


Tobii Dynavox I-110

Vejledningen Kom godt i gang




tobiidynavox

Kassens indhold

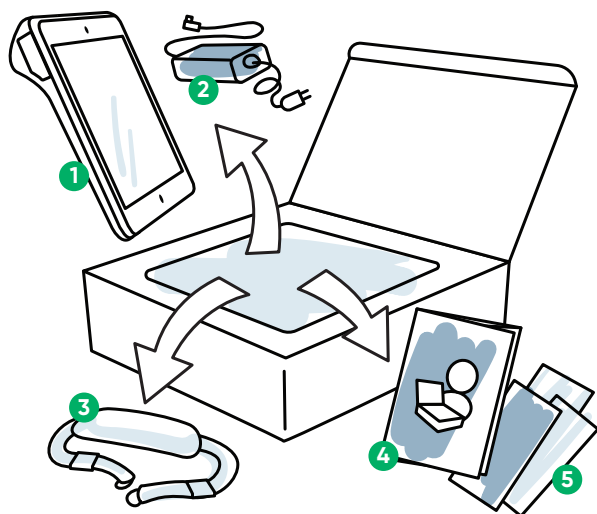


- 1 Enhed
- 2 Strømledning
- 3 Skulderrem
- 4 Vejledningen Kom godt i gang
- 5 Dokumenter om sikkerhed og standarder, licens og konfiguration


Lær din enhed at kende

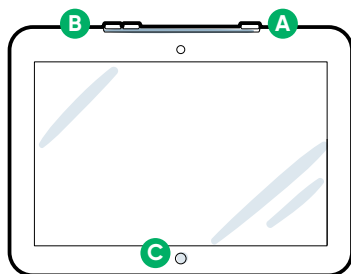

Forside

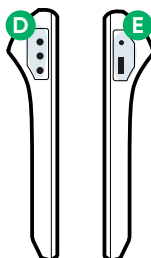

Sider

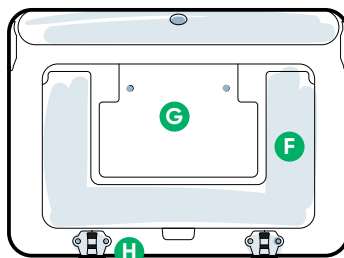

Tilbage

- A Tænd/sluk-knap
- B Knapper til lydstyrke
- C Startknap

- D Porte til lyd og kontakt
- E Strømskik og USB-porte

- F Fod
- G Fastgørelsespunkt
- H Fastgørelsespunkter til skulderrem

Følg disse tre trin for at konfigurere din nye I-110-enhed og gøre den klar til brug.

Trin 1: Førstegangskonfiguration

Start enheden


- 1 Slut strømkablet til enheden, og sæt stikket i en stikkontakt.
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen.



Konfiguration


Når du tænder din enhed, vises én af to skærme. Hvis din enhed ikke er konfigureret på forhånd, bliver du bedt om først at afslutte konfigurationen af Windows.

Konfiguration af Windows

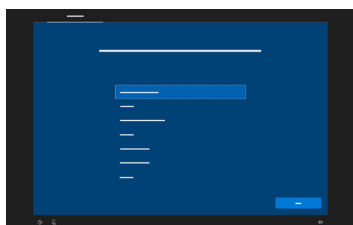

Konfigurationen kræver ikke en Microsoft-konto, men vi anbefaler, at du ikke bruger en medhjælperes konto men bruger en brugers konto eller opretter en konto.

Startguide: Vælg app

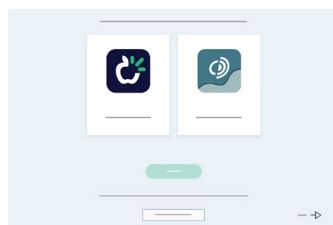

Vælg appen, der skal startes automatisk, når du tænder enheden.

Trin 2: Konfiguration af kommunikationssoftware



TD Snap

Symbolunderstøttede brugere

Guide til konfiguration af TD Snap

Følg anvisningerne for at oprette din nye bruger, eller gendan en gemt brugerfil.



Communicator 5

Tekstunderstøttede brugere

Guide til konfiguration af Communicator 5

Følg anvisningerne for at oprette din nye bruger.

Trin 3: Montering og placering

Enheden kan placeres ved hjælp af et monteringsystem, ligge fladt på en overflade eller støttes af den indbyggede støttefod. Start med at placere brugeren i en komfortabel stilling. Indstil derefter placeringen af enheden, så brugeren kan se skærmen klart og har nem adgang til sin ønskede valgmetode. Placer altid enheden, så den passer til brugeren, og ikke omvendt. Det kan blive nødvendigt at justere placeringen af enheden i løbet af dagen. Brug skulderremmen, når du skal transportere enheden sikkert.



Tips om adgangsmetoder til TD Snap



Adgangsmetoder til berøringsskærm

- Touch, Touch-enter og Touch-slip giver brugeren mulighed for at navigere og udføre valg på enhedens berøringsskærm.
- Hvis det er vanskeligt at bruge strygebevægelser eller vælge knapper, kan du overveje at skifte til adgangsmetoden Touch-enter eller Touch-slip.
- Der findes fingerguider til alle forudindstillede konfigurationer af gitterstørrelse.



Musedvæl

- Brug en hovedmus, en almindelig mus eller en joystick, der er sat i USB-porten på din enhed, til at navigere.
- Brug musen til at navigere rundt på skærmen. Vælg derefter ved at dvæle eller med en kontakt.
- Standardindstillingerne for en mus kan være vanskelige for nogle personer. Du kan overveje en speciel mus, fx en trackball, en trådløs mus eller en joystick.



Scanning

- Vælg sidesættet til scanning i guiden til konfiguration af TD. Siderne heri er designet til at øge effektiviteten.
- Opret et nyt sidesæt, hvis du ikke valgte sidesættet til scanning under konfigurationen:
 - 1 Vælg **Redigér**.
 - 2 Vælg fanen **Sidesæt**.
 - 3 Vælg det aktuelle sidesæt.
 - 4 Vælg **Opret sidesæt**.
 - 5 Vælg **Sidesæt til scanning til Core First**, og vælg **Næste**.
 - 6 Vælg **Opret**.
 - 7 Vælg **Scanning til Core First** for at indlæse sidesættet.
- Download implementeringsvejledningen til scanning med oplysninger og idéer til undervisning i brugen af scanning.



Aktivér Fremhævning eller Feedbacklyd ved valg.

Vi er her for at hjælpe



myTobiiDynavox

Brug din gratis konto til at synkronisere og dele sidesæt, gemme sikkerhedskopier og meget mere! Besøg:

www.myTobiiDynavox.com



Undervisningscenter

Tobii Dynavoxs undervisningscenter:

learn.tobiidynavox.com



Undervisningsmaterialer

Brugervejledning:

<https://qrco.de/I-110manual>

Undervisningskort til Communicator 5:

<https://qrco.de/C5Cards>

Undervisningskort til TD Snap Core First:

<https://qrco.de/TDSnapCards>

Implementeringsvejledning til scanning i TD Snap: **<https://qrco.de/ScanGuide>**



Yderligere support

Community:

<https://qrco.de/TDFB>

For teknisk support, bedes du kontakte din lokale Tobii Dynavox-repræsentant.

Få flere
oplysninger:



qrco.de/I-110Support

Få flere
oplysninger om
adgangsmetoder:



qrco.de/bbFvk6

