


# Tobii Dynavox I-110

## 入门指南




**tobii**dynavox

# 装箱清单

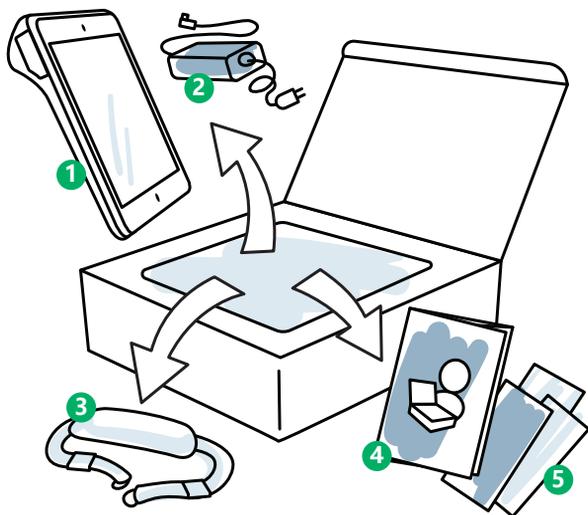


- 1 设备
- 2 电源线
- 3 肩带
- 4 入门指南
- 5 安全与合规、许可证与配置文档


# 了解您的设备

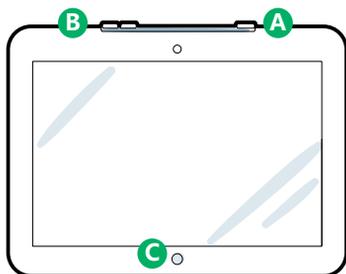

正面

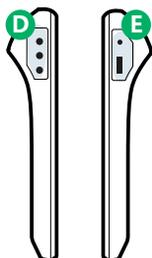

侧面

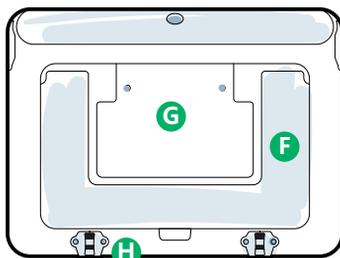

后退

- |        |                |         |
|--------|----------------|---------|
| A 电源按钮 | D 音频与外置按钮端口    | F 桌面支架  |
| B 音量按钮 | E 电源接口与 USB 端口 | G 安装位置  |
| C 主页按钮 |                | H 背带连接处 |

请遵循本指南中的三个步骤，以设置您的新 I-110 设备，使其准备就绪。

## 步骤 1：初始设置

### 启动设备


- 1 将电源线连接至设备，并插入插座内。
- 2 按下电源按钮。




### 设置

打开设备时，您将看到两个屏幕中的一个。如果您的设备未预先配置，将提示您首先完成 Windows 设置过程。

#### Windows 设置

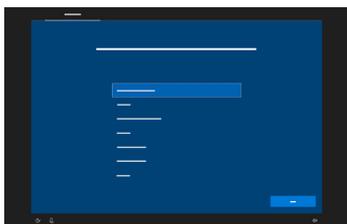

#### 启动向导：选择应用程序

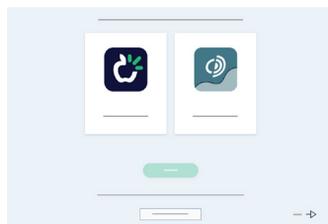

虽然此过程不需要 Microsoft 账户，但是我们建议您登陆或创建一个用户账户（不是看护人员的账户）。

选择当设备开启时将自动启动的应用程序。

## 步骤 2：沟通软件配置



### TD Snap

基于符号的沟通软件

#### TD Snap 设置向导

按照提示创建新用户，或者从已经保持的用户文件恢复。



### Communicator 5

基于文字的沟通软件

#### Communicator 5 设置向导

遵照提示创建新用户。

## 步骤 3：安装与位置摆放

可使用支架系统摆放设备，将其平放在表面，或者使用内置支架支撑。首先将用户置于舒适的位置，然后找到可使他们清晰地观看屏幕并且轻松访问其首选选择方法的设备位置。务必将设备放置在适合用户的位置，反之不然。一天当中可能需要改变设备的位置。连接肩带，以便于安全携带。



## TD Snap 访问方式提示



### 触摸屏访问方式

- 触摸、按住选中与松开选中模式允许用户利用设备上的触摸屏导航与选择。
- 如果难以滑动或选择按钮，应考虑将访问方式更改为按住选中或松开选中。
- 按键网格可用于所有预先设定的网格大小配置。



### 鼠标停留

- 使用头控鼠标、传统鼠标或者插在设备 USB 端口的操纵杆进行导航。
- 使用鼠标在屏幕上移动，然后使用停留或外置按钮进行选择。
- 标准型鼠标可能对于某些人而言比较困难。您可以考虑使用诸如轨迹球、无线鼠标与操纵杆之类的专业鼠标。



### 扫描

- 在设置向导中选择 TD Scanning 页面集。这些页面经过设计，可以提高效率。
- 如果您未在设置过程中选择 Scanning 页面集，可按下列步骤创建一个新页面集：
  - 1 选择“编辑”。
  - 2 选择“页面集”选项卡。
  - 3 选择当前页面集。
  - 4 选择 **创建页面集**，“选择页面集”对话框将被打开。
  - 5 选择“**Core First Scanning 页面集**”然后选择“下一步”。
  - 6 选择**创建**。
  - 7 选择 **Core First Scanning** 加载页面集。
- 下载 Scanning 实施指南，了解关于扫描技能教学的更多信息与思路。



如果个人需要试听反馈，请打开突出显示或选择反馈音。

# 我们在此为您服务



## myTobiiDynavox

您可以免费注册账户进行同步、页面集分享、备份存储以及更多操作！访问：  
[www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com)



## 学习中心

Tobii Dynavox 学习中心：  
[learn.tobiidynavox.com](http://learn.tobiidynavox.com)



## 培训材料

用户手册：  
<https://qrco.de/l-110manual>

Communicator 5 培训卡片：  
<https://qrco.de/C5Cards>

TD Snap Core First 培训卡片：  
<https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snap Text 培训卡片：  
<https://qrco.de/TextCards>

TD Snap Aphasia 培训卡片：  
<https://qrco.de/AphasiaCards>

TD Snap Scanning 实施指南：  
<https://qrco.de/ScanGuide>



## 服务与支持

中国技术支持：  
0512-69362880

了解更多信息：



[qrco.de/l-110Support](http://qrco.de/l-110Support)

关于访问方式的更多  
信息，请参阅：



[qrco.de/bbJ64t](http://qrco.de/bbJ64t)

