



Tobii Dynavox I-Series

Startanleitung

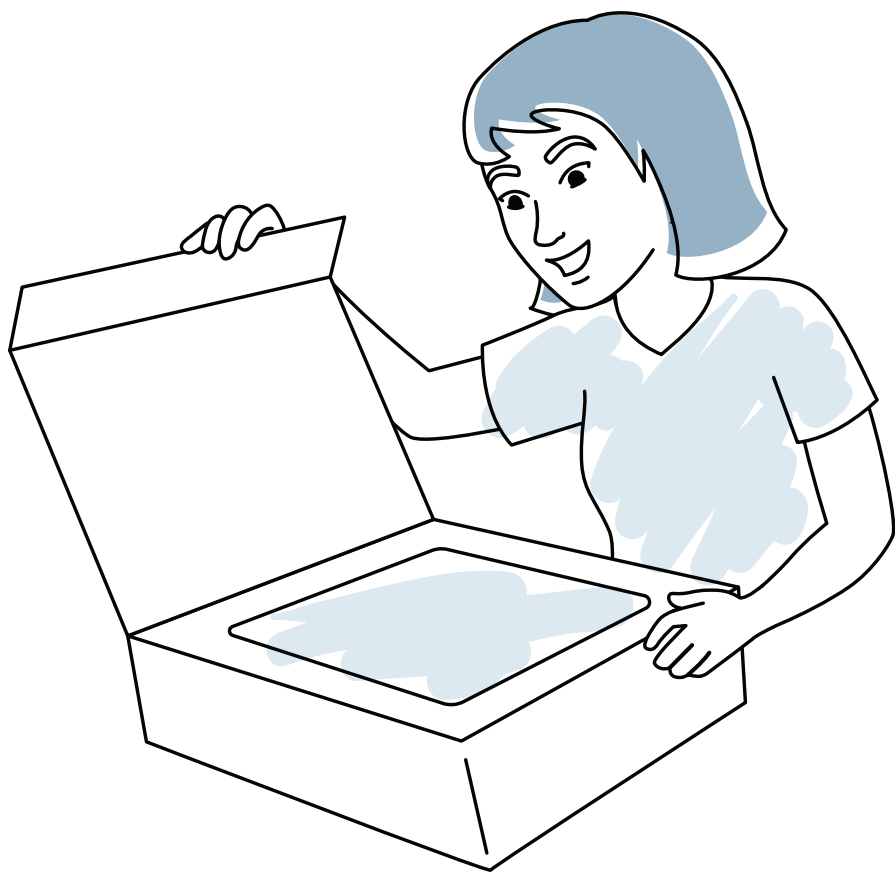


tobiidynavox

Was ist im Lieferumfang enthalten?

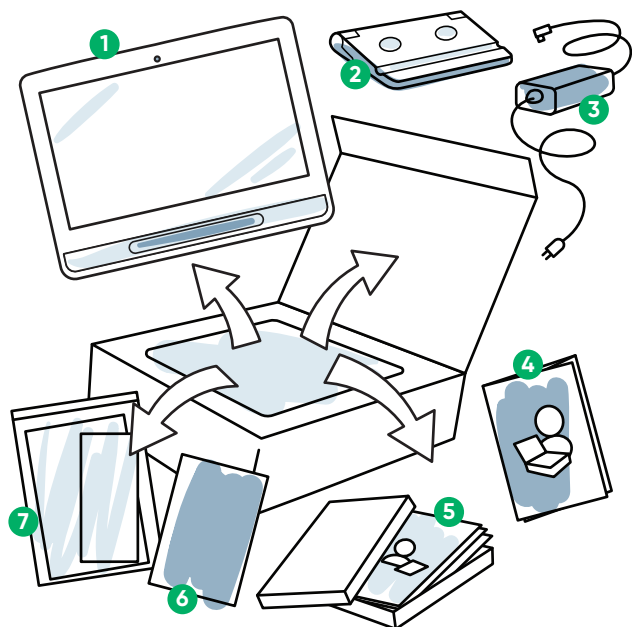


- 1 Gerät
- 2 Aufstellfuß
- 3 USB-Netzteil
- 4 Startanleitung
- 5 Lernkarten
- 6 Sicherheits- und Zertifizierungsbroschüre
- 7 Tasche mit Dokumenten


Das Gerät kennenlernen

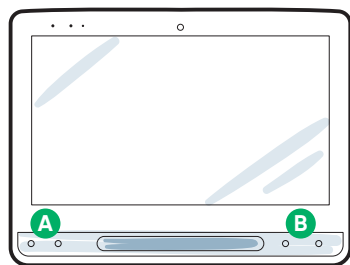

Vorderseite

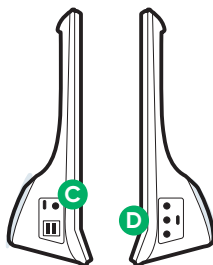

Seite

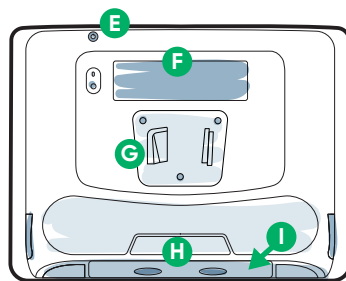

Rückseite

A Lernfähige Felder

B Lautstärketasten

C Stromanschluss

D Tastaturanschlüsse/
Kopfhöreranschluss

E Netzschalter

F Partnerfenster

G Adapterplatte*

H IR-Empfänger/-
Sender

I Batteriezugang**

* Mit einer Daessy-Halterung benötigen Sie eine Adapterplatte.


** Die Batterie befindet sich an der Unterseite des Geräts.

Einfach die vier Schritte in dieser Anleitung befolgen und schon ist Ihr neues I-Series-Gerät eingerichtet und einsatzbereit.

1. Schritt: Ersteinrichtung

Das Gerät einschalten


- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- 2 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

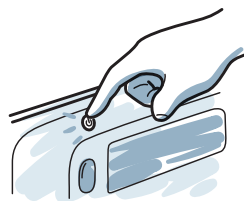

Einrichtung

Wenn Sie das Gerät einschalten, sehen Sie einen von zwei Bildschirmen. Wenn Ihr Gerät nicht vorkonfiguriert wurde, werden Sie aufgefordert, zunächst die Einrichtung von Windows abzuschließen.

Einrichtung von Windows

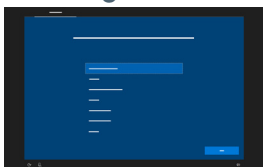

Dieser Vorgang ist zwar auch ohne Microsoft-Konto möglich, doch wir empfehlen, dass Sie sich mit einem Benutzerkonto anmelden oder eines erstellen, anstatt das Konto eines Betreuers zu verwenden.

Startassistent: App aussuchen



Wählen Sie, welche App beim Einschalten des Geräts automatisch gestartet werden soll.

2. Schritt: Kommunikationssoftware konfigurieren

Befolgen Sie die Anweisungen in der von Ihnen gewählten Software, um einen neuen Benutzer zu erstellen oder stellen Sie eine bereits vorhandene Benutzerdatei wieder her.



TD Snap

Symbolgestützte
Kommunikation



Communicator 5

Textgestützte
Kommunikation



Die Kalibrierung für die Augensteuerung (Gaze Interaction) darf erst durchgeführt werden, wenn das Gerät montiert ist und die Person bequem positioniert ist. Siehe den 3. Schritt für Tipps zur Montage und Positionierung.

3. Schritt: Montage und Positionierung

Sowohl das Gerät als auch der Benutzer sollten in die optimale Position gebracht werden. Montieren Sie das Gerät an einem Halterungssystem oder stellen Sie es (mithilfe des Aufstellfußes) auf einen Tisch.



Tipps zur Montage und Positionierung

- Stellen Sie sicher, dass die Person bequem positioniert ist. Stellen Sie die Halterung und das Gerät auf die Person ein, nicht umgekehrt.
- Öffnen Sie das Fenster „Trackstatus“, um die Augenposition zu überprüfen. Richten Sie das Gerät so aus, dass die Person den Bildschirm gut sehen kann und seine Augen sich im Trackstatus-Fenster befinden.

Um „Trackstatus“ am Gerät zu starten:

Berühren Sie das lernfähige Feld  an der Vorderseite des Geräts.

- Bewegen Sie das Gerät näher an die Person heran oder weiter von ihm fort, bis sich das Dreieck im grünen Bereich des Fensters „Trackstatus“ befindet.
- Wenn der Kopf der Person nach links oder rechts geneigt ist, muss das Gerät ebenfalls entsprechend geneigt werden.
- Wenn sich die Person in einer zurückgelehnten Position befindet, z. B. im Bett, kann das Gerät mit einem Montagesystem, z. B. einem Bodenstativ, über ihr montiert werden.
- Richten Sie den Bildschirm so aus, dass der Benutzer gerade auf ihn schaut und nicht nach oben oder unten. Höher ist besser als tiefer.
- Bei der Kalibrierung werden die Augen des Benutzers kalibriert, nicht die Position des Benutzers. Anstatt neu zu kalibrieren, stellen Sie das Gerät neu auf, wenn sich die Position des Benutzers ändert.

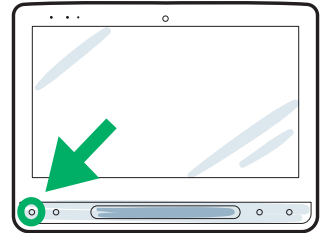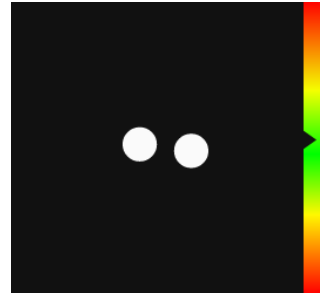

4. Schritt: Kalibrieren

Effektives Eyetracking ist auch möglich, wenn Sie nicht die perfekte Kalibrierung erzielen. Wenn Sie erst damit anfangen, starten Sie einmal die Kalibrierung, ohne sich allzu viele Gedanken über die Ergebnisse zu machen, und lassen Sie die Person dann die Blicksteuerung üben. Später können Sie immer noch erneut kalibrieren.




Sie müssen nicht bei jeder Verwendung des Geräts kalibrieren.

Um in TD Snap zu kalibrieren:

- 1 Klicken Sie auf das Feld **Bearbeiten**.




- 2 Wählen Sie **Benutzer** aus.

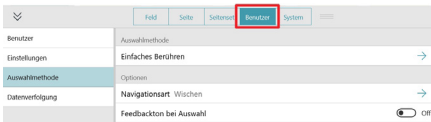


- 3 Wählen Sie **Auswahlmethode** aus.

- 4 Wählen Sie **Blicksteuerung** aus.

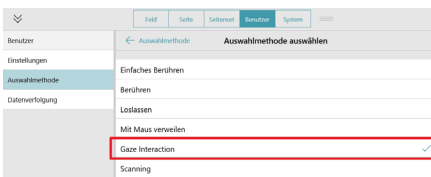

- 5 Scrollen Sie nach unten und wählen Sie **Kalibrieren** aus.

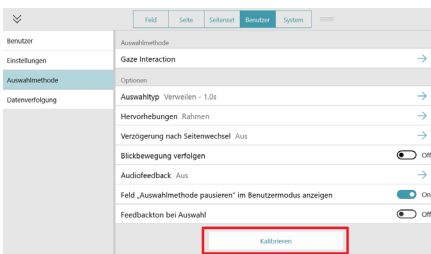

Um in Communicator 5 zu kalibrieren:

- 1 Öffnen Sie das **Schnellmenü**.

Zum Öffnen des Schnellmenüs drücken Sie Strg + M auf Ihrer Tastatur, rechtsklicken Sie mit Ihrer Maus oder berühren Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms, halten Sie sie gedrückt und lassen Sie sie dann los.



- 2 Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**.



- 3 Wählen Sie **Eingabemethode** aus und bestätigen Sie das Gaze Interaction ausgewählt ist.



- 4 Wählen Sie **Einstellungen für Gaze Interaction**. Sie können hier die Aktivierungsmethode zwischen „Blick“ und „Blick und Taster“ ändern, Kalibrierungsprofile ändern und eine neue Kalibrierung starten.



Wir helfen Ihnen gerne



myTobiiDynavox

Mit dem kostenlosen Konto Synchronisierungen vornehmen, Seitensets teilen, Backups speichern und vieles mehr! Besuchen Sie www.myTobiiDynavox.com



Schulungsmaterialien

Benutzerhandbuch:
<https://qrco.de/ISManual>

Lernkarten für Communicator 5:
<https://qrco.de/C5Cards>

Lernkarten für TD Snap Core First:
<https://qrco.de/TDSnapCards>

Lernkarten für TD Snap Text:
<https://qrco.de/TextCards>

Lernkarten für TD Snap Aphasie:
<https://qrco.de/AphasiaCards>



Zusätzlicher Support

Community:
<https://qrco.de/TDFB>

Technischen Support erhalten Sie von Ihrem Tobii Dynavox-Händler vor Ort.

Weitere
Informationen zum
Einrichtungsvorgang:



qrco.de/bbBdN3