

Tobii Dynavox Mobile Mini

Bruksanvisning



Bruksanvisning Tobii Dynavox Mobile Mini

Utgåva 1.0

08/2021

Alla rättigheter förbehålles.

Copyright © Tobii AB (publ)

Ingen del av detta dokument får reproduceras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt) utan föregående skriftligt medgivande från utgivaren.

Upphovsrättsskyddet omfattar alla former och typer av upphovsrättsligt material och information som tillåts av lagstadgad eller rättslig lag eller som herefter beviljas, inklusive, utan begränsning, material som genererats av programvara som visas på skärmen så som skärmbilder, menyer, osv.

Informationen i det här dokumentet tillhör Tobii Dynavox. All kopiering av hela eller delar av materialet utan föregående skriftligt tillåtelse från Tobii Dynavox är förbjuden.

Produkter som det här dokumentet hänvisar till kan vara varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. Utgivaren och upphovsmannen gör inga anspråk på dessa varumärken.

Största möda har lagts ned på arbetet med det här dokumentet. Utgivaren och upphovsmannen friskriver sig dock från allt ansvar för fel eller utelämnad information, eller för skador till följd av hur informationen i detta dokument, eller de program och den källkod som kan medfölja dokumentet, används. Utgivaren och författaren ska på inget sätt kunna hållas skadeskyldiga för eventuell inkomstförlust eller kommersiell skada som direkt eller indirekt har orsakats av, eller har påståtts orsakats av, detta dokument.

Innehållet kan ändras utan föregående meddelande.

Uppdaterade versioner av detta dokument finns på Tobii's webbplats för Dynavox

www.TobiiDynavox.com.

Kontaktinformation:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sverige

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
United Kingdom

+46 8 663 69 90

Tobii Electronics Technology Suzhou Co. Ltd
Room 401, Building 6, No. 5 Xing Han Street Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880

- Mobile Mini Enhets-ID: 7340074601929



Innehållsförteckning

1	Introduktion	5
1.1	Förklaring av förmaningar	5
1.2	Symboler och märkning	5
1.3	Användningsområde	6
1.4	Förpackningens innehåll	6
2	Säkerhet	7
2.1	Förebygga hörselskador	7
2.2	Strömförsörjning och batterier	7
2.3	Temperatur	8
2.4	Montering	8
2.5	Nödsituationer	8
2.6	Elektricitet	9
2.7	Barnsäkerhet	9
2.8	Tredje part	9
3	Översikt av Mobile Mini	10
3.1	Huvudfunktioner	10
3.2	Produktbeskrivning	11
3.2.1	Portar och knappar	11
3.3	Förinstallerad inbyggd programvara	12
4	Batterier i Mobile Mini	13
4.1	Batterier	13
4.2	Ladda Mobile Mini	13
5	Använda Mobile Mini	14
5.1	Starta enheten	14
5.2	Batteristatus och batterianvändning	14
5.3	Justera volymen	14
5.4	Justera ljudet	14
5.5	iPad	14
6	Produktvård	15
6.1	Temperatur och luftfuktighet	15
6.1.1	Allmän användning - driftstemperatur	15
6.1.2	Transport och lagring	15
6.1.3	Laddar	15
6.2	Rengöra Mobile Mini-enheten	15
6.3	Placering	15
6.4	Transportera Mobile Mini	15
6.5	Kassera Mobile Mini-enheten	16
6.6	Kassera batterierna	16
Bilaga A	Support, Garanti, Utbildningsresurser	17
A1	Kundtjänst	17
A2	Garanti	17
A3	Utbildningsmaterial	17
Bilaga B	Information om överensstämmelse	18
B1	CE-deklaration	18
B2	Direktiv och standarder	18

Bilaga C	Tekniska specifikationer	19
C1	Mobile Mini	19
C2	Nätadapter	19
Bilaga D	Godkända tillbehör	20

1 Introduktion

Tack för att du har valt en Mobile Mini från Tobii Dynavox!

För att säkerställa att den här produkten fungerar optimalt bör du läsa igenom den här användarmanualen noggrant.

Tobii Dynavox Mobile Mini är en talgenererande enhet (SGD) för personer som har nedsatt förmåga att tala på grund av skador, funktionsnedsättningar eller sjukdom.



Läs och följ all information om säkerhet, garanti och bestämmelser som tillhandahålls av Apple gällande den iPad® som inkluderas i Mobile Mini.

1.1 Förklaring av förmaningar

I denna användarmanual använder vi fem (5) förmaningsnivåer enligt följande:



OBS-symbolen används för att meddela användaren om någonting som är viktigt eller kräver särskild uppmärksamhet.



Försiktighetssymbolen används för att informera om någonting som skulle kunna skada utrustningen eller få den att fungera felaktigt.



Varningssymbolen används för att informera om någonting där det finns en tänkbar risk för att användaren skulle kunna skadas om varningen ignoreras.



Symbolen för hög volym används för att informera om någonting som kan orsaka hörselskador.



Symbolen för hög temperatur används för att informera om ytemperaturer som kan orsaka skada eller obehag.

1.2 Symboler och märkning

Detta avsnitt innehåller information om de symboler som används på Mobile Mini, dess tillbehör eller förpackning.

Symboler eller märkning	Beskrivning
	Säkerhetsklass II dubbelisolerad utrustning.
IP22	Kapslingsklassning IEC 60529
	Sortera i enlighet med ditt lands lagar.
CE	CE är en förkortning för Europeiska gemenskaperna och detta märke visar tulltjänstemän i Europeiska unionen att produkten överensstämmer med ett eller flera av EG-direktiven.
	Den nya effektivitetsstandarden DOE Nivå VI kräver att belastningsfri strömförbrukning inte överstiger 0,100 W för EPS inom ett intervall på <1 W till ≤ 49 W och inte överstiger 0,210W för EPS >49 W till ≤250 W.
	Australian Electrical Equipment Safety System Regulatory Compliance-märkning.

1.3 Användningsområde

Tobii Dynavox Mobile Mini är en talgenererande enhet (SGD) för personer som har nedsatt förmåga att tala på grund av skador, funktionsnedsättningar eller sjukdom.

Tobii Dynavox Mobile Mini är en medicinsk klass 1-enhet.



KONTRAINDIKATIONER: Mobile Mini-enheten är inte livsuppehållande.

Om Mobile Mini fungerar felaktigt kanske inte användaren kan kommunicera med hjälp av den.



Främst avsedd att användas inomhus.

1.4 Förpackningens innehåll



Det rekommenderas att du behåller originalförpackningen till Mobile Mini.

Om enheten behöver returneras till Tobii Dynavox för garantirelaterade ärenden eller reparation är det bra om den skickas i originalförpackningen eller motsvarande. De flesta transportföretag kräver minst 5 cm förpackningsmaterial runt enheten.

Obs: P.g.a. gemensamma kommissionsförfordningar måste allt fraktmateriel, inklusive lådor, som skickas till Tobii Dynavox kasseras.

Mobile Mini-paketet innehåller följande:

- 1 iPad mini 5 Wi-Fi 64 GB-
- 1 robust xCase för iPad Mini 7,9 tum
- 1 Lightning- till USB-kabel
- 1 USB-nätadapter
- 1 tygväska
- 1 Användarmanual-dokument (PDF på enheten)
- 1 Snabbstartsguide (tryckt)
- 1 Garantidokument (tryckt)

2 Säkerhet

Mobile Mini-enheten har testats och godkänts som överensstämmande med alla specifikationer och standarder som anges i *Bilaga B Information om överensstämmelse, sida 18* i denna handbok och i *Bilaga C Tekniska specifikationer, sida 19*. I syfte att garantera en säker användning av Mobile Mini finns det emellertid några säkerhetsvarningar som bör observeras:



Utrustningen får inte modifieras.



Användaren får aldrig försöka att byta batteri. Ändringar av batteriet kan orsaka risk för explosion.



Mobile Mini får inte användas som en livsuppehållande enhet och man ska inte förlita sig på den ifall den inte fungerar på grund av strömbrott eller andra orsaker.



Det kan finnas risk för kvävning om smådelar lossnar från Mobile Mini-enheten.



Bärremmen och laddningskabeln kan utgöra en strypningsrisk för små barn. Lämna aldrig små barn oövervakade med bärremmen eller laddningskabeln.



Mobile Mini-enheten får inte utsättas för eller användas i regn eller väderförhållanden som ligger utanför de tekniska specifikationerna för Mobile Mini-enheten.



Små barn eller personer med kognitiva funktionshinder bör inte ha tillgång till eller använda Mobile Mini-enheten såvida det inte sker under en förälders eller annan vuxens överinseende.



Mobile Mini-enheten ska användas försiktigt när du rör dig.

2.1 Förebygga hörselskador



Permanent hörselnedsättning kan uppstå om öronsnäckor, hörlurar eller högtalare används på hög volym. För att förhindra detta bör volymen vara inställd på en säker nivå. Med tiden kan din känslighet för höga ljudnivåer försämrats på så sätt att höga ljudnivåer upplevs acceptabla trots att de kan skada örat. Om du upplever symptom som ringningar i öronen bör du sänka volymen eller sluta använda öronsnäckor/hörlurar. Ju högre volym, desto mindre tid krävs innan hörseln kan påverkas.

Hörselexperter rekommenderar följande åtgärder för att skydda hörseln:

- Begränsa den tid du använder öronsnäckor eller hörlurar på hög volym.
- Vrid inte upp volymen för att stänga ute omgivande ljud.
- Sänk volymen om du inte hör människor som pratar i din närhet.

Så här fastställer du en säker volymnivå:

- Ställ in volymen på en låg nivå.
- Höj ljudet långsamt tills du hör det tydligt och det känns behagligt, utan förvrängning.

2.2 Strömförsörjning och batterier



Strömkällan måste uppfylla kraven i SELV-standard, Säkerhet vid extra låg spänning, och tillföra en märkspänning som uppfyller kraven i Begränsad strömkälla i enlighet med IEC60950-1.



Mobile Mini-enheten har ett uppladdningsbart batteri. Alla uppladdningsbara batterier försämrats med tiden. Således kan den potentiella användningstiden för Mobile Mini efter en full laddning bli kortare med tiden än när enheten var ny.



Mobile Mini-enheten använder litumpolymerbatterier.

Var medveten om att ifall du befinner dig i en varm miljö kan det påverka möjligheten att ladda batteriet. Den interna temperaturen ska ligga mellan 0 °C och 45 °C för att batteriet ska kunna laddas. Om den interna batteritemperaturen ligger över 45 °C/113 °F kommer batteriet inte att kunna laddas.

Flytta Mobile Mini-enheten till ett svalare ställe för att ladda batteriet.



Utsätt inte Mobile Mini-enheten för eld eller temperaturer över 60 °C. Det kan leda till att batteriet slutar fungera, genererar värme, antänds eller exploderar. Observera att temperaturen i extrema fall kan överstiga de gränser som anges ovan, exempelvis i bagageutrymmet på en bil en varm dag. Så att förvara Mobile Mini-enheten i en varm bagagelucka kan med andra ord leda till funktionsfel.



Ladda endast Mobile Mini-batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 0 °C/32 °F till 35 °C/95 °F.



Använd endast den medföljande nätadaptern för att ladda Mobile Mini enheten. Användning av otillåtna nätadapttrar kan allvarligt skada Mobile Mini-enheten.



För att Mobile Mini-enheten ska kunna användas på ett säkert sätt får endast laddare och tillbehör som godkänts av Tobii Dynavox användas.



Öppna eller modifiera inte Mobile Mini-enhetens eller strömförsörjningsenhetens hölje, eftersom du kan utsättas för potentiellt farlig elektrisk spänning. Enheten innehåller inga delar som kräver underhåll. Om Mobile Mini-enheten eller tillhörande kringutrustning har utsatts för mekanisk skada **ska du inte använda dem**.



Om batteriet inte är laddat och Mobile Mini inte är ansluten till strömförsörjningsenheten kommer Mobile Mini-enheten att stängas av.



Om nätsladden är skadad måste den bytas ut. Använd inte nätsladden förrän den bytts ut.



Dra ur adaptrens nätkontakt ur vägguttaget när enheten inte laddas och dra ur nätsladden ur enheten.



Särskilda regler gäller vid frakt av enheter som innehåller litumpolymerbatterier. Om batterierna tappas, krossas eller kortsluts kan de avge en farligt hög värme, antändas och är farliga i bränder.

Hänvisa till IATA:s regelverk när du skickar litiummetall eller litiumjonbatterier eller celler: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dangerous_goods/Pages/lithium_batteries.aspx



Nätadapttrarna får inte användas utan tillsyn från vuxen eller en vårdare.

2.3 Temperatur



Om den används i direkt solljus eller andra varma miljöer kan Mobile Mini-enhetens ytor bli varma.

2.4 Montering



Mobile Mini ska monteras enligt TILLVERKARENS anvisningar och med godkända monteringsbeslag eller fästen. Tobii Dynavox eller dess ombud ansvarar inte för skador på person eller egendom till följd av att en Mobile Mini faller från monterad position. Montering av en Mobile Mini sker helt på användarens egen risk.

2.5 Nödsituationer



Förlita dig inte på Mobile Mini-enheten för nödsamtal. Vi rekommenderar att du har flera olika kommunikationskanaler vid en eventuell nödsituation.

2.6 Elektricitet



Öppna inte Mobile Mini-enhetens hölje eftersom du kan utsättas för potentiellt farlig elektrisk spänning. Enheten innehåller inga delar som användaren kan underhålla.

2.7 Barnsäkerhet



Mobile Mini är ett avancerat datorsystem och en avancerad elektronisk apparat. Som sådana består de av många separata, sammanfogade delar. I händerna på ett barn kan vissa av dessa delar skiljas från enheten och eventuellt utgöra en kvävningsrisk eller annan fara för barnet.

Små barn bör inte ha tillgång till eller använda enheten om det inte sker under en förälders eller annan vuxens överinseende.

2.8 Tredje part



Om Mobile Mini används på andra sätt än den ändamålsenliga användningen och tillsammans med programvara eller maskinvara från tredje part så att användningen förändras innebär detta risker och Tobii Dynavox ansvarar inte för följderna.

3 Översikt av Mobile Mini


3.1 Huvudfunktioner

Mobile Mini har flera inbyggda funktioner.

- Högtalare
- Mikrofon
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Bluetooth 5.0

3.2 Produktbeskrivning

3.2.1 Portar och knappar

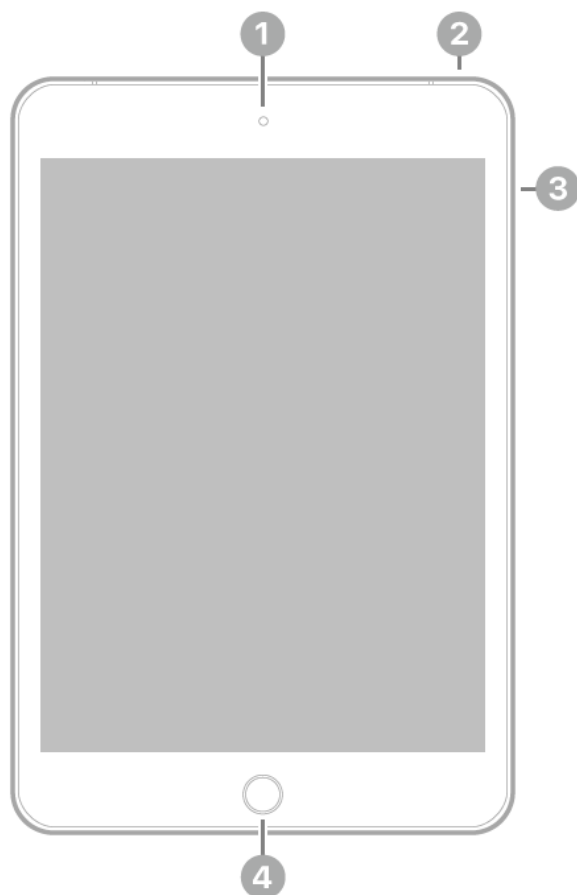

Figur 3.1 Vy av framsida och ovansida

Placering	Beskrivning
1	Framåtvänd kamera
2	Knapp på ovansida
3	Volymknappar
4	Startsideknapp/Touch ID



Figur 3.2 Vy av sidorna

Placering	Beskrivning
5	Bakåtvänd kamera
6	Hörlursuttag
7	Lightning-anslutning
8	Högtalare



Tvinga aldrig in en kontakt i ett uttag. Om kontakten inte kan sättas in i uttaget relativt lätt passar de förmodligen inte ihop. Kontrollera att kontakten matchar uttaget och att du har placerat kontakten rätt i förhållande till uttaget.

3.3 Förinstallerad inbyggd programvara

Den här Mobile Mini-enheten levereras med all nödvändig inbyggd programvara installerad och klar att använda.

4 Batterier i Mobile Mini

4.1 Batterier

Mobile Mini innehåller ett batteri. Batteriet kan laddas med den medföljande USB-laddningskontakten. Om batteriet inte är laddat eller om Mobile Mini inte strömsatts av strömförsörjningsenheten kommer Mobile Mini att stängas av.

4.2 Ladda Mobile Mini

1. Anslut nätsladden till Mobile Minis laddningsport.
2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.
3. Ladda Mobile Mini tills batteriet är fulladdat.
4. Koppla bort laddaren både från enheten och nätuttaget när din Mobile Mini är helt laddad.



Det **går inte** att ladda batteriet för mycket. Det går bra att ladda batteriet över natten.

Du **kan** använda Mobile Mini-enheten när batteriet laddas.



På grund av kemiska reaktioner i batteriet kan dess prestanda försämrats med tiden. Det finns risk för att den förväntade batteritiden förkortas eller att Mobile Mini-enheten skadas om inte användningsvillkoren uppfylls (exempelvis laddning, urladdning och omgivningstemperatur). Om batteriets laddning minskar för snabbt, trots att det är korrekt laddat, kan det behöva bytas ut.

Batteriet kan behöva bytas ut efter 12 till 18 månader av normal användning. Försök inte byta ut batteriet själv. Batteriet är internt och det är inte avsett att underhållas eller bytas ut av någon annan än en Tobii Dynavox tekniker.

Information om batteriernas förvarings- och laddningstemperaturer finns i *2.2 Strömförsörjning och batterier, sida 7*.

5 Använda Mobile Mini

5.1 Starta enheten

1. Följ instruktionerna i: <https://support.apple.com/sv-se/guide/ipad/ipad995bb83d/14.0/ipados/14.0>.

5.2 Batteristatus och batterianvändning

Batteristatusen för Mobile Mini övervakas via din kopplade iPad®.

1. Följ instruktionerna i: <https://support.apple.com/sv-se/guide/ipad/ipad997da965/14.0/ipados/14.0><https://support.apple.com/nb-NO/guide/ipad/ipad995bb83d/14.0/ipados/14.0>.



Batteristatusen för Mobile Mini visas i steg på 10 %. När batteriet når 10 % ska Mobile Mini anslutas till en strömkälla, annars kommer den att stängas ner inom kort.

Inställningarna för strömsparläge i Mobile Mini är förinställda för att optimera batteritiden. Mobile Mini är gjord för att alltid vara på.

5.3 Justera volymen

Justera volymen med hjälp av volymknapparna (placering 3 i *Figur 3.1 Vy av framsida och ovansida, sida 11*) på Mobile Mini.



Volymen kan också justeras i TD Snap® eller iOS-programvaran i din iPad.

5.4 Justera ljudet

Högtalarna kan konfigureras via **iOS-inställningar > Musik > EQ**.



Mobile Mini har ett hål som gör det möjligt att använda iPads inbyggda mikrofon för ljudutmatning. Under vissa omständigheter kan skalet orsaka störningar för ingående ljud. Ta tillfälligt ut din iPad ur skalet eller anslut en extern mikrofon till iPaden för att uppnå bästa möjliga kvalitet på ingående ljud.

5.5 iPad

Information om att använda iOS på iPaden finns på: <https://support.apple.com/sv-se/guide/ipad/welcome/ipados>

6 Produktvård

6.1 Temperatur och luftfuktighet

6.1.1 Allmän användning - driftstemperatur

Mobile Mini bör förvaras i en torr miljö i rumstemperatur. Rekommenderat temperaturområde och luftfuktighetsvärde för enheten är följande:

- Omgivningstemperatur: 0°C till 35°C
- Relativ fuktighet: 5% till 95% (ingen kondens på enheten)
- Maximal driftshöjd: 3000 m (10 000 fot)

6.1.2 Transport och lagring

Vid transport och lagring är rekommenderat temperaturområde och luftfuktighetsvärde för enheten följande:

- Temperatur: -20°C till 45°C
- Relativ fuktighet: 5% till 95% (ingen kondens på enheten)

Mobile Mini är varken vattentät eller vattentålig. Enheten bör inte förvaras under mycket fuktiga eller på annat sätt våta förhållanden. Doppa inte enheten i vatten eller i någon annan vätska. Se till att inte spilla vätska på enheten, särskilt vid kontakterna.

6.1.3 Laddar

Rekommenderat intervall för temperatur och luftfuktighet för enheten är följande:

- Temperatur: 0°C till 35°C
- Relativ fuktighet: 5% till 95% (ingen kondens på enheten)

6.2 Rengöra Mobile Mini-enheten

1. Stäng av enheten helt innan den rengörs.
2. Dra ur enhetens kontakt.
3. Avlägsna alla kablar.
4. Torka av alla externa ytor med rengöringsduk av sjukhuskvalitet eller motsvarande desinfektionsduk för infektionskontroll.
5. Låt enheten lufttorka.
6. Alla tillbehör måste också rengöras på samma sätt.
7. Om rengöringen efterlämnar streck kan skärmen putsas med en mjuk torr trasa.
8. Kassera använt rengöringsmaterial på rätt sätt.



Använd inte sprayprodukter direkt på enheten eftersom det kan göra den våt och släppa in fukt i den.

6.3 Placering

Använd endast de fästen som rekommenderats av din lokala återförsäljare eller försäljningsrepresentant och kontrollera att de är korrekt monterade och fastsatta i enlighet med anvisningarna. Placera inte enheten på instabila och/eller ojämna underlag.

6.4 Transportera Mobile Mini

Dra ur alla kablar från Mobile Mini när du bär enheten.



Det rekommenderas att du behåller originalförpackningen till Mobile Mini.

Om enheten behöver returneras till Tobii Dynavox för garantirelaterade ärenden eller reparation är det bra om den skickas i originalförpackningen eller motsvarande. De flesta transportföretag kräver minst 5 cm förpackningsmaterial runt enheten.

Obs: P.g.a. gemensamma kommissionsförfordningar måste allt fraktmateriel, inklusive lådor, som skickas till Tobii Dynavox kasseras.

6.5 Kassera Mobile Mini-enheten

Släng inte Mobile Mini-enheten bland vanligt hushålls- eller kontorsavfall. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av elektrisk eller elektronisk utrustning.

6.6 Kassera batterierna

Lägg inte batterierna bland vanligt hushålls- eller kontorsavfall. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av batterier.

Bilaga A Support, Garanti, Utbildningsresurser

A1 Kundtjänst

Om du behöver hjälp kan du kontakta din lokala återförsäljare eller supporten på Tobii Dynavox. För att du ska få hjälp så snabbt som möjligt bör du ha din Mobile Mini-enhet tillgänglig samt, om möjligt, vara ansluten till internet. Du ska också kunna uppge enhetens serienummer. Detta står på baksidan av enheten.

Ytterligare produktinformation och andra supportresurser finns på Tobii Dynavox-hemsidan www.tobiidynavox.com.

A2 Garanti

Läs Manufacturer's Warranty som finns inkluderad i paketet.



iPads som köps tillsammans med Mobile Mini omfattas inte av den här tillverkarens garanti



Tobii Dynavox garanterar inte att programvaran i Mobile Mini uppfyller dina krav, att driften av programvaran kommer att vara oavbruten eller felfri eller att alla programvarufel kommer att åtgärdas.



Tobii Dynavox garanterar inte att Mobile Mini uppfyller kundens krav, att driften av Mobile Mini kommer att vara oavbruten eller att Mobile Mini är fri från fel eller andra defekter. Kunden accepterar att Mobile Mini inte fungerar för alla användare och i alla ljusförhållanden.

Läs denna användarmanualen noggrant innan du använder enheten. Garantin är bara giltig om enheten används i enlighet med användarhandboken. Om du demonterar Mobile Mini-enheten upphör garantin att gälla.



Det rekommenderas att du behåller originalförpackningen till Mobile Mini.

Om enheten behöver returneras till Tobii Dynavox för garantirelaterade ärenden eller reparation är det bra om den skickas i originalförpackningen eller motsvarande. De flesta transportföretag kräver minst 5 cm förpackningsmaterial runt enheten.

Obs: P.g.a. gemensamma kommissionsförfordningar måste allt fraktmateriel, inklusive lådor, som skickas till Tobii Dynavox kasseras.

A3 Utbildningsmaterial

Tobii Dynavox tillhandahåller ett omfattande utbildningsmaterial för Mobile Mini-produkterna och relaterade kommunikationsprodukter. Du finner dem på www.tobiidynavox.com

Bilaga B Information om överensstämmelse

B1 CE-deklaration

Denna utrustning överensstämmer med Radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU för att uppfylla kraven gällande terminalutrustning för radio- och telekommunikation.

B2 Direktiv och standarder

Mobile Mini uppfyller följande direktiv:

- Medicindirektivet (MDR) 2017/745/EU
- Radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU
- RoHS2-direktivet 2011/65/EU
- WEEE-direktivet 2012/19/EU
- EN 62368-1
- EN 60950

Enheten har utformats för att uppfylla ISO 14971:2019 och andra relevanta standarder för avsedda marknader.

Bilaga C Tekniska specifikationer

C1 Mobile Mini

Standard	Mobile Mini
Typ	Kommunikationsenhet
Modell	Mobile Mini
Mått (B x H x D)	203,2 × 134,8 × 6,1 mm 8,0 × 5,31 × 0,24 inches
Vikt	300,5 g 10,62 oz
Högtalare	Stereo
Anslutningar	2 × 3,5 mm kontaktportar 1 × Lightning
Knappar	1 × Volym upp och ner 1 × Start sida 1 × Ovansida
Bluetooth®	Bluetooth® 5.0
Batteritid	~ 10 timmar vid normal användning
Batteriteknik	Laddningsbart litumpolymerbatteri
Batterikapacitet	19,1 Wh
Batteriets laddningstid	~ 4 timmar
Strömförsörjningsenhet	12 W AC-adapter
IP-klass	IP22

C2 Nätadapter

Föremål	Specifikation
Modell	A1401
Inspänning	100 till 240 VAC
Inström (max)	0,5 A
Infrekvens	50 till 60 Hz
Utström	2,4A
Märkutspänning	5,2 VDC
Märkuteffekt	12 W

Bilaga D Godkända tillbehör

Du kan få information om de senaste godkända tillbehören för Mobile Mini på www.TobiiDynavox.com eller genom att kontakta din lokal Tobii Dynavox-återförsäljare.

Copyright ©Tobii Dynavox AB. Alla produkter och tjänster erbjuds inte på alla lokala marknader. Specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii Dynavox-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakta din lösningskonsult eller återförsäljare

Kontakta din lösningskonsult på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact