




PCEye 5

Οδηγός έναρξης

Τι υπάρχει στο κουτί

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ❶ PCEye 5 | ❺ Έγγραφο ασφάλειας και συμμόρφωσης |
| ❷ Οδηγός έναρξης | ❻ Θήκη μεταφοράς |
| ❸ Πλακίδιο στήριξης | ❼ Αντάπτορας USB-C σε USB-A |
| ❹ Κιτ συναρμολόγησης πλακιδίου στήριξης | |

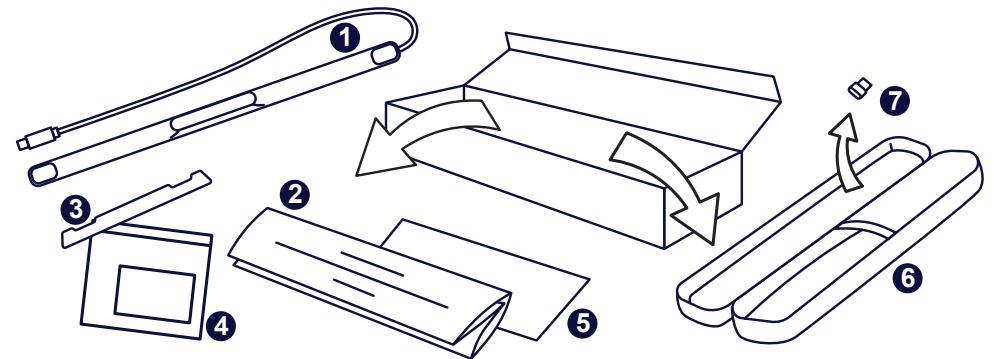


Λογισμικό

Το PCEye 5 περιλαμβάνει το TD Control υπολογιστή. Εάν αγοράσατε το πακέτο Magic EyeFx, ανατρέξτε στην κάρτα άδειας χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Εξοικειωθείτε με τη συσκευή σας

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ❶ Συσκευή ανίχνευσης βλέμματος | ❸ Σημεία τοποθέτησης |
| ❷ Υποδοχή σύνδεσης USB | ❹ Μαγνήτες προσάρτησης |

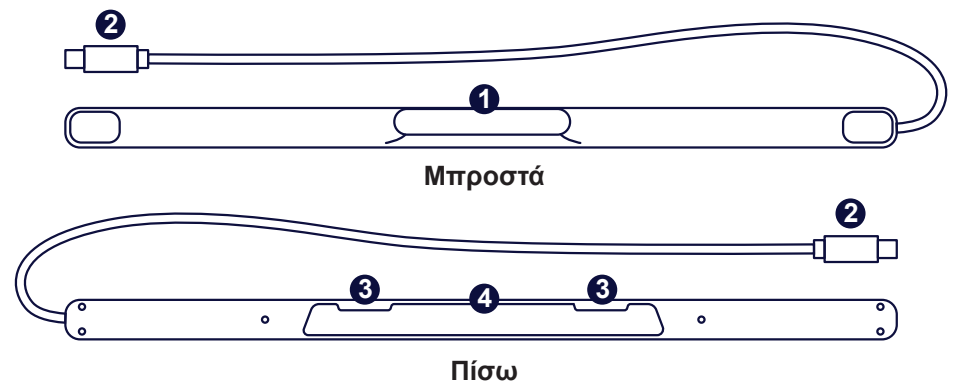

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Κέντρο εκμάθησης
Κέντρο εκμάθησης Tobii Dynavox:
learn.tobiidynavox.com

Πρόσθετη υποστήριξη
Κοινότητα: <http://qrco.de/TDFB>

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Tobii Dynavox για να λάβετε τεχνική υποστήριξη.

Εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδιο χρήσης: <http://qrco.de/PCEyeManual>
Εγχειρίδιο TD Control: <https://qrco.de/TDCmanual>
Κάρτες εκπαίδευσης Communicator 5: <https://qrco.de/C5Cards>
Κάρτες πρώτης βασικής εκπαίδευσης TD Snap: <https://qrco.de/TDSnapCards>
Κάρτες εκπαίδευσης κειμένου TD Snap: <https://qrco.de/TextCards>

Πρόσθετοι πόροι για το PCEye 5 είναι διαθέσιμοι εδώ:


qrco.de/PCEyeHelp



Ρύθμιση

Ολοκληρώστε τα τρία βήματα σε αυτόν τον οδηγό για να λάβετε το απαραίτητο λογισμικό και να προσαρτήσετε τη συσκευή PCEye 5 στον υπολογιστή σας. Η λήψη του λογισμικού FIRST θα παρέχει οδηγίες στην οθόνη και θα σας καθοδηγήσει στα βήματα για τη ρύθμιση και τη χρήση του.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PCEye 5 σε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή.

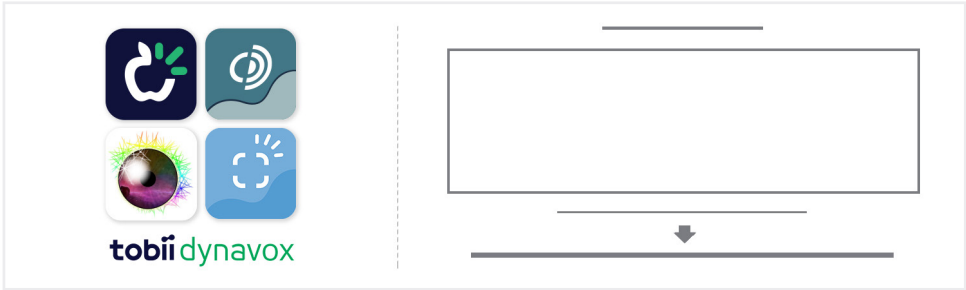

Ξεκινώντας με το λογισμικό TD Control

Σε συνδυασμό με το PCEye 5, το TD Control θα σας δώσει πρόσβαση σε λειτουργίες ποντικιού και πληκτρολογίου. Όταν το TD Control ανοίξει για πρώτη φορά, ο Οδηγός Γρήγορης Έναρξης θα σας παρέχει μια επισκόπηση των διαφορετικών ενεργειών.

Μπορείτε να επιστρέψετε στον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης επιλέγοντας το κουμπί Πληροφορίες.

Επιλέξτε Απόκρυψη οδηγού για έξοδο.

Εξερεύνηση Ίχνους

Το “Ίχνος” σας ενημερώνει για το πού κοιτάζετε στην οθόνη. Όταν εστιάζετε σε ένα στοιχείο, θα εμφανιστεί το κουμπί “Ενεργοποίηση”. Η εστίαση στο κουμπί “Ενεργοποίηση” θα ανοίξει το μενού αλληλεπιδράσεων.



Εξερεύνηση Μενού Αλληλεπιδράσης
Το Μενού αλληλεπιδράσης παρέχει πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και στις κύριες λειτουργίες του ποντικιού.


Για λεπτομερή περιγραφή κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη.

Εξερεύνηση Μενού Εκτός Οθόνης

Το Μενού Εκτός Οθόνης σας παρέχει πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες όπως στα Συνεχή Κλικ, Ρυθμίσεις, Παύση, κ.λπ.

Για επανάληψη της βαθμονόμησης, μεταβείτε στο Μενού Εκτός Οθόνης, επιλέξτε Περισσότερα και στη συνέχεια, επιλέξτε Γρήγορη Βαθμονόμηση.

Καθώς εξερευνάτε τον “TD Control”, μπορείτε να κάνετε βαθμονόμηση ξανά εάν η ακρίβεια δεν είναι η βέλτιστη.

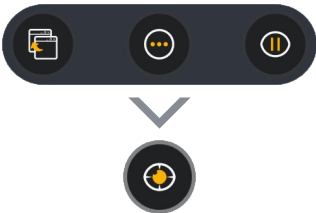

Βήμα 1: Λήψη του λογισμικού PCEye 5
Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://qrco.de/PCEyeCC> και κάντε λήψη του λογισμικού PCEye 5.

Βήμα 2: Στήριξη και βαθμονόμηση του PCEye 5
Εάν χρησιμοποιείτε το PCEye 5 με την προαιρετική βάση στήριξης PCEye 5, παραλείψτε αυτό το βήμα και ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται για αναλυτικές πληροφορίες.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Επιστρέψτε στον οδηγό για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό.

Βήμα 3: Εκκίνηση λογισμικού
Εάν αγοράσατε ένα πακέτο λογισμικού ή λάβατε πρόσθετες κάρτες άδειας χρήσης, ακολουθήστε τις οδηγίες λήψης και εγκατάστασης σε κάθε κάρτα (δείτε αριστερά).



Χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση του TD Control

- Χρησιμοποιήστε την «Παύση» όταν χρειάζεται να ξεκουράσετε τα μάτια σας.
- Δεν είναι απαραίτητο το επιθυμητό αντικείμενο να έχει τοποθετηθεί τέλεια στο κέντρο του Ίχνους.
- Για να αυξήσετε την ακρίβεια, χρησιμοποιήστε την επιλογή «Προσαρμογή στόχου».
- Όταν χρησιμοποιείτε την «Κύλιση», όσο πιο μακριά από το εικονίδιο κύλισης κοιτάζετε τα μάτια σας, τόσο πιο γρήγορα θα γίνεται η κύλιση. Η κύλιση λειτουργεί πάνω-κάτω και αριστερά-δεξιά.
- Για πληκτρολόγηση σε πεδία κειμένου, τοποθετήστε το Ίχνος στο πεδίο κειμένου και στη συνέχεια, επιλέξτε Πληκτρολόγιο. Δεν απαιτείται αριστερό κλικ.

