




# מצלמת מיקוד מבט PCEye 5

מדריך תחילת העבודה

מה יש בקופסה?

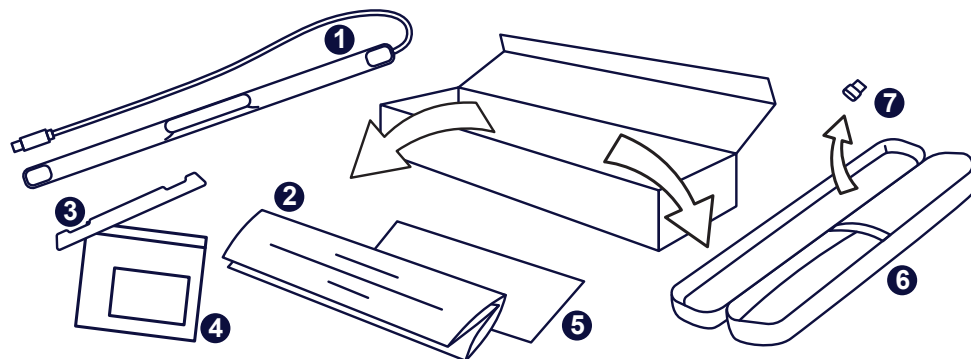


- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | מצלמת מיקוד מבט PCEye 5 |
| 2 | מדריך תחילת העבודה      |
| 3 | פנל למגנט               |
| 4 | ערכת הכנה פנל למגנט     |
| 5 | מסמך בטיחות ותאימות     |
| 6 | נרתיק                   |
| 7 | מתאם USB-A ל-USB-C      |

## תוכנה

PCEye 5 כולל את התכנה TD Control. אם רכשתם את החבילה Magic EyeFx, אנא עיינו בכרטיס הרישיון לפרטים נוספים.

## הכרת ההתקן

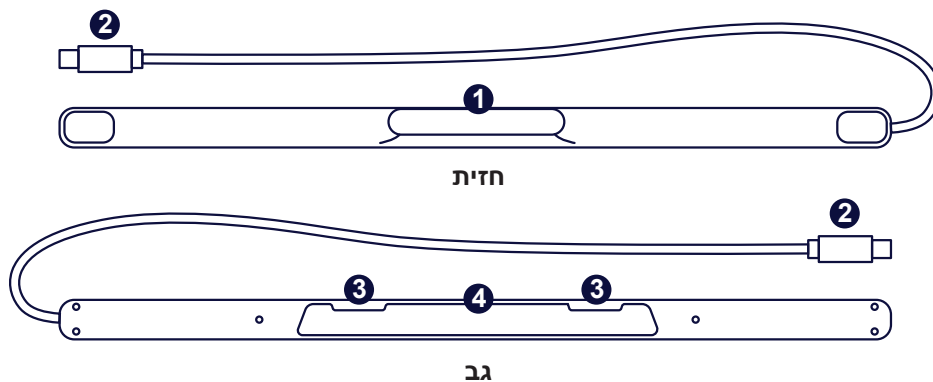

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | רכיב מעקב אחר העין   |
| 2 | מחבר USB             |
| 3 | סמני התקנה           |
| 4 | לוחיות הרכבה מגנטיות |

## אנחנו כאן כדי לעזור

מרכז למידה  
מרכז למידה של Tobii Dynavox  
[learn.tobiidynavox.com](http://learn.tobiidynavox.com)

תמיכה נוספת  
קהילה: <http://qrco.de/TDFB>

דגש טכנולוגיה מסייעת: 03.7313276  
[support@dagesh-at.co.il](mailto:support@dagesh-at.co.il)



משאבים נוספים עבור  
PCEye 5 ניתן למצוא  
כאן:

[qrco.de/PCEyeHelp](http://qrco.de/PCEyeHelp)

חומרי הדרכה

מדריך למשתמש: <http://qrco.de/PCEyeManual>

מדריך TD Control: <https://qrco.de/TDCmanual>

כרטיסי הדרכה של Communicator 5: <https://qrco.de/C5Cards>


כרטיסי הדרכת ליבה ראשונים של TD Snap Core:

<https://qrco.de/TDSnapCards>

כרטיסי הדרכת טקסט של TD Snap: <https://qrco.de/TextCards>

על מנת להוריד את התכנה הדרושה ולחבר את מצלמת מיקוד המבט PCEye 5 למחשב, נא להשלים את שלושת השלבים המפורטים במדריך זה. הורידו תחילה את התכנה על מנת להציג על המסך הוראות אשר ינחו אתכם בכל שלבי ההתקנה והשימוש.

### PCEye 5 ניתנת להתקנה הן על מחשב נייד והן על מחשב נייד.

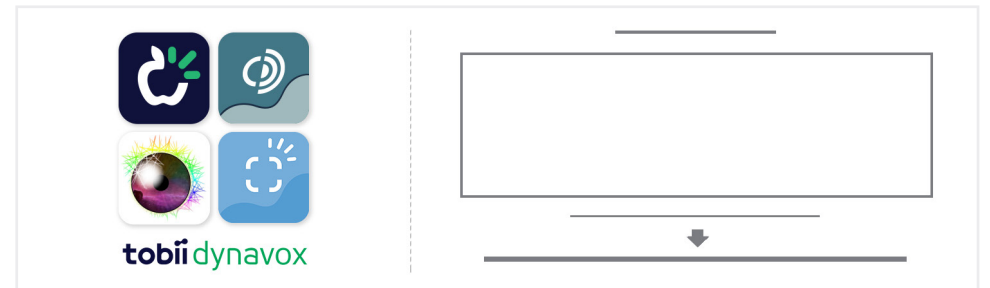

## התחלת עבודה עם תכנת TD Control

בשילוב עם PCEye 5, תכנת TD Control מאפשרת גישה לפונקציות העכבר והמקלדת. בזמן פתיחת TD Control בפעם הראשונה, ה"מדריך להתחלה מהירה" יספק סקירה כללית של הפעולות השונות.

ניתן לחזור ל"מדריך להתחלה מהירה" על ידי לחיצה על כפתור "מידע" (Information).

לחצו על "הסתר מדריך" כדי לצאת.

### הכירו את "עקוב" (Trace)

"עקוב" יספק לכם משוב אודות המקום על גבי המסך שעליו אתם מסתכלים. ברגע שהמבט יתקבע על פריט כלשהו יופיע הכפתור "מפעיל" (Activator). קיבוע המבט על הכפתור "מפעיל" יפתח את "תפריט אינטראקציות" (Interactions Menu).

### הכירו את "תפריט אינטראקציות"

"תפריט אינטראקציות" מאפשר גישה למקלדת ולפעולות עכבר בסיסיות.

למידע מפורט אודות כל אחת מהפונקציות נא לעיין במדריך למשתמש.




### הכירו את "תפריט מחוץ למסך" (Off-Screen Menu)

התפריט שמחוץ למסך מקנה לכם גישה לאפשרויות נוספות, כגון "לחיצה ממושכת", "הגדרות", ו"השהיה" וכד'.

לכיוול חוזר יש להיכנס לתפריט שמחוץ למסך, לבחור "עוד", ולאחר מכן על "כיוול מהיר".

אם במהלך ההכרות עם TD Control הדיוק אינו גבוה, ניתן לכייל מחדש.

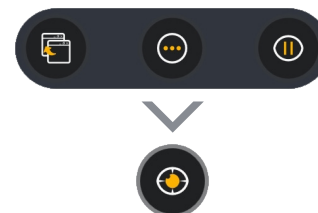

### שלב 1: הורידו את תכנת PCEye 5

עברו ל <https://qrco.de/PCEyeCC> והורידו את תוכנת ה- PCEye 5.

### שלב 2: הרכיבו את PCEye 5 ובצעו כיול

אם משתמשים ב- PCEye5 עם התושבת האופציונלית של PCEye 5, נא לפסוח על שלב זה ולעיין בהוראות המצורפות לקבלת מידע מפורט.

מלאו אחר ההוראות על גבי המסך. למידע נוסף אודות התכנה נא לעיין שוב במדריך.

### שלב 3: הפעלת התכנה

אם רכשתם חבילת תכנות או קיבלתם כרטיסי רישיון נוספים, מלאו אחר ההוראות ההורדה וההתקנה המופיעות על גבי כל אחד מהכרטיסים (ראו משמאל).



## עצות מועילות לשימוש ב-TD Control

- אם העיניים זקוקות למנוחה, השתמשו ב"השהיה" (Pause).
- אין צורך שהפריט המבוקש ימוקם בדיוק במרכז של "עקוב".
- כדי להגביר את הדיוק, השתמשו ב"התאם יעד" (Adjust Target).
- בעת גלילה, ככול שאתם מסתכלים רחוק יותר מסמל הגלילה, כך היא תהיה מהירה יותר. הגלילה פועלת מעלה מטה ומצד לצד.
- על מנת להקליד בשדות טקסט, הניחו את "עקוב" בתוך שדה הטקסט ואז ללחוץ על "מקלדת" (Keyboard). לא נדרשת לחיצה שמאלית.

