




PCEye 5

基本操作ガイド

梱包の中身は何ですか？

- | | |
|---------------|----------------------|
| ① PCEye 5 | ⑤ 安全性とコンプライアンスに関する文書 |
| ② 基本操作ガイド | ⑥ キャリーケース |
| ③ 取付プレート | ⑦ USB-C - USB-Aアダプター |
| ④ 取付プレート準備キット | |

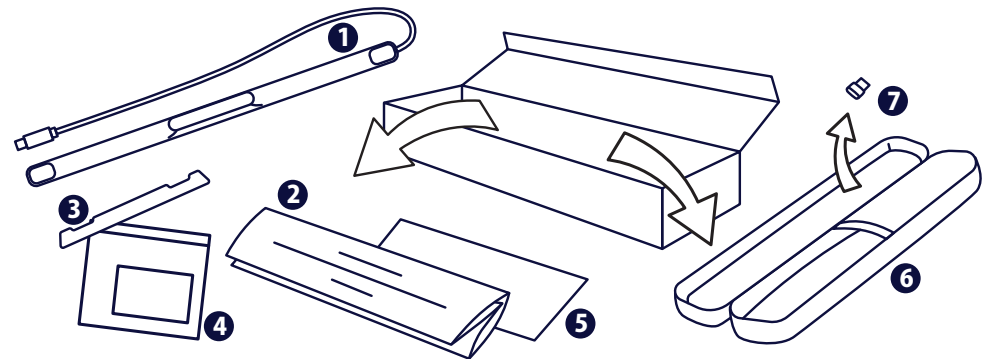


ソフトウェア

PCEye 5にはTD Controlソフトウェアが含まれています。Magic EyeFxバンドルを購入した場合、詳細についてはライセンスカードを参照してください。

デバイスを理解する

- | | |
|-----------|--------------|
| ① アイトラッカー | ③ 取り付け用マーキング |
| ② USBコネクタ | ④ 取り付け用磁石 |

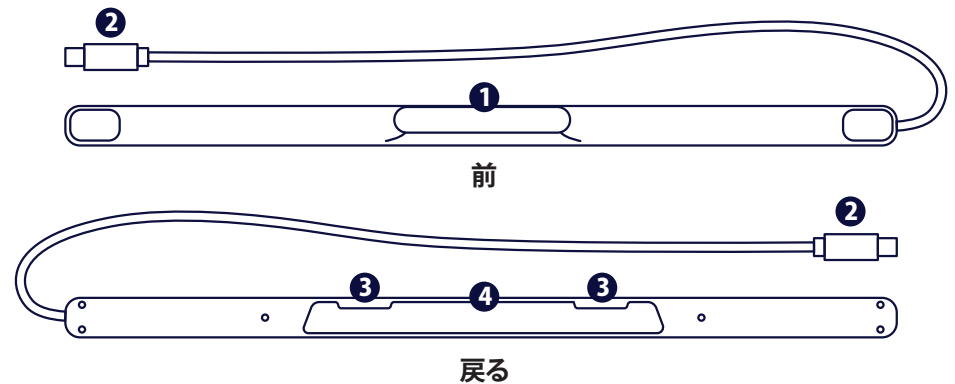

サポート

学習ハブセンター

Tobii Dynavox学習ハブセンター
learn.tobiidynavox.com

追加サポート

コミュニティ: <https://qrco.de/TDFB>

テクニカルサポート: info@creact.co.jp

トレーニング教材

ユーザーマニュアル: <https://qrco.de/PCEyeManual>

TD Controlマニュアル: <https://qrco.de/TDCmanual>

Communicator 5 トレーニングカード: <https://qrco.de/C5Cards>

TD Snap Core Firstトレーニングカード: <https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snapテキストトレーニングカード: <https://qrco.de/TextCards>

追加のPCEye 5リソースは、こちらから入手できます。


qrco.de/PCEyeHelp



設定

本ガイドの3つのステップを実行して、必要なソフトウェアをダウンロードし、PCEye 5デバイスをコンピュータに取り付けます。最初にソフトウェアをダウンロードすると、画面上に説明が表示され、設定と使用方法のステップを説明します。

PCEye 5はノートパソコンまたはデスクトップコンピュータで使用できます。

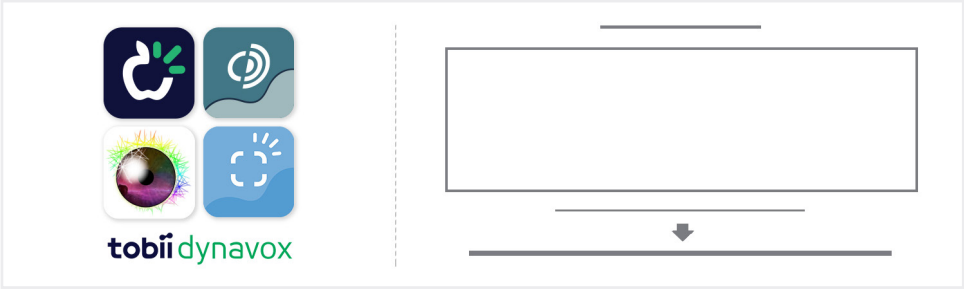


TD Controlソフトウェアの使用開始

PCEye 5と組み合わせると、TD Controlはマウスとキーボードの機能にアクセスできます。TD Controlを初めて開いたとき、クイックスタートガイドにさまざまなアクションの概要の説明があります。

[情報] ボタンを選択すると、クイックスタートガイドに戻ることができます。
[ガイドを非表示]を選択して終了します。

トレース表示について
トレースマークは、画面を見ている場所についてのフィードバックを提供します。ある対象を凝視すると、[アクティベーター]ボタンが表示されます。[アクティベーター]ボタンを固定すると、インタラクションメニューが開きます。

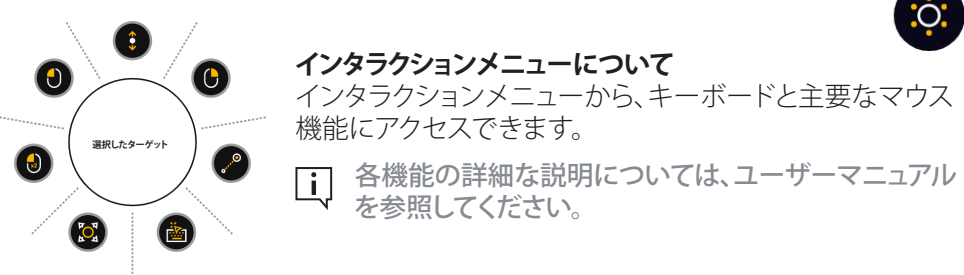

オフスクリーンメニューについて
オフスクリーンメニューでは、[連続クリック]、[設定]、および[一時停止]などの追加機能にアクセスできます。
再キャリブレーションするには、オフスクリーンメニューにアクセスし、[その他]、[クイックキャリブレーション]の順に選択します。

[情報] TD Controlを探索するとき、精度が最適でない場合は再キャリブレーションしても問題ありません。

ステップ 1:PCEye 5ソフトウェアをダウンロード
Go to <https://qrco.de/PCEyeCC> に移動し、PCEye 5ソフトウェアをダウンロードします。

ステップ 2:PCEye 5の取り付けとキャリブレーション
[i] PCEye 5をオプションのPCEye 5ブラケットと併用する場合は、この手順をスキップして、付属の手順で詳細を確認してください。

オンスクリーンプロンプト (指示) に従います。ソフトウェアの詳細については、ガイドを参照してください。

ステップ 3:ソフトウェアを起動
ソフトウェアバンドルを購入した場合、または追加のライセンスカードを受け取った場合は、各カードに記載されているダウンロードとインストールの手順に従ってください (左を参照)。



TD Control を使用するための役立つヒント

- 目を休める必要がある場合は、一時停止を使用してください。 **一時停止**
- 目的のアイテムをトレースの中心に完全に配置する必要はありません。 **ターゲットを調整**
- 精度を上げるには、アジャストターゲット (ターゲットを調整) を使用します。
- スクロールを使用する場合は、スクロールアイコンから目を離すほどスクロールが速くなります。スクロールは上下左右に機能します。
- テキストフィールドに入力するには、トレースをテキストフィールドに配置し、[キーボード]を選択します。左クリックは必要ありません。