




PCEye 5

Kom i gang – veiledning

Hva er i esken?

- | | |
|---|------------------------------------|
| ❶ PCEye 5 | ❺ Dokument om sikkerhet og samsvar |
| ❷ Kom i gang – veiledning | ❻ Bæreveske |
| ❸ Monteringsplate | ❼ USB-C til USB-A-adapter |
| ❹ Forberedelsessett for monteringsplate | |

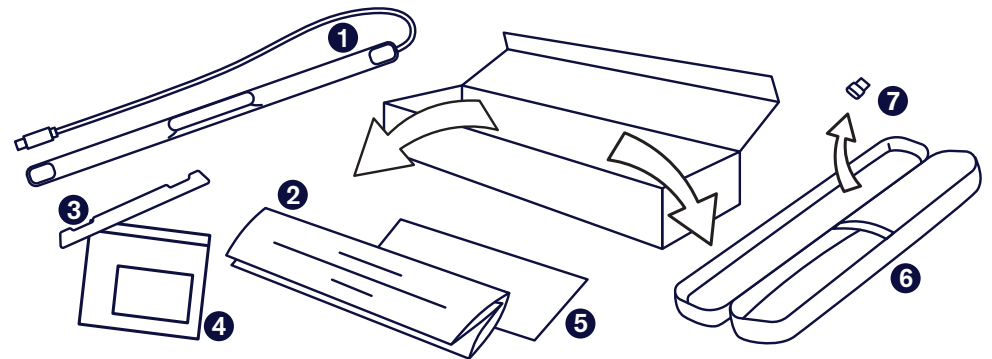


Programvare

PCEye 5 inkluderer TD Control-programvaren. Hvis du kjøpte Magic Eye Fx-pakken, se lisenskortet for mer informasjon.

Bli kjent med enheten din

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| ❶ Øyestyringsenhet | ❸ Installasjonsmarkeringer |
| ❷ USB-kobling | ❹ Monteringsmagneter |

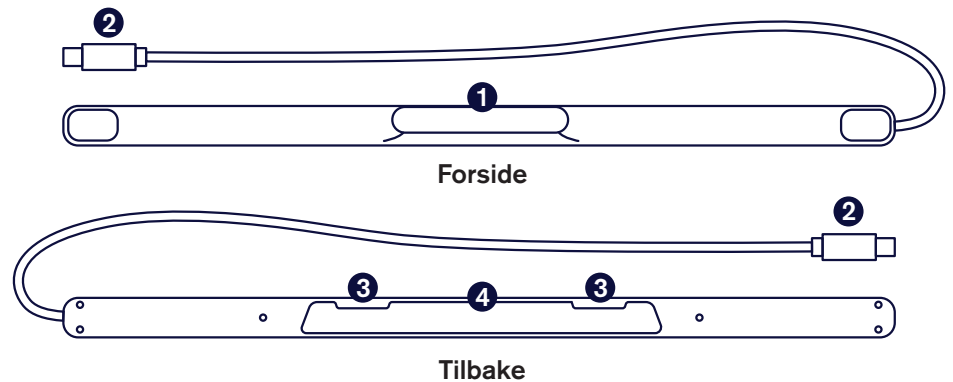

Vi er her for å hjelpe

Opplæring

Tobii Dynavox-opplæringsvideoer:
learn.tobiidynavox.com

Ytterligere støtte

Community: <https://qrco.de/fbno>

Teknisk støtte for Norge: 55 55 10 60

Opplæringsmateriell

Bruerveiledning: <http://qrco.de/PCEyeManual>

Bruerveiledning for TD Control: <https://qrco.de/TDCmanual>

Communicator 5-opplæringskort: <https://qrco.de/C5Cards>

TD Snap Core First, opplæringskort: <https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snap, tekstopplæringskort: <https://qrco.de/TextCards>

Ytterligere ressurser
om PCEye 5 finner
du her:


qrco.de/PCEyeHelp



Oppsett

Fullfør de tre trinnene i denne veiledningen for å laste ned den påkrevde programvaren og montere PCEye 5-enheten på datamaskinen din. Last ned programvaren FØRST, så viser den deg instruksjoner på skjermen og tar deg gjennom trinnene for oppsett og bruk.

Du kan bruke PCEye 5 på en bærbar eller stasjonær datamaskin.

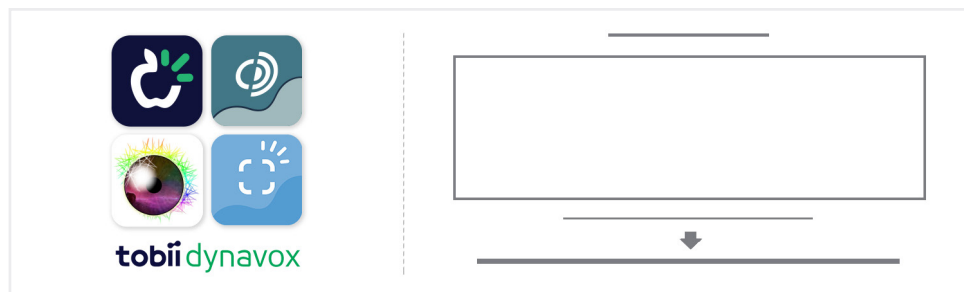

Kom i gang med TD Control-programvaren


Kombinert med PCEye 5, gir TD Control deg tilgang til mus- og tastaturfunksjoner. Når du åpner TD Control for første gang gir Hurtigstartguiden deg et overblikk over de ulike handlingene.

Du kan gå tilbake til Hurtigstartguiden ved å velge informasjonsknappen.

Velg Skjul guide for å gå ut.

Utforsk sporingssirkelen

Sporingssirkelen gir deg tilbakemelding om hvor på skjermen du ser. Når du fester blikket på et objekt vises Aktiveringsknappen. Fester du blikket på aktiveringsknappen åpnes Samhandlingsmenyen.

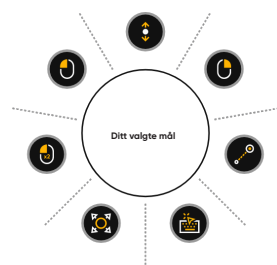

Utforsk samhandlingsmenyen

Samhandlingsmenyen gir tilgang til tastaturet og grunnleggende musefunksjoner.


Se i brukerveiledningen for detaljerte beskrivelser av hver funksjon.

Utforsk menyen utenfor skjermen

Menyen utenfor skjermen gir deg tilgang til ytterligere funksjoner, slik som Kontinuerlig klikk, Innstillinger, Pause, osv.

For å kalibrere på nytt går du til menyen utenfor skjermen, velger Mer, og velger deretter Hurtigkalibrering

Det er helt OK å kalibrere på nytt mens du utforsker TD Control dersom nøyaktigheten din ikke er optimal.

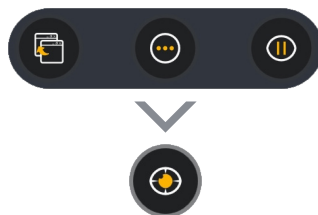

Trinn 1: Last ned PCEye 5-programvaren

Gå til <https://qrco.de/PCEyeCC> og last ned programvaren for PCEye 5.


Trinn 2: Montér PCEye 5 og kalibrer

Dersom du bruker PCEye 5 med den valgfrie PCEye 5-braketten kan du hoppe over dette trinnet og følge de inkluderte instruksjonene for mer detaljert informasjon.

Følg instruksjonene på skjermen. Gå tilbake til veiledningen for mer informasjon om programvaren.

Trinn 3: Start programvaren

Dersom du kjøpte en programvarepakke, eller du mottok flere lisenskort, følg nedlastings- og installasjonsanvisningene på hvert kort (se til venstre).

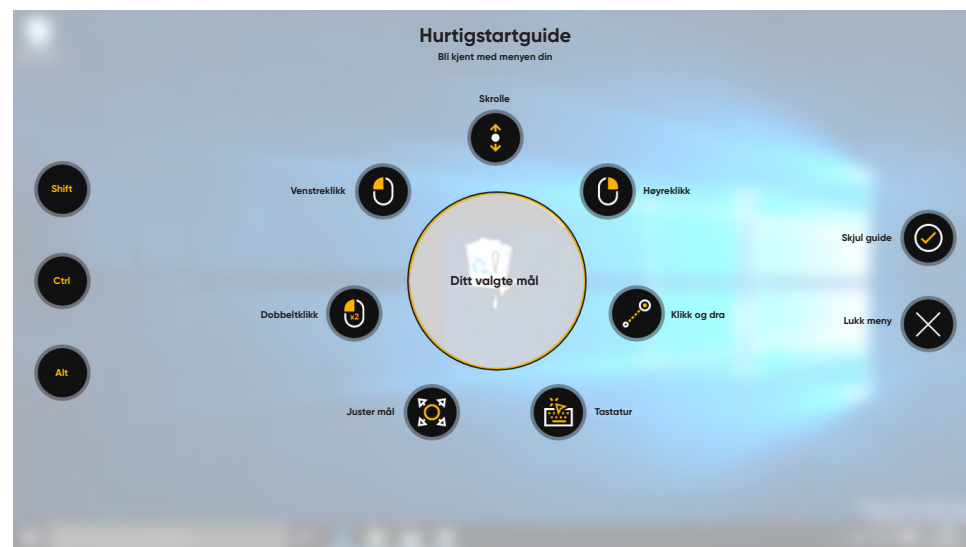


Nyttige tips for bruk av TD Control

- Bruk Pause når du trenger å hvile øynene.
- Det ønskede objektet trenger ikke å være perfekt plassert i midten av sporingssirkelen.
- For å øke nøyaktigheten, bruk Juster mål.
- Når du bruker Skrolling: Jo lenger unna skrolleikonet du ser, desto raskere går skrollingen. Skrolling fungerer opp og ned og side til side.
- For å skrive i tekstfelt plasserer du sporingssirkelen i tekstfeltet og velger deretter Tastatur. Ingen venstreklikk er nødvendig.



Pause

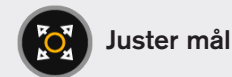

Juster mål