




PCEye 5

Introductiehandleiding

Wat zit er in de doos?

- | | |
|--|--|
| 1 PCEye 5 | 5 Documenten over veiligheid en conformiteit |
| 2 Introductiehandleiding | 6 Draagtas |
| 3 Montageplaat | 7 USB-C-naar-USB-A-adapter |
| 4 Voorbereidingspakket voor montageplaat | |

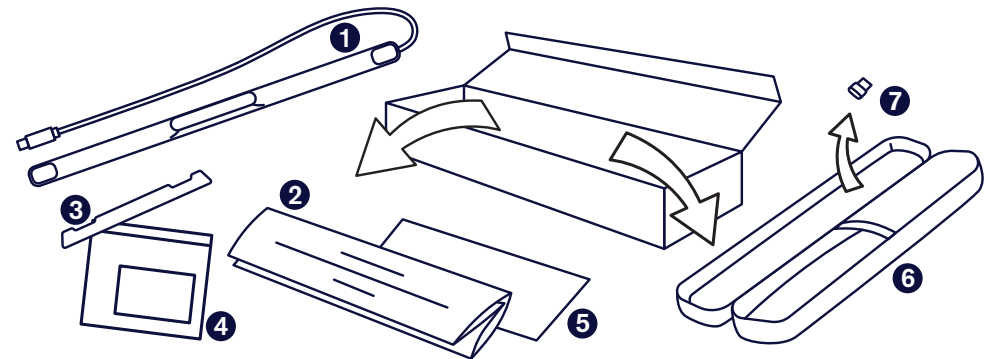


Software

PCEye 5 bevat de TD Control-software. Als u de Magic EyeFx-bundel hebt aangeschaft, raadpleeg dan de licentiekaart voor meer informatie.

Uw apparaat leren kennen

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Oogbesturingsmodule | 3 Installatiemarkeringen |
| 2 USB-connector | 4 Montagemagneten |

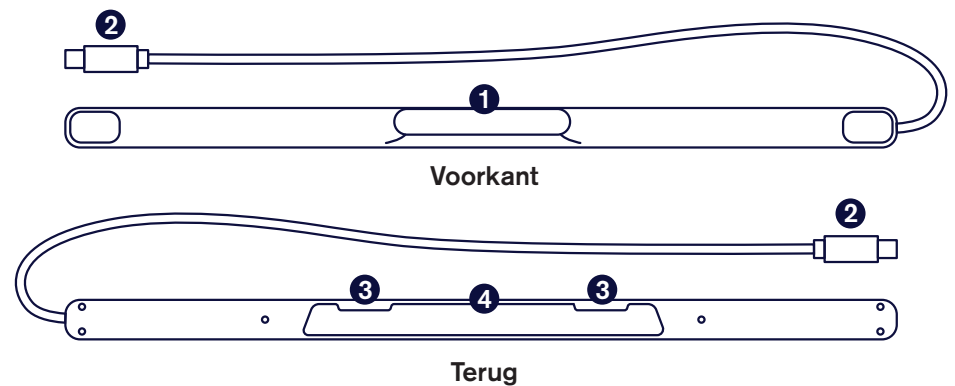

Wij zijn er om u te helpen

Leercentrum

Tobii Dynavox-leercentrum:
learn.tobiidynavox.com

Extra ondersteuning

Community: <http://qrco.de/TDFB>

Neem contact op met uw lokale Tobii Dynavox-vertegenwoordiger voor technische ondersteuning.

Trainingsmaterialen

Gebruikershandleiding: <http://qrco.de/PCEyeManual>

Handleiding TD Control: <https://qrco.de/TDCmanual>

Communicator 5-trainingskaarten: <https://qrco.de/C5Cards>

TD Snap Core First-trainingskaarten: <https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snap Tekst-trainingskaarten: <https://qrco.de/TextCards>

Extra PCEye
5-informatiebronnen
zijn hier beschikbaar:


qrco.de/PCEyeHelp



Installatie

Voltooi de drie stappen in deze handleiding om de vereiste software te downloaden en het PCEye 5-apparaat op uw computer te bevestigen. Door EERST de software te downloaden, krijgt u instructies op het scherm die u door de installatie en het eerste gebruik leiden.

U kunt de PCEye 5 op een laptop of desktopcomputer gebruiken.

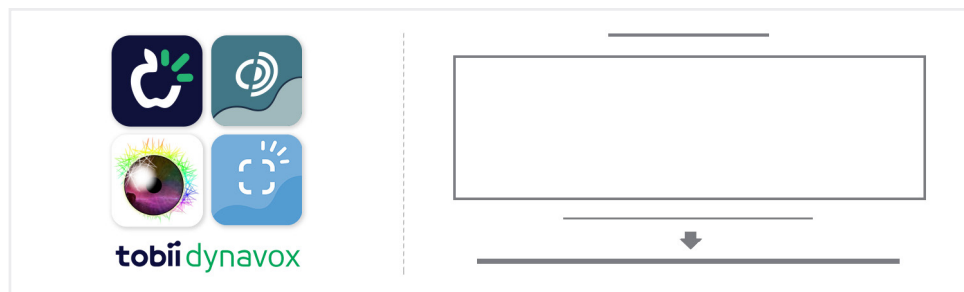

Stap 1: De PCEye 5-software downloaden

Ga naar <https://qrco.de/PCEyeCC> om de PCEye 5-software te downloaden.

Stap 2: De PCEye 5 monteren en kalibreren



Als u de PCEye 5 gebruikt met de optionele PCEye 5-beugel, kunt u deze stap overslaan en raadpleegt u de meegeleverde instructies voor meer informatie.

Follow the onscreen prompts. Return to guide for more information about the software.

Stap 3: De software starten

Als u een softwarebundel hebt aangeschaft of extra licentiekaarten hebt gekregen, volgt u de download- en installatie-instructies op elke kaart (zie links).

Aan de slag met de TD Control-software

Wanneer TD Control gekoppeld wordt met de PCEye 5, kunt u de muis- en toetsenbordfuncties gebruiken. Wanneer TD Control voor de eerste keer wordt geopend, biedt de Snelstartgids een overzicht van de verschillende acties.



U kunt terugkeren naar de Beknopte handleiding door de knop Informatie te selecteren.

Selecteer Gids verbergen om af te sluiten.

Tracering verkennen

Tracering biedt feedback over waar u op het scherm kijkt. Als u uw blik op een item richt, verschijnt de knop Activering. Door de blik op de knop Activering te richten, wordt het menu Interacties geopend.



Het menu Interactie verkennen

Het menu Interacties biedt toegang tot het toetsenbord en de belangrijkste muisfuncties.



Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een gedetailleerde beschrijving van elke functie.



Het Offscreenmenu verkennen

Het Offscreenmenu biedt u toegang tot extra functies, zoals Continue klik, Instellingen, Pauzeren, enz.

Om opnieuw te kalibreren, opent u het Offscreenmenu, selecteert u Meer en selecteert u vervolgens Snel kalibreren.



Terwijl u TD Control verkent, kunt u opnieuw kalibreren als de nauwkeurigheid niet optimaal is.

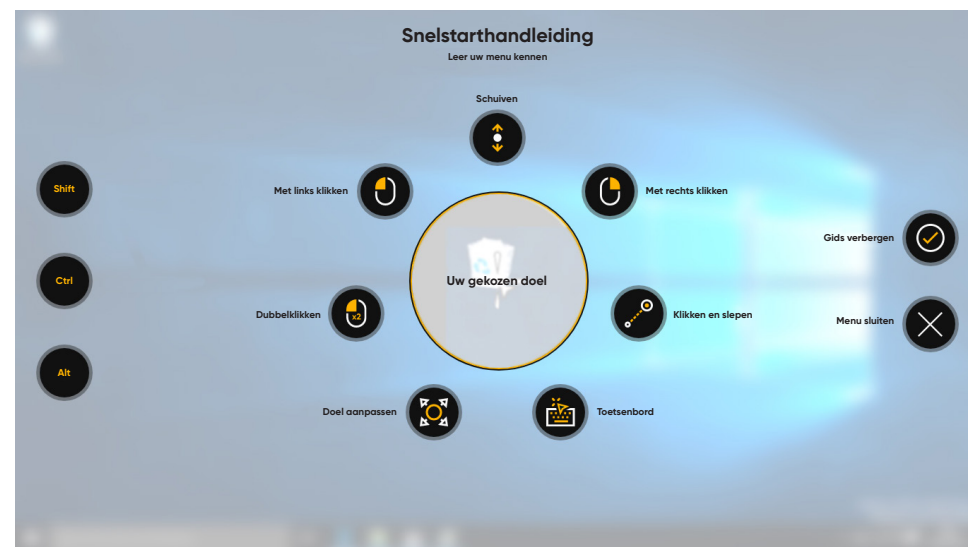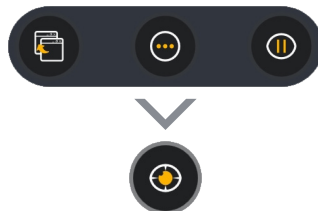

Handige tips voor het gebruik van TD Control

- Gebruik Pauzeren als u uw ogen wilt laten rusten.
- Het gewenste item hoeft niet perfect in het midden van de Tracering te worden geplaatst.
- Gebruik Doel aanpassen om de nauwkeurigheid te vergroten.
- Hoe verder uw ogen bij gebruik van scrollen van het scrollpictogram weggijken, hoe sneller er wordt gescrold. Scrollen werkt omhoog en omlaag en van links naar rechts.
- Om in tekstvelden te typen, plaatst u de Tracering in het tekstveld en selecteert u Toetsenbord. Een klik met de linkermuisknop is niet vereist.



Pauze



Doel aanpassen