


Snap™ Core First®

Brugervejledning

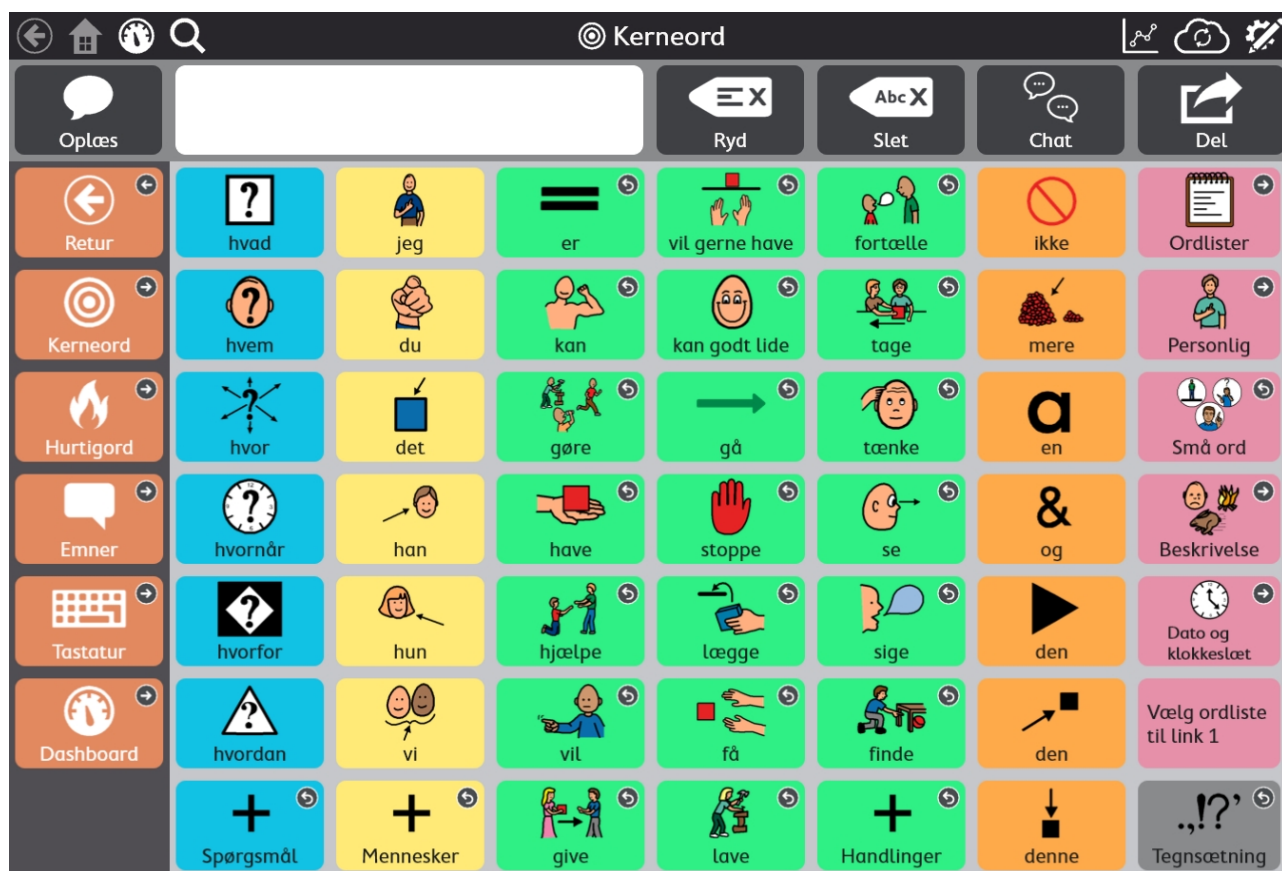

Brugervejledning Snap™ Core First®

Version 1.14

10/2020

Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright © Tobii AB (publ)

Intet i denne vejledning må gengives, gemmes i en database eller overføres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, ved fotokopiering, ved optagelse eller på anden måde) uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Den angivne ophavsret inkluderer alle former og dele af det ophavsretligt beskyttede materiale og informationer, som måtte være tilladt under nuværende gældende lov eller vedtaget herefter, inklusiv, men ikke begrænset til, materialer, der dannes af softwareprogrammerne, som vises på skærmen, så som skærbilleder, menuer, osv.

Oplysningerne i dette dokument tilhører Tobii Dynavox. Gengivelse af hele eller dele af indholdet er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tobii Dynavox.

Produkter, der henvises til i dette dokument, kan enten være varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Forlaget og forfatteren gør ikke krav på disse varemærker.

Selvom alle foranstaltninger er truffet ved udarbejdelsen af dette dokument, påtager forlaget og forfatteren sig intet ansvar for fejl eller mangler, og ej heller for skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen af oplysningerne i dette dokument eller brugen af eventuelt medfølgende programmer og kildekoder. Forlaget og forfatteren kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for tab af fortjeneste eller anden erhvervsmæssig skade, der direkte eller indirekte er opstået som følge af, eller som påstås at være opstået som følge af, indholdet i dette dokument.

Ret til ændring af indholdet uden forudgående varsel forbeholdes.

Besøg Tobii Dynavoxs webside

www.TobiiDynavox.com for at se, om der findes en opdateret udgave af dette dokument.

Kontaktoplysninger:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige

+46 (8) 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778



Indholdsfortegnelse

1	Velkommen	8
1.1	Systemkrav	8
1.2	Henter Snap Core First	9
1.2.1	Køb af talefunktioner	9
2	Ressourcer og support	10
2.1	Tobii Dynavox Pathways til Core First	10
2.2	Webressourcer og support	10
3	Kom godt i gang	11
3.1	Konfiguration af ny bruger	11
3.2	Gendan eksisterende bruger	11
3.3	Vælg sidesæt	11
3.3.1	Core First	12
3.3.2	Tekstsidesæt	13
3.3.3	Sidesæt til scanning til Core First	13
3.3.4	Sidesæt til afasi	13
3.4	Vælg gitterstørrelse	14
4	Navigation	15
5	Topbjælken	16
5.1	Tilbage	16
5.2	Startside	16
5.3	Dashboard	16
5.4	Søg	16
5.5	Indikator for partnervindue	17
5.6	Registrering af data	18
5.7	Synkronisering	18
5.8	Redigér	18
6	Meddelelseslinjen	19
6.1	Oplæs	19
6.2	Beskedvindue	19
6.3	Ryd	19
6.4	Slet	20
6.5	Chat	20
6.6	Kopier til knap	20
6.7	Del	20
7	Værktøjslinjen i Core First	21
7.1	Tilbage	21
7.2	Kerneord	21
7.3	Hurtigord	22
7.4	Emner	22
7.4.1	Emneord	22
7.4.2	Støtter	22
7.5	Tastatur	24
7.6	Dashboard	24
7.7	Ordformer	24
7.8	Understøttet navigation	25
7.9	Aktiv Boardmaker-aktivitet	25


7.10	abc (kun tysk)	25
8	Redigering	26
8.1	Redigeringspanelet	26
8.2	Tilføj knap	26
8.3	Flyt knap	27
8.4	Tilpas en knapstørrelse	27
8.5	Knappen Redigeringsværktøjer	29
8.5.1	Fortryd og Annullér fortryd	29
8.5.2	Kopier og indsæt knap	29
8.5.3	Vælg alle knapper	30
8.5.4	Vælg flere knapper	30
8.5.5	Valg af markeringsværktøj	31
8.5.6	Skjul/vis knap	31
8.5.7	Slet knap	32
8.5.8	Udvid/skjul navne på redigeringsværktøjer	32
8.6	Knapindhold	32
8.6.1	Knapetiket	32
8.6.2	Aktivt indhold	33
8.6.3	Knapmeddelelse	35
8.6.4	Lydsignal på knap	35
8.6.5	Knapbillede	36
8.6.6	Knaptype	37
8.7	Knaphandlinger	38
8.7.1	Slet handling	41
8.7.2	Omorganisér knaphandlinger	41
8.7.3	Whiteboard	42
8.7.4	AccessIT	43
8.7.5	Afspil Boardmaker-aktiviteter i Snap	44
8.8	Knaptypografi	48
8.8.1	Knapbaggrund	48
8.8.2	Knapramme	48
8.8.3	Knapetiket	49
8.9	Link til side/opret ny side	50
8.9.1	Opret en linkknap i en tom celle	51
8.9.2	Opret et link fra en eksisterende knap	51
8.9.3	Link til ny side/opret ny side	51
8.9.4	Link til eksisterende side	51
8.9.5	Link til en ny kopi af en eksisterende side	51
8.9.6	Importér og link til side	52
8.9.7	Besøg side	52
8.10	Regler for sprog på knap	54
8.11	Fjernbetjener	54
8.12	Redigér side	55
8.12.1	Sidenavn	55
8.12.2	Sidesymbol	56
8.12.3	Regler for sidesprog	57
8.12.4	Gitterstørrelse for side	57
8.12.5	Baggrundsfarve for side	58
8.12.6	Vis/skjul meddelelseslinje	58
8.12.7	Slet side	58

8.12.8	Importer/eksporter sider	58
8.13	Scanningsgrupper	58
8.13.1	Indstillinger for scanningsgrupper	60
8.14	Rediger meddelelseslinje	60
8.14.1	Flyt objekter, og tilpas objektstørrelse i beskedlinjen	60
8.14.2	Føj knapper til beskedlinjen	60
8.14.3	Fjern knapper i beskedlinjen	61
8.15	Redigér værktøjslinjen	62
8.16	Brugerdefinerede farver	62
9	Indstillinger for sidesæt	64
9.1	Sidesæt	64
9.1.1	Vælg sidesæt	64
9.1.2	Opret nyt sidesæt	64
9.1.3	Omdøb sidesæt, og rediger beskrivelse	65
9.1.4	Slet sidesæt	65
9.1.5	Indstil startside	65
9.1.6	Indstil tastaturside	65
9.2	Gitterstørrelse	66
9.3	Typografi for sidesæt	66
9.3.1	Skrifttype til knapetiketter i sidesæt	66
9.3.2	Skriftstørrelse til knapetiketter i sidesæt	66
9.3.3	Fed til knapetiketter i sidesæt	67
9.3.4	Knaplayout til sidesæt	67
9.3.5	Visning af link i sidesæt	67
9.3.6	Gittermargen i sidesæt	68
9.3.7	Standardfarver til baggrund til sidesæt	68
9.3.8	Skrifttype til meddelelsesvindue i sidesæt	68
9.3.9	Skriftstørrelse til meddelelsesvinduet i sidesæt	68
9.3.10	Tekstfarve i meddelelsesvinduet i sidesæt	68
9.4	Indstillinger for sidesæt	69
9.5	Adaptive knapper	69
9.6	Om sidesæt	70
9.6.1	Indstillinger for materialeudviklere for sidesæt	70
10	Print	72
11	Google Assistent	74
11.1	Tilslut din Google-konto	74
11.2	Konfigurer dine Google-enheder	74
11.3	Sprogunderstøttelse i Google Assistent	74
11.4	Tal til Google Assistent	75
12	Deling og lagring	77
12.1	Brugere	77
12.1.1	Sikkerhedskopier bruger	77
12.1.2	Gendan bruger	77
12.2	Sidesæt	77
12.2.1	Importer sidesæt	77
12.2.2	Gem kopi af sidesæt	78
12.2.3	Gem kopi af sidesæt (via myTobiiDynavox)	78
12.2.4	Synkroniser sidesæt	79
12.3	Sidebundter	81

12.3.1	Eksporter sidebundt	82
12.3.2	Importer sidebundt	83
13	Brugerindstillinger	85
13.1	Skift bruger	85
13.2	Opret ny bruger	85
13.3	Sikkerhedskopier bruger	85
13.4	Gendan bruger	86
13.5	Rediger/omdøb bruger	87
13.6	Slet bruger	87
13.7	Log ind på myTobiiDynavox-konto	88
13.8	Stemme	88
13.8.1	Talestemme	88
13.8.2	Stemmehastighed	89
13.8.3	Udtaleundtagelser	89
13.9	Outputenhed til tale	90
13.10	Sprogspecifikke stemmer	91
13.11	Google-konto	91
13.12	Indstillinger for bruger	91
13.12.1	Taleindstillinger	91
13.12.2	Indstillinger for meddelelsesvindue	91
13.12.3	Indstillinger for prædiktion	92
13.12.4	Indstillinger for synkronisering	92
13.13	Adgangsmetode	92
13.13.1	Indstil adgangsmetode	93
13.13.2	Touch-indstillinger	93
13.13.3	Indstillinger for Touch enter	94
13.13.4	Indstillinger for Touch afslut	95
13.13.5	Indstillinger for musedvæl	96
13.13.6	Indstillinger for Gaze Interaction	97
13.13.7	Indstillinger for scanning	98
13.14	Registrering af data	101
13.14.1	Registrer brug af knap	101
13.14.2	Vis knap til topbjælken	102
13.14.3	Vis tællere for brug af knapper	102
13.14.4	Vis tællere for modellering	103
13.14.5	Administrer data	103
14	Systemindstillinger	105
14.1	Indstillinger	105
14.1.1	Adgangskode	105
14.1.2	Skærmindstilling (kun Windows)	105
14.1.3	Redigeringstilstand for sprog	105
14.2	Enhed	106
14.2.1	Indstillinger for partnervindue	106
14.3	Butik	106
14.3.1	Foretag et køb	106
14.3.2	Gendan køb (kun Windows)	106
14.3.3	Deaktiver nøgle (kun Windows)	107
14.4	Symbolsæt	107
14.4.1	Søgeindstillinger	107

14.4.2	Installerede symboler og valgfrie symboler.....	107
14.4.3	Omorganisér symbolsæt	107
14.5	Hjælp og vejledninger.....	108
14.5.1	Videoer	108
14.5.2	Pathways til Core First.....	108
14.5.3	Kort beskrivelse	108
14.5.4	Ekstern hjælp	108
14.6	Om	108
14.6.1	Softwareopdateringer.....	108

1 Velkommen

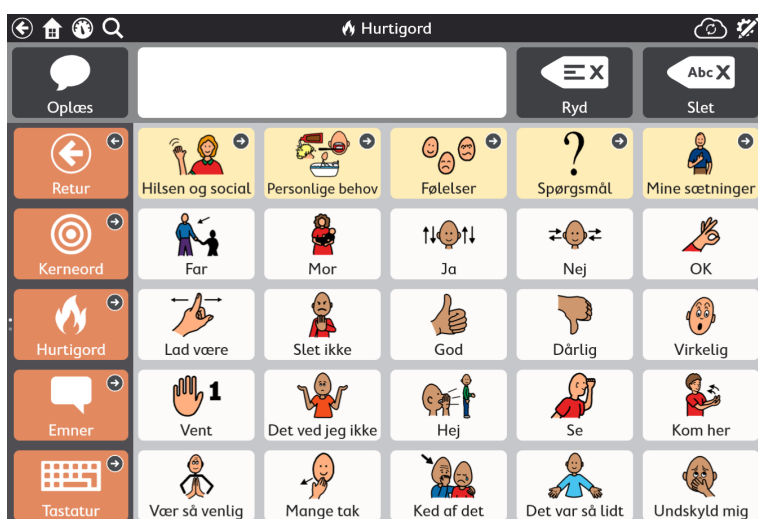

Figur 1.1 Snap Core First – Hurtigord

Tobii Dynavox Snap Core First er toppen af symbolbaseret kommunikationssoftware til symbolunderstøttede brugere. Programmet er designet til at være den mest brugervenlige, mest intuitive og konsekvente løsning på markedet til både brugeren og kommunikationspartneren. Snap Core First er den ideelle løsning til personer med autisme, spastisk lammelse, Downs syndrom og psykiske handicap. Snap giver den bedste symbolbaserede kommunikationsoplevelse og kombinerer komponenterne, som en forælder, lærer eller pædagog skal bruge til at bistå brugerne med at blive gode kommunikatører, tilegne sig sprog og opnå færdigheder i læsning og skrivning. Vores tilgang omfatter 3 nøglesøjler til vellykket kommunikation: Udvikling, engagement og færdigheder i læsning og skrivning.

Snap Core First er ikke bare et AAC-kommunikationsprogram (assisterende og alternativ kommunikation) men er derimod et omfattende program, der hjælper personer med at opnå færdigheder i læsning og skrivning samt opnå en uafhængighed uanset udgangspunkt, der vil ændre deres liv. Sidesættet Core First, der er centreret omkring Tobii Dynavoxs systematiske løsning med ordforråd med kerneord, emner, hurtigord, adfærdsstøtter, ordlister og tastaturer, udgør kernen i Snap. Core First, der tager sit udgangspunkt i forskning på University of North Carolina Chapel Hill, drager fordel af motorisk læring og introducerer metodisk og målbevidst et nyt ordforråd, der giver brugerne mulighed for at skalere op eller ned og samtidig altid vide, hvor de kan finde ordforrådet. Funktionerne giver brugerne mulighed for at starte deres kommunikationsrejse fra deres nuværende udgangspunkt og hele tiden at udvikle sig og bevæge sig hen mod at kunne lære at læse og skrive og opnå uafhængighed.

1.1 Systemkrav

Tabel 1.1 Windows-styresystem

	Styresystem	Arkitektur	Hukommelse	Berøring	Kamera
Mindst	Windows 10 version 1803	x86	2 GB	Kræves ikke	Kræves ikke
Anbefalet	Windows 10 version 1803	x86	4 GB	Indbygget berøring	Indbygget kamera

Tabel 1.2 iOS

	Styresystem	Enhed	Hukommelse	Berøring	Kamera
Mindst	iOS 10	iPad Air 2 iPad Mini 4	2 GB	Indbygget berøring	Kræves ikke
Anbefalet	iOS 13	iPad, 5. generation	4 GB	Indbygget berøring	Indbygget kamera

1.2 Henter Snap Core First

Snap Core First til Windows-enheder fås via TobiiDynavox.com og til iOS i Apple App Store. Køb Snap Core First Full, og få øjeblikkelig adgang til alle funktioner i Snap Core First. Hvis du vælger Snap Core First Free, får du gratis alle funktioner uden tale, inkl. Core First-indhold, oprettelse og redigering af sider, oprettelse af bruger og sikkerhedskopiering, gendannelse og synkronisering. Talefunktionen er dog begrænset. Opgradering til fuld talefunktion kan fås som apptilkøb.

Talefunktion, der er deaktiveret i gratisversionerne af appen

- Læs meddelelsesvinduet op
- Tale- eller optagelsesoutput genereret ved tryk på en knap
- Tale- eller optagelsesoutput genereret af en adfærdsstøtte
- Lydsignaler

Talefunktion, der findes i gratisversionerne af appen

- Optagelse af lyd (i redigeringstilstand)
- Eksempel på optagelse af lyd (i redigeringstilstand)
- Eksempel på stemme
- Eksempel på udtaleundtagelse (i redigeringstilstand)

1.2.1 Køb af talefunktioner

Få hurtig og sikker adgang til talefunktionerne i Snap Core First som engangsapptilkøb.

1. Start Snap Core First.

2. Vælg knappen Tale deaktiveret i topbjælken.



3. Vælg **Køb**.

4. Afslut din sikre transaktion.

2 Ressourcer og support

Tobii Dynavox tilbyder flere gratis ressourcer, der understøtter og supplerer din oplevelse med Snap Core First. Gå ikke glip af disse værktøjer, der hjælper dig med at få det meste ud af din Tobii Dynavox software!

2.1 Tobii Dynavox Pathways til Core First



Pathways til Core First er en gratis ressource, der hjælper dig med at implementere Tobii Dynavoxs produkter på den mest effektive måde. Du lærer forskningsbaserede teknikker, der øger engagementet og brugervenligheden mest muligt, og meget andet!

Pathways til Core First hjælper dig, mens du kommer i gang med at bruge Snap Core First, og fremmer udvikling af engagement, sprog samt læse- og skrivefærdigheder. Pathways til Core First:

- giver en klar, tilpasset metode til at komme i gang.
- fremmer udvikling hos personer i alle aldre og på alle færdighedsniveauer.
- lærer dig at opbygge færdigheder på flere områder, inkl. brug af kerneord, udvidelse af ordforråd, brug af Snap Core First i daglige aktiviteter mm.
- viser dig, hvordan Snap Core First kan hjælpe dig med sociale færdigheder og situationer, såsom håndtering af kommunikationsnedbrud, navigations- og handlefærdigheder samt tilskyndelse til positiv adfærd.
- opbygger færdigheder som kommunikationspartner med toptips.
- understøtter kontinuerlig tilpasning af Core First.

Pathways med alle funktioner til Core First fås som en gratis app til Windows og iOS. Pathways for Core First online er tilgængelig via din webbrowser. Besøg www.tobiidynavox.com/learn/pathways, og få flere oplysninger.

2.2 Webressourcer og support

myTobiiDynavox er din personlige webportal til onlinelagring og deling. Gem dine brugersikkerhedskopier sikkert på myTobiiDynavox, og del med hele dit kommunikationssupportteam.

Gå til myTobiiDynavox.com, og opret en gratis konto.

my **tobii** dynavox

Besøg tobiidynavox.com/support-training/, og få hjælp, undervisning og andre ressourcer, inkl.:

- svar på generelle spørgsmål
- undervisningsvideoer
- downloads
- optagelser af webinarer
- personlig support

3 Kom godt i gang

Første gang du starter Snap Core First, skal du besvare et par spørgsmål, der bruges til at tilpasse softwaren til dine behov. Du kan altid ændre indstillingerne senere.

3.1 Konfiguration af ny bruger

Vælg **Kom godt i gang**, og du er klar på mindre end et minut!



3.2 Gendan eksisterende bruger

Brug muligheden, hvis du har en brugersikkerhedskopi, der skal gendannes.

Gendan en sikkerhedskopi af bruger fra myTobiiDynavox

1. Vælg **Gendan eksisterende bruger**.
2. Hvis du ikke er logget ind på myTobiiDynavox, skal du indtaste din e-mailadresse og adgangskode og derefter

vælge  **Næste**.

3. Vælg en fil med sikkerhedskopi af en bruger på listen, og vælg derefter  **Næste**.

Gendan en sikkerhedskopi af bruger fra en lokal fil

1. Vælg **Gendan eksisterende bruger**.
2. Vælg **Gendan fra en lokal fil**.
3. Navigér til, og vælg filen med sikkerhedskopien af brugeren. Vælg derefter **Åbn**.

3.3 Vælg sidesæt

Konfigurationsguiden viser automatisk sidesættene, der matcher sprogindstillingen på din enhed, hvis sproget findes i Snap. Vælg **Skift sprog** for at se sidesættene på et andet tilgængeligt sprog.


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Kinesisk (forenklet) | • Tysk (CH) |
| • Tjekkisk (CZ) | • Islandsk (IS) |
| • Dansk (DK) | • Italiensk (IT) |
| • Hollandsk (NL) | • Norsk (NO) |
| • Engelsk (AU) | • Portugisisk (BR) |
| • Engelsk (CA) | • Portugisisk (PT) |
| • Engelsk (Storbritannien) | • Spansk (ES) |
| • Engelsk (USA) | • Spansk (Latinamerika) |
| • Fransk (CA) | • Spansk (US) |
| • Fransk (FR) | • Svensk (SE) |
| • Tysk (DE) | • Flere sprog kommer snart! |



Alle sidesæt, der følger gratis med Snap Core First, vises, når der konfigureres en ny bruger, samt på fanen Sidesæt. Sidesæt til PODD og Gateway kan købes i butikken. Se afsnit 14.3 *Butik*.

3.3.1 Core First

Core First er premium sidesættet i Snap-softwaren. Det er designet til at maksimere engagement, opnåelse af læse- og skrivefærdigheder og udvikling ved hjælp af flere kommunikationsværktøjer, der bruges sammen på en glidende og forudsigelig måde.

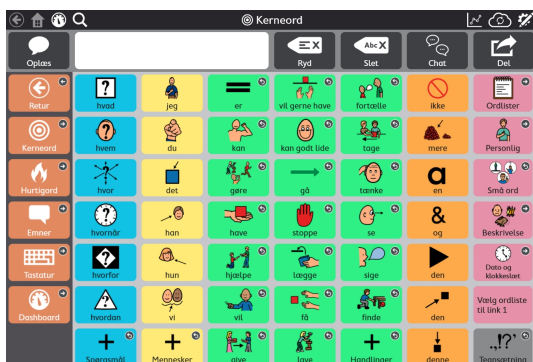

Figur 3.1 Sidesættet Core First

Nøglefunktionen i Core First er vores strategi for kerneord. Baseret på forskning, kliniske erfaringer og brugertests:

- Valg af ord for maksimal brug i flere miljøer.
- Ordplacering og brugergrænseflade.
- Introduktion af ordrækkefølge.
- Fast placering af ord efterhånden som flere tilføjes systematisk.
- Effektiv navigation.
- Understøtter undervisning af brugerne om ordenes betydning, og hvordan ordene kombineres til selvstændige meddelelser.

Core First indeholder følgende yderligere kommunikationsværktøjer:

- Hurtigord – kvikke, forudsigelige meddelelser der kan bruges alene eller i kombinationer.
- Tastatur – indtast bogstaver i meddelelsesvinduet, og opret eller redigér ord.
- Ordlister – organiseret efter kategori, så de er lette at finde.
- Emner – understøtter samtaler i specifikke miljøer eller om særlige emner.
- Støtter – hjælper brugerne med adfærd og social kommunikation.
- Dashboard – fjernbetjening, lydstyrkekontrol mm. lige ved dine fingerspidser!

Sidesættet Core First er designet til at være den fornemste standard i indhold til supplerende og alternativ kommunikation (AAC), der giver brugeren den mest tilgængelige oplevelse med at finde indhold hurtigt og være i stand til at oprette selvstændige og specifikke meddelelser på den bedst mulige måde. Core First lader brugerne engagere sig i en hurtig samtale i realtid om emner, som er mest vigtige for dem. Softwaren giver dem også frihed til at oprette nye meddelelser, som kunne være vanskelige at forudsige på forhånd. Ved hjælp af værktøjerne kan brugerne være en aktiv del af situationen, som de befinder sig i, og engagere sig med kommunikationspartnere.

Udviklingen af læse- og skrivefærdigheder er en vigtig færdighed og skal udgøre en del af en kommunikationsløsning. Core First understøtter ved hjælp af tastaturer, nemme links til forskningsbaserede programmer på enheden og indhold, der er designet til at understøtte kommunikation omkring læseoplevelser, læse- og skrivefærdigheder hos alle sine brugere.

Endelig er Core First ikke beregnet som et altdækkende program på et stationært system. Kontinuitet over alle gitterstørrelser er et ledende hovedprincip. Efterhånden som brugernes færdigheder øges, og der kræves yderligere valgmuligheder med hensyn til sprogkompleksitet, føjes de nye muligheder problemfrit til Core First, mens indholdet bliver på forudsigelige placeringer.

3.3.2 Tekstsidesæt

Dette sidesæt er designet til brugere, der ikke er afhængig af symboler for at kommunikere. Tekstsidesættet anbefales til kommunikatorer med stærke evner inden for læsning og skrivning.

Gitterstørrelser i sidesæt: 7 x 10.

3.3.3 Sidesæt til scanning til Core First

Core First-indholdet i sidesættet er ændret med henblik på nemmere og mere effektiv brug sammen med adgangsmetoden Scanning. De medfølgende sider Lær at scanne hjælper brugerne med at blive trygge ved at bruge scanning som adgangsmetode.

Gitterstørrelser i sidesæt: 3 x 4, 6 x 4, 7 x 6, 9 x 8


3.3.4 Sidesæt til afasi

Sidesættet til afasi er designet til brugere med afasi. Funktionerne omfatter Whiteboard, emnesider med gittermønster eller muligheder for layout med visuelle scener, kalender, fotoalbum samt sider med Google Assistant og Alexa. Symbolerne i sidesættet til afasi er passende til voksne brugere.

Gitterstørrelser i sidesæt: 6 x 5, 4 x 3, 3 x 3

4 Navigation

Find ud af meget mere om sidesættet Core First! Læs videre, og lær, hvordan du navigerer gennem indholdet i Snap og finder alt, hvad du skal bruge til at kommunikere.

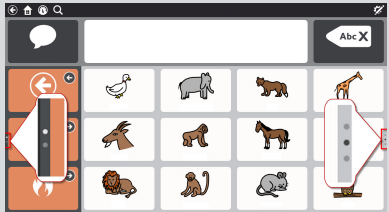Rulning	Du kan rulle op og ned både i værktøjslinjen og på siden. Sideindikatorerne (prikkerne til venstre for værktøjslinjen og til højre for siden) viser dig, at der er mere indhold ovenfor eller nedenfor.  Afhængigt af dine indstillinger og adgangsmetode ruller du ved at stryge med fingeren på berøringsskærmen eller ved at vælge en navigationsknap. Se afsnit 13.13.2 <i>Touch-indstillinger</i>.	
Topbjælke	Knapperne i venstre side af topbjælken omfatter en tilbage-knap, en startsideknap, en dashboardknap og en søgeknap. Se afsnit 5 <i>Topbjælken</i>.	
Linkknap	Linkknapper fører dig over på en anden side. Se afsnit 8.9 <i>Link til side/opret ny side</i>.	
Besøgsknap	Besøgsknapper fører dig over på en anden side, lader dig foretage et valg på siden, og fører dig derefter automatisk tilbage til den forrige side. Se afsnit 8.9.7 <i>Besøg side</i>.	
Tilbage-knap	Tilbage-knappen virker på samme måde som tilbage-knappen på en webbrowser. Vælg tilbage-knappen én gang for at vende tilbage til den forrige side eller flere gange for at blive ved med at bevæge dig baglæns i sidehistorikken.	
Knap til Boardmaker	Knapper til Boardmaker er knyttet til mapper og aktiviteter, der er gemt på Boardmaker Online. Gennemse og afspil aktiviteterne lige her i Snap! Se afsnit 8.7.5 <i>Afspil Boardmaker-aktiviteter i Snap</i>.	

5 Topbjælken

5.1 Tilbage

Knappen Tilbage  fører dig tilbage til den tidligere besøgte side.

5.2 Startside

Knappen Start  fører dig tilbage til startside (den første side du ser, når du starter Snap Core First). Knappen Startside er en genvej, som du kan bruge til at komme tilbage til startside fra alle steder i programmet. Se afsnittet 9.1.5 *Indstil startside* om ændring af startside.

5.3 Dashboard


Brug knappen Dashboard  til hurtigt at åbne siden Dashboard. Dashboardet er en side, der giver nem adgang til ofte anvendte knapper, især knapper uden ordforråd såsom lydstyrkekontrol eller fjernbetjening.

5.4 Søg


 Søg er kun tilgængelig, når du bruger adgangsmetoden Touch.

Søgeværktøjet  viser dig, hvor du kan finde ord i Snap Core First. Indtast et søgeord, og følg derefter de visuelle signaler. De visuelle signaler fører dig til målordet, så du selv senere kan finde ordet igen.

1. Vælg værktøjet **Søg**  i topbjælken.
2. Indtast et søgeord.

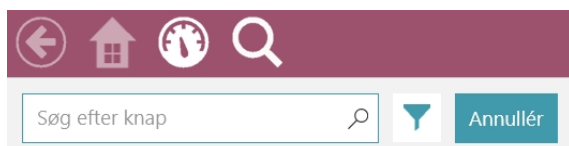


3. Vælg eventuelt  **Filtre**, hvis du ønsker at indstille søgefiltre:
 - **Tillad dupliserede match** – Aktivér, og få vist alle steder med identiske knapper.
 - **Vis skjulte stier** – Aktivér, og få vist stier, der bruger knapper, der er skjult i øjeblikket.
4. Vælg knappen, som du søgte efter, i søgeresultatet.

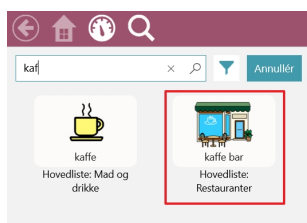

5. Vælg den fremhævede knap på hver side, indtil du kommer til målkappen.



Du skal muligvis rulle for at se den næste knap. Læg derfor mærke til pile, der fortæller dig, hvor du skal gå hen!

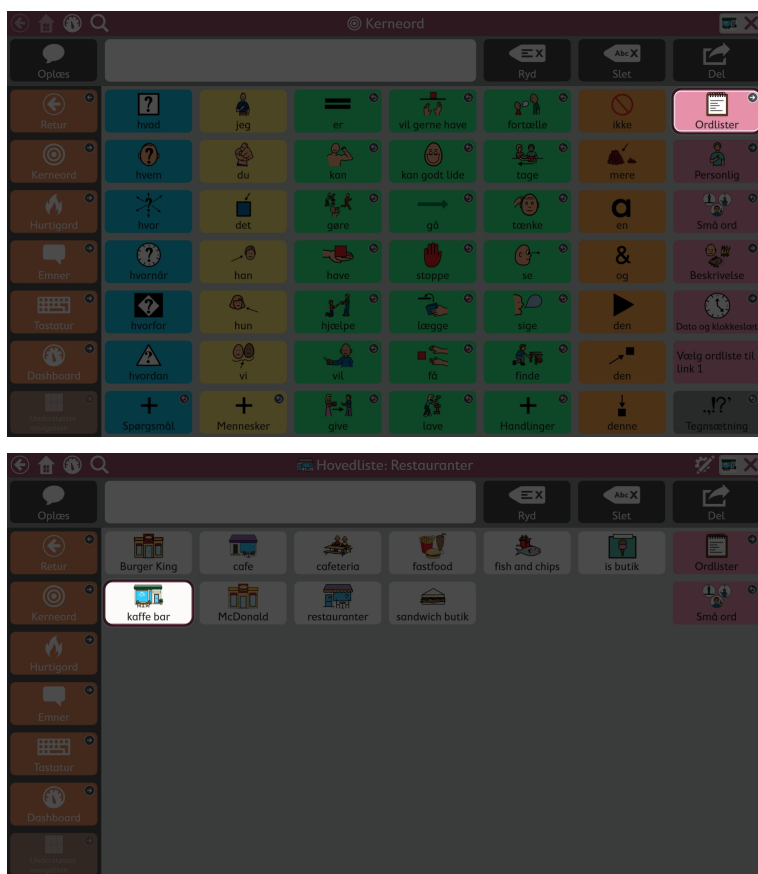

Læg mærke til alle fremhævede knapper, så du selv kan huske stien næste gang.

Du kan annullere din søgning når som helst ved at vælge et vilkårligt sted uden for den fremhævede sti.

5.5 Indikator for partnervindue



Indikatoren for partnervinduet er kun tilgængelig på Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheder.

Indikatoren for partnervinduet giver oplysninger om status for partnervinduet bag på din enhed.

Spejltypografi – viser den tekst der aktuelt er i partnervinduet.



Ikontypografi – ikonet viser at partnervinduet er tændt. Når partnervinduet er slukket, vises ikonet ikke.



Se afsnit 14.2.1 *Indstillinger for partnervindue*, hvis du vil ændre indikortypografien for partnervinduet.

5.6 Registrering af data



Registrering af data kan kun startes ved berøring eller direkte museklik.



Knappen Registrering af data giver hurtig adgang til følgende indstillinger, når den er aktiveret: Modelleringsstilstand, Vis tællere for brug af knapper, Vis tællere for modellering og Administrer data. Se afsnittet *13.14 Registrering af data* med flere oplysninger om registrering af data.

5.7 Synkronisering



Synkronisering er kun tilgængelig ved touch eller direkte museklik.



Knappen Synkronisering bruges til at starte delingen af et sidesæt til synkronisering eller opdatere et sidesæt, der allerede er delt til synkronisering. Se afsnittet *12.2.4 Synkronisér sidesæt* om flere oplysninger om synkronisering.

Se afsnittet *13.12.4 Indstillinger for synkronisering* om at skjule synkroniseringsknappen i brugstilstand.

5.8 Redigér



Redigering er kun tilgængelig ved touch eller direkte museklik.



Vælg knappen Redigér for at foretage ændringer i dit sidesæt og få adgang til indstillinger.


Se afsnittet *8 Redigering* om flere oplysninger.

6 Meddelelseslinjen

Meddelelseslinjen viser teksten i den oprettede meddelelse og knapperne, der bruges til deling af meddelelsen med hele verden!



Hvis du vil have vist meddelelseslinjen, skal du vælge en gitterstørrelse med mindst 3 rækker og 3 kolonner.

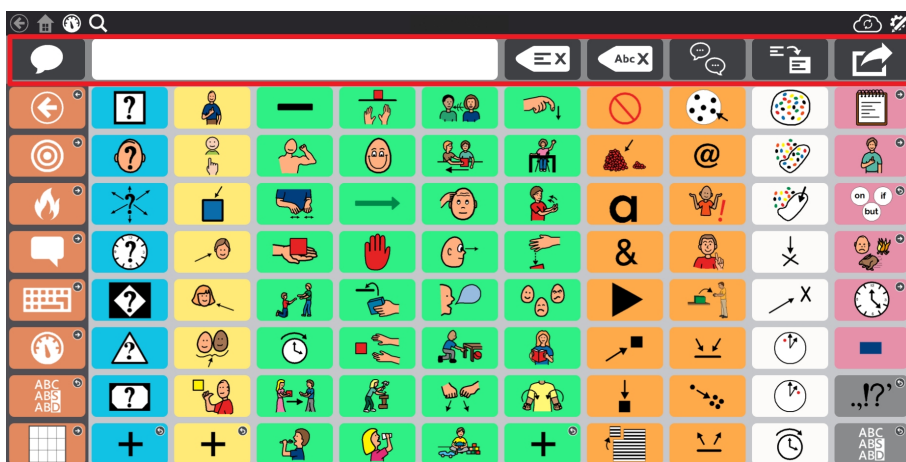

Se 8.14 Rediger meddelelseslinje om redigering af meddelelseslinjen.

6.1 Oplæs



Vælg knappen for at få det aktuelle indhold af meddelelsesvinduet læst op.

6.2 Beskedvindue



Meddelelsesvinduet viser teksten, der skal læses op eller sendes som en meddelelse. Det kan også vise symboler. Du kan skrive direkte i meddelelsesvinduet med en tastaturside eller sende tekst fra en knap.

Se afsnittet 13.12.2 Indstillinger for meddelelsesvindue, side 91 om indstillinger for meddelelsesvinduet.

6.3 Ryd



Fjern alt indhold i meddelelsesvinduet.

6.4 Slet



Slet det sidste ord i meddelelsesvinduet.

6.5 Chat



Slå chat til og fra. Når du slår chat til, gemmes indholdet af det aktuelle meddelelsesvindue, og vinduet slettes derefter. Når du chatter, kan du placere nyt indhold i meddelelsesvinduet og få det læst op. Når du slår chat fra, gendannes det gemte indhold af meddelelsesvinduet, og du kan fortsætte, hvor du slap.

6.6 Kopiér til knap



Kopiér teksten i meddelelsesvinduet, og føj den derefter til en knap. På denne måde kan brugeren hurtigt redigere knapper!

6.7 Del



Brug denne praktiske brugerfunktion til at sende indholdet af meddelelsesvinduet til en AccessIT 3-enhed (8.7.4 AccessIT), en knap på den aktuelle side (6.6 *Kopiér til knap*) eller til at kopiere indholdet til systemudklipsholderen.

Vælg Andet for at sende teksten i meddelelsesvinduet til en af dig valgt app (såsom Twitter, Facebook osv.).



Menuen til knappen Andet kan kun åbnes med berøring.




7 Værktøjslinjen i Core First

Se 8.15 Redigér værktøjslinjen, og lær, hvordan du redigerer værktøjslinjen.




7.1 Tilbage

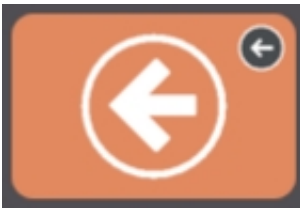

Figur 7.1 Tilbage-knappen – værktøjslinjen i Core First

Tilbage-knappen virker på samme måde som tilbage-knappen i en webbrowser. Brug den til at vende tilbage til den forrige side.

7.2 Kerneord

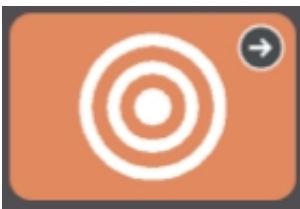

Figur 7.2 Knappen Kerneord – værktøjslinjen i Core First

Knappen åbner siden Kerneord. Den mest kendetegnende funktion i Core First er vores strategi for kerneord, som er udviklet på basis af forskning, kliniske erfaringer og brugertests. Nøglefunktionerne på siden Kerneord omfatter:

- Valg af ord for maksimal brug i flere miljøer.
- Ordplacering.
- Introduktion af ordrækkefølge.
- Fast placering af ord efterhånden som flere tilføjes systematisk.
- Effektiv navigation.
- Understøtter undervisning af brugerne om ordenes betydning, og hvordan ordene kombineres til selvstændige meddelelser.

7.3 Hurtigord



Figur 7.3 Knappen Hurtigord – værktøjslinjen i Core First

Hurtigord er hurtige, forudsigelige meddelelser der kan bruges alene eller i kombinationer. Det er små ord, der kan holde en samtale i gang, skabe opmærksomhed eller lave en kommentar. Ofte anvendte meddelelser, der fokuserer på personlige behov, hilsner, social, følelser, spørgsmål og reparationer følger også med. Hurtigord læses straks op og placerer ikke tekst i meddelelsesvinduet.


7.4 Emner



Figur 7.4 Knappen Emner – værktøjslinjen i Core First


Emner understøtter samtaler i specifikke miljøer eller om særlige emner. Vælg et emne på siden Emner for at få vist relevante ord og udtryk. Tilpas dit sidesæt med dine egne emner!

7.4.1 Emneord

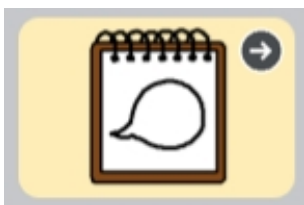


Siderne indeholder almindeligt anvendte ord om det valgte emne.

7.4.2 Støtter

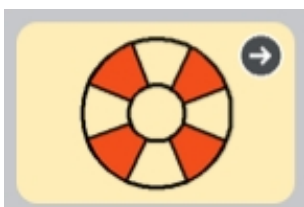

Støtter hjælper brugerne med adfærd og social kommunikation.

7.4.2.1 Først, derefter

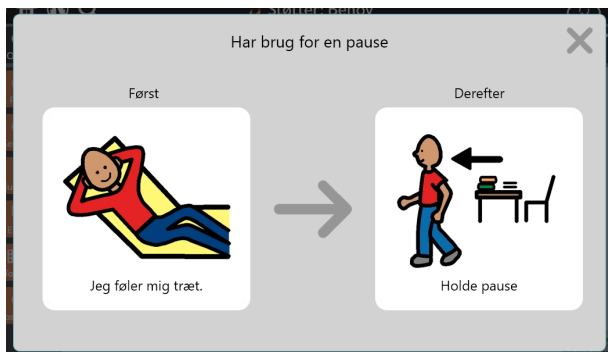

Figur 7.5 Støtten først, derefter

Støtten viser rækkefølgen af handlinger i to trin, og forstærker forståelsen af årsag og virkning eller logiske trin.

7.4.2.2 Minitidsplan



Figur 7.6 Støtten minitidsplan

Støtten viser rækkefølgen af handlinger i flere trin, og forstærker forståelsen af årsag og virkning eller en række logiske trin.

7.4.2.3 Script



Figur 7.7 Støtten script

Et script indeholder faste udtryk, der sædvanligvis bruges om et bestemt emne. Scripts bruges til at skabe sociale fortællinger og hjælper med at udforme relevant samtale.

7.4.2.4 Synlig timer



Figur 7.8 Topbjælke med visuelt tidspur

Det visuelle tidsur viser et ur, der tæller ned, og en animeret farvebjælke i topbjælken. Nummeret viser nedtællingen af den angivne periode, og farvebjælken bliver mindre i takt med, at resttiden bliver mindre. Når alarmfunktionen er aktiveret, høres der en lyd, når tiden er udløbet.

Vælg **X**'et i højre side af topbjælken for at annullere den synlige timer.



Hvis du vil ændre nedtællingstiden eller alarmindstillingen, skal du redigere knappen og vælge handlingen Visuelt tidsur.

7.5 Tastatur



Figur 7.9 Knappen Tastatur – værktøjslinjen i Core First

Siden Tastatur har knapper til hver enkelt tegn, der fungerer som tasterne på et tastatur. Brug siden til at sammensætte ord, der ikke findes i sidesættet eller til at tilføje tegnsætning. Se 9.1.6 *Indstil tastaturside* om indstillingen af din foretrukne side med tastatur.

7.6 Dashboard



Figur 7.10 Knappen Dashboard – værktøjslinjen i Core First

Dashboardet er en side, der giver nem adgang til ofte anvendte knapper, især knapper uden ordforråd såsom lydstyrkekontrol eller fjernbetjening.

7.7 Ordformer



Figur 7.11 Knappen Ordformer – værktøjslinjen i Core First

Siden Ordformer viser forskellige former (tid, ental/flertal osv.) af det sidste ord i meddelelsesvinduet. Vælg den ønskede ordform for at opdatere ordet i meddelelsesvinduet.


7.8 Understøttet navigation



Figur 7.12 Understøttet navigation – værktøjslinjen i Core First

Siden Understøttet navigation er startside for gitterstørrelser (< 3x3) for de tidligt fremspirende. Knappen Understøttet navigation i værktøjslinjen gør siden tilgængelig for alle gitterstørrelser.

7.9 Aktiv Boardmaker-aktivitet

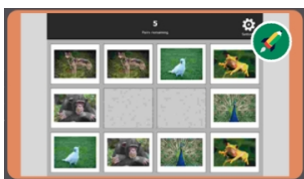

Figur 7.13 Aktuell Boardmaker-aktivitet – Værktøjslinje til Core First

Åbn en eventuelt aktiv Boardmaker-aktivitet. Knappen er inaktiv, hvis der ikke findes aktive Boardmaker-aktiviteter. Miniaturebillede af knap og etiket opdateres for at vise den aktive Boardmaker-aktivitet.

7.10 abc (kun tysk)



Knappen åbner ABC-ordforrådsområdet, der er kendt fra "LiterAACy". Her finder du over 3.600 ord fra kerne- og fremmedordforråd, sorteret efter første og andet bogstav.

- ABC-området understøtter læring og brug af læse- og skrivefærdigheder.
- Der afspilles fonetisk feedback, når et bogstav vælges.
- Der er to versioner af funktionen: den ene bruger store bogstaver, og den anden bruger små bogstaver. Knappen til abc (med små bogstaver) er standard. Hvis du skal bruge store bogstaver, skal du gøre knappen ABC (store bogstaver) synlig i værktøjslinjen og skjule knappen abc (små bogstaver). Se afsnit 8.5.6 *Skjul/vis knap*.

8 Redigering

Softwaren skal være i redigeringstilstand, hvis du skal ændre knapper, sider, indstillinger eller brugere. Du kan når som

helst aktivere redigeringstilstanden ved at vælge knappen  **Redigér**.




Knappen Redigér og redigeringstilstanden er kun tilgængelig, når adgangsmetoden touch anvendes.

Når du er i redigeringstilstand, kan du dobbeltklikke på de fleste sideknapper for at se, hvordan de opfører sig i brugstilstand.

8.1 Redigeringspanelet

Redigeringspanelet indeholder alle værktøjer og faner, der skal bruges til at ændre dit sidesæt og softwaren.

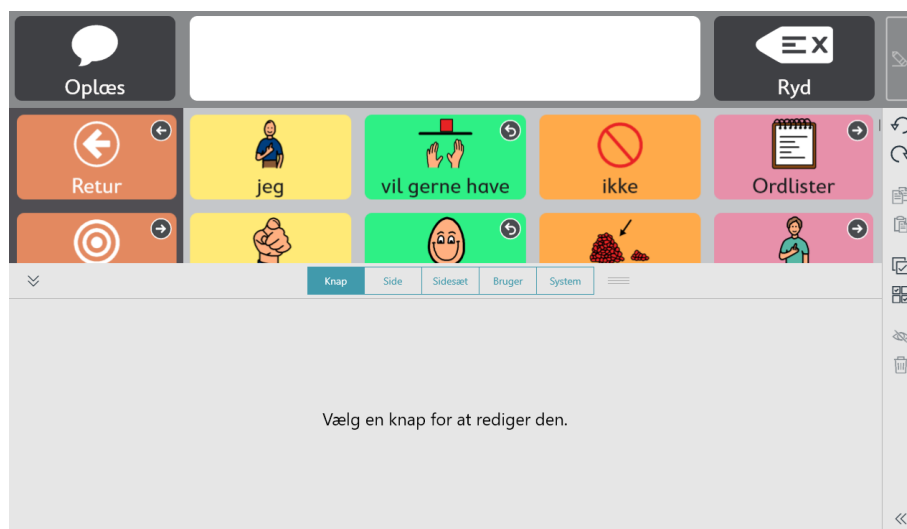

Figur 8.1 Redigeringspanelet (vist udvidet)

Vælg  for at udvide redigeringspanelet.

Tilpas størrelsen på redigeringspanelet til din egen størrelse ved at trække  op eller ned, mens panelet er udvidet.

8.2 Tilføj knap

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg  i en vilkårlig tom celle på siden for at oprette en ny knap.



Figur 8.2 Tom celle


8.3 Flyt knap



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg og hold knappen, der skal flyttes, inde, og træk den derefter til den ønskede placering. Knappen kan placeres på siden på to måder:
 - Ombyt – Når du trækker knappen direkte hen på en anden knap, bytter de to knapper plads på siden. Den sorte ramme om den valgte placering i gitteret angiver en ombytning.



- Indsæt – Når du trækker den valgte knap hen mellem to knapper, flytter knapperne til højre og nedenunder sig og gør plads, så du kan placere knappen. Knappernes rækkefølge på siden, fra venstre til højre, top til bund, ændres ikke. Placeringen af knappen, der skal indsættes, markeres med en lodret bjælke.

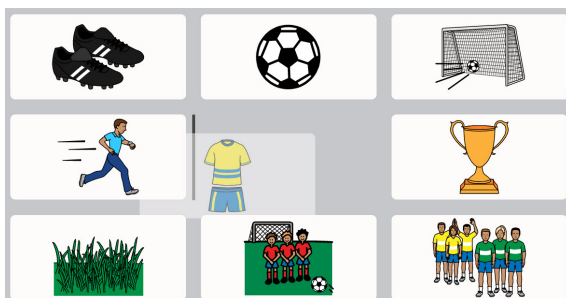

Du kan indsætte en knap vandret (som vist ovenfor) eller lodret.



Når du flytter en knap, gælder det kun for den aktuelle gitterstørrelse.

8.4 Tilpas en knapstørrelse

Du kan ændre størrelsen på en knap til at fylde lige så mange gitterceller på et afsnit af en side eller en værktøjslinje, som du har lyst til.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg en knap på siden eller i værktøjslinjen.




Ændring af knapstørrelse kan kun udføres, når der er valgt en enkelt knap.

3. Vælg og hold fast i en af de blå prikker i hjørnerne af den valgte knap, træk så for at ændre knappens størrelse.



i Knapper med ændret størrelse kan ikke strække sig over flere sideafsnit eller værktøjslinjeafsnit.

4. Vent på, at knappen helt udfylder celleenhederne, og til den er nået den ønskede størrelse, og slip så valget.

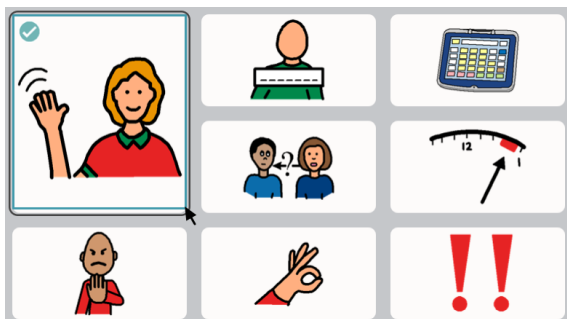

i Du kan ikke ændre størrelsen på eller flytte en knap over i en celle, der bruges af en navigationsknap (rulning). Når du gør en knap større, bliver knappen, der skubbes ud, flyttet over til den nærmeste celle.

! Når du ændrer størrelse på en knap, gælder det kun for den aktuelle gitterstørrelse.

8.5 Knappen Redigeringsværktøjer

Værktøjerne i højre side af appvinduet hjælper dig med at redigere de valgte knapper.



Figur 8.3 Knappen Redigeringsværktøjer – (fra oven og nedefter): Fortryd, Annullér fortryd, Kopiér, Indsæt, Vælg alle, Vælg flere, Markeringsværktøj, Skjul/vis, Slet, Udvid/skjul navne på værktøjer

8.5.1 Fortryd og Annullér fortryd

Værktøjet  Fortryd lader dig tilbageføre op til 100 af de seneste ændringer, der er foretaget i den aktuelle bruger eller sidesæt. Værktøjet  Annullér fortryd gendanner den sidste ændring, som du tilbageførte med værktøjet Fortryd.



Tælleren til Fortryd nulstilles, når der indlæses en anden bruger, et andet sidesæt, og når Snap afsluttes.

8.5.2 Kopiér og indsæt knap

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg værktøjet  **Kopiér**.
Bemærk, at værktøjet Sæt ind viser antallet af kopierede knapper.

4. Vælg værktøjet  **Indsæt**.
Knappen sættes ind i den første tomme celle på siden.

8.5.3 Vælg alle knapper

Værktøjet Vælg alle vælger automatisk alle knapper på den aktuelle side, så du kan udføre mange redigeringshandlinger på én gang.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Knap**.
3. Vælg værktøjet  **Vælg alle**.

 Når du har brugt Vælg alle, kan du klikke på de enkelte knapper for at fravælge dem. De øvrige knapper markeres fortsat.

4. Udfør de ønskede ændringer på knapperne.
5. Hvis du vil fravælge alle knapper, skal du vælge værktøjet  **Vælg flere**.


8.5.4 Vælg flere knapper

Værktøjet  **Vælg flere** lader dig vælge flere knapper på én gang (manuelt), så du kan udføre redigeringshandlinger på flere knapper ad gangen.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Knap**.
3. Vælg værktøjet  **Vælg flere**.

 Værktøjet Vælg flere er sort, når det er deaktiveret, og blå, når det er aktiveret.

4. Vælg knapperne, der skal redigeres på samme tid.

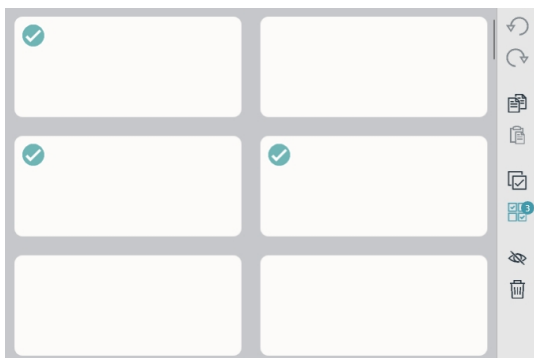


Figur 8.4 Flere valgte knapper – Bemærk, at værktøjet Vælg flere viser antallet af valgte knapper.

5. Udfør de ønskede ændringer på knapperne.
6. Hvis du vil fravælge alle knapper, skal du vælge værktøjet  **Vælg flere**.

8.5.5 Valg af markeringsværktøj

 Markeringsværktøjet udgør en nem måde at vælge flere knapper på. Du skal bare klikke og trække for at tegne en firkant rundt om en eller flere knapper, som du vil vælge.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Knap**.
3. Vælg værktøjet  **Valg af markeringsværktøj**.
4. Klik (eller berør), og træk derefter diagonalt for at tegne en firkant rundt om alle knapperne, der skal vælges.

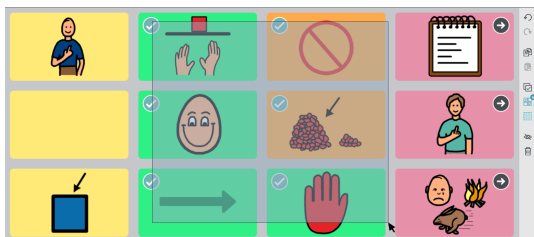

Figur 8.5 Brug af Valg af markeringsværktøj – Knapperne behøver ikke at være helt inden for firkanten for at blive valgt.



Klik på knapperne enkeltvis for at vælge eller fravælge knapperne.


Knapper kan vælges på værktøjslinjen eller på siden men ikke begge steder på samme tid.

5. Udfør de ønskede ændringer af de valgte knapper.
6. Hvis du vil fravælge alle knapper, skal du vælge værktøjet  **Vælg flere**.

8.5.6 Skjul/vis knap

Knapper, der er skjulte, kan ikke ses i brugstilstand. Knapper, der fx i øjeblikket er for avancerede eller distraherer, kan skjules og derefter vises igen senere.

Skjulte knapper vises i redigeringstilstanden med en grå overlejring.

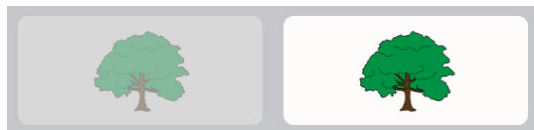

Figur 8.6 En skjult knap ved siden af en synlig knap, vist i redigeringstilstand.

8.5.6.1 Skjul

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knappen, der skal skjules.
3. Vælg værktøjet  **Skjul**.



Standardhandlingen for værktøjet Skjul/vis er at indstille synligheden af knappen overalt, hvor den vises i sidesættet. Tryk længe (klik og hold) på værktøjet Skjul/vis, og vælg **Skift synlighed her**, hvis du vil indstille synligheden for kun den valgte knap.

8.5.6.2 Vis

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg skjult knap.
3. Vælg værktøjet  **Vis**.



Standardhandlingen for værktøjet Skjul/vis er at indstille synligheden af knappen overalt, hvor den vises i sidesættet. Tryk længe (klik og hold) på værktøjet Skjul/vis, og vælg **Skift synlighed her**, hvis du vil indstille synligheden for kun den valgte knap.

8.5.7 Slet knap

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg værktøjet  **Slet**.

8.5.8 Udvid/skjul navne på redigeringsværktøjer

Vælg de  dobbelte pile for at få vist navnene på redigeringsværktøjerne. Vælg de  dobbelte pile igen for at skjule navnene på værktøjerne.

8.6 Knapindhold



Figur 8.7 Knap med etiket, symbol, baggrundsfarve og mellemtyk kant.


8.6.1 Knapetiket

Knapetiketten er teksten, der er vist på knappen.

8.6.1.1 Skift knapetiket

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.

3. Skriv i tekstfeltet **Etiket**.

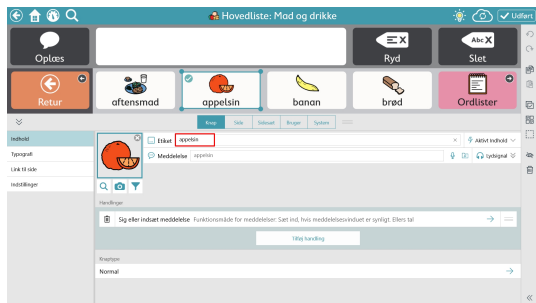

Figur 8.8 Tekstfelt til knapetiket


Se afsnittet 8.8.3 *Knapetiket*, hvis du vil ændre andre etikettegenskaber (skrifttype, farve, placering, størrelse osv.).

8.6.2 Aktivt indhold

Aktivt indhold lader dig vise dynamiske oplysninger på en knap. Knapetiketten og symbolet ændres for at vise den aktuelle status for oplysningerne.

8.6.2.1 Føj aktivt indhold til en knap

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg **Aktivt indhold**. (Er kun tilgængelig, når **knaptypen** er indstillet til **normal**)

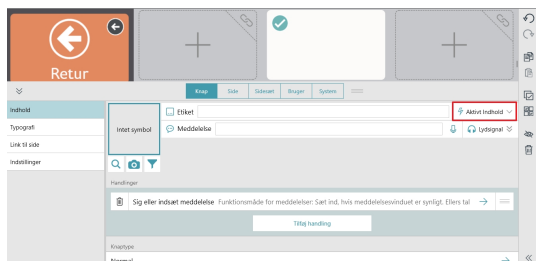

Figur 8.9 Aktivt indhold

4. Vælg type af aktivt indhold.

Type af aktivt indhold	Beskrivelse
Ingen	Vælg Ingen for at fjerne det aktive indhold fra knappen.
Pausetilstand for adgangsmetode	Bemærk: Pausetilstand for adgangsmetode findes kun til følgende adgangsmetoder: Gaze Interaction og musedvæl. Når andre adgangsmetoder bruges, deaktiveres knapper med pausetilstand for aktivt indhold for adgangsmetode. Hvis handlingen Sæt adgangsmetode på pause findes på knappen (standard), viser etiketten knaphandlingen: Start adgang, eller sæt adgang på pause. Hvis handlingen Sæt adgangsmetode på pause ikke findes på knappen, viser etiketten pausetilstanden for adgangsmetoden: Adgang kører, eller Adgang er sat på pause.
Adgangstid	Bemærk: Adgangstid bruges ikke i adgangsmetoden med berøring. Viser tidsindstillingen for den aktuelle adgangsmetode. Den faktiske tidsindstilling varierer efter adgangsmetode, fx holdetid, scanningshastighed, dvæletid osv. Se for at få flere oplysninger <i>Tabel 8.1 Diagram over adgangstid, side 41</i>


Type af aktivt indhold	Beskrivelse
Tilslutningstilstand for AccessIT	Viser status for tilslutningen af AccessIT 3-enheden: Afbrudt, Afbryder, Tilslutter eller Tilsluttet. Kan kombineres med handlingen Slut til AccessIT til at oprette en knap, der viser status, og som slutter til en AccessIT-enhed, når den vælges.
Batteriniveau	Viser det aktuelle batteriniveau i procent: 0-100 %. Symbolet ændres for at vise batteriniveauet og viser, når enheden er tilsluttet strømmen, og batteriet oplades.
Chattilstand	Hvis handlingen Slå chattilstand til/fra findes på knappen (standard), viser etiketten knaphandlingen: Chat eller Stop chat. Hvis handlingen Slå chattilstand til/fra ikke findes på knappen, viser etiketten den aktuelle chattilstand: Chattilstand til eller Chattilstand fra.
Aktiv Boardmaker-aktivitet	Viser titel og miniaturebillede for en eventuelt aktiv Boardmaker-aktivitet. Kan kombineres med handlingen Åbn aktiv Boardmaker-aktivitet for at oprette en knap, der åbner den aktive Boardmaker-aktivitet og samtidig viser titlen og miniaturebilledet for aktiviteten.
Dato	Viser den aktuelle dag, måned og år. Dataformatet fastsættes af landestandarden.
Ugedag	Viser den aktuelle ugedag.
Tilstand for lydløs/hørlig feedback	Hvis handlingen Slå feedbacklyd til/fra findes på knappen (standard), viser etiketten knaphandlingen: Slå feedbacklyd fra, eller Slå feedbacklyd til. Hvis handlingen Slå feedbacklyd til/fra ikke findes på knappen, viser etiketten den aktuelle status for feedbacklyden: Hørlig feedbacklyd slået fra eller Hørlig feedbacklyd ikke slået fra.
Lydstyrke for feedbacklyd	Viser lydstyrken for feedbacklyd: 0-100 %. Kan kombineres med handlingen Feedbacklyd op eller Feedbacklyd ned til at oprette en knap, der kontrollerer lydstyrken samt viser niveauet for lydstyrken for feedbacklyden.
Lysstyrke i partnervindue	Kun for Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheder. Viser lysstyrke i partnervinduet i procentdele: 0-100 %. Kan parres med en handling, der sætter lysstyrken i partnervinduet op eller en handling, der sætter lysstyrken i partnervinduet ned for dermed at oprette en knap, som styrer lysstyrken og samtidigt viser lysstyrken af det aktuelle partnervindue.
Strømtilstand for partnervindue	Kun for Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheder. Hvis handlingen Slå strøm til partnervinduet til/fra findes på knappen (standard), viser etiketten knaphandlingen: Slå partnervinduet til eller Slå partnervinduet fra. Hvis handlingen Slå strøm til partnervinduet til/fra ikke findes på knappen, viser etiketten den aktuelle strømtilstand for partnervinduet: Partnervindue til eller Partnervindue fra.
Oplæsningstilstand	Hvis handlingen Læs meddelelsesvinduet op findes på knappen (standard), viser etiketten knaphandlingen: Læs op eller Stop. Hvis handlingen Læs meddelelsesvinduet op ikke findes på knappen, viser etiketten den aktuelle oplæsningstilstand: Læser op, eller Læser ikke op.
Tilstand for tale slået til/fra	Hvis handlingen Slå tale til/fra findes på knappen (standard), viser etiketten knaphandlingen: Slået til eller Slået fra. Hvis handlingen Slå tale til/fra ikke findes på knappen, viser etiketten den aktuelle status for tale: Slået fra eller Ikke slået fra.
Lydstyrke for tale	Viser lydstyrken for tale: 0-100 %. Kan kombineres med handlingen Lydstyrke for tale op eller Lydstyrke for tale ned til at oprette en knap, der kontrollerer lydstyrken samt viser niveauet for lydstyrken for tale.
Tidspunkt	Viser det aktuelle systemtidspunkt i timer og minutter. Tidsformatet bestemmes af region-sindstillingen for operativsystemet. Bemærk: Symbolet er en urskive, som ikke forandrer sig.

8.6.3 Knapmeddelelse

Knapbeskeden kan bestå af tekst, optaget lyd eller en lydfil, der er valgt på din enhed. Når knapbeskeden består af tekst, indsættes teksten i beskedvinduet, når knappen vælges. Hvis beskedvinduet ikke er åbent, læses teksten på knapbeskeden op. Optaget lyd og lydfiler i knapbeskeden afspilles, når knappen vælges.

8.6.3.1 Skift tekst i knapbesked

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Skriv i tekstfeltet **Meddelelse**.

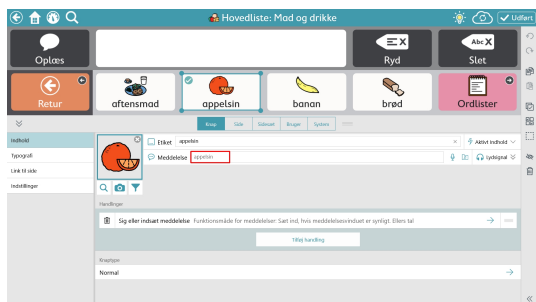

Figur 8.10 Tekstfelt til knapmeddelelse

8.6.3.2 Lav en optagelse

1. Vælg  **Optag**. Dialogboksen Optag besked åbnes.
2. Vælg  **Optag** for at starte optagelsen.
3. Vælg  **Stop**, når optagelsen er færdig.
4. Vælg  **Afspil** for at høre optagelsen.
5. Vælg **Gem** for at gemme optagelsen, når du er færdig med at lave optagelsen. Vælg Annullér for at lukke dialogboksen Optag besked.

8.6.3.3 Tilføj lydfil

Tilføj en lydfil, og opret en knap, der afspiller en sang eller et andet lydspor.

1. Vælg  **Tilføj lydfil**.
2. Navigér til, og vælg en lydfil på din enhed. Filen skal være mindre end 50 MB.
Understøttede filtyper: .aac, .m4a, .mp3, .wav, .wma
3. Vælg **Udført**.


8.6.4 Lydsignal på knap

Lydsignalet kan bruges sammen med adgangsmetoderne Touch afslut, musedvæl, Gaze Interaction og scanning. Lydsignalet er et knapeksempel, der læses op, når knappen fremhæves men endnu ikke er valgt.

8.6.4.1 Skift lydsignal på knap

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.

3. Vælg **Lydsignal** for at udvide rækken.

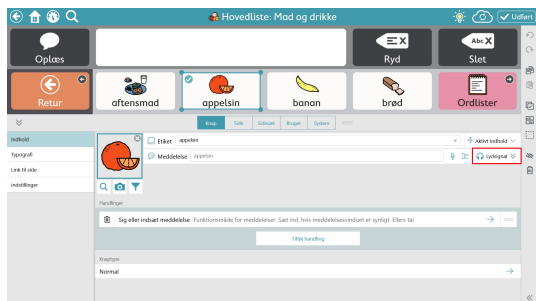

Figur 8.11 Tekstfelt til lydsignal på knap

4. Skriv i tekstfeltet **Lydsignal**.

Se afsnittet 8.6.3.2 *Lav en optagelse*, hvis du vil optage dit eget lydsignal.


8.6.5 Knapbillede

En knap kan vise et symbol eller billede.

8.6.5.1 Skift knapbillede


1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Føj et billede til knappen:
 - Søg efter et symbol:

- a. Vælg knappen  **Søg i symboler**.
Dialogboksen til søgning efter symbol åbnes.

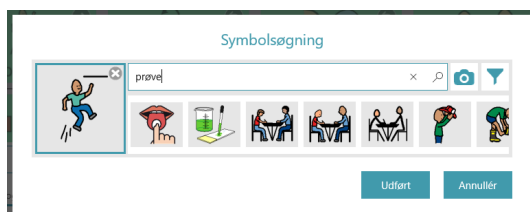

- b. Skriv i tekstfeltet for at tilpasse dine søgeord.
 - c. Vælg det ønskede symbol.
 - d. Vælg **Udført**.
- Brug kameraet til at tage et billede, der kan bruges som knapbillede:
 - a. Vælg knappen  **Kamera**.
 - b. Vælg **Fra kamera**.
 - c. Brug kameraet på din enhed til at tage et billede.
 - Brug et billede, der er gemt på din lokale enhed:
 - a. Vælg knappen  **Kamera**.
 - b. Vælg **Fra fotobibliotek**.
 - c. Naviger med filbrowseren til den ønskede billedfil.

Hvis du ikke vil have et symbol på knappen, skal du vælge **X't** i hjørnet af det aktuelle symbol eller indstille Knaplayout til Kun etiket. Se afsnit 8.8.3.5 *Knaplayout*.

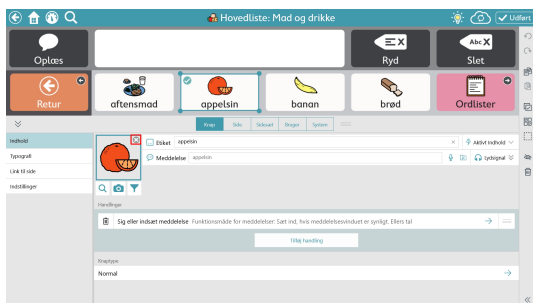

8.6.5.2 Filtrér søgeresultatet for symbol


1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg knappen  **Symbolfilter**.
4. Vælg elementerne, der skal være i dit søgeresultat for symbol (voksen, barn, kvinde, mand).

 Filterindstillingerne er i kraft, indtil du redigerer dem igen.

8.6.6 Knapttype

Indstillingen Knapttype fastsætter knappens adfærd.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg **Knapttype**.
4. Vælg knapttype på listen:
 - **Normal** – Kan indeholde et symbol, en etiket, en besked og handlinger. Standardhandlingen er Læs op/indsæt meddelelse.
 - **Prædiktation** – Gætter det næste ord baseret på den nuværende ordsammensætning i meddelelsesvinduet. Vælg knappen for at indsætte det viste ord i meddelelsesvinduet.
 - **Tastatur** – Bruges til at indsætte et enkelt tegn i meddelelsesvinduet og reagere på passende måde på modifikatorer, som fx skift-tasten eller tasten Caps Lock. Knapper på tastaturet kan også afspille en optaget lyd eller lydfil, når de vælges. Se afsnit 8.6.3.2 *Lav en optagelse* og 8.6.3.3 *Tilføj lydfil*.
 - **Ordbøjning** – Ændrer målordet til den angivne ordform, dvs. flertal, datid osv. Målet indstilles til en af to indstillinger: sidste ord i meddelelsesvinduet eller alle grammatikknapper.

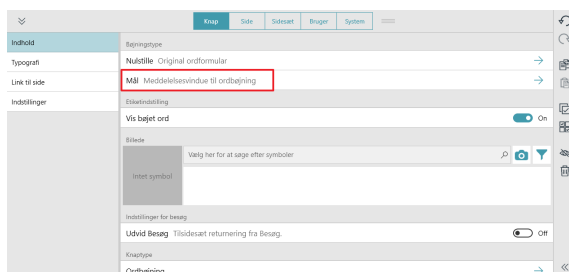

 Indstillingen for knappen Sprogregler skal være nøjagtig den samme som for ordbøjningsknappen og grammatikknappen, for at bøjninger virker korrekt.

- **Grammatik** – Opdaterer sin egen etiket med et gæt på den ønskede grammatiske form af ordet baseret på meddelelsesvinduetts aktuelle indhold, en valgt ordbøjningsknap eller en valgt knap til underforstået grundled.
 - **Underforstået grundled** – En knap til underforstået grundled kan bruges til at bøje grammatikknapper og tillige indsætte sin etiket i meddelelsesvinduet, når den er udfyldt med et relevant stedord (kun spansk). Når knappen til underforstået grundled er valgt én gang, bøjer den grammatikknapper, så de passer til stedordet på knappen til underforstået grundled. Hvis knappen vælges igen, indsættes etiketten (stedord) på knappen til underforstået grundled i meddelelsesvinduet.
- Hvis sprogreglerne for knappen til underforstået grundled er indstillet til spansk (Mexico, Spanien eller USA), kan et af følgende stedord bruges på knappen:

- yo
- tú
- usted
- él
- ella
- nosotros
- nosotras
- vosotros
- vosotras
- ustedes
- ellos
- ellas



Indstillingen for knappen Regler for sprog skal være nøjagtig den samme som for knappen til underforstået grundled og grammatikknappen, for at bøjninger virker korrekt.

8.7 Knaphandlinger

Handlinger giver dig mulighed for at oprette knapper, der gør noget!

Tilføj eller redigér knaphandlinger



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg **Tilføj handling** for at vælge en handling, der skal føjes til knappen. (Er kun tilgængelig, når **knaptypen** er indstillet til **Normal**).



Skriv søgeord i feltet **Søg efter handlinger** for at finde handlinger, der passer til din søgning. Vælg  ikonet for information i titlen på afsnittet for at få flere oplysninger om, hvad handlingerne gør.



Favorithandlinger vises først på listen med handlinger for at gøre adgangen nem. Vælg  stjerneomridset for at føje handlingen til favoritlisten. Vælg  den udfyldte stjerne for at fjerne handlingen fra favoritlisten.

Handlinger vedrørende meddelelser

Handlinger vedrørende meddelelser	Beskrivelse
Ryd beskedvindue	Ryd indholdet i meddelelsesvinduet.
Slet ord	Slet sidste ord i meddelelsesvinduet.
Kopiér meddelelsesvindue til knap	Kopiér teksten i meddelelsesvinduet, og føj derefter teksten til den brugervalgte knapetiket.
Kopiér meddelelsesvindue til udklipsholder	Kopiér teksten i meddelelsesvinduet til systemudklipsholderen.
Indsæt udklipsholder i meddelelsesvindue	Indsæt indholdet af systemudklipsholderen i meddelelsesvinduet.

Handlinger vedrørende meddelelser	Beskrivelse
-----------------------------------	-------------

Del meddelelsesvindue	Del indholdet af meddelelsesvinduet.
Læs meddelelsesvinduet op	Læs indholdet af meddelelsesvinduet op.
Læs meddelelse op, eller indsæt meddelelse	Læs en meddelelse på en knap op/indsæt en meddelelse fra en knap.
Læs sætning op	Læs sidste sætning i meddelelsesvinduet op.
Stop All Sound	Stop al tale og alle lyde, der aktuelt afspilles eller er sat i kø i Snap Core First.
Slå chattilstand til/fra	Slå chat til og fra. Når du slår chat til, gemmes indholdet af det aktuelle meddelelsesvindue, og vinduet slettes derefter. Når du chatter, kan du placere nyt indhold i meddelelsesvinduet og få det læst op. Når du slår chat fra, gendannes det gemte indhold af meddelelsesvinduet, og du kan fortsætte, hvor du slap.

Handlinger vedrørende navigation	Beskrivelse
----------------------------------	-------------

Annullér Besøg	Annullerer besøget og lader dig blive på siden.
Udvid Besøg	En knap med denne handling udløser ikke returnering til den forrige side, når besøgstilstanden er aktiv.
Gå tilbage	Gå tilbage til forrige side.
Gå til startside	Gå til startside.
Link	Link til en anden side.
Åbn Dashboard	Åbn siden Dashboard.
Åbn tastatur	Åbn tastatursiden.
Åbn Whiteboard***	Åbn Whiteboard.
Retur fra Besøg	Returnér til den forrige side, og annullér besøget.
Skift sidesæt	Skift til et andet sidesæt.

Handlinger for Boardmaker-aktiviteter	Beskrivelse
---------------------------------------	-------------

Åbn en Boardmaker-aktivitet eller -mappe†	Åbn en Boardmaker-aktivitet eller -mappe som en side i Snap eller som et pop op-vindue.
Åbn Bibliotek til Boardmaker-aktivitet ‡	Åbn Bibliotek til Boardmaker-aktivitet i Snap. Brugeren kan gennemse mapper og afspille aktiviteter fra biblioteket. Biblioteket til Boardmaker-aktivitet findes i mappen Aktiviteter i Snap på Boardmakeronline.com
Åbn aktiv Boardmaker-aktivitet ‡	Åbn en eventuelt aktiv Boardmaker-aktivitet.

Handlinger vedrørende adfærdsstøtte	Beskrivelse
-------------------------------------	-------------

Først, derefter	Vis rækkefølgen Først, derefter i et pop op-vindue.
Minitidsplan	Viser en minitidsplan i en pop op.
Script	Vis et script i et pop op-vindue.
Synlig timer	Vis et tidsur med nedtælling af den angivne tid i topbjælken.

Handlinger vedrørende adgangsmetode	Beskrivelse
Kalibrér øjenstyringsenhed	Begynd kalibrering af øjenstyring.
Sæt adgangsmetode på pause	Sætter adgangsmetoden på pause, og starter adgangsmetoden igen. Teksten på knapetiketten viser, om adgangsmetoden i øjeblikket er sat på pause eller er aktiv. Tilgængelige adgangsmetoder: Musedvæl og Gaze Interaction.
Indstil adgangstid	Indstiller tidsvariablen for adgangsmetoden til den angivne værdi. Den pågældende tidsvariabel afgøres af den aktive adgangsmetode, når funktionen <i>Indstil handling for adgangstid er aktiveret</i> . Du kan eksempelvis tilføje handlingen, når adgangsmetoden er indstillet til berøring, men brugeren aktiverer senere handlingen med adgangsmetoden Gaze Interaction for at ændre dvæletiden ved øjenstyring.
Vis status for øjenstyringsenhed	Viser vindue med styringsstatus for øjenstyringsenhed.
Handlinger vedrørende kontrol med lydstyrke	Beskrivelse
Slå hørlig feedback til/fra	Slå lyden til hørlig feedback til eller fra.
Lydstyrke ned for hørlig feedback	Skru ned for lydstyrken til hørlig feedback.
Lydstyrke op for hørlig feedback	Skru op for lydstyrken til hørlig feedback.
Set Volume	Indstil systemets lydstyrke til et bestemt niveau.
Slå tale til og fra	Slå systemlyden til eller fra.
Lydstyrke for tale ned	Skru ned for systemlydstyrken.
Lydstyrke for tale op	Skru op for systemlydstyrken.
Handlinger vedrørende omverdenskontrol	Beskrivelse
Send Google Assistant-kommando	Send en tekstkommando til Google Assistant. Valgmuligheder: Send beskedtekst på knap, eller send tekst i beskedvindue.
Send infrarødt signal	Send det angivne infrarøde signal.
Handlinger vedrørende AccessIT	Beskrivelse
Slut til AccessIT*	Frakobl den aktuelt tilsluttede AccessIT-enhed, og vis derefter vælgeren til AccessIT-enhed.
Nulstil AccessIT*	Stop de angivne AccessIT-handlinger: overførsel af tekst, aktiverede tastaturtaster, klik og/eller kontinuerlige musebevægelser.
Send knaptekst*	Send en knapetiket eller meddelelse til AccessIT-enheden.
Send tastaturtast*	Send en tastaturtast til AccessIT-enheden.
Send tekst i meddelelsesvinduet*	Send den aktuelle tekst i meddelelsesvinduet til AccessIT-enheden.
Send museklik*	Send museklik til AccessIT-enheden.
Send musebevægelse*	Send musebevægelse til AccessIT-enheden.
Send tekst*	Send tekst til AccessIT-enheden.
Handlinger vedrørende start af andre programmer	Beskrivelse
Start program	Start det specificerede program.

Handlinger vedrørende enhed	Beskrivelse
Genstart enhed	Genstarter enheden.
Luk enheden ned	Lukker enheden ned.
Slå Fuld skærm til/fra	Slå tilstanden Fuld skærm til eller fra på enheden.
Handlinger vedrørende partnervindue	Beskrivelse
Lysstyrke i partnervindue ned**	Reducerer lysstyrken i partnervinduet.
Lysstyrke i partnervindue op**	Øger lysstyrken i partnervinduet.
Slå strøm til partnervindue til/fra**	Slår partnervinduet til eller fra.

*Handlingen kræver en Tobii Dynavox AccessIT 3-enhed. Se afsnit 8.7.4 *AccessIT*

*Handlingen kræver en Tobii Dynavox I-13- eller I-16-enhed.

***Se afsnit 8.7.3 *Whiteboard*

‡ Handlingen kræver en konto på Boardmakeronline.com og tilknyttet Boardmaker-indhold. Se afsnit 8.7.5 *Afspil Boardmaker-aktiviteter i Snap*

† Liste med tidsvariable, der påvirkes af handlingen Indstil adgangstid.

Tabel 8.1 Diagram over adgangstid

Adgangsmetode	Påvirket tidsvariabel
Gaze Interaction med dvæl	Dvæletid
Gaze Interaction med kontakt	Holdetid for kontakt
Gaze Interaction med blink	Minimumstid for blink
Touch enter/touch afslut	Holdetid
Automatisk scanning med 1 kontakt	Scanningshastighed
Scanning med 1 kontakt	Pausetid
Dvælescanning med 1 kontakt	Pausetid
Omvendt scanning	Hastighed
Musedvæl	Dvæletid
Berøring	ingen


8.7.1 Slet handling

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg knappen  **Slet** ved siden af en handling.
4. Vælg den røde knap **Slet** for at bekræfte sletningen.

8.7.2 Omorganisér knaphandlinger

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knap.

- Tryk længe på håndtaget  på en handling, og træk den derefter til en ny placering i listen over handlinger.

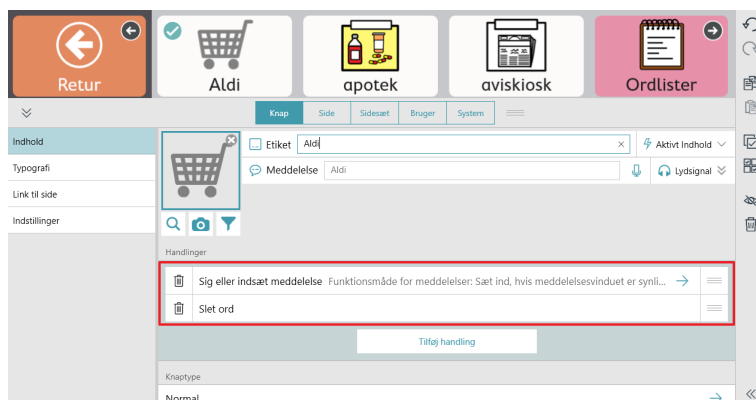


8.7.3 Whiteboard

 Whiteboard er kun tilgængelig, når du bruger berøring som adgangsmetode.

Whiteboard er et område, hvor du kan vise billeder og lave frihåndstegninger. Du kan oprette lige så mange Whiteboards, som du ønsker. De eksisterer, indtil du sletter dem.

Du skal bruge handlingen Åbn Whiteboard på en knap for at åbne Whiteboard.

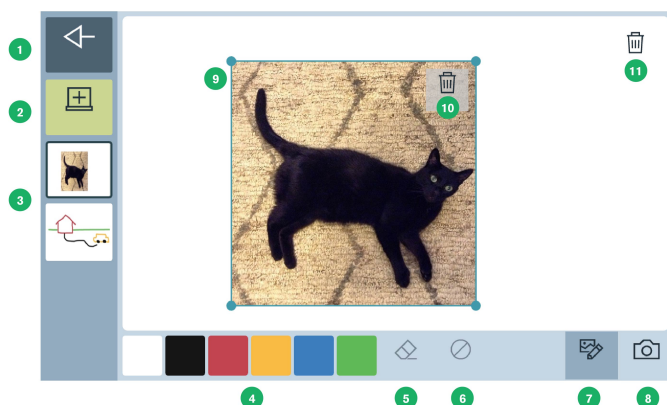

- Tilbage** – Retur til sidesættet.
- Nyt Whiteboard** – Opret nyt Whiteboard.
- Liste med eksisterende Whiteboards** – Vælg Whiteboard, der skal vises og redigeres.
- Tegnepalet** – Vælg farve, og tegn en frihåndstegning på Whiteboard.
- Sletteværktøj** – Slet tegninger i bestemte områder.
- Ryd** – Ryd alle tegninger på det aktuelle Whiteboard.
- Redigér billeder** – Flyt, tilpas størrelse på eller slet billeder på Whiteboard.
- Tilføj billede** – Føj et billede til Whiteboard. Brug dit indbyggede kamera til at tage et billede, eller find et billede gemt på din enhed.

Handlinger vedrørende Tilføj billede

- Tag et billede
 - Vælg et foto – Bemærk: Dialogboksen for handlingen kan kun bruges med berøring.
 - Annullér
- Valgt billede** – Klik og træk fra midten af billedet for at flytte billedet. Klik og træk i et hjørne for at tilpasse størrelsen af billedet.
 - Slet billede** – Slet det valgte billede.

11. **Slet Whiteboard** – Slet det aktuelle Whiteboard.

8.7.4 AccessIT

Snap understøtter Tobii Dynavox AccessIT 3, der er en USB-enhed til Bluetooth, der sender tastetryk, musebevægelser og museklik til en standardcomputer med Windows 10 fra en enhed, der kører Tobii Dynavoxs app Snap Core First. Besøg <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT> for at lære mere om Tobii Dynavox AccessIT 3



Der medfølger AccessIT-sider i sidesættene til Core First, der er oprettet med Snap version 1.7 eller senere. Du kan få sidebunter til AccessIT på <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>, der kan importeres til dine eksisterende sidesæt



Fra nu af omtaler dette dokument computeren, der modtager kommandoer, som "pc'en", og enheden, der sender kommandoer, som "taleenheden".



AccessIT 3 bruger trådløs teknologi fra Bluetooth®. Pc'en (med tilsluttet AccessIT 3) og taleenheden skal befinde sig inden for en afstand af ca. 10 m fra hinanden for at oprette og opretholde Bluetooth-parring, når AccessIT 3 bruges.

Både taleenheden og pc'en skal være tændt og låst op, før nedennævnte trin udføres.

8.7.4.1 Konfiguration af AccessIT

Tilslut AccessIT

1. (På pc'en): Sæt AccessIT 3 i en USB-port.



AccessIT 3 kræver USB 2.0 eller senere.

Aktivér Bluetooth – Windows-taleenheder

1. (På taleenheden): Vælg menuen **Start**, og vælg derefter **Indstillinger**.
2. Vælg **Enheder**.
3. Vælg **Bluetooth**.
4. Flyt til/fra-knappen til **Bluetooth** til stillingen TIL.

Aktivér Bluetooth – iOS-taleenheder (iPad)

1. (På taleenheden): Navigér til **Indstillinger > Bluetooth**, og aktivér Bluetooth.

8.7.4.2 Handlinger på AccessIT

Handlingerne på AccessIT er beregnet til at blive anvendt i kombinationer. Almindelige pc-handlinger, som fx klik og træk, kræver mere end én handling. Handlingerne beskrives nedenfor.



Hvis en AccessIT-enhed ikke er tilsluttet, når en knap med en AccessIT-handling vælges, åbnes vælgeren til AccessIT-enhed automatisk.

- Slut til AccessIT – Frakobl en eventuel eksisterende AccessIT-enhed, og få vist vælgeren til AccessIT-enhed. Handlingen er nyttig, når der skiftes fra en AccessIT-enhed til en anden AccessIT-enhed. Handlingen skal ikke bruges til at starte alle sessioner med AccessIT, da alle handlinger på AccessIT automatisk åbner vælgeren til AccessIT-enhed, hvis der ikke er tilsluttet en AccessIT-enhed.
- Nulstil AccessIT – Stop de angivne kommandotyper som er under udførelse: tastetryk, museklik, musebevægelser og/eller tekst.
- Send knapttekst – Send knapmeddelelsen til AccessIT-enheden. Send knapetiketten, hvis knappen ikke indeholder en meddelelse.
- Send tastetryk – Send det angivne tastetryk. Valgmuligheder: Hold tasten nede, og/eller vent en angiven periode, når tastetrykket er sendt (før udførelsen af den næste handling).
- Send tekst i meddelelsesvindue – Send teksten i det aktuelle meddelelsesvindue til AccessIT-enheden. Hvis der er anvendt symboltavler i meddelelsesvinduet, sendes symbolerne ikke.
- Send tekst – Send meddelelsen til AccessIT-enheden.

- Send museklik – Send den angivne kliktype (venstreklik, højreklik, midterklik, venstre dobbeltklik). Valgmuligheder: Vent en angiven periode, når klikket er sendt (før udførelsen af den næste handling), og/eller klik længe.
- Send musebevægelse – Send en musebevægelse til AccessIT-enheden. Musebevægelser udføres fra den aktuelle placering af musen. Flyt den blå bold til placeringen på cirklen, der svarer til retningen af den ønskede musebevægelse, og indtast derefter et tal i afstandsfeltet. Enheden for afstanden er den mindste, registrerbare musebevægelse, som ligger mellem 0,08 mm og 0,1 mm, afhængigt af udstyret og indstillingen for musehastigheden på pc'en. Valgmuligheder: Bevæg musen kontinuerligt (muse fortsætter med at bevæge sig i den angivne retning, indtil en anden handling stopper den, omdirigerer den, eller den når kanten af skærmen), og/eller vent i en angiven periode, når musebevægelsen er sendt (før udførelsen af den næste handling).



Figur 8.12 Retning for musebevægelse – Placer den blå bold på cirklen for at indstille retningen for musens bevægelse.



Nogle AccessIT-brugere synes muligvis, at det er nyttigt at aktivere Windows-indstillingen "Vis placeringen af markøren, når der trykkes på tasten Ctrl" på pc'en. Brug handlingen Send tastaturtast til at sende tastaturtasten Ctrl fra Snap. Der vises midlertidigt cirkler i bevægelse rundt om musemarkøren på pc'en, der gør markøren nemmere at se. Navigér til *Indstillinger > Enheder > Mus > Yderligere museindstillinger > fanen Markørindstillinger* for at få adgang til denne museindstilling i Windows.

8.7.4.3 Strømindstillinger for pc og AccessIT

Din pc skal være tændt og vågen for at modtage AccessIT-kommandoer. Justér indstillingerne for strømstyring på din pc, så computeren (harddisken) aldrig sættes til slumring, når den er tændt, så du er sikker på, at du altid har adgang til pc'en.

Pc'en kan stadig modtage AccessIT-kommandoer, selvom skærmen er gået i energisparetilstand. Når Snap sender en AccessIT-kommando (tastetryk, musebevægelse eller museklik), vækkes pc-skærmen.

Strømindstillingerne i Windows findes i *Indstillinger > System > Strømstyring og slumretilstand*.


8.7.5 Afspil Boardmaker-aktiviteter i Snap

Boardmaker-aktiviteter er interaktivt og trykt materiale, der er designet til undervisning, kommunikation og masser af sjov! Du kan afspille dine Boardmaker-aktiviteter her i Snap. Brug handlingen Åbn bibliotek til Boardmaker for at gennemse og afspille aktiviteter. Eller brug handlingen Åbn Boardmaker-aktivitet eller -mappe for at navigere direkte til en bestemt aktivitet eller mappe. Du kan også gøre aktiviteter tilgængelige offline.



Boardmaker-aktiviteter, der afspilles i Snap, er designet til brug i hjemmet, hvor hjælperen administrerer Tobii Dynavox-kontoen, der bruges både til Snap og Boardmaker Online. Hjælperen har i denne situation direkte adgang til mappen med Boardmaker-aktiviteter, hvor vedkommende kan placere Boardmaker-aktiviteter til brugeren.

I en klasseværelsessituation eller en behandlingssituation, hvor en underviser eller en pædagog tildeler Boardmaker-aktiviteter, skal eleven udføre sine opgaver ved hjælp af appen Boardmaker 7 Student Center. Det er gratis at installere og bruge appen Boardmaker 7 Student Center, der er kompatibel med de fleste enheder, der understøtter Snap Core First. Eleven har sandsynligvis brug for en separat log-in, som skal leveres af underviseren, for at få adgang til sine opgaver på appen Boardmaker 7 Student Center.

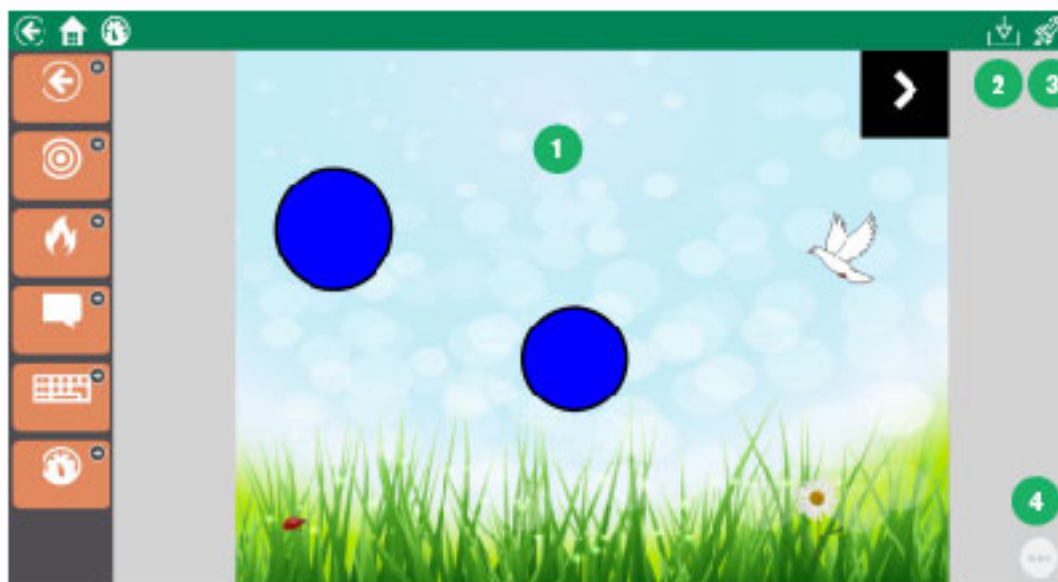

Figur 8.13 Afspil Boardmaker-aktivitet i Snap

1	Aktivitet	Boardmaker-aktiviteter afspilles som standard på Snaps hovedside. Du kan også afspille Boardmaker-aktiviteter i et pop op-vindue ved at aktivere funktionen <i>Afspil i pop op-vindue</i> , når du fjører en Boardmaker-handling til en knap.
2	Administrér offlineadgang	Vælg aktiviteterne på den aktuelle side, der skal downloades og gøres tilgængelige offline. De valgte aktiviteter kan afspilles i Snap uden en internetforbindelse.
3	Gå til Boardmaker Online	Start Boardmakeronline.com i et browservindue.
4	Ikon for Menu for Boardmaker-aktivitet	Åbn Menu for Boardmaker-aktivitet, der giver adgang til følgende knapper:



- Tilbage – Forlad aktiviteten, og vend tilbage til den forrige side.
- Bibliotek – Gå til biblioteket Boardmaker Online i Snap.
- Genstart – Start forfra i den aktive aktivitet.
- Flyt – Flyt ikonet for Menu for Boardmaker-aktivitet til et andet hjørne på skærmen.

8.7.5.1 Administrér aktiviteter på Boardmaker Online

Din myTobiiDynavox-konto kommer med en gratis konto til fællesskabet på Boardmakeronline.com. Log ind for at finde og gemme delte Boardmaker-aktiviteter fra fællesskabet samt overføre dine egne Boardmaker-aktiviteter.



Kontrollér, at du har forbindelse til internettet, før du starter, og at du er logget ind på Snap med din Tobii Dynavox-konto.

1. Vælg **Dashboard** i Snap, og vælg derefter knappen **Boardmaker-aktiviteter**.



Hvis der ikke findes en knap til Boardmaker-aktiviteter på dit Dashboard, kan du oprette en knap med handlingen Åbn bibliotek til Boardmaker-aktivitet og derefter vælge knappen i brugertilstand. Handlingen Åbn bibliotek til Boardmaker-aktivitet opretter den krævede mappe i din konto på Boardmaker Online første gang, at handlingen udføres.

2. Åbn en webbrowser, og navigér til Boardmakeronline.com
3. Vælg **Log ind**, og indtast derefter logonoplysningerne til din Tobii Dynavox-konto. Du skal tilmelde dig en gratis fællesskabskonto eller starte et abonnement, hvis du ikke tidligere har logget ind på Boardmakeronline.com.
4. Vælg **Mit Boardmaker**.
5. Vælg mappen **Aktiviteter i Snap**.
6. Føj aktiviteter og mapper til mappen Aktiviteter i Snap for at gøre dem tilgængelige via handlinger i Snap. Mappen Aktiviteter i Snap indeholder flere forudindlæste aktiviteter, så du hurtigt kan komme i gang.



Mappen Aktiviteter i Snap på Boardmaker Online svarer til Bibliotek til Boardmaker-aktivitet i Snap.

8.7.5.2 Åbn Bibliotek til Boardmaker

Brug handlingen til at tillade brugeren at gennemse alle Boardmaker-aktiviteterne i mappen Aktiviteter i Snap på Boardmaker Online i Snap. Brugeren kan vælge at afspille alle aktiviteter i Bibliotek til Boardmaker-aktivitet.



Alle aktiviteter i biblioteket kan afspilles, hvis enheden har en aktiv internetforbindelse. Når enheden er offline, kan kun aktiviteter, der er downloadet eller som tidligere er gemt, afspilles. Se afsnit 8.7.5.5 *Offlineadgang til Boardmaker-aktivitet*.

1. Navigér til siden, hvor du ønsker en knap med tilknytning til dit Bibliotek med Boardmaker-aktivitet.
2. Vælg knappen  **Redigér**.
3. Vælg knappen, der skal bruges til at åbne Bibliotek med Boardmaker-aktivitet.
4. Vælg **Tilføj handling**.
5. Rul ned til afsnittet med Boardmaker-aktiviteter, og vælg **Åbn bibliotek med Boardmaker-aktivitet**.

8.7.5.3 Åbn Boardmaker-aktivitet

Afspil en bestemt aktivitet i Boardmaker-biblioteket.



Alle aktiviteter i biblioteket kan afspilles, hvis enheden har en aktiv internetforbindelse. Når enheden er offline, kan kun aktiviteter, der er downloadet eller som tidligere er gemt, afspilles. Se afsnit 8.7.5.5 *Offlineadgang til Boardmaker-aktivitet*.

1. Navigér til siden, hvor du ønsker en knap med tilknytning til Boardmaker-aktiviteten.
2. Vælg knappen  **Redigér**.
3. Vælg knappen, der skal bruges til at åbne Boardmaker-aktiviteten.
4. Vælg **Tilføj handling**.
5. Rul ned til afsnittet Boardmaker-aktiviteter, og vælg **Åbn en Boardmaker-aktivitet eller -mappe**. Dialogen for Aktiviteter i Snap åbner.
6. Navigér gennem mapperne for at finde aktiviteten, som du ønsker at afspille. Vælg aktiviteten.
7. Hvis du ønsker at åbne aktiviteten i et pop op-vindue, skal du aktivere funktionen **Åbn i pop op-vindue**. Ellers åbner aktiviteten som en side i Snap.



Brugeren kan ikke navigere væk fra og senere vende tilbage til aktiviteter, der er åbnet i et pop op-vindue, for at fortsætte, hvor de slap. Pop op-vinduer passer bedst til korte aktiviteter, der nemt kan startes forfra.

8. Vælg **Vælg aktivitet**. Vælg Annullér for at afslutte uden at gemme.



Knapetiketten opdateres automatisk med navnet på den tilknyttede aktivitet.

8.7.5.4 Åbn mappen Boardmaker

Åbn en bestemt mappe i dit Boardmaker-bibliotek. Brugeren kan vælge aktiviteter i mappen, der kan afspilles i Snap.



Du kan tildele Boardmaker-aktiviteter til brugeren ved at oprette en mappe til vedkommende i din mappe Aktiviteter til Snap på Boardmakeronline.com og derefter knytte mappen til brugerens sidesæt til Snap. Flyt aktiviteter over i mappen efter behov, og brugeren kan se aktiviteterne i Snap (brugeren skal have en internetforbindelse og være logget på sin konto hos myTobiiDynavox i Snap for at få adgang til de opdaterede aktiviteter).



Alle aktiviteter i biblioteket kan afspilles, hvis enheden har en aktiv internetforbindelse. Når enheden er offline, kan kun aktiviteter, der er downloadet eller som tidligere er gemt, afspilles. Se afsnit 8.7.5.5 *Offlineadgang til Boardmaker-aktivitet*.

1. Navigér til siden, hvor du ønsker en knap med tilknytning til Boardmaker-aktiviteten.
2. Vælg knappen  **Redigér**.
3. Vælg knappen, der skal bruges til at åbne Boardmaker-mappen.
4. Vælg **Tilføj handling**.
5. Rul ned til afsnittet Boardmaker-aktiviteter, og vælg **Åbn en Boardmaker-aktivitet eller -mappe**. Dialogen for Aktiviteter i Snap åbner.
6. Navigér til mappen, som skal tilknyttes, så du befinder dig i den ønskede mappe.
7. Vælg **Vælg mappe**. Vælg Annullér for at afslutte uden at gemme.



Knapetiketten opdateres automatisk med navnet på den tilknyttede mappe.

8.7.5.5 Offlineadgang til Boardmaker-aktivitet

Du kan downloade Boardmaker-aktiviteter til din enhed og gøre dem tilgængelige for afspilning, når enheden er offline.



Offlineaktiviteter downloades for hver enkelt enhed. Hvis sidesættet er synkroniseret eller delt på en anden enhed, skal downloadprocessen gentages på den anden enhed for at gøre aktiviteterne tilgængelige offline.

1. Åbn Bibliotek til Boardmaker i Snap. Se afsnit 8.7.5.2 *Åbn Bibliotek til Boardmaker*.
2. Åbn en mappe for at få vist listen med aktiviteter.
3. Vælg  Administrér offlineadgang.
4. Markér feltet ud for aktiviteterne, der skal downloades til enheden for afspilning offline.

Aktiviteter, der viser ikonet , er downloadede og tilgængelige på enheden offline.

5. Vælg **X** for at lukke dialogen, når du er færdig med at downloade aktiviteter til mappen.
6. Gentag trinnene ovenfor for mapper med aktiviteter, som du ønsker at gøre tilgængelige offline.



En aktivitet, der ikke er markeret til offlinebrug, downloades som en midlertidig fil, når den afspilles, mens der er en aktiv internetforbindelse. Derfor kan visse aktiviteter, der er afspillet tidligere, men som ikke er udtrykkeligt markeret til offlinebrug, fortsat afspilles, når enheden er offline. Det garanteres ikke, at disse aktiviteter er tilgængelige offline.

8.7.5.6 Åbn aktiv Boardmaker-aktivitet

Hvis brugeren afspiller en Boardmaker-aktivitet i Snap og navigerer væk fra aktiviteten til en anden side, kan vedkommende vende tilbage til stedet i Boardmaker-aktiviteten, hvor den blev forladt.



Handlingen fungerer kun med aktiviteter, der afspilles i Snaps hovedvindue. Den fungerer ikke med aktiviteter, der er åbnet som pop op-vinduer.

1. Navigér til siden, hvor du ønsker en knap, der returnerer brugeren til den aktive Boardmaker-aktivitet.




2. Vælg knappen **Redigér**.
3. Vælg knappen, der skal bruges til at navigere til den aktive Boardmaker-aktivitet.
4. Vælg **Tilføj handling**.
5. Rul ned til afsnittet Boardmaker-aktiviteter, og vælg **Åbn aktiv Boardmaker-aktivitet**.



Hvis der ikke findes en aktiv Boardmaker-aktivitet, deaktiveres knappen automatisk. Findes der en aktiv Boardmaker-aktivitet, aktiveres knappen automatisk, og etiketten viser aktivitetens navn og miniaturebillede.

8.8 Knaptypografi

Ændrer udseendet af en knap i kategorien knaptypografi.

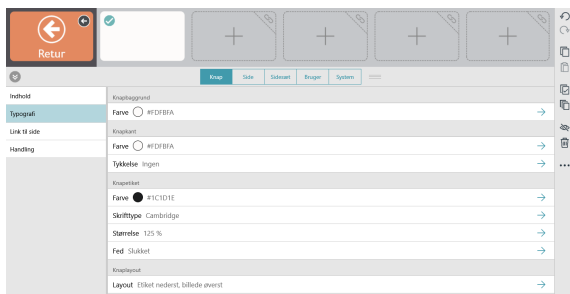

8.8.1 Knapbaggrund



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Farve** under Knapbaggrund.
5. Vælg farve.



Du kan oprette dine egne farver! Se afsnit 8.16 *Brugerdefinerede farver*.

8.8.2 Knapramme

8.8.2.1 Rammefarve



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Farve** under Knapramme.
5. Vælg farve.



Du kan oprette dine egne farver! Se afsnit 8.16 *Brugerdefinerede farver*.

8.8.2.2 Rammetykkelse



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Tykkelse** under Knapramme.
5. Vælg en rammetykkelse – ingen, tynd, mellem eller kraftig.



Figur 8.14 Knaprammer: Ingen, tynd, mellem og kraftig.

8.8.3 Knapetiket

8.8.3.1 Farve



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Farve** under Knapetiket.
5. Vælg farve.



Du kan oprette dine egne farver! Se afsnit 8.16 *Brugerdefinerede farver*.

8.8.3.2 Skrifttype



Standardindstillingen indstilles på fanen Sidesæt. Hvis du vil ændre standarden fra sidesættet, skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Fra**. For at sætte indstillingen til det samme som resten af sidesættet skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Til**.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Skrifttype** under Knapetiket.
5. Vælg skrifttype.

8.8.3.3 Størrelse



Standardindstillingen indstilles på fanen Sidesæt. Hvis du vil ændre standarden fra sidesættet, skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Fra**. For at sætte indstillingen til det samme som resten af sidesættet skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Til**.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg kategorien **Typografi**.

4. Vælg **Størrelse** under Knapetiket.
5. Vælg størrelse.

8.8.3.4 Fed

 Standardindstillingen indstilles på fanen Sidesæt. Hvis du vil ændre standarden fra sidesættet, skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Fra**. For at sætte indstillingen til det samme som resten af sidesættet skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Til**.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Fed** under Knapetiket.
5. Indstil fed til **Til** eller **Fra**.

8.8.3.5 Knaplayout

 Standardindstillingen indstilles på fanen Sidesæt. Hvis du vil ændre standarden fra sidesættet, skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Fra**. For at sætte indstillingen til det samme som resten af sidesættet skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Til**.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Knaplayout** under Knapetiket.
5. Vælg layout i listen.



Etiket øverst, billede nederst




Etiket nederst, billede øverst



Etiket til venstre, billede til højre



Etiket til højre, billede til venstre

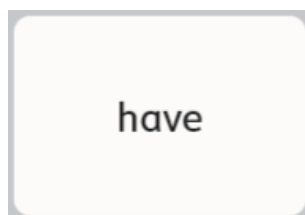

Kun etiket



Kun billede

8.9 Link til side/opret ny side

Når du vælger en linkknap, åbnes en ny side. Som standard identificeres linkknapper ved dette ikon  eller ikonet for

besøg . Se afsnittet 9.3.5 *Visning af link i sidesæt* om ændring af udseendet af link- og besøgsknapper.

8.9.1 Opret en linkknap i en tom celle

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg linkikonet i en tom celle.



- Se afsnittet 8.9.3 *Link til ny side/opret ny side* om link til en helt ny side.
- Se afsnittet 8.9.4 *Link til eksisterende side* om link til en eksisterende side.
- Se afsnittet 8.9.5 *Link til en ny kopi af en eksisterende side* om link til en (ny) kopi af en eksisterende side.
- Se afsnittet 8.9.6 *Importér og link til side* om import af og link til en side.

8.9.2 Opret et link fra en eksisterende knap

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg knappen, hvorfra der skal oprettes et link.
3. Vælg fanen **Knap**.
4. Vælg kategorien **Handling**.
5. Vælg **Tilføj handling**.
6. Vælg **Link**.
 - Se afsnittet 8.9.3 *Link til ny side/opret ny side* om link til en helt ny side.
 - Se afsnittet 8.9.4 *Link til eksisterende side* om link til en eksisterende side.
 - Se afsnittet 8.9.5 *Link til en ny kopi af en eksisterende side* om link til en (ny) kopi af en eksisterende side.
 - Se afsnittet 8.9.6 *Importér og link til side* om import af og link til en side.

8.9.3 Link til ny side/opret ny side

1. Vælg **Link til ny side**. Dialogboksen Ny side åbnes.
2. Skriv sidenavnet i feltet **Navn**. Vælg et symbol, eller vælg **X'et**, hvis du ikke vil have et symbol til siden.
3. Vælg **Opret** for at oprette linket og den nye side. Vælg **Annullér** for at vende tilbage uden at gemme.

8.9.4 Link til eksisterende side

1. Vælg **Link til eksisterende side**. Dialogboksen Link til eksisterende side åbnes.
2. Vælg en side i listen.



Indtast søgeord i søgefeltet for at finde en bestemt side, eller vælg Senest åbnede for at finde en side, som du har besøgt for nylig.

3. Vælg **Gem** for at oprette linket. Vælg **Annullér** for at vende tilbage uden at gemme.

Se afsnittet 8.9.7 *Besøg side* om Besøg side.

8.9.5 Link til en ny kopi af en eksisterende side

Linkmetoden giver dig mulighed for at bruge en side som skabelon til den nye side, som du opretter.

1. Vælg **Link til kopi af side**. Dialogboksen Link til kopi af side åbnes.

2. Vælg en side i listen.



Indtast søgeord i søgefeltet for at finde en bestemt side, eller vælg Senest åbnede for at finde en side, som du har besøgt for nylig.

3. Indtast et navn til den nye side i navnefeltet.
4. Vælg **Gem** for at oprette en kopi af den valgte side og linket. Vælg **Annullér** for at vende tilbage uden at gemme.

Se 8.9.7 *Besøg side* om Besøg side.

8.9.6 Importér og link til side

Hvis du gerne vil lave et link til en side i en fil med et sidebundt, kan du importere siden og linke den i ét trin ved at bruge funktionen Importér og link til side.

1. Vælg **Importér og link til side**. Du kan vælge at importere fra myTobiiDynavox eller fra en lokal fil:

Fra myTobiiDynavox

- a. Vælg **Fra myTobiiDynavox**.
Du bliver muligvis bedt om at logge ind på myTobiiDynavox. Dialogboksen til valg af sidebundt fra myTobiiDynavox åbnes.
- b. Vælg sidebundtet, der skal importeres, og vælg derefter **Næste**.
- c. Vælg siden, der skal linkes til, og vælg derefter **Importer**.



Der opstår konflikter mellem sider, når sidebundtet indeholder én eller flere sider, der allerede findes

på din enhed, men som ikke er identiske. Vælg ikonet  for hver sidekonflikt, og vælg derefter, om den eksisterende side skal beholdes eller overskrives af den importerede side fra sidebundtet. Du skal løse alle sidekonflikter på denne måde, før du kan fortsætte med at importere sidebundtet.

Fra en lokal fil

- a. Vælg **Fra en lokal fil**. Dialogboksen til import af sidebundt fra en lokal åbnes.
- b. Vælg **Gennemse**. Navigér til det ønskede sidebundt (.spb), og vælg derefter **Abn**.
- c. Vælg **Næste**.
- d. Vælg siden, der skal linkes til, og vælg derefter **Importer**.



Der opstår konflikter mellem sider, når sidebundtet indeholder én eller flere sider, der allerede findes

på din enhed, men som ikke er identiske. Vælg ikonet  for hver sidekonflikt, og vælg derefter, om den eksisterende side skal beholdes eller overskrives af den importerede side fra sidebundtet. Du skal løse alle sidekonflikter på denne måde, før du kan fortsætte med at importere sidebundtet.

8.9.7 Besøg side

Når indstillingen Besøg side er indstillet, oprettes et link, der fører brugeren tilbage til den forrige side efter et valg på den

linkede side, der udløser en returnering. Linkknapper, hvor funktionen Besøg side er aktiveret, viser dette ikon:



Sådan virker Besøg side

1. Vælg linkknappen Besøg side. Den linkede side åbner.
2. Foretag et valg på den linkede side.*
Den forrige side (med linkknappen Besøg side) åbnes.



*For at udløse en returnering til den forrige side skal den valgte knap *enten* indeholde en af følgende handlinger:

- Læs meddelelse op, eller indsæt meddelelse
- Læs sætning op
- Retur fra Besøg

eller være en af følgende knaptyper, der også udløser en returnering til den forrige side:

- Grammatikknap
- Bøjningsknapp
- Prædiktionsknapp
- Knapp på skærmtastatur, der er programmeret med tastetypen = mellemrum

Følgende handlinger og knaptyper udvider tilstanden Besøg og udløser *ikke* returnering til den forrige side:

- Udvid Besøg
- Gå tilbage
- Link
- Underforstået grundled
- Sæt adgangsmetode på pause
- Chat


Hvis en knap indeholder flere handlinger (nogle der udløser returnering til den forrige side, og nogle der udvider besøgstilstanden), udløses returnering til den forrige side ikke, medmindre knappen også indeholder handlingen Retur fra besøg.

Følgende handlinger annullerer et besøg:

- Annullér Besøg
- Gå til startside
- Åbn Dashboard
- Åbn tastatur

8.9.7.1 Aktivér Besøg side på en linkknapp

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg linkknappen.

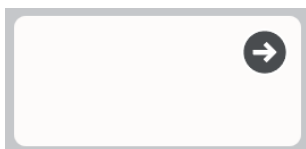

Figur 8.15 Eksempel på linkknapp

3. Vælg kategorien **Handling**.
4. Vælg handlingen **Link**.
5. Indstil **Besøg side** til Til.

8.9.7.2 Udvid, annullér eller returnér fra besøg

Du kan bruge handlinger til at afbryde eller forlænge et besøg på en side, der finder sted efter valget af en besøgsknapp. Hvis en valgt knap på den besøgte side indeholder en af følgende handlinger, ændres normal besøgsadfærd på den angivne måde:

- Udvid besøg – bliv i besøgstilstanden uanset handlingerne på knappen.
- Annullér besøg – afslut besøgstilstanden men bliv på siden.
- Returnér fra besøg – afslut straks besøgstilstanden (før der udføres flere handlinger på knappen), og returnér til den oprindelige side. Alle handlinger på knappen udelukkes.

8.10 Regler for sprog på knap

Indstillingen for sprogregler lader dig angive sproget, der bruges til søgning efter symboler, symboltavler, ordprædiktion, bøjning, automatisk omformning og talestemme (hvis en sprogspecifik stemme er indstillet for sproget) for knappen.

Knapper bruger en standardindstilling for sprogregler fra indstillingerne for sidesætniveau eller indstillingerne for sideniveau. Du kan manuelt indstille sprogreglerne for en knap ved at følge nedennævnte trin:



1. Vælg knappen **Redigér**.

2. Vælg knap.

3. Vælg kategorien **Indstillinger**.

4. Vælg **Sprogregler**.

5. Vælg sprog i listen:

- a. **Fuldt understøttede sprog** – Påvirker søgning efter symboler, symboltavler, ordprædiktion, bøjning, automatisk omformning og talestemme (hvis en sprogspecifik stemme er indstillet for sproget).
Sproget **Neutral** bruges primært med egennavne (fx Harriet Tubman eller Amsterdam). Når ord, der mærkes som neutrale, sendes til meddelelsesvinduet, læses de op i henhold til sprogreglerne for de øvrige ord i meddelelsesvinduet. Hvis meddelelsesvinduet er tomt, læses de neutrale ord op i henhold til indstillingen for sprogregler for den aktuelle eller seneste ikke-neutrale side.
- b. **Øvrige sprog** – Sprogene i denne kategori understøttes på forskellige niveauer i appen Snap Core First.

8.11 Fjernbetjening

Visse Tobii Dynavox-enheder, fx Indi og I-110, er udstyret med en infrarød sender, der kan kontrolleres med Snap. Det gør det muligt at bruge enhederne som fjernbetjening til apparater som fx et tv eller et stereoanlæg. Sidesættet Core First kommer med færdige sider til fjernbetjening i Dashboardet. Siderne til fjernbetjeningerne indeholder knapper, som du kan programmere med dine egne fjernbetjeningskommandoer.



Snap-fjernbetjening virker ikke med Tobii Dynavox-enhederne I-12(+) eller I-15(+).

8.11.1 Programmér en knap på fjernbetjening



Programmeringen af knapper på fjernbetjeningen skal kun gøres én gang pr. knap.

Du skal have fjernbetjeningen ved siden af dig. Du skal bruge den til at lære din enhed de infrarøde kommandoer.



1. Vælg knappen **Redigér**.

2. Vælg knappen på skærmen, som skal programmeres til at sende den infrarøde kommando.

3. Vælg fanen **Knap**.

4. Vælg kategorien **Handling**.

5. Vælg **Tilføj handling**.

6. Vælg **Send infrarødt signal**.

7. Vælg **Optag**, og ret fjernbetjeningen mod det infrarøde panel på din Tobii Dynavox-enhed, og tryk på knappen på fjernbetjeningen.

8. Hvis du ser meddelelsen "Optagelse udført!", skal du vælge **Udført**.

Hvis du ser meddelelsen "Der blev ikke registreret et signal. Prøv igen.", skal du gå tilbage til trin 7.

8.11.2 Brug af fjernbetjeninger



Fjernbetjeninger er kun tilgængelige til compatible Tobii Dynavox-enheder.

Du skal konfigurere din fjernbetjening på forhånd ved at programmere alle knapper på fjernbetjeningen med den korrekte infrarøde kommando. Se 8.11.1 *Programmer en knap på fjernbetjening*.




Figur 8.16 Dashboard – knap på fjernbetjening

1. Navigér til siden med den fjernbetjening, der svarer til apparatet (tv, stereoanlæg osv.), som skal styres.
2. Ret det infrarøde vindue på din Tobii Dynavox-enhed mod apparatet, der skal styres.
3. Vælg knappen til den ønskede kommando.

8.12 Redigér side


Ændringer i fanen Side påvirker *kun den aktuelle side*. Du kan bruge indstillingerne på fanen Side til at ændre visse indstillinger for sidesættet. Hvis du fx vil have vist meddelelseslinjen på alle sider med undtagelse af Dashboard-siden, skal du gøre følgende: 1. Aktivér meddelelseslinjen i indstillingerne for sidesættet. 2. Gå til siden for Dashboard. 3. Vælg fanen Side. 4. Vælg Indstillinger 5. Deaktivér indstillingen Match sidesæt på siden Visning af meddelelseslinje: Til. 6. Indstil Visning af meddelelseslinjen til Fra.

8.12.1 Sidenavn

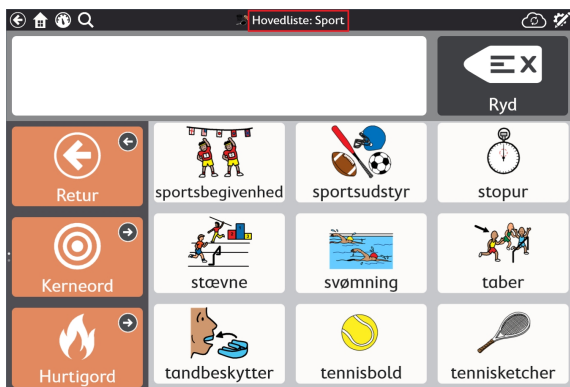


Figur 8.17 Sidenavn

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Skriv i feltet **Etiket** for at redigere sidenavnet.

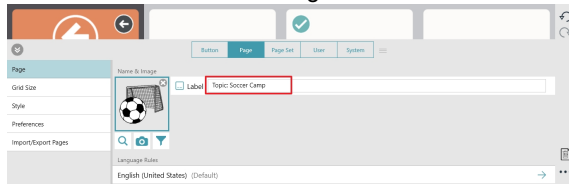


8.12.2 Sidesymbol

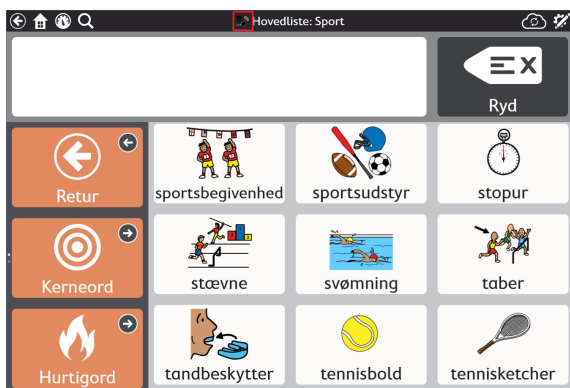

Figur 8.18 Sidesymbol

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Tilføj eller rediger sidesymbolet:
 - Søg efter et symbol:
 - a. Vælg knappen  **Søg i symboler**.
Dialogboksen til søgning efter symbol åbnes.

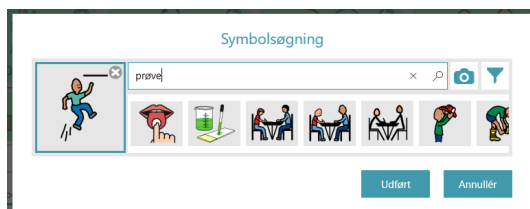

- b. Skriv i tekstfeltet for at tilpasse dine søgeord.
 - c. Vælg det ønskede symbol.
 - d. Vælg **Udført**.
- Brug kameraet til at tage et billede til sidesymbolet:
 - a. Vælg knappen  **Kamera**.
 - b. Vælg **Fra kamera**.
 - c. Brug kameraet på din enhed til at tage et billede.
 - Brug et billede, der er gemt på din lokale enhed:
 - a. Vælg knappen  **Kamera**.
 - b. Vælg **Fra fotobibliotek**.
 - c. Naviger med filbrowseren til den ønskede billedfil.



Hvis du ikke vil bruge et sidesymbol, skal du vælge **X**'et på sidesymbolet.

8.12.3 Regler for sidesprog

Indstillingen Regler for sidesprog fastsætter regler for standardsproget for knapperne på siden. Indstillingen for sprogregler styrer sproget, der bruges til søgning efter symboler, symboltavler, ordprædiktion, bøjning, automatisk omformning og talestemme (hvis en sprogspecifik stemme er indstillet for sproget).

Knapper bruger en standardindstilling for sprogregler fra indstillingerne for sidesætniveau eller indstillingerne for sideniveau. Når du fastsætter Regler for sidesprog, gælder indstillingen for alle eksisterende knapper på siden, og nye knapper, der oprettes på siden, bruger også indstillingen som standard. Se afsnittet 8.10 *Regler for sprog på knapom* ændring af sprogreglerne for visse knapper.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg **Sprogregler**.
4. Vælg sprog i listen:

- a. **Fuldt understøttede sprog** – Påvirker søgning efter symboler, symboltavler, ordprædiktion, bøjning, automatisk omformning og talestemme (hvis en sprogspecifik stemme er indstillet for sproget). Sproget **Neutral** bruges primært med egennavne (fx Albert Einstein eller Coca-Cola). Når ord, der mærkes som neutrale, sendes til meddelelsesvinduet, læses de op i henhold til sprogreglerne for de øvrige ord i meddelelsesvinduet. Hvis meddelelsesvinduet er tomt, læses de neutrale ord op i henhold til indstillingen for sprogregler for sidesættet.
- b. **Øvrige sprog** – Sprogene i denne kategori understøttes på forskellige niveauer i appen Snap Core First.

8.12.4 Gitterstørrelse for side



Standardindstillingen indstilles på fanen Sidesæt. Hvis du vil ændre standarden fra sidesættet, skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Fra**. For at sætte indstillingen til det samme som resten af sidesættet skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Til**.

8.12.4.1 Skift gitterstørrelse for side



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg kategorien **Gitterstørrelse**.
4. Indstil **Match indstilling for sidesæt** til **Fra**.
5. Vælg **Gitterstørrelse**.
6. Vælg en gitterstørrelse fra de optimerede gitterstørrelser, eller indstil antallet af rækker og kolonner, og opret din egen gitterstørrelse.




Medmindre du laver din helt egen specielle side, anbefales det kraftigt at bruge de optimerede gitterstørrelser til sidesættet. De optimerede gitterstørrelser viser sideindhold, der er udfyldt på forhånd, som designet af vores kliniske team. Det gør andre gitterstørrelser muligvis ikke.




Hvis du have vist meddelelseslinjen og/eller værktøjslinjen, skal du vælge en gitterstørrelse med mindst 3 rækker og 3 kolonner.

Se afsnittet 9.3.6 *Gittermargen i sidesæt* om ændring af mellemrummene mellem knapper.


Tabel 8.2 Eksempel på gitterstørrelser (ikke udtømmende)

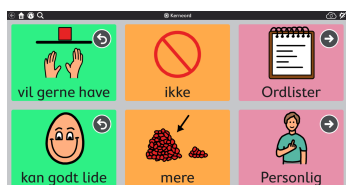

2 x 3

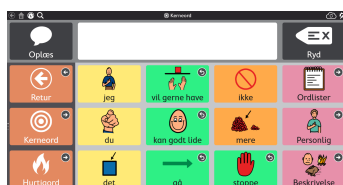

3 x 4

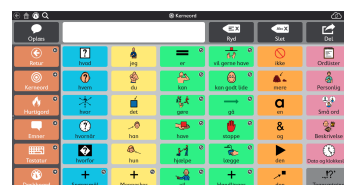

6 x 6

8.12.5 Baggrundsfarve for side



Standardindstillingen indstilles på fanen Sidesæt. Hvis du vil ændre standarden fra sidesættet, skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Fra**. For at sætte indstillingen til det samme som resten af sidesættet skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Til**.

1. Naviger til siden, der skal have en anden baggrundsfarve.
2. Vælg knappen  **Redigér**.
3. Vælg fanen **Side**.
4. Vælg afsnittet **Typografi**.
5. Sæt indstillingen Baggrundsfarve for side matcher sidesæt til **Fra**.
6. Vælg **Farve**. Listen over baggrundsfarver for side åbnes.
7. Vælg farve.



Du kan oprette dine egne farver! Se afsnit 8.16 *Brugerdefinerede farver*.

8.12.6 Vis/skjul meddelelseslinje



Standardindstillingen indstilles på fanen Sidesæt. Hvis du vil ændre standarden fra sidesættet, skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Fra**. For at sætte indstillingen til det samme som resten af sidesættet skal du ændre indstillingen Match sidesæt til **Til**.

8.12.6.1 Skift visning af meddelelseslinje

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg kategorien **Indstillinger**.
4. Sæt **Match indstilling for sidesæt** til **Til** for at matche den angivne indstilling eller til **Fra** for at ændre visningen af meddelelseslinjen på siden i forhold til resten af sidesættet.

8.12.7 Slet side



Sletning er en permanent handling. Slet kun en side, hvis du er sikker på, at du ikke skal bruge den igen på et senere tidspunkt.

1. Naviger til siden, der skal slettes.
2. Vælg knappen  **Redigér**.
3. Vælg fanen **Side**.
4. Vælg  **Slet**. Dialogboksen Slet side åbnes.
5. Vælg knappen **Slet** for at slette siden permanent, eller vælg **Annuller** for at vende tilbage til indstillingerne for siden uden at slette siden.

8.12.8 Importer/eksporter sider

Se afsnit 12.3 *Sidebundter*.


8.13 Scanningsgrupper

En scanningsgruppe er et område med knapper, der scannes som en enkelt enhed. Når en scanningsgruppe er valgt, scannes knapperne i området derefter. Brugen af scanningsgrupper kan gøre brugen af scanningsadgangsmetoden meget hurtigere.

For at bruge scanningsgrupper skal scanningsadgangsmetoden være aktiv og indstillingen Gruppescanning aktiveret. Se afsnit 13.13.7 *Indstillinger for scanning* med flere oplysninger.

Opret og redigér scanningsgrupper


1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg værktøjet  **Scanningsgrupper**.
Den første scanningsgruppe oprettes automatisk.
4. Vælg værktøjet  **Tegn** for at føje områder til din scanningsgruppe, og klik derefter på (eller klik og træk hen over) områderne på siden, der skal føjes til scanningsgruppen. Områderne kan være placeret over alt på siden, og de behøver ikke at røre ved hinanden.

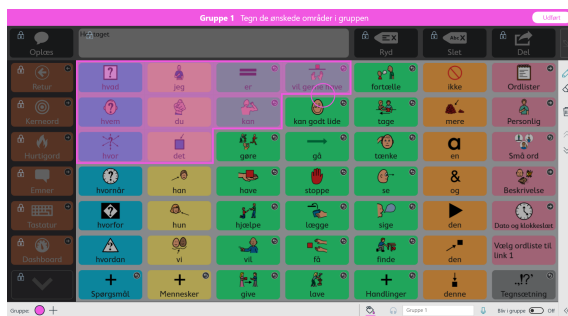

Figur 8.19 Tilføjelse til en scanningsgruppe med værktøjet Tegn.



5. Vælg værktøjet  **Slet** for at fjerne områder fra scanningsgruppen, og klik derefter på hvert enkelt område, der skal fjernes fra gruppen.

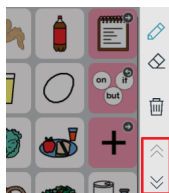


Scanningsgrupper defineres som områder på en side og ikke som bestemte knapper. Hvis du flytter en knap, indgår den muligvis i en anden scanningsgruppe på det nye sted.

Scanningsretningen går fra venstre mod højre og fra top til bund. Scanningsgruppenumrene er ikke knyttet til scanningsretningen.

Knapper på siden, der ikke er i en scanningsgruppe, scannes særskilt.

Scanningsgrupper er spesifikke for gitterstørrelsen.

6. Vælg knappen  i nederste venstre hjørne for at oprette en ny scanningsgruppe.
7. Når du skal navigere mellem scanningsgrupper, skal du vælge den farvede cirkel, der matcher farven på scanningsgruppen, der skal redigeres.

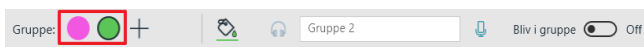

8. Når du skal slette en scanningsgruppe, skal du første vælge scanningsgruppen som beskrevet i forrige trin og derefter vælge  **Slet scanningsgruppe**.

8.13.1 Indstillinger for scanningsgrupper

Farve på scanningsgruppe



- Vælg farveværktøjet  for at vælge farve til den aktuelle scanningsgruppe. Farverne til scanningsgruppen vises kun i tilstanden Redigér men ikke i tilstanden Brug.

Lydsignal for scanningsgruppe

- Tekst, der tages ind i feltet Lydsignal, læses op, når gruppen scannes (hvis indstillingen Læs lydsignal op er aktiveret).



- Se afsnittet 8.6.3.2 *Lav en optagelse*, hvis du vil optage dit eget lydsignalspor.

Bliv i gruppe

- Når funktionen er aktiveret, starter scanningen igen inden for scanningsgruppen, når der er foretaget et valg. Det giver brugerne mulighed for nemt at foretage flere valg i samme gruppe. Når funktionen Bliv i gruppe er deaktiveret, starter scanningsretningen i toppen af siden, når der er foretaget et valg.

8.14 Rediger meddelelseslinje

Ændringer i beskedlinjen anvendes på hele sidesættet.

8.14.1 Flyt objekter, og tilpas objektstørrelse i beskedlinjen



1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg objektet (knap eller beskedvindue) i beskedlinjen, hvis størrelse skal tilpasses.
3. Du ændrer størrelsen på objektet ved at vælge og holde fast i en af de blå prikker i hjørnerne af objektet og derefter trække til den ønskede størrelse.
Du flytter objektet ved at vælge og holde fast i midten af objektet og derefter trække det til venstre eller højre i beskedlinjen.



Beskedvinduet kan kun gøres større ved hjælp af tomme celler.

8.14.2 Føj knapper til beskedlinjen



1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg en tom celle i beskedlinjen.
Du har tre valgmuligheder, hvis der ikke findes tomme celler i beskedlinjen:
 - Gør beskedvinduet mindre. Se afsnit 8.14.1 *Flyt objekter, og tilpas objektstørrelse i beskedlinjen*.
 - Slet en eller flere knapper i beskedlinjen. Se afsnit 8.14.3 *Fjern knapper i beskedlinjen*.
 - Forøg gitterstørrelsen. Se afsnit 9.2 *Gitterstørrelse*.

3. Vælg en knap fra menuen, der skal tilføjes beskedlinjen. Se afsnit 6 *Meddelelseslinjen*, og lær mere om knapperne på beskedlinjen.



Figur 8.20 Menu for knap i beskedlinje


8.14.3 Fjern knapper i beskedlinjen

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg en knap i beskedlinjen.
3. Vælg  **Slet**.



Beskedvinduet kan ikke slettes.

8.15 Redigér værktøjslinjen

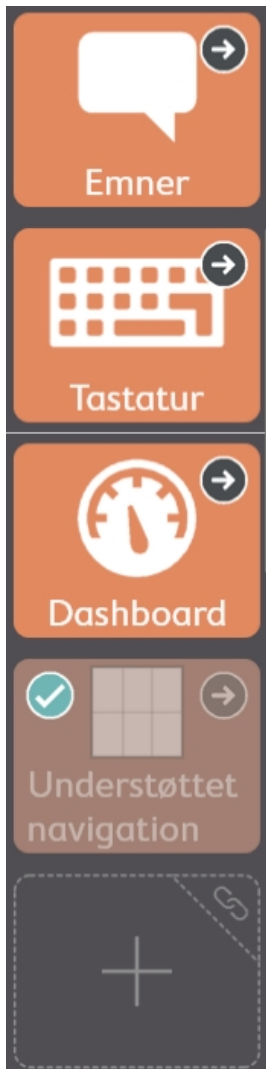

Figur 8.21 Værktøjslinjen i Core First, vist i redigeringstilstand, med knapper, skjulte knapper og en tom celle.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg en knap i værktøjslinjen, der skal redigeres.
Du skal muligvis rulle for at få vist alt indholdet i værktøjslinjen eller for at få adgang til tomme celler på værktøjslinjen.
3. Klik og hold, og træk derefter knapperne for at omorganisere dem på værktøjslinjen.



Du kan ikke trække knapper mellem siden og værktøjslinjen.

8.16 Brugerdefinerede farver

Du kan oprette, redigere og gemme brugerdefinerede farver ved hjælp af alle farvemenuer i Snap.

1. Vælg objektet, hvor farven skal ændres, mens du er i redigeringstilstand.



Vælg fanen **Sidesæt** for at anvende ændringerne over alt i sidesættet.

2. Vælg **Typografi**.
3. Vælg elementet, hvis farve skal redigeres (ramme, baggrund, tekst osv.).
4. Vælg knappen  Redigér farve.
5. Vælg **Gem** for at gemme din nye farve. Vælg Annullér for at gå tilbage uden at gemme.
6. Gemte brugerdefinerede farver er tilgængelige i afsnittet i toppen af farvemenuen, hver gang du åbner menuen.

Vælg farve, og vælg derefter  Slet, når du skal slette en gemt brugerdefineret farve.

9 Indstillinger for sidesæt

9.1 Sidesæt

9.1.1 Vælg sidesæt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg rækken under **Brugernavns sidesæt**.
4. Vælg et sidesæt på listen.

9.1.2 Opret nyt sidesæt

Opret sidesæt fra forudinstallerede sidesæt, kopi af eksisterende brugersidesæt eller en lokal fil



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg rækken under **Brugernavns sidesæt**.
4. Vælg **Opret sidesæt**.
Dialogboksen Vælg sidesæt åbnes.
5. Vælg sidesæt:

Forudinstallerede sidesæt

- Sidesættet **Core First** består af indholdet fra Core First.
- Vælg sidesættet **Tomt** for at starte fra bunden af med en tom skabelon.

Brugers sidesæt

- Vælg et eksisterende sidesæt som skabelon (opret en kopi).

Lokale filer

- Importer en fil med sidesæt (.sps), gemt på din lokale enhed eller et tilsluttet drev.

6. Vælg **Næste** for at oprette det nye sidesæt.
7. Indtast et navn til det nye sidesæt.
8. Vælg **Opret** for at oprette sidesættet. Vælg **Annuller** for at vende tilbage til indstillingerne for sidesæt uden at oprette det nye sidesæt.

Download sidesæt fra myTobiiDynavox



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg det aktuelle sidesæt.
4. Vælg **Download sidesæt**.



Du bliver muligvis bedt om at logge ind på myTobiiDynavox.

5. Vælg et sidesæt i listen, og vælg derefter **Download**.
6. Når sidesættet er downloadet, skal du indtaste et navn til sidesættet og derefter vælge **Gem**.

9.1.3 Omdøb sidesæt, og rediger beskrivelse

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg knappen  **Redigér** ud for navnet på sidesættet, som skal omdøbes, i listen med brugerens sidesæt. Dialogboksen Rediger sidesæt åbnes.
4. Rediger teksten i feltet **Navn** og/eller feltet **Beskrivelse**.
5. Vælg **Gem** for at gemme ændringerne. Vælg **Annuller** for at vende tilbage til listen med sidesæt uden at gemme.

9.1.4 Slet sidesæt

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg knappen  **Slet** ud for navnet på sidesættet, som skal slettes, i listen med brugerens sidesæt.



Du kan ikke slette sidesættet, der er aktivt lige nu.

4. Vælg den røde knap **Slet**.
5. Vælg **Slet** for at slette sidesættet permanent. Vælg **Annuller** for at vende tilbage til listen med sidesæt uden at slette.

9.1.5 Indstil startside

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg **Startside**.
4. Vælg en side i listen.



Indtast søgeord i søgefeltet for at finde en bestemt side, eller vælg Senest åbnede for at finde en side, som du har besøgt for nylig.

Den anbefalede startside for gitterstørrelserne 1 x 1 til og med 2 x 3 er Understøttet navigation. Kerneord er den foreslåede startside til gitterstørrelserne 3 x 3 og derover.

9.1.6 Indstil tastaturside

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg **Tastaturside**.
4. Vælg en side i listen.



Indtast søgeord i søgefeltet for at finde en bestemt side, eller vælg Senest åbnede for at finde en side, som du har besøgt for nylig.

Brug søgeordet "tastatur" for at begrænse søgeresultatet til tastatursider.

9.2 Gitterstørrelse

Gitterstørrelsen, der vælges i indstillingerne for sidesættet, er standardgitterstørrelsen for brugeren. Alle sider bruger som standard gitterstørrelsen, der er valgt i indstillingerne for sidesættet, medmindre der er angivet andet i indstillingerne for siden.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Gitterstørrelse**.
4. Vælg en gitterstørrelse fra de optimerede gitterstørrelser, eller vælg antallet af rækker og kolonner, og opret din egen gitterstørrelse.



Medmindre du laver din helt egen specielle side, anbefales det kraftigt at bruge de optimerede gitterstørrelser til sidesættet. De optimerede gitterstørrelser viser sideindhold, der er udfyldt på forhånd, som designet af vores kliniske team. Det gør andre gitterstørrelser muligvis ikke.




Hvis du har vist meddelelseslinjen og/eller værktøjslinjen, skal du vælge en gitterstørrelse med mindst 3 rækker og 3 kolonner.

Se afsnittet 9.3.6 *Gittermargen i sidesæt* om ændring af mellemrummene mellem knapper.

Tabel 9.1 Eksempel på gitterstørrelser (ikke udtømmende)



2 x 3

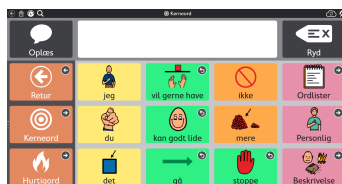

3 x 4



6 x 6

9.3 Typografi for sidesæt

Indstillingerne for typografi for sidesæt bestemmer sidesættets udseende. Alle sider i sidesættet, inkl. nye sider, bruger typografiindstillingerne, medmindre de ændres manuelt på side- eller knapniveau.

9.3.1 Skrifttype til knapetiketter i sidesæt

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Skrifttype** under Typografi.
5. Vælg skrifttype.

9.3.2 Skriftstørrelse til knapetiketter i sidesæt

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Skrifttype** under Typografi.
5. Vælg skriftstørrelse.

9.3.3 Fed til knapetiketter i sidesæt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Fed** under Typografi.
5. Indstil fed til Til eller Fra.

9.3.4 Knaplayout til sidesæt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Knaplayout** under Typografi.
5. Vælg layout i listen.



Etiket øverst, billede nederst




Etiket nederst, billede øverst



Etiket til venstre, billede til højre



Etiket til højre, billede til venstre

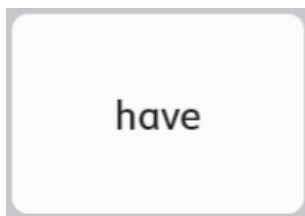

Kun etiket



Kun billede

9.3.5 Visning af link i sidesæt

Indstiller udseendet af knapper, der linker til andre sider.



Typografi for visning af link – ingen



Typografi for visning af link –
navigationsikoner



Typografi for visning af link – mapper

- **Ingen** – Matcher standardtypografien for knapper i sidesættet.
- **Navigationsikoner** – Der vises et lille ikon i hjørnet af knapperne, der viser, hvad de gør (linker til en anden side, besøger siden eller går tilbage)

- **Mapper som links** – Linkknapperne har form som mapper. (Typografien gælder kun for linkknapper, ikke for knapperne Gå tilbage eller Besøg).

9.3.6 Gittermargen i sidesæt

Indstiller størrelsen af mellemrummene mellem knapper.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Faktor for gittermargen** under Gittermargen.
5. Vælg en faktorstørrelse for gittermargenen.

9.3.7 Standardfarver til baggrund til sidesæt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg en af følgende rækker for at ændre den angivne baggrundsfarve:
 - **Baggrund på siden** – Standardfarve for baggrunden på siden.
 - **Baggrund på værktøjslinjen** – Standardfarve for baggrunden på værktøjslinjen.
 - **Baggrund på meddelelseslinjen** – Standardfarve for baggrunden på meddelelseslinjen (ikke meddelelsesvinduet).



Du kan oprette dine egne farver! Se afsnit 8.16 *Brugerdefinerede farver*.

9.3.8 Skrifttype til meddelelsesvindue i sidesæt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Skrifttype** under Meddelelsesvindue.
5. Vælg skrifttype.

9.3.9 Skriftstørrelse til meddelelsesvinduet i sidesæt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Skriftstørrelse** under Meddelelsesvindue.
5. Vælg skriftstørrelse.

9.3.10 Tekstfarve i meddelelsesvinduet i sidesæt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg kategorien **Typografi**.
4. Vælg **Tekstfarve** under Meddelelsesvinduet.
5. Vælg farve.



Du kan oprette dine egne farver! Se afsnit 8.16 *Brugerdefinerede farver*.

9.4 Indstillinger for sidesæt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg **Indstillinger**.
4. Vælg en af følgende for at ændre den angivne indstilling:

Skærm

- **Meddelelseslinje Til** – Når funktionen er aktiveret, vises meddelelseslinjen som standard på alle sider.
- **Placering af værktøjslinje** — Vælg, om værktøjslinjen vises i venstre eller højre side af siden eller er slukket.

Rækker på værktøjslinje

- **Match indstilling for sidesæt:** – Når funktionen er aktiveret, matcher antallet af tilgængelige rækker på værktøjslinjen antallet af rækker i det valgte sidesæt.
Hvis du vil ændre antallet af rækker i værktøjslinjen i forhold til gitterstørrelsen for sidesættet, skal du deaktivere indstillingen og derefter indstille det ønskede antal rækker.

Sidesæt til scanningsgrupper

- **1. xxx, 2. yyy, 3. zzz** – Indstil rækkefølgen for scanning af scanningsgrupper i sidesæt: side, værktøjslinje og meddelelseslinje.
Indstil scanningsrækkefølge, lydsignaler og Bliv i gruppe for scanningsgrupper i sidesæt: side, værktøjslinje og meddelelseslinje.

9.5 Adaptive knapper



Dette afsnit gælder kun for Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheder.

De tilpassede knapper der er på forsiden af Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheder, kan vælges med en berøring eller en



Gaze Interaction. To af disse knapper, knapperne  og , kan programmeres med Snap Core First handlinger, der udføres, hvis de vælges med Gaze Interaction, når du bruger Snap Core First.

Indstilling af tilpassede knapper til handlinger med Gaze Interaction



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg **Adaptive knapper**.
4. Vælg  eller  på listen.
5. Vælg **Tilføj handling**.
6. Vælg en handling.



For at tilføje yderligere handlinger gentages trin 5 og 6.

Indstilling af tilpassede knapper til handlinger med berøring



Egenskaber af tilpassede knapper med berøring indstilles i appen til Tobii Dynavox hardware indstillinger. Du kan starte denne app direkte med den genvej, der er på skrivebordet eller med Snap Core First, som beskrives herunder.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg **Adaptive knapper**.
4. Vælg **Indstil handlinger for berøring**. Appen Tobii Dynavox Indstillinger for hardware startes.
5. Brug rullemenuerne i appen til hardware indstillinger til at udvælge handlingerne af de tilpassede knapper, når de vælges med berøring.

9.6 Om sidesæt

Afsnittet viser versionsnummeret for sidesættet og indstillinger for materialeudviklere.

9.6.1 Indstillinger for materialeudviklere for sidesæt

Specielle indstillinger for forfattere af avancerede sidesæt.

9.6.1.1 Indstil optimerede gitterstørrelser

Fastsætter hvilke gitterstørrelser, der vises i listen med optimerede gitterstørrelser i sidesættet.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg **Om**.
4. Vælg **Indstillinger for materialeudviklere**.
5. Vælg **Gitterstørrelser**.
6. Rul til højre, og vælg **Tilføj ny størrelse** for at føje en ny gitterstørrelse til listen. Dialogboksen Tilføj optimeret gitterstørrelse åbnes.
7. Vælg antallet af **Rækker** og **Kolonner** til den nye optimerede gitterstørrelse (maks. 15 x 15), og vælg derefter **Gem**.
8. Vælg ikonet **Slet** på gitterstørrelsen i listen for at fjerne en optimeret gitterstørrelse. Der vises en advarsel om sletning af gitterstørrelsen. Du skal vælge **Slet**, hvis du er sikker på, at du vil slette gitterstørrelsen. Ellers skal du vælge **Annuller** for at lukke advarslen uden at slette.

9.6.1.2 Regler for sidesætsprog

Indstillingen Regler for sidesætsprog fastsætter regler for standardsproget for knapper og sider i sidesættet. Indstillingen for sprogregler styrer sproget, der bruges til søgning efter symboler, symboltavler, ordprædiktion, bøjning, automatisk omformning og talestemme (hvis en sprogspecifik stemme er indstillet for sproget).

Knapper bruger en standardindstilling for sprogregler fra indstillingerne for sidesætniveau eller indstillingerne for sideniveau. Når du fastsætter Regler for sidesætsprog, gælder indstillingen for alle eksisterende knapper i sidesættet, og nye knapper, der oprettes i sidesættet, bruger også indstillingen som standard. Se afsnittet 8.12.3 *Regler for sidesprog* om ændring af sprogreglerne for visse sider i sidesættet. Se afsnittet 8.10 *Regler for sprog på knap* om ændring af sprogreglerne for visse knapper.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg **Om**.
4. Vælg **Indstillinger for materialeudviklere**.
5. Vælg **Sprogregler**.
6. Vælg sprog i listen:

- a. **Fuldt understøttede sprog** – Påvirker søgning efter symboler, symboltavler, ordprædiktion, bøjning, automatisk omformning og talestemme (hvis en sprogspecifik stemme er indstillet for sproget).
- b. **Øvrige sprog** – Sprogene i denne kategori understøttes på forskellige niveauer i appen Snap Core First.

10 Print

Udskriv en eller flere sider på papir eller som PDF-dokument.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg  **Udskriv** i redigeringsværktøjslinjen i højre side af skærmen. Dialogboksen Vælg sider til udskrivning åbnes.



Du kan også udskrive fra afsnittet **Udskriv sider** på fanen Side.

4. Den aktuelle side føjes som standard til udskriftskøen. Vælg flere sider fra listen for at føje dem til udskriftskøen. Skriv i søgefeltet for at søge efter sidenavn.


Markér feltet **Vælg alle** for at føje alle sider fra det aktuelle søgeresultat til udskriftskøen.



Hvis du markerer Vælg alle og derefter fjerner markeringen fra Vælg alle, nulstilles printkøen.

Vælg tegnet **X** ved siden af sidenavnet for at fjerne siderne fra udskriftskøen.

Vælg **Næste**, når alle ønskede sider er føjet til udskriftskøen.

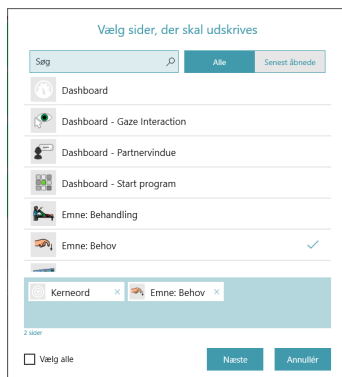

5. Vælg dine udskriftsindstillinger. Vis side opdateres for at afspejle de aktuelle indstillinger.




- Meddelelseslinje – Deaktiver indstillingen for at skjule meddelelseslinjen på de udskrevne sider.
- Værktøjslinje – Deaktiver indstillingen for at skjule værktøjslinjen på de udskrevne sider.
- Linkvisning – Deaktiver indstillingen for at skjule ikonerne til linkvisning på linkknapperne på de udskrevne sider.

- Tællere for brug af knap – Aktivér indstillingen for at vise de aktuelle tællere for brug af knap på de udskrevne sider. Bemærk: Funktionen Registrering af data skal aktiveres for at se tællerne for brug af knap.

Vælg **Udskriv**, når du har valgt dine udskriftsindstillinger.

6. Bemærk: Dialogen varierer afhængigt af din platform og standardprinterindstilling. Vælg din printer (eller udskriv til PDF), farveindstilling og papirretning. Valgmuligheder for papirstørrelse findes under **Flere indstillinger**.

Vælg **Udskriv**, når du har konfigureret dine printerindstillinger.

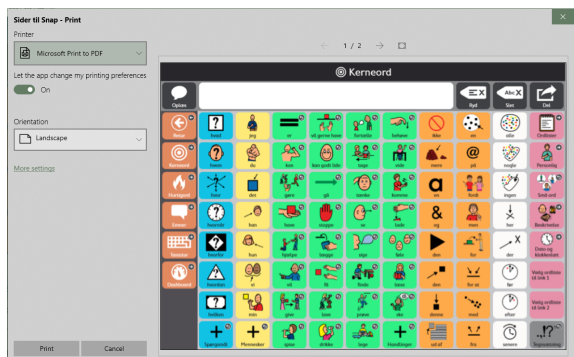

11 Google Assistant

Opdag fordelene ved en intelligent assistent takket være integrationen af Google Assistant i Snap Core First. Få straks adgang til informationer, underholdning, omverdenskontrol mm. direkte ved hjælp af softwaren.



Kontraindikation: Snap Core First, Google Assistant og eventuelle andre tilknyttede intelligente apparater må aldrig være brugerens eneste middel til kommunikation af vigtige oplysninger.



Snap Core First, Google Assistant og eventuelle andre tilknyttede intelligente apparater eller højttalere må ikke bruges som livsunderstøttende enheder eller til andre kritiske formål, og brugeren må ikke være afhængig af enhederne i tilfælde af manglende funktionalitet ved strømsvigt eller andre årsager.



Tobii Dynavox påtager sig intet ansvar for brugernes adfærd og fralægger sig alt ansvar for tab og/eller skade (herunder, men ikke begrænset til, skade på ejendom, personskade og død) knyttet til brugen af Snap Core First, Google Assistant, intelligente apparater, højttalere og alle kombinationer heraf.



Hvis du bruger andet udstyr end en ekstern Google-højttaler, skal du have en åben kommunikationsenhed. Kontakt Tobii Dynavoxs tekniske support, hvis du har brug for hjælp til at åbne enheden.

11.1 Tilslut din Google-konto

Når du skal bruge Google Assistant, intelligente højttalere og intelligent apparater, skal du først logge ind på din Google-konto i Snap Core First. Se afsnit 13.11 *Google-konto*.

11.2 Konfigurer dine Google-enheder

Følg vejledningen, der fulgte med dine enheder, for at konfigurere dem, før du bruger dem sammen med Snap Core First.

11.3 Sprogunderstøttelse i Google Assistant

Det er vigtigt at konfigurere Google Assistant med de samme sprog, som du bruger i Snap Core First.



Før du ændre sprog i Google Assistant, skal du kontrollere, at din mobilenhed eller tablet-pc er tilsluttet samme wi-fi-netværk eller knyttet til samme konto som din Google Nest, højttaleren Google Home eller andre enheder kompatible med Google Assistant.

Ændring af sprog i Google Assistant:

1. Åbn **Google Home** eller appen **Google Assistant** på din mobilenhed.
2. Vælg din konto > **Assistent-indstillinger** øverst til højre.
3. Vælg **Assistent** > **Sprog**.
4. Vælg dit aktuelle sprog.
5. Vælg nyt sprog.

Føj et andet sprog til din Assistent:

1. Åbn **Google Home** eller appen **Google Assistant** på din mobilenhed.
2. Vælg din konto > **Assistent-indstillinger** øverst til højre.
3. Vælg **Assistent** > **Sprog** > **Tilføj et sprog**.
4. Vælg et andet sprog.



Du kan tale til Google Assistant på begge sprog, men du kan ikke blande begge sprog i samme udtryk.

11.4 Tal til Google Assistant

Vi opfordrer dig til at starte med vores sider om Google Assistant i Core First*. Du finder siderne på Dashboardet i det aktuelle sidesæt Core First, eller du kan downloade og importere siderne fra mytobiidynavox.com/PagesetCentral. Siderne med Google Assistant indeholder knapper, der kan bruges til at bede Google Assistant om at finde informationer, spille musik og spil, foretage telefonopkald, styre omverdenskontrol mm. Du kan få detaljerede anvisninger om brugen af siderne om Google Assistant i Core First og om at tale til Google Assistant via Snap i startvejledningen [Brug Google Assistant sammen med Snap Core First](#).

*Google Assistant og siderne om Google Assistant findes ikke i alle lande eller på alle sprog.

Se nedenfor om oprettelse af dine egne knapper til Google Assistant.



Du skal være tilsluttet internettet for at bruge Google Assistant, og du skal være logget ind i Snap med din Google-konto og en enhed tilsluttet Google Assistant, som du planlægger at bruge.

Afhængigt af dit udstyr sender du kommandoer til Google Assistant på lidt forskellige måder. Følg anvisningerne til udstyret, som du bruger. Find ikonerne nedenfor for at finde trinnene, der er relevante for dig.

	Kun Google Assistant-konto. Intet yderligere udstyr.
	Google Nest Mini eller anden Google-højttaler.



Opret en knap, der sender en forudprogrammeret Google Assistant-kommando til en Google-højttaler

Denne mulighed er bedst til kommandoer til Google Assistant, der bruges mere end én gang.

1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Skriv kommandoen, der skal sendes til Google Assistant i beskedfeltet.



Beskeden skal starte med "OK Google" efterfulgt af et spørgsmål eller en kommando.

4. Vælg **Oplæs eller indsæt besked** i afsnittet Handlinger.
5. Vælg **Oplæs altid**.



Hvis du skal sende unikke kommandoer til Google Assistant på farten, skal du følge trinnene nedenfor og oprette en knap, der kun indeholder beskeden "OK Google". Sammensæt kommandoen til Google Assistant i brugertilstand i beskedvinduet, vælg knappen OK Google, og læs derefter beskedvinduet op for at sende kommandoen.



Opret en knap, der sender teksten i knapbeskeden til Google Assistant på din enhed

Denne mulighed er bedst til kommandoer til Google Assistant, der bruges mere end én gang.

1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Skriv spørgsmålet eller kommandoen, der skal sendes til Google Assistant, i beskedfeltet.



Skriv ikke "OK Google" foran spørgsmålet eller kommandoen.

4. Vælg **Tilføj handling**.
5. Rul ned til sektionen med omverdenskontrol, og vælg **Send Google Assistant-kommando**.
6. Vælg **Send beskedtekst på knap til Google Assistant**.



Opret en knap, der sender teksten i beskedvinduet til Google Assistant på din enhed

Denne knaptype giver brugeren mulighed for at sammensætte unikke kommandoer til Google Assistant i beskedvinduet og derefter sende dem til Google Assistant.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg knap.
3. Vælg **Tilføj handling**.
4. Rul ned til sektionen med omverdenskontrol, og vælg **Send Google Assistant-kommando**.
5. Vælg **Send tekst i beskedvinduet til Google Assistant**.



Prøv et andet ordvalg, hvis du ikke får det forventede resultat. For eksempel tændte kommandoen "OK Google. Tænd lyset" ikke den intelligente pære. I stedet tændte kommandoen "OK Google. Tænd lyset i alrummet" den intelligente pære, fordi den var konfigureret i alrummet i appen Google Home.

Du kan få flere idéer til brugen af Google Assistant sammen med Snap Core First ved at læse startvejledningen [Brug Google Assistant sammen med Snap Core First](#).

12 Deling og lagring

Tobii Dynavox Snap Core First indeholder flere nemme funktioner til deling og lagring af dine brugere, sidesæt og sider. Du er dækket ind, uanset om du gerne vil have samme sidesæt på alle dine enheder eller sende nye sider til en ven!

- **Lokal eksport/import** (bruger, sidesæt, sidebundt) – Bruges, når du gemmer filen på din lokale enhed, deler via et USB-drev eller med personer, som ikke har en konto på myTobiiDynavox.
- **Eksport/import via myTobiiDynavox*** (sidesæt, sidebundt) – Del sidesæt og sidebundter med andre myTobiiDynavox-brugere. Gem og få adgang til dine personlige filer på din egen myTobiiDynavox-konto.
- **Synkronisering*** (sidesæt) – Del aktuelle ændringer i et sidesæt med alle dine enheder og med angivne myTobiiDynavox-brugere. Et sidesæt, der deles via synkronisering, opretholder en opdateret version af sidesættet i clouden, så ændringer i sidesættet, der foretages på en godkendt enhed eller konto, deles med alle synkroniserede enheder og konti.

*Delingsmetoderne kræver en aktiv internetforbindelse.

Tabel 12.1 Filtyper til deling og lagring – deres indhold

Filtype	Sider	Indstillinger for side	Indstillinger for sidesæt	Indstillinger for bruger	Indstillinger for system
Bruger	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Sidesæt	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Sidebundt	Ja (specificerede sider)	Ja	Nej	Nej	Nej

12.1 Brugere

Filer med brugersikkerhedskopier indeholder sidesættene og indstillingerne, der er knyttet til brugeren. Filer med bruger-sikkerhedskopier indeholder ikke stemmer. Indstillinger for stemmer bevares dog, og den valgte stemme downloades automatisk, hvis den ikke findes på enheden (kræver internetforbindelse).

12.1.1 Sikkerhedskopier bruger

Se afsnit 13.3 *Sikkerhedskopier bruger*.

12.1.2 Gendan bruger

Se afsnit 13.4 *Gendan bruger*.

12.2 Sidesæt

En fil med sidesæt indeholder alle siderne, der er knyttet til sidesættet. Den indeholder ingen brugeroplysninger eller indstillinger på brugerniveau.

12.2.1 Importer sidesæt

Fra myTobiiDynavox



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg det aktuelle sidesæt.
4. Vælg **Download sidesæt**.



Du bliver muligvis bedt om at logge ind på myTobiiDynavox.

5. Vælg et sidesæt i listen, og vælg derefter **Download**.
6. Når sidesættet er downloadet, skal du indtaste et navn til sidesættet og derefter vælge **Gem**.

Fra en lokal fil



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg det aktuelle sidesæt.
4. Vælg **Opret sidesæt**.
5. Vælg fanen **Lokale filer**.
6. Vælg **Gennemse**.
7. Naviger til den ønskede .sps-fil, vælg filen, og vælg derefter **Åbn**.
8. Vælg **Næste**.
9. Indtast et entydigt navn til sidesættet, og vælg derefter **Opret**.

12.2.2 Gem kopi af sidesæt

12.2.2.1 Gem sidesæt på myTobiiDynavox

Filer med sidesæt, der er gemt på myTobiiDynavox, kan findes på myTobiiDynavox.com under Mine ting > Snap > Sidesæt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg det aktuelle sidesæt.
4. Vælg ikonet  **Gem** ud for sidesættet, der skal gemmes.
5. Vælg **Gem kopi på myTobiiDynavox**.



Du bliver muligvis bedt om at logge ind på myTobiiDynavox.

6. Indtast et entydigt navn til sidesættet og eventuelt en beskrivelse, og vælg derefter **Gem**.
7. En linje viser status for lagringen. Når delingen er udført, skal du vælge **Udført**.

12.2.2.2 Gem sidesæt lokalt



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Sidesæt**.
3. Vælg det aktuelle sidesæt.
4. Vælg ikonet  **Gem** ud for sidesættet, der skal gemmes.
5. Vælg **Gem kopi i en lokal fil**.
6. Indtast et entydigt navn til sidesættet og eventuelt en beskrivelse. Vælg derefter **Næste**.
7. Vælg **Gennemse**. Naviger til mappen, hvor filen med dit sidesæt skal gemmes, og vælg derefter **Gem**.
8. Vælg **Gem**.
9. En linje viser status for lagringen. Når delingen er udført, skal du vælge **Udført**.

12.2.3 Gem kopi af sidesæt (via myTobiiDynavox)



1. Vælg knappen **Redigér**.

2. Vælg fanen **Sidesæt**.



3. Vælg ikonet **Del sidesæt** ud for sidesættet, der skal deles.
4. Vælg **Del kopi**.
5. Indtast et entydigt navn til sidesættet og eventuelt en beskrivelse. Vælg derefter **Næste**.
6. Indtast brugernavn eller e-mailadresse til myTobiiDynavox for personen, som du sender sidesættet til, og vælg derefter tegnet **+** for at føje personen til listen med modtagere. Gentag processen for at tilføje flere modtagere. Når du har tilføjet alle modtagere, skal du vælge **Del**.
7. En linje viser status for delingen. Når delingen er udført, skal du vælge **Udført**.



Se afsnittet 12.2.2.2 *Gem sidesæt lokalt*, hvis du vil gemme en kopi af et sidesæt lokalt (til deling på et USB-drev, pr. e-mail osv.).

12.2.4 Synkronisér sidesæt

Synkronisering gør det nemt at vedligeholde samme version af et sidesæt på flere enheder. Synkronisering gemmer en opdateret version af dit sidesæt i clouden. Når du trykker på synkroniseringsknappen, sender du ændringerne, som du har foretaget på sidesættet på din lokale enhed, og modtager også ændringer, som blev foretaget på andre (synkroniserede) enheder.* Alle enheder har samme version af sidesættet, når de er synkroniserede.

Synkroniseringsknappen i topbjælken fortæller dig, når der findes en opdateret version af sidesættet, eller når du har lokale ændringer, der skal gemmes i clouden.

*Funktionen synkronisering understøtter ikke fletning af ændringer fra flere enheder til den samme side under samme synkronisering. Hvis der foretages samtidige ændringer af flere enheder til den samme side, bliver sideversionen overskrevet af versionen på enheden, der synkroniserer sidst. Personer, der redigerer et synkroniseret sidesæt, bør fortælle, hvilke sider de redigerer, og synkronisere ofte for at undgå at synkronisere ændringer til den samme side på samme tidspunkt.



Når der synkroniseres på flere enheder eller med flere brugere, skal indstillingen for navigationstype være den samme for alle enheder/brugere, der synkroniserer. Se afsnit 13.13 *Adgangsmetode*.

12.2.4.1 Synkronisering af sidesæt til myTobiiDynavox

Når du synkroniserer et sidesæt til myTobiiDynavox, opretter du en kopi af sidesættet på myTobiiDynavoxs server. Du kan bruge metoden som et hurtigt og nemt system til at lave en sikkerhedskopi af dit sidesæt. Har du andre enheder, der kører Snap Core First, kan du også synkronisere sidesættet på disse enheder.

Konfiguration af sidesæt til synkronisering



1. Vælg knappen **Synkronisering** i topbjælken. Du bliver muligvis bedt om at indtaste dit brugernavn og adgangskode til myTobiiDynavox.
2. Vælg **Synkronisering**.
3. Det var alt! Sidesættet er nu synkroniseret til din myTobiiDynavox-konto.



Når du redigerer sidesættet, skal du vælge synkroniseringsknappen i topbjælken for at sende ændringerne til clouden.

Synkronisering af sidesæt på flere enheder

Hvis et sidesæt allerede er konfigureret på en af dine enheder, kan du synkronisere med flere enheder ved at følge nedenstående trin på alle enheder.



1. Vælg knappen **Synkronisering** i topbjælken. Du bliver muligvis bedt om at indtaste dit brugernavn og adgangskode til myTobiiDynavox.
2. Vælg ikonet  **Download sidesæt**.
3. Vælg sidesættet, der skal downloades og synkroniseres, og vælg derefter **Download**.

4. Når sidesættet er downloadet, skal du vælge **Udført**.
Det synkroniserede sidesæt konfigureres automatisk som det aktive sidesæt.



Når du redigerer sidesættet, skal du vælge synkroniseringsknappen i topbjælken for at sende ændringerne til clouden og gøre det opdaterede sidesæt tilgængeligt for synkronisering på de øvrige enheder. Det er bedst at synkronisere, før du ændrer i sidesættet, og derefter synkronisere igen, når du har lavet ændringerne.

12.2.4.2 Invitér andre til at synkronisere med dit sidesæt

Når andre myTobiiDynavox-brugere synkroniserer med dit sidesæt, kan de ændre i sidesættet på deres enheder og synkronisere ændringerne til clouden. Du modtager deres ændringer, når du næste gang synkroniserer din enhed. På samme måde stilles ændringer, som du har lavet i sidesættet og derefter synkroniseret, til rådighed for de andre brugere, som du har givet lov til at synkronisere med dit sidesæt.

Synkronisering kan ikke flette ændringer fra flere brugere, som har redigeret den samme side på samme tidspunkt. I det tilfælde overskriver brugeren, der har synkroniseret sidst, siden med sin version. Du bør synkronisere lige før og efter, at du har ændret sidesættet, og fortælle de andre brugere, som synkroniserer med dit sidesæt, at de ikke må redigere den samme side på samme tidspunkt.

Du bør kun synkronisere med personer, som du har tillid til vil lave relevante ændringer i dit sidesæt.



Når du redigerer sidesættet, skal du vælge synkroniseringsknappen i topbjælken for at sende ændringerne til clouden og gøre det opdaterede sidesæt tilgængeligt for synkronisering på de øvrige enheder eller brugere.



Det er bedst at synkronisere, før du ændrer i sidesættet, og derefter synkronisere igen, når du har lavet ændringerne.

1. Vælg knappen  **Synkronisering** i topbjælken. Du bliver muligvis bedt om at indtaste dit brugernavn og adgangskode til myTobiiDynavox.
2. Vælg ikonet  **Del sidesæt**.
3. Indtast brugernavn eller e-mailadresse til myTobiiDynavox for personen, som du deler sidesættet med, og vælg derefter tegnet + for at føje personen til listen med modtagere. Gentag processen for at tilføje flere modtagere. Når du har tilføjet alle modtagere, skal du vælge **Del**.
4. Når delingen er afsluttet, skal du vælge **Udført**. Modtagerne får besked om delingen pr. e-mail og i appen Snap Core First.



Det tager op til en time, før beskeden om synkronisering vises efter afsendelsen af invitationen. Du kan når som helst søge efter beskeder ved at vælge ikonet Synkronisering.

12.2.4.2.1 Tilbagekaldelse af tilladelse til synkronisering

Du kan når som helst fjerne brugere fra synkroniserede sidesæt (som er dine).

1. Vælg knappen  **Synkronisering** i topbjælken.
2. Vælg ikonet  **Del sidesæt**.
3. Brugere, der har tilladelse til at synkronisere det aktuelle sidesæt, vises i den blå kasse. Vælg **X'et** ud for brugerens navn/e-mailadresse, og vælg derefter **Opdater** for at fjerne brugeren.
4. Vælg **Udført**.

12.2.4.3 Synkronisering med andres sidesæt

Når en person deler et sidesæt med dig til synkronisering, viser ikonet for synkronisering i topbjælken et ikon for vigtig be-

sked . Følg trinene nedenfor for at acceptere eller afslå invitationen.

Det tager op til en time, før beskeden om synkronisering vises efter afsendelsen af invitationen.

Accepter invitationen til synkronisering

1. Vælg knappen  **Synkronisering** i topbjælken.
2. Vælg ikonet  **Download sidesæt.**
3. Vælg **Gennemse sidesættene på min myTobiiDynavox-konto.**
4. Vælg sidesættet, der skal downloades og synkroniseres, og vælg derefter **Download.**
5. Når sidesættet er downloadet, skal du vælge **Udført.**

Afslå invitationen til synkronisering

1. Vælg knappen  **Synkronisering** i topbjælken.
2. Vælg ikonet  **Download sidesæt.**
3. Vælg **Gennemse sidesættene på min myTobiiDynavox-konto.**
4. Vælg sidesættet, der skal afslås, og vælg derefter ikonet  **Slet.**
5. Vælg **Afslå.**

12.2.4.4 Gendan et synkroniseret sidesæt til en tidligere gemt version

Du kan vende tilbage til en tidligere version af et synkroniseret sidesæt. Det er nyttigt, hvis du har lavet ændringer i sidesættet, som du vil fjerne eller annullere.

1. Vælg knappen  **Synkronisering** i topbjælken.
2. Vælg **Gemte versioner.**
3. Find datoen for synkronisering, der skal gendannes, på listen, og vælg derefter **Gendan.**

12.2.4.5 Overskriv synkroniseret sidesæt

Hvis du vil være sikker på, at din aktuelle version af sidesættet er den samme, som er gemt i skyen (uanset eventuelle ændringer synkroniseret af andre brugere), skal du bruge funktionen Overskriv.

1. Vælg knappen  **Synkronisering** i topbjælken.
2. Vælg **Avanceret.**
3. Vælg **Overskriv.**

12.2.4.6 Kun pull-synkronisering

Når du bruger funktionen Kun pull-synkronisering, modtager du ændringer til sidesæt (foretaget på andre enheder) men sender ingen ændringer til sidesæt foretaget på den aktuelle enhed. Hvis du vil bruge funktionen Kun pull-synkronisering, skal du begrænse adgangen til redigeringstilstanden med en adgangskode. Se afsnittet 14.1.1 Adgangskode om konfiguration af adgangskode og funktionen Kun pull-synkronisering.

12.3 Sidebundter

Du kan dele en del af dit sidesæt (en eller flere sider efter dit valg) som et sidebundet. Sidebundter indeholder kun de specificerede sider. Hvis siderne indeholder knapper med links til sider, der ikke findes på modtagerens enhed, virker linkene ikke.

12.3.1 Eksporter sidebundt

12.3.1.1 Eksporter sidebundt til myTobiiDynavox



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg **Importer/eksporter sider**.
4. Vælg **Eksporter sidebundt**.
5. Vælg **Til myTobiiDynavox**.
6. Vælg siderne, der skal indgå i sidebundtet. Der vises en markering ud for valgte sider på listen. Siderne vises i den blå kasse.



Den aktuelle side medtages automatisk i sidebundtet. Vælg X'et ved siden af sidenavnet i den blå kasse for at fjerne siden eller andre sider fra sidebundtet.

7. Når du har føjet de ønskede sider til sidebundtet, skal du vælge **Næste**. Dialogboksen Giv sidebundtet et navn åbnes.
8. Indtast et navn til sidebundtet i navnefeltet, og indtast eventuelt en beskrivelse af siderne i beskrivelsesfeltet.
9. Vælg **Eksporter** for at gemme sidebundtet på myTobiiDynavox.
10. Når eksporten er gennemført, vælg dernæst **Færdig**.

12.3.1.2 Eksporter sidebundt til en lokal fil



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg **Importer/eksporter sider**.
4. Vælg **Eksporter sidebundt**.
5. Vælg **Til en lokal fil**.
6. Vælg siderne, der skal indgå i sidebundtet. Der vises en markering ud for valgte sider på listen. Siderne vises i den blå kasse.



Den aktuelle side medtages automatisk i sidebundtet. Vælg X'et ved siden af sidenavnet i den blå kasse for at fjerne siden eller andre sider fra sidebundtet.

7. Når du har føjet de ønskede sider til sidebundtet, skal du vælge **Næste**. Dialogboksen Giv sidebundtet et navn åbnes.
8. Indtast et navn til sidebundtet i navnefeltet, og indtast eventuelt en beskrivelse af siderne i beskrivelsesfeltet.
9. (Kun Windows) Vælg **Næste**.
10. (Kun Windows) Vælg **Gennemse**. Naviger til mappen, hvor filen med dit sidesæt skal gemmes, og vælg derefter **Gem**.
11. Vælg **Eksporter**.
12. Når eksporten er gennemført, vælg dernæst **Færdig**.

12.3.1.3 Eksporter sidebundt til deling (via myTobiiDynavox)



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg **Importer/eksporter sider**.
4. Vælg **Eksporter sidebundt**.
5. Vælg **Til deling**.
6. Vælg siderne, der skal indgå i sidebundtet. Der vises en markering ud for valgte sider på listen. Siderne vises i den blå kasse.



Den aktuelle side medtages automatisk i sidebundtet. Vælg X'et ved siden af sidenavnet i den blå kasse for at fjerne siden eller andre sider fra sidebundtet.

7. Når du har føjet de ønskede sider til sidebundtet, skal du vælge **Næste**. Dialogboksen Giv sidebundtet et navn åbnes.
8. Indtast et navn til sidebundtet i navnefeltet, og indtast eventuelt en beskrivelse af siderne i beskrivelsesfeltet.
9. Vælg **Næste**. Dialogboksen Del sidebundt åbnes.
10. Indtast brugernavn eller e-mailadresse til myTobiiDynavox for personen, som du sender sidesættet til, og vælg derefter tegnet **+** for at føje personen til listen med modtagere. Gentag processen for at tilføje flere modtagere. Når du har tilføjet alle modtagere, skal du vælge **Del**.
11. Når eksporten er gennemført, vælg dernæst **Færdig**.

 Se afsnittet 12.3.1.2 Eksporter sidebundt til en lokal fil, hvis du vil gemme et sidebundt lokalt (til deling på et USB-drev, pr. e-mail osv.).

12.3.2 Importer sidebundt

12.3.2.1 Importer sidebundt fra myTobiiDynavox

Brug funktionen til at importere et sidebundt, der er gemt på din egen myTobiiDynavox-konto, eller et sidebundt, som en anden myTobiiDynavox-bruger har delt med dig.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg **Importer/eksporter sider**.
4. Vælg **Importer sidebundt**.
5. Vælg **Fra myTobiiDynavox**. Dialogboksen Vælg sidebundt fra myTobiiDynavox åbnes.
6. Vælg et sidebundt i listen.
7. Du skal vælge **Næste** for at downloade det valgte sidebundt.
8. Gennemgå listen med sider i sidebundtet. Du skal vælge **Importer** for at importere sidebundtet. Du skal vælge **Annuller** for at afbryde importen af sidebundtet.

 Der opstår konflikter mellem sider, når sidebundtet indeholder én eller flere sider, der allerede findes på din enhed, men som ikke er identiske. Vælg ikonet  for hver sidekonflikt, og vælg derefter, om den eksisterende side skal beholdes eller overskrives af den importerede side fra sidebundtet. Du skal løse alle sidekonflikter på denne måde, før du kan fortsætte med at importere sidebundtet.

12.3.2.2 Importer sidebundt fra en lokal fil

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Side**.
3. Vælg **Importer/eksporter sider**.
4. Vælg **Importer sidebundt**.
5. Vælg **Fra en lokal fil**.
6. Vælg **Gennemse**. Naviger til filen med sidebundtet (.spb), som skal importeres, vælg filen og vælg derefter **Åbn**.
7. Vælg **Næste**. Dialogboksen Gennemgå sidebundt åbnes.
8. Gennemgå listen med sider i sidebundtet. Du skal vælge **Importer** for at importere sidebundtet. Du skal vælge **Annuller** for at afbryde importen af sidebundtet.

 Der opstår konflikter mellem sider, når sidebundtet indeholder én eller flere sider, der allerede findes på din enhed, men som ikke er identiske. Vælg ikonet  for hver sidekonflikt, og vælg derefter, om den eksisterende side skal beholdes eller overskrives af den importerede side fra sidebundtet. Du skal løse alle sidekonflikter på denne måde, før du kan fortsætte med at importere sidebundtet.

12.3.2.3 Importer sidebundt og link

Du kan importere et sidebundt og oprette et link på én gang med funktionen Importer og link!

Se afsnit 8.9.6 *Importér og link til side*.

13 Brugerindstillinger

Brugerindstillingerne hjælper med at tilpasse brugeroplevelsen i Snap. Alle brugere kan have deres helt egne indstillinger, der bruges, når du indlæser brugeren i softwaren.

13.1 Skift bruger

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg den aktuelle bruger.
4. Vælg bruger fra listen Vælg en bruger.



Brugeren med markering er den aktuelt aktive bruger.

13.2 Opret ny bruger

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg **Ny bruger**.
4. Følg trinene i guiden til konfigurering af bruger til at oprette en ny bruger. Vælg **X**'et for at annullere oprettelsen af en ny bruger.

13.3 Sikkerhedskopier bruger

Lav sikkerhedskopi til myTobiiDynavox

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg pilen til højre for den aktuelle bruger.
4. Vælg knappen  **Sikkerhedskopier** ud for navnet på brugeren, der skal sikkerhedskopieres.
5. Vælg **Sikkerhedskopier til myTobiiDynavox**.



Hvis du ikke er logget ind på din myTobiiDynavox-konto, bliver du bedt om at logge ind nu.

6. Angiv navnet på filen med sikkerhedskopien af brugeren, og vælg dernæst **Næste**.




Det kan være nyttigt at sætte datoen for sikkerhedskopien ind i filnavnet.

7. Vælg **Udført**.



Lokale filer med sikkerhedskopier af brugere kan også flyttes manuelt til myTobiiDynavox. Brug din webbrowser til at navigere til myTobiiDynavox.com, log ind, og navigér derefter til *Snap > Sikkerhedskopier*, og vælg **Overfør sikkerhedskopi**.

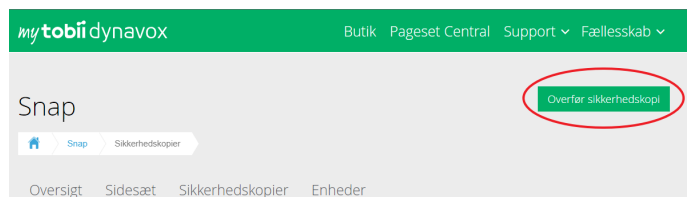

Sikkerhedskopier til en lokal fil

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg pilen til højre for den aktuelle bruger.
4. Vælg knappen  **Sikkerhedskopier** ud for navnet på brugeren, der skal sikkerhedskopieres.
5. Vælg **Sikkerhedskopier til en lokal fil**.
6. (Windows) **Naviger** til mappen, hvor filen med sikkerhedskopien skal gemmes, og vælg derefter **Gem**.
(iOS) Indtast et navn til filen med sikkerhedskopien.
7. Vælg **Sikkerhedskopi**.

13.4 Gendan bruger

Gendan bruger fra myTobiiDynavox


1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg pilen til højre for den aktuelle bruger.
4. Vælg **Ny bruger**.
5. Vælg **Gendan eksisterende bruger**.
6. Hvis du ikke er logget ind på myTobiiDynavox, skal du indtaste din e-mailadresse og adgangskode og derefter vælge **Næste**.
7. Vælg en fil med sikkerhedskopi af en bruger på listen, og vælg derefter **Næste**.

Gendan en bruger fra en lokal fil




Lokale filer med sikkerhedskopier af brugere under iOS, der blev oprettet på en anden enhed, skal først flyttes over i appen Snap Core First ved hjælp af iTunes:

- Åbn iTunes på din Mac eller pc.
- Slut din iPad til computeren med USB-kablet, der fulgte med din enhed.
- Vælg din enhed i iTunes.

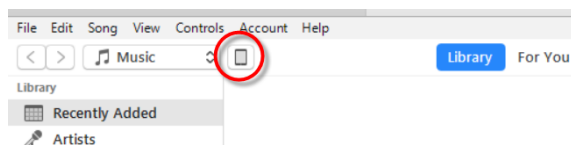

- Du skal vælge **Apps** i venstre sidepanel. Rul derefter til afsnittet Fildeling i bunden af siden.
- Vælg **Snap Core First**.

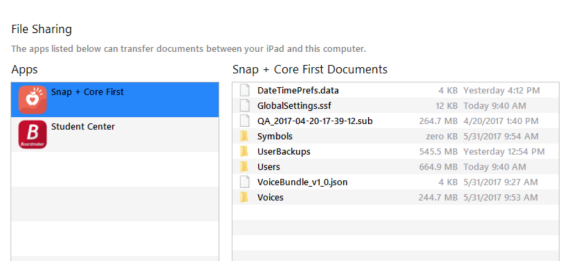

- Træk filerne med sikkerhedskopier af brugere ind i dokumentområdet på Snap Core First.
- Følg trinene nedenfor for at gendanne brugeren på din iPad.



- Vælg knappen **Redigér**.
- Vælg fanen **Bruger**.
- Vælg pilen til højre for den aktuelle bruger.
- Vælg **Ny bruger**.
- Vælg **Gendan eksisterende bruger**.
- Vælg **Gendan fra en lokal fil**.
- (Windows) Naviger til filen med sikkerhedskopi af brugeren, vælg filen, og vælg derefter **Abn**.
(iOS) Vælg en fil med sikkerhedskopi af bruger på listen, og vælg derefter **Gendan bruger**.

13.5 Rediger/omdøb bruger



- Vælg knappen **Redigér**.
- Vælg fanen **Bruger**.
- Vælg knappen  **Redigér** ud for navnet på brugeren, der skal redigeres.
- Skriv i feltet **Navn**.
- Vælg **Gem** for at gemme ændringerne eller **Annuller** for at slette ændringerne.

13.6 Slet bruger



Sletning af en bruger fra enheden er en permanent handling. Hvis du tror, at du kan få brug for brugeren på et senere tidspunkt, skal du oprette en sikkerhedskopi af brugeren *13.3 Sikkerhedskopier bruger*, før du sletter den.



- Vælg knappen **Redigér**.
- Vælg fanen **Bruger**.

3. Vælg knappen  **Slet** ud for navnet på brugeren, der skal slettes.



Du kan ikke slette den aktuelt aktive bruger.

4. Vælg den røde knap **Slet**.
5. Vælg **Slet** for at slette brugeren permanent. Vælg **Annuler** for at vende tilbage til menuen for indstillinger uden at slette brugeren.

13.7 Log ind på myTobiiDynavox-konto



Der kræves en aktiv internetforbindelse for at logge ind på myTobiiDynavox-kontoen.


Nogle funktioner i Snap Core First, fx synkronisering, kræver, at du logger ind på din myTobiiDynavox-konto. Vælg **Log ind** for at indtaste dine legitimationsoplysninger til myTobiiDynavox eller oprette en ny myTobiiDynavox-konto. Hvis du er logget ind på myTobiiDynavox, vises dit brugernavn eller e-mailadresse i kontoafsnittet på myTobiiDynavox.

13.8 Stemme

13.8.1 Talestemme

Talestemmen læser indholdet i meddelelsesvinduet og knapmeddelelserne op.

Talestemmen er standardstemmen og er ikke knyttet til et bestemt sprog. Hvis der er tildelt sprogspecifikke stemmer, bruges disse stemmer i stedet til de pågældende sprog. Se *13.10 Sprogspecifikke stemmer* om tildeling af sprogspecifikke stemmer.

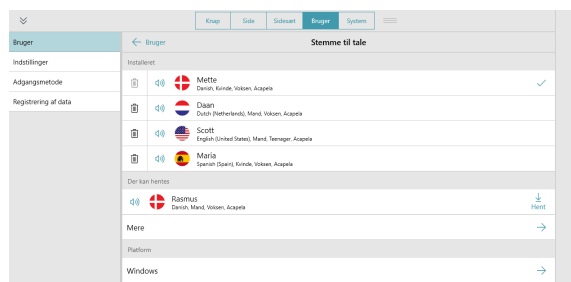

Figur 13.1 Fanen Bruger – talestemme

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg **Talestemme**.

13.8.1.1 Installerede stemmer

Det er stemmer, der findes på enheden, og som kan bruges med det samme. De omfatter både forudinstallerede stemmer, og stemmer der downloades til enheden.



Du kan slette stemmer på listen Installeret, men du kan ikke slette den aktuelt aktive stemme.

13.8.1.2 Valgfrie stemmer

Download nye stemmer.



Du skal have en aktiv internetforbindelse for at downloade stemmer.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg **Talestemme**.
4. Vælg **Download** ud for den ønskede stemme i listen Valgfrie stemmer.



Download af stemmer i iOS sættes på pause, når appen Snap Core First minimeres.

13.8.1.3 Tilkøb af stemmer

Snap Core First (fuld version) omfatter et taleprogram og adgang til alle stemmerne til programmet. Der kan tilkøbes yderligere taleprogrammer. Når du køber et taleprogram, får du adgang til mere end 100 tilhørende stemmer.

Eksempler på og køb af stemmer



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg **Talestemme**.
4. Rul ned til afsnittet *Kan købes*.
5. Vælg  for at lytte til et eksempel på stemmen.
Vælg **Køb flere stemmer** for at købe.

13.8.1.4 Platformstemmer

Det er stemmer, der leveres af dit styresystem, og SAPI5-stemmer.



Visse stemmer vises muligvis to gange, hvis de både findes i en platformsversion og en SAPI5-version.
SAPI5 er kun til Windows

13.8.2 Stemme-hastighed

Angiver, hvor hurtigt der tales.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Flyt **skyderen til stemme-hastighed** til venstre, så der tales langsommere, eller til højre, så der tales hurtigere.

13.8.3 Udtaleundtagelser

Det er ord eller akronymer, som du lærer stemmen at udtale på en bestemt måde. Udtaleundtagelserne knyttes til stemmen, der er aktiv, når udtaleundtagelserne oprettes. Hvis du skifter stemme og vil bruge de samme udtaleundtagelser, skal du importere udtaleundtagelserne fra den forrige stemme.

Der fås også udtaleundtagelser til sprogspecifikke stemmer. Se afsnit 13.10 *Sprogspecifikke stemmer*.



Udtaleundtagelser kan ikke importeres fra en platform til en anden (Windows ⇌ iOS).

Opret ny udtaleundtagelse




1. Vælg knappen **Redigér**.

2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg **Udtaleundtagelser**.
4. Vælg **Tilføj udtaleundtagelse**.
Dialogboksen Tilføj udtaleundtagelse åbnes.

5. Skriv ordet, som det staves, i feltet **Ord**.
6. Skriv ordet med lydskrift, som du gerne vil have det udtalt, i feltet **Udtale**.
Vælg knappen Vis eksempel for at teste udtalen.
7. Vælg **Udført** for at gemme udtaleundtagelsen. Vælg **Annullér** for at slette ændringerne og vende tilbage til brugerindstillingerne.

Importer udtaleundtagelse

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg **Udtaleundtagelser**.
4. Vælg **Importer** fra en anden stemme.

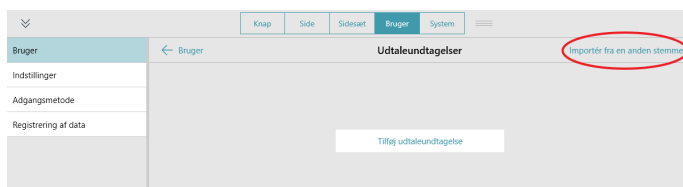

5. Vælg stemmen med udtaleundtagelser, der skal importeres.



Der vises kun stemmer med tilknyttede udtaleundtagelser i listen.

6. Vælg **Importer** for at importere alle udtaleundtagelserne knyttet til den valgte stemme. Vælg **Annullér** for at vende tilbage til brugerindstillingerne uden at importere.



Det anbefales, at du tester udtaleundtagelserne med den aktuelle stemme, når du har importeret dem fra en anden stemme. Vælg knappen  Vis eksempel på en udtaleundtagelse for at høre den udtalt med den aktuelle stemme.

13.9 Outputenhed til tale

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg **Outputenhed til tale**.
4. Indstil Anvend standardenhed til **Til** for at bruge standardoutputenheden i Windows. Indstil Anvend standardenhed til **Fra** for at få vist listen over tilgængelige outputenheder.
 - a. Vælg en outputenhed i listen for at bruge enheden til taleoutput. Vælg knappen Afspil for at lytte til enheden.

13.10 Sprogspecifikke stemmer

Du kan tildele en stemme til et sprog, så indhold på sproget læses op med korrekt udtale.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg **Sprogspecifikke stemmer**.
4. Vælg **Tilføj en stemme til et andet sprog**.
5. Vælg **Sprog**, og vælg derefter et sprog i listen Stemmesprog. Vælg **Ny stemme**, når du har valgt sprog.
6. Vælg **Stemme**, og vælg derefter en stemme fra afsnittet Installeret i stemmelisten. Vælg **Ny stemme**, når du har valgt stemme.



Nogle stemmer kan downloades gratis (kræver en internetforbindelse). Vælg **Download** ud for den ønskede stemme. Når stemmen er downloadet, kan du finde og vælge den i afsnittet Installeret på stemmelisten.

7. (Alternativt) Juster stemmehastigheden for det valgte sprog/stemme.
8. (Alternativt) Føj udtaleundtagelser til stemmen. Se afsnit 13.8.3 *Udtaleundtagelser*.

13.11 Google-konto

Tilslut din Google-konto for at bruge Google Assistant, intelligente højttalere og apparater med Snap Core First.

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Rul ned, og vælg **Tilslut Google**. Din standardwebbrowser åbner.
4. Log ind på din Google-konto.
5. Vælg **Tillad**, når du bliver spurgt, for at tillade, at Snap Core First kommunikerer med Google Assistant på dine vegne.
6. Vend tilbage til Snap Core First.



Vælg **Afbryd**, når du skal logge ud af din Google-konto i Snap Core First.

13.12 Indstillinger for bruger

13.12.1 Taleindstillinger

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg kategorien **Indstillinger**.
4. Indstil Afbryd altid tale for ny tale til **Til** (igangværende tale stoppes for at sige en ny kommando) eller til **Fra** (talekommandoer sættes i kø, den aktuelle tale afsluttes, og derefter siges den nyeste talekommando).

13.12.2 Indstillinger for meddelelsesvindue



Figur 13.2 Brug af symboler i meddelelsesvinduet aktiveret

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg kategorien **Indstillinger**.
4. Indstil følgende indstillinger til enten **Til** (aktiveret) eller **Fra** (deaktiveret):
 - Brug symboler i meddelelsesvinduet – Når funktionen er aktiveret, vises ord og vendinger som symboltavler i meddelelsesvinduet.
 - Læs op, når der indsættes i meddelelsesvinduet – Når funktionen er aktiveret, læses alle ord eller vendinger op, når de indsættes i meddelelsesvinduet.
 - Læs tegn op – Når funktionen er aktiveret, læses alle tegn op, når de indsættes i meddelelsesvinduet.



Indstillingen “Læs op, når der indsættes i meddelelsesvinduet” skal være aktiveret for at bruge “Læs tegn op”.

- Fjern efter tale – Når teksten i meddelelsesvinduet er læst op, fjernes teksten, når den næste tekst indsættes.
- Bøj grammatikknapper automatisk – Når funktionen er aktiveret, opdateres grammatikknapperne dynamisk og matcher den grammatiske kontekst i indholdet i meddelelsesvinduet.
- Dan sammentrækninger automatisk – Når funktionen er aktiveret dannes almindelige sammentrækninger af to ord (fx bliver “is not” til “isn’t”).

13.12.3 Indstillinger for prædiktion

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg kategorien **Indstillinger**.
4. Indstil Vis symboler på prædiktionsknapper til **Til** (prædiktionsknapperne viser et symbol for det aktuelt gættede ord) eller til **Fra** (prædiktionsknapperne viser kun tekst).

13.12.4 Indstillinger for synkronisering

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg kategorien **Indstillinger**.
4. Indstil Aktivér synkronisering i brugstilstand til **Til** (synkroniseringsknappen kan ses i topbjælken i både brugstilstand og redigeringstilstand) eller til **Fra** (synkroniseringsknappen er skjult i topbjælken i brugstilstand men er synlig i redigeringstilstand).

13.13 Adgangsmetode

Berøring

Genstande aktiveres ved at berøre dem på skærmen med en finger eller ved at klikke på dem med en musemarkør. Adgangsmetoden er egnet til læring for brugere, som er i stand til hurtigt og præcist at berøre skærmen eller styre og venstre-klikke med en almindelig computermus. Genstande aktiveres, når de berøres, eller der klikkes på dem.

Touch-enter

Genstande aktiveres ved fysisk vedvarende berøring på skærmen i et givent tidsrum eller ved anvendelse af en mus, hvor genstanden skal klikkes på og holdes nede i et givent tidsrum. Fastholdelsestiden fastsættes af brugeren. Adgangsmetoden er nyttig for brugere, som kan komme til at røre ved eller klikke på genstande ved et uheld.

Touch-slip

Metoden ligner Touch enter, men den valgte genstand aktiveres, når den slippes. Metoden giver brugeren mulighed for at opretholde kontakten med berøringsskærmen uden at komme til at udføre et valg ved et uheld. Det betyder, at brugeren kan glide en finger eller en markør hen over berøringsskærmen eller holde en museknop nede, mens markøren flyttes. Der udføres først et valg, når fingeren eller markøren fjernes fra berøringsskærmen, eller når museknappen slippes. Det

gør valgmetoden Touch afslut ideel til personer, der har nemmere ved at trække en finger eller markør hen over berørings-skærmen, mens der flyttes fra valg til valg.

Musedvæl

(Kun Windows) Adgangsmetoden musedvæl kræver, at en computermus, en trackball eller en hovedstyret mus styrer markøren på skærmen. En genstand vælges, når markøren holdes på en genstand i en angivet periode, eller når brugeren aktiverer en kontakt. Adgangsmetoden er et godt valg til personer, som fysisk kan styre en mus, men som ikke kan trykke på museknappen for at træffe et valg.

Gaze Interaction

(Kun Windows) Metoden giver brugeren mulighed for at styre Snap Core First bare med øjnene. Valg udføres ved enten at holde blikket rettet mod en genstand i en specifik periode (dvæle), aktivere en kontakt eller blinke med øjnene. Gaze Interaction kræver en øjenstyringsenhed fra Tobii Dynavox.

Scanning

Når scanning er den aktive valgmetode, fremhæves genstandene på skærmen i et bestemt mønster. Scanning kræver en kontakt eller en tast på tastaturet til at udføre et valg, når den ønskede genstand fremhæves. Adgangsmetoden er tiltænkt personer, hvis motorik forhindrer dem i at anvende direkte valgmetoder effektivt.



Se videoerne om adgangsmetoder under *System — Hjælp og vejledninger*, og lær mere om adgangsmetoder.

13.13.1 Indstil adgangsmetode




1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg kategorien **Adgangsmetode**.
4. Vælg den aktuelle adgangsmetode.
5. Vælg en adgangsmetode i listen.

13.13.2 Touch-indstillinger



Touch er standardadgangsmetoden.

Når du bruger adgangsmetoden Touch, aktiveres genstande ved at berøre dem på skærmen med en finger eller ved at klikke på dem med en musemarkør. Adgangsmetoden er egnet til læring for brugere, som er i stand til hurtigt og præcist at berøre skærmen eller styre og venstreklikke med en almindelig computermus. Genstande aktiveres, når de berøres, eller der klikkes på dem.

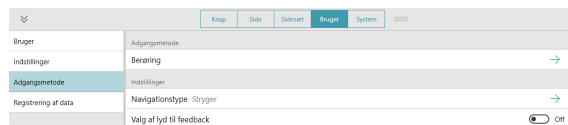

Navigationstype

Navigationstypen er måden, som brugeren kan bruge til at rulle på siden og værktøjslinjen. Du kan vælge at rulle ved at stryge med din finger på skærmen, vælge navigationsknapper eller begge dele.

Stryg med finger

- Rul siden og værktøjslinjen op og ned ved at stryge med din finger på berørings-skærmen. (Kun adgangsmetoden Touch).


- Pileknapper vises på siden og værktøjslinjen, når der er mere indhold ovenfor eller nedenfor. Der findes pileknapper til navigation i alle adgangsmetoder.



- Både knapper til stryg med finger og navigation er aktiverede, og begge navigationstyper kan bruges til at navigere op og ned i indholdet. (Kun adgangsmetoden Touch).

Afspil en lyd, når der vælges en knap uden tale.

Når Touch enter er valgt som adgangsmetode, aktiveres genstande ved fysisk og vedvarende berøring på skærmen i et specifikt tidsrum eller ved at klikke på og holde en genstand med en mus i et minimalt tidsrum. Fastholdelsestiden fastsættes af brugeren. Adgangsmetoden er nyttig for brugere, som kan komme til at røre ved eller klikke på genstande ved et uheld.

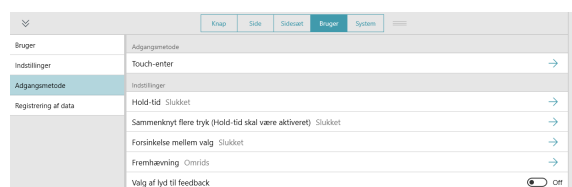

Holdetiden er den mindste periode, der kræves til at vælge og fastholde en genstand for at aktivere genstanden.

Indstillingen registrerer flere tryk, der indtræffer inden for en specifik tidsramme, og forbinder dem, så de opfattes som et langt tryk og fasthold. Indstillingen er nyttig, hvis brugeren har svært ved at fastholde et valg.


Når funktionen Forbind flere tryk er aktiveret, kan du vælge perioden, hvor trykkene forbindes. Fx registreres alle tryk, der indtræffer inden for et interval på 0,3 sekund (starter ved det første tryk), som et enkelt langt tryk og hold, når indstillingen er indstillet til Mellem.

Indstillingen giver dig mulighed for at indstille en periode, hvor Snap ignorerer forsøg på valg, når et valg er udført. Aktivisering af funktionen Forsinkelse mellem valg kan hjælpe med at undgå utilsigtede gentagne valg i softwaren.

Når funktionen Forsinkelse mellem valg er aktiveret, kan du vælge perioden, hvor forsøg på valg ignoreres, når et valg er udført. Snap vil fx ignorere alle forsøg på valg, der opstår inden for 2 sekunder efter et valg, hvis indstillingen er indstillet til Mellem.

#12005874 Snap™ Core First® Brugervejledning v.1.14 - da-DK

Vælg din foretrukne type og farve for fremhævning. Fremhævning er et visuelt signal, der viser, at en genstand er valgt. Fremhævningen forsvinder, når genstanden er aktiveret.

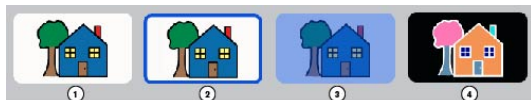


1. Ingen fremhævning
2. Omrids
Valgmuligheder: Farve og tykkelse på markering
3. Overlejring
Valgmulighed: Farve
4. Invertér

Feedbacklyd ved valg

Afspil en lyd, når der vælges en knap uden tale.

13.13.4 Indstillinger for Touch afslut

Når du bruger Touch afslut, aktiveres den valgte genstand, når den slippes. Metoden giver brugeren mulighed for at opretholde kontakten med berøringsskærmen uden at komme til at udføre et valg ved et uheld. Det betyder, at brugeren kan glide en finger eller en markør hen over berøringsskærmen eller holde en museknap nede, mens markøren flyttes. Samtidig med at markøren flyttes hen over knapperne, fremhæves den aktuelt valgte knap. En knap aktiveres først, når fingeren eller markøren fjernes fra berøringsskærmen, eller når museknappen slippes. Det gør valgmetoden Touch afslut ideel til personer, der har nemmere ved at trække en finger eller markør hen over berøringsskærmen, mens der flyttes fra valg til valg. Metoden er også nyttig for personer, som bruger visuelt feedback til at udføre nøjagtige valg.

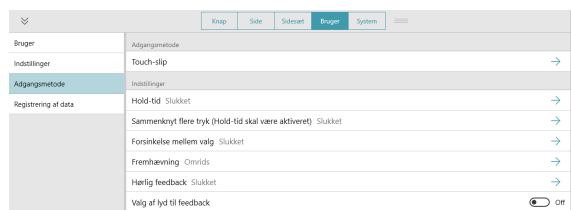

Holdetid

Holdetiden er den mindste periode, der kræves til at vælge og fastholde en genstand for at aktivere den, når der slippes.

Forbind flere tryk

Indstillingen registrerer flere tryk, der indtræffer inden for en specifik tidsramme, og forbinder dem, så de opfattes som et langt tryk og fasthold. Indstillingen er nyttig, hvis brugeren har svært ved at fastholde et valg.

Når funktionen Forbind flere tryk er aktiveret, kan du vælge perioden, hvor trykkene forbindes. Fx registreres alle tryk, der indtræffer inden for et interval på 0,3 sekund (starter ved det første tryk), som et enkelt langt tryk og hold, når indstillingen er indstillet til Mellem.


Forsinkelse mellem valg

Indstillingen giver dig mulighed for at indstille en periode, hvor Snap ignorerer forsøg på valg, når et valg er udført. Aktivisering af funktionen Forsinkelse mellem valg kan hjælpe med at undgå utilsigtede gentagne valg i softwaren.

Når funktionen Forsinkelse mellem valg er aktiveret, kan du vælge perioden, hvor forsøg på valg ignoreres, når et valg er udført. Snap vil fx ignorere alle forsøg på valg, der opstår inden for 2 sekunder efter et valg, hvis indstillingen er indstillet til Mellem.

Fremhævning

Vælg din foretrukne type og farve for fremhævning. Fremhævning er et visuelt signal, der viser, at en genstand er valgt. Fremhævningen forsvinder, når genstanden er aktiveret.

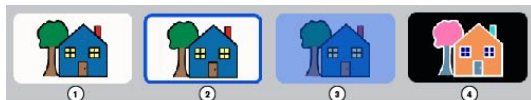

1. Ingen fremhævning
2. Omrids
Valgmuligheder: Farve og tykkelse på markering
3. Overlejring
Valgmulighed: Farve
4. Invertér

Hørlig feedback


Når funktionen Hørlig feedback er aktiveret, hører brugeren et lydsignal, når en genstand fremhæves. Et lydsignal er et ord eller kort meddelelse, der hjælper med at identificere genstanden. Du kan vælge en anden stemme samt din egen stemmehastighed og udtaleundtagelser til hørlig feedback.

Feedbacklyd ved valg

Afspil en lyd, når der vælges en knap uden tale.

13.13.5 Indstillinger for musedvæl

(Kun Windows) Adgangsmetoden musedvæl kræver, at en computermus, en trackball eller en hovedstyret mus styrer markøren på skærmen. En genstand vælges, når markøren holdes på en genstand i en angivet periode, eller når en kontakt aktiveres.

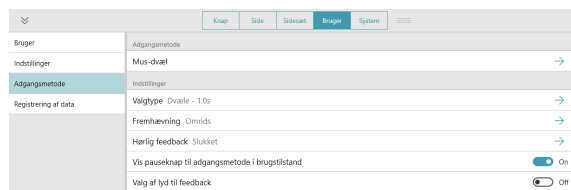

Valgtype

Dvæle

- Valg træffes ved at holde markøren på en genstand i en bestemt periode (dvæletid).
 - Dvæletid – Indstiller perioden, hvor markøren skal forblive på en genstand for at vælge genstanden.

Kontakt


- Valg udføres ved at aktivere en kontakt, mens markøren befinder sig på den ønskede genstand.
 - Kontaktinput – Indstiller tastaturtasten, der virker som input til kontakten.

Fremhævning

Vælg din foretrukne type og farve for fremhævning. Fremhævning er et visuelt signal, der viser, at en genstand er valgt. Fremhævningen forsvinder, når genstanden er aktiveret.



Valgmuligheden "Ingen markering" kan ikke vælges for denne adgangsmetode.

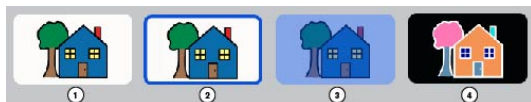

1. Ingen fremhævnning
2. Omrids
Valgmuligheder: Farve og tykkelse på markering
3. Overlejring
Valgmulighed: Farve
4. Invertér

Hørlig feedback

Når funktionen Hørlig feedback er aktiveret, hører brugeren et lydsignal, når en genstand fremhæves. Et lydsignal er et ord eller kort meddelelse, der hjælper med at identificere genstanden. Du kan vælge en anden stemme, sprogspecifikke feedbackstemmer samt din egen stemmehastighed og udtaleundtagelser til hørlig feedback.

Vis Pauseknap til adgangsmetode i brugstilstand

Når funktionen er aktiveret, vises en knap til at sætte adgangsmetoden på pause eller fortsætte adgangsmetoden i topbjælken i brugstilstand. Når funktionen er deaktiveret, er knappen skjult.

Feedbacklyd ved valg

Afspil en lyd, når der vælges en knap uden tale.

13.13.6 Indstillinger for Gaze Interaction

(Kun Windows) Metoden giver brugeren mulighed for at styre Snap Core First bare med øjnene. Valg udføres ved enten at holde blikket rettet mod en genstand i en specifik periode (dvæle), aktivere en kontakt eller blinke med øjnene. Gaze Selection kræver en øjenstyringsenhed fra Tobii Dynavox.

Valgtype

Dvæle

- Giver brugeren mulighed for at vælge ved at lade blikket hvile på en genstand i et fastsat tidsrum (dvæletid).
 - Dvæletid – Indstiller perioden, hvor blikket skal hvile på en genstand for at vælge genstanden.

Kontakt

- Brugeren styrer markeringen på skærmen med sit blik og udfører derefter valg ved hjælp af en kontakt.
 - Kontaktinput – Indstiller tastaturtasten, der virker som input til kontakten.



Kontaktvalg med en tastaturtast eller en Bluetooth-kontakt virker muligvis ikke uden Snap.

- Varighed af kontaktryk – Perioden hvor kontakten skal aktiveres for at vælge den aktuelt formhævede genstand.
- Varighed af gentaget kontaktryk – Perioden som brugeren skal vente mellem kontaktrykkene. Yderligere kontaktryk før udløbet af perioden ignoreres.

Blink

- Giver brugeren mulighed for at vælge ved at blinke med øjnene i en fastsat periode.
 - Mindste varighed af blink – Indstiller minimumsperioden, hvor brugerens øjne skal være lukkede for at udføre valget.
 - Længste varighed af blink – Indstiller maksimumsperioden, hvor brugerens øjne kan være lukkede for at udføre valget. Hvis brugerens øjne er lukket længere end maksimumsperioden for blink, udføres der intet valg.

Feedback fra Gaze

Feedback om Gaze er et visuelt signal, der viser brugeren, hvor deres blik registreres på skærmen, hvor konsekvent og hvor længe.

Indstil typografi, farve og størrelse for Gaze-feedback.

Forsinkelse efter sideskift

Valg kan ikke udføres i en indstillet periode, når du er gået til en ny side. Indstillingen hjælper med at undgå tilfældige valg, når en side åbnes første gang.

Type af Windows Control

Indstiller tilstanden for skrivebordsadgang for navigation uden for Snap.

- Gaze Selection – Det er en valgmetode i to trin, som reducerer risikoen for uønskede klik.
- Mouse Emulation – Emulerer og styrer en standard pc-musemarkør på skærmen.

Hørlig feedback

Når funktionen Hørlig feedback er aktiveret, hører brugeren et lydssignal, når en genstand fremhæves. Et lydssignal er et ord eller kort meddelelse, der hjælper med at identificere genstanden. Du kan vælge en anden stemme samt din egen stemmehastighed og udtaleundtagelser til hørlig feedback.

Vis Pauseknap til adgangsmetode i brugstilstand


Når funktionen er aktiveret, vises en knap til at sætte adgangsmetoden på pause eller fortsætte adgangsmetoden i topbjælken i brugstilstand. Når funktionen er deaktiveret, er knappen skjult.

Feedbacklyd ved valg

Afspil en lyd, når der vælges en knap uden tale.

13.13.7 Indstillinger for scanning

Når scanning er den aktive valgmetode, fremhæves genstandene på skærmen i et bestemt mønster. Brugeren aktiverer en kontakt eller en tastaturtast til at udføre et valg, når den ønskede genstand fremhæves. Adgangsmetoden er tiltænkt personer, hvis motorik forhindrer dem i at anvende direkte valgmetoder effektivt.

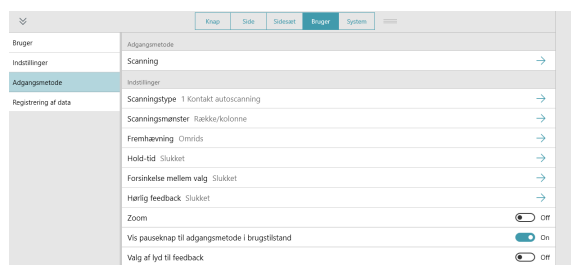

Scanningstype

Scanningstypen afgør, hvordan markeringen af scanningen flytter sig (automatisk eller via kontakinput), og hvordan valg udføres.

Automatisk scanning med 1 kontakt

- Når du bruger Automatisk scanning med 1 kontakt, scanner softwaren elementerne på siden i det angivne scanningsmønster. Brugeren udfører valg med en kontakt.
 - Kontakinput – Vælg enten tryk på skærm eller tastaturtast.
 - Hastighed – Indstiller hastigheden af den automatiske scanning.
 - Overgangstid – Indstiller perioden mellem udførelse af et valg og fortsættelse af den automatiske scanning.
 - Scan efter – Vælg, hvornår den automatiske scanning starter igen: Valg, Side, Ændring, Tale.
 - Læs hele lydssignalet op før flytning – Når funktionen er aktiveret, forsinker lange lydssignaler flytningen af markeringen for scanningen, indtil hele lydssignalet er læst op.

Trinvis scanning med 2 kontakter

- Når du bruger Trinvis scanning med 2 kontakter, udløser brugeren en kontakt for at fortsætte fremhævelsen ved scanningen og en anden kontakt for at udføre et valg.
 - Kontaktinput 1 – Vælg enten tryk på skærm eller tastaturtast for at fortsætte fremhævelsen ved scanning.
 - Kontaktinput 2 – Vælg enten tryk på skærm eller tastaturtast for at udføre et valg.



Kontaktinput 1 og kontaktinput 2 skal være forskellige.

Scanning med 1 kontakt

- Når valgmuligheden scanning med 1 kontakt er aktiv, udløser brugeren kontakten for at flytte markeringen frem (markeringen rykkes et interval frem for hvert valg). Brugeren skal vælge kontakten og opretholde valget i den angivne pausetid for at vælge den markerede genstand.
 - Kontaktinput 1 – Vælg enten tryk på skærm eller tastaturtast for at fortsætte fremhævelsen ved scanning.
 - Holdetid – Den krævede minimumstid til at vælge og fastholde en genstand for at aktivere genstanden.

Dvælescanning med 1 kontakt

- Når valgmuligheden dvælescanning med 1 kontakt er aktiv, udløser brugeren kontakten for at flytte markeringen frem (markeringen rykkes et interval frem for hvert valg). Brugeren skal holde pause (gøre ingenting) i den angivne pausetid for at vælge den markerede genstand.
 - Kontaktinput 1 – Vælg enten tryk på skærm eller tastaturtast for at fortsætte fremhævelsen ved scanning.
 - Pausetid – Den krævede minimumstid til at dvæle på en genstand for at aktivere genstanden.

Omvendt scanning

- En person, der bruger omvendt scanning, holder kontakten nede for at flytte markeringen for scanningen fremad (markeringen fortsætter med at bevæge sig fremad, så længe kontakten holdes nede). Når personen slipper kontakten, vælges den markerede genstand.
 - Kontaktinput 1 – Vælg enten tryk på skærm eller tastaturtast for at fortsætte fremhævelsen ved scanning.
 - Hastighed – Hastigheden for markeringen for scanningen under bevægelse fremad (mens der trykkes på kontakten).
 - Læs hele lydsignalet op før flytning – Når funktionen er aktiveret, forsinker lange lydssignaler flytningen af markeringen for scanningen, indtil hele lydsignalet er læst op.

Scanningsrækkefølge

Scanningsmønstret er rækkefølgen for markering af genstande på skærmen til valg. Afsnittet indeholder også indstillinger for typer af scannede genstande.

Mønster

- Række/kolonne – Scanner rækker oppefra og ned. Når der vælges en række, scannes elementerne i rækken fra venstre mod højre.
- Kolonne/række – Scanner kolonner fra venstre mod højre. Når der vælges en kolonne, scannes elementerne i kolonnen oppefra og ned.
- Lineært – Genstande scannes enkeltvist fra venstre mod højre, oppefra og ned.

Antal gennemløb

- Gennemløb – Indstiller, hvor mange gange scanningen scanner en række eller kolonne, uden at der udføres et valg.
- Efter sidste gennemløb – Vælg hvad der sker, når den automatiske scanning har gennemført det angivne antal gennemløb (ikke tilgængelig ved uendeligt antal gennemløb).

Gruppescanning

- Når funktionen er aktiveret, scannes knapperne på siden i grupper.



Scanningsgrupper skal defineres på forhånd. Se afsnit 8.13 *Scanningsgrupper*.

Scan fra sidste valg

- Når funktionen er aktiveret, starter scanningen igen på siden, hvor det sidste valg blev udført. Når funktionen er deaktiveret, starter scanningen igen fra toppen af siden, når et valg er udført.

Scan topbjælke

- Når funktionen er aktiveret, scannes elementerne i topbjælken, der er tilgængelige for scanning (Tilbage, Startside og Dashboard). Når funktionen er deaktiveret, scannes elementerne i topbjælken ikke.



Knapperne Søg, Synkroniser, Sæt adgangsmetode på pause og Rediger i topbjælken scannes ikke. De kan altid bruges ved berøring.

Scan tomme knapper


- Når funktionen er aktiveret, scannes knapper uden indhold. Når funktionen er deaktiveret, scannes tomme knapper ikke.

Fremhævning

Vælg din foretrukne type og farve for fremhævning. Markering er et visuelt signal, der viser, når en genstand scannes. Fremhævningen forsvinder, når genstanden er aktiveret.



Valgmuligheden "Ingen markering" kan ikke vælges for denne adgangsmetode.

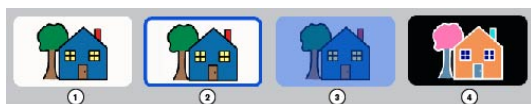

1. Ingen fremhævning
2. Omrids
Valgmuligheder: Farve og tykkelse på markering
3. Overlejring
Valgmulighed: Farve
4. Invertér

Holdetid

Holdetiden er den mindste periode, der kræves til at vælge og fastholde en genstand for at aktivere genstanden.

Forsinkelse mellem valg

Forsinkelse mellem valg hjælper med at undgå utilsigtede, gentagne valg med kontakt. Når der udføres en valg med en kontakt, kan næste valg med kontakten ikke udføres, før perioden indstillet i Forsinkelse mellem valg er udløbet. Hvis kontakten udløses under forsinkelsesperioden, nulstilles nedtællingen.

Hørlig feedback

Når funktionen Hørlig feedback er aktiveret, hører brugeren et lydssignal, når en genstand fremhæves. Et lydssignal er et ord eller kort meddelelse, der hjælper med at identificere genstanden. Du kan vælge en anden stemme, sprogspecifikke feedbackstemmer samt din egen stemmehastighed og udtaleundtagelser til hørlig feedback.

Zoom

Når funktionen er aktiveret, zoomes der ind på genstande på skærmen, når de scannes. Når der scannes flere objekter (rækker eller kolonner), zoomes der ind på det første objekt i mønstret, og de øvrige objekter markeres som angivet i indstillingen for markeringstypografi.

Vis Pauseknap til adgangsmetode i brugstilstand

Når funktionen er aktiveret, vises en knap til at sætte adgangsmetoden på pause eller fortsætte adgangsmetoden i topbjælken i brugstilstand. Når funktionen er deaktiveret, er knappen skjult.

Feedbacklyd ved valg

Afspil en lyd, når der vælges en knap uden tale.

13.14 Registrering af data

13.14.1 Registrer brug af knap

Når funktionen Registrer brug af knap, optages oplysninger om brugen af knapper i Snap Core First. Oplysningerne omfatter tidspunktet for brugen af knappen, meddelelse, sprog, sidesæt, side, gitterplacering, adgangsmetode (fx Gaze Interaction), modelleringstilstand, og om knappen læste højt eller indsatte tekst i meddelelsesvinduet.



Oplysningerne om brugen af knapper optages ikke i redigeringstilstand.

Aktivér funktionen Registrer brug af knap



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg kategorien **Registrering af data**.
4. Indstil **Registrer brug af knap** til Til.
5. Læs advarslen om beskyttelse af personlige data, og vælg **Ja** for at aktivere funktionen Registrer brug af knap. Du skal vælge **Nej**, hvis du ikke vil aktivere funktionen Registrer brug af knap.



Du kan få vist tællerne for brugen af knapper her i softwaren til Snap Core First ved at aktivere funktionen Vis tællere for brugen af knapper og/eller Vis tællere for modellering. Se afsnit 13.14.3 *Vis tællere for brug af knapper* og 13.14.4 *Vis tællere for modellering* for flere oplysninger. Der findes yderligere visualiseringer af data i afsnittet **Brugsrapporter** på din myTobiiDynavox.com-konto.

Når funktionen Registrering af brug af knapper er aktiveret, finder registrering sted, når Snap Core First-softwaren bruges. Af hensyn til nøjagtigheden af brugsdataene er det vigtigt at skelne mellem valg af knapper foretaget af brugeren og modellering valg foretaget af en hjælper eller kommunikationspartner. Hvis brugeren bruger Snap Core First med en adgangsmetode uden berøring (musedvæl, Gaze Interaction eller scanning), optages alle valg af knapper ved berøring automatisk som modellering. Hvis brugeren bruger Snap Core First med en berøringsbaseret adgangsmetode, skal hjælperen aktivere modelleringstilstanden, før der foretages modellering valg, og derefter deaktivere funktionen igen, før brugeren foretager sit næste valg.



Hvis funktionen Registrer brug af knap er aktiveret, og brugeren bruger en berøringsbaseret adgangsmetode, skal du kontrollere, at funktionen Vis knap til topbjælke også er aktiveret. Se afsnit 13.14.2 *Vis knap til topbjælken*.



Når du deler et sidesæt med brugsdata, har du mulighed for at inkludere brugsoplysningerne.

Aktivér modelleringstilstand (kun nødvendigt hvis adgangsmetoden er angivet til Touch, Touch enter, Touch afslut, eller når skærmen bruges som en kontakt)



Hvis din nuværende adgangsmetode viser knappen Sæt adgangsmetode på pause i topbjælken, skal du sætte adgangsmetoden  på pause, før du udfører trinene nedenfor. Fortsæt adgangsmetoden , når du afslutter modelleringstilstanden.

1. Vælg knappen  **Registrering af data** i topbjælken.
Se afsnit 13.14.2 *Vis knap til topbjælken* om at aktivere knappen Registrering af data i topbjælken.
2. Aktivér **Modelleringstilstand**.
Når du afslutter modelleringen, skal du huske at deaktivere modelleringstilstanden.




Du kan også slå modelleringstilstanden til og fra med et langt tryk (tryk og hold) på knappen Registrering af data i topbjælken. Når modelleringstilstanden er aktiveret, ser knappen Registrering af data således ud .



Når modelleringstilstanden er deaktiveret, ser knappen Registrering af data således ud .

13.14.2 Vis knap til topbjælken

Når funktionen er aktiveret, vises knappen  Registrering af data i topbjælken. Knappen Registrering af data i topbjælken giver hurtig adgang til følgende indstillinger: Modelleringstilstand, Vis tællere for brug af knapper, Vis tællere for modellering og Administrer data.

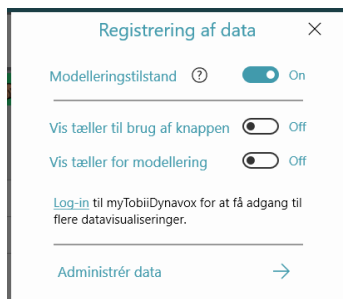

13.14.3 Vis tællere for brug af knapper

Når tællerne er aktiveret, viser knapperne en hvid badge, der viser hvor mange gange brugeren valgte knappen (mens funktionen Registrer brug af knap var aktiveret) i det angivne tidsinterval. Standardtidsintervallet er Alt.

Aktivér funktionen Vis tællere for brug af knapper (i brugerindstillinger)

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg kategorien **Registrering af data**.
4. Indstil **Vis tællere for brug af knapper** til Til.



Vælg **Tidsinterval**, brug derefter rullemenuen eller felterne til startdato/-tidspunkt og slutdato/-tidspunkt til at ændre tidsintervallet for tælleren for brugen af knapper.

Aktivér funktionen Vis tællere for brug af knapper (med knappen Registrering af data i topbjælken)




Se afsnit 13.14.2 *Vis knap til topbjælken* om at aktivere knappen Registrering af data i topbjælken.

1. Vælg knappen  **Registrering af data** i topbjælken.
2. Aktivér **Vis tællere for brug af knapper**.



Vælg **Tidsinterval**, brug derefter rullemenuen eller felterne til startdato/-tidspunkt og slutdato/-tidspunkt til at ændre tidsintervallet for tælleren for brugen af knapper.

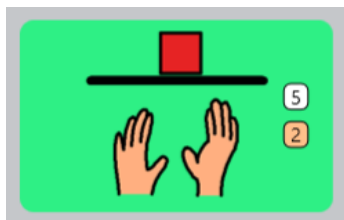

Figur 13.3 Knap, der viser brugstæller (hvid) og modelleringstæller (orange).

13.14.4 Vis tællere for modellering

Når tællerne er aktiveret, viser knapperne en orange badge, der viser hvor mange gange knappen valgtes i modelleringstilstanden (mens funktionen Registrer brug af knap var aktiveret) i det angivne tidsinterval. Standardtidsintervallet er Alt.

Aktivér funktionen Vis tællere for modellering (i brugerindstillinger)

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg kategorien **Registrering af data**.
4. Indstil **Vis tællere for modellering** til Til.



Vælg **Tidsinterval**, brug derefter rullemenuen eller felterne til startdato/-tidspunkt og slutdato/-tidspunkt til at ændre tidsintervallet for tælleren for modellering.

Aktivér funktionen Vis tællere for modellering (med knappen Registrering af data i topbjælken)



Se afsnit 13.14.2 *Vis knap til topbjælken* om at aktivere knappen Registrering af data i topbjælken.

1. Vælg knappen  **Registrering af data** i topbjælken.
2. Aktivér **Vis tællere for modellering**.



Vælg **Tidsinterval**, brug derefter rullemenuen eller felterne til startdato/-tidspunkt og slutdato/-tidspunkt til at ændre tidsintervallet for tælleren for modellering.

13.14.5 Administrer data

Nulstil tællerne for brug af knapper og modellering for den aktuelle side, knapperne på meddelelseslinjen, knapperne på værktøjslinjen eller hele sidesættet.



Nulstilling af tællerne for brug af knapper sletter ikke tidligere brugsdata. Hvis du vil slette alle brugsdata, der er gemt på din mytobiidynavox-konto, permanent, skal du navigere til mytobiidynavox.com > Snap > Brugsrapporter med en webbrowser.

Nulstil brugstællere (i brugerindstillinger)



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **Bruger**.
3. Vælg kategorien **Registrering af data**.
4. Vælg **Administrer data**.
5. Vælg området, hvor du gerne vil nulstille tællerne for brug af knapper og modellering.
6. Vælg **Nulstil** for at nulstille tællerne for brug og modellering for det valgte område. Vælg **Annuller** for at annullere nulstillingen.

Nulstil tællerne for brug (med knappen Registrering af data i topbjælken)



Se afsnit 13.14.2 *Vis knap til topbjælken* om at aktivere knappen Registrering af data i topbjælken.



1. Vælg knappen **Registrering af data** i topbjælken.
2. Vælg **Administrer data**.
3. Vælg området, hvor du gerne vil nulstille tællerne for brug af knapper og modellering.
4. Vælg **Nulstil** for at nulstille tællerne for brug og modellering for det valgte område. Vælg **Annuller** for at annullere nulstillingen.

14 Systemindstillinger


14.1 Indstillinger

14.1.1 Adgangskode

Når funktionen er aktiveret, skal der bruges en 4-cifret adgangskode for at få adgang til Redigeringstilstand, Søgetilstand og Synkronisering. Aktivering af adgangskode kan hjælpe med at forhindre uautoriserede ændringer af sidesættet og indstillingerne.

Aktivér adgangskode

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **System**.
3. Indstil kontakten Brug adgangskode til **Til**.
4. Indtast en 4-cifret adgangskode, som kun du kender, og som er svær at gætte.

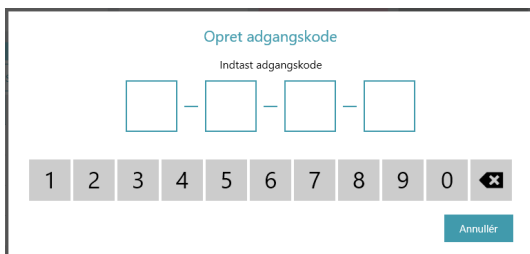

5. Indtast adgangskoden igen for at bekræfte den.
6. Når du aktiverer funktionen Brug adgangskode, aktiveres adgangskoden som standard for Redigeringstilstand, Synkronisering og Søgetilstand. Indstil indstillingen til Fra for disse funktioner, hvis de skal være tilgængelige uden adgangskode.



Hvis adgangskoden er aktiveret, og adgangskoden til funktionen Synkronisering er deaktiveret, virker synkronisering i tilstanden Kun pull-synkronisering. Når du bruger funktionen Kun pull-synkronisering, modtager du ændringer til sidesæt (foretaget på andre enheder) men sender ingen ændringer til sidesæt foretaget på den aktuelle enhed.

7. Når du afslutter redigeringstilstanden, kræves adgangskoden for at få adgang til apptilkøb og (hvis aktiveret) redigeringstilstand, synkronisering og/eller søgetilstand.



Hvis du allerede har aktiveret adgangskoden, kan du nulstille den ved at vælge knappen  **Redigér**.

Hvis du glemmer din adgangskode, kan du bruge hovedadgangskoden (0520) til at få adgang til redigeringstilstanden og straks nulstille din adgangskode.

14.1.2 Skærmindstilling (kun Windows)

Snap udfylder hele skærmen på din enhed, når fuldskræmstilstanden er aktiveret. Snap vises i et vindue, som du kan tilpasse, når fuldskræmstilstanden er deaktiveret.

14.1.3 Redigeringstilstand for sprog

Vælg sprog til skærmen Redigeringstilstand.

14.2 Enhed



Afsnittet Enhed findes kun på Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheder.

14.2.1 Indstillinger for partnervindue

Partnervinduet er en skærm på bagsiden af Tobii Dynavox I-13- og I-16-enheder. Partnervinduet fortæller samtalepartnere, at brugeren gør klar til at tale, og det viser tekst, som partneren kan læse.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **System**.
3. Vælg **Enhed**.
4. Foretag et valg i partnervinduevalgmuligheder:
 - **Vis teksten i meddelelsesvinduet** – viser teksten i meddelelsesvinduet i partnervinduet i realtid.
 - **Vis tekst der siges** – viser kun teksten i partnervinduet, når den siges. Når du skriver i meddelelsesvinduet, viser partnervinduet en række prikker for at vise, at brugeren er ved at udarbejde sin meddelelse. Når meddelelsesvinduet siges, ruller partnervinduet teksten samtidigt med, at den siges.



Partnervinduet viser kun tekst. Det viser ikke symboler.

5. Foretag et valg af indikatortypografien for partnervinduet:
 - **Spejl** – viser en miniatureversion af partnervinduet i topbjælken.
 - **Ikon** – viser et ikon når partnervinduet er tændt. Skjul ikonet når partnervinduet er slukket.
6. Sæt Slå strøm til partnervinduet til/fra på **Til** eller **Fra**. Når strømmen til partnervinduet er sat på Fra, viser det ikke nogen tekst.



Du kan også bruge knappen Handlinger til at styre lysstyrken på skærmen for partnervinduet og slå strøm til partnervinduet til og fra. Se afsnit 8.6.2 *Aktivt indhold* og 8.7 *Knaphandlinger*.

14.3 Butik

Køb varer, og administrér din aktiveringsnøgle.

14.3.1 Foretag et køb



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **System**.
3. Vælg **Butik**.
4. Vælg **Køb** på varen, som du vil købe.
5. Afslut din sikre transaktion.



Du skal have forbindelse til internettet for at foretage køb i butikken.

14.3.2 Gendan køb (kun Windows)

Du skal gendanne dine køb med din aktiveringsnøgle, hvis de købte varer ikke vises i Windows-versionen af appen Snap Core First.



Du skal have forbindelse til internettet for at gendanne køb.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **System**.
3. Vælg **Butik**.
4. Vælg **Gendan køb**.
5. Indtast din **aktiveringsnøgle**.
6. Vælg **Udført**.

14.3.3 Deaktivér nøgle (kun Windows)

Fjern aktiveringsnøglen fra den nuværende Windows-enhed, og brug den på en anden enhed.



1. Vælg knappen **Redigér**.
2. Vælg fanen **System**.
3. Vælg **Butik**.
4. Vælg **Deaktivér nøgle**. En dialogboks til bekræftelse åbnes.
5. Bekræft, at du vil deaktivere nøglen på enheden.

14.4 Symbolsæt

14.4.1 Søgeindstillinger

Når sikker symbolsøgning er aktiveret, vises ingen anstødelige symboler i søgeresultaterne, meddelelsesvinduet (med symboltavler) eller i søgetilstanden. Når sikker symbolsøgning er deaktiveret, vises alle tilgængelige symboler i søgeresultater, meddelelsesvinduet og i søgetilstanden.

14.4.2 Installerede symboler og valgfrie symboler

Symbolsættene, der er vist i afsnittet Installerede symboler, er installerede og tilgængelige på din enhed.



Vælg knappen **Slet**, og vælg derefter **Slet** for at bekræfte, hvis du vil slette et installeret symbolsæt.



Symbolerne i Snap Core kan ikke slettes.

Symbolsættene, der er vist i afsnittet Valgfrie symboler, er gratis symboler, der ikke i øjeblikket er installeret på din enhed. Vælg **Download** ud for det ønskede symbolsæt for at downloade og installere et gratis symbolsæt.



Du skal have en aktiv internetforbindelse for at downloade symbolsæt .



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
Visse symbolsæt fra tredjepart kan købes i butikken. Se afsnit 14.3 Butik.


14.4.3 Omorganisér symbolsæt

Rækkefølgen i søgeresultater for symboler afgøres af rækkefølgen af symbolsættene i listen med installerede symboler. Hvis du fx mest bruger symboler med høj kontrast i dit sidesæt, kan du flytte sættet med symboler med høj kontrast til toppen af listen med installerede symboler og dermed prioritere disse symboler i symbolsøgninger.



1. Vælg knappen **Redigér**.

2. Vælg fanen **System**.
3. Vælg kategorien **Symbolsæt**.
4. Vælg, og hold fast i håndtaget  på et symbolsæt i listen med installerede symboler.
5. Træk symbolsættet til en ny placering på listen.

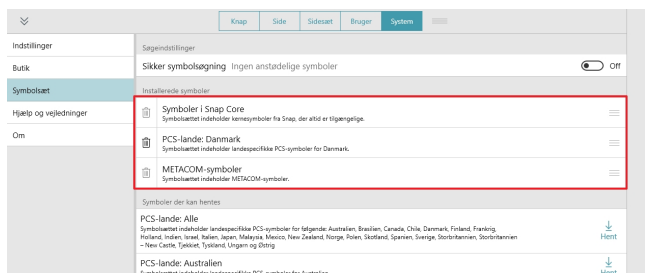

14.5 Hjælp og vejledninger

14.5.1 Videoer

Se videoer, og lær mere om at bruge Snap Core First.

14.5.2 Pathways til Core First



Pathways til Core First er en gratis app, der lærer dig de bedste måder at bruge Snap Core First til kommunikation, opnåelse af læse- og skrivefærdigheder, adfærdsstøtter og meget mere! Følg linkene i afsnittet, og lær mere.

14.5.3 Kort beskrivelse

Start den korte beskrivelse igen, og lær, hvordan du bruger Snap.

14.5.4 Ekstern hjælp

Se startvejledningen, brugervejledningen, vejledningerne til sidesæt, flere videoer, vidensdatabasen online og slutbrugerlicensaftalen.

14.6 Om

Versionsoplysninger for Snap Core First.

14.6.1 Softwareopdateringer



Gælder kun Windows

Appen Snap Core First opdateres automatisk med regelmæssige mellemrum.

Søg manuelt efter ny version, og download opdateringen:

1. Vælg knappen  **Redigér**.
2. Vælg fanen **System**.
3. Vælg kategorien **Om**.
4. Hvis der findes en opdatering, vises den under produktkoden. Vælg **Installér opdatering** for at hente den opdaterede version.

Copyright ©Tobii AB (publ). Ikke alle produkter og tjenester kan fås i alle lande. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdateret information om problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores support-sider online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt din løsningskonsulent eller forhandler

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du bede din løsningskonsulent hos Tobii Dynavox eller en godkendt forhandler om hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Kontaktoplysninger findes på www.TobiiDynavox.com/contact