


Startanleitung

Tobii Dynavox Speech Case



tobiidynavox

Was ist im Lieferumfang enthalten?

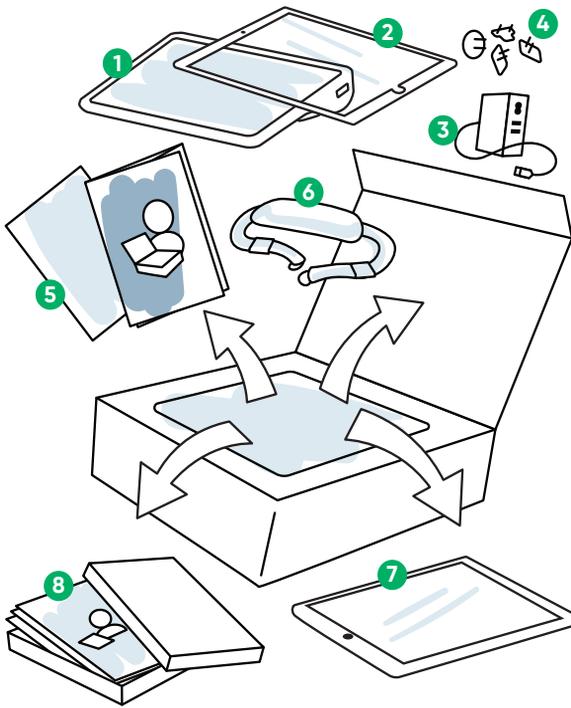

- 1 Speech Case
- 2 Abdeckung des iPad-Rahmens
- 3 Universelle Netzteile
- 4 USB-Netzteil
- 5 Benutzerhandbuch
- 6 Trageriemen


Zusätzlich mit SC-Tablet:

- 7 iPad
- 8 Lernkarten für TD Snap



Wenn Sie eine Montageplatte oder eine Fingerführung gekauft haben, finden Sie genauere Informationen dazu in der mitgelieferten Anleitung.


Das Gerät kennenlernen

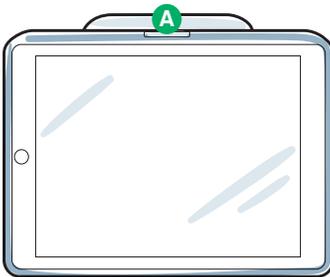

Vorderseite



Von oben und von den Seiten

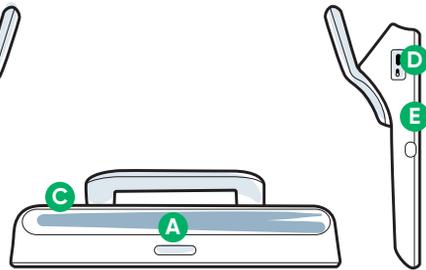

- A Wippschalter zur Lautstärkeregelung
- B Tasteranschlüsse

- C Lautsprecher
- D Stromversorgungsanschluss (USB-C)

- E Schiebeschalter für Auswahlmethode

Mit den vier Schritten in dieser Anleitung wird Ihr Speech Case/SC-Tablet eingerichtet.


Bevor es losgeht



Wenn Sie das SC-Tablet (das Paket „Speech Case + iPad“) gekauft haben, schalten Sie das iPad ein und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen. Versichern Sie sich, dass Sie **Manuell einrichten** und ein WLAN-Netzwerk auswählen, sobald Sie dazu aufgefordert werden.


1. Schritt: iPad in Speech Case legen

- 1 Legen Sie das iPad (mit dem Bildschirm nach oben) auf eine ebene Fläche.
- 2 Legen Sie die Abdeckung des iPad-Rahmens auf das iPad und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.
- 3 Bringen Sie den Ladeanschluss im iPad auf die Höhe des dazugehörigen Lochs im Speech Case und schieben Sie anschließend die Kante des iPads unter die flexible Lippe oben am Speech Case.
- 4 Richten Sie das iPad so aus, dass es flach im Speech Case liegt.
- 5 Biegen Sie die flexible Lippe mit den Fingern um und über die Kanten des iPads.

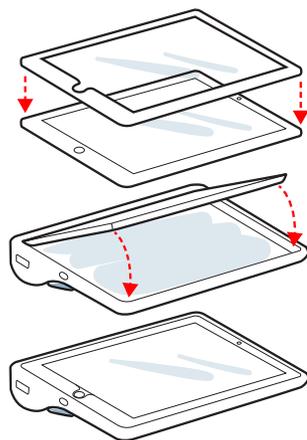

2. Schritt: Modus einstellen

Das Speech Case hat drei Modi: Touch (T), iOS-Scanning (S) und Aus (O). Stellen Sie mit dem Schiebeschalter für die Auswahlmethode den Modus ein, **BEVOR** Sie das Gerät verwenden. Der Entscheidungsbaum unten hilft Ihnen, für den Benutzer den richtigen Modus zu finden.

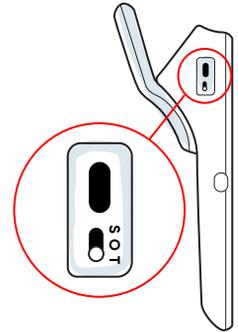


Position „Touch“ (T): Das Gerät sagt „Power On“ und es ertönt 1 Klick.

Position „Scanning“ (S): Das Gerät sagt „Power On“ und es ertönen 2 Klicks.

Die **Position (O)** ist für den Versand und längere Lagerzeiten vorgesehen.

Wie nimmt der Benutzer auf dem Gerät eine Auswahl vor?

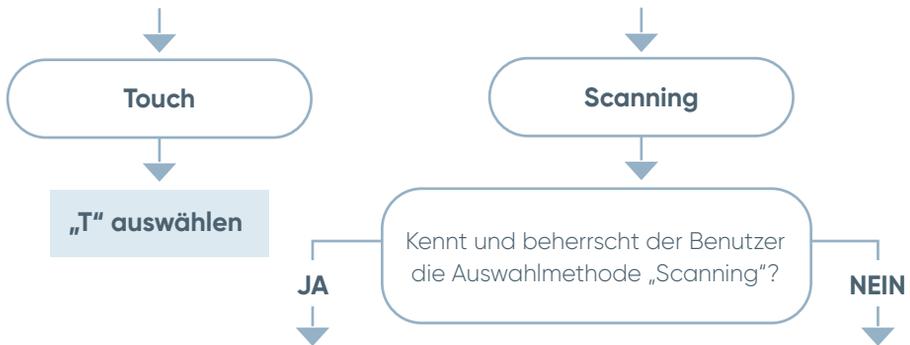

„S“ für iOS-Scanning auswählen

- Sie können dann per Scanning auf alle Apps und Dateien zugreifen.
- Keine Kompatibilität mit manchen Scanning-Funktionen von TD Snap.
- Konfigurieren Sie die Scanning-Bedienungshilfen in den iOS-Einstellungen für die Barrierefreiheit.
- Wenn Sie iOS-Scanning in TD Snap nutzen möchten, setzen Sie die Auswahlmethode in TD Snap auf „Touch“.


Auf „T“ für TD Snap-Scanning setzen

- Benutzern, die noch keine Erfahrung mit Scanning haben, wird dies empfohlen.
- Mit den Funktionen von TD Snap-Scanning, wie zum Beispiel Gruppenscanning, auditives Feedback und Kontaktzeit, können Sie eine Personalisierung vornehmen.
- Das Scanning ist auf TD Snap beschränkt. Außerhalb von TD Snap können keine Elemente gescannt werden.



Wenn Sie den Modus ändern müssen, schauen Sie in das Benutzerhandbuch des Speech Case.


3. Schritt: Bluetooth-Kopplung

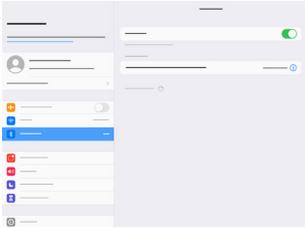

- 1 Gehen Sie auf dem iPad auf Einstellungen > Bluetooth.
- 2 Achten Sie darauf, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
- 3 Wählen Sie das SC-Tablet von Tobii Dynavox aus.



Wenn Sie mehrere SC-Tablets im selben Raum verwenden, erkennen Sie sie an den letzten 5 Stellen der Bluetooth-ID. Sie entsprechen der fünfstelligen Seriennummer unter dem integrierten Ständer des Speech Case.

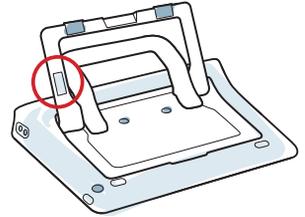

4. Schritt: Erste Schritte mit TD Snap



Einrichtungsassistent für TD Snap

Die TD Snap-App starten.

Befolgen Sie die Anweisungen, um einen neuen Benutzer zu erstellen, oder stellen Sie eine gespeicherte Benutzerdatei wieder her.

Wir helfen Ihnen gerne



myTobiiDynavox

Mit dem kostenlosen Konto Synchronisierungen vornehmen, Seitensets teilen, Backups speichern und vieles mehr!

Besuchen Sie

www.myTobiiDynavox.com



Schulungsmaterialien

Benutzerhandbuch:

<http://qrco.de/SCmanual>

Lernkarten für TD Snap Core First:

<https://qrco.de/TDSnapCards>

Lernkarten für TD Snap Text:

<https://qrco.de/TextCards>

Lernkarten für TD Snap Aphasie:

<https://qrco.de/AphasiaCards>



Zusätzlicher Support

Community:

<http://qrco.de/TDFB>

Technischen Support erhalten Sie von Ihrem Tobii Dynavox-Händler vor Ort.

Zusätzliche Ressourcen für das Speech Case finden Sie hier:



qrco.de/TDSCinfo