




# TD Pilot med TD Talk

Vejledning

start her

# Kassens indhold

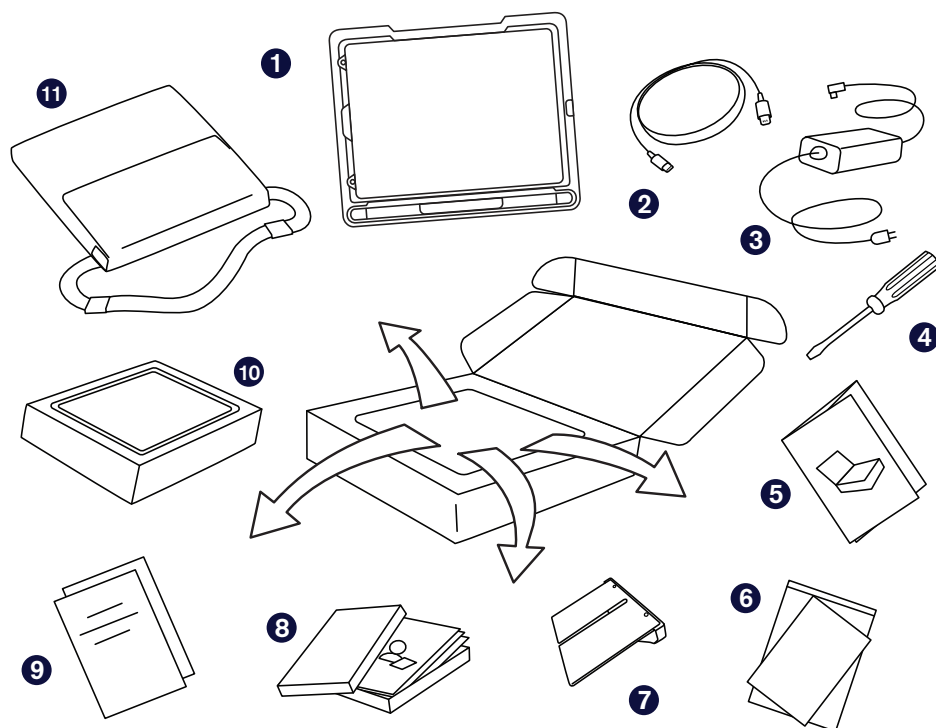

## 1 Samlet enhed

(iPad Pro 12,9", TD Pilot, beskyttelsesetui, monteringsbeslag til ConnectIT/Rehadapt, USB-C-kabel-til-USB-C, forudinstalleret batteri)

## 2 Kabel Lightning til USB-C

## 3 Oplader med kabel

## 4 Skruetrækker

## 5 Vejledning

## 6 Dokument om sikkerhed og standarder

## 7 Justerbart beslag

## 8 Undervisningskort til TD Talk og AssistiveTouch

## 9 Garantidokumenter

## 10 iPad-kasse (med oplader til iPad)

## 11 Bæretaske

# Lad os komme i gang

Vejledningen er målrettet to personer: Personen, som skal bruge enheden til at kommunikere, og hjælperen, som kan trykke på skærmen og flytte enheden. Afsnittene med håndikonet skal læses af hjælperen. Afsnittene med øjenikonet skal læses af personen, som skal bruge enheden ved hjælp af øjenstyring. Personen vil være i stand til at kommunikere ved hjælp af øjenstyring med appen, TD Talk, når vedkommende har gennemgået trinnene i vejledningen.

Hjælper




Bruger



## Strøm på

- 1 Slut ledningen til opladningsporten på siden af TD Pilot og sæt derefter ledningen i en stikkontakt.
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af TD Pilot for at tænde enheden.
- 3 Tryk på tænd/sluk-knappen på iPad'en for at tænde enheden.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere iPad'en.

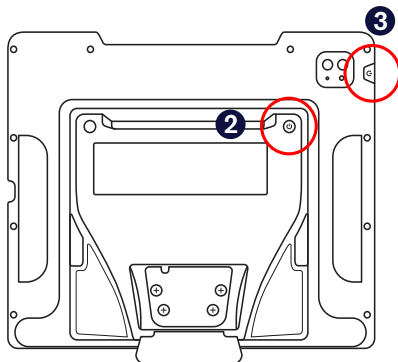

Skærmen Hjem vises med dine appikoner, når du har afsluttet konfigurationen af din iPad.

# Konfiguration af adgang med øjenstyring

Konfigurer skærmen for nøjagtighed i øjenstyring 

- 1 Tryk på **Indstillinger**.



- 2 Tryk på kategorien **Hjemmeskærm & Dock** i venstre side.
- 3 Vælg **Større** appsymboler i højre side for at gøre symbolerne større.
- 4 Tryk på kategorien **Skærm & lysstyrke** i venstre side.
- 5 Tryk på **Mørk** udseende til højre
- 6 Scroll ned og tryk på **Tekststørrelse** til højre.
- 7 Flyt markøren til tekststørrelse hele vejen til højre.



**Bemærk:** Tekststørrelsen forstørres i alle kompatible programmer.

- 8 Tryk på **Skærm & lysstyrke** i venstre side for at vende tilbage til indstillingerne for skærm og lysstyrke.
- 9 Scroll ned og tryk på **Vis** i højre side.



**Bemærk:** Indstillingen findes ikke på iPads, der er mindre end 11".

- 10 Vælg **Zoomet** og tryk derefter på **Indstil**.
- 11 Tryk på **Brug zoomet** i pop op-vinduet. Skærmen nulstilles.
- 12 Vælg **Annuller** for at lukke det zoomede pop op-vindue.
- 13 Du skal nu nulstille din iPad for at aktivere zoomindstillingerne. Tryk på **Generelt** til venstre, scroll derefter ned i højre side og tryk på **Luk ned**. Tryk igen på tænd/sluk-knappen for at tænde den igen, når iPad'en er slukket.



## Hvad har AssistiveTouch med øjenstyring at gøre?

AssistiveTouch er designet til personer, som har vanskeligt ved at røre ved skærmen. Menuen til AssistiveTouch gør det muligt for dig at udføre touchfunktioner, såsom trykke og scrolle, når du bruger øjenstyring. Den indeholder også genveje til brug med øjenstyring til funktioner som skærmen Hjem og Apps-kuffer, der typisk åbnes ved touch.

## Konfigurer AssistiveTouch



- 1 Tryk på **Indstillinger**.



- 2 Tryk på **Tilgængelighed** i venstre side.

- 3 Tryk på **Berøring** i højre side.

- 4 Tryk på **AssistiveTouch** og tænd derefter funktionen.

- Øjenstyring er nu aktiveret. Du kan se markøren, der viser placeringen af dit blik. Menuknappen til AssistiveTouch kan også ses på skærmen.



**Bemærk:** Tryk på **Annuller**, hvis du bliver bedt om at tilpasse menuen på øverste niveau.

- 5 Træk menuknappen til AssistiveTouch op i den øverste tredjedel af skærmen i højre side.

## Tilpasning af menuen til AssistiveTouch

- 1 Vælg **Tilpas menu på øverste niveau** i højre side.

- 2 Tryk på **+** for at ændre antallet af ikoner til otte.

- 3 Tryk på **Notifikationscenter**.

- 4 Scroll ned til bunden af listen, og tryk på **Pause/genoptag pause til/fra**. Tryk uden for listen for at lukke den.

- 5 Tryk på knappen **Bevægelser**.


- 6 Scroll ned og tryk derefter på **Flyt menu**. Tryk et vilkårligt sted uden for menuen for at lukke den.

- 7 Fortsæt redigeringen af menuikonerne indtil menuen stemmer overens med menuen til højre.

- 8 Vælg **Tilgængelighed** til venstre.

- 9 Vælg **Berøring** til højre.

- 10 Vælg **AssistiveTouch** til højre.

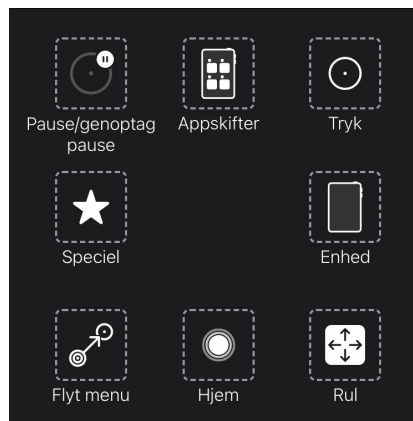

## Konfiguration af dvælekontrol

- 1 Scroll til bunden af menuen til AssistiveTouch i højre side. Tænd **Pusebetjening**.



**Bemærk:** Tryk på Nej, hvis du bliver bedt om at tilpasse menuen på øverste niveau for AssistiveTouch.

- 2 Tryk på minustegnet (-) ved siden af **Sekunder** for at ændre dvæletiden til 1,5 sekunder.




**Tip:** Du kan komme i gang med denne indstilling for dvæletid. Du kan ændre dvæletiden senere, så den passer til dit behov.

## Vækning og oplåsning af din iPad

iPad'en vækkes automatisk, når øjenstyringsenheden registrerer brugerens øjne. Lås iPad'en op ved at vælge knappen AssistiveTouch og derefter Hjem.

Prøv det nu:

- 1 Tryk på øverste knap for at låse iPad'en.
- 2 Se på skærmen et par sekunder. iPad'en vækkes og viser låseskærmen.
- 3 Tryk på eller brug dine øjne til at vælge menuknappen, **AssistiveTouch**, og vælg derefter **Hjem**.

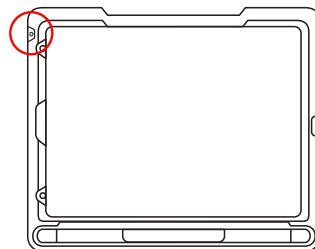

IPad-en er nu låst opp.



**Tip:** Vi anbefaler, at du bruger ansigtsgenkendelse, hvis du vil have øget sikkerhed på din enhed. Med ansigtsgenkendelse kan du låse din enhed op uden at indtaste en adgangskode hver gang. Konfigurer ansigtsgenkendelse i Indstillinger for iPadOS > Face ID og kode.

# Konfigurer TD Talk



- 1 Tryk på appen **TD Talk**.



- 2 Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk for at åbne den øjenstyrede systemmenu.

- 3 Tryk på knappen **Mere**.



- 4 Tryk på **Indstillinger**.



- 5 Indstil sprog for TD Talk:

- Tryk på den **højre pil** for at navigere til indstillingen **Generel**.
- Tryk **Åbn** på Generelle indstillinger.
- Vælg sprog.
- Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til Indstillinger.



- 6 Vælg stemme:

- Tryk på **Åbn** indstillingen **Stemme**.
- Vælg sprog, som skal tildeles en stemme, øverst i skærmen.
- Vælg stemme.
- Vælg **X** for at afslutte indstillingerne for TD Talk.



## Bemærk:

Stemmerne i toppen af listen er allerede downloadet og klar til brug. Stemmerne i bunden af listen er stemmer, der kan downloades.

## Valgfrit: Tilføj flere tastatursprog.


- 1 Gå til **Øjenstyret systemmenu > Mere > Indstillinger > Tastatur > Tilføj/skift**.
- 2 Vælg sprog fra fanen Installeret, eller gå til fanen Download for at finde andre sprog.
- 3 Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til indstillingerne for TD Talk.
- 4 Åbn **Stemmeindstillinger**, vælg det nye sprog og vælg derefter stemme til sproget.




**Tip:** Du kan hurtigt skifte sprog i TD Talk ved at vælge globussen i nederste venstre hjørne af tastaturet.

# Montering og placering


Gør brugeren klar til at bruge øjenstyring ved at placere vedkommende i en komfortabel stilling. Sørg for at brugeren eventuelt bruger sine briller, og at brillerne er pudsede.

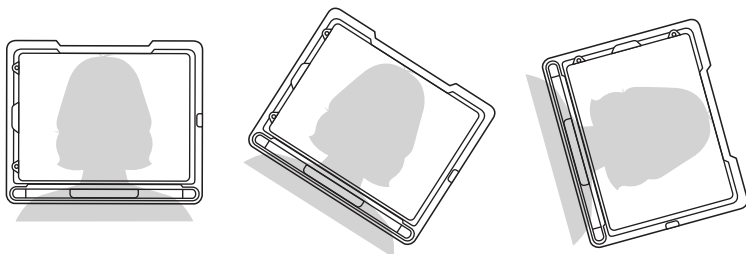

Placer TD Pilot på monteringsystemet eller en stabil overflade foran brugeren i eller lidt under øjenhøjden på vedkommende. Hvis brugeren læner sit hoved til venstre eller højre, skal du vippe TD Pilot tilsvarende. Det er vigtigt, at vinklen på skærmens overflade svarer til vinklen på brugerens ansigt. TD Pilot skal placeres højere end bordfladen for de fleste brugere, når de sidder ved et bord eller et skrivebord.

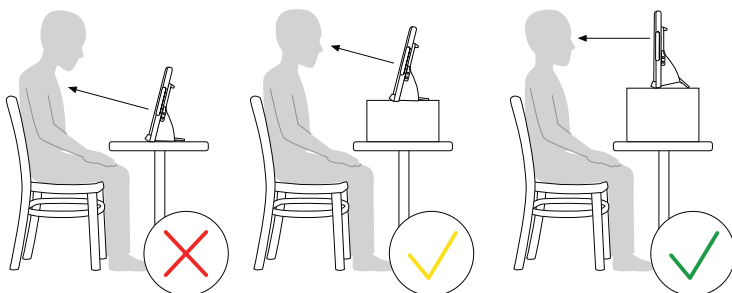

Du skal muligvis finindstille placeringen af enheden under kalibreringstrinnene på næste side. Juster altid enheden, så den passer til brugeren og ikke omvendt.

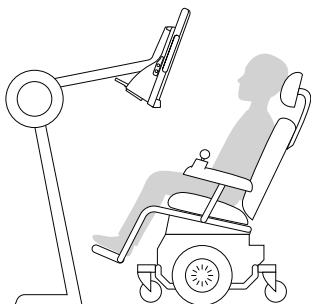

**Bemærk:** Et monteringsystem er den bedste løsning til præcis placering af enheden og til justering i løbet af dagen. Der findes flere monteringsløsninger, herunder gulvbeslag, bordbeslag og kørestolsbeslag. Besøg [TobiiDynavox.com](https://www.tobii-dynavox.com), eller kontakt din lokale Tobii Dynavox-partner.




# Kalibrering

- 1 Tryk på appen **CoPilot**.



- 2 Følg anvisningerne på skærmen i CoPilot for at kalibrere øjenstyringsenheden til brugerens øjne.

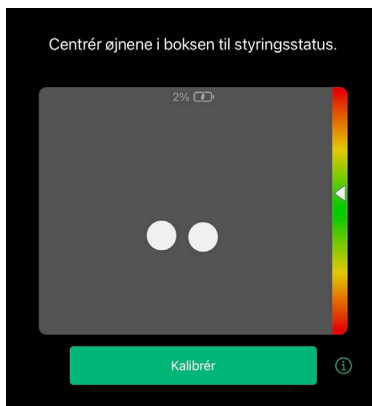

- 3 Stryg op fra bunden af skærmen for at vende tilbage til skærmen Start, når kalibreringen er udført.



De resterende trin skal udføres af brugeren af TD Pilot-enheden ved hjælp af øjenstyring. Du kan som hjælper læse anvisningerne højt. Læs i et tempo der giver brugeren af enheden tilstrækkelig tid til at udføre valgene med sine øjne.

# Prøv det

Din TD Pilot er nu klar til brug! Brug dine øjne til at færdiggøre selvstudiet nedenfor.

## Åbn TD Talk

Vælg appen **TD Talk** med dine øjne.



**Bemærk:** Din hjælper kan trykke på skærmen for dig, hvis du har problemer med at vælge med dine øjne, indtil du lærer TD Talk at kende. Øjenstyring er en færdighed så øv dig i TD Talk, så det bliver nemmere.

## Skriv og oplæs

Brug øjenstyring til at sige nogle ord og sætninger i TD Talk.

- Introducer dig selv.
- Kom med en kommentar om vejret.
- Brug det numeriske tastatur til at oplyse din alder eller telefonnummer.

# Fortsæt med undervisningskortene til TD Talk

Fortsæt din konfigurationsrejse med undervisningskortene til TD Talk, der fulgte med i kassen med din TD Pilot.

Forslagene til vejledninger og fejlfinding i undervisningskortene til TD Talk gør det nemmere for dig at få en bedre oplevelse med øjenstyring og bruge TD Talk til at kommunikere hurtigere og mere effektivt. Du lærer også mere om at bruge AssistiveTouch til at få adgang til andre apps på din iPad ved hjælp af øjenstyring.

# Øvrige ressourcer

Scan QR-koderne, eller brug linkene.



**Tobii Dynavox**

[tobiidynavox.com](https://tobiidynavox.com)



**Apple**

[apple.com/dk/accessibility](https://apple.com/dk/accessibility)



**myTobiiDynavox**

[mytobiidynavox.com](https://mytobiidynavox.com)



**Tobii Dynavoxs  
undervisningscenter  
(kun på engelsk)**

[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)



**TD Community**

[qrco.de/TDFB](https://qrco.de/TDFB)



**Supportside til TD Pilot**

[qrco.de/PilotHelp](https://qrco.de/PilotHelp)



**Brugervejledning  
til TD Pilot**

[qrco.de/PilotDocs](https://qrco.de/PilotDocs)



**Dokumentation**

*TD CoPilot > Indstillinger  
> Hjælp*



For teknisk support, bedes  
du kontakte din lokale Tobii  
Dynavox-repræsentant.