


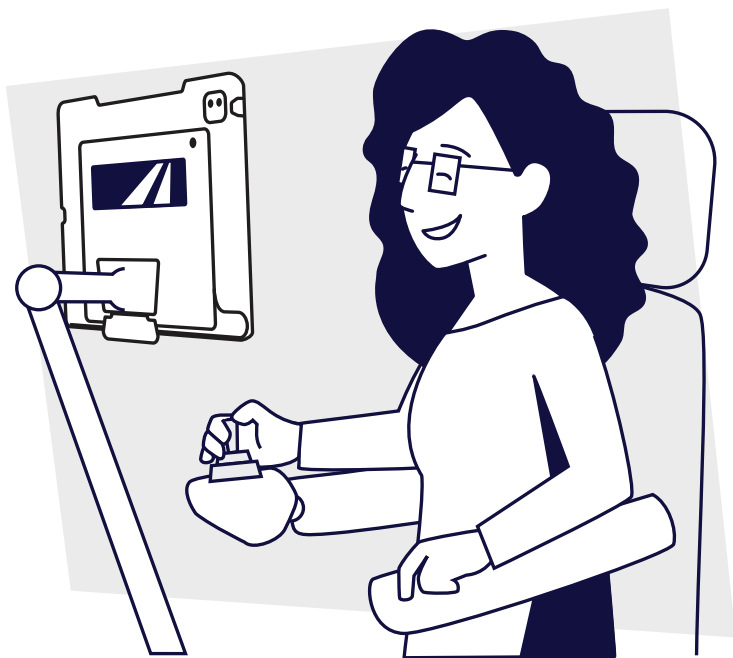


TD Pilot con TD Talk

Guía de inicio

Comenzar
aquí

¿Qué hay en la caja?

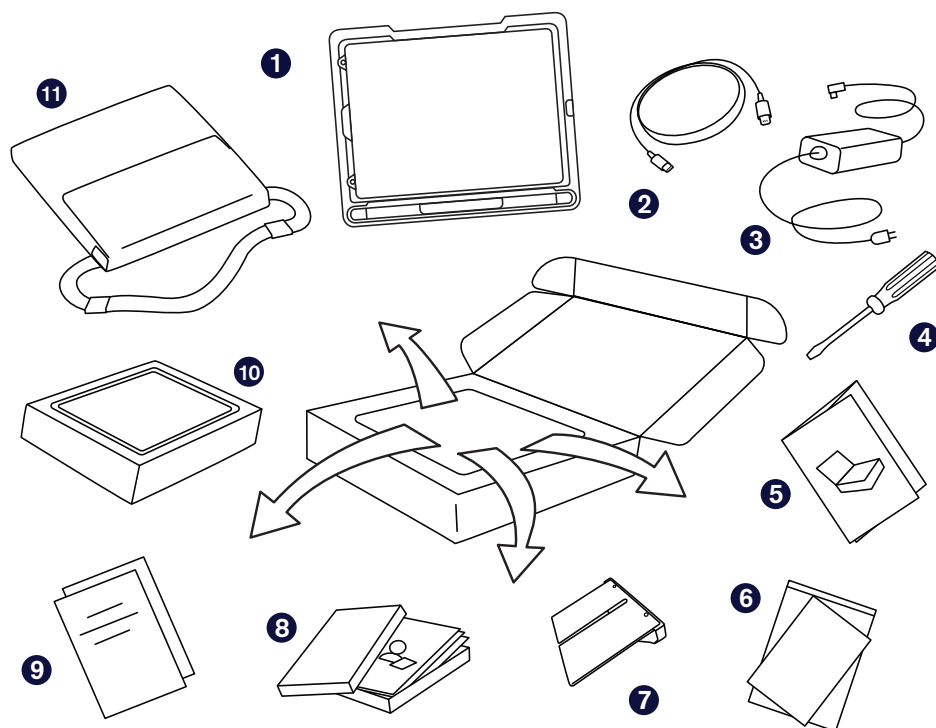

1 Dispositivo preensamblado
(iPad Pro 12.9, base de TD Pilot, funda protectora, placa de montaje ConnectIT/Rehadapt, cable de conexión USB-C a USB-C, batería preinstalada)

2 Cable de conexión
Lightning a USB C

3 Cargador con cable

4 Desarmador

5 Guía de inicio

6 Documento sobre seguridad y conformidad

7 Soporte ajustable

8 Tarjetas de entrenamiento de TD Talk y AssistiveTouch

9 Documentos de garantía

10 Caja de iPad
(contiene un cargador de iPad)

11 Bolsa de transporte

Empecemos

Esta Guía de inicio está diseñada para dos personas: aquella que usará el dispositivo para comunicarse y un asistente que puede tocar la pantalla y mover el dispositivo. Las secciones con el ícono de mano deben ser completadas por el asistente. Las secciones con el ícono de ojo deben ser completadas por la persona que accederá al dispositivo mediante el seguimiento ocular. Cuando haya completado los pasos de esta guía, la persona será capaz de usar el seguimiento ocular para comunicarse en la aplicación TD Talk.

Asistente




Usuario



Botón de encendido/apagado

- 1 Conecte el cable de alimentación al puerto de carga en el lado de la base de TD Pilot y, luego, conecte el cable de alimentación en un tomacorriente.
- 2 Presione el botón de encendido en la parte de atrás del TD Pilot para encenderlo.
- 3 Presione el botón de inicio en el iPad para encenderlo.
- 4 Siga las indicaciones en pantalla para configurar el iPad.

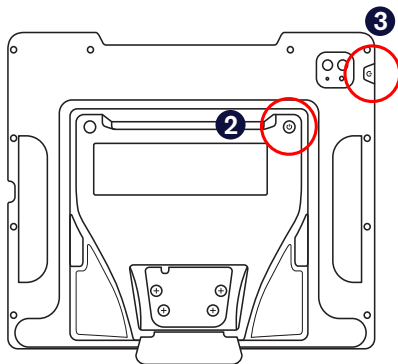

Cuando haya completado las indicaciones de configuración en el iPad, verá la pantalla de Inicio con los íconos de las aplicaciones.

Configuración del acceso al seguimiento ocular

Configure la pantalla para la precisión de la mirada



1 Seleccione **Configuración**.



2 A la izquierda, seleccione la categoría **Pantalla de inicio y acoplamiento**.

3 A la derecha, seleccione **Usar íconos grandes de apps** para agrandar los íconos.

4 A la izquierda, seleccione la categoría **Pantalla y brillo**.

5 A la derecha, seleccione **Oscuro**.

6 A la derecha, desplácese hacia abajo y seleccione **Tamaño del texto**.

7 Mueva el control deslizante Tamaño del texto hasta la derecha.



Nota: Esto aumenta el tamaño del texto en todas las aplicaciones compatibles.

8 Seleccione **Pantalla y brillo** a la izquierda para volver a la configuración de Pantalla y brillo.

9 A la derecha, desplácese hacia abajo y seleccione **Vista**.



Nota: Esta configuración no está disponible en los iPad de menos de 11 pulgadas.

10 Seleccione **Ampliada** y, luego, seleccione **Establecer**.

11 En el cuadro emergente, seleccione **Usar vista ampliada**. La pantalla se restablecerá brevemente.

12 Seleccione **Cancelar** para cerrar el cuadro emergente Usar vista ampliada.

13 Debe reiniciar por completo el iPad para aplicar la configuración de Zoom. Seleccione **General** a la izquierda y, luego, a la derecha, deslice el dedo hacia abajo y seleccione **Cerrar**. Cuando el iPad se haya apagado, presione el botón de Inicio para encenderlo de nuevo.



¿Qué relación tiene AssistiveTouch con el seguimiento ocular?

AssistiveTouch está diseñado para las personas a las que se les dificulta tocar la pantalla. El menú de AssistiveTouch le permite hacer funciones de acceso táctil, tales como tocar y desplazarse, mediante el seguimiento ocular. También proporciona atajos accesibles para la mirada a cosas como la pantalla de Inicio y App Switcher, a los cuales se accede normalmente mediante gestos.

Configurar AssistiveTouch

- 1 Seleccione **Configuración**.



- 2 A la izquierda, seleccione **Accesibilidad**.
- 3 A la derecha, seleccione **Tacto**.
- 4 Seleccione **AssistiveTouch** y, luego, actívelo.

- Ahora, está activado el seguimiento ocular. Verá el Puntero, que muestra hacia dónde está mirando en la pantalla. El botón del Menú AssistiveTouch también aparece en la pantalla.



Nota: Si se le pide personalizar el Menú del nivel superior, seleccione **Cancelar**.

- 5 Arrastre el botón del Menú AssistiveTouch hasta el tercio superior de la pantalla del lado derecho.

Personalice el Menú AssistiveTouch

- 1 A la derecha, seleccione **Personalizar el menú de nivel superior**.
- 2 Seleccione **+** para cambiar el número de íconos a 8.
- 3 Seleccione **Centro de notificaciones**.
- 4 Deslice el dedo hasta el final de la lista y seleccione **Alternar pausar/reanudar la permanencia**. Seleccione afuera de la lista para cerrarla.
- 5 Seleccione el botón **Gestos**.
- 6 Deslice el dedo hasta **Mover menú** y selecciónelo. Toque fuera del menú en cualquier lugar para cerrarlo.
- 7 Siga editando los íconos del menú hasta que su menú coincida con el que se muestra a la derecha.
- 8 A la izquierda, seleccione **Accesibilidad**.
- 9 A la derecha, seleccione **Táctil**.
- 10 A la derecha, seleccione **AssistiveTouch**.



Configure el Control de permanencia

- 1 A la derecha, deslice el dedo hasta el final del Menú AssistiveTouch. Active el **Control de permanencia**.



Nota: Si se le pide personalizar el menú del nivel superior AssistiveTouch, seleccione **No**.

- 2 Seleccione el signo de menos (–) al lado de **Segundos** para cambiar el tiempo de permanencia a 1.5 segundos.




Consejo: Este ajuste del tiempo de permanencia servirá para iniciar. Puede cambiar el tiempo de permanencia de nuevo más tarde según sus necesidades.

Activar y desbloquear el iPad

El iPad se activa automáticamente cuando el seguidor visual detecta los ojos del usuario. Para desbloquear el iPad, seleccione el botón AssistiveTouch, y luego, Inicio.

Inténtelo ahora:

- 1 Presione el botón de la parte superior para bloquear el iPad.
- 2 Mire la pantalla unos momentos. El iPad se activa y muestra la pantalla bloqueada.
- 3 Seleccione o use los ojos para seleccionar el botón del **Menú AssistiveTouch** y, luego, seleccione **Inicio**.

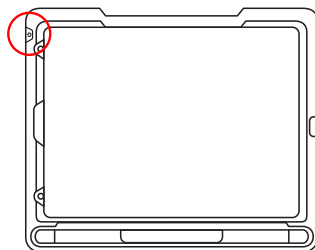

Ahora, el iPad está bloqueado.



Consejo: Si le interesa tener seguridad adicional en su dispositivo, le recomendamos que use Face ID. Face ID le permite desbloquear su dispositivo sin introducir un código de acceso en cada ocasión. Configure Face ID en *Configuración de iPad OS > Face ID y código de acceso*.

Configuración de TD Talk

- 1 Seleccione la aplicación de **TD Talk**.



- 2 Deslice el dedo hacia arriba desde la letra T en el teclado de TD Talk para abrir el menú oculto.

- 3 Seleccione el botón **Más**.



- 4 Seleccione **Configuración**.



- 5 Establezca el idioma de la interfaz de TD Talk:

- Seleccione la **flecha derecha** para navegar hasta la configuración **General**.
- En la configuración General, seleccione **Abrir**.
- Seleccione el idioma de su preferencia.
- Seleccione **Atrás** para regresar a Configuración.



- 6 Elija sus voces:

- En el Panel de voz, toque **Abrir**.
- En la parte superior de la pantalla, seleccione el idioma al que le asignará una voz.
- Seleccione una voz.
- Seleccione **X** para salir de la Configuración de TD Talk.



Nota: Las voces de la parte superior de la lista están descargadas y listas para usarse. Las voces del final de la lista están disponibles para descargarse.

Opcional: Agregue idiomas de teclado adicionales.

- 1 Vaya a **Menú oculto > Más > Configuración > Teclado > Agregar/cambiar**.
- 2 Seleccione un idioma de la pestaña Instalado o vaya a la pestaña Descargar para buscar otros idiomas.
- 3 Seleccione **Atrás** para regresar a la Configuración de TD Talk.
- 4 Abra la **Configuración de voz**, seleccione el nuevo idioma y, luego, elija una voz para el idioma.




Consejo: Cuando esté usando TD Talk, puede cambiar de idioma rápidamente si selecciona la imagen del mundo en la esquina inferior izquierda del teclado.


Montaje y posicionamiento




Prepare al usuario para que empiece a usar el seguimiento ocular ubicándolo en una posición cómoda. Si usa anteojos, asegúrese de que los traiga puestos y de que las lentes estén limpias.

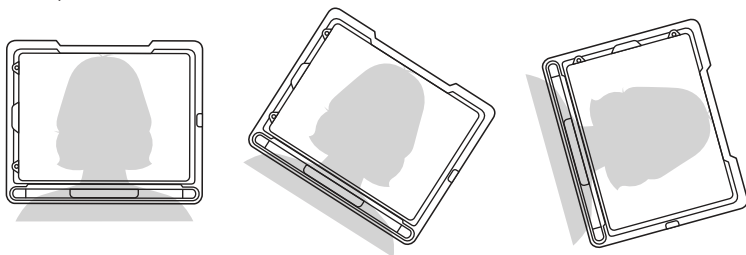

Coloque el TD Pilot en su sistema de montaje o en una superficie estable frente al usuario, al nivel de los ojos o ligeramente por debajo de este. Si la cabeza está inclinada a la izquierda o la derecha, incline el TD Pilot para que coincidan. Es importante que el ángulo de la superficie de la pantalla coincida con el ángulo de la cara del usuario. La mayoría de los usuarios, cuando están sentados en una mesa o escritorio, necesitarán acomodar el TD Pilot a un nivel más alto que la superficie de la mesa.

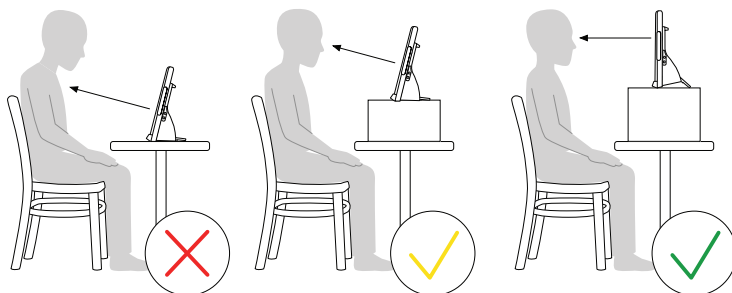

Es posible que necesite ajustar con detalle la posición del dispositivo durante los pasos de Calibración en la página siguiente. Ajuste siempre la posición del dispositivo de manera que se adapte al usuario, no al revés.

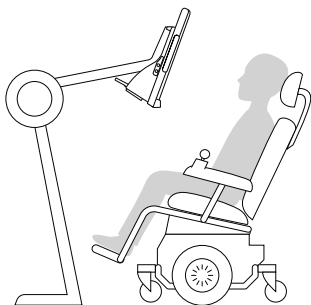

Nota: Un sistema de montaje es la mejor opción para acomodar con precisión el dispositivo y es fácil de ajustarse durante el día. Existen varias opciones de montaje, como los soportes para piso, para escritorio y para silla de ruedas. Visite TobiiDynamox.com o contacte a nuestro partner en su país

Calibración

- 1 Seleccione la aplicación **CoPilot**.



- 2 Siga las instrucciones en pantalla en CoPilot para calibrar el seguidor ocular con los ojos del usuario.



- 3 Cuando el usuario haya terminado la calibración, deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba para regresar a la pantalla de Inicio.



Los pasos restantes debe realizarlos el usuario del dispositivo TD Pilot mediante el seguimiento ocular. Como asistente, usted leerá las instrucciones en voz alta. Lea a un ritmo que le dé el tiempo necesario al usuario del dispositivo para hacer las selecciones con los ojos.

Pruébelo

¡Su TD Pilot ya está listo para ser usado! Use sus ojos para completar el tutorial a continuación.

Abra TD Talk

Use los ojos para seleccionar la aplicación **TD Talk**.



Nota: Si en este punto se le dificulta seleccionar con los ojos, su asistente puede tocar la pantalla por usted hasta que llegue a TD Talk. El seguimiento ocular es una habilidad, así que practíquela en TD Talk para familiarizarse.

Cree y hable

Use el seguimiento ocular para decir algunas palabras y frases en TD Talk.

- Preséntese.
- Comente acerca del clima.
- Use el teclado numérico para decir su edad o número telefónico.

Continúe con las tarjetas de entrenamiento de TD Talk

Continúe el proceso de configuración con las tarjetas de entrenamiento de TD Talk que venían en la caja con su TD Pilot.

Los tutoriales y las sugerencias de resolución de problemas en las tarjetas de entrenamiento de TD Talk pueden ayudarle a mejorar su experiencia con el seguidor ocular y usar TD Talk para comunicarse de manera más rápida y eficaz. También aprenderá más acerca del uso de AssistiveTouch para acceder a otras aplicaciones en su iPad mediante el seguimiento ocular.

Recursos adicionales

Escanee los códigos QR para usar los vínculos.



Tobii Dynavox

es.tobiidynavox.com



Apple

apple.com/es/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



**Centro de aprendizaje
de Tobii Dynavox
(solo en inglés)**

learn.tobiidynavox.com



Comunidad de TD

qrco.de/TDFB



**Página de Soporte de
TD Pilot**

qrco.de/PilotHelpES



**Manual del usuario de
TD Pilot**

qrco.de/PilotDocs



Documentación

*TD CoPilot >
Configuración > Ayuda*



Soporte técnico

Norteamérica:
1-800-344-1778 ext. 1

Resto del mundo:
+46 8 522 950 20 ext. 1