


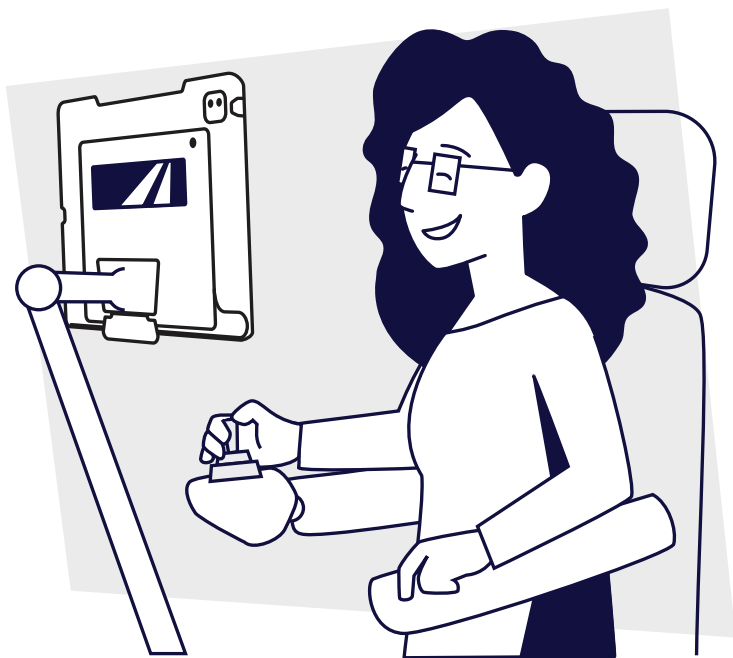


TD Pilot met TD Talk

Introductiehandleiding

Begin hier

Wat zit er in de doos?

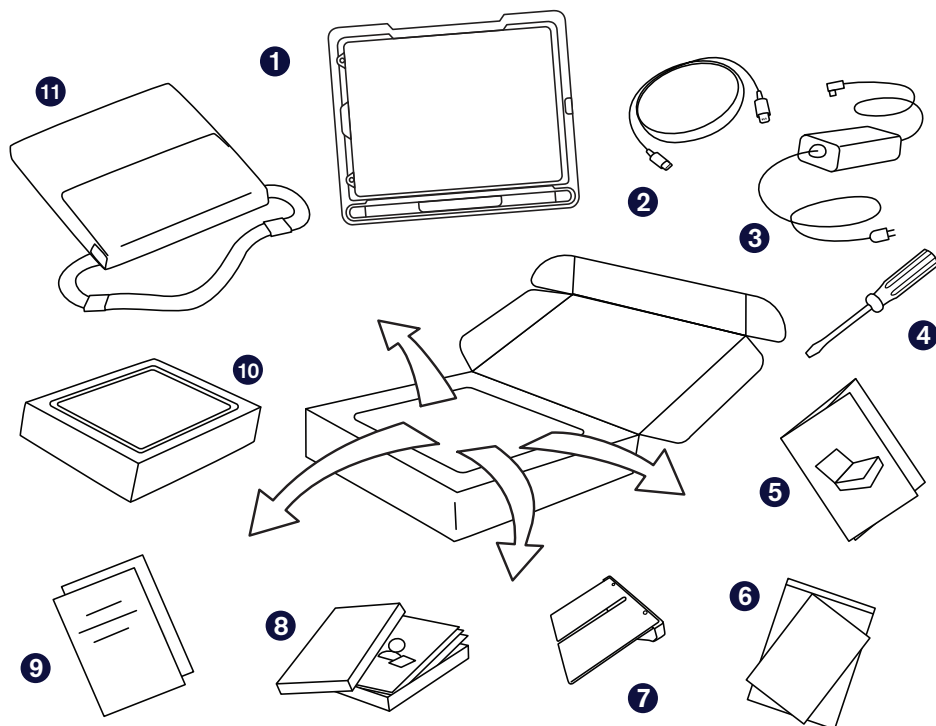

1 Voorgemonteerd apparaat
(iPad Pro 12.9, TD Pilot-basis,
beschermhoes, ConnectIT/
Rehadapt-montageplaat,
verbindingskabel USB-C naar
USB-C, vooraf geïnstalleerde accu)

2 Aansluitkabel Lightning - USB-C

3 Oplader met kabel

4 Schroevendraaier

5 Introductiehandleiding

**6 Document over veiligheid en
conformiteit**

7 Verstelbare beugel

**8 TD Talk en AssistiveTouch
Trainingskaarten**

9 Garantiedocumenten

10 iPad Box
(met iPad-oplader)

11 Draagtas

Laten we beginnen

Deze Introductiehandleiding is ontworpen voor twee mensen: de persoon die het apparaat zal gebruiken om mee te communiceren en een helper die het scherm kan aanraken en het apparaat kan verplaatsen. De onderdelen met het hand-icoon moeten samen met een helper worden uitgevoerd. De secties met het oog-icoon moeten worden gevolgd door de persoon die het apparaat bedient met behulp van oogbesturing. Wanneer de stappen in deze handleiding uitgevoerd zijn zal de gebruiker in staat zijn om oogbesturing te gebruiken om in de TD Talk app te communiceren.

Helper




Gebruiker



Strøm på

- ❶ Sluit de stroomkabel aan op de oplaadpoort aan de zijkant van de TD Pilot basis en steek het netsnoer in een stopcontact.
- ❷ Druk op de aan/uit-knop op de achterkant van de TD Pilot om hem aan te zetten.
- ❸ Druk op de aan/uit-knop op de iPad om hem aan te zetten.
- ❹ Volg de aanwijzingen op het scherm om de iPad in te stellen.

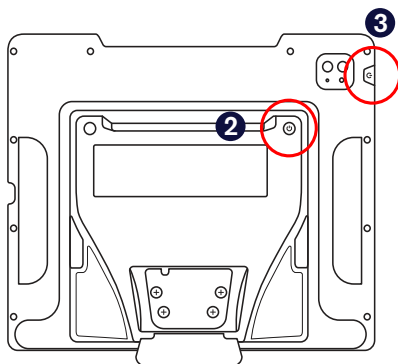

Als je klaar bent met de instellingen van de iPad, wordt het startscherm met de app-pictogrammen zichtbaar.

Instellen bediening met oogbesturing

Configureer het beeldscherm voor de beste nauwkeurigheid. 

- 1 Tik op **Instellingen**.



- 2 Tik aan de linkerkant op de **Beginscherm & Dock** categorie.
- 3 Selecteer aan de rechterkant **Gebruik grote appsymbolen** om de iconen groter te maken.
- 4 Tik aan de linkerkant op de **Scherm en helderheid** categorie.
- 5 Tip aan de rechterkant op **Donker**.
- 6 Scroll naar beneden en aan op de rechterkant op **Tekstgrootte**.
- 7 Schuif de schuifregelaar Tekstgrootte helemaal naar rechts.



Opmerking: Dit vergroot de tekstgrootte in alle compatibele toepassingen.

- 8 Tik op **Scherm en helderheid** aan de linkerkant om terug te keren naar de scherm en helderheid instellingen.
- 9 Scroll omlaag en tik aan de rechterkant op **Beeld**.



Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar op iPads die kleiner zijn dan 11 inch.

- 10 Selecteer **Ingezoomd**, dan tik op **Instellen**.
- 11 In the pop-up, tik op **Gebruik Ingezoomd**. Het scherm zal kort resetten.
- 12 Selecteer **Annuleren** om de Gebruik Ingezoomd pop-up te sluiten.
- 13 Je moet nu je iPad volledig herstarten om de Zoom-instellingen toe te passen. Tik op **algemeen** aan de linkerkant, dan aan de rechterkant veeg omlaag en tik op **Afsluiten**. Als de iPad is uitgeschakeld, druk je op de aan/uit-knop om hem weer in te schakelen.



Wat heeft AssistiveTouch te maken met oogbesturing?

AssistiveTouch is ontworpen voor mensen die moeite hebben om het scherm aan te raken. Het AssistiveTouch.menu staat je toe om “aanraak” functies uit te voeren, zoals tikken en scrollen, met behulp van oogbesturing. Het biedt ook met het oog toegankelijke snelkoppelingen naar zaken als het Startscherm en de app-schakelaar, die normaal gesproken met gebaren worden geopend.

AssistiveTouch instellen

- 1 Tik op **Instellingen**.



- 2 Tik aan de linkerkant op **Toegankelijkheid**.

- 3 Tik aan de rechterkant op **Aanraken**.

- 4 Tik op **AssistiveTouch**, en zet het aan.

- Oogbesturing is nu ingeschakeld. De aanwijzer wordt zichtbaar die de locatie van de blik toont. De menuknop AssistiveTouch verschijnt ook op het scherm.




Opmerking: Als er wordt gevraagd om het Hoofdmenu aan te passen, tik dan op **Annuleren**.

- 5 Sleep de menuknop AssistiveTouch naar de bovenste 33% van het scherm op de rechterkant.

Het menu AssistiveTouch aanpassen

- 1 Selecteer aan de rechterkant **Pas hoogste menu aan**.
- 2 Tik op **+** om het aantal iconen te veranderen in 8.
- 3 Tik op **Berichten-centrum**.
- 4 Veeg het naar de onderkant van de lijst en tik op **+** scroll naar beneden en selecteer **Pauzeer/hervat 'houd stil'**. Tik op buiten de lijst om het te sluiten.
- 5 Tik op de **Gebaren** knop.
- 6 Veeg naar en vervolgens tik op het **Verplaats meny**. Tik waar dan ook buiten het menu om het te sluiten.
- 7 Ga door met het bewerken van de menu-iconen totdat je menu overeenkomst met het menu dat rechts getoond wordt.
- 8 Selecteer aan de linkerkant **Toegankelijkheid**.
- 9 Selecteer aan de rechterkant **Aanraking**.
- 10 Selecteer aan de rechterkant **AssistiveTouch**.

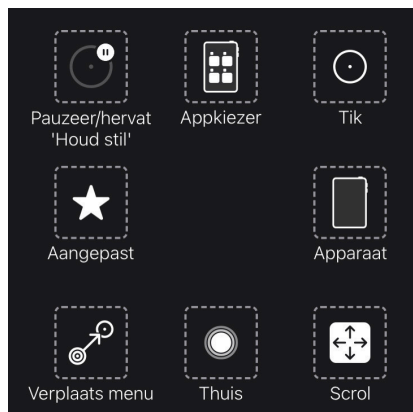

Dwell-beheer configureren

- 1 Veeg aan de rechterkant naar de onderkant van het menu AssistiveTouch. Zet **Stilhoudbediening (dwell tijd)** aan.



Opmerking: Als je wordt gevraagd om het Hoofdmenu aan te passen van AssistiveTouch, tik dan op **Annuleren**.

- 2 Tik op het minteken (–) rechts naast **Seconden** om de dwelltijd te veranderen naar 1,5 seconde.




Tip: Deze dwelltijd-instelling is bedoeld om te beginnen beginnen. De stilhoudbediening (dwell tijd) kan op een later moment nog worden aangepast.

Wekken en ontgrendelen van je iPad

De iPad wordt automatisch “wakker” wanneer de oogbesturing de ogen van de gebruiker detecteert. Ontgrendel de iPad door de AssistiveTouch-knop te selecteren en vervolgens Beginscherm.

Probeer het nu:

- 1 Druk op de bovenste knop om de iPad te vergrendelen.
- 2 Kijk naar het scherm voor een paar seconden. De iPad “wordt wakker” en toont het vergrendelscherm.
- 3 Tik of gebruik je ogen om de **menuknop AssistiveTouch** te selecteren en vervolgens **Startscherm**.

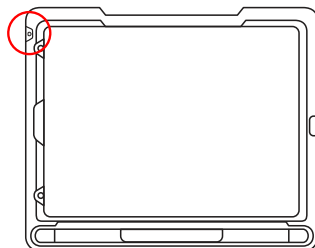

IPad-en er n   st opp.



Tip: Als je extra beveiliging op je apparaat wilt, raden we je aan Face-ID te gebruiken. Face-ID maakt het mogelijk om je apparaat te ontgrendelen zonder elke keer een wachtwoord in te voeren. Stel Face-ID in onder Instellingen iPad OS > Face-ID en wachtwoord.

Instellen TD Talk



- 1 Tik op de **TD Talk** app.



- 2 Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk toetsenbord om het menu buiten het scherm te openen.

- 3 Tik op de **Meer**-knop.



- 4 Tik op **Instellingen**.



- 5 Stel de TD Talk interfacetaal in:

- Tik op het **pijlje naar rechts** om te navigeren naar de **Algemene** instellingen.
- Tik op Algemene Instellingen op **Openen**.
- Selecteer de taal van je keuze.
- Selecteer **Terug** om terug te gaan naar Instellingen.



- 6 Kies je stemmen:

- Tik op Stem op **Openen**.
- Selecteer boven in het scherm de taal waarvoor je een stem wilt toewijzen.
- Selecteer een stem.
- Selecteer **X** om TD Talk Instellingen te verlaten.

Optioneel: Toevoegen aanvullende toetsenbordtalen.

- 1 Ga naar **offscreenmenu > Meer > Instellingen > Toetsenbord > aanpassen**.

- 2 Selecteer een taal op het tabblad Geïnstalleerd of ga naar het tabblad Downloaden om andere talen te vinden.

- 3 Selecteer **Terug** om terug te gaan naar TD Talk Instellingen.

- 4 Open the **Steminstellingen**, selecteer de nieuwe taal, kies dan een stem voor de taal.



Opmerking:

Stemmen aan de bovenkant van de lijst zijn gedownload en klaar om te gebruiken. Stemmen aan de bovenkant van de lijst zijn beschikbaar voor download.




Tip:


Als je TD Talk gebruikt, kun je snel van taal wisselen door de wereldbol linksonder op het toetsenbord te selecteren.

Montage en plaatsing


Bereid de gebruiker voor op het gebruik van oogbesturing door hem of haar comfortabel te laten zitten. Als er een bril wordt gedragen, zorg er dan voor dat de glazen schoon zijn.

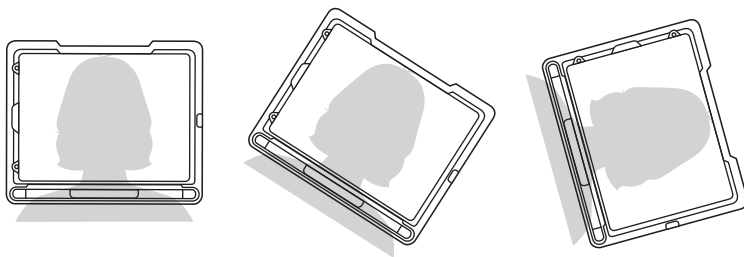

Plaats de TD Pilot op het montagesysteem of op een stabiel oppervlak voor de gebruiker, op of iets onder zijn ooghoogte. Als het hoofd iets scheef wordt gehouden naar links of rechts, bevestig dan de TD Pilot overeenkomstig. Als hun hoofd naar links of rechts is gekanteld, kantel dan de TD Pilot om het te matchen. De meeste gebruikers zullen, wanneer ze aan een tafel of bureau zitten, de TD Pilot hoger moeten hebben dan het oppervlakte van de tafel.

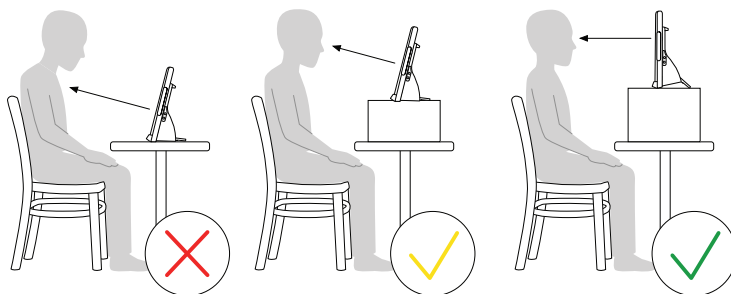

Het kan nodig zijn de positie van het apparaat te verfijnen tijdens de kalibratiestappen op de volgende pagina. Pas altijd de positie van het apparaat zodanig aan dat het aan de behoeften van de gebruiker voldoet, en niet andersom.

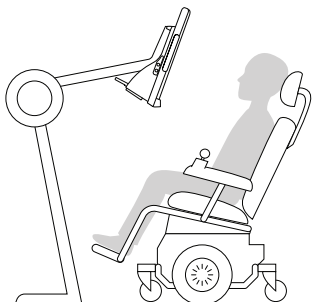


Opmerking: Een montagesysteem is de beste optie voor een precieze plaatsing van de TD Pilot dat in de loop van de dag gemakkelijk kan worden aangepast. Er zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden beschikbaar, waaronder vloer-, tafel-, en rolstoelbevestigingen. Bezoek [TobiiDynavox.com](https://www.tobii-dynavox.com) of neem contact op met de lokale Tobii Dynavox partner.

Kalibreren

- 1 Tik op de **CoPilot** app.



- 2 Volg de instructies op het scherm in CoPilot om de oogbesturing te kalibreren voor de ogen van de gebruiker.

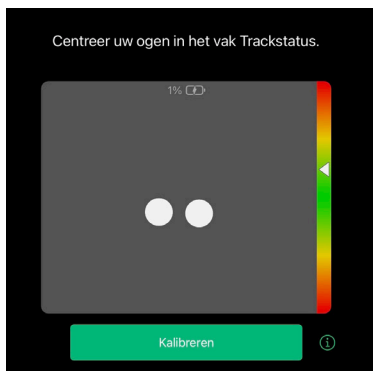

- 3 Wanneer de gebruiker klaar is met kalibreren, veeg dan omhoog van de onderkant van het scherm om terug te keren naar het startscherm.



De resterende stappen moeten worden uitgevoerd door de gebruiker van het TD Pilot apparaat die oogbesturing gebruikt. Als zijn helper lees je de instructies hardop voor. Lees in een tempo dat de gebruiker van het apparaat voldoende tijd geeft om de selecties met hun ogen te maken.

Probeer het

Je TD Pilot is nu klaar om te kunnen gebruiken! Gebruik uw ogen om de handleiding hieronder te volgen.

Open TD Talk

Gebruik uw ogen om de **TD Talk** app te selecteren.



Opmerking: Als u nu nog moeite hebt om met uw ogen te selecteren, kan je assistent voor jou op het scherm tikken tot je in TD Talk komt. Oogbesturing is een vaardigheid, dus oefen in TD Talk om er aan te wennen.

Stel samen en Spreek

Gebruik oogbesturing om een paar woorden en zinnen te zeggen in TD Talk.

- Stel jezelf voor.
- Zeg wat over het weer.
- Gebruik het numerieke toetsenbord om je leeftijd of telefoonnummer te vertellen.

Doorgaan naar de TD Talk Trainingskaarten

Ga verder met het instellen met de TD Talk Trainingskaarten die in de doos met u TD Pilot zitten.

De handleidingen en suggesties voor het oplossen van problemen in de TD Talk Trainingskaarten kunnen u helpen uw ervaring met oogbesturing te verbeteren en TD Talk te gebruiken om sneller en effectiever te communiceren. U zult ook meer leren over het gebruik van AssistiveTouch om andere apps op uw iPad te openen met behulp van oogbesturing.

Aanvullende bronnen

Scan de Qr-codes of gebruik de links:



Tobii Dynavox

tobiidynavox.com



Apple

apple.com/nl/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



**Tobii
Dynavoxleercentrum
(alleen in het Engels)**

learn.tobiidynavox.com



TD Gemeenschap

qrco.de/TDFB



**TD Pilot
Ondersteuningscentrum**

qrco.de/PilotHelp



**TD Pilot
Gebruikershandleiding**

qrco.de/PilotDocs



Documentatie

*TD CoPilot > Instellingen
> Hulp*



Neem contact op met
uw lokale Tobii Dynavox
vertegenwoordiger voor
technische ondersteuning.