




# TD Pilot avec TD Talk

Guide de mise en route

Démarrer  
ici

# Que contient la boîte ?

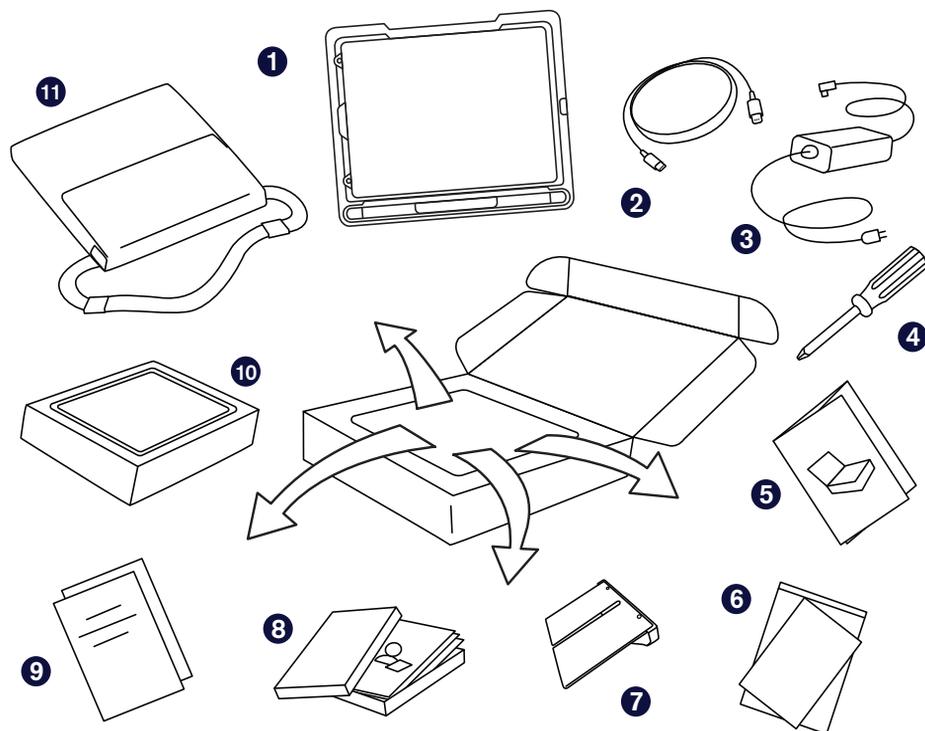

**1 Dispositif préassemblé**  
(iPad Pro 12.9, socle TD Pilot, étui de protection, plaque de montage ConnectIT/Rehadapt, câble de connexion USB-C vers USB-C, batterie préinstallée)

**2 Câble de connexion**  
Lightning vers USB C

**3 Chargeur avec câble**

**4 Tournevis**

**5 Guide de mise en route**

**6 Documents de sécurité et de conformité**

**7 Support d'ajustement**

**8 TD Talk et fiches de familiarisation d'AssistiveTouch**

**9 Documents de garantie**

**10 Boîte de l'iPad**  
(contenant le chargeur iPad)

**11 Sac de transport**

# Commençons

Ce guide de mise en route est conçu pour deux personnes : la personne qui utilisera le dispositif pour communiquer et un assistant qui peut toucher l'écran et déplacer le dispositif. Les sections comportant une icône représentant une main doivent être effectuées par l'assistant. Les sections comportant une icône représentant un œil doivent être effectuées par la personne qui accédera au dispositif à l'aide du regard. Lorsque vous aurez terminé les étapes de ce guide, la personne pourra utiliser le regard pour communiquer dans l'application TD Talk.

**Assistant**




**Utilisateur**



## Marche/arrêt

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur le port d'alimentation situé sur le côté du socle du dispositif TD Pilot, puis branchez le cordon d'alimentation sur une prise.
- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé à l'arrière du dispositif TD Pilot afin de l'allumer.
- 3 Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur l'iPad afin de l'allumer.
- 4 Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour configurer l'iPad.

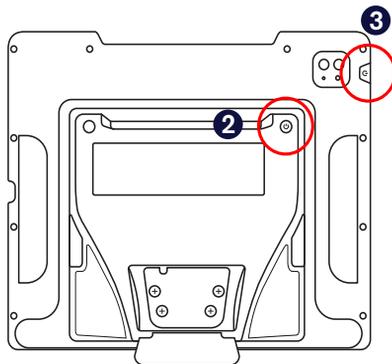

Lorsque vous avez suivi toutes les invites de configuration de votre iPad, l'écran d'accueil contenant les icônes de votre application s'affiche.

# Configurer l'accès avec la commande oculaire

## Configurer l'affichage pour la précision du regard

1 Appuyez sur **Paramètres**.



2 Sur le côté gauche, appuyez sur la catégorie **Écran et station d'accueil**.

3 À droite, sélectionnez **Plus grand** pour agrandir les icônes.

4 Sur le côté gauche, appuyez sur la catégorie **Affichage et luminosité**.

5 Sur le côté droit, appuyez sur **Foncé**.

6 Sur le côté droit, faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur **Taille du texte**.

7 Déplacez le curseur Taille du texte jusqu'au bout vers la droite.



**Remarque :** Cela augmente la taille du texte dans toutes les applications compatibles.

8 Appuyez sur **Affichage et luminosité** sur le côté gauche pour revenir aux paramètres Affichage et luminosité.

9 Sur le côté droit, faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur **Affichage**.



**Remarque :** Ce paramètre n'est pas disponible sur les iPad de moins de 11 pouces.

10 Sélectionnez **Zoom**, puis appuyez sur **Définir**.

11 Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur **Utiliser le zoom**. L'écran est brièvement réinitialisé.

12 Sélectionnez **Annuler** pour fermer la fenêtre contextuelle Utiliser le zoom.

13 Vous devez maintenant effectuer un redémarrage complet de l'iPad pour appliquer les paramètres du zoom. Appuyez sur **Général** sur le côté gauche, puis faites défiler vers le bas sur le côté droit et appuyez sur **Éteindre**. Lorsque l'iPad est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour le rallumer.



### Qu'est-ce que AssistiveTouch a à voir avec le regard ?

AssistiveTouch est conçu pour les personnes qui éprouvent des difficultés à toucher l'écran. Le menu AssistiveTouch vous permet d'effectuer des fonctions « tactiles », telles qu'Appuyer et Faire défiler en utilisant la commande oculaire. Il fournit également des raccourcis accessibles par le regard vers des éléments tels que l'écran d'accueil et le commutateur d'application, qui sont généralement accessibles par des gestes tactiles.

## Configurer AssistiveTouch

- 1 Appuyez sur **Paramètres**.



- 2 Sur le côté gauche, appuyez sur **Accessibilité**.

- 3 Sur le côté droit, appuyez sur **Tactile**.

- 4 Appuyez sur l'application **AssistiveTouch**, puis activez la.

- La commande oculaire est maintenant activée. Le pointeur, qui indique l'emplacement de votre regard, s'affiche à l'écran. Le bouton Menu d'AssistiveTouch s'affiche également à l'écran.



**Remarque :** Si vous êtes invité à personnaliser le menu de niveau supérieur, appuyez sur **Annuler**.

- 5 Faites glisser le bouton Menu d'AssistiveTouch vers le tiers supérieur de l'écran, du côté droit.

## Personnaliser le menu AssistiveTouch

- 1 Sur le côté droit, sélectionnez **Personnaliser le menu de niveau supérieur**.

- 2 Appuyez sur **+** pour passer à 8 icônes.

- 3 Appuyez sur **Centre de notification**.

- 4 Parcourez l'écran jusqu'au bas de la liste et appuyez sur **Mettre en pause ou reprendre la sélection par fixation du regard**. Appuyez en dehors de la liste pour la fermer.

- 5 Appuyez sur le bouton **Gestes**.


- 6 Parcourez l'écran pour atteindre **le menu**. Appuyez n'importe où en dehors du menu pour le fermer.

- 7 Continuez à modifier les icônes du menu jusqu'à ce que votre menu corresponde à celui affiché sur le côté droit.

- 8 Sur le côté gauche, sélectionnez **Accessibilité**.

- 9 Sur le côté droit, sélectionnez **Tactile**.

- 10 Sur le côté droit, sélectionnez **AssistiveTouch**.

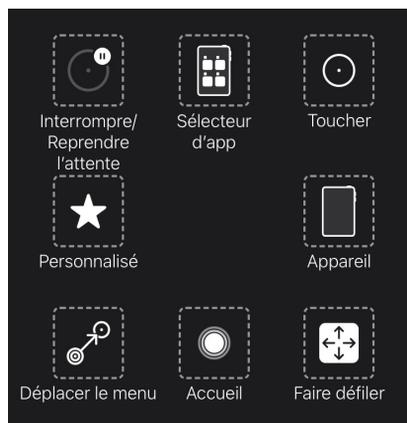

## Configurer la commande par fixation du regard

- 1 Sur le côté droit, parcourez l'écran jusqu'au bas du menu AssistiveTouch. Activez la **commande par fixation du regard**.



**Remarque :** Si vous êtes invité à personnaliser le menu de niveau supérieur d'AssistiveTouch, appuyez sur **Non**.

- 2 Appuyez sur le signe moins (-) situé à côté de **Secondes** pour régler la durée de fixation sur 1,5 seconde.




**Conseil :** Ce paramètre de durée de fixation est destiné à vous permettre de démarrer. Vous pouvez modifier à nouveau la durée de fixation ultérieurement en fonction de vos besoins.

## Sortie de veille et déverrouillage de votre iPad

L'iPad sort automatiquement de son état de veille lorsque la commande oculaire détecte les yeux de l'utilisateur. Déverrouillez l'iPad en sélectionnant le bouton AssistiveTouch, puis Accueil.

Essayez maintenant ce qui suit :

- 1 Appuyez sur le bouton situé dans la partie supérieure de l'iPad pour le verrouiller.
- 2 Regardez l'écran pendant quelques instants. L'iPad sort de son état de veille et affiche son écran de verrouillage.
- 3 Appuyez ou utilisez vos yeux pour sélectionner le bouton du menu AssistiveTouch, puis sélectionnez Accueil.

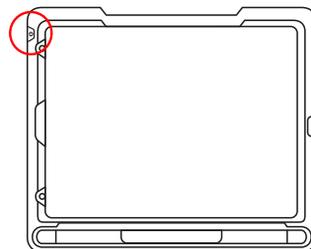

L'iPad est maintenant déverrouillé.



**Conseil :** Si vous souhaitez renforcer la sécurité de votre dispositif, nous vous recommandons d'utiliser Face ID. Face ID vous permet de déverrouiller votre dispositif sans avoir à saisir de code d'accès à chaque utilisation. Configurez Face ID dans *iPad OS Settings > Face ID et code d'accès*.

# Configurer TD Talk

- 1 Appuyez sur l'application **TD Talk**.



- 2 Faites défiler l'écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier TD Talk afin d'ouvrir le menu hors écran.

- 3 Appuyez sur le bouton **Autres**.



- 4 Appuyez sur **Paramètres**.



- 5 Définissez la langue de l'interface TD Talk :

- Appuyez sur la **flèche droite** afin d'atteindre les Paramètres **généraux**.
- Dans les paramètres généraux, appuyez sur **Ouvrir**.
- Sélectionner la langue de votre choix.
- Sélectionnez **Retour** pour revenir aux paramètres.



- 6 Sélectionnez vos voix :

- Dans le panneau Voix, appuyez sur **Ouvrir**.
- Dans la partie supérieure de l'écran, sélectionnez la langue à laquelle vous attribuerez une voix.
- Sélectionnez une voix.
- Sélectionnez **X** pour quitter les paramètres TD Talk.



**Remarque :** Les voix situées en haut de la liste sont téléchargées et prêtes à être utilisées. Les voix situées en bas de la liste sont disponibles au téléchargement.

## Facultatif : Ajouter des langues de clavier supplémentaires.

- 1 Allez dans **Menu Hors Écran > Autres > Paramètres > Clavier > Ajouter/Modifier**.
- 2 Sélectionnez une langue dans l'onglet Installées ou accédez à l'onglet Télécharger pour rechercher d'autres langues.
- 3 Sélectionnez **Retour** pour revenir aux paramètres de TD Talk.
- 4 Ouvrez les **Paramètres de la voix**, sélectionnez la nouvelle langue, puis choisissez une voix pour cette même langue.




**Conseil :** Lorsque vous utilisez TD Talk, vous pouvez rapidement changer de langue en sélectionnant l'icône représentant un globe dans le coin inférieur gauche du clavier.


# Montage et position




Préparez l'utilisateur à l'utilisation de la commande oculaire en le positionnant confortablement. S'il utilise des lunettes, assurez-vous qu'il les porte et que les verres sont propres.

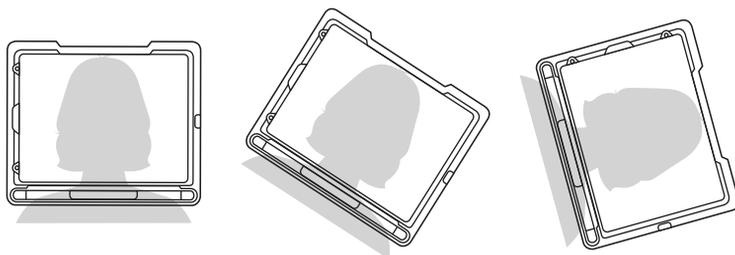

Placez le dispositif TD Pilot sur votre système de montage ou sur une surface stable devant l'utilisateur, au niveau de ses yeux ou légèrement en dessous. Si sa tête est penchée vers la gauche ou vers la droite, inclinez le dispositif TD Pilot en conséquence. Il est important que l'angle de la surface de l'écran corresponde à l'angle du visage de l'utilisateur. Dans la plupart des cas, le dispositif TD Pilot doit être positionné à une hauteur supérieure à celle de la surface de la table ou du bureau où l'utilisateur est assis.

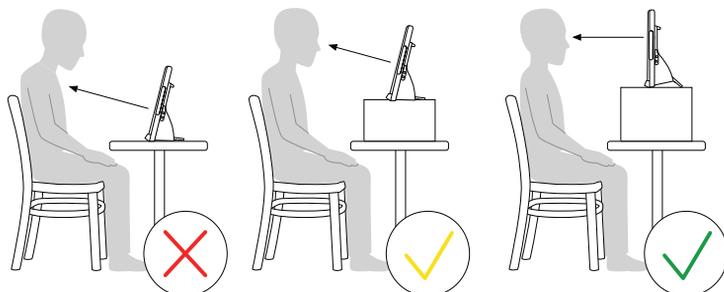

Vous devrez peut-être affiner la position du dispositif au cours des étapes de calibrage de la page suivante. Ajustez toujours la position du dispositif en fonction de l'utilisateur, et non l'inverse.

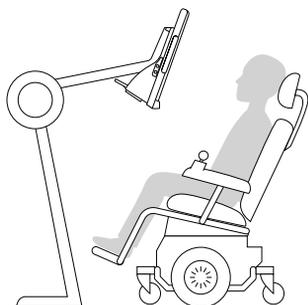

**Remarque :** Il est préférable de disposer d'un système de montage qui peut être ajusté facilement tout au long de la journée afin d'assurer un positionnement précis du dispositif. Plusieurs options de montage sont possibles, notamment au sol, sur un bureau et sur un fauteuil roulant. Visitez [TobiiDynavox.com](https://www.tobii-dynavox.com) ou contactez votre partenaire Tobii Dynavox local.

# Calibrer

- 1 Appuyez sur l'application **CoPilot**.



- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran dans CoPilot afin de calibrer la commande oculaire sur les yeux de l'utilisateur.



- 3 Une fois que l'utilisateur a terminé le calibrage, faites défiler l'écran de bas en haut afin de revenir à l'écran d'accueil.



Les étapes restantes doivent être effectuées par l'utilisateur du dispositif TD Pilot à l'aide de son regard. En tant qu'assistant, vous lirez les instructions à voix haute. Lisez à un rythme qui donne à l'utilisateur du dispositif suffisamment de temps pour faire les sélections en utilisant son regard.

# Essayez maintenant ce qui suit :

Votre dispositif TD pilot est maintenant prêt à être utilisé ! Utilisez votre regard afin de suivre le tutoriel ci-dessous.

## Ouvrir TD Talk

Utilisez votre regard pour sélectionner l'application **TD Talk**.



**Remarque :** Si vous éprouvez des difficultés à effectuer des sélections avec votre regard à ce stade, votre assistant peut appuyer sur l'écran pour vous jusqu'à ce que vous accédiez à TD Talk. Le regard est une compétence, alors pratiquez-la dans TD Talk afin de vous familiariser avec.

## Composer et énoncer

Utiliser le regard pour prononcer quelques mots et phrases dans TD Talk.

- Présentez-vous.
- Formulez un commentaire sur la météo.
- Utilisez le clavier numérique pour indiquer votre âge ou votre numéro de téléphone.

# Poursuivre vers les fiches de familiarisation TD Talk

Poursuivez votre parcours d'installation avec les fiches de familiarisation TD Talk fournies avec votre dispositif TD Pilot.

Les tutoriels et les suggestions de dépannage contenus dans les fiches de familiarisation de TD Talk peuvent vous aider à améliorer l'utilisation de la commande oculaire et à utiliser TD Talk pour communiquer plus rapidement et plus efficacement. Vous en saurez également davantage sur l'utilisation d'AssistiveTouch qui vous permet accéder à d'autres applications sur votre iPad en utilisant la commande oculaire.

# Ressources supplémentaires

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.



**Tobii Dynavox**

[fr.tobiidynavox.com](https://fr.tobiidynavox.com)



**Apple**

[apple.com/fr/accessibility](https://apple.com/fr/accessibility)



**myTobiiDynavox**

[mytobiidynavox.com](https://mytobiidynavox.com)



**Centre d'apprentissage  
Tobii Dynavox (en  
anglais uniquement)**

[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)



**Communauté TD**

[qrco.de/TDFB](https://qrco.de/TDFB)



**Page d'assistance de  
TD Pilot**

[qrco.de/PilotHelpFR](https://qrco.de/PilotHelpFR)



**Manuel de l'utilisateur  
de TD Pilot**

[qrco.de/PilotDocs](https://qrco.de/PilotDocs)



**Documentation**

*TD CoPilot > Paramètres  
> Aide*



Contactez votre représentant  
Tobii Dynavox local pour  
obtenir une aide technique.