


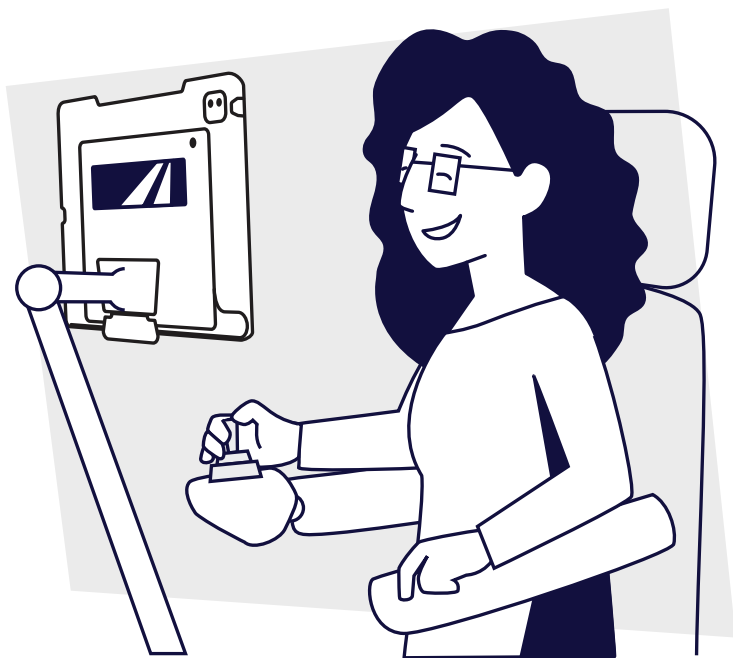


TD Pilot med TD Talk

Kom i gang – veiledning

start her

Hva er i esken?

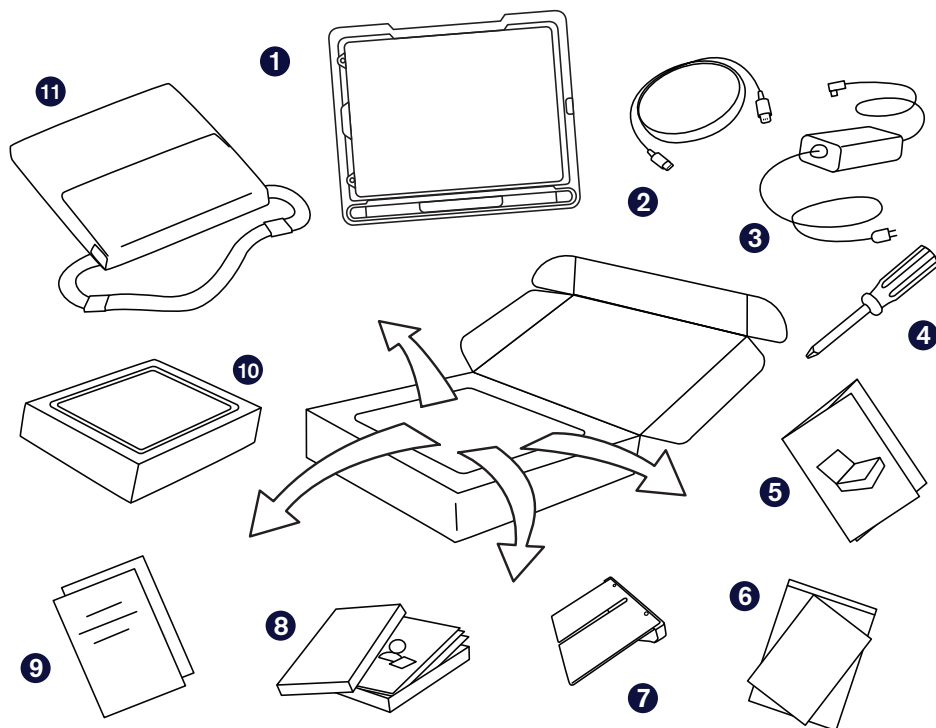

1 Forhåndsmontert enhet

(iPad Pro 12.9, TD Pilot-sokkel, beskyttelsesdeksel, ConnectIT/Rehadapt monteringsplate, tilkoblingskabel USB-C til USB-C, forhåndsinstallert batteri)

2 Tilkoblingskabel Lightning – USB C

3 Lader med kabel

4 Skrutrekker

5 Kom i gang – veiledning

6 Dokument om sikkerhet og samsvar

7 Justerbar brakett

8 Opplæringskort for TD Talk og AssistiveTouch

9 Garantidokumenter

10 iPad-eske (med iPad-lader)

11 Bæreveske

La oss komme i gang

Denne veiledningen er designet for to personer: personen som skal bruke enheten til å kommunisere med og en assistent som kan berøre skjermen og flytte på enheten. Delene med håndikonet må fullføres av assistenten. Delene med øyeikonet bør fullføres av personen som kommer til å bruke enheten med øyestyring. Når dere har fullført trinnene i denne veiledningen, vil brukeren kunne bruke øyestyring til å kommunisere i TD Talk-appen.

Assistent




Bruker



Strøm på



- 1 Koble strømkabelen til ladeporten på siden av TD Pilot-sokkelen, og sett deretter strømkabelen i en stikkontakt.
- 2 Trykk på strømknappen på baksiden av TD Pilot for å slå den på.
- 3 Trykk på strømknappen på iPad-en for å slå den på.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp iPad-en.

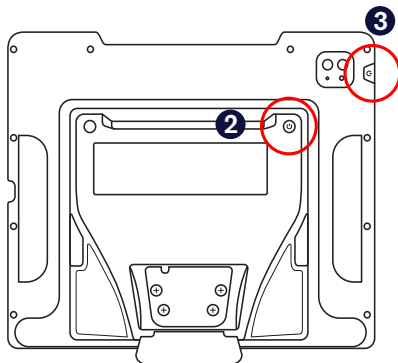

Når du har fullført oppsettet av iPad-en, vil du se hjemskjermen med app-ikoner.

Oppsett av øyestyringstilgang

Konfigurer skjermen for blikknøyaktighet 

- 1 Trykk på **Innstillinger**.



- 2 På venstre side, trykk på kategorien **Hjem-skjerm og dock**.
- 3 På høyre side, velg **Bruk store appsymboler** for å gjøre ikonene større.
- 4 På venstre side, trykk på kategorien **Skjerm og lysstyrke**.
- 5 På høyre side, trykk på **Mørkt**.
- 6 På høyre side, skroll ned og trykk på **Tekststørrelse**.
- 7 Flytt glidebryteren for tekststørrelse helt til høyre.



Merk: Dette gjør teksten større i alle compatible apper.

- 8 Trykk på **Skjerm og lysstyrke** på venstre side for å komme tilbake til innstillingene for skjerm og lysstyrke.
- 9 På høyre side, skroll ned og trykk på **Visning**.



Merk: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på iPad-er som er mindre enn 11 tommer.

- 10 Velg **Zoomet**, og trykk deretter på **Bruk**.
- 11 Trykk på **Bruk zoomet** i popupen. Skjermen vil tilbakestilles i et øyeblikk.
- 12 Velg **Avbryt** for å lukke Bruk zoomet-popupen.
- 13 Du må nå gjøre en full omstart av iPad-en for å ta i bruk zoom-innstillingene. Trykk på **Generelt** til venstre, og skroll deretter ned på høyre side og trykk på **Slå av**. Når iPad-en er slått av, trykk på strømknappen for å slå den på igjen.



Hva har AssistiveTouch med øyestyring å gjøre?

AssistiveTouch er designet for alle personer som har vanskeligheter med å berøre skjermen. AssistiveTouch-menyen gjør at du kan gjennomføre «berøringsfunksjoner», slik som å trykke og skrolle, ved hjelp av øyestyring. Den har også snarveier til ting som hjemskjermen og App Switcher, som man vanligvis finner ved hjelp av berøringsbevegelser, tilgjengelig med øyestyring.

Oppsett av AssistiveTouch



- 1 Trykk på **Innstillinger**.



- 2 På venstre side, trykk på **Tilgjengelighet**.

- 3 På høyre side, trykk på **Berøring**.

- 4 Trykk på **AssistiveTouch**, og slå den på.

- Øyestyring er nå aktivert. Du vil se pekeren som viser plasseringen av blikket ditt. AssistiveTouch-menyknappen vises også på skjermen.



Merk: Hvis du blir bedt om å tilpasse øverste menynivå, trykk Avbryt.

- 5 Dra AssistiveTouch-menyknappen til øverste tredjedel av skjermen på høyre side.

Tilpass AssistiveTouch-menyen



- 1 På høyre side, velg **Tilpass øverste menynivå**.

- 2 Trykk på + for å endre antallet ikoner til 8.

- 3 Trykk på **Varslingssenter**.

- 4 Bla til bunnen av listen, og trykk på **Sett dvel på pause / fortsett dvel**. Trykk utenfor listen for å lukke den.

- 5 Trykk på **Bevegelser**-knappen.


- 6 Bla til og trykk på **Flytt meny**. Trykk hvor som helst utenfor listen for å lukke den.

- 7 Fortsett å redigere menyikonene frem til menyen din er lik som den som vises til høyre.

- 8 På venstre side, velg **Tilgjengelighet**.

- 9 På høyre side, velg **Berøring**.

- 10 På høyre side, velg **AssistiveTouch**.

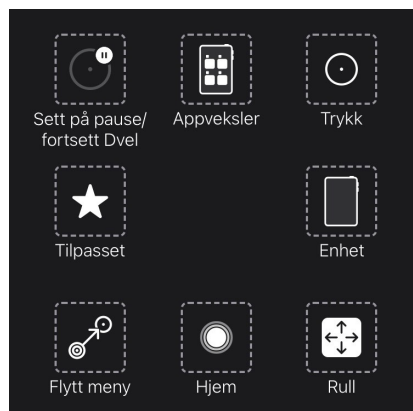

Konfigurer dvelekontroll



- 1 På høyre side, bla til bunnen av AssistiveTouch-menyen. Slå på Dvelekontroll.



Merk: Hvis du bes om å tilpasse øverste menynivå for AssistiveTouch, trykk Nei.

- 2 Trykk på minustegnet (–) ved siden av sekunder for å endre dveletiden til 1,5 sekunder.



Tips: Denne innstillingen for dveletid er for å få deg i gang. Du kan endre dveletiden igjen senere ved behov.


Vekke og låse opp iPad-en



IPad-en vekkes automatisk når øyestyringsenheten oppdager brukerens øyne. Lås opp iPad-en ved å velge AssistiveTouch-knappen, og deretter Hjem.

Prøv det nå:

- 1 Trykk på den øverste knappen for å låse iPad-en.
- 2 Se på skjermen i noen sekunder. IPad-en vekkes og viser låst skjerm.
- 3 Trykk, eller bruk øynene til å velge AssistiveTouch-menyknappen, og velg deretter Hjem.

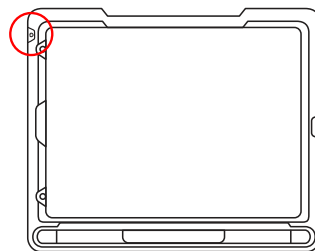

IPad-en er nå låst opp.



Tips: Hvis du er interessert i ekstra sikkerhet på enheten din, anbefaler vi bruk av Face ID. Face ID gjør at du kan låse opp enheten din uten å måtte angi en kode hver gang. Sett opp Face ID i iPad OS-innstillinger > Face ID og kode.

Oppsett av TD Talk

- 1 Trykk på **TD Talk**-appen.



- 2 Sveip opp fra bokstaven T på TD Talk-tastaturet for å åpne menyen utenfor skjermen.

- 3 Trykk på **Mer**-knappen.



- 4 Trykk på **Innstillinger**.



- 5 Angi grensesnittspråket for TD Talk:

- Trykk på **høyre pil** for å navigere til **Generelle innstillinger**.
- I Generelle innstillinger trykker du på **Åpne**.
- Velg språket du ønsker.
- Velg **Tilbake** for å gå tilbake til Innstillinger.



- 6 Velg dine stemmer:

- I stemmepanelet trykker du på **Åpne**.
- Øverst på skjermen velger du språket du ønsker å tildele en stemme til.
- Velg en stemme.
- Velg **X** for å gå ut av TD Talk-innstillinger.



Merk: Stemmene øverst på listen er lastet ned og klare til bruk. Stemmene nederst på listen er tilgjengelige for nedlasting.

Valgfritt: Legg til flere tastaturspråk.


- 1 Gå til **Meny utenfor skjermen > Mer > Innstillinger > Tastatur > Legg til / endre**.
- 2 Velg et språk fra Installert-fanen, eller gå til Last ned-fanen for å finne andre språk.
- 3 Velg **Tilbake** for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.
- 4 Åpne **Stemmeinnstillinger**, velg det nye språket, og velg deretter en stemme for språket.




Tips: Når du bruker TD Talk, kan du raskt bytte språk ved å velge globusen i nedre venstre hjørne av tastaturet.

Stativ og plassering


Forbered brukeren på å begynne å bruke øyestyring ved å plassere dem komfortabelt. Sørg for at de har på seg brillene sine, hvis de bruker briller, og sjekk at glassene er rene.

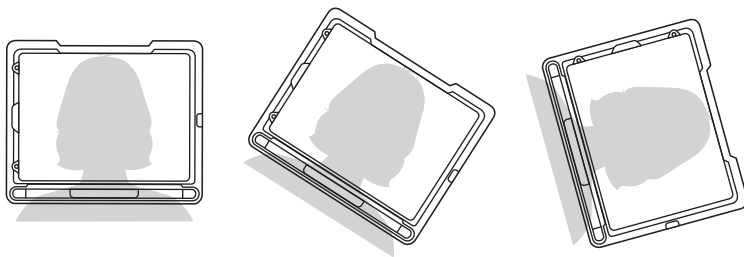

Plasser TD Pilot på monteringsystemet eller en stabil flate foran brukeren, i, eller rett nedenfor brukerens øyehøyde. Hvis hodet deres er lent mot venstre eller høyre, vipp TD Pilot for å matche. Det er viktig at vinkelen på skjermoverflaten stemmer med vinkelen på brukerens ansikt. De fleste brukere må ha TD Pilot plassert høyere enn bordplaten når de sitter ved et bord eller en pult.

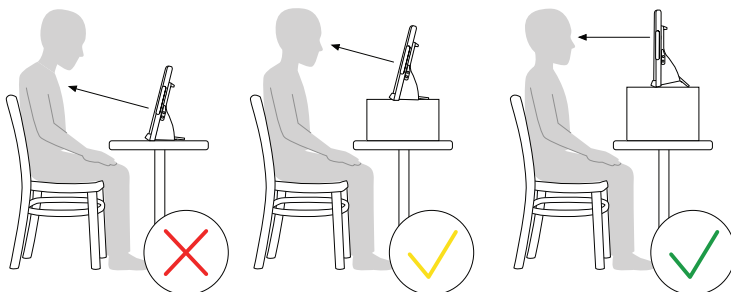

Det er mulig du må justere enhetens posisjon i løpet av kalibreringstrinnene på neste side. Juster alltid enhetens posisjon for å passe til brukeren, ikke motsatt.

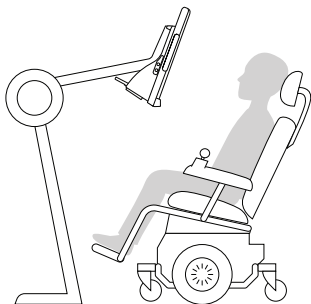


Merk: Et monteringsystem er den beste løsningen for presis posisjonering av enheten, som også er lett å justere i løpet av dagen. Det finnes flere tilgjengelige monteringsalternativer, inkludert gulv-, bord- og rullestolstativer. Gå til [TobiiDynavox.com](https://www.tobii-dynavox.com) eller kontakt din lokale Tobii Dynavox-partner.

Kalibrering

- 1 Trykk på CoPilot-appen.



- 2 Følg instruksjonene på skjermen i CoPilot for å kalibrere øyestyringsenheten til brukerens øyne.

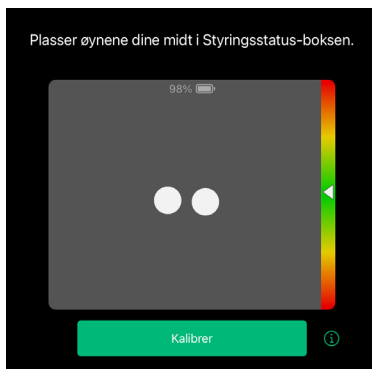

- 3 Når brukeren er ferdig med å kalibrere, sveip opp fra bunnen av skjermen for å komme tilbake til hjemskjermen.



De gjenværende trinnene bør gjennomføres av brukeren av TD Pilot-enheten ved hjelp av øyestyring. Du, som assistent, kan lese instruksjonene høyt. Les i en hastighet som gir brukeren tilstrekkelig tid til å gjøre valgene med øynene sine.

Prøv den

TD Pilot er nå klar til bruk! Bruk øynene dine til å fullføre opplæringen nedenfor.

Åpne TD Talk.

Bruk øynene dine til å velge TD Talk-appen.



Merk: Hvis du har problemer med å velge med øynene nå, kan assistenten din trykke på skjermen for deg frem til du kommer deg inn i TD Talk. Øyestyring er en ferdighet, så øv deg i TD Talk for å bli kjent med den.

Skriv og snakk

Bruk øyestyring til å si noen ord og fraser i TD Talk.

- Presenter deg selv.
- Kommenter noe om været.
- Bruk tastaturet til å si alderen din eller telefonnummeret ditt.

Fortsett til opplæringskortene for TD Talk

Fortsett oppsettsreisen med opplæringskortene for TD Talk, som kom i esken sammen med TD Pilot.

Opplæringene og feilsøkingforslagene i opplæringskortene kan hjelpe deg med å forbedre øyestydingsopplevelsen, og til å bruke TD Talk til å kommunisere raskere og mer effektivt. Du vil også lære mer om å bruke AssistiveTouch for å få tilgang til andre apper på iPad-en din ved hjelp av øyestyring.

Flere ressurser

Skann QR-kodene eller bruk lenkene.



Tobii Dynavox

tobiidynavox.no



Apple

apple.com/no/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



TD Community

qrco.de/fbnnbno



**Bruerveiledning
for TD Pilot**

qrco.de/PilotDocs



**Støttesiden
for TD Pilot**

qrco.de/PilotHelpNO



Dokumentasjon

*TD CoPilot >
Innstillinger > Hjelp*



Teknisk støtte for Norge

55 55 10 60