

Communicator 5 Utilisateur utilisant
la communication textuelle

Fiches de familiarisation

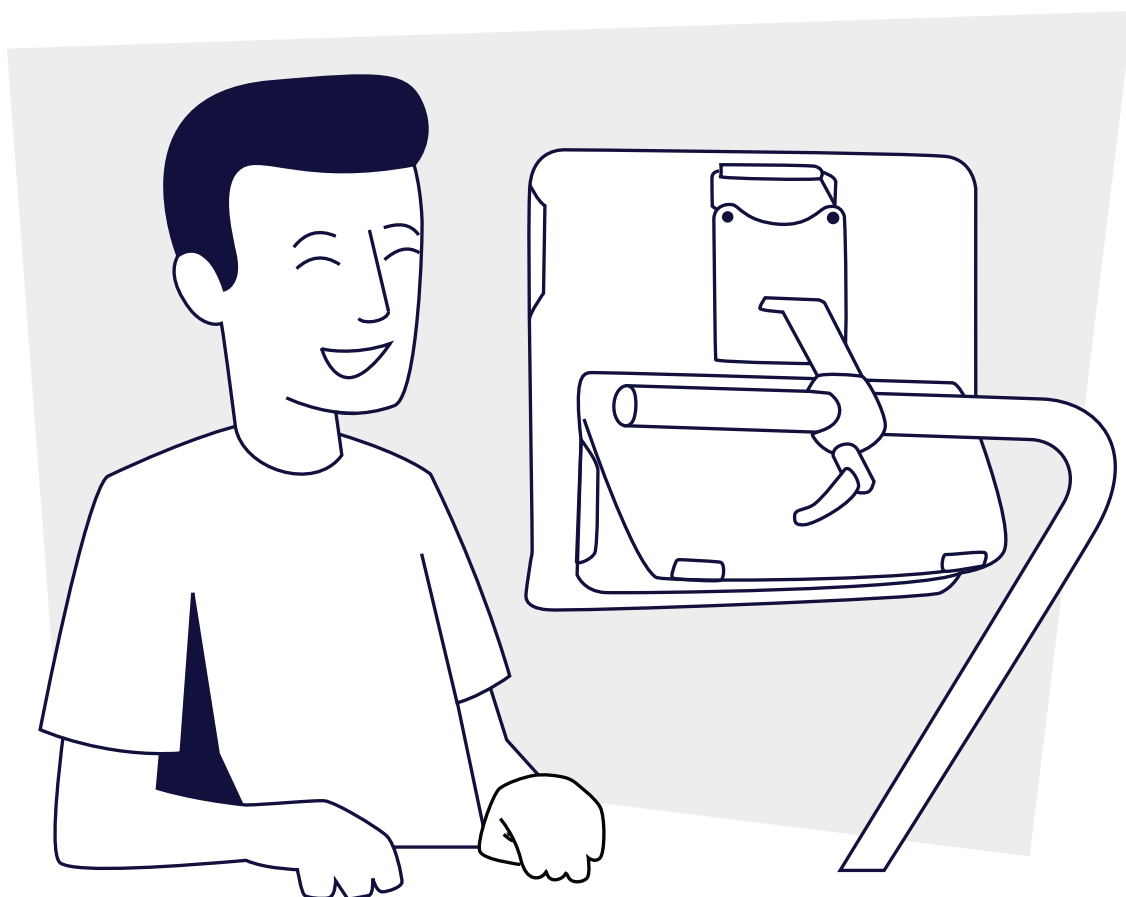


Table des matières

1	Présentation rapide de Communicator 5 : Page d'accueil
3	Présentation rapide de Communicator 5 : Menu rapide
4	Éditer votre page d'accueil
4	Moyen de saisie
5	Énoncer
6	Modifier les dispositions du clavier
7	Mes phrases
8	Messagerie électronique
9	Télécommande IR
10	Calendrier
10	Mes fichiers de texte
11	Appareil photo et Mes images
12	Sauvegarder et exporter les profils
13	Message Banking
13	Options de Computer Access
14	myTobiiDynavox.com
14	Ressources supplémentaires

Présentation rapide de Communicator 5 : Page d'accueil

La page d'accueil comporte des liens vers des ensembles de pages, des outils, d'autres applications et bien plus encore. La page d'accueil affichée concerne les dispositifs TD I-Series. Les options concernant d'autres configurations matérielles de la page d'accueil peuvent différer.



1 Énonciation

Composez et énoncez des messages à l'aide d'un clavier à l'écran ainsi que de la prédiction de mots et expressions et de vos propres expressions pré-écrites personnalisées.

2 Mes expressions

Ajoutez, modifiez, classez et supprimez vos expressions récemment énoncées et personnalisées. Pour lancer l'énonciation de vos expressions, sélectionnez Énoncer, puis Expressions.

3 Messagerie électronique

Envoyez et recevez des e-mails. Cette fonctionnalité nécessite une connexion internet.

4 Tous les ensembles de pages

Sélectionnez un autre ensemble de pages ou ajoutez une application ou un fichier à votre page d'accueil.

5 Éditer la page d'accueil

Personnalisez votre page d'accueil : ajoutez et supprimez des boutons, réorganisez-les, modifiez la taille de la grille, la couleur du fond, etc.

6 Quitter Communicator

Quittez l'application Communicator, mettez votre dispositif en veille ou redémarrez votre dispositif.

7 Paramètres (accessibles)

Modifiez les paramètres de l'appareil et de l'application Communicator 5 tels que la luminosité de l'écran, le volume, le moyen de saisie, la voix, etc.

8 Message texte*

Connectez un téléphone mobile via Bluetooth pour envoyer et recevoir des messages texte par SMS.

9 Mes images

Prenez des photos à l'aide de l'appareil photo de votre dispositif, puis affichez et classez-les.

10 Mes contacts

Affichez et gérez les renseignements personnels, tels que le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et la photo de profil, des personnes que vous connaissez.

*Uniquement disponible sur les appareils I-Series et Windows 10 équipés de la fonction Bluetooth
Incompatible avec certains modèles de téléphones mobiles.

11 Mes fichiers texte

Créez, gérez et énoncez des fichiers texte. Les fichiers texte sont utiles pour les compositions plus longues telles que les présentations, les discours, les lettres, etc.

12 Agenda

Effectuez le suivi de votre emploi du temps avec des notifications de rendez-vous et facultatives.

13 Appareil photo

Prenez des photos à l'aide de l'appareil photo de votre dispositif.

14 Calculatrice

Une calculatrice de base pour couvrir vos besoins en matière de calcul.

15 Alarme

Déclenchez immédiatement une sonnerie d'alarme.

16 Mise en pause

Mettez la commande oculaire en pause

17 Télécommande radio

Programmez et envoyez des commandes IR vers des équipements radio compatibles.

18 Télécommande de poste de télévision

Programmez et envoyez des commandes IR vers un poste de télévision compatible.

19 TD Control

Lancez TD Control aux fins d'accès informatique. Consultez la section Options d'accès informatique pour plus d'informations.

20 TD Talk

TD Talk est une application de synthèse vocale basée sur du texte pour les utilisateurs utilisant les moyens d'accès Tactile et Commande oculaire. Pour en savoir plus, visitez tobiidynavox.com/products/td-talk.

21 TD Browse

TD Browse est une application personnalisée permettant de naviguer sur le Web à l'aide du regard uniquement. Faites défiler, naviguez et cliquez de manière intuitive et sélectionnez des cibles de grande et de petite taille à l'aide de liens colorés. Pour en savoir plus, visitez tobiidynavox.com/products/td-browse.

22 TD Phone

Envoyez des SMS ou appelez n'importe qui, n'importe où, à l'aide de TD Phone, de votre téléphone mobile connecté par Bluetooth et de votre dispositif TD I-Series. Des fenêtres contextuelles de message accessibles vous informent lorsque vous recevez un appel ou un SMS entrant. Pour en savoir plus, visitez tobiidynavox.com/products/td-phone.



Présentation rapide de Communicator 5 : Menu rapide

Le menu rapide contient des outils pour modifier et créer des ensembles de pages ainsi que des paramètres avancés et des options d'affichage. Le menu rapide menu est accessible par le moyen d'accès tactile ou avec la souris uniquement.



Comment puis-je accéder au Menu rapide ?

Appuyez
longuement sur
l'écran

OU

Effectuez un
clic droit



❶ Page d'accueil

Accéder à la page d'accueil.

❷ Éditer la page d'accueil

Ajoutez, supprimez et repositionnez les ensembles de pages sur la page d'accueil. Vous pouvez également personnaliser la taille de la grille et le fond d'écran.

❸ Créer un nouvel ensemble de pages

Créez votre propre ensemble de pages selon une taille de grille de votre choix ou à main levée.

❹ Tous les ensembles de pages

Parcourez tous vos ensembles de pages.

❺ Éditer l'ensemble de pages

Modifiez votre ensemble de pages en cours.

❻ Éditer les boutons

Une fois sélectionnés, tous les boutons pouvant être édités de la page en cours sont mis en surbrillance. Sélectionnez un bouton pouvant être édité pour le modifier.

❼ Aide et formation

Ouvrez l'ensemble de pages Aide et formation.

❽ Basculement entre le mode fenêtre et le mode plein écran

Sélectionnez ce bouton pour basculer entre l'affichage sous forme de fenêtres et l'affichage plein écran.

❾ Paramètres avancés

Accédez aux paramètres de saisie, de claviers et de langue, audio, d'applications, de configuration utilisateur et de système.

❿ Retour

Revenez en arrière dans l'historique de vos pages.

⓫ Quitter

Quittez Communicator 5.

⓬ 13 Ensembles de pages récents

Il s'agit des deux derniers ensembles de pages ouverts. Sélectionnez cette option pour atteindre l'un de ces ensembles de pages.

Éditer votre page d'accueil

Les éléments disponibles sur la page d'accueil ne sont que des suggestions. Vous pouvez supprimer, ajouter et réorganiser les éléments présents sur votre page d'accueil en fonction de vos besoins.

Supprimer un ensemble de pages de votre page d'accueil :

- 1 Sélectionnez **Éditer la page d'accueil**.



- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**.
- 4 Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, **Supprimer** pour confirmer.

Ajoutez un ensemble de pages à la page d'accueil :

- 1 Sélectionnez **Tous les ensembles de pages**.



- 2 Sélectionnez **Communication textuelle**.
- 3 Sélectionnez l'élément souhaité.
- 4 Sélectionnez **Ajouter à la page d'accueil**.



Conseil

Activez la barre d'état sur votre page d'accueil afin d'être en mesure de surveiller rapidement le statut du suivi de votre regard, l'usage de la batterie de votre dispositif et le statut de votre connexion Wi-Fi.



Remarque

Ces étapes ne sont accessibles qu'avec le moyen tactile ou une souris.

- 1 Ouvrez le menu rapide.
- 2 Sélectionnez **Paramètres avancés**.
- 3 Sélectionnez **Système**.
- 4 Sélectionnez **Activer la barre de statut**.

Moyen de saisie

Le moyen de saisie est la façon dont vous naviguez et effectuez des sélections sur le dispositif.

Configurez votre moyen de saisie :

- 1 Ouvrez le **Menu rapide**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres avancés**.
- 3 Sélectionnez un **moyen de saisie**.
- 4 Sélectionnez un moyen de saisie.
- 5 Sélectionnez le bouton **Paramètres** du moyen de saisie choisi pour afficher et modifier les paramètres.



Scannez ce code ou visitez qrco.de/bbFrbd pour visionner une vidéo concernant les méthodes de saisie sur les dispositifs de CAA de pointe.

Énoncer



L'ensemble de pages Énonciation contient le clavier que vous utiliserez pour la composition et l'énonciation des messages. Exercez-vous à l'utiliser pour améliorer votre facilité et votre rapidité à communiquer.

Étapes de la pratique

- 1 Entraînez-vous à composer des messages en utilisant des mots, des signes de ponctuation et des chiffres, puis énoncez ces mêmes messages. Essayez ces invites ou explorez par vous-même.

- Nommez et décrivez votre meilleur ami.
- Présentez-vous. « Je m'appelle _____. J'ai ____ ans et mon livre préféré est _____.»
- Citez vos trois films préférés.

- 2 La prédiction de mots et d'expressions vous permet de communiquer beaucoup plus rapidement. Commencez à taper les réponses aux invites ci-dessous et essayez d'utiliser les boutons de prédiction de mots et d'expressions pour compléter vos messages.

- Quels pays aimeriez-vous visiter ?
- Tapez des questions commençant par qui, quoi, quand, où et pourquoi, par exemple « Où allons-nous ? » « Que mangeons-nous pour dîner ? »


- 3 Utilisation de votre dispositif dans la vie réelle. Exercez-vous en utilisant le clavier et les boutons de prédiction dans les situations suivantes :

- Racontez ce que vous avez fait la nuit dernière ou pendant le week-end.
- Parler d'une actualité récente.



Conseil

Plus vous tapez un mot, plus il est probable que celui-ci apparaisse dans la prédiction de mots.

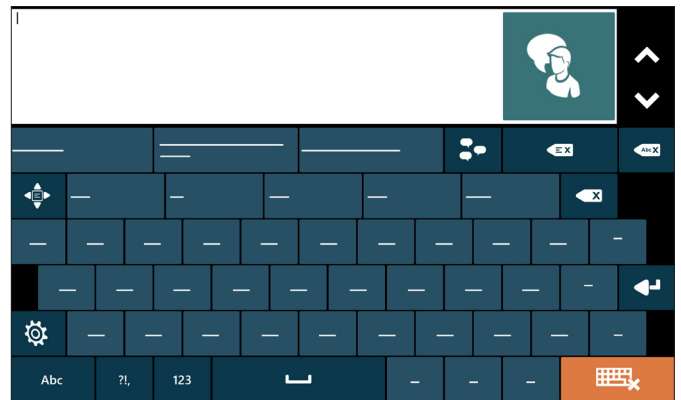

Modifier les dispositions du clavier



Si la disposition du clavier par défaut ne répond apparemment pas à vos besoins, d'autres choix sont disponibles ! Dans Communicator 5, vous pouvez choisir parmi plusieurs dispositions de clavier.

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.



- 2 Sélectionnez **Paramètres du clavier**.

	Standard (par défaut)	Grille	Gros boutons
Organisation (décrite ci-dessous)	QWERTY/AZERTY, ABC, SCAN, Pointeur	ABC, SCAN, Pointeur	ABC, SCAN, Pointeur
Prédiction	Prédiction des mots et expressions	Aucun	Prédiction de mots
Taille du bouton	Petit	Moyenne	Grand
Guide doigts	Non	Oui	Oui
Extras	Grande fenêtre de message permettant la création de messages et de texte contenant plusieurs lignes.	Convient pour la commande oculaire. Grande zone cible.	Pour les utilisateurs qui ont besoin de boutons de plus grande taille.

- 3 Sélectionner la disposition du clavier préférée : Le tableau ci-dessus décrit les caractéristiques des trois configurations de clavier les plus courantes. Pour prévisualiser la disposition du clavier, sélectionnez **Afficher**.

- 4 Si vous souhaitez modifier la disposition du type de clavier que vous avez choisi, sélectionnez QWERTY/AZERTY/ABC. Sélectionnez l'un de choix de disposition du clavier.

- AZERTY est la disposition de nombreux claviers physiques.
- ABC est une disposition par ordre alphabétique.
- La fonction Défilement est conçue pour les personnes utilisant un contacteur en tant que moyen de saisie.
- Pointeur est optimisé pour les personnes utilisant un dispositif de pointage en tant que moyen de saisie.



QWERTY
/ ABC

Mes phrases



Le contenu de la page Mes expressions est constitué de votre historique de messages et de vos propres expressions personnalisées. Disposer d'expressions pré-écrites vous permet de communiquer rapidement sans avoir à saisir des messages en entier.

- 1 Pensez à des catégories (situations) et expressions fréquemment utilisées auxquelles vous souhaitez accéder rapidement. Il s'agit par exemple de situations comme les rendez-vous, les sorties au restaurant ou les rencontres entre amis etc.

Ajouter une nouvelle catégorie :

- Sélectionnez **Ajouter une nouvelle catégorie**.
- Saisissez le nom de la catégorie.
- Sélectionner **Confirmer**.

Ajouter une nouvelle phrase :

- Choisissez la **catégorie** de la nouvelle expression.
- Sélectionnez **Ajouter une nouvelle expression**.
- Saisissez votre expression.
- Sélectionner **Confirmer**.

- 2 Après avoir ajouté vos expressions, sélectionnez chacune d'entre elles afin de vous familiariser avec son contenu et son emplacement. Ajustez les expressions ou les Catégories en fonction de vos besoins.
- 3 Pratiquez l'utilisation des expressions que vous avez ajoutées et continuez à en ajouter en fonction de vos besoins.



Conseil

Si vous ne voyez pas plusieurs catégories d'expressions, il vous faudra peut-être en importer. Pour importer des expressions, allez à *Menu rapide > Paramètres avancés > Claviers et langues > Expressions > Importer* et suivez les invites qui apparaissent à l'écran.

Messagerie électronique



La page Messagerie électronique vous permet d'envoyer, de recevoir, et de gérer facilement et efficacement les messages électroniques. Pour configurer votre messagerie électronique, vous avez besoin d'une personne qui est en mesure de toucher l'écran.



Remarque

Vous avez besoin d'une connexion Internet active pour configurer, envoyer et recevoir des e-mails.

Configurez votre e-mail

(vous ne devrez effectuer ces étapes qu'une seule fois.)

- ❶ Ouvrez le **Menu rapide**.
- ❷ Sélectionnez **Paramètres avancés**.
- ❸ Sélectionnez **Applications**.
- ❹ Sélectionnez **E-Mail**.
- ❺ Sélectionnez **Nouveau**.
- ❻ Sélectionnez votre fournisseur de messagerie électronique. Si votre fournisseur n'est pas répertorié, choisissez **Configurer manuellement**. Vous devrez peut-être contacter votre fournisseur de messagerie électronique pour obtenir des informations adéquates sur le serveur.
- ❼ Sélectionnez **Suivant**.
- ❽ Sélectionnez **Terminé**.

Accéder à votre messagerie électronique

- ❶ Sur la page d'accueil, sélectionnez **Messagerie électronique**.
- ❷ Tous vos e-mails sont affichés sur le côté gauche de la page Messagerie électronique.
 - Sélectionnez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer.
 - Pour accéder à un autre dossier de messagerie, utilisez **Sélectionner le dossier** dans le coin supérieur gauche de la page.

Télécommande IR




Les fonctions de la télécommande infrarouge vous permettent de faire fonctionner des appareils de divertissement comme des postes de télévision, des lecteurs DVD ou la radio. Vous pouvez également contrôler des dispositifs présents dans votre environnement, comme par exemple l'éclairage, les portes et les lits à des fins de réglage avec des équipements supplémentaires. Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les appareils de communication dotés d'équipement IR tels que le Tobii Dynavox I-Series.

Avant d'utiliser votre télécommande IR, vous devez programmer chaque commande. Par exemple, vous avez besoin des boutons Marche/Arrêt, Vol. + et Vol. -, P+ et P- etc. pour la télévision.

Votre page d'accueil contient des pages de télécommandes complètes pour les postes de télévision, les lecteurs DVD, les chaînes stéréo et la radio. Il existe des pages de télécommandes simplifiées que vous pouvez ajouter à la page d'accueil si vous ne souhaitez pas disposer de toutes les fonctions.

- 1 Obtenez la télécommande de l'appareil que vous souhaitez programmer.
- 2 Allez à votre page Télécommande et sélectionnez le bouton dont vous souhaitez programmer la fonction. Une fenêtre contextuelle apparaît et vous indique qu'aucune commande n'a été programmée.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour programmer une nouvelle commande.
- 4 Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge situé à l'arrière du dispositif de communication.
- 5 Suivez les Invites qui s'affichent à l'écran
- 6 Le bouton change de couleur s'il a été correctement programmé. Votre appareil peut désormais fonctionner comme une télécommande pour envoyer la commande que vous avez programmée sur le bouton concerné. Assurez-vous que le dispositif que vous commandez (poste de télévision, lecteur DVD, etc.) est à portée de réception du signal IR et que l'émetteur-récepteur IR situé à l'arrière de votre dispositif de communication est orienté vers ce même dispositif.
- 7 Testez le bouton avant de programmer le bouton suivant.

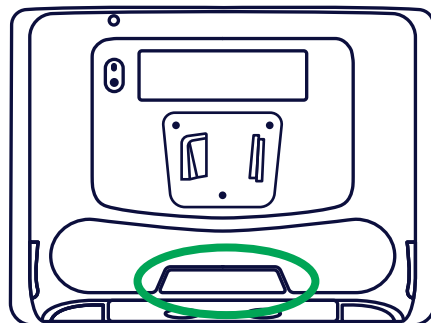

Conseil

Vous pouvez également utiliser votre dispositif avec des assistants intelligents tels que Alexa et Google Home.

Calendrier



Le calendrier vous permettra de définir des rendez-vous et des rappels.

Pour ajouter un rendez-vous :

- 1 Sélectionnez **Calendrier** sur la page d'accueil.
- 2 Sélectionner la date de votre rendez-vous.
- 3 Sélectionnez **Nouveau**.
- 4 Saisissez le nom de votre rendez-vous.
- 5 Sélectionnez l'heure de début et de fin.
- 6 Cochez la case si vous souhaitez recevoir un rappel à l'heure de votre rendez-vous.



Mes fichiers de texte



Mes fichiers texte vous permet d'enregistrer des fichiers texte plus longs, tels que des récits, des discours ou des présentations. L'enregistrement et l'organisation de vos fichiers à cet emplacement vous permet d'y accéder facilement et de décider du début et de la fin de l'énonciation.

Créez un nouveau fichier de texte :

- 1 Sélectionnez **Nouveau**.
- 2 Tapez le contenu de votre fichier.
- 3 Lorsque vous avez terminé de composer votre message, sélectionnez **Terminé**.
- 4 Le fichier est automatiquement nommé par la première phrase du document.
 - Pour modifier ceci, sélectionnez l'**icône du clavier** située à côté du nom du fichier.
 - Sélectionner **Effacer**.
 - Tapez le nouveau nom du fichier.
 - Sélectionnez **Enregistrer**.

Éditer un fichier texte

- 1 Sélectionnez le nom du fichier dans la colonne de gauche.
- 2 Sélectionnez **Édition**.
- 3 Modifiez votre document.
- 3 Sélectionnez **Confirmer**.
- 3 Sélectionner **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

Énoncer un fichier texte :

- 1 Sélectionnez le nom du fichier dans la colonne de gauche.
- 2 Sélectionnez **Énoncer le texte**.
- 3 Pour arrêter l'énonciation, sélectionnez **Arrêter l'énonciation**.

Appareil photo et Mes images



Photographiez, enregistrez et disposez vos images en utilisant l'appareil photo et Mes images.

Les photos prises avec l'appareil photo sont automatiquement enregistrées dans le dossier Images du dispositif et apparaissent automatiquement dans Mes images.

Mes images accède au dossier des images sur votre dispositif.

Vous pouvez les filtrer par :

- Toutes les images
- Ajoutée récemment
- Date
- Caméra
- Dossier

Sélectionnez Afficher pour effectuer les opérations suivantes :

- Faire pivoter l'image vers la gauche ou la droite
- Ajouter une description
- Imprimer
- Supprimer

Le diaporama présente les images dans l'ordre et les fait défiler automatiquement. Vous pouvez sélectionner une cadence de défilement des images lente, moyenne ou rapide ou les faire défiler manuellement.

Sauvegarder et exporter les profils

Il est très important de sauvegarder vos ensembles de pages personnalisés ainsi que les données de l'utilisateur. Si vous devez retourner votre appareil à des fins de réparation ou acheter un nouvel appareil, vous utiliserez vos fichiers de sauvegarde pour restaurer vos données. Ce menu est accessible par le biais de l'écran tactile ou de la souris uniquement.

- 1 Ouvrez le **Menu rapide**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres avancés**.



- 3 Sélectionnez **Configuration utilisateur**.
- 4 Sélectionnez **Importer/Exporter**.
- 5 Sélectionnez **Exporter les paramètres et les données sélectionnés**.
- 6 Sélectionnez **Suivant**.
- 7 Sélectionnez **Exportation complète** (ce paramètre permet de collecter tous les ensembles de pages de l'utilisateur, ainsi que ses paramètres, sons et expressions enregistrés, contacts, dictionnaires et paramètres grammaticaux).
- 8 Sélectionnez **Suivant**.
- 9 Nommez l'archive—Nous vous recommandons d'utiliser le nom d'utilisateur et la date.
- 10 Choisissez l'emplacement où la sauvegarde doit être enregistrée—Nous vous recommandons de l'enregistrer sur un périphérique USB.



Conseil

Si vous souhaitez renforcer la sécurité, téléchargez vos fichiers de sauvegarde sur myTobiiDynavox.com. Connectez-vous tout simplement avec votre compte Tobii Dynavox, sélectionnez **Communicator** dans la section Mes trucs, onglet **Sauvegardes**, **Télécharger la sauvegarde**.

Message Banking

Message banking vous permet de préserver votre propre voix naturelle grâce à des messages enregistrés. Ces messages peuvent être utilisés ultérieurement dans un logiciel de communication tel que Communicator 5.

Message Bank de Tobii Dynavox vous permet de collecter, d'organiser et de stocker gratuitement des messages enregistrés jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Les messages peuvent être téléchargés et utilisés sur n'importe quel système en mesure de les lire.



Conseil

Il est important de démarrer le processus dès que possible afin que la qualité et la clarté de votre voix puissent être enregistrées.



Pour en savoir plus sur Message Banking scannez le code ou visitez la page myMessageBanking.com.

Options de Computer Access

Les utilisateurs de la commande oculaire peuvent naviguer en dehors de l'application Communicator 5 vers le bureau Windows et d'autres applications à l'aide des outils suivants.



TD Control

TD Control est notre choix le plus rapide et le plus puissant d'accès à l'informatique par la commande oculaire. Vos choix de moyens d'interaction (clic gauche, clic droit, double-clic, cliquer- faire glisser, clavier, etc.) apparaissent autour de l'élément que vous avez sélectionné à l'aide de votre regard. Lancez TD Control à partir de la page d'accueil de Communicator 5 pour commencer.



Pour en savoir plus sur TD Control, scannez le code ou visitez la page qrco.de/TDCmanual.



Windows Access pour Communicator 5

Avec Windows Access pour Communicator 5, vos choix de moyens d'interaction apparaissent dans une barre d'outils toujours active. Pour l'essayer, allez à *Tous les ensembles de pages > Communication textuelle > Windows Access*. Sélectionnez **Windows Access**, puis **Ajouter à la page d'accueil**.



Pour en savoir plus sur Windows Access pour Communicator 5, scannez le code ou visitez la page qrco.de/be8LSm.



Votre compte myTobiiDynavox.com gratuit vous donne accès à de nombreux avantages, notamment un espace de stockage sur le cloud à des fins de sauvegarde, le partage des ensembles de pages, des plans de cours et autres !

- Sauvegarder votre système en toute sécurité
- Télécharger gratuitement des outils et de la documentation
- Connaître les mises à jour disponibles
- Accéder au service d'assistance technique et aux FAQ
- Partager des ensembles de pages



myTobiiDynavox
myTobiiDynavox.com

Ressources supplémentaires



Guide de démarrage de Communicator 5

qrco.de/bbFrc5



Aide et formation

qrco.de/beBfJj



Communauté TD Facebook

qrco.de/TDFB



Fiches de familiarisation au logiciel

qrco.de/trainingcards



Assistance technique

Europe: Pour toute demande d'assistance, veuillez contacter votre revendeur.

Amérique du Nord: 1-800-344-1778 ext. 1