


Utbildningskort

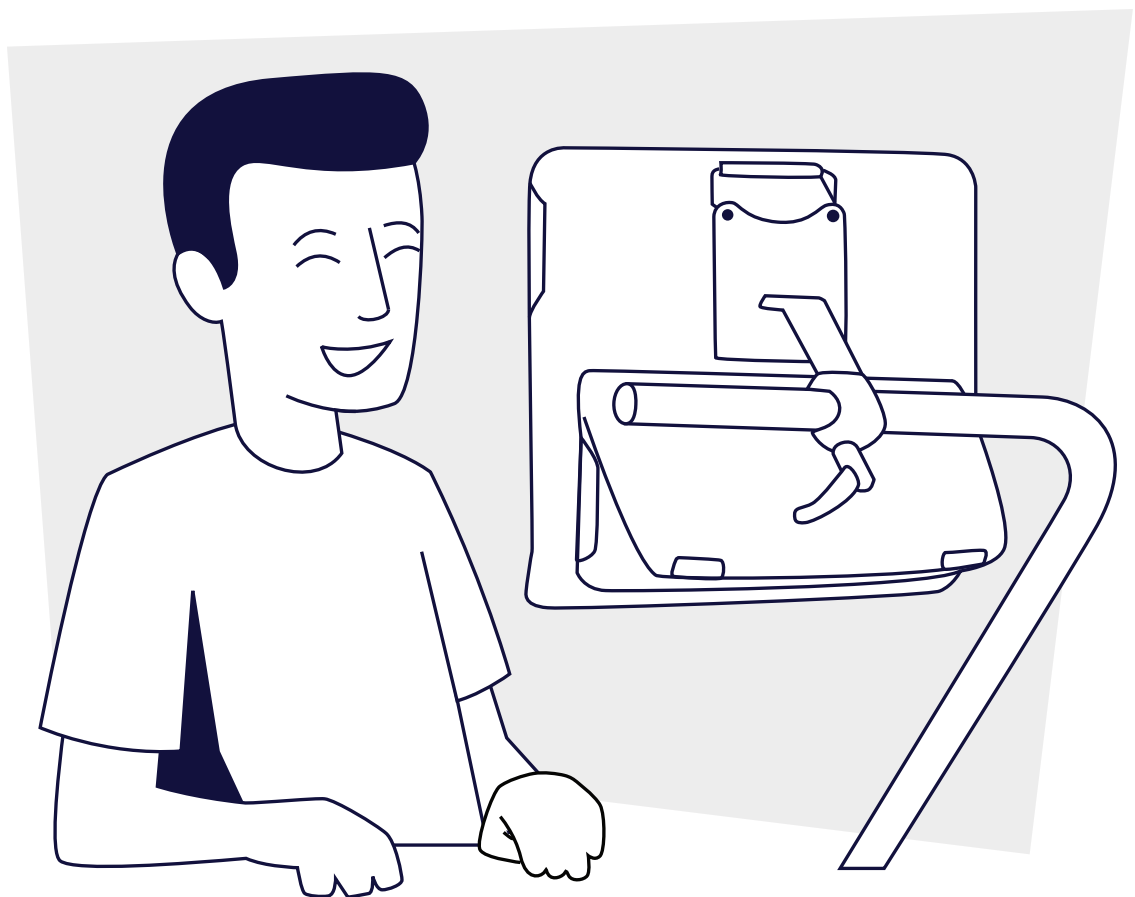

Innehåll

1	Genomgång av Communicator 5: Startside
3	Genomgång av Communicator 5: Snabbmeny
4	Redigera din startside
4	Manövermetod
5	Läs upp
6	Ändra layouter på tangentbord
7	Mina fraser
8	E-post
9	IR-fjärrkontroll
10	Kalender
10	Mina textfiler
11	Kamera och Mina bilder
12	Säkerhetskopiering och exportera profiler
13	Message Banking
13	Alternativ för datoråtkomst
14	myTobiiDynavox.com
14	Ytterligare resurser

Genomgång av Communicator 5: Startside

Startsidan länkar till paneler, verktyg, andra appar med mera. Startsidan som visas är för TD I-Seriesenheter. Startsidan på andra enheter kan se annorlunda ut.



1 Tala

Komponera och tala meddelanden med hjälp av ett skärmtangentbord med ord- och frasprediktion och dina egna anpassade fraser.

2 Mina fraser

Lägg till, redigera, organisera och ta bort dina nyligen talade och anpassade fraser. För att välja dina fraser, välj Tala och sedan Fraser.

3 E-post

Skicka och ta emot e-postmeddelanden. Den här funktionen kräver en internetanslutning.

4 Alla paneler

Välj en annan panel eller lägg till en app eller fil på din startside.

5 Redigera startside

Anpassa din startside – lägg till och ta bort paneler, flytta om dem, ändra rutnätets storlek, bakgrundsfärg med mera.

6 Avsluta Communicator

Avsluta Communicator-appen, försätt enheten i viloläge eller starta om enheten.

7 Inställningar (tillgängliga)

Ändra enhetens och Communicator 5-appens inställningar som skärmens ljusstyrka, volym, manövermetod, röst med mera.

8 Textmeddelanden*

Anslut en mobiltelefon via Bluetooth för att skicka och ta emot SMS-meddelanden.

9 Mina bilder

Ta foton med enhetens kamera och visa och organisera dina foton.

10 Mina kontakter

Visa och hantera information för personer du känner, som namn, e-postadress, telefonnummer och profilfoto.

*Endast tillgängligt på I-Series- och Windows 10-enheter med Bluetooth.
Ej kompatibelt med alla mobiltelefonmodeller.

11 Mina textfiler

Skapa, hantera och tala textfiler. Textfiler är användbara för längre kompositioner som presentationer, tal, brev etc.

12 Kalender

Håll koll på ditt schema med möten och valfria aviseringar.

13 Kamera

Ta foton med kameran på din enhet.

14 Räknare

En enkel miniräknare för dina sifferbehov.

15 Larm

Startar omedelbart en larmton.

16 Vila

Pausar ögonstyrning.

17 Radiofjärrkontroll

Programmera och skicka IR-kommandon till en kompatibel radio.

18 TV-fjärrkontroll

Programmera och skicka IR-kommandon till en kompatibel TV.

19 TD Control

Starta TD Control för datoråtkomst. Se avsnittet Alternativ för datoråtkomst för mer information.

20 TD Talk

TD Talk är en textbaserad app som genererar tal för pek- och ögonstyrningsanvändare. För mer information, besök se.tobiidynavox.com/products/td-talk.

21 TD Browse

TD Browse är en specialbyggd app för att surfa på webben med bara dina ögon. Bläddra, surfa och klicka på ett intuitivt sätt och välj stora och små mål med hjälp av färglänkar. För mer information, besök se.tobiidynavox.com/products/td-browse.

22 TD Phone

Sms:a eller ring vem som helst, var som helst med hjälp av TD Phone och din Bluetooth-anslutna mobiltelefon och TD I-Series-enhet. Tillgängliga pop up-meddelanden låter dig veta när du har ett inkommande samtal eller sms. För mer information, besök se.tobiidynavox.com/products/td-phone.



Genomgång av Communicator 5: Snabbmeny

Snabbmenyn innehåller verktyg för att redigera och skapa paneler samt avancerade inställningar och visningsalternativ. Snabbmenyn är endast åtkomlig genom att röra skärmen eller med en mus.



Hur får jag åtkomst till snabbmenyn?

Peka och håll
på skärmen

ELLER

Högerklicka



1 Startside

Gå till startsidan.

2 Redigera startside

Lägg till, ta bort och flytta panelerna på startsidan. Du kan också anpassa rutnätsstorlek och bakgrund.

3 Skapa ny panel

Designa din egen panel baserat på en rutnätsstorlek som du väljer eller på en frihandssida.

4 Alla paneler

Bläddra igenom alla dina paneler.

5 Redigera panel

Modifiera din aktuella panel.

6 Redigera knapp

När denna är vald är alla redigerbara knappar på den aktuella sidan markerade. Markera en redigerbar knapp för att redigera den.

7 Hjälp och övningar

Öppna panelen Hjälp och övningar.

8 Växla mellan fönsterläge/helskrämsläge

Välj den här knappen för att växla mellan fönstervisning och helskrämsvisning.

9 Avancerade inställningar

Få åtkomst till inställningar för manöver, tangentbord och språk, ljud, applikationer, användarinställningar och system.

10 Tillbaka

Gå tillbaka genom din sidhistorik.

11 Avsluta

Avsluta Communicator 5.

12 13 Senaste paneler

Det här är de två senaste panelerna som öppnades. Välj för att gå till den panelen.

Redigera din startsida

Panelerna på startsidan är endast förslag. Du kan ta bort, lägga till och ordna om panelerna på din startsida för att passa dina behov.

Ta bort en panel från din startsida:

- 1 Tryck på **Redigera startsida**.



- 2 Markera panelen som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Ta bort**.
- 4 I popup-fönstret välj **Ta bort** för att bekräfta.

Lägg till en ny panel på startsidan:

- 1 Tryck på **Alla paneler**.



- 2 Välj **Textkommunikation**.
- 3 Välj önskad panel.
- 4 Välj **Lägg till på startsidan**.



Tips

Aktivera statusfältet på din hemsida för att snabbt kunna övervaka status för spårning av ögonstyrning, enhetens batteriförbrukning och status för Wi-Fi-anslutning.



OBS!

Dessa steg är endast åtkomliga genom att trycka på skärmen eller högerklicka med en mus.

- 1 Öppna snabbmenyn.
- 2 Välj **Avancerade inställningar**.
- 3 Välj **System**.
- 4 Välj **Aktivera statusfält**.

Manövermetod

Manövermetoden är hur du navigerar och gör val på enheten.

Konfigurera manövermetod:

- 1 Öppna **Snabbmenyn**.
- 2 Välj **Avancerade inställningar**.
- 3 Välj **Manövermetod**.
- 4 Välj en manövermetod.
- 5 Välj knappen **Inställningar** för din valda manövermetod för att visa och ändra inställningarna.



Skanna denna kod eller besök qrco.de/bbFkqc för att se ett videoklipp om manövermetoder på högteknologiska enheter.

Läs upp



Panelen Tala innehåller ditt tangentbord för att komponera och tala meddelanden. Öva på att använda den för att förbättra din kommunikationshastighet och för enklare kommunikation.


Öva på stegen

- 1 Öva på att komponera meddelanden med hjälp av ord, skiljetecken och siffror och tala sedan meddelandena. Prova dessa förslag eller utforska på egen hand.
 - Namnge och beskriv din bästa vän.
 - Presentera dig. "Jag heter ____ Jag är ____ år och min favoritbok är ____."
 - Räkna upp dina tre favoritfilmer.
- 2 Ord- och frasprediktion hjälper dig att kommunicera mycket snabbare. Börja skriva in svaren på förslagen nedan och försök använda ordprediktions- och frasprediktionsknapparna för att slutföra dina meddelanden.
 - Vilka länder skulle du vilja resa till?
 - Skriv några vem-, vad-, när-, var- och varför-frågor t.ex. "Vart är vi på väg?" "Vad blir det till middag?"
- 3 Använd din enhet i verkliga livet. Öva med att använda tangentbordet och prediktionsknapparna i följande situationer:
 - Berätta för någon vad du gjorde i går eller i helgen.
 - Diskutera en nyhet.



Tips

Ju oftare du skriver ett ord, desto troligare kommer det att visas i ordprediktionen.

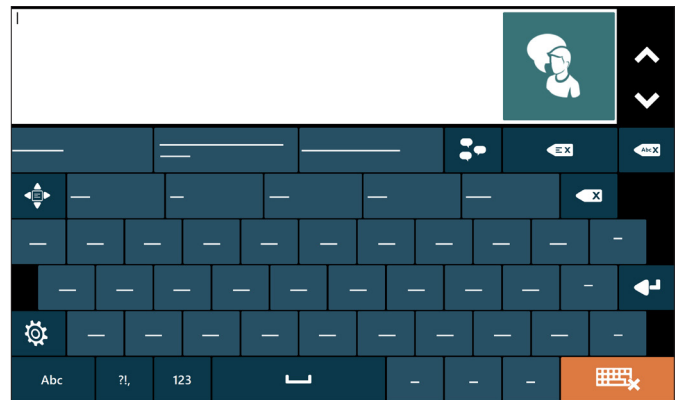

Ändra layouter på tangentbord



Om du upptäcker att standardtangentbordslayouten inte uppfyller dina behov finns det alternativ! Det finns olika layouter för tangentbord som du kan välja mellan i Communicator 5.

1 Välj **Inställningar**.



2 Välj **Tangentbordsinställningar**.

	Vanlig (standard)	Rutnät	Större knappar
Organisation (beskrivet nedan)	Qwerty, Sono Key tangentbord, Standard	Rutnät, Stora tangenter, Ögonstyrning delat	Rutnät, Stora tangenter, Ögonstyrning delat
Prediktion	Ord- och frasprediktion	Ingen	Ordprediktion
Knappstorlek	Liten	Medel	Stor
Fingerguide	Nej	Ja	Ja
Extra	Stort meddelandefönster för att skapa flera radmeddelanden och text.	Lämplig för ögonstyrning. Stort målområde.	För användare som behöver större knappar.

3 Välj en tangentbordslayout. Tabellen ovan beskriver funktionerna hos de tre mest populära tangentbordslayouterna. För att förhandsgranska tangentbordslayouten, välj **Visa**.

4 Om du vill ändra organisationen för typen av tangentbord som du har valt, välj QWERTY/ABC. Välj ett av alternativen för tangentbordsorganisation.

- QWERTY är layouten som ses på många fysiska tangentbord.
- ABC är en alfabetisk layout.
- Skanna är designad för personer som använder en kontakt som inmatningsmetod.
- Pekare är optimerad för personer som använder en pekare som inmatningsmetod.



QWERTY
/ ABC

Mina fraser



Panelen Mina fraser består av din talhistorik och dina egna anpassade fraser. Att ha färdiga fraser hjälper dig att kommunicera snabbt utan att behöva skriva ut hela meddelanden.

- 1 Tänk på vanliga kategorier (situationer) och fraser som du vill ha snabb åtkomst till. Flera exempel inkluderar möten, på en restaurang, träffa vänner etc.

Lägg till en ny kategori:

- Välj **Lägg till ny kategori**.
- Skriv in ett kategorinamn.
- Välj **Bekräfta**.

Lägg till en ny fras:

- Välj en **Kategori** för den nya frasen.
- Välj **Lägg till ny fras**.
- Skriv in din fras.
- Välj **Bekräfta**.

- 2 När du har lagt till dina fraser kan du välja varje fras för att bekanta dig med vad den förmedlar och var den finns. Justera fraser eller kategorier allt efter behov.
- 3 Öva på de fraser som du använder och har lagt till, och fortsätt att lägga till fler efter behov.



Tips

Om du inte ser en mängd olika kategorier av fraser, kan du behöva importera dem. För att importera fraser, gå till *Snabbmeny > Avancerade inställningar > Tangentbord och språk > Mina fraser > Importera* och följ anvisningarna på skärmen.

E-post



Panelen E-post låter dig enkelt och effektivt skicka, ta emot och hantera e-postmeddelanden. När du ska konfigurera e-posten behöver du någon som kan trycka på skärmen.



OBS!

Du behöver en aktiv internetanslutning för att konfigurera, skicka och ta emot e-post.

Konfigurera din e-post

(Du behöver endast göra dessa steg en gång.)

- 1 Öppna **Snabbmenyn**.
- 2 Välj **Avancerade inställningar**.
- 3 Välj **Applikationer**.
- 4 Välj **E-post**.
- 5 Välj **Ny**.
- 6 Välj e-postleverantör. Om din leverantör inte finns med i listan, välj **Konfigurera manuellt**. Du kan behöva kontakta din e-postleverantör för att få korrekt serverinformation.
- 7 Välj **Nästa**.
- 8 Välj **Slutför**.

Få åtkomst till din e-post

- 1 På startsidan, välj **E-post**.
- 2 På e-postsidan kan du se alla dina e-postmeddelanden till vänster på sidan.
 - Välj ett e-postmeddelande för att läsa, svara, vidarebefordra eller radera det.
 - För att navigera till en annan e-postmapp, använd **Välj mapp** i övre vänstra hörnet på sidan.

IR-fjärrkontroll




IR-fjärrkontrollfunktioner låter dig styra enheter för underhållning som TV, DVD eller radio. Du kan också styra omgivningen som belysning, dörrar och sängjusteringar med ytterligare utrustning. Den här funktionen stöds endast på kommunikationsenheter med IR-hårdvara som TD I-Series.

Innan du kan använda din IR-fjärrkontroll måste du programmera varje kommando. Till exempel för TV-apparaten behöver du strömknapp, volym upp/ner, kanal upp/ner etc.

Din startsida har paneler med full fjärrstyrning för TV, DVD-spelare, stereo och radio. Det finns förenklade fjärrkontrollpaneler som du kan lägga till på startsidan om du inte vill ha alla funktioner.

- 1 Ha fjärrkontrollen för den enhet som du vill programmera tillgänglig.
- 2 Gå till panelen med fjärrkontrollen och välj den knapp du vill programmera. Ett pop up-fönster visar att det inte finns något kommando programmerat.
- 3 Välj **Ja** för att programmera ett nytt kommando.
- 4 Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på baksidan av kommunikationsenheten.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen.
- 6 Knappen ändrar färg om den har programmerats. Din enhet kan nu fungera som en fjärrkontroll för att skicka kommandot som du har programmerat på knappen. Se till att enheten du styr (TV, DVD-spelare etc.) är inom räckhåll för att ta emot IR-signalen och att IR-mottagaren på baksidan av din kommunikationsenhet är riktad mot enheten du styr.
- 7 Prova med knappen innan du går vidare till att programmera nästa knapp.

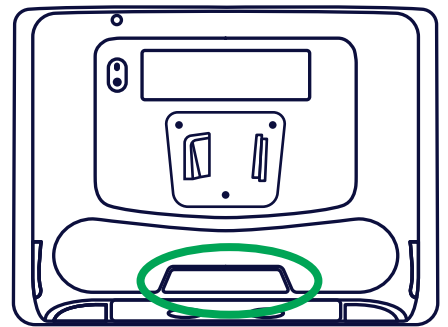

Tips

Du kan också använda enheten med smarta assistenter som Alexa och Google Home.

Kalender



Kalendern låter dig lägga in bokade möten och påminnelser.

Så här lägger du till ett nytt möte.

- 1 Välj **Kalender** på startsidan.
- 2 Välj datum för ditt möte.
- 3 Välj **Ny**.
- 4 Skriv in beskrivning för ditt bokade möte.
- 5 Välj start- och sluttid.
- 6 Om du vill ha en påminnelse när ditt möte börjar, kryssa i rutan.



Mina textfiler



Med Mina textfiler kan du spara längre textfiler som berättelser, tal eller presentationer. Genom att spara och organisera dina filer här kan du enkelt komma åt dem och kontrollera när du ska börja och sluta tala.

Skapa ny textfil:

- 1 Välj **Ny**.
- 2 Skriv in innehållet i din fil.
- 3 När du är färdig med din text väljer du **Klar**.
- 4 Filen namnges automatiskt med den första meningen i dokumentet.
 - För att ändra detta, välj **symbolen för tangentbordet** bredvid filnamnet.
 - Välj **Radera allt**.
 - Skriv in det nya filnamnet.
 - Tryck på **Spara**.

Redigera en textfil.

- 1 Välj filnamnet i den vänstra kolumnen.
- 2 Välj **Redigera**.
- 3 Redigera ditt dokument.
- 4 Välj **Bekräfta**.
- 5 Välj **Spara** eller **Spara som**.

Tala en textfil:

- 1 Välj filnamnet i den vänstra kolumnen.
- 2 Välj **Tala text**.
- 3 För att stoppa talet, välj **Stoppa talet**.

Kamera och Mina bilder



Ta, spara och organisera dina bilder med hjälp av Kamera och Mina bilder.

Bilder som tas med kameran sparas automatiskt i mappen Bilder på enheten och visas automatiskt i Mina bilder.

Mina bilder hämtar mappen Bilder på din enhet.

Du kan filtrera bilder efter:

- Alla bilder
- Nyligen tillagda
- Datum
- Kamerafoton
- Mappar

Välj Visa för att göra följande:

- Roterar bilden åt vänster eller höger
- Lägg till en beskrivning
- Skriv ut
- Ta bort

Bildspelet presenterar bilder i ordning och avancerar framåt automatiskt. Du kan välja en långsam, medel eller snabb takt, eller gå framåt manuellt.

Säkerhetskopiering och exportera profiler

Det är mycket viktigt att säkerhetskopiera alla anpassade paneler och användardata. Om du måste skicka in din enhet för reparation eller skaffa en ny enhet kommer du att använda dina säkerhetskopior för att återställa dina data. Denna funktion är endast åtkomlig genom att trycka på skärmen eller högerklicka med en mus.

❶ Öppna **Snabbmenyn**.

❷ Välj **Avancerade inställningar**.



❸ Välj **Användarinställning**.

❹ Välj **Import/Export**.

❺ Välj **Exportera valda inställningar och data**.

❻ Välj **Nästa**.

❼ Välj **Fullständig export** (fullständig export samlar in användarens alla paneler, inställningar, inspelade ljud/fraser, kontakter, ordböcker och grammatiska inställningar).

❽ Välj **Nästa**.

❾ Namnge arkivet – vi rekommenderar att du använder användarens namn och datum.

❿ Välj var du vill spara säkerhetskopian – vi rekommenderar att du sparar den på en extern USB-minnesenhet.



Tips

För extra säkerhet, ladda upp dina säkerhetskopierade filer till myTobiiDynavox.com. Logga in med ditt Tobii Dynavox-konto, välj **Communicator** i avsnittet Mina saker, fliken **Säkerhetskopior**, **Ladda upp säkerhetskopia**.

Message Banking

Message banking är ett sätt att bevara din egen naturliga röst genom inspelade meddelanden. Dessa meddelanden kan användas senare i kommunikationsprogramvara som Communicator 5.



Tips

Det är viktigt att starta processen så tidigt som möjligt så att kvaliteten och tydligheten i ditt tal kan fångas upp.

Tobii Dynavox Message Bank är ett sätt att samla in, organisera och lagra inspelade meddelanden tills de behövs. Meddelanden kan hämtas hem och användas på alla system som kan spela upp dessa meddelanden.



Skanna denna kod eller besök myMessageBanking.com för mer information om message banking.

Alternativ för datoråtkomst

Ögonstyrningsanvändare kan navigera utanför Communicator 5-appen till Windows-skrivbordet och andra appar med hjälp av följande verktyg.



TD Control

TD Control är vårt snabbaste och mest kraftfulla alternativ för ögonstyrningsdatoråtkomst. Dina interaktionsalternativ (vänsterklicka, högerklicka, dubbelklicka, klicka och dra, tangentbord etc.) visas runt panelen du har valt med dina ögon. Starta TD Control från startsidan för Communicator 5 för att komma igång.



Om du vill veta mer om TD Control, skanna koden eller besök grco.de/TDCmanual.



Communicator 5 Windows-åtkomst

Med Communicator 5 Windows-åtkomst visas dina interaktionsalternativ i ett verktygsfält som alltid är aktivt. För att prova det, gå till *Alla paneler > Textkommunikation > Windows-åtkomst*. Välj **Windows-åtkomst**, sedan **Lägg till på startsida**.



Om du vill veta mer om Communicator 5 Windows-åtkomst, skanna koden eller besök grco.de/be8LSm.



Ditt gratis myTobiiDynavox.com-konto ger dig åtkomst till många fördelar inklusive molnlagring för säkerhetskopior, delning av paneler, lektionsplaner med mera!

- Säkerhetskopiera ditt system på ett säkert sätt
- Hämta hem verktyg och resurser helt gratis
- Läs mer om tillgängliga uppdateringar
- Få åtkomst till teknisk support och vanliga frågor och svar
- Dela paneler



myTobiiDynavox
myTobiiDynavox.com

Ytterligare resurser



Communicator 5 Guide för att komma igång

qrco.de/bbA7aL



Support och utbildning

qrco.de/beBfJj



TD Facebook-community

qrco.de/TDFB



Utbildningskort för programvara

qrco.de/trainingcards



Teknisk support i Sverige

08 522 950 20 (välj 1 för support)