
tobii dynavox

Communicator 5 基于文本的用户

培训卡片

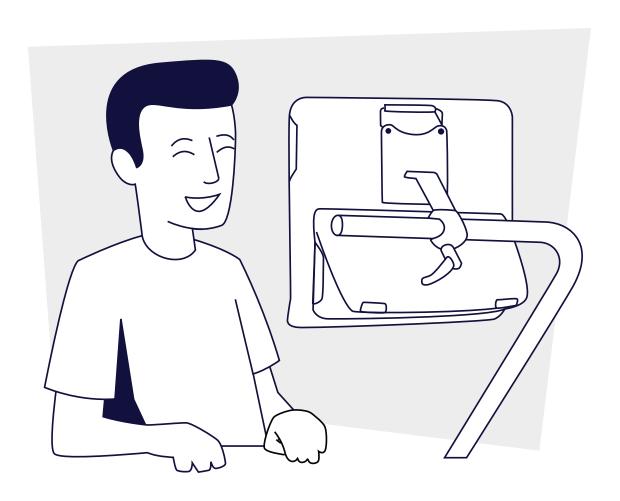

目录

- 1 Communicator 5 教程——主页
- 3 Communicator 5 教程——快捷菜单
- 4 编辑主页
- 4 输入方式
- 5 说出
- 6 更改键盘布局
- 7 我的短语
- 8 电子邮件
- 9 红外遥控器
- 10 日历
- 10 我的文本文件
- 11 摄像头与我的图片
- 12 备份与导出配置文件
- 13 Message Banking
- 13 电脑操控
- 14 myTobiiDynavox.com
- 14 其他资源

Communicator 5 教程——主页

主页与页面集、工具、其他应用程序等链接。显示的主页用于 TD I-Series 设备。其他硬件配置 上的主页选项可能不同。



1 说出

通过屏幕键盘打字,或者使用自定义短语或者语音 历史,把文字输入到文本框内,然后利用合成语音 说出文本内容。

2 我的短语

添加、修改、整理或者删除您最近说出过的文字内容。您还可以预设自己常用的语句,将它们归类存放。使用时只需要在主页中选择"说出"页面集,然后选择"短语"按钮,即可方便地调用它们。

3 电子邮件

用于收发电子邮件。此功能需连接互联网,配置邮件登陆信息。



注意

邮箱提供商须支持第三方软件授权登录功能。

4 所有页面集

选择一个不同的页面集或者将应用程序或文件添加至主页。

5 编辑主页

自定义主页 — 添加与移除按钮、对其重新排列,更 改网格大小、背景色等。

6 退出 Communicator

退出 Communicator 应用程序,使设备进入休眠状态或者重启设备。

7 设置 (可访问)

更改设备与 Communicator 5 应用程序设置,例如: 屏幕亮度、音量、输入方法、语音等。

8 文本消息

通过蓝牙连接手机,以收发短信。

9 我的图片

使用设备相机拍摄照片,然后查看与整理照片。

10 我的联系人

查看与管理您的联系人信息,例如:姓名、电子邮件地址、电话号码与个人资料照片。

^{*}仅在具有蓝牙功能的 I-Series 与 Windows 10 设备上可用。并非与所有型号手机兼容。

11 我的文本文件

创建、管理与说出文本文件。文本文件对于较长的文 稿有用,例如:演示文稿、演讲、信件等。

12日历

利用预约与通知跟踪您的日程。

13 相机

使用设备上的相机拍照。

14 计算器

一款常用的数字计算器。

15 警报

立即发出警报音。

16 休息

暂停眼控。

1 收音机遥控

编程并将红外命令发送至兼容的收音机。

18 电视遥控

编程并将红外命令发送至兼容的电视机。

1 TD Control

启动 TD Control 操作电脑。查看"电脑访问选项"章节 了解更多详情。

20 TD Talk

TD Talk 是一款基于文本转语音的面向触摸或者眼控用户的"优化版"屏幕键盘盘。如想了解更多详情,请访问 tobiidynavox.com/products/td-talk。

41 TD Browse

TD Browse 一款专为眼控操作而设计的网页浏览器。通过直观的方式完成滚动和点击操作,利用颜色链接的方式易于选择更小的目标。如想了解更多详情,请访问 tobiidynavox.com/products/td-browse。

22 TD Phone

TD Phone 通过蓝牙连接手机和 TD I-Series 设备,随时随地给家人朋友打电话、发短信。当别人给您打电话或者发短信时,您会收到提示,并且能够直接用眼睛操作,接听或者回复。如想了解更多详情,请访问tobiidynavox.com/products/td-phone。



Communicator 5 教程——快捷菜单

快捷菜单包含用于编辑与创建页面集的工具以 及高级设置与显示选项。只能通过触摸或使用 鼠标访问快捷菜单。




如何访问快捷菜单?

长按屏幕

或者

右键单击

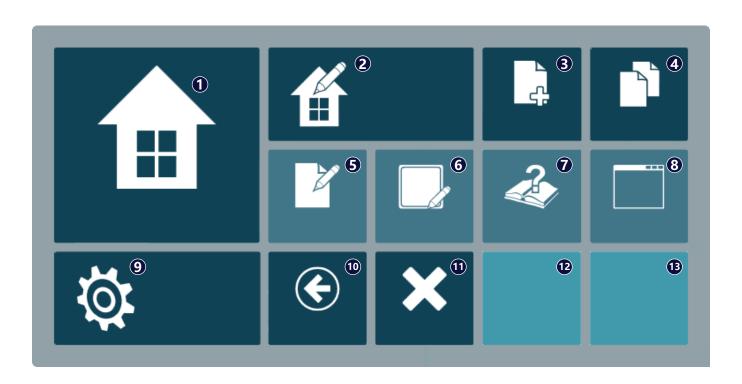

1 主页

转至主页。

2 编辑主页

添加、移除和整理页面集,可以自定义网格大小和背景。

3新建页面集

根据需求设计自己的页面集,可以选择格子页或者自由绘制页。

4 所有页面集

浏览所有页面集。

5 编辑页面集

修改当前页面集。

6 编辑按钮

选择后,当前页面上的所有可编辑按钮突出显示。选择一个可编辑按钮进行编辑。

7 帮助与培训

打开"帮助与培训"页面集。

8 窗口模式/全屏模式切换

选择此按钮在窗口与全屏显示模式之间切换。

9 高级设置

输入、键盘与语言、声音、应用、用户设置以及系统的相关设置。

10 返回

回到上一个页面。

10 退出

退出 Communicator 5。

12 13最近页面集

这些是最后打开过的两个页面集。选择将转至页面集。

编辑主页

主页上提供的项目仅为建议。您可以根据自身需求移除、添加以及重新排列主页上的项目。

移除主页上的页面集:

1 选择**编辑主页**。



- 2 选择您想要移除的项目。
- 3 选择移除。
- 4 在弹出窗口中,选择**移除**进行确认。

将页面集添加至主页:

1 选择**所有页面集**。



- 2 选择文本式沟通。
- 3 选择所需项。
- 4 选择添加到主页。



提示

启用状态栏,确保能够快速监测注视跟踪状态、设备电池使用量与 Wi-Fi 连接状态。



注意

这些步骤仅能通过触摸或使用鼠标访问。

- 1 打开快捷菜单。
- 2 选择高级设置。
- 3 选择系统。
- 4 选择启用状态栏。

输入方式

输入方式是操作方式,例如触摸、眼控、鼠标停留等。

配置输入方式:

- **1** 打开**快捷菜单**。
- **2** 冼择**高级设置**。
- **3** 选择输入方式。
- 4 选择一种输入方式。
- **5** 为选择的输入方式选择**设置**按钮,查看与更改设置。



扫描此二维码或者访问 qrco.de/bbJ64t 在高科技设备 上观看关于访问方式的视频。

说出



"说出"页面集包含了屏幕键盘和文本框。练习使用此键盘进行打字沟通,更方便,更快捷。


练习步骤

- 练习使用文字、标点与数字编写消息,然后说出消息。试用这些提示或者自行探索。
 - ■说出您最好朋友的姓名并描述。
 - 自我介绍。"我的名字叫_____,我_____岁,我最喜欢的书籍是 。"
 - ■列出您最喜欢的三部影片。
- ② 文字与短语预测有助于更快速沟通。首先在下方输入提示的答案,然后尝试使用文字预测与短语预测按钮完成消息。
 - 您想到哪些国家旅行?
 - ■输入一些关于谁、什么、何时、哪里和为什么的问题,例如:"我们将要去哪里?""我们晚饭吃什么?"
- **3** 在现实生活中使用您的设备。在下列情况下练习使用键盘:
 - 与某人分享关于您昨天晚上或者周末所做事情的信息.
 - ■讨论最近的新闻事件。



提示

经常输入的词组或短句会排在候选框靠前的 位置。

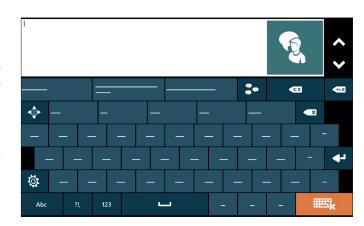

更改键盘布局



如果您发现默认键盘布局无法满足您的需求,则可以选择不同的键盘布局。

1 选择**设置**。



2 选择键盘设置。

	常规 (默认)	网格	大按键
布局 (下方描述)	全键盘、ABC、扫描、 指棍	ABC、扫描、指棍	ABC、扫描、指棍
预测	单词与短语预测	无	文字预测
按钮大小	小	中	大
键保护壳	否	是	是
其他	用于创建多行消息与文 字的大消息窗口。	适合于眼动跟踪。大目 标区域。	对于需要较大按钮的用户。

- **3** 选择一种键盘布局。上表介绍描述三种最流行键盘布局的特征。要预览键盘布局,选择**查看**。
- 4 如想更改您已经选择的键盘类型的布局,请选择"全键盘/ABC"。选择其中一个键盘布局 选项。
 - QWERTY是一种最为常见的键盘布局。
 - ABC 是一种按照字母顺序的布局。
 - ■扫描适用于将外置按钮作为输入方式的用户。
 - ■指针最适用于将指针作为输入方式的用户。





我的短语



"我的短语"页面集由您的消息历史和您自己自定义的短语组成。拥有预先编写的短语有助于您快速沟通,无需键入整条消息。

● 思考您想要快速访问的常见类别(情况)与短语。示例包括预约、餐馆就餐、与好友聚会等。

添加一个新类别:

- 选择添加新类别。
- ■键入类别名称。
- 选择确认。

添加一个新短语:

- 为新短语选择**类别**。
- 选择添加新短语。
- ■键入您的短语。
- 选择确认。
- 2 添加短语后,选择每一个短语,熟悉短语的内容和位置。根据需要调整短语或类别。
- 3 练习使用您已经添加的短语,以及根据需要继续添加更多短语。



提示

如果您未看到多种短语类别,您可能需要将其导入。如需导入短语,转至 快捷菜单 > 高级设置 > 键盘与语言 > 短语 > 导入,然后遵循屏幕上的提示操作。

电子邮件



电子邮件页面将允许您轻松和高效发送、接收与管理电子邮件消息。如要设置电子邮件,您将需要其他人使用鼠标或者触控来操作。



注意

设置、发送与接收电子邮件需要与互联网有效连接。

设置电子邮件

(您仅需要执行下方步骤一次。)

- **1** 打开**快捷菜单**。
- 2 选择高级设置。
- 3 选择应用。
- 4 选择电子邮件。
- **5** 选择**新建**。
- **6** 选择您的电子邮件提供商。如果您的提供商未列出,请选择**手动配置**。您可能需要联系电子邮件提供商获取正确的服务器信息。
- 7 选择下一步。
- 8 选择完成。

访问您的电子邮件

- **1** 在主页上选择**电子邮件**。
- 2 在电子邮件页面上可以查看位于页面左侧的所有电子邮件。
 - ■选择一封要阅读、回复、转发或删除的电子邮件。
 - 要导航至另外一个电子邮件文件夹,使用位于页面左上角的**选择文件夹**。

红外遥控器




红外遥控器功能允许您操作电视机、DVD 或收音机之类的娱乐设备。您还可控制环境设备,例如:照明、门以及配备附加设备的床位调节装置。只有配备红外硬件的沟通设备(例如:Tobii Dynavox I-Series)才支持此功能。

在使用红外遥控器之前,必须编程每一个命令。例如:对于电视机,您需要编程电源开关、增加音量、减小音量、向上更换频道、向下更换频道等命令。

您的主页提供关于电视机、DVD播放器、音响与收音机的全功能遥控页面。还提供一些简易遥控器页面,当您不需要所有的功能时,可将这些简易页面添加至主页。

- 获取您想要编程的设备遥控器。
- **②** 前往"遥控器"页面,选择您想要编程的按钮。将出现一个弹出窗口,告知您无编程命令。
- **3** 选择**是**编程新命令。
- 4 将谣控器指向位于沟通设备背部的红外接收器。
- **5** 按照屏幕上的提示操作。
- ⑥ 编程成功后,按钮将变色。您的设备此时起到遥控器的作用,发送您已经在按钮上编程的命令。确保您正在控制的设备(电视机、DVD播放器等)在接收红外信号的范围内,并且位于沟通设备背部的红外接收器指向您正在控制的设备。
- 7 试用此按钮,然后对下一个按钮编程。

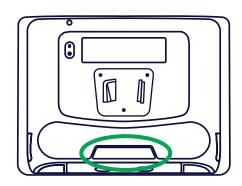



提示

您还可使用配有 Alexa 与 Google Home 等智能助手的设备。

日历



"日历"允许您设定预约和提醒事项。

添加预约:

- **1** 在主页上选择**日历**。
- 2 选择预约日期。
- **3** 选择新建。
- 4 输入预约名称。
- **5** 选择起始与结束时间。
- **6** 如果您想要在预约开始时进行提醒,请勾选此复选框。



我的文本文件



"我的文本文件"允许您保存较长的文本文件,例如:故事、演讲或演示文稿。在此处保存和整理文件可使您对其轻松访问,以及控制开始与停止说话的时间。

创建新文本文件:

- **1** 选择新建。
- 2键入您的文件内容。
- **3** 完成编写后,选择**完成**。
- 4 使用文档中的第一句对文件自动命名。
 - 如要变更,选择位于文件名旁的**键盘图标**。
 - 选择**清除**。
 - ■键入新的文件名。
 - 再次选择 "保存"。

编辑文本文件。

- 1 在左列选择文件名。
- 2 选择编辑。
- 3 编辑文档。
- 3 选择确认。
- **3** 选择保存或另存为.

说出文本文件:

- **1** 在左列选择文件名。
- 2 选择说出文本。
- **3** 要停止语音,选择**停止说话**。

摄像头与我的图片





使用"摄像头"与"我的图片"拍摄、保存与整理图片。

使用摄像头拍摄的照片会自动保存至设备上的"图片"文件夹,并且在"我的图片"中自动出现。

"我的图片"访问您设备上的"图片"文件夹。

您可以按照下列条件筛选图片:

- ■所有图片
- ■最近添加的图片
- ■日期
- ■摄像头
- ■文件夹

选择"查看"进行下列操作:

- ■向左或向右旋转图片
- ■添加描述
- ■打印
- ■删除

幻灯片按顺序展示图片,并自动前进。您可以选择慢速、中速与快速或者手动展示图片。

备份与导出配置文件

备份个性化页面集与用户数据非常重要。如果您需要将设备送交维修,或者获取一台新设备,则需要使用备份文件恢复数据。您将需要其他人协助您用鼠标或触屏来操作。

- **1** 打开**快捷菜单**。
- 2 选择高级设置。



- **3** 选择用户设置。
- 4 选择导入/导出。
- **6** 选择**导出选择的设置与数据**。
- 6 选择下一步。
- **⑦** 选择全部导出(全部导出将收集用户的所有页面集、设置、录制的声音/短语、通讯录、字典与语法设置)。
- 8 选择下一步。
- 9 对档案命名 我们建议使用用户名与日期。
- 选择保存备份的位置 我们建议将其保存至外部 USB 存储设备中。



提示

为提高安全性,将备份文件上传至 myTobiiDynavox.com。使用 Tobii Dynavox 账户登录即可,在"我的物品"部分选择 **Communicator**,选择**备份**选项卡,然后选择**上传备份**。

Message Banking

Message Banking 是一种通过录制的消息保留您自己自然语音的方式。可稍后在Communicator 5 等沟通软件中使用这些消息。

Tobii Dynavox Message Bank 可使您免费收集、整理和存储录制的消息,直至其需要为止。可在任何能够回放这些消息的系统上下载和使用消息。



提示

务必尽早开始此过程,以便于捕捉到您语音的质量与清晰度。



扫描此二维码或者访问 myMessageBanking.com 了解关于 Message Banking 的更多信息

电脑操控

眼控用户可以使用下列工具操作电脑上 Communicator5 之外的其他应用程序。



TD Control

TD Control 是我们目前最新最先进的眼控操控软件互动菜单中心化完美结合了眼控中心精度高于边缘的特点,将眼控优化做到极致。从 Communicator 5 主页中气动TD Control 便可以开始体验。



如要详细了解 TD Control,请扫描二维码或者访问 qrco.de/TDCmanual。




Communicator 5 Windows 访问

使用 Communicator 5 的 Windows 访问时,您的 互动将会始终显示在屏幕上。如要尝试,请访问 所 有页面集 > 文本沟通 > Windows 访问。然后选择 Windows 访问并将它添加至主页。



如要详细了解 Communicator 5 Windows 访问,请扫描二维码或者访问 grco.de/be8LSm。

myTobiiDynavox.com

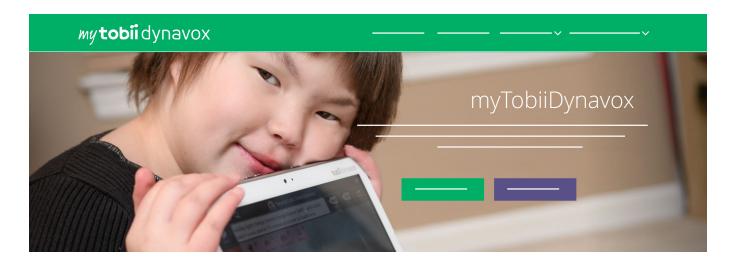

通过免费 myTobiiDynavox.com 账户可以体验多种好处,例如:用于备份的云存储、页面集共享、课程计划等等!

- ■安全备份系统
- 下载免费工具与资源
- ■了解可用更新
- 访问技术支持与常见问题
- 共享页面集



myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

其他资源



Communicator 5 快速入门指南

qrco.de/bbGQn1



支持与培训

qrco.de/beBfJj



微信公众号

TobiiDynavox



软件培训卡片

qrco.de/trainingcards



中国技术支持

0512-69362880-814