

TD Control
Manuale Utente



Manuale Utente TD Control

Version 1.1

03/2022

Tutti i diritti riservati

Copyright © Tobii AB (publ)

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, archiviata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, tramite fotocopia, registrazione o altro tipo) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'autore.

La protezione del copyright rivendicata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali schermate, menu e così via.

Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà di Tobii Dynavox. La riproduzione, parziale o totale, senza la preventiva autorizzazione scritta di Tobii Dynavox è vietata.

I prodotti a cui viene fatto riferimento in questo documento possono essere marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. L'editore e l'autore non riconoscono alcuna garanzia in merito a questi marchi.

Sebbene siano state prese tutte le possibili precauzioni nella preparazione di questo documento, l'editore e l'autore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni oppure per danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questo documento o dei programmi e del codice sorgente forniti a corredo. In nessun caso l'editore e l'autore saranno responsabili per eventuali perdite di profitto o qualsiasi altro danno commerciale causato o presumibilmente causato direttamente o indirettamente dalle informazioni incluse in questo documento.

Il contenuto è soggetto a modifica senza preavviso.

Visitare il sito Web Tobii Dynavox

www.TobiiDynavox.com per versioni aggiornate di questo documento.

Recapiti:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Svezia

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Regno Unito

+46 8 663 69 90

Tobii Electronics Technology Suzhou Co. Ltd
Room 401, Building 6, No. 5 Xing Han Street Suzhou
P.R.Cina 215021

+86 512 69362880



Indice

1	Informazioni su TD Control	6
1.1	Usò previsto	6
1.2	Requisiti di sistema	6
2	Primo avvio	7
3	Panoramica di TD Control	9
3.1	Il Trace	9
3.2	Il Interaction Menu	10
3.3	Menu fuori schermo in TD Control	11
3.3.1	Menu fuori schermo	12
3.3.1.1	Menu fuori schermo Modalità continua	12
3.3.2	Tastiera Menu fuori schermo	14
3.4	Il Dashboard	15
3.5	Finestra dello Stato del tracciamento	17
3.6	Nessun eye tracker collegato	17
4	Utilizzo di TD Control	18
4.1	Le azioni nell'Interaction Menu	18
4.1.1	In che modo posso eseguire un'azione con TD Control?	18
4.1.2	Come posso utilizzare la funzione Scorrimento in TD Control ?	18
4.1.3	Come posso eseguire un Clic destro in TD Control?	19
4.1.4	Come posso utilizzare Clic e trascinamento in TD Control?	20
4.1.5	Come posso attivare la Tastiera in TD Control?	21
4.1.5.1	Tastiera	21
4.1.6	Come posso utilizzare l'azione Regola target in TD Control?	24
4.1.7	Come posso utilizzare Doppio clic in TD Control?	24
4.1.8	Come posso utilizzare Clic sinistro in TD Control?	24
4.2	Azioni nel Menu fuori schermo	25
4.2.1	Come posso attivare Switcher in TD Control?	25
4.2.2	Come posso attivare la Dashboard in TD Control?	25
4.2.3	Pausa in TD Control	26
4.2.3.1	Come posso mettere in pausa l'eye tracking in TD Control?	26
4.2.3.2	Come faccio a capire se l'eye tracking è in pausa in TD Control?	27
4.2.3.3	Come posso mettere ripristinare l'eye tracking in TD Control?	27
4.2.4	Modalità continue in TD Control	27
4.2.4.1	Come posso eseguire un'Azione continua in TD Control?	27
4.2.4.2	Come posso cambiare l'Azione continua selezionata in TD Control?	28
4.2.4.3	Come posso uscire dall'Azione continua selezionata in TD Control?	28
4.3	Azioni su Dashboard	29
4.3.1	Come posso attivare il Dashboard in TD Control?	29
4.3.2	Come posso attivare un'azione dal Dashboard in TD Control?	30
4.3.3	Come posso eseguire rapidamente una Calibrazione in TD Control?	30
4.3.4	In che modo posso mettere in standby il mio dispositivo con TD Control?	31
4.3.5	Come posso accedere alle Impostazioni in TD Control?	31
4.3.6	Come posso accedere a Blocco appunti in TD Control?	32

5	Impostazioni di TD Control	33
5.1	Attivazione	33
5.1.1	Metodo di attivazione	34
5.1.1.1	Come posso cambiare il Metodo di attivazione in TD Control	34
5.1.2	Velocità	34
5.1.2.1	In che modo posso selezionare il Tempo di fissazione per la traccia in TD Control?	34
5.1.2.2	In che modo posso cambiare/impostare il Tempo di selezione per la traccia in TD Control?	35
5.1.3	Tracciamento	35
5.1.3.1	In che modo posso cambiare/impostare l' Opacità per la traccia in TD Control?	35
5.1.4	Regola target	36
5.1.4.1	Come posso selezionare il modo in cui Regola target funzionerà in TD Control?	36
5.1.4.2	Come seleziono il comportamento della Finestra dello zoom per Clic e trascina in TD Control?	36
5.2	Calibrazione	37
5.2.1	Come funziona il processo di calibrazione in TD Control?	37
5.2.2	Come posso selezionare l'occhio di cui eseguire il tracciamento in TD Control?	38
5.2.3	In che modo posso controllare il posizionamento dell'utente utilizzando Stato del tracciamento in TD Control?	39
5.2.4	In che modo posso Calibrare un utente in TD Control?	39
5.2.5	Come posso modificare la Configurazione display del mio eye tracker in TD Control?	40
5.3	Tastiera	41
5.3.1	Metodo di attivazione	41
5.3.1.1	Come posso cambiare il Metodo di attivazione in TD Control?	41
5.3.2	Pulsanti	41
5.3.2.1	In che modo posso cambiare/impostare il Tempo di selezione per la tastiera in TD Control?	41
5.3.2.2	Come scelgo il comportamento della Velocità pausa adattiva in TD Control?	42
5.3.3	Predizione	42
5.3.3.1	Come scelgo il comportamento delle Predizioni in TD Control?	42
5.3.3.2	In che modo posso cambiare/impostare il Tempo di selezione predizioni in TD Control?	43
5.3.4	Generale	43
5.3.4.1	In che modo posso cambiare/impostare la Lingua della tastiera in TD Control?	43
5.3.4.2	In che modo posso scaricare nuova lingua della tastiera in TD Control?	44
5.3.4.3	Come scelgo il comportamento del Feedback sonoro di digitazione in TD Control?	44
5.4	Modalità	45
5.4.1	Modalità continua	45
5.4.1.1	Come scelgo il tipo di Modalità continua da utilizzare in TD Control?	45
5.4.1.2	Come posso attivare/disattivare l' Avvio della Modalità continua in TD Control?	45
5.5	Generale	46

5.5.1	In che modo posso selezionare la Lingua applicazione per TD Control?.....	46
5.5.2	Come posso eseguire Raccogli registri per TD Control?	47
5.5.3	In che modo posso selezionare l' Avvio automatico in TD Control?	47
5.6	Personalizzazione	48
5.6.1	Come posso rimuovere un'azione dal Menu Interazione in TD Control?	48
5.6.2	Come posso aggiungere un'azione al Menu Interazione in TD Control?	48
5.7	Dispositivo	49
5.7.1	Pulsanti adattivi I-Series	49
5.7.1.1	Come posso impostare/cambiare l'azione del Pulsante Triangolo per I-Series in TD Control?.....	49
5.7.1.2	Come posso impostare/cambiare l'azione del Pulsante Quadrato per I-Series in TD Control?.....	50
5.7.1.3	Come posso attivare/disattivare i Pulsanti Volume su I-Series in TD Control?	50
5.8	Il mio account	51
5.8.1	Come posso creare un account per Il mio account in TD Control?.....	51
5.8.2	Come posso effettuare l'accesso a Il mio account in TD Control?.....	51
6	Switcher	53
6.1	Come posso accedere a Switcher in TD Control?	53
6.2	Come posso selezionare un'applicazione in Switcher?	53
6.3	Come posso aggiungere un'applicazione a Switcher?	54
6.4	Come posso rimuovere un'applicazione da Switcher?	54

1 Informazioni su TD Control

1.1 Uso previsto

La tecnologia dell'eye tracking Tobii Dynavox ha aiutato migliaia di persone ad affrontare le sfide di comunicazione e mobilità per condurre una vita più indipendente. Ma chi vuole fare un passo avanti e sfruttare al massimo tutto ciò che può offrire un computer? TD Control è un nuovo modo per interagire con il computer e utilizzarlo tramite l'eye tracking e offre un'esperienza più intuitiva che assicura la massima indipendenza. La tecnologia dell'eye tracking è nota già da molti anni, ma ciò che contraddistingue TD Control è che non solo offre la possibilità di controllare il computer con gli occhi, ma considera anche il modo più intuitivo e logico per farlo. L'innovativo approccio, chiamato "Interaction first", consente di utilizzare il computer comodamente e al proprio ritmo, ma anche di usare il proprio software preferito per la navigazione, le e-mail, i giochi, ecc..

Interaction First permette all'utente di selezionare l'oggetto con cui desidera interagire prima ancora di decidere cosa fare. Tramite un comportamento che sembra più naturale e intuitivo è quindi possibile ridurre il numero di errori.

Assumi il pieno controllo del computer con i tuoi occhi! Con il nostro software è possibile emulare tutti i tipi di azioni del mouse, scorrere le operazioni e digitare del testo. Abbiamo aggiunto collegamenti rapidi per facilitare ulteriormente l'accesso a tutti i componenti di Windows!

1.2 Requisiti di sistema

Componente	Requisiti
Computer e processore	i5-4200U a 1,60 GHz (i5 di 4a generazione con due core / 4 thread)
Memoria (RAM)	8 gigabyte (GB) RAM (minimo raccomandato)
Hard Disk	500 megabyte (MB) disponibili.
Sistema operativo	Windows 10
Versione .NET	4.7.2
Eye tracker	Tobii Dynavox I-Series I-13 & I-16 e Tobii Dynavox PCEye 5
Altri requisiti e considerazioni	Connessione Internet consigliata per ricevere aggiornamenti.


2 Primo avvio

Al primo avvio di TD Control , l'utente sarà sottoposto a un percorso composto dai seguenti elementi:

1. Schermata iniziale.
2. Schermata di benvenuto.
3. Schermata dello stato del tracciamento (per controllare se l'utente è posizionato correttamente di fronte all'eye tracker). (Per ulteriori informazioni, vedere *3.5 Finestra dello Stato del tracciamento*, pagina 17).
4. Schermata della calibrazione (per ulteriori informazioni, vedere *5.2 Calibrazione*).
5. Schermata dei termini dei servizi.
6. Schermata della guida rapida.




Quando si seleziona il pulsante  (Nascondi guida) nella Guida rapida, nella parte centrale - inferiore della schermata viene visualizzato un messaggio che informa l'utente su come accedere al Dashboard.

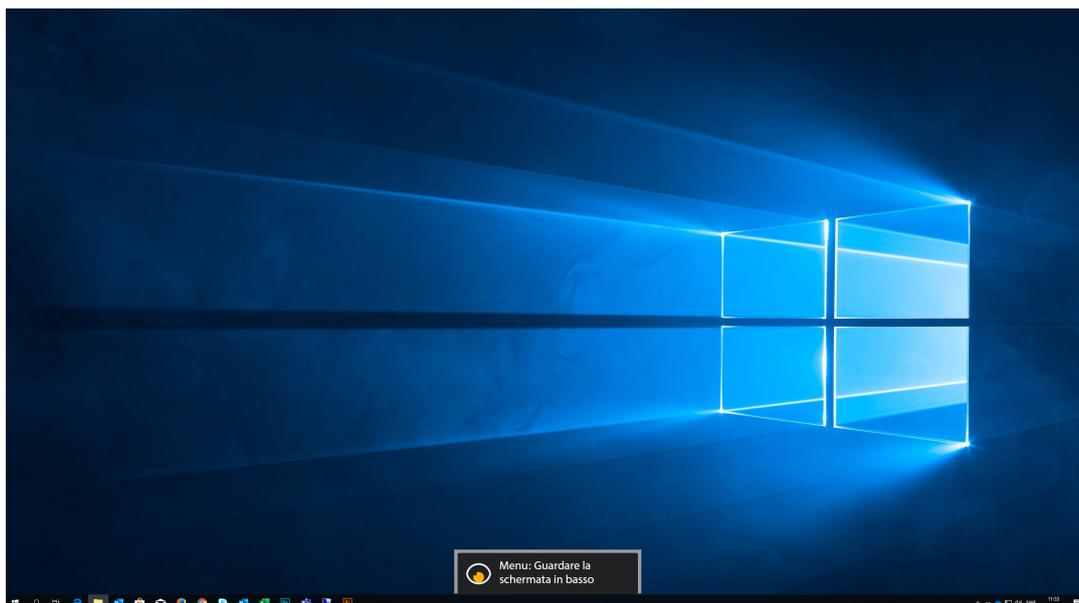

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.

Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

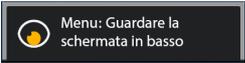Il messaggio a comparsa  viene visualizzato fino alla selezione dell'icona  (Dashboard).

La prima volta in cui l'utente seleziona l'icona  (Dashboard) viene visualizzata la Guida rapida per Dashboard.



Selezionare il pulsante  (Nascondi guida) nella Guida rapida per uscire dalla guida.

3 Panoramica di TD Control

3.1 Il Trace

La traccia segue lo sguardo dell'utente. La traccia è meno opaca finché l'utente non fissa lo sguardo, quindi diventa definita e compare l'Attivatore. L'Attivatore punta sempre verso il centro dello schermo, dove si trova l'Interaction Menu. L'area compresa tra i cerchi piccoli e grandi si blocca nel punto della schermata in cui si trova la traccia quando l'utente fissa lo sguardo e nell'area target della traccia viene mostrata un'istantanea dell'area all'interno della traccia. Quando l'utente chiude la traccia, l'istantanea viene rilasciata e la traccia torna al suo stato inattivo. La traccia funziona su tutti i tipi di sfondo.


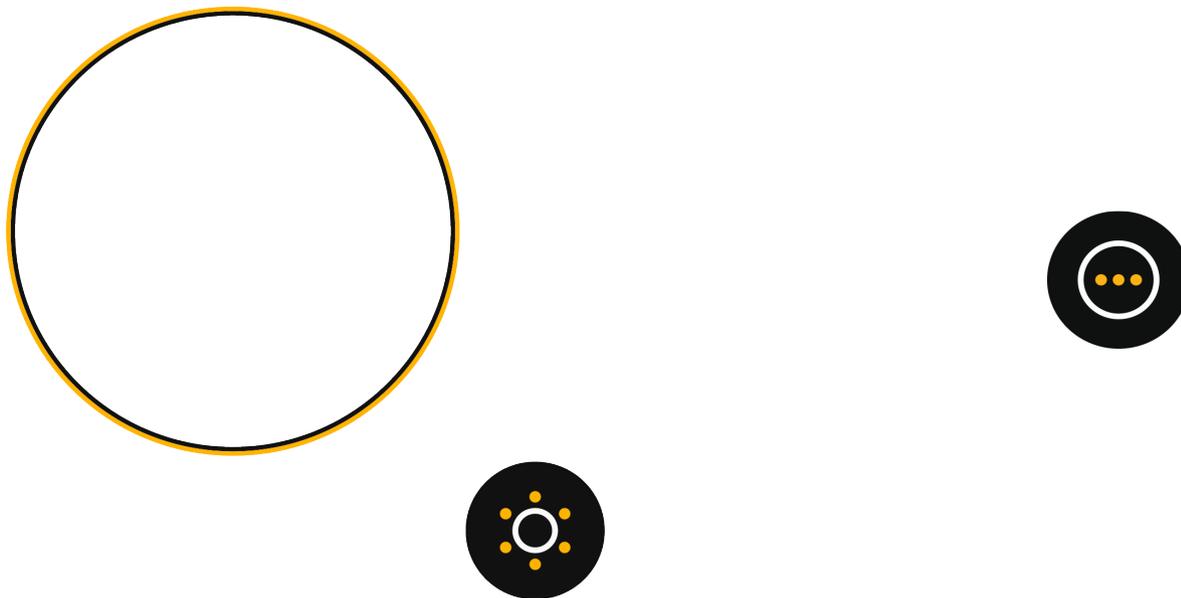


Figura 3.1 La traccia attiva

Tabella 3.1 La traccia

Elemento	Azione	Descrizione
	La traccia	La traccia offre un feedback sull'area verso cui è puntato lo sguardo dell'utente. La traccia si sposterà sullo schermo seguendo lo sguardo dell'utente. L'Attivatore compare quando l'utente fissa lo sguardo sullo schermo per un determinato periodo.
	Attivatore	Apri il Interaction Menu. Per ulteriori informazioni, vedere 3.2 <i>Il Interaction Menu</i> , pagina 10.
	Dashboard	Apri il Dashboard. Per ulteriori informazioni, vedere 3.4 <i>Il Dashboard</i> , pagina 15.

3.2 Il Interaction Menu

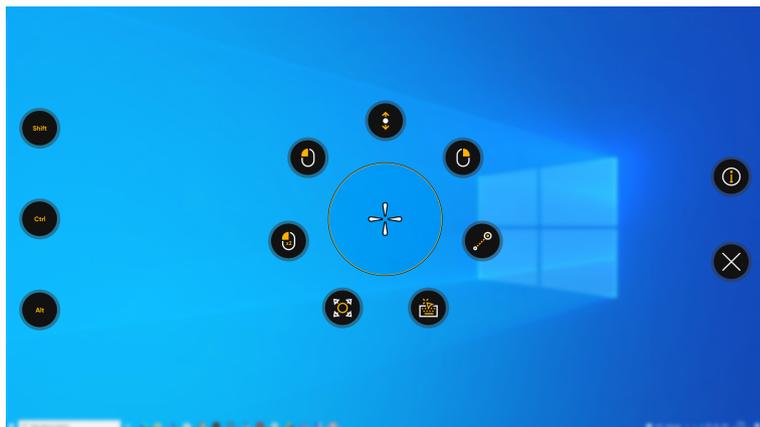

Il grande cerchio, con mirino al centro, nella parte centrale del Interaction Menu, è un'istantanea ingrandita dell'area target. È possibile affinare il mirino per puntare precisamente sulla zona desiderata all'interno dell'area target. Nella *Tabella 3.2 Interaction Menu, pagina 10* vengono descritte tutte le azioni disponibili nell'Interaction Menu.

Tabella 3.2 Interaction Menu

Icona	Azione	Descrizione
	Scorrimento	<p>Azione che, se eseguita in una finestra adatta, consente di scorrere il contenuto della pagina con lo sguardo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guardare l'area che può essere scorsa e mantenere fisso lo sguardo. Si aprirà il Interaction Menu. • Selezionare l'azione Scorrimento. • Guardare sopra l'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso l'alto. • Guardare sotto l'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso il basso. • Guardare a sinistra dell'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso sinistra. • Guardare a destra dell'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso destra. • Guardare il pulsante Esci posizionato sul lato destro per uscire dall'azione di scorrimento. <p> Utilizzare l'attività Scorrimento per scorrere in verticale e in orizzontale nelle app con interfaccia utente Modern e nella schermata Start di Windows nell'interfaccia utente Modern.</p> <p> Più si guarda l'ancoraggio di scorrimento più veloce scorre.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.2 Come posso utilizzare la funzione Scorrimento in TD Control ?, pagina 18</i></p>
	Clic destro	<p>Azione che esegue un singolo clic destro.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.3 Come posso eseguire un Clic destro in TD Control?, pagina 19</i></p>
	Clic e trascinamento	<p>Azione per spostare oggetti o selezionare aree.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guardare l'oggetto che si desidera spostare. • Selezionare l'azione Clic e tieni premuto. • Guardare la posizione di rilascio per l'oggetto. • Selezionare l'icona di rilascio che compare sullo schermo quando si mantiene lo sguardo sulla posizione di rilascio. <p>Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.4 Come posso utilizzare Clic e trascinamento in TD Control?, pagina 20</i></p>

Icona	Azione	Descrizione
	Tastiera	Azione che consente di aprire una tastiera sullo schermo abilitata alla digitazione mediante puntamento oculare. Questa azione si focalizza anche sull'area in cui l'utente esegue l'azione ovvero esegue un clic sinistro e apre la tastiera Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.5 Come posso attivare la Tastiera in TD Control?</i> , pagina 21.
	Regola target	Azione per l'affinamento dell'Interazione target sullo schermo. <ul style="list-style-type: none"> • Guardare la posizione in cui si desidera eseguire un'azione per aprire l'Interaction Menu. • Guardare l'azione Regola target • Affinare l'area target spostando il mirino nella finestra target con lo sguardo per posizionare il punto desiderato. • Selezionare l'azione da eseguire. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.6 Come posso utilizzare l'azione Regola target in TD Control?</i> , pagina 24
	Doppio clic	Azione che esegue un doppio clic sinistro. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.7 Come posso utilizzare Doppio clic in TD Control?</i> , pagina 24
	Clic sinistro	Azione che consente di eseguire un singolo clic sinistro o, per dispositivi a tocco, l'equivalente di un singolo tocco. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.8 Come posso utilizzare Clic sinistro in TD Control?</i> , pagina 24
	Guida	Azione che apre una pagina della guida.
	Annulla	Azione che annulla il Interaction Menu.

Tabella 3.3 Tasti di modifica

Icona	Azione	Descrizione
	Maiusc	Azione che consente di attivare/disattivare il tasto Maiusc della tastiera.
	Ctrl	Azione che consente di attivare/disattivare il tasto Ctrl della tastiera.
	Alt	Azione che consente di attivare/disattivare il tasto Alt della tastiera.

3.3 Menu fuori schermo in TD Control

In TD Control ci sono diversi menu fuori schermo. Un aspetto in comune è che tutti i menu fuori schermo sono basati sul contesto.

3.3.1 Menu fuori schermo

In Control è presente un menu fuori schermo principale chiamato Menu fuori schermo. I menu restanti hanno dei nomi propri.



Tabella 3.4 Menu fuori schermo

Icona	Azione	Descrizione
	Switcher	Azione che consente di aprire Switcher. Per ulteriori informazioni, vedere 6 Switcher, pagina 53
	Dashboard	Azione che consente di aprire il Dashboard. Per ulteriori informazioni, vedere 3.4 // Dashboard, pagina 15.
	Pausa	Azione che mette in pausa l'interazione fino alla selezione del pulsante Ripristina interazione oculare.
	Modalità continua	Azione che consente di aprire il Menu fuori schermo Modalità continua. Per ulteriori informazioni, vedere 3.3.1.1 Menu fuori schermo Modalità continua, pagina 12

3.3.1.1 Menu fuori schermo Modalità continua

In TD Control ci sono due (2) tipi di Modalità continua.

- Semplificato
- Avanzato

Per ulteriori informazioni sulla selezione della Modalità continua, vedere [5.4.1 Modalità continua, pagina 45.](#)

3.3.1.1.1 Menu fuori schermo Modalità continua semplificata



Tabella 3.5 Menu fuori schermo Modalità continua semplificata

Icona	Azione	Descrizione
	Guida	Azione che apre una pagina della guida.
	Mostra tracciamento	Azione che mostra/nasconde la traccia sullo schermo.
	Clic sinistro	Azione che esegue un clic sinistro singolo per ogni fissaggio. Per ulteriori informazioni, vedere Clic sinistro in <i>Tabella 3.2 Interaction Menu, pagina 10</i>
	Pausa	Azione che mette in pausa l'interazione fino alla selezione del pulsante Ripristina interazione oculare. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.2.3 Pausa in TD Control</i> .
	Annulla	Azione che consente di uscire dalla Modalità continua.

3.3.1.1.2 Menu fuori schermo Modalità continua avanzata



Tabella 3.6 Menu fuori schermo Modalità continua avanzata

Icona	Azione	Descrizione
	Guida	Azione che apre una pagina della guida.
	Regola target	Azione che esegue automaticamente la funzione Regola target per ciascuna selezione. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.6 Come posso utilizzare l'azione Regola target in TD Control?</i> , pagina 24
	Clic sinistro	Azione che esegue un clic sinistro singolo per ogni fissaggio. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.8 Come posso utilizzare Clic sinistro in TD Control?</i> , pagina 24.
	Clicca e tieni premuto	Azione che esegue la funzione Clicca e tieni premuto per ogni selezione. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.1.4 Come posso utilizzare Clic e trascinamento in TD Control?</i> , pagina 20.
	Tieni premuto e trascina	Azione che esegue la funzione Tieni premuto e trascina per ogni selezione fino al momento in cui l'utente decide di terminarla. Utile specialmente quando si usa un software come Photoshop o Paint per disegnare. <ul style="list-style-type: none"> ● Guardare dove si trova il punto iniziale di Tieni premuto e trascina sullo schermo. ● Attivare la funzione. ● Spostare lo sguardo nel punto sullo schermo. Lo sguardo sarà tracciato. ● Guardare la posizione di rilascio per l'oggetto. ● Selezionare l'icona di rilascio che compare sullo schermo quando si mantiene lo sguardo sulla posizione di rilascio.
	Annulla	Azione che consente di uscire dalla Modalità continua.

3.3.2 Tastiera Menu fuori schermo

Tastiera Menu fuori schermo viene visualizzata sullo schermo quando sono visibili le azioni Tastiera o Blocco appunti.



Figura 3.2 Il Dashboard.

Tabella 3.7 Tastiera Menu fuori schermo

Icona	Azione	Descrizione
	Guida	Azione che apre una pagina della Guida .
	Blocco appunti	Azione che apre la funzione Blocco appunti . Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.3.6 Come posso accedere a Blocco appunti in TD Control?</i>

Icona	Azione	Descrizione
 	Nascondi Blocco appunti	Azione che nasconde il Blocco appunti . Viene visualizzata un'icona diversa a seconda che il Blocco appunti si apra sopra o sotto la tastiera.
 	Sposta tastiera	Azione che sposta la tastiera nella parte superiore o inferiore dello schermo in base al punto in cui viene aperta.
	Ridimensiona	Azione che modifica la dimensione della tastiera
	Pausa	Azione che mette in pausa l'interazione fino alla selezione del pulsante Ripristina interazione oculare. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.2.3 Pausa in TD Control</i> .
	Lingua rapida	Azione che apre la pagina delle lingue per accedere velocemente alla modifica della lingua della tastiera.
	Annulla	Azione che annulla il Dashboard.

3.4 Il Dashboard



Figura 3.3 Il Dashboard.

Tabella 3.8 Il Dashboard

Icona	Azione	Descrizione
	Impostazioni	Azione che apre le impostazioni di TD Control. Per ulteriori informazioni, vedere <i>5 Impostazioni di TD Control</i> .
	Blocco appunti	Azione che apre la funzione Blocco appunti. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.3.6 Come posso accedere a Blocco appunti in TD Control?</i>
	Calibrazione rapida	Azione che apre la calibrazione rapida. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.3.3 Come posso eseguire rapidamente una Calibrazione in TD Control?</i>
	Sospendi	Azione che imposta il dispositivo in modalità sospensione. Per ulteriori informazioni, vedere <i>4.3.4 In che modo posso mettere in standby il mio dispositivo con TD Control?, pagina 31</i>
	Guida	Azione che apre una pagina della guida.
	Esci da TD Control	Azione che consente di chiudere e uscire dal software TD Control.
	Annulla	Azione che annulla il Dashboard.



Tabella 3.9 Pannello scorciatoie

Icona	Azione	Descrizione
	copia	Azione che copia l'elemento/il testo selezionato.
	incolla	Azione che incolla l'elemento/il testo copiato/tagliato.
	taglia	Azione che taglia l'elemento/il testo selezionato.

3.5 Finestra dello Stato del tracciamento

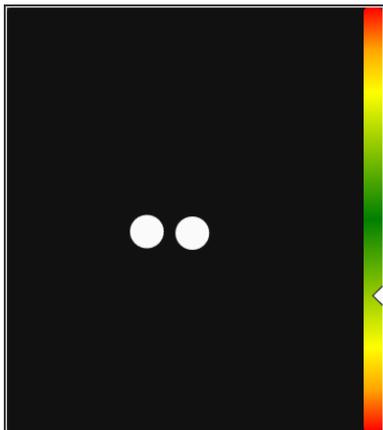


Figura 3.4 Finestra dello Stato del tracciamento

La funzione **Stato del tracciamento** controlla se l'utente è correttamente posizionato di fronte all'eye tracker.

- Due (2) puntini bianchi — Gli occhi dell'utente e come sono posizionati verso lo schermo. Per un posizionamento ottimale, i puntini bianchi devono essere al centro dell'area nera.
- Barra a colori a sinistra con freccia bianca: indicatore della lontananza o vicinanza dell'utente rispetto allo schermo.
 - Se la freccia bianca si trova al centro dell'area verde della barra, l'utente è alla distanza ottimale dallo schermo.
 - Se la freccia si trova sulla parte inferiore della barra: è necessario che l'utente si avvicini allo schermo.
 - Se la freccia si trova sulla parte superiore della barra: è necessario che l'utente si allontani dallo schermo.

3.6 Nessun eye tracker collegato

Se nessun eye tracker è collegato al dispositivo o se qualcuno lo scollega, saranno visualizzate le informazioni seguenti:



Nessun eye tracker collegato

Quando l'eye tracker viene collegato/ricollegato, il messaggio scompare automaticamente.

4 Utilizzo di TD Control

TD Control consente agli utenti di controllare un sistema operativo Windows standard con un metodo di selezione a due passi, in modo da ridurre il rischio di clic involontari.

i La maggior parte delle funzioni/azioni di TD Control sono accessibili tramite tocco e mouse allo scopo di agevolare il lavoro di assistenti e badanti secondo necessità, che possono infatti selezionare molto più facilmente un'azione oppure modificare le impostazioni per l'utente.


L'accesso alla funzione Interaction Menu non può essere eseguito senza un eye tracker.

4.1 Le azioni nell'Interaction Menu

4.1.1 In che modo posso eseguire un'azione con TD Control?

1. Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

2. Selezionare l'icona  (Attivatore).
Si aprirà Interaction Menu.

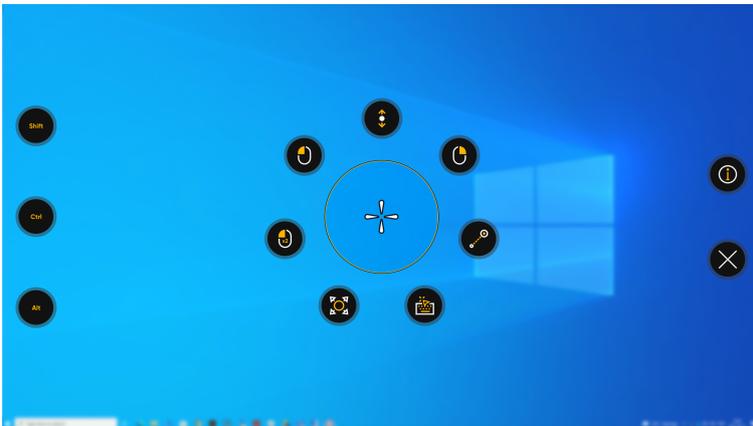

3. Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita. Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

- a. Selezionare l'icona  (Regola target).
- b. Spostare con lo sguardo la traccia nella finestra target fino a individuare il punto preciso della scelta. Il mirino si sposterà nella nuova posizione.
- c. Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

4. Selezionare l'azione da eseguire da Interaction Menu o selezionare il pulsante (Chiudi) per annullare.

4.1.2 Come posso utilizzare la funzione Scorrimento in TD Control ?



1. Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

2. Selezionare l'icona  (Attivatore).

Si aprirà Interaction Menu.

3. Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita. Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

- a. Selezionare l'icona  (Regola target).
- b. Spostare con lo sguardo la traccia nella finestra target fino a individuare il punto preciso della scelta. Il mirino si sposterà nella nuova posizione.
- c. Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

4. Selezionare l'icona  dall'Interaction Menu. Un ancoraggio di scorrimento verrà posizionato sullo schermo dove è stato collocato il mirino.

5. Selezionare la direzione verso la quale eseguire lo scorrimento:
 - Guardare sopra l'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso l'alto.
 - Guardare sotto l'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso il basso.
 - Guardare a sinistra dell'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso sinistra.
 - Guardare a destra dell'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso destra.
 - Guardare l'area attorno all'ancoraggio di scorrimento per mettere in pausa lo scorrimento.



Più si guarda l'ancoraggio di scorrimento più veloce scorre.



Per la massima flessibilità, prendere in considerazione il posizionamento dell'ancoraggio verso il centro dell'area di scorrimento.

6. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dallo scorrimento.

4.1.3 Come posso eseguire un **Clic destro** in TD Control?




1. Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.
2. Selezionare l'icona  (Attivatore). Si aprirà Interaction Menu.
3. Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita. Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.
 - a. Selezionare l'icona  (Regola target).
 - b. Spostare con lo sguardo la traccia nella finestra target fino a individuare il punto preciso della scelta. Il mirino si sposterà nella nuova posizione.
 - c. Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.
4. Selezionare l'icona  dall'Interaction Menu.


4.1.4 Come posso utilizzare **Clic e trascinamento** in TD Control?



1. Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.
2. Selezionare l'icona  (Attivatore).
Si aprirà Interaction Menu.
3. Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita. Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.
 - a. Selezionare l'icona  (Regola target).
 - b. Spostare con lo sguardo la traccia nella finestra target fino a individuare il punto preciso della scelta. Il mirino si sposterà nella nuova posizione.
 - c. Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.
4. Selezionare l'icona  dall'Interaction Menu.
5. Selezionare la nuova posizione per l'oggetto.
Verrà visualizzata una linea di indicazione tra la vecchia e la nuova posizione della traccia.

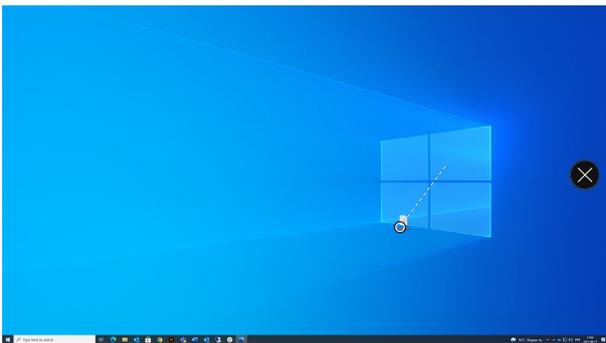


6. Fissare lo sguardo sulla nuova posizione.
Sullo schermo verrà visualizzata un'icona di rilascio all'esterno della traccia.

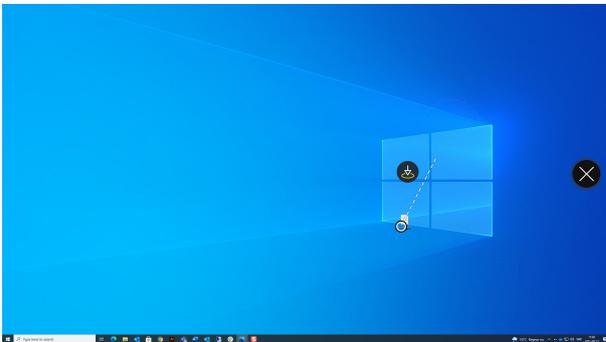

7. Selezionare l'azione  (Rilascia) per rilasciare l'oggetto in corrispondenza della nuova posizione.

Viene visualizzata l'azione Regola target.

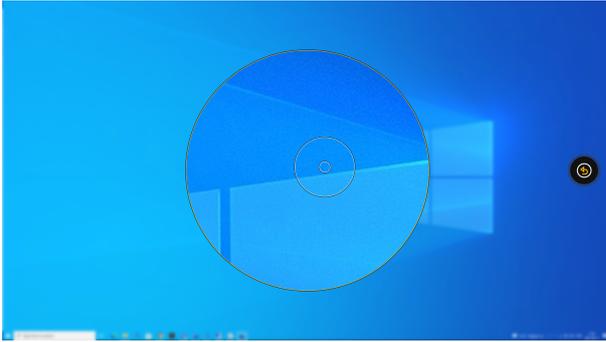

8. Selezionare il punto preciso per la nuova posizione.
9. L'oggetto si trova ora in una nuova posizione.

4.1.5 Come posso attivare la Tastiera in TD Control?

La tastiera viene usata per inserire il testo in un documento, inserire il testo in una barra di ricerca e selezionare Rinomina in un menu per rinominare un documento.



1. Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.
2. Selezionare l'icona  (Attivatore).
Si aprirà Interaction Menu.
3. Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita. Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.
 - a. Selezionare l'icona  (Regola target).
 - b. Spostare con lo sguardo la traccia nella finestra target fino a individuare il punto preciso della scelta. Il mirino si sposterà nella nuova posizione.
 - c. Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.
4. Selezionare l'icona  dall'Interaction Menu.
5. Se necessario, utilizzare i pulsanti  (Sposta tastiera su) o  (Sposta tastiera giù) per spostare la tastiera.

4.1.5.1 Tastiera

Selezionando la funzione Tastiera  dall'Interaction Menu, tale funzione verrà avviata come tastiera su schermo. La tastiera si apre sempre sul lato opposto dello schermo rispetto all'area di interazione. È possibile spostare la tastiera utilizzando i pulsanti  (Sposta tastiera su) o  (Sposta tastiera giù) disponibili quando la tastiera è attiva sullo schermo.

A seconda della lingua, la tastiera è composta da quattro-cinque (4-5) pagine, in base alla lingua. L'utente può facilmente spostarsi tra le varie pagine della tastiera selezionando uno di questi pulsanti ,  o  situati nell'angolo

superiore destro della schermata o **F1..F12** ubicato nell'angolo superiore sinistro nelle pagine Numeri ed Caratteri aggiuntivi.

Il tasto della tastiera osservato dall'utente è contraddistinto da una cornice chiara che circonda il carattere o la funzione



sul tasto e, quando il tasto viene selezionato, cambia brevemente assumendo il colore di attivazione impostato



Le pagine della tastiera sono le seguenti:

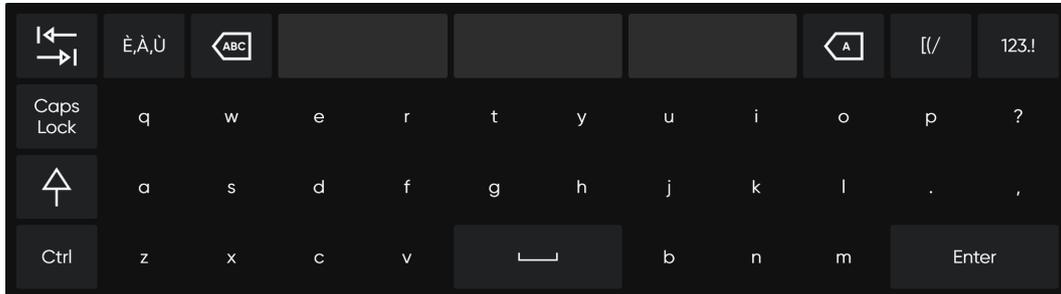


Figura 4.1 Pagina Tastiera

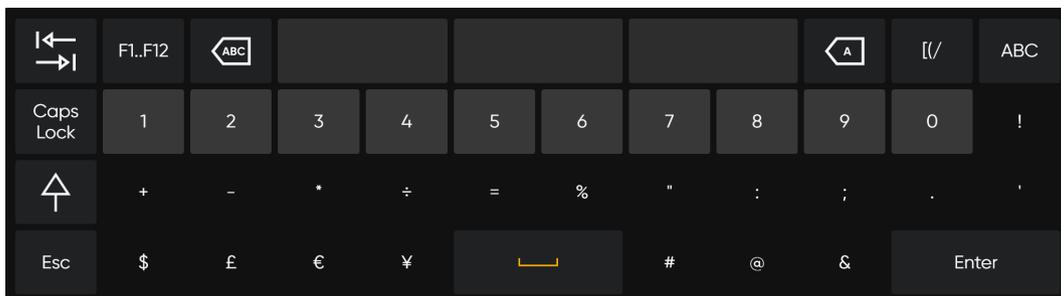


Figura 4.2 Pagina Numeri

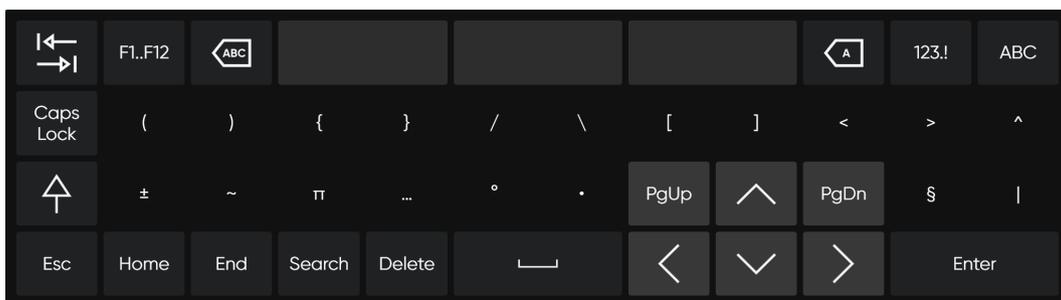


Figura 4.3 Pagina Caratteri aggiuntivi

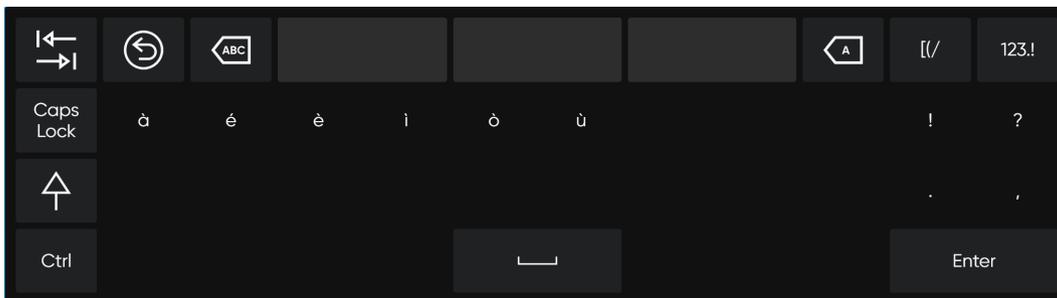


Figura 4.4 Pagina Specifica della lingua

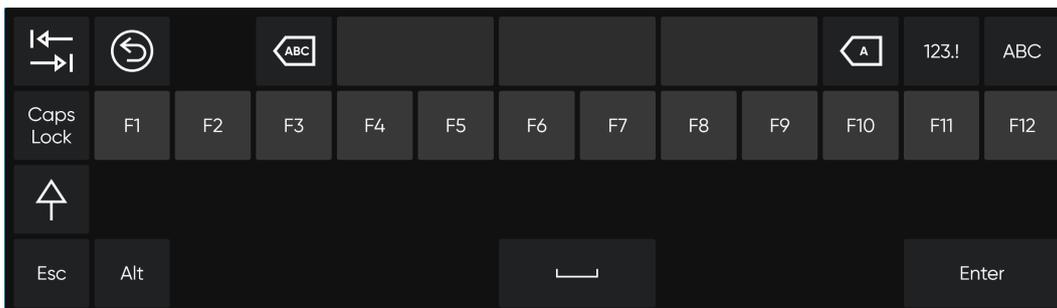


Figura 4.5 Pagina Tasti funzione

Per cambiare la lingua della tastiera e altre impostazioni per la tastiera, vedere *5 Impostazioni di TD Control, pagina 33*.

4.1.5.1.1 Predizione parole

Il motore di predizione parole utilizzato in TD Control è di SwiftKey™ e viene comunemente utilizzato in tablet e smartphone. SwiftKey™ utilizza diverse tecnologie di intelligenza artificiale per prevedere la parola successiva che l'utente intende digitare. SwiftKey™ apprende dal testo che l'utente ha scritto in precedenza e visualizza suggerimenti basati sul testo immesso e sul testo appreso. La lingua della funzione Scrittura facilitata parole cambierà in base all'impostazione di Lingua tastiera.

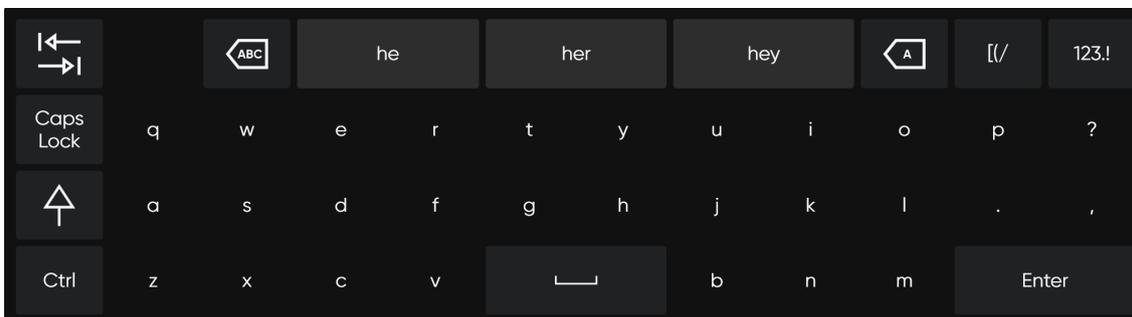


Figura 4.6 Tastiera con funzione Scrittura facilitata parole attivata

Quando Predizione parole è in uso, sulla tastiera vengono visualizzate tre (3) caselle. Nella casella all'estrema sinistra è visualizzata la parola più probabile, mentre le due (2) caselle rimanenti contengono ciascuna una parola prevista. Per selezionare una parola prevista, selezionare una casella contenente la parola corretta. Se la parola desiderata non è presente, continuare a digitare caratteri finché non viene visualizzata la parola desiderata.



Se si utilizza la funzione Predizione parole e si desidera digitare una parola che contiene un accento, come caffè, lasciare che sia la funzione a farlo, evitando sforzi e perdite di tempo. Digitando “caffè” si otterrà come suggerimento la parola “caffè”.

4.1.6 Come posso utilizzare l'azione **Regola target** in TD Control?



L'azione Regola target viene utilizzata per affinare il punto di attivazione all'interno della finestra target. Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita.

Affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

1. Selezionare l'icona  (Regola target).
2. Spostare con lo sguardo la traccia nella finestra target fino a individuare il punto preciso della scelta. Il mirino si sposterà nella nuova posizione.
3. Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

4.1.7 Come posso utilizzare **Doppio clic** in TD Control?



1. Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.
2. Selezionare l'icona  (Attivatore).
Si aprirà Interaction Menu.
3. Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita. Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.
 - a. Selezionare l'icona  (Regola target).
 - b. Spostare con lo sguardo la traccia nella finestra target fino a individuare il punto preciso della scelta. Il mirino si sposterà nella nuova posizione.
 - c. Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.
4. Selezionare l'icona  dall'Interaction Menu.

4.1.8 Come posso utilizzare **Clic sinistro** in TD Control?



1. Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.
2. Selezionare l'icona  (Attivatore).
Si aprirà Interaction Menu.
3. Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita. Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

- a. Selezionare l'icona  (Regola target).
 - b. Spostare con lo sguardo la traccia nella finestra target fino a individuare il punto preciso della scelta. Il mirino si sposterà nella nuova posizione.
 - c. Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.
4. Selezionare l'icona  dall'Interaction Menu.

4.2 Azioni nel Menu fuori schermo




4.2.1 Come posso attivare Switcher in TD Control?

Con Switcher, l'utente può spostarsi tra software attivi e avviare le applicazioni di Tobii Dynavox.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'azione  (Switcher). Switcher si aprirà.

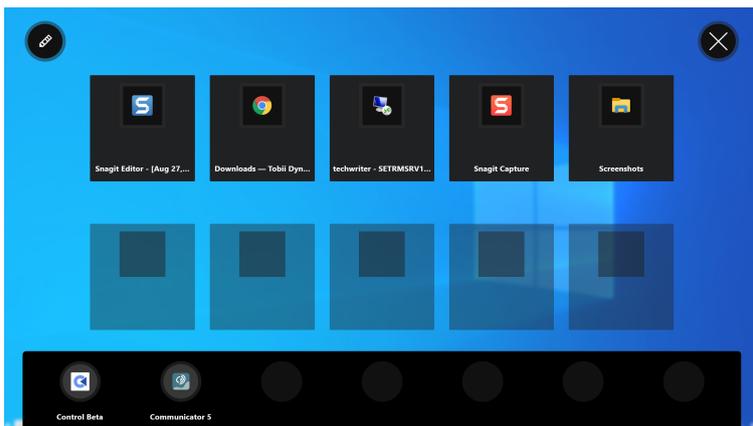

Per ulteriori informazioni su Switcher, vedere [6 Switcher, pagina 53](#)..

4.2.2 Come posso attivare la Dashboard in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.



2. Selezionare l'icona  (Dashboard).

Il Dashboard si aprirà.



Figura 4.7 Il Dashboard.

Per ulteriori informazioni, vedere *4.3 Azioni su Dashboard*, pagina 29

4.2.3 Pausa in TD Control

L'uso dell'interazione oculare è un'attività fisica ripetuta, pertanto, i muscoli utilizzati intorno agli occhi possono affaticarsi. La pausa dell'interazione oculare non solo offre tempo per guardare lo schermo senza interagire ma garantisce agli occhi anche tempo per riposare.

4.2.3.1 Come posso mettere in pausa l'eye tracking in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Pausa).

Verrà mostrata brevemente un'icona arancione di pausa  sullo schermo e ci sarà un bordo arancione attorno ai bordi esterni della schermata per indicare che TD Control è in pausa.



4.2.3.2 Come faccio a capire se l'eye tracking è in pausa in TD Control?

Ci sarà un bordo arancione attorno ai bordi esterni della schermata.



4.2.3.3 Come posso mettere ripristinare l'eye tracking in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.

L'icona  (Ripristina interazione oculare) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo..

2. Selezionare l'icona  (Ripristina interazione oculare) per ripristinare l'eye tracking in TD Control.

4.2.4 Modalità continue in TD Control

In TD Control ci sono due (2) diverse modalità di Azioni continue:

- Azioni continue avanzate
- Azioni continue semplici

Per ulteriori informazioni sulle modalità Azioni continue, vedere [3.3.1.1 Menu fuori schermo Modalità continua](#), pagina 12.

4.2.4.1 Come posso eseguire un'Azione continua in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'azione  (Clic continuo).

Si aprirà il menu fuori schermo continuo.



3. Selezionare una delle Azioni continue disponibili.
4. Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.




L'Azione continua selezionata rimane attiva fino a quando l'utente non cambia o esce dall'azione.



Se desiderato, TD Control può essere impostato per aprirsi in una di queste modalità.

4.2.4.2 Come posso cambiare l'Azione continua selezionata in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Si aprirà il Menu fuori schermo continuo.

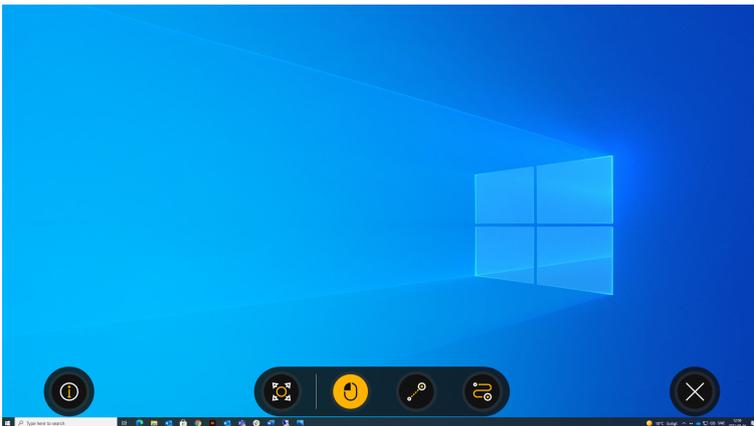


Le Azioni continue selezionate hanno uno sfondo arancione.

2. Selezionare una delle Azioni continue disponibili.

4.2.4.3 Come posso uscire dall'Azione continua selezionata in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.

Si aprirà il menu fuori schermo continuo.

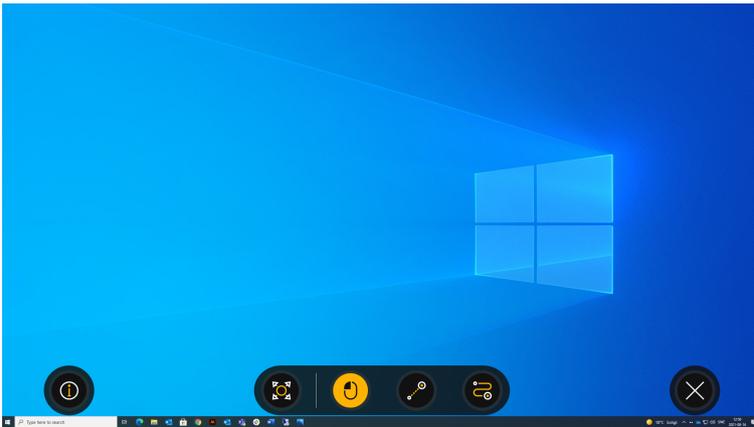

Le Azioni continue selezionate hanno uno sfondo arancione.


2. Selezionare l'icona  (Chiudi) per interrompere l'Azione continua.

4.3 Azioni su Dashboard

4.3.1 Come posso attivare il Dashboard in TD Control?

Il Dashboard è nascosto, quindi non interferirà né/o distrarrà l'utente. Per richiamare il Dashboard, seguire questi passaggi.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

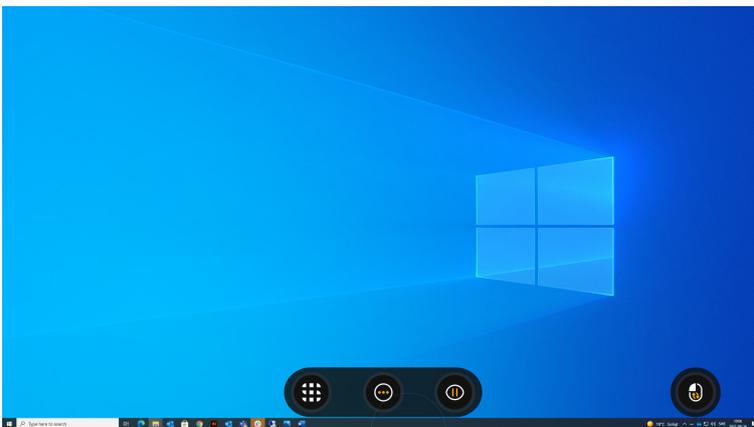

2. Selezionare l'icona  (Dashboard).


Si aprirà Dashboard.



4.3.2 Come posso attivare un'azione dal Dashboard in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.

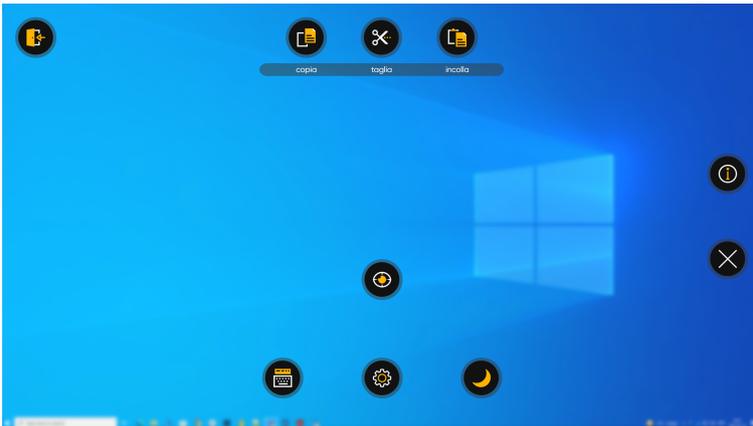

3. Selezionare l'azione da eseguire dal Dashboard o selezionare il pulsante di chiusura per annullare.


4.3.3 Come posso eseguire rapidamente una **Calibrazione** in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Calibrazione rapida).

4. Provare la calibrazione guardando diversi target.

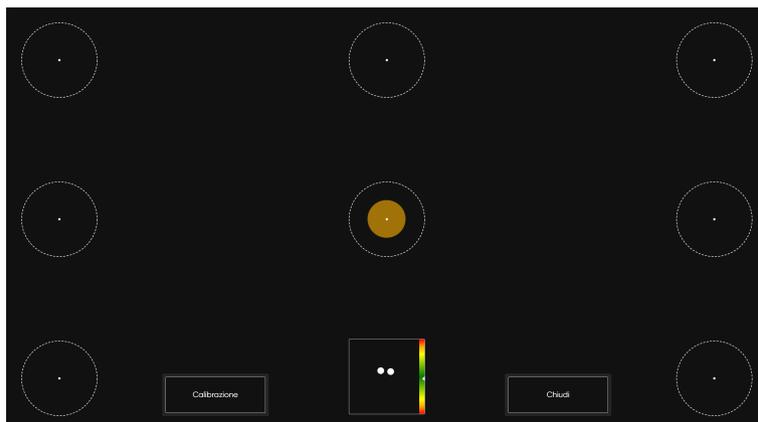

5. Se necessario, selezionare il pulsante **Calibra**.
6. Guardare i puntini di colore arancione, uno alla volta, visualizzati sullo schermo fino a quando non spariscono.
7. Provare la nuova calibrazione.
8. Ripetere i punti 7– 9 fino a ottenere quanto desiderato.
9. Selezionare il pulsante **Chiudi**.

Per ulteriori informazioni sulla Calibrazione, vedere *5.2.1 Come funziona il processo di calibrazione in TD Control?*, pagina 37.

4.3.4 In che modo posso mettere in standby il mio dispositivo con TD Control?



L'uso di questa funzione implica che qualcun altro dovrà attivare il dispositivo perché non è presente alcuna funzione wake-on-gaze.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard).
3. Selezionare l'icona  (Sospendi).
4. Selezionare uno dei seguenti pulsanti:
 - **Sospendi** - Consente di mettere in standby il dispositivo.
 - **Annulla** - Consente di annullare lo stato di standby del dispositivo.

4.3.5 Come posso accedere alle Impostazioni in TD Control?




1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per accedere alle impostazioni di TD Control. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni disponibili, vedere *5 Impostazioni di TD Control*, pagina 33.

4.3.6 Come posso accedere a **Blocco appunti** in TD Control?




1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Blocco appunti) per aprire il Blocco appunti.

5 Impostazioni di TD Control

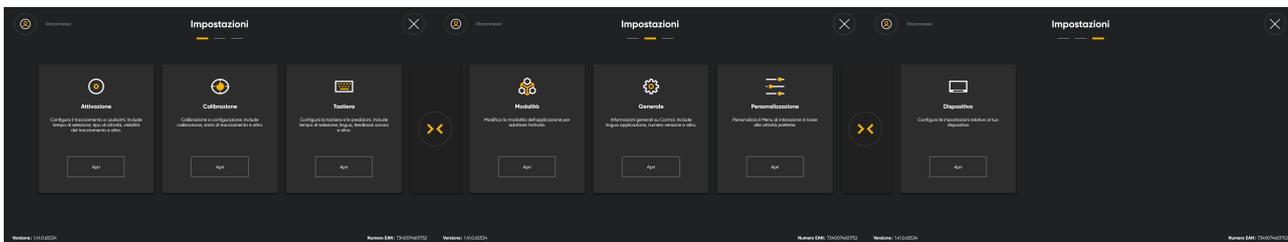

Icone	Azione	Descrizione
	Attivazione	Apri le impostazioni Attivazione e feedback . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.1 Attivazione</i> , pagina 33.
	Calibrazione	Apri le impostazioni Calibrazione . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.2 Calibrazione</i> , pagina 37.
	Tastiera	Apri le impostazioni Barra delle applicazioni . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.3 Tastiera</i> , pagina 41.
	Modalità	Apri le impostazioni Modalità . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.4 Modalità</i> , pagina 45
	Generale	Apri le impostazioni Generali . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.5 Generale</i> , pagina 46
	Personalizzazione	Apri le impostazioni Personalizzazione . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.6 Personalizzazione</i> , pagina 48
	Dispositivo	Apri le impostazioni Dispositivo . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.7 Dispositivo</i>
	Il mio account	Apri Il mio account . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.8 Il mio account</i> , pagina 51.

5.1 Attivazione

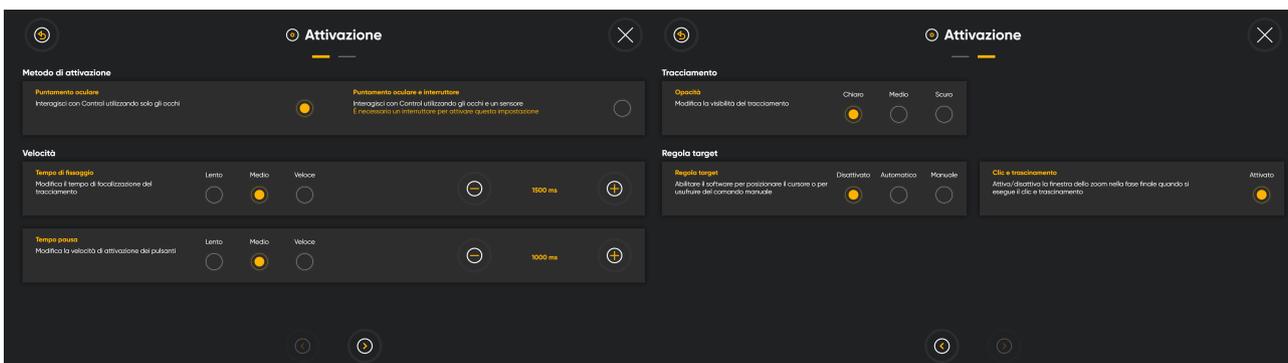

5.1.1 Metodo di attivazione

5.1.1.1 Come posso cambiare il Metodo di attivazione in TD Control

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.

4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Metodo di attivazione**.

7. Selezionare uno dei seguenti pulsanti di opzione:

- **Puntamento oculare** - Consente di interagire con Control utilizzando solo gli occhi
- **Puntamento oculare e sensore** - Consente di interagire con Control utilizzando gli occhi e un sensore



È necessario un sensore per attivare questa impostazione.

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.1.2 Velocità

5.1.2.1 In che modo posso selezionare il Tempo di fissazione per la traccia in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.

4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Velocità**.

7. Selezionare il pulsante di opzione **Tempo di fissazione** scegliendo uno tra i seguenti valori:

- **Lento** (impostazione predefinita)
- **Medio**
- **Veloce**

8. Regolare il tempo con i pulsanti  e , secondo necessità.

9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.

10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.1.2.2 In che modo posso cambiare/impostare il **Tempo di selezione** per la traccia in TD Control?

Il tempo di selezione è il tempo durante il quale l'utente deve guardare le voci di un'azione nell'Interazione e nei menu fuori schermo per attivare l'azione selezionata.

 Questa impostazione riguarda solo il tempo di selezione dei pulsanti. C'è anche un'impostazione relativa al tempo di selezione per la tastiera. Per ulteriori informazioni, vedere 5.3.2.1 *In che modo posso cambiare/impostare il **Tempo di selezione** per la tastiera in TD Control?*.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Velocità**.
7. Selezionare il pulsante di opzione **Tempo di selezione** scegliendo uno tra i seguenti valori:
 - **Lento** (impostazione predefinita)
 - Medio
 - Veloce

8. Regolare il tempo con i pulsanti  e  , secondo necessità.
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.1.3 Tracciamento

5.1.3.1 In che modo posso cambiare/impostare l'**Opacità** per la traccia in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) per passare alla pagina delle impostazioni successiva.
7. Guardare nella sezione **Traccia**.
8. Selezionare il pulsante di opzione per l'**Opacità** scegliendo uno tra i seguenti valori:
 - **Luminoso** (impostazione predefinita)
 - Medio
 - Scuro
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.1.4 Regola target

5.1.4.1 Come posso selezionare il modo in cui Regola target funzionerà in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) per passare alla pagina delle impostazioni successiva.
7. Guardare nella sezione **Regola target**.
8. Selezionare il pulsante di opzione **Regola target** scegliendo uno tra i seguenti valori:
 - **Disattivato** (predefinito) - Selezionare manualmente l'azione Regola target da Interaction Menu quando è necessario regolare il target.
 - **Auto** - Control regolerà il target al posto dell'utente. Il sistema apprenderà e si adatterà sempre meglio all'utente con il passare del tempo.
 - **Manuale** - Regola target sarà avviato automaticamente in concomitanza con lo sguardo dell'utente per selezionare il punto target prima che il Interaction Menu si apra per selezionare l'azione desiderata.




Gli utenti con interazione oculare meno accurata possono beneficiare della regolazione manuale del target.

9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.1.4.2 Come seleziono il comportamento della Finestra dello zoom per **Clic e trascina** in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) per passare alla pagina delle impostazioni successiva.
7. Guardare nella sezione **Regola target**.
8. Selezionare il pulsante di opzione **Clicca e trascina** per attivare/disattivare la finestra dello zoom nel passaggio finale quando si esegue l'azione **Clic e trascina**.
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.2 Calibrazione

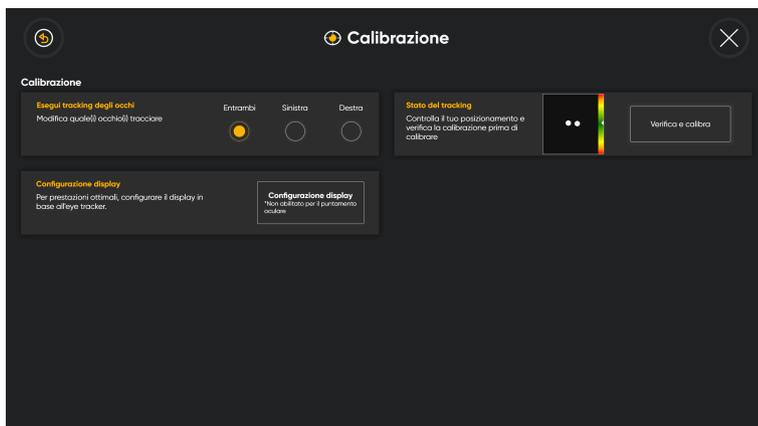

5.2.1 Come funziona il processo di calibrazione in TD Control?


Il processo di calibrazione funziona nel modo seguente:

Quando viene avviata una calibrazione, a prescindere che si tratti di una Calibrazione rapida o normale, verrà mostrata la pagina Testare la calibrazione. Questa pagina consente di valutare la qualità della calibrazione.


All'interno di questa schermata sono presenti dei cerchi con al centro un piccolo punto. Il punto arancione indica dove sta guardando l'utente. Fissando lo sguardo su uno dei punti, si mostra dove l'eye tracker registra la fissazione in quel punto nonché l'entità dello scostamento.



Se il cerchio arancione si trova all'interno del cerchio bianco punteggiato, allora la calibrazione sarà sufficientemente buona per l'utilizzo di TD Control.

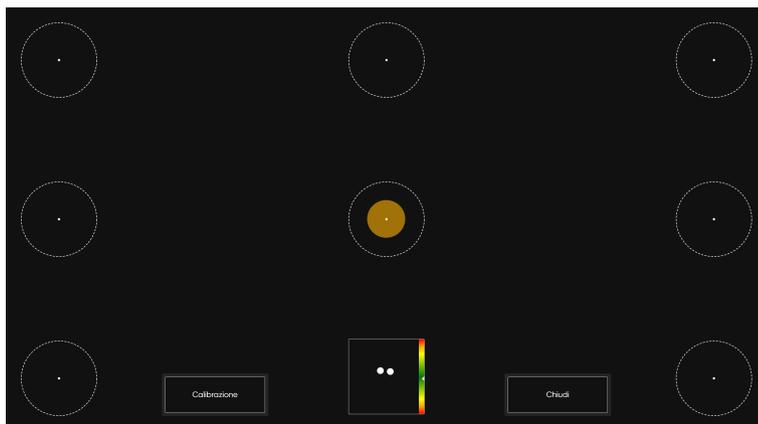

Quando si seleziona il pulsante Calibra, viene visualizzata la prima schermata di calibrazione. Si tratta di una schermata nera e, al centro, c'è un singolo punto arancione con centro nero.

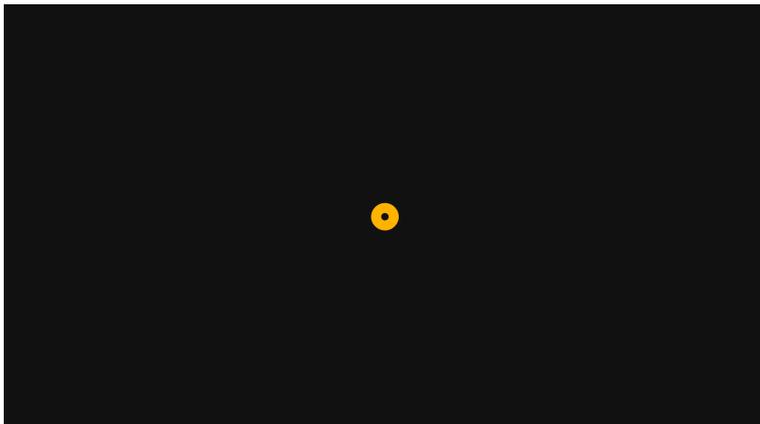

Nulla accade finché l'utente non fissa lo sguardo sul punto, l'eye tracker registra la fissazione e il punto lampeggia una volta per poi scomparire.



Fino a quando il puntino rimane sullo schermo, l'Eye Tracker non ha registrato i dati dell'interazione oculare per tale posizione.

Verrà visualizzata una nuova schermata. Si tratta di una schermata nera e, nei quattro angoli, sarà presente un punto arancione con il centro nero.



Nulla accade finché l'utente non fissa lo sguardo su uno dei punti, l'eye tracker registra la fissazione su tale punto e il punto lampeggia una volta per poi scomparire.



Fino a quando il puntino rimane sullo schermo, l'Eye Tracker non ha registrato i dati dell'interazione oculare per tale posizione.

Dopo che l'utente ha fissato lo sguardo su tutti i punti della schermata, che sono gradualmente scomparsi, il processo di calibrazione termina e viene nuovamente visualizzata la schermata di test della calibrazione.

Provare la calibrazione guardando i cerchi nella schermata. Chiudere la schermata di calibrazione o avviare una nuova calibrazione secondo necessità.

5.2.2 Come posso selezionare l'occhio di cui eseguire il tracciamento in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Calibrazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Calibrazione**.
7. Selezionare il pulsante di opzione **Esegui tracking degli occhi** scegliendo uno tra i modi seguenti con cui l'eye tracker deve eseguire il tracking degli occhi dell'utente:
 - **Entrambi** (impostazione predefinita)
 - Sinistra
 - Destra
8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.


5.2.3 In che modo posso controllare il posizionamento dell'utente utilizzando **Stato del tracciamento** in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Calibrazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Controllare il posizionamento dell'utente guardando nella finestra **Stato del tracciamento**. Per ulteriori informazioni, vedere *3.5 Finestra dello Stato del tracciamento*
7. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
8. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.2.4 In che modo posso **Calibrare** un utente in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Calibrazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Controllare il posizionamento dell'utente guardando nella finestra **Stato del tracciamento**. Per ulteriori informazioni, vedere *3.5 Finestra dello Stato del tracciamento*
7. Selezionare il pulsante **Verifica e calibra**.

Si aprirà la pagina Controlla calibrazione.

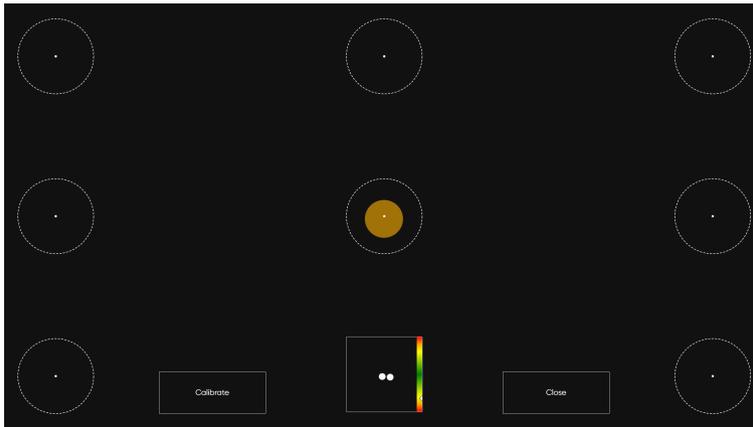

8. Selezionare il pulsante **Calibra**.
9. Guardare i puntini di colore arancione, uno alla volta, visualizzati sullo schermo fino a quando non spariscono.
10. Provare la nuova calibrazione.
11. Ripetere i punti 7– 9 fino a ottenere quanto desiderato.
12. Selezionare il pulsante **Chiudi**.

5.2.5 Come posso modificare la Configurazione display del mio eye tracker in TD Control?


1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Calibrazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante **Configurazione display**.

 Questo pulsante non è abilitato per il puntamento oculare e deve essere selezionato tramite tocco o mouse.

7. Attenersi alle istruzioni visualizzate.
8. Selezionare il pulsante **Fine**
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.3 Tastiera

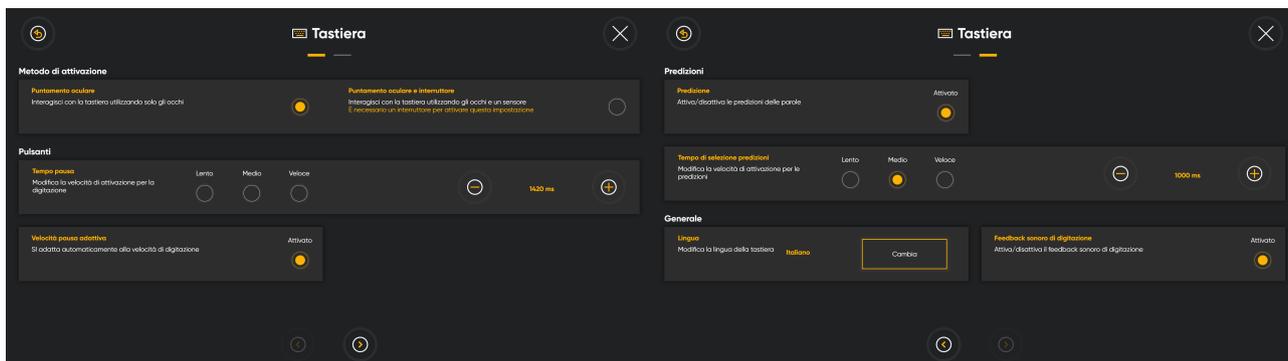

Lingua

Viene visualizzato il layout di tastiera per la lingua selezionata. Selezionare il pulsante **Modifica** per impostare un'altra lingua per il layout di tastiera. Sono disponibili differenti layout di tastiera a seconda della lingua.

5.3.1 Metodo di attivazione

5.3.1.1 Come posso cambiare il Metodo di attivazione in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.

4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Metodo di attivazione**.

7. Selezionare uno dei seguenti pulsanti di opzione:

- **Puntamento oculare** - Consente di interagire con Control utilizzando solo gli occhi
- **Puntamento oculare e sensore** - Consente di interagire con Control utilizzando gli occhi e un sensore



È necessario un sensore per attivare questa impostazione.

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.3.2 Pulsanti

5.3.2.1 In che modo posso cambiare/impostare il Tempo di selezione per la tastiera in TD Control?



Questa impostazione riguarda solo il tempo di selezione della tastiera. C'è anche un'impostazione relativa al tempo di selezione per i pulsanti. Per ulteriori informazioni, vedere 5.1.2.2 *In che modo posso cambiare/impostare il Tempo di selezione per la traccia in TD Control?*

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.

Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.
7. Selezionare il pulsante di opzione scegliendo uno tra i seguenti **Tempi di selezione** (ms):
 - **Lento** (impostazione predefinita)
 - Medio
 - Veloce
8. Regolare il tempo con i pulsanti  e , secondo necessità.
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.3.2.2 Come scelgo il comportamento della **Velocità pausa adattiva** in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.
7. Selezionare il pulsante di opzione per **Velocità selezione adattiva** per attivare/disattivare la Velocità selezione adattiva.
8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.3.3 Predizione

5.3.3.1 Come scelgo il comportamento delle **Predizioni** in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) per passare alla pagina delle impostazioni successiva.
7. Guardare nella sezione **Predizioni**.
8. Selezionare il pulsante di opzione per **Predizione** per attivare/disattivare la predizione parole.
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.3.3.2 In che modo posso cambiare/impostare il **Tempo di selezione predizioni** in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) per passare alla pagina delle impostazioni successiva.
7. Guardare nella sezione **Predizioni**.
8. Selezionare il pulsante di opzione scegliendo uno tra i seguenti **Tempi di selezione predizioni** (ms):
 - **Lento** (impostazione predefinita)
 - Medio
 - Veloce
9. Regolare il tempo con i pulsanti  e , secondo necessità.
10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni tastiera.
11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.3.4 Generale

5.3.4.1 In che modo posso cambiare/impostare la **Lingua** della tastiera in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) per passare alla pagina delle impostazioni successiva.
7. Guardare la sezione **Generali** in **Lingua**.
La lingua attiva sarà visualizzata dopo l'intestazione Lingue.
8. Selezionare il pulsante **Modifica**.
9. Assicurarsi che il pulsante **Installato** sia selezionato.

10. Selezionare la lingua desiderata.
11. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni tastiera.
12. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
13. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.3.4.2 In che modo posso scaricare nuova lingua della tastiera in TD Control?



Prima di continuare, assicurarsi che il dispositivo sia collegato a Internet.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) per passare alla pagina delle impostazioni successiva.
7. Guardare la sezione **Generali** in **Lingua**.
La lingua attiva sarà visualizzata dopo l'intestazione Lingue.
8. Selezionare il pulsante **Modifica**.
9. Selezionare il pulsante di **Scarica**.
10. Selezionare l'icona  (Scarica) per la lingua scelta.
11. Selezionare il pulsante **Installa** per scaricare la lingua selezionata.
12. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni tastiera.
13. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
14. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.3.4.3 Come scelgo il comportamento del Feedback sonoro di digitazione in TD Control?


1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) per passare alla pagina delle impostazioni successiva.
7. Guardare nella sezione **Generali**.

8. Selezionare il pulsante di opzione per **Feedback sonoro di digitazione** per attivare/disattivare il feedback sonoro di digitazione.

9. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) per passare alla pagina delle impostazioni successiva.

10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.4 Modalità

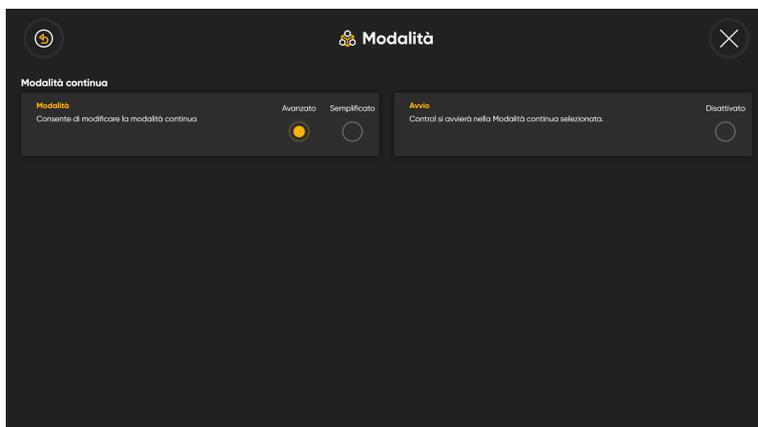

5.4.1 Modalità continua

5.4.1.1 Come scelgo il tipo di **Modalità continua** da utilizzare in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.

4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.

5. Cercare l'icona  (Modalità) per individuare la scheda impostazioni corretta.

6. Selezionare il pulsante **Apri**.

7. Guardare nella sezione **Modalità continua**.

8. Selezionare uno dei seguenti pulsanti di opzione in **Modalità**:

- Avanzato
- Semplificato

Per ulteriori informazioni, vedere 3.3.1.1 *Menu fuori schermo Modalità continua, pagina 12*.

9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni tastiera.

10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.


5.4.1.2 Come posso attivare/disattivare l'**Avvio** della Modalità continua in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.

Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Cercare l'icona  (Modalità) per individuare la scheda impostazioni corretta.
6. Selezionare il pulsante **Apri**.
7. Guardare nella sezione **Modalità continua**.
8. Selezionare il pulsante di opzione **Avvio** per attivare/disattivare l'avvio di Control nella modalità continua selezionata.
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni tastiera.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.5 Generale

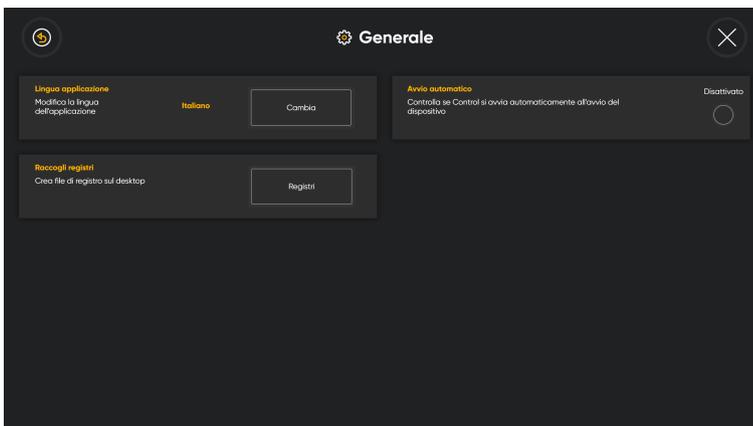

5.5.1 In che modo posso selezionare la Lingua applicazione per TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
6. Selezionare il pulsante **Apri**.
7. Guardare nella sezione **Lingua applicazione**.
La lingua attiva sarà visualizzata dopo l'instestazione Lingue.
8. Selezionare il pulsante **Modifica**.

9. Selezionare la lingua desiderata.
10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni **Generali**.
11. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
12. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.5.2 Come posso eseguire **Raccogli registri** per TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
6. Selezionare il pulsante **Apri**.
7. Guardare nella sezione **Raccogli registri**.
8. Selezionare il pulsante **Registro**.
9. Selezionare il pulsante **Si**.

 I registri saranno creati sul desktop.

10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.5.3 In che modo posso selezionare l'**Avvio automatico** in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
6. Selezionare il pulsante **Apri**.
7. Guardare nella sezione **Avvio automatico**.
8. Impostare l'interruttore **Avvio automatico** su **On** per avviare automaticamente TD Control all'avvio di Windows® sul dispositivo.
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.

10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.6 Personalizzazione



5.6.1 Come posso rimuovere un'azione dal Menu Interazione in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Cercare l'icona  (Personalizzazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
6. Selezionare il pulsante **Apri**.
7. Selezionare il pulsante  per l'azione da rimuovere.
8. Selezionare il pulsante **Rimuovi**.
9. Ripetere i punti 7 - 8 fino a ottenere quanto desiderato.
10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.6.2 Come posso aggiungere un'azione al Menu Interazione in TD Control?


1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.

4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Cercare l'icona  (Personalizzazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
6. Selezionare il pulsante **Apri**.
7. Selezionare il pulsante  (Aggiungi) per la posizione desiderata.
8. Selezionare l'**Azione** da aggiungere.
9. Selezionare il pulsante **Aggiungi**.
10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni tastiera.
11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.7 Dispositivo

 Questa funzione è disponibile solo su I-Series I-13 e I-16.

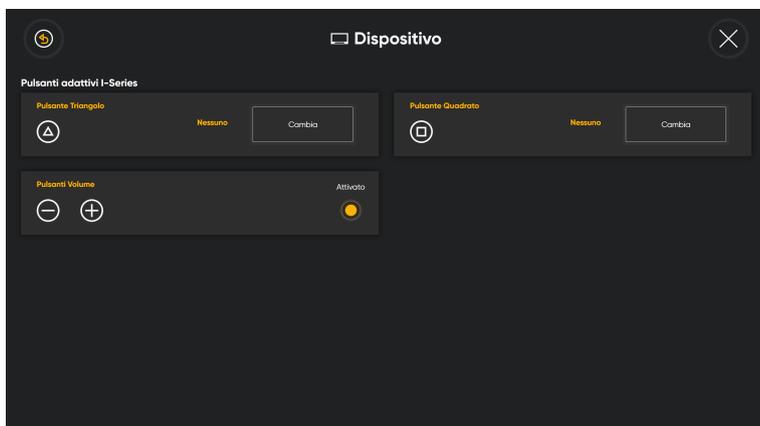

5.7.1 Pulsanti adattivi I-Series

5.7.1.1 Come posso impostare/cambiare l'azione del Pulsante Triangolo per I-Series in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
6. Cercare l'icona  (Dispositivo) per individuare la scheda impostazioni corretta.
7. Selezionare il pulsante **Apri**.
8. Selezionare il pulsante **Cambia** per la sezione Pulsante Triangolo

9. Selezionare il pulsante di opzione scegliendo uno tra le seguenti funzioni:

- Stato del tracking
- Calibra
- Switcher
- Tastiera
- **Nessuno** (predefinito)

10. Selezionare il pulsante **OK**.

11. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni tastiera.

12. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.7.1.2 Come posso impostare/cambiare l'azione del Pulsante Quadrato per I-Series in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.

4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.

5. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.

6. Cercare l'icona  (Dispositivo) per individuare la scheda impostazioni corretta.

7. Selezionare il pulsante **Apri**.

8. Selezionare il pulsante **Cambia** per la sezione Pulsante Triangolo

9. Selezionare il pulsante di opzione scegliendo uno tra le seguenti funzioni:

- Stato del tracking
- Calibra
- Switcher
- Tastiera
- **Nessuno** (predefinito)

10. Selezionare il pulsante **OK**.

11. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni **Generali**.

12. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.7.1.3 Come posso attivare/disattivare i Pulsanti Volume su I-Series in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker.
Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.

4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.

5. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.

6. Cercare l'icona  (Dispositivo) per individuare la scheda impostazioni corretta.
7. Selezionare il pulsante **Apri**.
8. Selezionare il pulsante di opzione per **Pulsanti Volume** per attivare/disattivare i Pulsanti Volume.
9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.

5.8 Il mio account

L'account gratuito myTobiiDynavox.com offre l'accesso a numerosi vantaggi, inclusa l'archiviazione cloud per il backup delle predizioni e delle impostazioni di sincronizzazione per più dispositivi.

5.8.1 Come posso creare un account per Il mio account in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Selezionare il pulsante  (Il mio account).
5. Selezionare il pulsante **Crea Account**.
6. Compilare tutti i campi utilizzando il pulsante  (Modifica) per ciascun valore.
7. Selezionare il pulsante di opzione per **accettare i Termini e condizioni**.



Selezionare il pulsante **Termini e condizioni** per leggere la sezione Termini e condizioni.

8. Selezionare il pulsante **Crea**.
Verrà inviata un'e-mail di verifica all'indirizzo e-mail fornito.
9. Accedere al proprio account e-mail.
10. Aprire l'**E-mail di conferma** da **Tobii Dynavox**.
11. Selezionare il pulsante **Verifica e-mail** nell'e-mail per verificare l'indirizzo e-mail.

5.8.2 Come posso effettuare l'accesso a Il mio account in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Il Menu fuori schermo diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare l'icona  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Control.
4. Selezionare il pulsante  (Il mio account).
5. Selezionare il pulsante  (Modifica) per l'**indirizzo e-mail**.
6. Inserire l'**indirizzo e-mail**.

7. Selezionare il pulsante  (Modifica) per la **password**.
8. Inserire la **Password**.
9. Selezionare il pulsante **Accedi**.
10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Control.
11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Control.


6 Switcher

Switcher è un'app di aiuto che consente di selezionare le app di Tobii Dynavox installate, le app in generale e aprire Windows.

6.1 Come posso accedere a Switcher in TD Control?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. L'app Switcher sarà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare Switcher 
Switcher si aprirà.

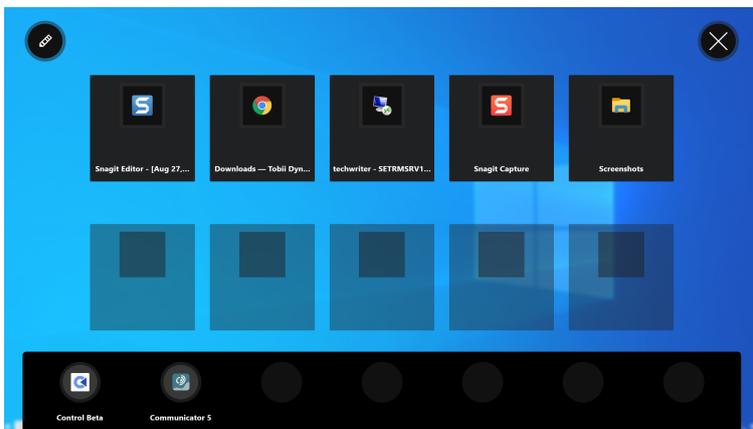


6.2 Come posso selezionare un'applicazione in Switcher?

 Se si desidera aggiungere un'applicazione non Tobii Dynavox, assicurarsi di avviare l'applicazione desiderata prima di procedere.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. L'app Switcher sarà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare Switcher 
3. Selezionare l'applicazione desiderata.

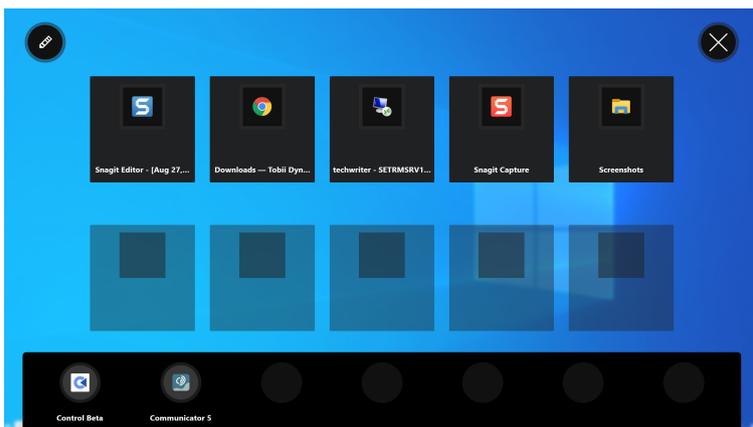

4. Selezionare il pulsante  (Fine) nell'angolo superiore sinistro.
5. Selezionare il pulsante  (Chiudi).

6.3 Come posso aggiungere un'applicazione a Switcher?

 Se si desidera aggiungere un'applicazione non Tobii Dynavox, assicurarsi di avviare l'applicazione desiderata prima di procedere.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. L'app Switcher sarà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare Switcher 
3. Selezionare il pulsante  (Modifica) nell'angolo superiore sinistro.
4. Selezionare il pulsante  (Aggiungi) per la posizione desiderata.
5. Selezionare la scheda corretta:
 - Tobii Dynavox
 - Applicazioni in esecuzione
6. Selezionare l'applicazione desiderata.
7. Selezionare il pulsante  (Fine) nell'angolo superiore sinistro.
8. Selezionare il pulsante  (Chiudi).

6.4 Come posso rimuovere un'applicazione da Switcher?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. L'app Switcher sarà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Selezionare Switcher 
3. Selezionare il pulsante  (Modifica) nell'angolo superiore sinistro.
4. Selezionare il pulsante  (Rimuovi) per la posizione desiderata.
5. Selezionare il pulsante **Rimuovi** per confermare.
6. Selezionare il pulsante  (Fine) nell'angolo superiore sinistro.
7. Selezionare il pulsante  (Chiudi).

Copyright ©Tobii Dynavox AB. Non tutti i prodotti e i servizi sono offerti in tutti i mercati locali. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Supporto per il dispositivo Tobii Dynavox

Informazioni disponibili online

Visitare la pagina del supporto specifica del prodotto per il dispositivo Tobii Dynavox in uso. Tale pagina include informazioni aggiornate sui problemi riscontrati, oltre a suggerimenti utili correlati al prodotto. Le pagine del supporto sono disponibili all'indirizzo: www.TobiiDynavox.com/support-training

Contatta il Consulente per la tua soluzione o il Rivenditore

Per domande o problemi relativi al prodotto, rivolgersi al consulente per la soluzione o al rivenditore autorizzato Tobii Dynavox. Gli operatori conoscono la configurazione personale dei clienti e possono offrire suggerimenti e informazioni mirate. Per i recapiti, visitare la pagina all'indirizzo www.TobiiDynavox.com/contact