

**TD Control**  
**Navodila za uporabo**



## Navodila za uporabo TD Control

Verzija 1.1

03/2022

Vse pravice zadržane.

Copyright © Tobii AB (publ)

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shraniti v sistem za obnavljanje ali ga prenašati v kakršni koli obliki in na kakršen koli način (elektronsko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače) brez predhodne pisne odobritve izdajatelja.

Avtorske pravice vključujejo vse oblike in zadeve materiala in informacij, ki jih zajemajo avtorske pravice in ki jih dovoljujejo zakonsko ali sodno pravo ali ki so odobrene v nadaljevanju, vključno z in brez omejitev glede materiala, ustvarjenega iz programske opreme, prikazane na zaslonu, npr. zaslonski prikazi, meniji itn.

Informacije v tem dokumentu so last družbe Tobii Dynavox. Vsakršno razmnoževanje delov ali celega dokumenta brez predhodne pisne odobritve s strani družbe Tobii Dynavox je prepovedano.

Izdelki, navedeni v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke zadevnih lastnikov. Izdajatelj in avtor ne zahtevata pravic iz naslova teh blagovnih znamk.

Čeprav smo izvedli vse previdnostne ukrepe pri pripravi tega dokumenta, izdajatelj in avtor ne prevzemata odgovornosti za napake ali opustitve ali škode, do katerih lahko pride zaradi uporabe informacij v tem dokumentu ali zaradi uporabe programov in izvorne kode, ki ta dokument spremljajo. V nobenem primeru izdajatelj in avtor ne bosta odgovorna za kakršno koli izgubo ali dobiček ali drugačno povzročeno ali domnevno povzročeno komercialno škodo neposredno ali posredno zaradi tega dokumenta.

Vsebinska se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Preverite spletno mesto družbe Tobii Dynavox

[www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) glede posodobljenih različic tega dokumenta.

### Kontaktne informacije:

Tobii Dynavox AB  
Karlsrovägen 2D  
182 53 Danderyd  
Švedska

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC  
2100 Wharton Street, Suite 400  
Pittsburgh, PA 15203  
ZDA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.  
Sheffield Technology Parks  
Cooper Buildings  
Arundel Street  
Sheffield S1 2NS  
Združeno kraljestvo

+46 8 663 69 90

Tobii Electronics Technology Suzhou Co. Ltd  
Room 401, Building 6, No. 5 Xing Han Street Suzhou  
L.R.Kitajska 215021

+86 512 69362880



# Kazalo

1	O TD Control	6
1.1	Predvidena uporaba	6
1.2	Sistemske zahteve	6
2	Prvi zagon	7
3	Pregled TD Control	9
3.1	Trace	9
3.2	Interaction Menu	10
3.3	Zunajzaslonski meniji v TD Control	11
3.3.1	Zunajzaslonski meni	12
3.3.1.1	Neprekinjeni način menija Off-Screen Menu	12
3.3.2	Tipkovnica za zunajzaslonski meni	14
3.4	Dashboard	15
3.5	Polje Track Status (sledenje stanja)	17
3.6	Sledilnik očem ni povezan	17
4	Uporaba TD Control	18
4.1	Dejanja v Interaction Menu	18
4.1.1	Kako izvedem dejanje z TD Control?	18
4.1.2	Kako uporabljam <b>drsenje</b> v TD Control ?	18
4.1.3	Kako izvedem <b>desni klik</b> v TD Control ?	19
4.1.4	Kako uporabljam <b>Povleci in spusti</b> v TD Control ?	20
4.1.5	Kako aktiviram <b>tipkovnico</b> v TD Control ?	21
4.1.5.1	Tipkovnica	21
4.1.6	Kako uporabljam <b>Prilagodi cilj</b> v TD Control ?	24
4.1.7	Kako uporabljam <b>dvoklik</b> v TD Control ?	24
4.1.8	Kako uporabljam <b>levi klik</b> v TD Control ?	24
4.2	Dejanja v zunajzaslonskem meniju	25
4.2.1	Kako aktiviram <b>Switcher</b> v TD Control?	25
4.2.2	Kako aktiviram <b>nadzorno ploščo</b> v TD Control?	25
4.2.3	Premor v TD Control	26
4.2.3.1	Kako uporabljam Začasno ustavi sledenje očem v TD Control?	26
4.2.3.2	Kako lahko vidim, ali je sledenje očem začasno ustavljeno v TD Control?	27
4.2.3.3	Kako uporabljam Obnovi sledenje očem v TD Control?	27
4.2.4	Neprekinjeni način v TD Control	27
4.2.4.1	Kako izvedem neprekinjeno dejanje v TD Control?	27
4.2.4.2	Kako spremenim izbrano neprekinjeno dejanje v TD Control?	28
4.2.4.3	Kako prekličem izbrano neprekinjeno dejanje v TD Control?	28
4.3	Dejanja na Dashboard	29
4.3.1	Kako aktiviram Dashboard v TD Control?	29
4.3.2	Kako aktiviram dejanje iz Dashboard v TD Control?	30
4.3.3	Kako lahko hitro izvedem <b>umerjanje</b> v TD Control?	30
4.3.4	Kako preklopim svojo napravo na spanje z TD Control?	31
4.3.5	Kako dostopam do <b>nastavitev</b> v TD Control?	31
4.3.6	Kako dostopam do <b>beležnice</b> v TD Control?	32
5	Nastavitve TD Control	33
5.1	Aktivacija	33

5.1.1	Način aktivacije:.....	34
5.1.1.1	Kako spremenim način aktivacije v TD Control .....	34
5.1.2	Hitrost .....	34
5.1.2.1	Kako izberem <b>čas osredotočenja</b> za sledenje v TD Control .....	34
5.1.2.2	Kako spremenim/nastavim <b>čas zadrževanja</b> za gumbe v TD Control .....	35
5.1.3	Sledenje.....	35
5.1.3.1	Kako spremenim/nastavim <b>prosojnost</b> za sledenje v TD Control? .....	35
5.1.4	Prilagodi cilj.....	36
5.1.4.1	Kako lahko izberem, na kakšen način bo prilagajanje cilja delovalo v TD Control? .....	36
5.1.4.2	Kako izberem obnašanje okna za povečavo za <b>klikni in povleci</b> v TD Control? .....	36
5.2	Umerjanje .....	37
5.2.1	Kako deluje postopek umerjanja v TD Control? .....	37
5.2.2	Kako izberem, kateremu očesu bo izvedeno sledenje v TD Control? .....	38
5.2.3	Kako preverim položaj uporabnika pri uporabi <b>sledenja stanja</b> v TD Control? .....	39
5.2.4	Kako izvedem <b>umerjanje</b> uporabnika v TD Control? .....	39
5.2.5	Kako spremenim nastavitve zaslona za moj sledilnik očem v TD Control? .....	40
5.3	Tipkovnica .....	41
5.3.1	Način aktivacije:.....	41
5.3.1.1	Kako spremenim način aktivacije v TD Control? .....	41
5.3.2	Gumbi.....	41
5.3.2.1	Kako spremenim/nastavim <b>čas zadrževanja</b> za tipkovnico v TD Control? .....	41
5.3.2.2	Kako izberem obnašanje za <b>prilagodljivo hitrost zadrževanja</b> v TD Control? .....	42
5.3.3	Predvidevanje.....	42
5.3.3.1	Kako izberem obnašanje za <b>predvidevanja</b> v TD Control? .....	42
5.3.3.2	Kako spremenim/nastavim <b>čas zadrževanja predvidevanja</b> v TD Control? .....	43
5.3.4	Splošno.....	43
5.3.4.1	Kako spremenim/nastavim <b>jezik</b> tipkovnice v TD Control? .....	43
5.3.4.2	Kako prenesem nov jezik tipkovnice v TD Control? .....	44
5.3.4.3	Kako izberem obnašanje za vnos zvočne povratne informacije v TD Control? .....	44
5.4	Način .....	45
5.4.1	Neprekinjeni način .....	45
5.4.1.1	Kako izberem, katera vrsta <b>neprekinjenega načina</b> bo uporabljena v TD Control? .....	45
5.4.1.2	Kako aktiviram/deaktiviram neprekinjeni način za <b>zagon</b> v TD Control? .....	45
5.5	Splošno .....	46
5.5.1	Kako izberem <b>jezik aplikacije</b> za TD Control? .....	46
5.5.2	Kako <b>zberem dnevniške datoteke</b> za TD Control? .....	47
5.5.3	Kako izberem <b>samodejni zagon</b> TD Control? .....	47
5.6	Prilagoditev po meri .....	48
5.6.1	Kako odstranim dejanje iz interakcijskega menija v TD Control? .....	48
5.6.2	Kako dodam dejanje v interakcijski meni v TD Control? .....	48

5.7	Naprava .....	49
5.7.1	Prilagodljivi gumbi I-Series.....	49
5.7.1.1	Kako nastavim/spremenim dejanje za trikotni gumb za serije I-Series v TD Control? .....	49
5.7.1.2	Kako nastavim/spremenim dejanje za kvadratni gumb za serije I-Series v TD Control? .....	50
5.7.1.3	Kako aktiviram/deaktiviram gumbe za glasnost pri seriji I-Series v TD Control? .....	50
5.8	Moj račun .....	51
5.8.1	Kako ustvarim račun za Moj račun v TD Control?.....	51
5.8.2	Kako se prijavim v Moj račun v TD Control? .....	51
6	Switcher .....	53
6.1	Kako dostopam do preklopnika Switcher v TD Control?.....	53
6.2	Kako preklopim v aplikacijo v preklopniku Switcher .....	53
6.3	Kako dodam aplikacijo v preklopniku Switcher? .....	54
6.4	Kako odstranim aplikacijo iz preklopnika Switcher?.....	54

# 1 O TD Control

## 1.1 Predvidena uporaba

Tehnologija sledenja očem Tobii Dynavox je pomagala tisočim posameznikom pri komunikaciji in izzivih zaradi mobilnosti pri komunikaciji ter pripomogla k večji neodvisnosti. Kaj pa tisti, ki želijo narediti naslednji korak in uporabiti vse, kar jim ponuja računalnik? TD Control je nov način komunikacije z računalnikom in za njegovo krmiljenje z uporabo sledenja očem ter ponuja bolj intuitivno izkušnjo, ki omogoča največjo neodvisnost. Tehnologija sledenja očem je prisotna že več let; zaradi česar pa je TD Control drugačna, je dejstvo, da vam ne omogoča samo krmiljenja računalnika z očmi, ampak upošteva tudi najbolj intuitiven in logičen način, da to storite. Ta inovativni pristop, imenovan 'Interaction First', omogoča udobno uporabo računalnika in z lastno določeno hitrostjo, vendar omogoča tudi uporabo najljubše programske opreme, vključno z brskanjem, e-pošto in igrkami.

Interaction First omogoča uporabniku, da izbere element, s katerim želi komunicirati, preden se odloči, kaj želijo storiti. To je bolj naravno in intuitivno vedenje, ki bo pomagalo zmanjšati število napak.

Prevezemite popolni nadzor nad računalnikom le z očmi. Z našo programsko opremo lahko oponašate vse vrste potez z miško, drsanje po zaslonu in vnesete besedilo. Prav tako smo dodali pametne bližnjice, da bo dostop do vseh delov sistema Windows še preprostejši!

## 1.2 Sistemske zahteve

Sestavni del	Zahteve
Računalnik in procesor	i5-4200U @ 1,60 GHz (4. generacija i5 z dvema jedroma/4 nizi)
Pomnilnik (RAM)	8 gigabajte (GB) RAM (priporočena minimalna zahteva).
Trdi disk	na voljo 500 megabajtov (MB).
Operacijski sistem	Windows 10
Različica .NET	4.7.2
Sledilnik oči	Tobii Dynavox I-Series I-13 & I-16 in Tobii Dynavox PCEye 5
Dodatne zahteve in pozornost	Internetna povezava je priporočena za sprejemanje posodobitev.


## 2 Prvi zagon

Ko prvič zaženete TD Control, bo uporabnik moral izvesti On-boarding (uvajanje). Onboarding (uvajanje) je sestavljeno iz naslednjih korakov:

1. Razpršeni zaslon.
2. Pogled Welcome.
3. Pogled Track Status (za preverjanje, ali je uporabnik pravilno nameščen pred sledilnikom oči). (Za več informacij glejte *3.5 Polje Track Status (sledenje stanja)*, stran 17).
4. Pogled za umerjanje (za več informacij glejte *5.2 Umerjanje*).
5. Pogled pogojev uporabe
6. Pogled vodnika za hiter začetek




Če izberete gumb  (skrij vodiča) v vodiču za hiter začetek, se bo prikazalo sporočilo na sredini spodnjega dela zaslona, ki bo obveščalo uporabnika o dostopu do Dashboard.

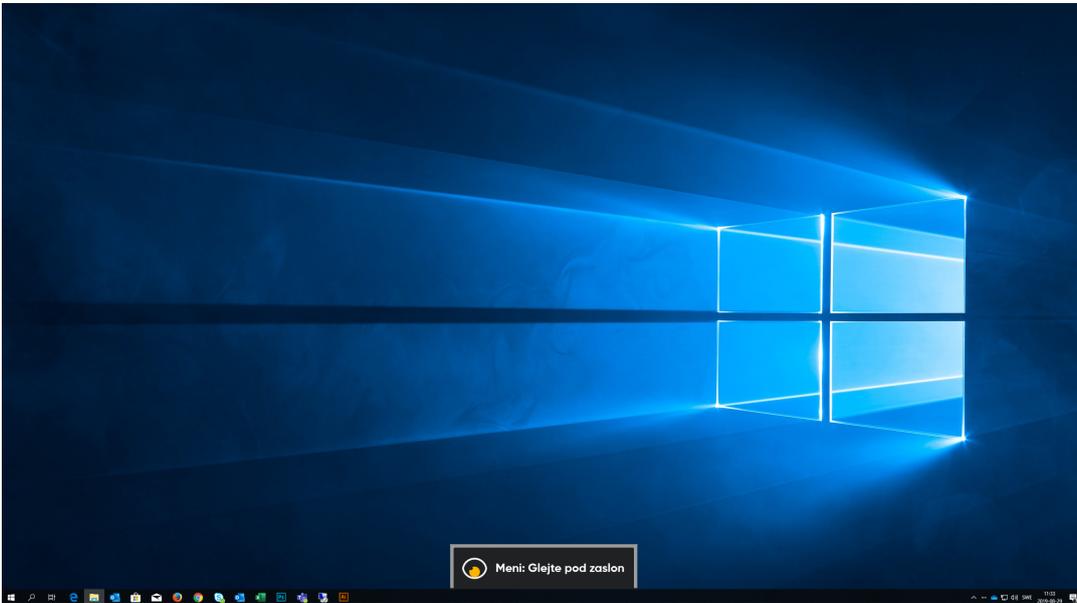

Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

Prikazovalo se bo pojavno okno  "Meni: Glejte pod zaslon", dokler uporabnik ne izbere ikone  (Dashboard).

Ko uporabnik prvič izbere ikono  (Dashboard), se bo prikazal vodič za hiter začetek za Dashboard.

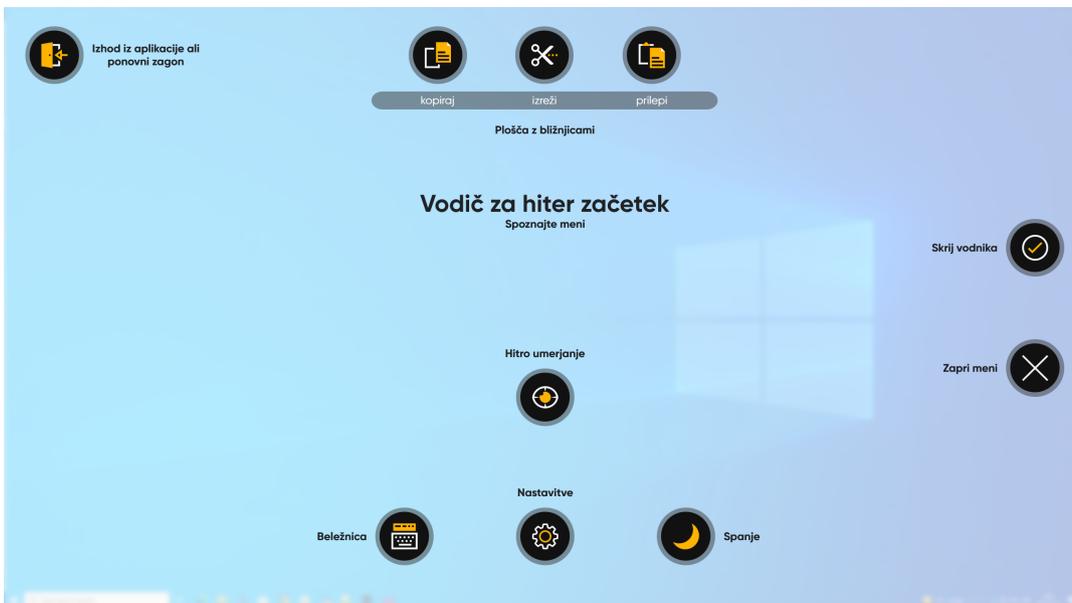


Izberite gumb  (skrij vodiča) v vodiču za hiter začetek, da zapustite vodiča za hiter začetek.

# 3 Pregled TD Control

## 3.1 Trace

Sled sledi strmenju uporabnika. Sled je manj prosojna, dokler uporabnik ne osredotoči strmenja, nato pa postane trdna in prikaže se aktivator. Aktivator bo vedno obrnjen proti sredini zaslona, kjer bo Interaction Menu. Območje med majhnimi in velikimi krogi se zaklene v položaju na zaslonu, kjer je sled, če uporabnik osredotoči strmenje; v ciljnem območju sledi se bo prikazal posnetek območja znotraj sledi. Če uporabnik zapusti sled, bo posnetek sproščen in sled se bo vrnila v svoje neaktivirano stanje. Sled deluje na vseh vrstah ozadja.

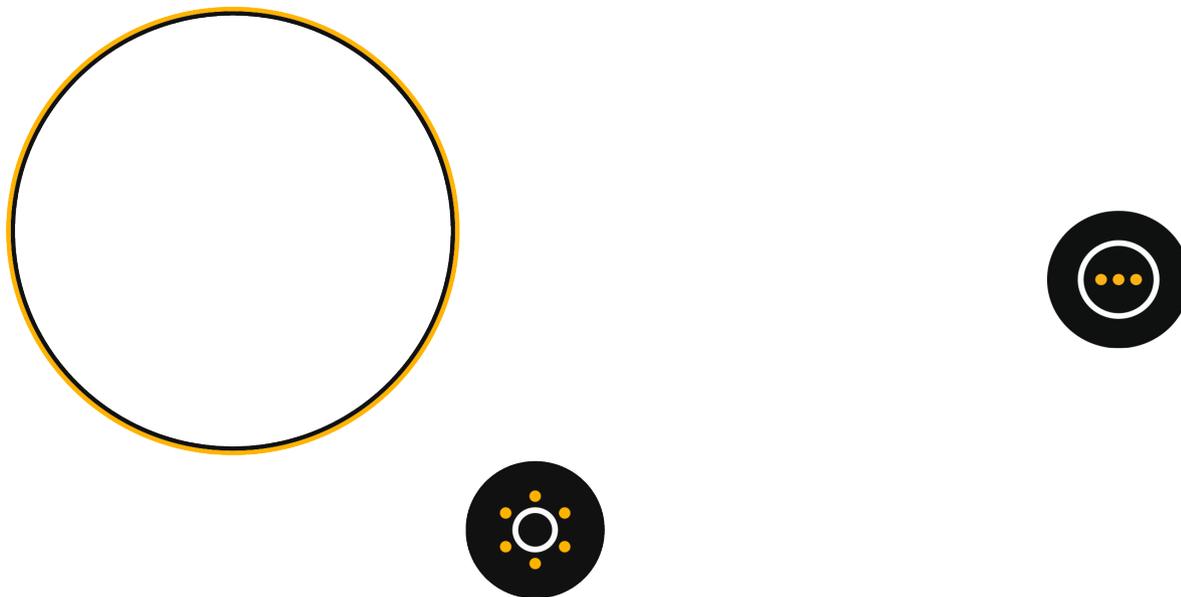

Podoba 3.1 Aktivna sled

Tabela 3.1 Sled

Element	Dejanje	Opis
	Sled	Sled daje uporabniku povratne informacije o tem, kam na zaslonu uporabnik strmi. Sled se bo premikala po zaslonu in sledila uporabnikovemu strmenju. Ko uporabnik osredotoči strmenje za določen čas na zaslonu, se bo prikazal aktivator.
	Aktivator	Odpre Interaction Menu. Za več informacij glejte 3.2 <i>Interaction Menu</i> , stran 10.
	Dashboard	Odpre Dashboard. Za več informacij glejte 3.4 <i>Dashboard</i> , stran 15.



Ikona	Dejanje	Opis
	Tipkovnica	Dejanje, ki odpre zaslonsko tipkovnico, omogočeno za tipkanje s strmenjem. To dejanje se tudi osredotoča na mesto, na katerem uporabnik izvede dejanje – to pomeni, da izvede levi klik in nato odpre tipkovnico  Za več informacij glejte <i>4.1.5 Kako aktiviram tipkovnico v TD Control ?, stran 21.</i>
	Prilagodi cilj	Dejanje za natančno prilagajanje ciljnega predmeta na zaslonu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poglejte na mesto, na katerem želite izvesti dejanje, da odprete Interaction Menu.</li> <li>• Poglejte v dejanje za prilagajanje cilja</li> <li>• Natančno prilagodite ciljno območje, tako da s strmenjem premaknete prečno črto v ciljno okno, da boste natančno namestili izbrano točko.</li> <li>• Izberite dejanje, ki ga želite izvesti.</li> </ul> Za več informacij glejte <i>4.1.6 Kako uporabljam Prilagodi cilj v TD Control ?, stran 24</i>
	Dvoklik	Dejanje, ki izvede en levi dvoklik.  Za več informacij glejte <i>4.1.7 Kako uporabljam dvoklik v TD Control ?, stran 24</i>
	Levi klik	Dejanje, ki izvede en levi klik ali ki je pri napravah na dotik enakovredno enemu tapu s prstom.  Za več informacij glejte <i>4.1.8 Kako uporabljam levi klik v TD Control ?, stran 24</i>
	Pomoč	Dejanje, ki odpre stran s pomočjo.
	Prekliči	Dejanje, ki prekliče Interaction Menu.

Tabela 3.3 Tipke za spreminjanje

Ikona	Dejanje	Opis
	Shift	Dejanje, ki preklopi tipko <b>Shift</b> na tipkovnici na On/Off.
	Ctrl	Dejanje, ki preklopi tipko <b>Ctrl</b> na tipkovnici na On/Off.
	Alt	Dejanje, ki preklopi tipko <b>Alt</b> na tipkovnici na On/Off.

### 3.3 Zunajzaslonski meniji v TD Control

Na voljo je več različnih zunajzaslonskih menijev po vsem TD Control. Skupno jim je to, da vsi zunajzaslonski meniji temeljijo na kontekstu.

### 3.3.1 Zunajzaslonski meni

Na voljo je en glavni zunajzaslonski meni v krmilniku, ki se imenuje Off-Screen Menu. Drugi nimajo lastnih imen



Tabela 3.4 Zunajzaslonski meni

Ikona	Dejanje	Opis
	Switcher	Dejanje, ki odpre Switcher (preklopnik). Za več informacij glejte <i>6 Switcher, stran 53</i>
	Dashboard	Dejanje, ki odpre Dashboard. Za več informacij glejte <i>3.4 Dashboard, stran 15.</i>
	Premor	Dejanje, ki začasno ustavi interakcijo, dokler ne izberete gumba Resume Gaze (obnovi strmenje).
	Neprekinjeni način	Dejanje, ki odpre neprekinjeni način menija Off-Screen Menu. Za več informacij glejte <i>3.3.1.1 Neprekinjeni način menija Off-Screen Menu, stran 12</i>

#### 3.3.1.1 Neprekinjeni način menija Off-Screen Menu

Na voljo sta dve (2) vrsti neprekinjenega načina v TD Control.

- Poenostavljeno
- Napredno

Za več informacij o izbiri neprekinjenih načinov glejte *5.4.1 Neprekinjeni način, stran 45.*

### 3.3.1.1.1 Poenostavljeni neprekinjeni način menija Off-Screen Menu



Tabela 3.5 Poenostavljeni neprekinjeni način menija Off-Screen Menu

Ikona	Dejanje	Opis
	Pomoč	Dejanje, ki odpre stran s pomočjo.
	Pokaži sled	Dejanje, ki prikaže/skrije sled na zaslonu.
	Levi klik	Dejanje, ki izvede en levi klik z vsako fiksacijo. Za več informacij glejte levi klik v <i>Tabela 3.2 Interaction Menu, stran 10</i>
	Premor	Dejanje, ki začasno ustavi interakcijo, dokler ne izberete gumba Resume Gaze (obnovi strmenje). Za več informacij glejte <i>4.2.3 Premor v TD Control</i> .
	Prekliči	Dejanje, s katerim zapustite neprekinjeni način.

### 3.3.1.1.2 Napredni neprekinjeni način menija Off-Screen Menu



Tabela 3.6 Napredni neprekinjeni način menija Off-Screen Menu

Ikona	Dejanje	Opis
	Pomoč	Dejanje, ki odpre stran s pomočjo.
	Prilagodi cilj	Dejanje, ki samodejno izvede funkcijo prilagajanja cilja za vsako izbiri. Za več informacij glejte 4.1.6 <i>Kako uporabljam Prilagodi cilj v TD Control ?</i> , stran 24
	Levi klik	Dejanje, ki izvede en levi klik z vsako fiksacijo. Za več informacij glejte 4.1.8 <i>Kako uporabljam levi klik v TD Control ?</i> , stran 24.
	Click & Hold	Dejanje, ki izvede funkcijo Click & Hold pri vsaki izbiri. Za več informacij glejte 4.1.4 <i>Kako uporabljam Povleci in spusti v TD Control ?</i> , stran 20.
	Primi in povleci	Dejanje, ki izvede funkcijo Hold & Drag (Primi in povleci) pri vsaki izbiri, dokler uporabnik ne izbere, da jo konča. Posebej uporabno pri risanju v programski opremi, kot je Photoshop ali Slikar. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poglejte tja, kjer bo na zaslonu začetna točka funkcije Hold &amp; Drag.</li> <li>• Aktivirajte funkcijo.</li> <li>• Premaknite strmenje na lokacijo na zaslonu. Strmenje bo sledeno.</li> <li>• Poglejte na mesto spustitve predmeta.</li> <li>• Izberite ikono za spustitev, ki se prikaže na zaslonu, ko strmite na mesto spustitve.</li> </ul>
	Prekliči	Dejanje, s katerim zapustite neprekinjeni način.

### 3.3.2 Tipkovnica za zunajzaslonski meni

Tipkovnica za zunajzaslonski meni se bo prikazala na zaslonu, ko je na njem vidna tipkovnica ali beležnica.



Podoba 3.2 Dashboard.

Tabela 3.7 Tipkovnica za zunajzaslonski meni

Ikona	Dejanje	Opis
	Pomoč	Dejanje, ki odpre stran <b>Help</b> (pomoč).
	Beležnica	Dejanje, ki odpre funkcijo <b>beležnice</b> . Za več informacij glejte 4.3.6 <i>Kako dostopam do beležnice v TD Control?</i>

Ikona	Dejanje	Opis
 	Skrij beležnico	Dejanje, ki skriva <b>beležnico</b> . Različne ikone so prikazane glede na to, ali je bila beležnica odprta nad ali pod tipkovnico.
 	Premakni tipkovnico	Dejanje, ki premakne tipkovnico z vrha ali na dno zaslona, odvisno od tega, kje je bila odprta.
	Spremeni velikost	Dejanje, ki spremeni velikost tipkovnice
	Premor	Dejanje, ki začasno ustavi interakcijo, dokler ne izberete gumba Resume Gaze (obnovi strmenje). Za več informacij glejte 4.2.3 Premor v TD Control.
	Hitra izbira jezika	Dejanje, ki odpre stran z jeziki za hiter dostop za spremembo jezika tipkovnice.
	Prekliči	Dejanje, ki prekliče Dashboard.

## 3.4 Dashboard



Podoba 3.3 Dashboard.

Tabela 3.8 Dashboard


Ikona	Dejanje	Opis
	Nastavitve	Dejanje, ki odpre nastavitve TD Control. Za več informacij glejte 5 <i>Nastavitve TD Control</i> .
	Beležnica	Dejanje, ki odpre funkcijo beležnice. Za več informacij glejte 4.3.6 <i>Kako dostopam do <b>beležnice</b> v TD Control?</i>
	Hitro umerjanje	Dejanje, ki odpre hitro umerjanje. Za več informacij glejte 4.3.3 <i>Kako lahko hitro izvedem <b>umerjanje</b> v TD Control?</i>
	Spanje	Dejanje, ki preklopi napravo v način spanja. Za več informacij glejte 4.3.4 <i>Kako preklopim svojo napravo na spanje z TD Control?, stran 31</i>
	Pomoč	Dejanje, ki odpre stran s pomočjo.
	Izhod iz TD Control	Dejanje, ki zapre in zapusti programsko opremo TD Control.
	Prekliči	Dejanje, ki prekliče Dashboard.



Tabela 3.9 Plošča z bližnjicami

Ikona	Dejanje	Opis
	kopiraj	Dejanje, ki kopira izbrani element/besedilo.
	prilepi	Dejanje, ki prilepi izbrani element/besedilo.
	izreži	Dejanje, ki izreže izbrani element/besedilo.

### 3.5 Polje Track Status (sledenje stanja)

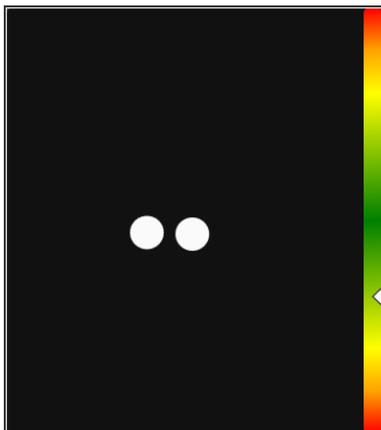

**Podoba 3.4** Polje Track Status (sledenje stanja)

Funkcija **Track Status** preverja, ali je uporabnik pravilno nameščen pred sledilnikom oči.

- Dve (2) beli piki — uporabnikove oči in v kakšnem položaju so pred zaslonom. Za optimalni položaj morajo biti na sredini črnega območja.
- Barvna vrstica na desni z belo puščico — kako daleč ali blizu je uporabnik pred zaslonom.
  - Če je puščica na sredini zelenega območja vrstice, je uporabnik na optimalni razdalji od zaslona.
  - Če je puščica na spodnjem delu vrstice — premaknite uporabnika bližje sledilniku očem.
  - Če je puščica na zgornjem delu vrstice — premaknite uporabnike dlje od sledilnika očem.

### 3.6 Sledilnik očem ni povezan

Če noben sledilnik očem ni povezan z napravo ali če nekdo odklopi sledilnik očem, bodo prikazane naslednje informacije:



Sledilnik očem ni povezan

Ko se sledilnik očem poveže/znova poveže, se bo sporočilo prikazalo samodejno.

# 4 Uporaba TD Control

TD Control uporabniku omogoča nadzor nad standardnim namiznim operacijskim sistemom Windows z metodo z dvema korakoma, ki zmanjša tveganje neželenih klikov.



Večina funkcij/dejanj v TD Control je omogočenih za upravljanje na dotik in z miško, zaradi česar lahko skrbnik ali asistent preprosteje pomaga uporabniku, če je treba. Skrbnik ali asistent lahko veliko preprosteje izbere dejanje ali spremeni nastavitve za uporabnika.


Dostop do funkcije Interaction Menu ni mogoče izvesti brez sledilnika očem.

## 4.1 Dejanja v Interaction Menu

### 4.1.1 Kako izvedem dejanje z TD Control?

1. Strmenje usmerite v želeno območje zaslona (ali ikono na zaslonu), kjer želite izvesti dejanje.

2. Izberite ikono  (aktivator).  
Odprl se bo Interaction Menu.

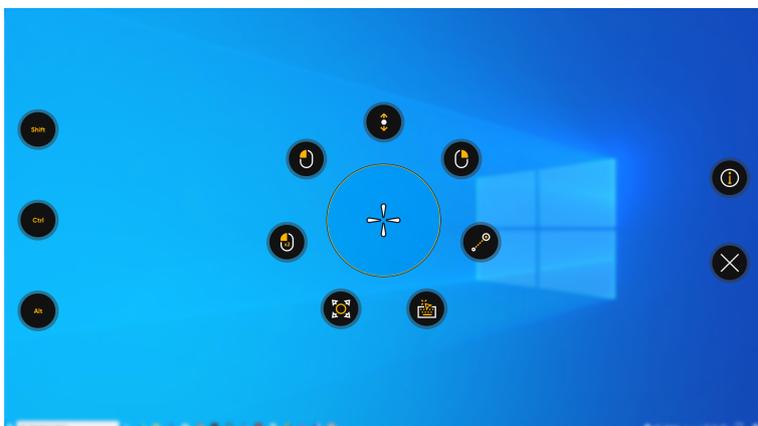

3. Prečna črta na sredini ciljnega okna bo prikazovala, kje se bo izvedlo dejanje.  
Po potrebi natančno prilagodite aktivacijsko točko, tako da sledite tem korakom.

- a. Izberite ikono  (prilagodi cilj).
  - b. S strmenjem premaknite sled v ciljno okno, dokler ne nastavite natančne točke izbire.  
Prečna črta se bo premaknila na novo mesto.
  - c. Ponavljajte, dokler ni prednostni cilj znotraj prečne črte.
4. Izberite dejanje, ki ga boste izvedli iz Interaction Menu ali izberite gumb zapri za preklic.

### 4.1.2 Kako uporabljam drsenje v TD Control ?



1. Strmenje usmerite v želeno območje zaslona (ali ikono na zaslonu), kjer želite izvesti dejanje.

2. Izberite ikono  (aktivator).  
Odprl se bo Interaction Menu.
3. Prečna črta na sredini ciljnega okna bo prikazovala, kje se bo izvedlo dejanje.  
Po potrebi natančno prilagodite aktivacijsko točko, tako da sledite tem korakom.
  - a. Izberite ikono  (prilagodi cilj).
  - b. S strmenjem premaknite sled v ciljno okno, dokler ne nastavite natančne točke izbire.  
Prečna črta se bo premaknila na novo mesto.
  - c. Ponavljajte, dokler ni prednostni cilj znotraj prečne črte.
4. Izberite ikono  iz Interaction Menu.  
Dršno sidro se bo prikazalo na zaslonu, kjer je bila postavljena prečna črta.
5. Izberite, v katero smer se boste pomikali:
  - Poglejte nad sidro za pomikanje, da se pomaknete navzgor.
  - Poglejte pod sidro za pomikanje, da se pomaknete navzdol.
  - Poglejte na levo stran sidra za drsenje v levo.
  - Poglejte na desno stran sidra za drsenje v desno.
  - Poglejte v območje okrog sidra za začasno ustavitev drsenja.



Dlje stran pogledate od sidra za drsenje, hitreje se bo izvajalo drsenje.



Za največjo prilagodljivost razmislite o postavitvi sidra proti središču drsnega območja.

6. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz drsenja.

### 4.1.3 Kako izvedem desni klik v TD Control ?



1. Strmenje usmerite v zeleno območje zaslona (ali ikono na zaslonu), kjer želite izvesti dejanje.
2. Izberite ikono  (aktivator).  
Odprl se bo Interaction Menu.
3. Prečna črta na sredini ciljnega okna bo prikazovala, kje se bo izvedlo dejanje.  
Po potrebi natančno prilagodite aktivacijsko točko, tako da sledite tem korakom.
  - a. Izberite ikono  (prilagodi cilj).
  - b. S strmenjem premaknite sled v ciljno okno, dokler ne nastavite natančne točke izbire.  
Prečna črta se bo premaknila na novo mesto.
  - c. Ponavljajte, dokler ni prednostni cilj znotraj prečne črte.
4. Izberite ikono  iz Interaction Menu.

## 4.1.4 Kako uporabljam **Povleci in spusti** v TD Control ?




1. Strmenje usmerite v želeno območje zaslona (ali ikono na zaslonu), kjer želite izvesti dejanje.

2. Izberite ikono  (aktivator).  
Odprl se bo Interaction Menu.


3. Prečna črta na sredini ciljnega okna bo prikazovala, kje se bo izvedlo dejanje.  
Po potrebi natančno prilagodite aktivacijsko točko, tako da sledite tem korakom.

- Izberite ikono  (prilagodi cilj).
- S strmenjem premaknite sled v ciljno okno, dokler ne nastavite natančne točke izbire.  
Prečna črta se bo premaknila na novo mesto.
- Ponavljajte, dokler ni prednostni cilj znotraj prečne črte.

4. Izberite ikono  iz Interaction Menu.
5. Izberite novo lokacijo predmeta.  
Prikazana bo indikacijska črta med staro lokacijo in novo lokacijo sledi.

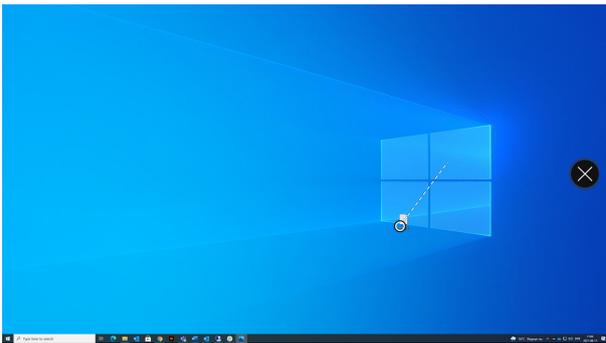


6. Usmerite strmenje na novo lokacijo.  
Na zaslonu se bo prikazala ikona za spustitev zunaj sledi.

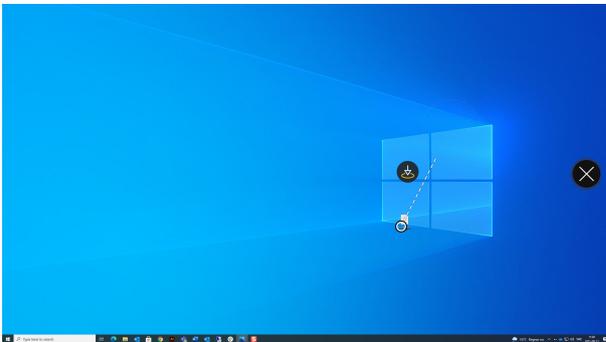

7. Izberite dejanje  (spusti), da spustite predmet na novi lokaciji.

Dejanje prikazuje Adjust Target (prilagodi cilj).

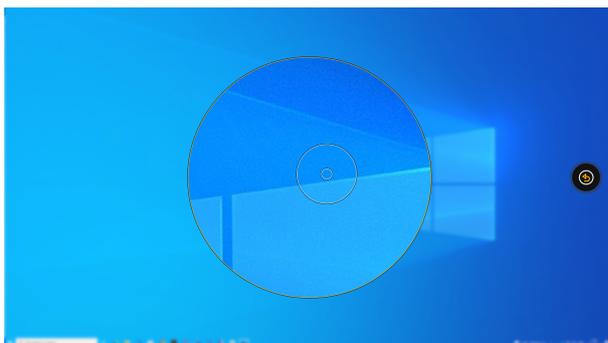

8. Izberite natančno mesto za novo lokacijo.
9. Predmet je zdaj na novi lokaciji.

### 4.1.5 Kako aktiviram tipkovnico v TD Control ?

Tipkovnica se uporablja za vnos besedila v dokument, vnos besedila v iskalno vrstico, izbiro po preimenovanju v meniju za preimenovanje dokumenta



1. Strmenje usmerite v želeno območje zaslona (ali ikono na zaslonu), kjer želite izvesti dejanje.
2. Izberite ikono  (aktivator).  
Odprl se bo Interaction Menu.
3. Prečna črta na sredini ciljnega okna bo prikazovala, kje se bo izvedlo dejanje.  
Po potrebi natančno prilagodite aktivacijsko točko, tako da sledite tem korakom.
  - a. Izberite ikono  (prilagodi cilj).
  - b. S strmenjem premaknite sled v ciljno okno, dokler ne nastavite natančne točke izbire.  
Prečna črta se bo premaknila na novo mesto.
  - c. Ponavljajte, dokler ni prednostni cilj znotraj prečne črte.
4. Izberite ikono  iz Interaction Menu.
5. Po potrebi uporabite gumba  (premakni tipkovnico gor) ali  (premakni tipkovnico dol) za premik tipkovnice.

#### 4.1.5.1 Tipkovnica


Z izbiro funkcije tipkovnice  iz Interaction Menu se bo tipkovnica zagnala kot tipkovnica na zaslonu. Tipkovnica se bo vedno odprla na strani zaslona, ki je nasprotna strani, s katero ste v interakciji. Možno je premakniti tipkovnico z

razpoložljivima gumboma  (premakni tipkovnico gor) ali  (premakni tipkovnico dol), kadar je tipkovnica aktivna na zaslonu.


Ovisno od jezika je tipkovnica sestavljena iz štirih–petih (4–5) strani tipkovnice. Uporabnik lahko preprosto preklaplja med različnimi stranmi tipkovnice, tako da izbere enega od teh gumbov ,  ali  v zgornjem desnem kotu tipkovnice ali  v zgornjem levem kotu na strani s številkami in strani z dodatnimi znaki.

Tipka na tipkovnici, v katero uporabnik strmi, bo prikazana s svetlečim okvirjem okrog znaka/funkcije  na tipki in ko izberete tipko, bo za kratek čas spremenila barvo, da se nastavi aktivacijska barva .


**Strani tipkovnice so:**

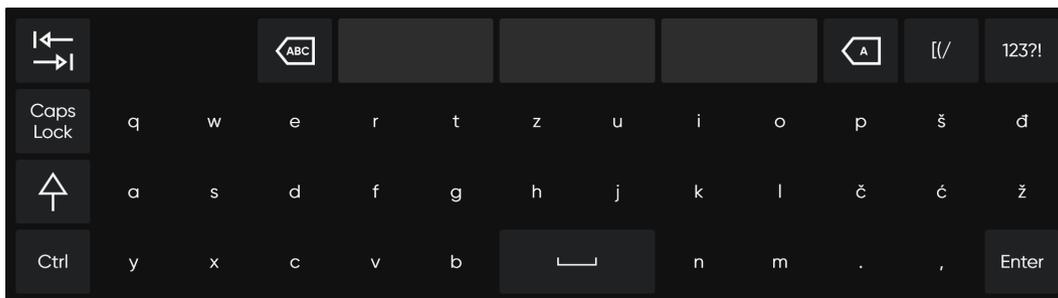


**Podoba 4.1** Stran s tipkovnico

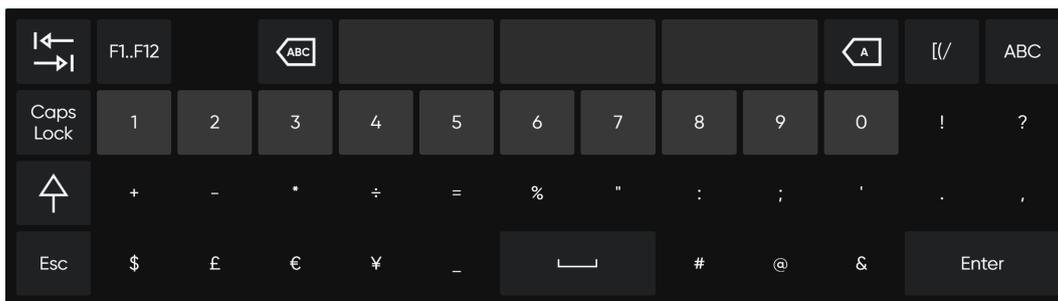


**Podoba 4.2** Stran s številkami

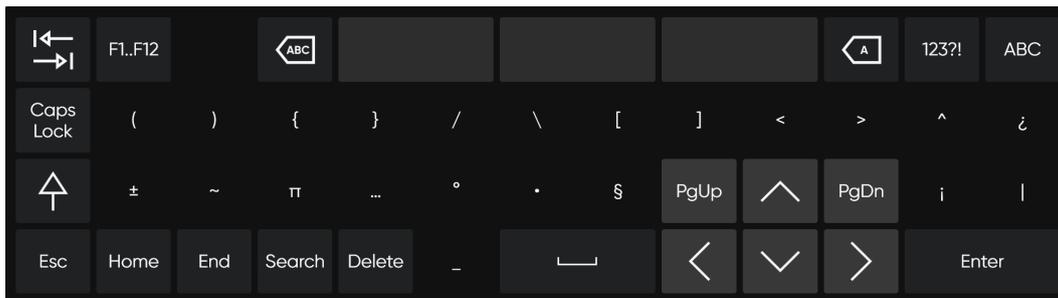

**Podoba 4.3** Stran z dodatnimi znaki

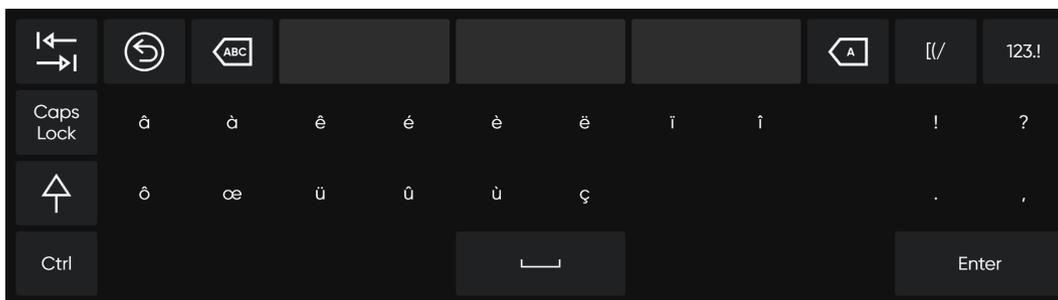

**Podoba 4.4** Stran, specifična za jezik

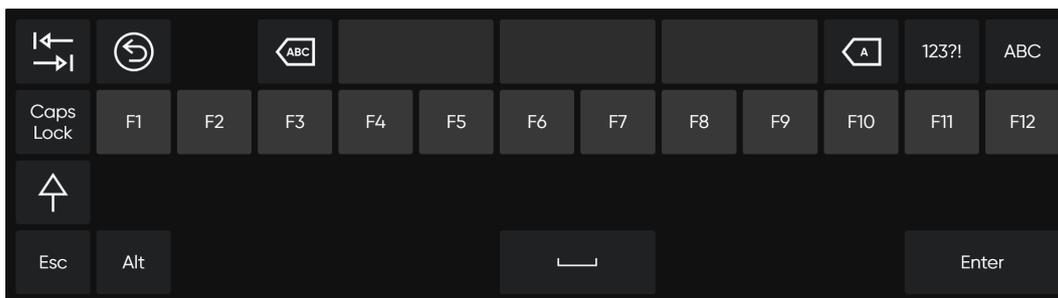


**Podoba 4.5** Stran s funkcijskimi tipkami

Za preklop jezika tipkovnice in druge nastavitve tipkovnice glejte *5 Nastavitve TD Control, stran 33*.

#### 4.1.5.1.1 Predvidevanje besed

Mehanizem za predvidevanje besed, ki se uporablja v TD Control, je iz SwiftKey™ in se običajno uporablja v tabličnih računalnikih in pametnih telefonih. SwiftKey™ uporablja zamatke tehnologije umetne inteligence za predvidevanje naslednje besede, ki jo uporabnik namerava vpisati. SwiftKey™ se uči iz prejšnjih besedil uporabnika in predlaga predvidevanja na osnovi trenutno vnesenega besedila in naučenega. Jezik za predvidevanje besed se bo spremenil glede na nastavitve jezika tipkovnice.

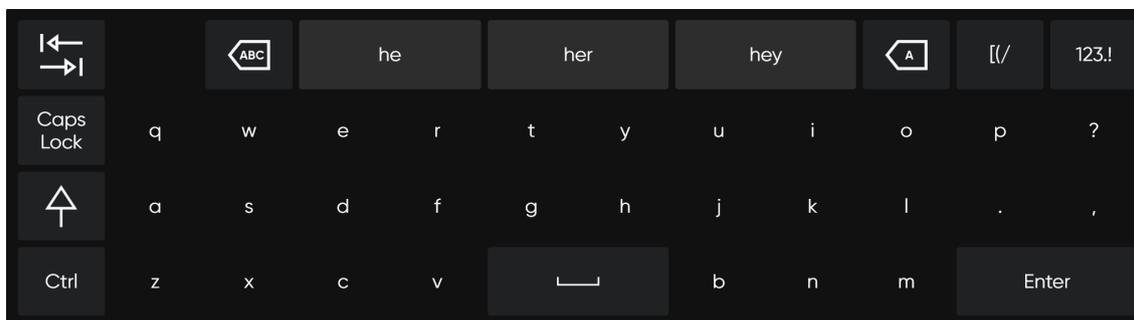

**Podoba 4.6** Tipkovnica s predvidevanjem besed aktivirana

Kadar uporabljate predvidevanje besed, se nad tipkovnico prikažejo tri (3) polja. Skrajno levo polje bo prikazovalo najbolj verjetno predvideno besedo, ostali dve (2) polji pa bosta vsebovali po eno predvideno besedo. Za izbiro predvidene besede izberite polje s trenutno besedo. Če ne morete najti besede, ki jo iščete, nadaljujte s tipkanjem in morebiti se bo beseda, ki jo iščete, prikazala po naslednjem znaku.



Če uporabljate predvidevanje besed in želite napisati besedo z naglasom, npr. *café*, boste prihranili čas in napor, če prepustite mehanizmu za predvidevanje besed, da uredi naglas. Preprosto vnesite »cafe« in prikazal se bo predlog za »café«.

#### 4.1.6 Kako uporabljam **Prilagodi cilj** v TD Control ?



Dejanje Adjust Target (prilagodi cilj) se uporablja za natančno prilagajanje aktivacijske točke v ciljnem oknu. Prečna črta na sredini ciljnega okna bo prikazovala, kje se bo izvedlo dejanje.

Natančno prilagodite aktivacijsko točko, tako da sledite tem korakom.

1. Izberite ikono  (prilagodi cilj).
2. S strmenjem premaknite sled v ciljno okno, dokler ne nastavite natančne točke izbire. Prečna črta se bo premaknila na novo mesto.
3. Ponavljajte, dokler ni prednostni cilj znotraj prečne črte.

#### 4.1.7 Kako uporabljam **dvoklik** v TD Control ?



1. Strmenje usmerite v zeleno območje zaslona (ali ikono na zaslonu), kjer želite izvesti dejanje.
2. Izberite ikono  (aktivator).  
Odpri se bo Interaction Menu.
3. Prečna črta na sredini ciljnega okna bo prikazovala, kje se bo izvedlo dejanje.  
Po potrebi natančno prilagodite aktivacijsko točko, tako da sledite tem korakom.
  - a. Izberite ikono  (prilagodi cilj).
  - b. S strmenjem premaknite sled v ciljno okno, dokler ne nastavite natančne točke izbire. Prečna črta se bo premaknila na novo mesto.
  - c. Ponavljajte, dokler ni prednostni cilj znotraj prečne črte.
4. Izberite ikono  iz Interaction Menu.

#### 4.1.8 Kako uporabljam **levi klik** v TD Control ?



1. Strmenje usmerite v zeleno območje zaslona (ali ikono na zaslonu), kjer želite izvesti dejanje.
2. Izberite ikono  (aktivator).  
Odpri se bo Interaction Menu.
3. Prečna črta na sredini ciljnega okna bo prikazovala, kje se bo izvedlo dejanje.  
Po potrebi natančno prilagodite aktivacijsko točko, tako da sledite tem korakom.

- a. Izberite ikono  (prilagodi cilj).
- b. S strmenjem premaknite sled v ciljno okno, dokler ne nastavite natančne točke izbire. Prečna črta se bo premaknila na novo mesto.
- c. Ponavljajte, dokler ni prednostni cilj znotraj prečne črte.

4. Izberite ikono  iz Interaction Menu.

## 4.2 Dejanja v zunajzaslonskem meniju




### 4.2.1 Kako aktiviram Switcher v TD Control?

S preklopnikom Switcher lahko uporabnik preklaplja med aktivno programsko opremo in zažene aplikacije Tobii Dynavox.

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite dejanje  (Switcher). Switcher se bo odprl.

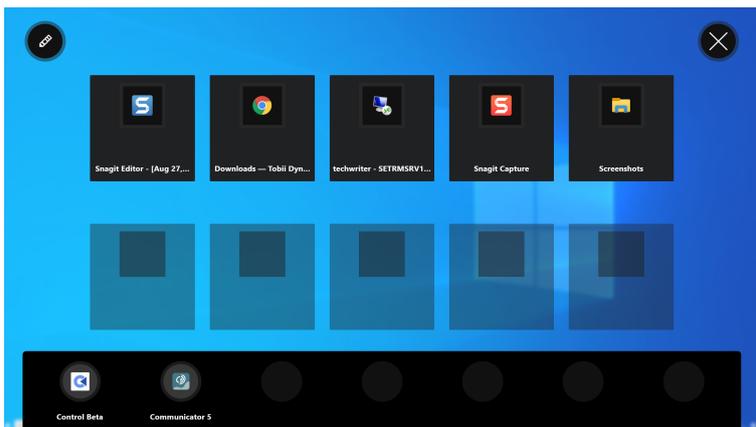

Za več informacij o preklopniku Switcher glejte *6 Switcher, stran 53*.

### 4.2.2 Kako aktiviram nadzorno ploščo v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.



2. Izberite ikono  (Dashboard).

Nadzorna plošča se bo odprla.



**Podoba 4.7** Dashboard.

Za več informacij glejte [4.3 Dejanja na Dashboard, stran 29](#)

## 4.2.3 Premor v TD Control

Uporaba strmenja je ponavljajoče se fizično opravilo, zato se lahko uporabljene mišice okrog oči utrudijo. Premor med strmenjem vam ne omogoči samo časa, da gledate v zaslon brez interakcije, ampak omogoči vašem očem tudi počitek.

### 4.2.3.1 Kako uporabljam Začasno ustavi sledenje očem v TD Control?


1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (premor).

Oranžna ikona za premor  se bo za kratek čas prikazala na zaslonu in na zunanjih robovih zaslona bo oranžna obroba, ki prikazuje, da je TD Control začasno ustavljen.



#### 4.2.3.2 Kako lahko vidim, ali je sledenje očem začasno ustavljeno v TD Control?

Na zunanjih robovih zaslona bo vidna oranžna obroba.

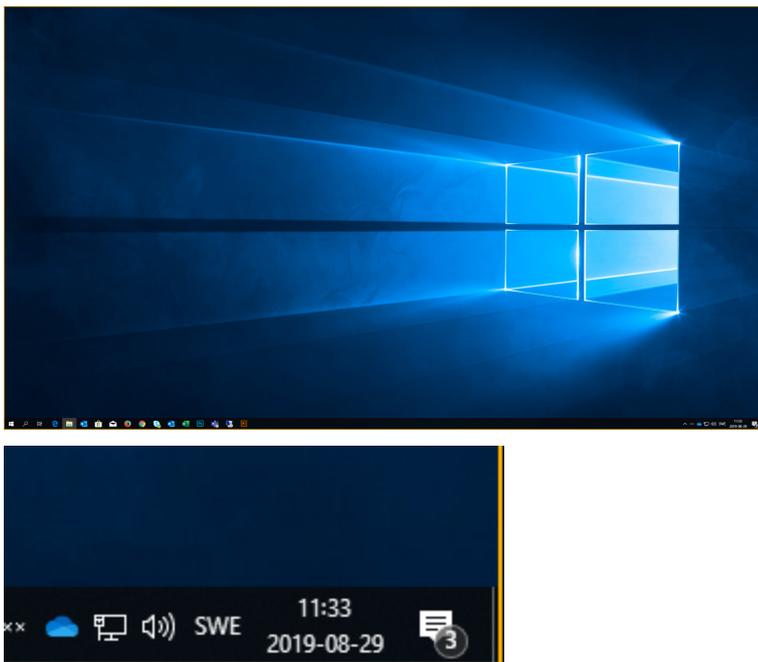

#### 4.2.3.3 Kako uporabljam Obnovi sledenje očem v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem.

Ikona  (obnovi strmenje) bo postala vidna na spodnjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (obnovi strmenje), da obnovite sledenje očem v TD Control.

#### 4.2.4 Neprekinjeni način v TD Control

Na voljo sta dve (2) različna načina neprekinjenih dejanj v TD Control.

- Napredna neprekinjena dejanja
- Preprosta neprekinjena dejanja


Za več informacij o različnih načinih neprekinjenega dejanja glejte 3.3.1.1 *Neprekinjeni način menija Off-Screen Menu*, stran 12.

#### 4.2.4.1 Kako izvedem neprekinjeno dejanje v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite dejanje  (neprekinjeni klik).

Odpre se neprekinjeni zunajzaslonski meni.

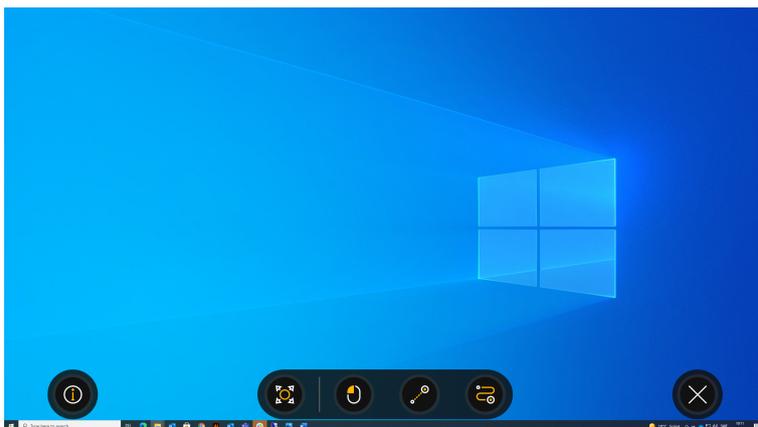


3. Izberite eno od razpoložljivih neprekinjenih dejanj.
4. Strmenje usmerite v zeleno območje zaslona (ali ikono na zaslonu), kjer želite izvesti dejanje.

 Izbrano neprekinjeno dejanje bo aktivno, dokler uporabnik aktivno ne spremeni ali prekliče dejanja.

 TD Control je mogoče nastaviti, da se po želji odpre v enem od teh načinov.

#### 4.2.4.2 Kako spremenim izbrano neprekinjeno dejanje v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Odpre se neprekinjeni zunajzaslonski meni.

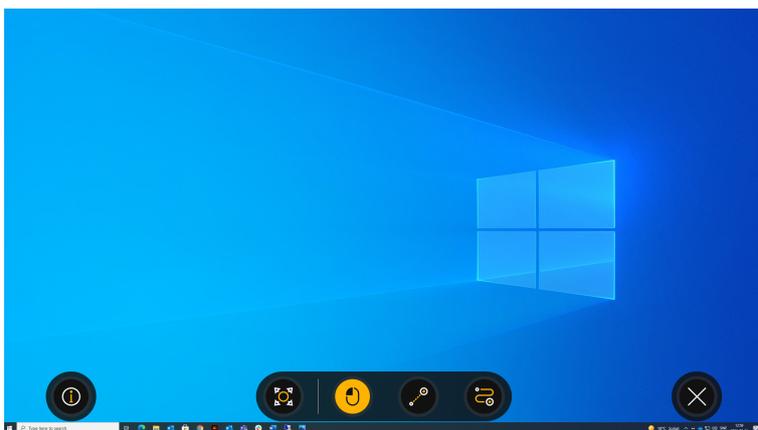


 Izbrana neprekinjena dejanja bodo imela oranžno ozadje.

2. Izberite eno od razpoložljivih neprekinjenih dejanj.

#### 4.2.4.3 Kako prekličem izbrano neprekinjeno dejanje v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem.

Odpre se neprekinjeni zunajzaslonski meni.

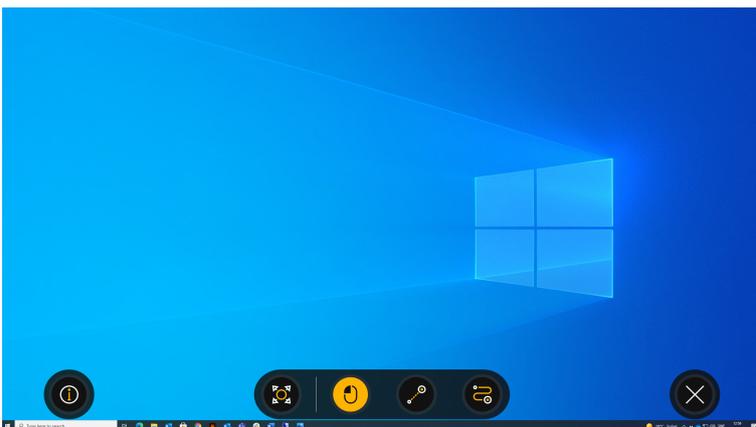

 Izbrana neprekinjena dejanja bodo imela oranžno ozadje.


2. Izberite ikono  (zapri), da prenehate z uporabo neprekinjenega dejanja.

## 4.3 Dejanja na Dashboard

### 4.3.1 Kako aktiviram Dashboard v TD Control?


Dashboard je skrit, da se ne bo vmešaval in/ali motil uporabnika. Za priklic Dashboard sledite tem korakom.

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

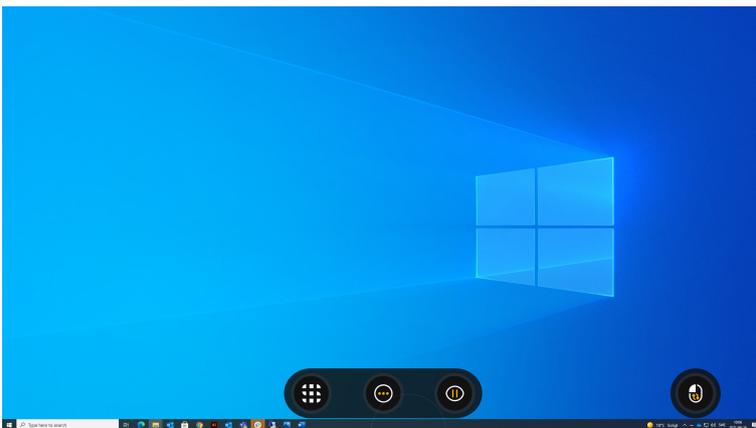

2. Izberite ikono  (Dashboard).


Odprl se bo Dashboard.

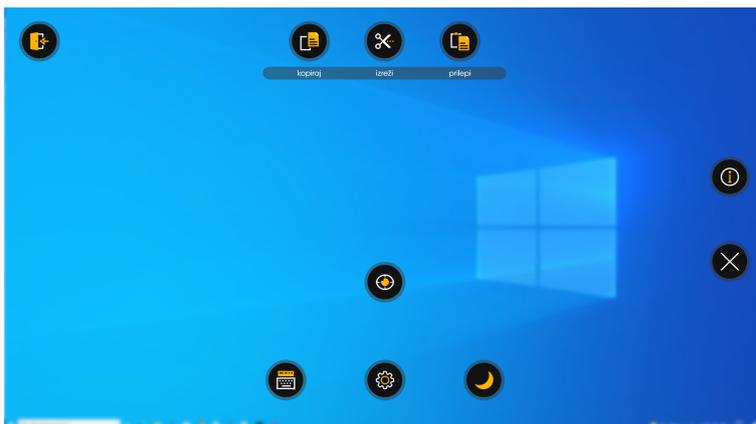

### 4.3.2 Kako aktiviram dejanje iz Dashboard v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.

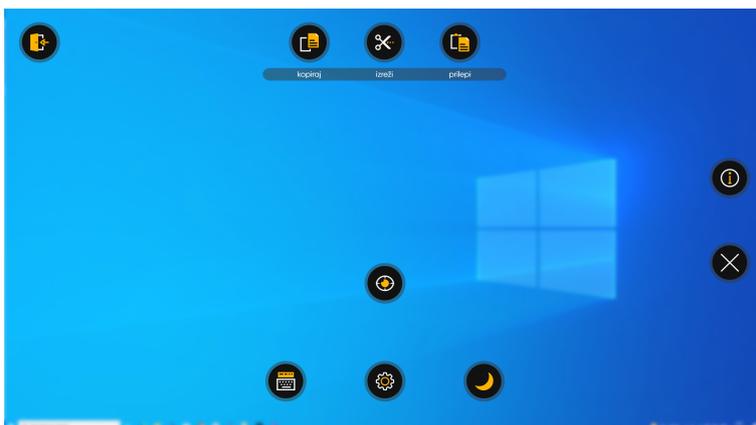

3. Izberite dejanje, ki ga boste izvedli iz Dashboard ali izberite gumb zapri za preklic.


### 4.3.3 Kako lahko hitro izvedem umerjanje v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.

3. Izberite dejanje  (hitro umerjanje).

4. Preizkusite umerjanje z gledanjem v različne cilje.

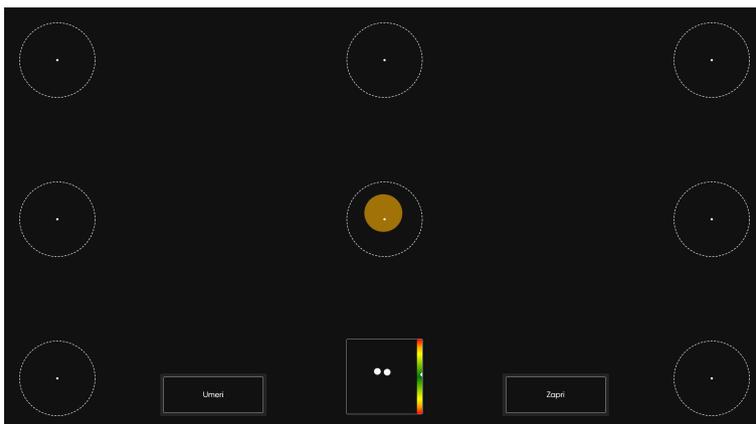

5. Po potrebi izberite gumb **Calibrate** (umerjanje).
6. Glejte v oranžne pike, eno za drugo, ki se pojavljajo na zaslonu, dokler ne izginejo.
7. Preizkusite novo umerjanje.
8. Ponavljajte korake 7–9, dokler niste zadovoljni.
9. Izberite gumb **Close**.

Za več informacij o umerjanju glejte [5.2.1 Kako deluje postopek umerjanja v TD Control?](#), stran 37

#### 4.3.4 Kako preklopi svojo napravo na spanje z TD Control?



Uporaba te funkcije pomeni, da bo moral nekdo drug zbuditi napravo, saj funkcija bujenje s strmenjem ni na voljo.

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard).
3. Izberite ikono  (spanje).
4. Izberite enega od naslednjih gumbov:
  - **Sleep** – za preklon naprave na spanje.
  - **Cancel** – za preklic preklopa naprave na spanje.

#### 4.3.5 Kako dostopam do nastavitvev v TD Control?




1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve) za dostop do nastavitvev za TD Control.  
Za več informacij o razpoložljivih nastavitvah glejte [5 Nastavitve TD Control](#), stran 33

### 4.3.6 Kako dostopam do **beležnice** v TD Control?




1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (beležnica), da odprete beležnico.

# 5 Nastavitve TD Control

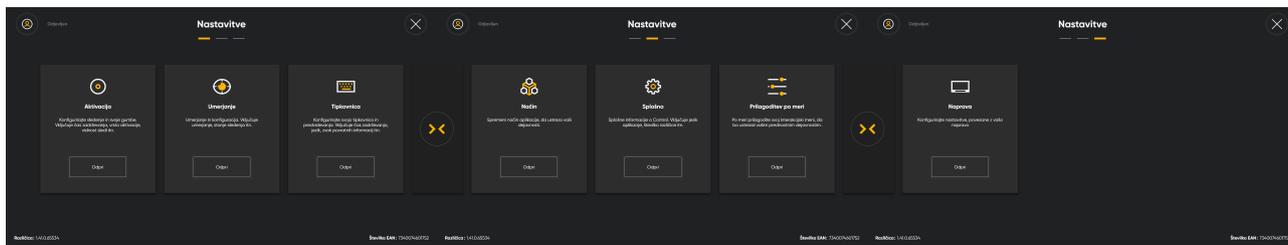

Simboli	Dejanje	Opis
	Aktivacija	Odpre nastavitve za <b>aktivacijo in povratne informacije</b> . Za več informacij glejte 5.1 Aktivacija , stran 33.
	Umerjanje	Odpre nastavitve za <b>umerjanje</b> . Za več informacij glejte 5.2 Umerjanje , stran 37.
	Tipkovnica	Odpre nastavitve za <b>tipkovnico</b> . Za več informacij glejte 5.3 Tipkovnica , stran 41.
	Način	Odpre <b>Način</b> nastavitvev. Za več informacij glejte 5.4 Način , stran 45.
	Splošno	Odpre <b>Splošne</b> nastavitve. Za več informacij glejte 5.5 Splošno , stran 46.
	Prilagoditev po meri	Odpre Nastavitve <b>po meri</b> . Za več informacij glejte 5.6 Prilagoditev po meri , stran 48.
	Naprava	Odpre Nastavitve <b>naprave</b> . Za več informacij glejte 5.7 Naprava .
	Moj račun	Odpre <b>Moj račun</b> . Za več informacij glejte 5.8 Moj račun , stran 51.

## 5.1 Aktivacija

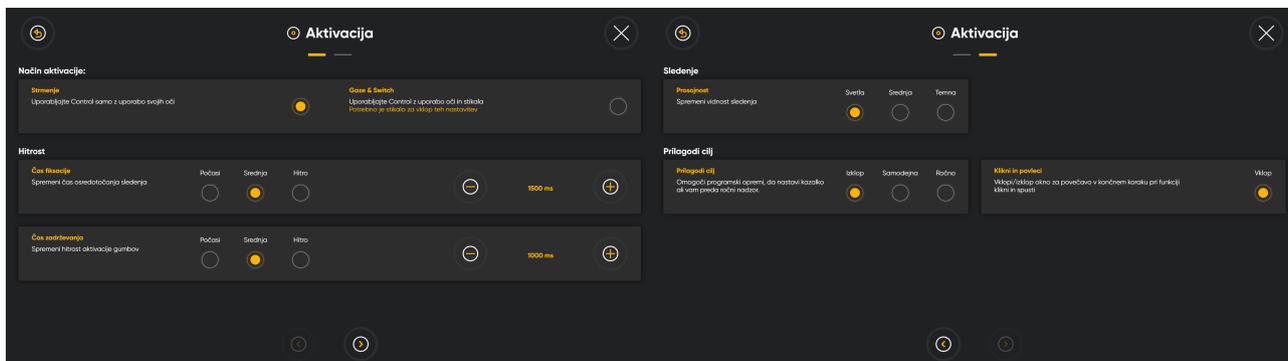

## 5.1.1 Način aktivacije:

### 5.1.1.1 Kako spremenim način aktivacije v TD Control

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (aktivacija), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Poglejte v razdelek **Način aktivacije**.
7. Izberite enega od naslednjih radijskih gumbov:
  - **Gaze** – interakcija s Control samo z uporabo svojih oči
  - **Gaze & Switch** – interakcija s Control z uporabo oči in stikala

 Potrebno je stikalo za vklop teh nastavitvev.

8. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
9. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.1.2 Hitrost

### 5.1.2.1 Kako izberem čas osredotočenja za sledenje v TD Control

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (aktivacija), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Glejte v razdelek **Speed** (hitrost).
7. Izberite radijski gumb za **čas osredotočenja** za eno od naslednjih vrednosti:
  - **Počasi** (privzeto)
  - Srednje
  - Hitro

8. Po potrebi natančno nastavite čas z gumboma  in .
9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.1.2.2 Kako spremenim/nastavim čas zadrževanja za gumbе v TD Control

Čas zadrževanja je čas, ki ga ima uporabnik, da fiksira strmenje v elemente dejanja v meniju za interakcijo in zunajzaslonskem meniju ter aktivira izbrano dejanje.

 Ta nastavev je samo za čas zadrževanja za gumbе. Na voljo je tudi nastavev časa zadrževanja za tipkovnico. Za več informacij glejte 5.3.2.1 *Kako spremenim/nastavim čas zadrževanja za tipkovnico v TD Control?*.

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (aktivacija), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Glejte v razdelek **Speed** (hitrost).
7. Izberite radijski gumb za **čas zadrževanja** za eno od naslednjih vrednosti:
  - **Počasi** (privzeto)
  - Srednje
  - Hitro

8. Po potrebi natančno nastavite čas z gumboma  in .

9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.1.3 Sledenje

#### 5.1.3.1 Kako spremenim/nastavim prosojnost za sledenje v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (aktivacija), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Izberite gumb  (naslednja stran), da odprete naslednjo stran z nastavitvami.
7. Glejte v razdelek **Trace** (sledenje).
8. Izberite radijski gumb za **prosojnost** za eno od naslednjih vrednosti:
  - **Svetla** (privzeto)
  - Srednja
  - Temna

9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.1.4 Prilagodi cilj

### 5.1.4.1 Kako lahko izberem, na kakšen način bo prilagajanje cilja delovalo v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (aktivacija), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Izberite gumb  (naslednja stran), da odprete naslednjo stran z nastavitvami.
7. Poglejte v razdelek **Adjust Target** (prilagodi cilj).
8. Izberite radijski gumb za **prilagajanje cilja** za eno od naslednjih vrednosti:
  - **Izklop** (privzeto) – ročno izberite dejanje za prilagajanje cilja iz Interaction Menu, kadar želite nastaviti cilj.
  - Samodejno – krmilnik Control bo prilagodil cilj. Sistem se bo naučil, kako biti boljši in se sčasoma prilagodil uporabniku.
  - Ročno – prilagajanje cilja se bo zagnalo samodejno pri fiksaciji, da bo lahko uporabnik izbral cilj, preden se odpre Interaction Menu, nato pa še želeno dejanje.




Uporabniki z manj natančnim strmenjem lahko pridobijo z ročnim prilagajanjem cilja.

9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.1.4.2 Kako izberem obnašanje okna za povečavo za **klikni in povleci** v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (aktivacija), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Izberite gumb  (naslednja stran), da odprete naslednjo stran z nastavitvami.
7. Poglejte v razdelek **Adjust Target** (prilagodi cilj).
8. Izberite radijski gumb za **klikni in povleci**, da vklopite/izklopite okno za povečavo v končnem koraku, kadar izvajate dejanje klikni in povleci.
9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.2 Umerjanje

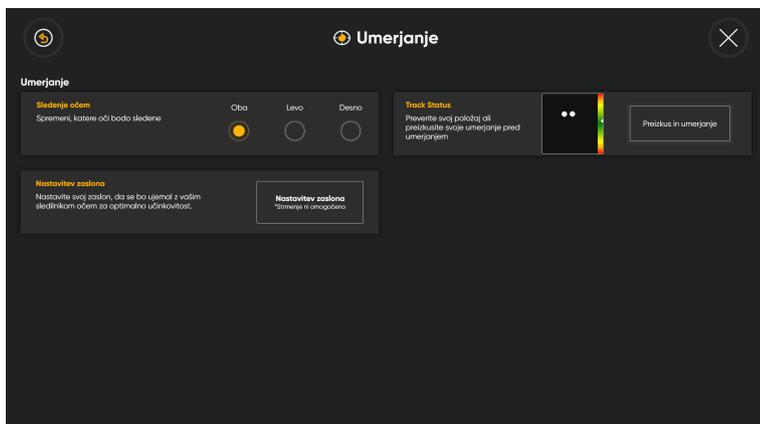

### 5.2.1 Kako deluje postopek umerjanja v TD Control?


Postopek umerjanja deluje tako:

Preskusno umerjanje bo prikazano, ko se umerjanje zažene ne glede na to, ali gre za hitro ali običajno umerjanje. Ta stran nudi možnost za ocenjevanje kakovosti umerjanja.


Na zaslonu za preskusno umerjanje so krogi z majhno piko v središču. Oranžna pika prikazuje, kam gleda uporabnik. Z osredotočenjem strmenja na eno od pik je prikazano, kje sledilnik očem zazna osredotočenje na piko in kako majhen ali velik je zamik.



Če je oranžni krog znotraj pikastega belega kroga, potem je umerjanje dovolj dobro za uporabo TD Control.

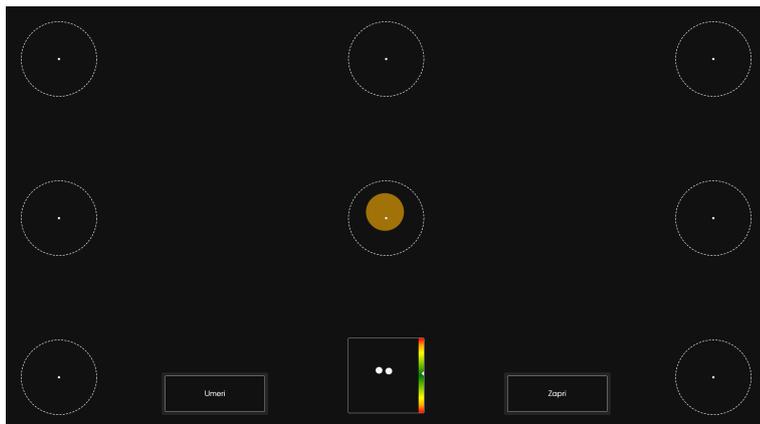

Če izberete gumb za umerjanje, se bo prikazal prvi zaslon za umerjanje. To je črni zaslon in na sredini zaslona je ena oranžna pika s črnim središčem.

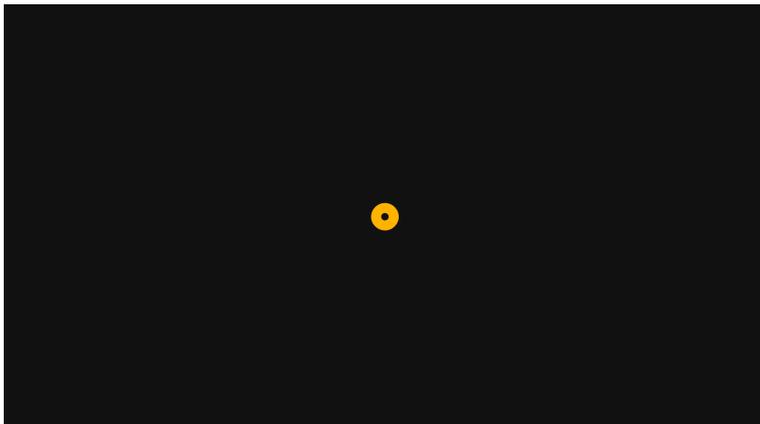

Nič se ne bo zgodilo, dokler uporabnik ne osredotoči strmenja na piko; sledilnik očem bo zaznal osredotočenje in pika bo enkrat utripnila ter izginila.



Dokler pike ostanejo na zaslonu, sledilnik očem še ni registriral podatkov strmenja za ta položaj.

Prikazal se bo nov zaslon. To je črni zaslon in v štirih kotih bo prisotna oranžna pika s črnim središčem.



Nič se ne bo zgodilo, dokler uporabnik ne osredotoči strmenja na eno od pik; sledilnik očem bo zaznal osredotočenje na to piko in pika bo enkrat utripnila ter izginila.



Dokler pike ostanejo na zaslonu, sledilnik očem še ni registriral podatkov strmenja za ta položaj.

Ko uporabnik osredotoči svoje strmenje na vse pike na zaslonu in ko vse pike izginejo, je postopek umerjanja končan in znova se bo prikazal zaslon za preskusno umerjanje.

Preizkusite umerjanje s pogledom v kroge na zaslonu. Zaprite zaslon za preskusno umerjanje ali po potrebi zaženite novo umerjanje.

## 5.2.2 Kako izberem, kateremu očesu bo izvedeno sledenje v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.

3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (umerjanje), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Glejte v razdelek **Calibration** (umerjanje).
7. Izberite radijski gumb za **sledenje očem** na enega od naslednjih načinov, da bo sledilnik očem lahko sledil uporabnikovim očem:
  - **Obe** (privzeto)
  - Levo
  - Desno
8. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
9. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.2.3 Kako preverim položaj uporabnika pri uporabi sledenja stanja v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.


2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (umerjanje), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Preverite položaj uporabnika, tako da pogledate polje **Track Status** (slednje stanja). Za več informacij glejte 3.5 Polje Track Status (sledenje stanja)
7. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
8. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.2.4 Kako izvedem umerjanje uporabnika v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (umerjanje), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Preverite položaj uporabnika, tako da pogledate polje **Track Status** (slednje stanja). Za več informacij glejte 3.5 Polje Track Status (sledenje stanja)
7. Izberite gumb **Test & Calibrate** (preizkušanje in umerjanje).

Odpre se stran Check calibration (Preveri umerjanje).

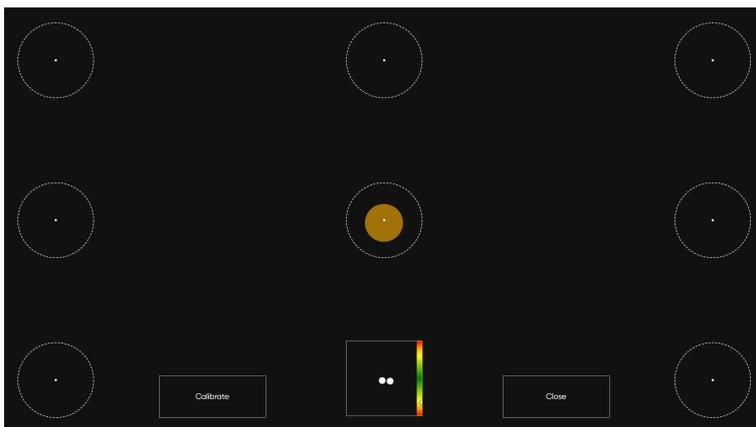

8. Izberite gumb **Calibrate** (umerjanje).
9. Glejte v oranžne pike, eno za drugo, ki se pojavljajo na zaslonu, dokler ne izginejo.
10. Preizkusite novo umerjanje.
11. Ponavljajte korake 7–9, dokler niste zadovoljni.
12. Izberite gumb **Close**.

### 5.2.5 Kako spremenim nastavitve zaslona za moj sledilnik očem v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.


2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (umerjanje), da najdete kartico s pravnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Izberite gumb **Display Setup** (Nastavitev zaslona).



Ta gumb ni omogočen za strmenje in ga je treba izbrati z dotikom ali miško.

7. Sledite navodilom na zaslonu.
8. Izberite gumb **Done** (opravljeno)
9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.3 Tipkovnica

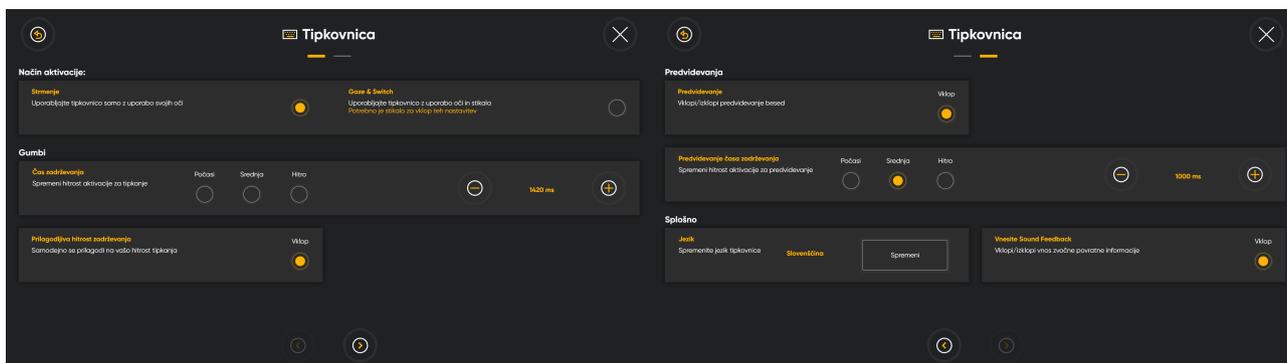

### Jezik

Prikazana je postavitev tipkovnice za izbrani jezik. Izberite gumb **Change** za spremembo postavitev tipkovnice za drug jezik. Na voljo so različne postavitve tipkovnice za jezike.

### 5.3.1 Način aktivacije:

#### 5.3.1.1 Kako spremenim način aktivacije v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.

3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.

4. Poiščite ikono  (tipkovnica), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.

5. Izberite gumb **Open** (odpri).

6. Poglejte v razdelek **Način aktivacije**.

7. Izberite enega od naslednjih radijskih gumbov:

- **Gaze** – interakcija s Control samo z uporabo svojih oči
- **Gaze & Switch** – interakcija s Control z uporabo oči in stikala



Potrebno je stikalo za vklop teh nastavitvev.

8. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.

9. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.3.2 Gumbi

#### 5.3.2.1 Kako spremenim/nastavim čas zadrževanja za tipkovnico v TD Control?



Ta nastavev je samo za čas zadrževanja za tipkovnico. Na voljo je tudi nastavev časa zadrževanja za gumb. Za več informacij glejte 5.1.2.2 *Kako spremenim/nastavim čas zadrževanja za gumb v TD Control*.

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem.

Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (tipkovnica), da najdete kartico s praviimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Glejte v razdelek **Buttons** (gumbi).
7. Izberite radijski gumb za enega od naslednjih **časov zadrževanja** (ms):
  - **Počasi** (privzeto)
  - Srednja
  - Hitro
8. Po potrebi natančno nastavite čas z gumboma  in .
9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.3.2.2 Kako izberem obnašanje za prilagodljivo hitrost zadrževanja v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (tipkovnica), da najdete kartico s praviimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Glejte v razdelek **Buttons** (gumbi).
7. Izberite radijski gumb za **prilagodljivo hitrost zadrževanja**, da vklopite/izklopite prilagodljivo hitrost zadrževanja.
8. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
9. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.3.3 Predvidevanje

### 5.3.3.1 Kako izberem obnašanje za predvidevanja v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (tipkovnica), da najdete kartico s praviimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).

6. Izberite gumb  (naslednja stran), da odprete naslednjo stran z nastavitvami.
7. Glejte v razdelek **Predictions** (predvidevanja).
8. Izberite radijski gumb za **Prediction**, da vklopite/izklopite predvidevanje besed.
9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.3.3.2 Kako spremenim/nastavim čas zadrževanja predvidevanja v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (tipkovnica), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Izberite gumb  (naslednja stran), da odprete naslednjo stran z nastavitvami.
7. Glejte v razdelek **Predictions** (predvidevanja).
8. Izberite radijski gumb za enega od naslednjih **časov zadrževanja predvidevanja** (ms):
  - **Počasi** (privzeto)
  - Srednja
  - Hitro
9. Po potrebi natančno nastavite čas z gumboma  in .
10. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve tipkovnice.
11. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.3.4 Splošno

### 5.3.4.1 Kako spremenim/nastavim jezik tipkovnice v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (tipkovnica), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Izberite gumb  (naslednja stran), da odprete naslednjo stran z nastavitvami.
7. Glejte v razdelek **General** (splošno) pod **Language** (jezik).  
Za naslovom Languages (jeziki) se bo prikazal trenutni jezik.
8. Izberite gumb **Change** (spremeni).

9. Poskrbite, da bo izbrani gumb **Installed** (nameščen).
10. Izberite prednostni jezik.
11. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve tipkovnice.
12. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
13. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

#### 5.3.4.2 Kako prenesem nov jezik tipkovnice v TD Control?



Pred nadaljevanjem poskrbite, da bo vaša naprava povezana z internetom.

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (tipkovnica), da najdete kartico s praviimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Izberite gumb  (naslednja stran), da odprete naslednjo stran z nastavitvami.
7. Glejte v razdelek **General** (splošno) pod **Language** (jezik). Za naslovom Languages (jeziki) se bo prikazal trenutni jezik.
8. Izberite gumb **Change** (spremeni).
9. Izberite gumb **Download** (prenos).
10. Izberite ikono  (prenos) za želeni jezik.
11. Izberite gumb **Install** (namesti), da prenesete izbrani jezik.
12. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve tipkovnice.
13. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
14. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

#### 5.3.4.3 Kako izberem obnašanje za vnos zvočne povratne informacije v TD Control?


1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Poiščite ikono  (tipkovnica), da najdete kartico s praviimi nastavitvami.
5. Izberite gumb **Open** (odpri).
6. Izberite gumb  (naslednja stran), da odprete naslednjo stran z nastavitvami.
7. Glejte v razdelek **General** (splošno).

8. Izberite radijski gumb za **Type Sound Feedback**, da vklopite/izklopite vnos zvočne povratne informacije.

9. Izberite gumb  (naslednja stran), da odprete naslednjo stran z nastavitvami.

10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.4 Način

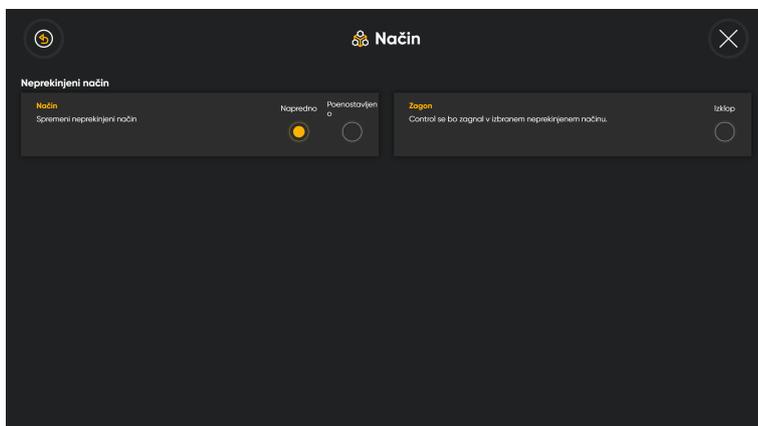

### 5.4.1 Neprekinjeni način

#### 5.4.1.1 Kako izberem, katera vrsta **neprekinjenega načina** bo uporabljena v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.

3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.

4. Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.

5. Poiščite ikono  (način), da najdete kartico s praviimi nastavitvami.

6. Izberite gumb **Open** (odpri).

7. Poglejte v razdelek **Continuous Mode** (neprekinjeni način).

8. Izberite enega od naslednjih radijskih gumbov pod **Mode** (način):

- Napredno
- Poenostavljeno

Za več informacij glejte 3.3.1.1 *Neprekinjeni način menija Off-Screen Menu*, stran 12.

9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve tipkovnice.


10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

#### 5.4.1.2 Kako aktiviram/deaktiviram neprekinjeni način za **zagon** v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
5. Poiščite ikono  (način), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
6. Izberite gumb **Open** (odpri).
7. Poglejte v razdelek **Continuous Mode** (neprekinjeni način).
8. Izberite radijski gumb za **Startup**, da vklopite/izklopite možnost, da se bo krmilnik Control zagnal v izbranem neprekinjenem načinu.
9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve tipkovnice.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.5 Splošno

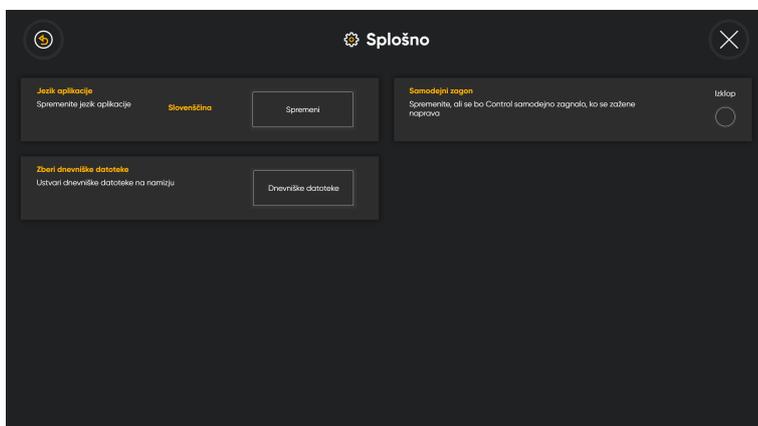

### 5.5.1 Kako izberem jezik aplikacije za TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
5. Poiščite ikono  (splošno), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
6. Izberite gumb **Open** (odpri).
7. Poglejte v razdelek **Application Language** (jezik aplikacije). Za naslovom Languages (jeziki) se bo prikazal trenutni jezik.
8. Izberite gumb **Change** (spremeni).
9. Izberite prednostni jezik.

10. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v **splošne** nastavitve.
11. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
12. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.5.2 Kako zberem dnevniške datoteke za TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
5. Poiščite ikono  (splošno), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
6. Izberite gumb **Open** (odpri).
7. Poglejte v razdelek **Collect Logs** (Zberi dnevniške datoteke).
8. Izberite gumb **Log** (dnevniška datoteka).
9. Izberite gumb **Yes** (da)

 Dnevniške datoteke bodo ustvarjene na namizju.


10. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
11. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.5.3 Kako izberem samodejni zagon TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
5. Poiščite ikono  (splošno), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
6. Izberite gumb **Open** (odpri).
7. Poglejte v razdelek **Auto Launch** (samodejni zagon).
8. Preklopite preklopno stikalo **Auto Launch** (samodejni zagon) na **On** (vklop), da boste samodejno zagnali TD Control, ko se na napravi zažene sistem Windows®.
9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.6 Prilagoditev po meri

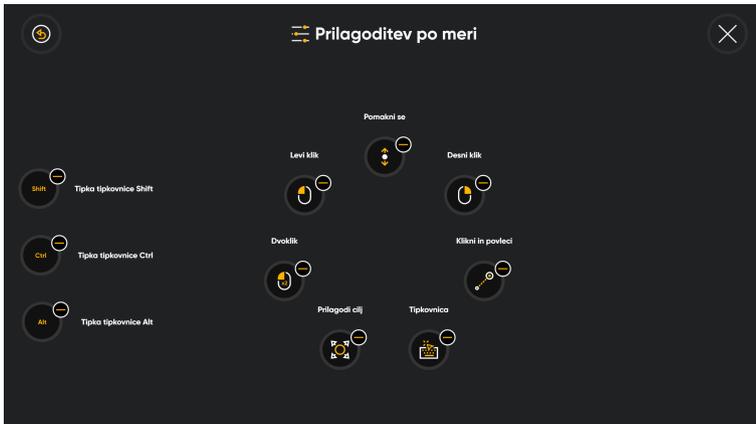

### 5.6.1 Kako odstranim dejanje iz interakcijskega menija v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
5. Poiščite ikono  (prilaganje po meri), da najdete kartico s praviimi nastavitvami.
6. Izberite gumb **Open** (odpri).
7. Izberite gumb  za dejanje, ki ga boste odstranili.
8. Izberite gumb **Remove** (odstrani).
9. Ponavljajte korake 7-8, dokler niste zadovoljni.
10. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
11. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.


### 5.6.2 Kako dodam dejanje v interakcijski meni v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
5. Poiščite ikono  (prilaganje po meri), da najdete kartico s praviimi nastavitvami.

6. Izberite gumb **Open** (odpri).
7. Izberite gumb  (dodaj) za želeni položaj.
8. Izberite **Action** (dejanje), ki ga želite dodati.
9. Izberite gumb **Add** (dodaj).
10. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve tipkovnice.
11. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.7 Naprava

 Ta funkcija je na voljo samo za serije I-Series: I-13 in I-16.

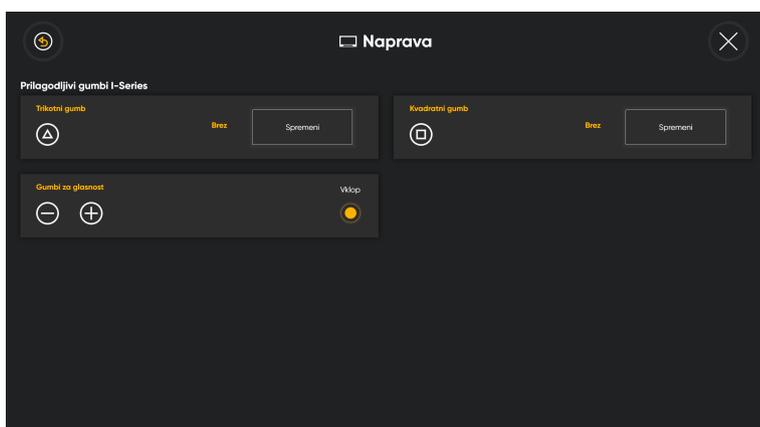

### 5.7.1 Prilagodljivi gumbi I-Series

#### 5.7.1.1 Kako nastavim/spremenim dejanje za trikotni gumb za serije I-Series v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
5. Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
6. Poiščite ikono  (naprava), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
7. Izberite gumb **Open** (odpri).
8. Izberite gumb **Change** (spremeni) za razdelek s trikotnim gumbom
9. Izberite radijski gumb za enega od naslednjih funkcij:
  - Track Status
  - Umeri
  - Switcher

- Tipkovnica
  - **None** (privzeto)
- Izberite gumb **OK**.
  - Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve tipkovnice.
  - Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.7.1.2 Kako nastavim/sprememim dejanje za kvadratni gumb za serije I-Series v TD Control?

- Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.

- Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
- Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
- Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
- Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
- Poiščite ikono  (naprava), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
- Izberite gumb **Open** (odpri).
- Izberite gumb **Change** (spremeni) za razdelek s trikotnim gumbom
- Izberite radijski gumb za enega od naslednjih funkcij:
  - Track Status
  - Umeri
  - Switcher
  - Tipkovnica
  - **None** (privzeto)
- Izberite gumb **OK**.
- Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v **splošne** nastavitve.
- Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

### 5.7.1.3 Kako aktiviram/deaktiviram gumb za glasnost pri seriji I-Series v TD Control?

- Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
- Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
- Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
- Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
- Izberite gumb  (naslednji zaslon) na desni strani.
- Poiščite ikono  (naprava), da najdete kartico s pravilnimi nastavitvami.
- Izberite gumb **Open** (odpri).
- Izberite radijski gumb za **Volume Buttons**, da vklopite/izklopite gumb za glasnost.

9. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
10. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.

## 5.8 Moj račun

Vaš brezplačni račun myTobiiDynavox.com vam omogoča dostop do številnih prednosti, vključno s shranjevanjem v oblaku za varnostno kopiranje predvidevanj in sinhronizacijo med različnimi napravami.

### 5.8.1 Kako ustvarim račun za Moj račun v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Izberite gumb  (Moj račun).
5. Izberite gumb **Create Account** (Ustvari račun).
6. Izpolnite vsa polja z uporabo gumba  (uredi) za vsako vrednost.
7. Izberite radijski gumb, da se **strinjate s Pogoji in določili**.



Izberite gumb **Terms and Conditions** (Pogoji in določila), da preberete pogoje in določila.

8. Izberite gumb **Create** (ustvari).  
Na vaš e-poštni naslov bomo poslali potrditveno e-pošto.
9. Odprite svoj e-poštni račun.
10. Odprite **Confirm Email** (potrdi e-pošto) prek **Tobii Dynavox**.
11. Izberite gumb **Verify Email** (Potrdi e-pošto) v e-pošti, da potrdite e-poštni naslov.

### 5.8.2 Kako se prijavim v Moj račun v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Zunajzaslonski meni bo postal viden v spodnjem srednjem delu zaslona.
2. Izberite ikono  (Dashboard), da odprete Dashboard.
3. Izberite dejanje  (nastavitve), da odprete nastavitve TD Control.
4. Izberite gumb  (Moj račun).
5. Izberite gumb  (uredi) za **e-poštni naslov**.
6. Vnesite **e-poštni naslov**.
7. Izberite gumb  (uredi) za **geslo**.
8. Vnesite **Password** (geslo).
9. Izberite gumb **Log In** (prijava).

10. Izberite gumb  (nazaj), da se vrnete v nastavitve TD Control.
11. Izberite gumb  (zapri) za izhod iz nastavitvev TD Control.


# 6 Switcher

Switcher je pomožna aplikacija, ki omogoča preprosto preklapljanje med nameščenimi aplikacijami Tobii Dynavox, aplikacijami na splošno in odprtimi okni.

## 6.1 Kako dostopam do preklopnika Switcher v TD Control?

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Aplikacija Switcher bo postala vidna na spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite Switcher   
Switcher se bo odprl.

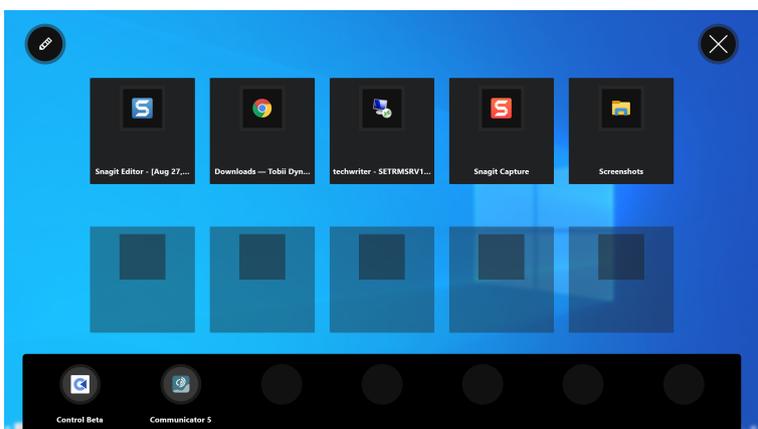


## 6.2 Kako preklopim v aplikacijo v preklopniku Switcher

 Če želite dodati aplikacijo, ki ni Tobii Dynavox, poskrbite, da boste zagnali zeleno aplikacijo pred nadaljevanjem.

1. Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Aplikacija Switcher bo postala vidna na spodnjem srednjem delu zaslona.

2. Izberite Switcher 
3. Izberite zeleno aplikacijo.

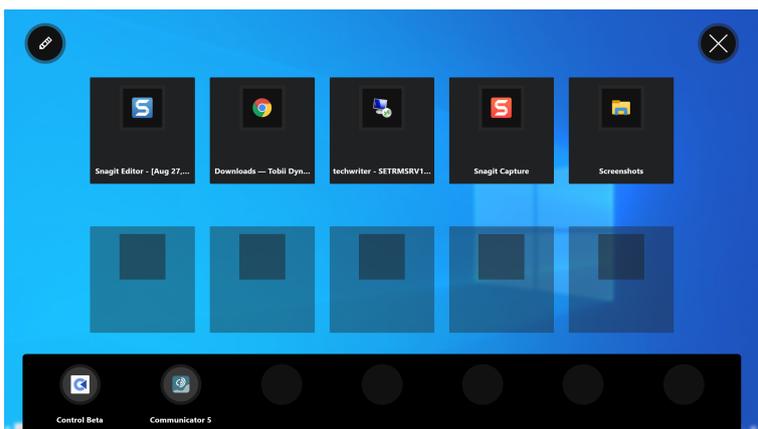

- Izberite gumb  (opravljeno) v zgornjem levem kotu.
- Izberite gumb  (zapri).

## 6.3 Kako dodam aplikacijo v preklopniku Switcher?

 Če želite dodati aplikacijo, ki ni Tobii Dynavox, poskrbite, da boste zagnali zeleno aplikacijo pred nadaljevanjem.

- Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Aplikacija Switcher bo postala vidna na spodnjem srednjem delu zaslona.
- Izberite Switcher .
- Izberite gumb  (uredi) v zgornjem levem kotu.
- Izberite gumb  (dodaj) za zeleno lokacijo.
- Izberite pravilni zavihek:
  - Tobii Dynavox
  - Trenutno delujoča aplikacija
- Izberite zeleno aplikacijo.
- Izberite gumb  (opravljeno) v zgornjem levem kotu.
- Izberite gumb  (zapri).

## 6.4 Kako odstranim aplikacijo iz preklopnika Switcher?

- Usmerite svoje strmenje pod zaslon, na sredino sledilnika očem ali v območje sledilnika očem. Aplikacija Switcher bo postala vidna na spodnjem srednjem delu zaslona.
- Izberite Switcher .
- Izberite gumb  (uredi) v zgornjem levem kotu.
- Izberite gumb  (odstrani) za zeleno lokacijo.
- Izberite gumb **Remove** (odstrani), da potrdite.
- Izberite gumb  (opravljeno) v zgornjem levem kotu.
- Izberite gumb  (zapri).



Avtorske pravice ©Tobii Dynavox AB. Vsi izdelki in storitve niso na voljo na vseh lokalnih trgih. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vse blagovne znamke so last njihovih zadevnih lastnikov.

## Podpora za vašo napravo Tobii Dynavox

### Pridobi spletno pomoč

Glejte stran s podporo za specifični izdelek za napravo Tobii Dynavox. Vsebuje posodobljene informacije o težavah, nasvetih in zvijačah, povezanih z izdelkom. Poiščite naše strani za podporo na spletnem naslovu: [www.TobiiDynavox.com/support-training](http://www.TobiiDynavox.com/support-training)

### Obrnite se na svojega svetovalca za rešitve ali prodajalca

V primeru vprašanj ali težav z izdelkom se za pomoč obrnite na svetovalca za rešitve družbe Tobii Dynavox ali pooblaščenega prodajalca. Ta najbolje pozna vaše osebne nastavitve in vam lahko najbolje pomaga z nasveti in usposabljanjem glede izdelka. Za podrobnosti o stiku obiščite [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)