

Dekontamination des Tobii Dynavox Geräts

Benötigte Hilfsmittel

Zur Verwendung in Krankenhäusern vorgesehene Reinigungstücher oder vergleichbare Desinfektionstücher zur Infektionsbekämpfung.

Gilt für folgende Produkte

Tobii I-Series	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox Indi® 7	Tobii M-Series
Tobii Dynavox I-Series(+)	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Speech Case	Tobii C-Series
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox SC Tablet	Dynavox T-Series
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox EyeMobile Bracket	Tobii Dynavox Mobile Mini	Dynavox Maestro
Tobii PCEye	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii Dynavox AccessIT 3	Tobii S32
Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Bracket	TD Pilot	
Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox EyeR	

Verfahrensweise

Dekontamination und Reinigung

1. Fahren Sie Ihr Gerät vor der Reinigung vollständig herunter.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
3. Entfernen Sie alle Kabel.
4. Wischen Sie alle Außenflächen mit zur Verwendung in Krankenhäusern vorgesehenen Reinigungstüchern oder vergleichbaren Desinfektionstüchern zur Infektionsbekämpfung ab.
5. Lassen Sie das Gerät von selber trocknen.
6. Das mitgelieferte Zubehör muss in der gleichen Weise desinfiziert werden.
7. Wenn nach der Reinigung Schlieren zurückbleiben, polieren Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch.
8. Entsorgen Sie benutzte Reinigungsmaterialien sachgemäß.



Richten Sie keine Sprays direkt auf das Gerät, da unerwünschte Feuchtigkeit darin eindringen kann.

Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe
Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt zu Tobii Dynavox Produktberater oder Fachhändler
Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Produktberater oder Fachhändler von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.TobiiDynavox.com/contact