

Tobii Dynavox Desinfección del dispositivo

Equipo requerido

Paños de limpieza hospitalarias o toallitas desinfectantes que sean su equivalente para el control de infecciones.

Productos aplicables

Tobii I-Series	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox Indi® 7	Tobii M-Series
Tobii Dynavox I-Series(+)	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Speech Case	Tobii C-Series
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox SC Tablet	Dynavox T-Series
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox EyeMobile Bracket	Tobii Dynavox Mobile Mini	Dynavox Maestro
Tobii PCEye	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii Dynavox AccessIT 3	Tobii S32
Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Bracket	TD Pilot	
Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox EyeR	

Procedimiento

Desinfectar y limpiar

1. Antes de limpiar, apague completamente su dispositivo.
2. Desenchufe su dispositivo.
3. Retire todos los cables.
4. Limpie sobre todas las superficies externas con paños de limpieza de grado hospitalario o toallitas desinfectantes que sean equivalentes para el control de infecciones.
5. Permita que el dispositivo se seque naturalmente.
6. Cualquier accesorio incluido también debe desinfectarse de la misma manera.
7. Si quedan residuos de la limpieza, limpie la pantalla con un paño suave y seco.
8. Deseche los materiales de limpieza usados de manera adecuada.



No utilice productos en aerosol que puedan saturar el dispositivo o que permitan el ingreso de humedad en la unidad.

Soporte técnico para su dispositivo Tobii Dynavox

Obtener ayuda en línea

Consulte la página de Soporte de su dispositivo Tobii Dynavox. Contiene información actualizada sobre problemas y sugerencias y trucos relacionados con el producto. Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en: www.TobiiDynavox.com/support-training

Póngase en contacto con su consultor de soluciones o su distribuidor.

Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su consultor de soluciones autorizado de Tobii Dynavox para recibir ayuda. Conocen su configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite www.TobiiDynavox.com/contact