



**tobii** dynavox

TD I-Series


# Aloituspapas

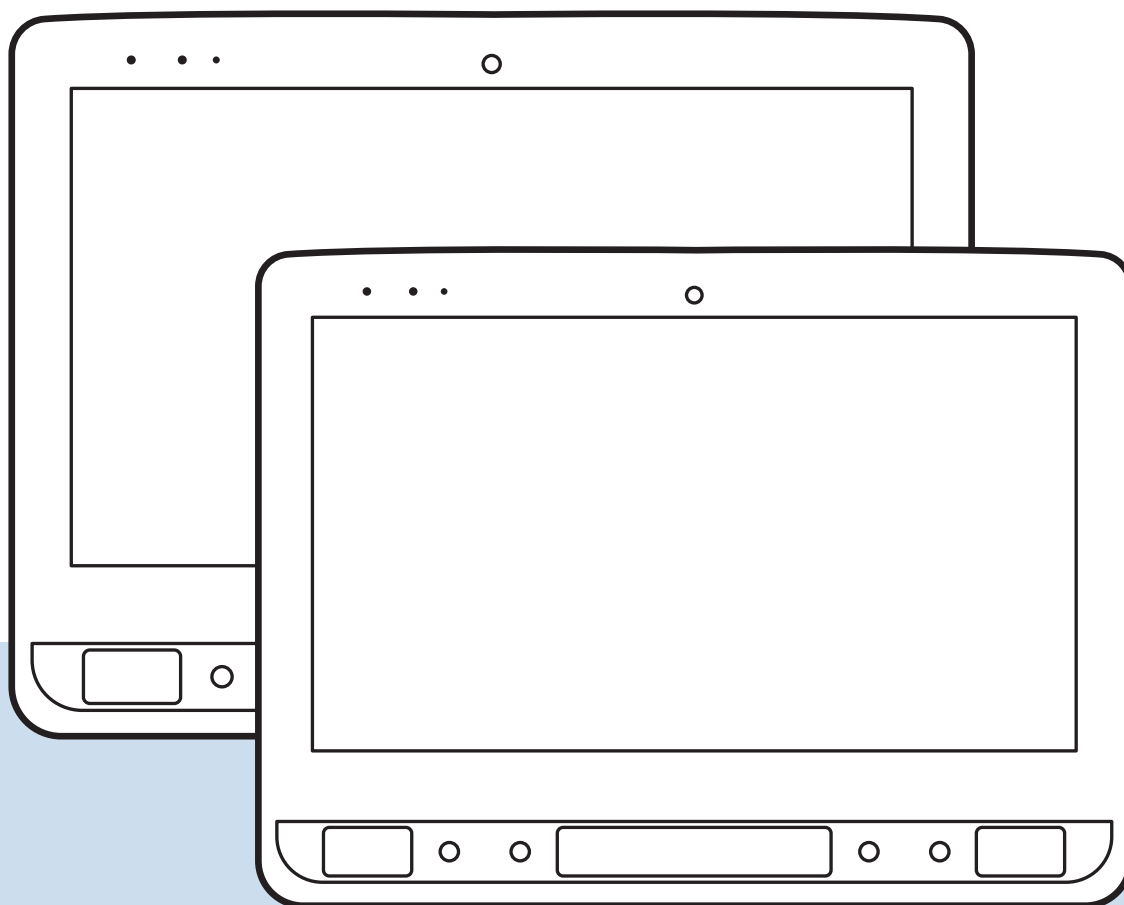


# Sisältö

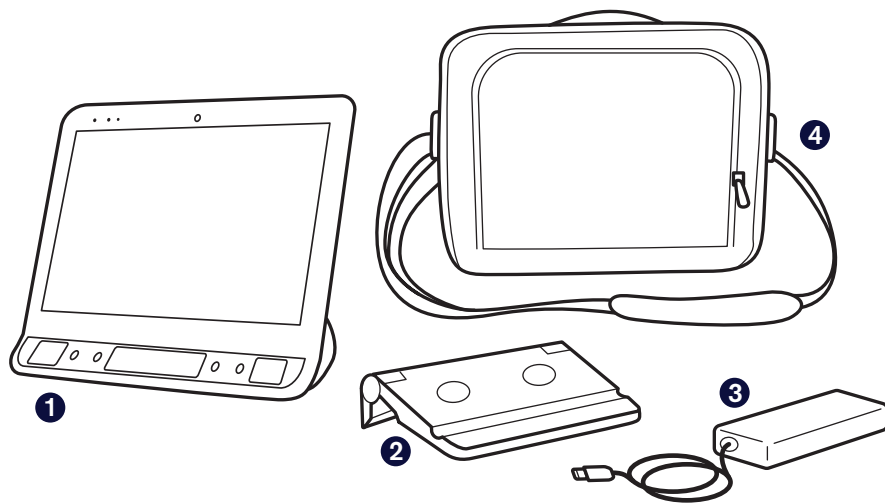


# Tutustu laitteeseesi

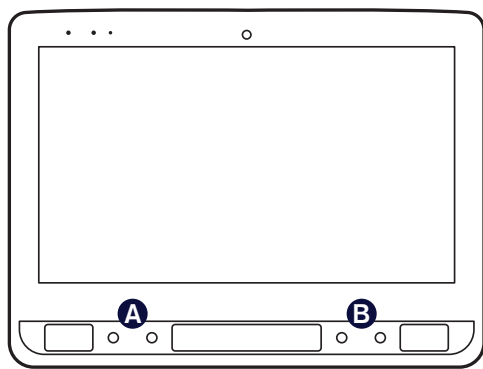

Etupuoli

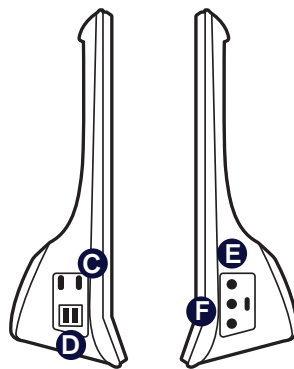

Sivut

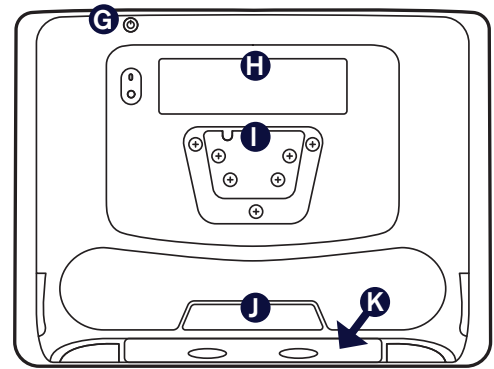

Takaisin

- A** Mukautettavat painikkeet
- B** Äänvoimakkuuspainikkeet
- C** Virtaliitin
- D** USB 3.0 -liittimet

- E** Kuulokeliitäntä
- F** Kytkinportit 1 ja 2
- G** Virtapainike
- H** Kakkosnäyttö

- I** Kiinnityslevy\*
- J** IR-vastaanotin/-lähetin
- K** Pääsy akkuun\*\*

\*Jos käytät Daessy-jalustaa, tarvitset muuntosarjan: [qrco.de/tdmkodus](http://qrco.de/tdmkodus)


\*\*Akku sijaitsee laitteen pohjassa\*\*

Asenna laitteesi ja aloita sen käyttö tämän oppaan vaiheita noudattaen.

## Vaihe 1: Alustava asennus

### Käynnistä laite


- 1 Liitä virtajohto laitteeseen ja kytke pistoke pistorasiaan.
- 2 Paina virtapainiketta.

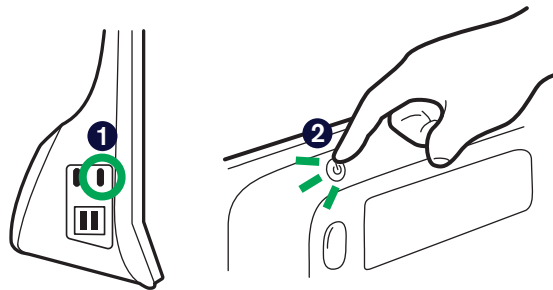

### Asennus


Kun käynnistät laitteen, näet yhden kahdesta näytöstä. Jos laitettasi ei ole esimääritetty, sinua kehoitetaan suorittamaan Windows-asennus ensin.

#### Windows-asennus

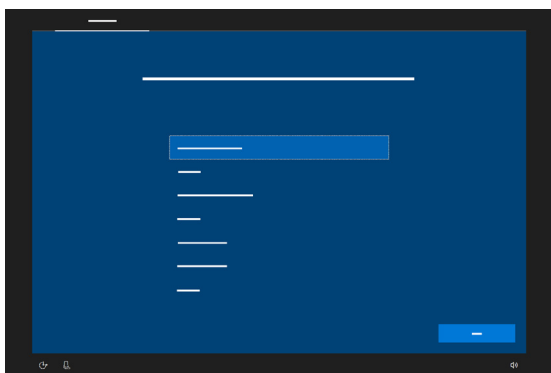

Tämä prosessi ei vaadi Microsoft-tiliä, mutta suosittelemme käyttäjätilin (ei hoitajan tilin) luomista tai siihen yhdistämistä.

#### Asetusavustaja: valitse sovelluksesi

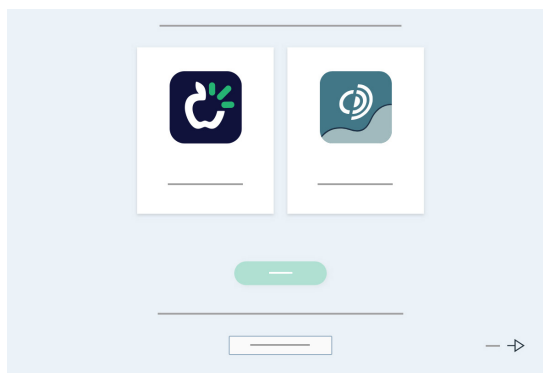

Valitse joko TD Snap® tai Communicator 5 oletussovellukseksi, jota käytät laitteen käynnistyessä.

## Vaihe 2: Määritä kommunikointiohjelmisto

Seuraa valitsemasi ohjelmiston kehotteita luodaksesi uuden käyttäjän tai palauttaaksesi olemassa olevan käyttäjätiedoston.



**TD Snap®**  
Symboli-tuetut viestinät



**Communicator 5**  
Tekstiviestintälaitteet







#### Huomaus

Älä suorita katseen seurannan kalibrointia ennen kuin laite on asennettu ja henkilö on mukavassa asennossa. Katso kiinnitystä ja sijoittamista koskevat vinkit vaiheesta 3.




## Vaihe 3: Asennus ja sijoittaminen

Valmistaudu käyttämään katseenseurantaa asettamalla TD I-Series -laitetta käyttävä henkilö mukavaan asentoon. Jos silmälasit ovat tarpeen, varmista, että ne ovat päässä ja linssit ovat puhtaat.


Kosketa mukautettavaa painiketta  käynnistääksesi Seurannan tilan, joka auttaa löytämään laitteesi optimaalisen etäisyyden ja sijainnin.

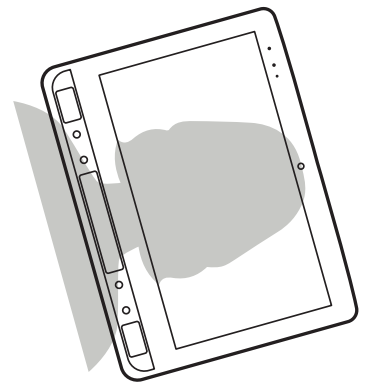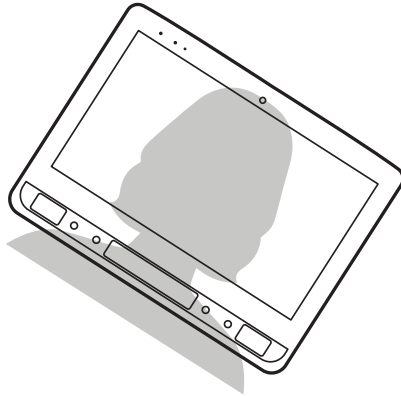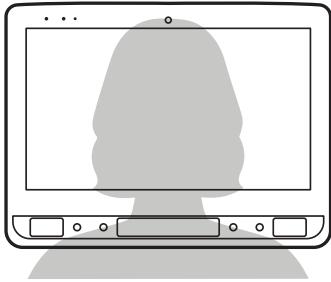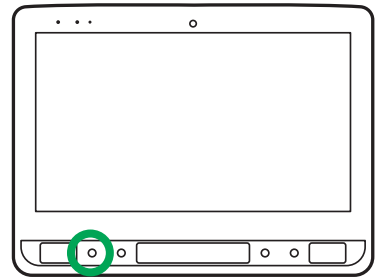

Aseta TD I-Series -laite kiinnitysjärjestelmälleen tai käytä säädettävää jalustaa vakaalla alustalla laitetta käyttävän henkilön edessä. Sen tulisi olla heidän silmiensä tasolla tai hieman sen alapuolella. Jos heidän päänsä on kallellaan, kallista laitetta vastaavasti. On tärkeää kohdistaa näytön tason kulma heidän kasvoihinsa nähden. Jos he istuvat pöydän tai työpöydän ääressä, voi olla tarve sijoittaa laite korkeammalle kuin pöydän pinta.

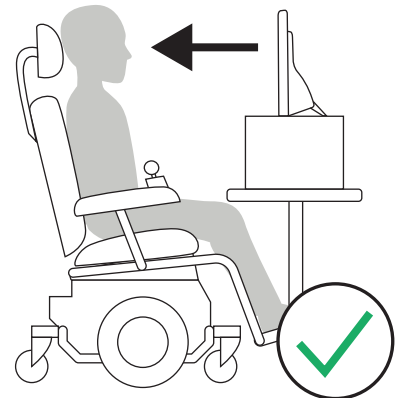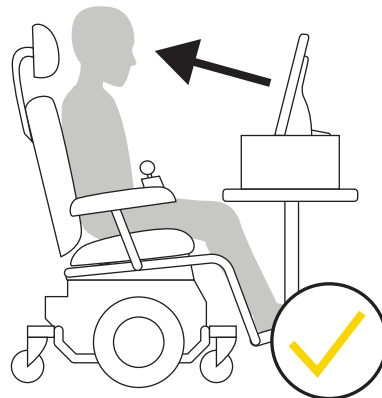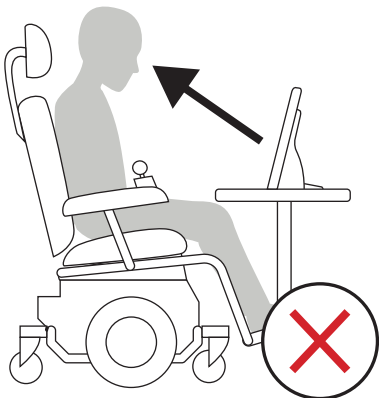

Laitteen sijaintia on ehkä tarkistettava seuraavan sivun kalibrointivaiheiden aikana. Säädä laitteen asentoa aina käyttäjälle sopivaksi, ei päinvastoin.

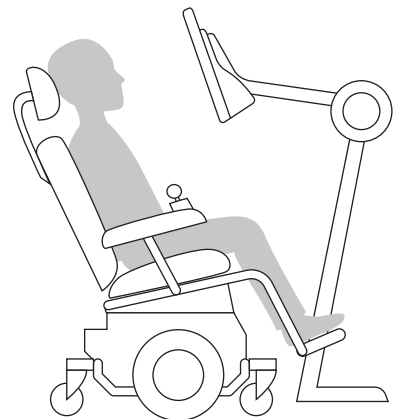

### Huomautus

Kiinnitysjärjestelmä on paras vaihtoehto laitteen tarkkaan sijoitteluun, jota on helppo säätää päivän mittaan. Saatavilla on useita kiinnitysvaihtoehtoja, kuten lattia-, pöytä- ja pyörätuolikiinnikkeet. Käy osoitteessa [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com) tai ota yhteyttä paikalliseen Tobii Dynavox -kumppaniin.

# Vaihe 4: Kalibro

Katseenseurannan tehokas käyttö ei edellytä täydellistä kalibroititilosta. Kun olet aloittamassa, kalibroi kerran murehtimatta liikaa pisteistä. Tärkeintä on harjoitella. Voit aina kalibroida uudelleen myöhemmin.



## Huomautus


Laitetta ei tarvitse kalibroida joka kerta, kun käytät sitä.

### TD Snap® -laitteen kalibrointi:

- 1 Valitse **Muokkaa**-painike.




- 2 Valitse **Käyttäjä**.

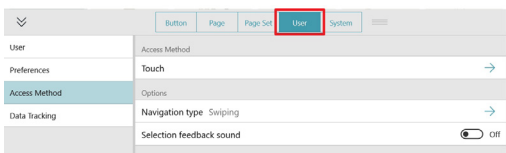


- 3 Valitse **Valintatapa**.

- 4 Valitse **Katseenseuranta**.

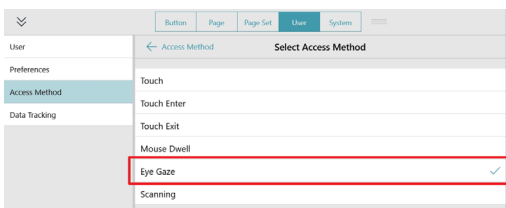

- 5 Vieritä alaspäin ja valitse **Kalibro**.

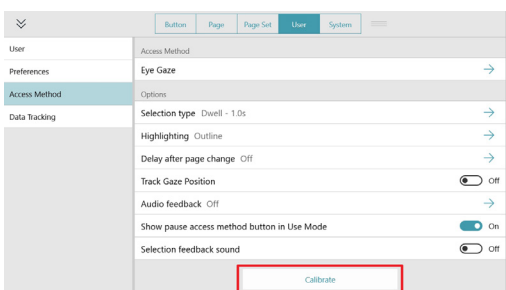

### Communicator 5:n kalibrointi:

- 1 Avaa **Pikavalikko**.


Avaa pikavalikko painamalla näppäimistön Ctrl + M-näppäinyhdistelmää, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tai koskettamalla, pitämällä ja vapauttamalla mitä tahansa kohtaa näytöllä.



- 2 Valitse **Lisäasetukset**.



- 3 Valitse **Syöttötapa** ja vahvista, että Katseohjaus on valittu.

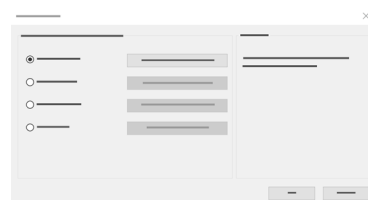

- 4 Valitse **Katseohjauksen asetukset**.

Tässä voit vaihtaa aktiivointityyppiä viiveajan ja kytkimen välillä, muuttaa kalibrointiprofiileita sekä käynnistää uuden kalibroinnin.



## Vaihe 5: Opi, harjoittele ja ratkaise ongelmia

TD I-sarjan laitteesi on nyt käyttövalmis! Voit aloittaa laitteesi ja sovellustesi tutkimisen. Kun olet valmis oppimaan lisää, tutustu TD Snap®- ja Communicator 5 -harjoituskortteihin. Ne näyttävät sinulle, miten käytät viestintäsovellustesi tärkeimpiä ominaisuuksia, kehität AAC-taitojasi ja ratkaiset ongelmia.



**TD Snap® -harjoituskortit**


[qrco.de/sbtcFI](https://qrco.de/sbtcFI)



**Communicator 5 -harjoittelukortit:**

[qrco.de/bgdHz3](https://qrco.de/bgdHz3)

## myTobiiDynavox.com

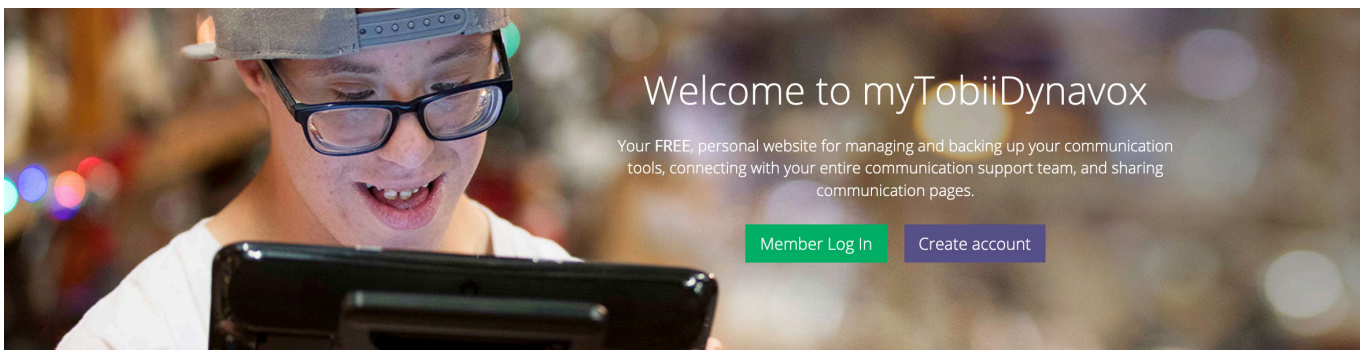

Maksuton myTobiiDynavox.com-tilisi tarjoaa sinulle useita etuja, mukaan lukien pilvitallennustila varmuuskopioita varten, sivuston synkronointi ja jako, oppituntisuunnitelmat ja paljon muuta!

### Liittymällä voit:

- Varmuuskopioi järjestelmäsi turvallisesti
- Lataa ilmaiset työkalut ja resurssit
- Lunasta ja hallinnoi rinnakkaislisenssejä
- Opi saatavilla olevat päivityksistä
- Siirry tekniseen tukeen ja usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ:t)
- Jaa sivustoja ja ruudukkokonaisuuksia



**myTobiiDynavox**

[myTobiiDynavox.com](https://myTobiiDynavox.com)

# Rinnakkaislisenssit

TD I-Series -laitteesi mukana toimitetaan TD Snap®- ja Communicator 5 -sovellusten rinnakkaislisenssit. Rinnakkaislisenssit sallivat näiden sovellusten käytön toisella laitteella, kuten kannettavalla tietokoneella. Rinnakkaislisenssit lunastetaan ja hallitaan myTobiiDynavox-tilisi kautta.



## Lunasta TD Snap® -rinnakkaislisenssi

- 1 Kirjaudu TD I-Series-laitteellasi myTobiiDynavox-tilillesi TD Snap® -sovelluksessa.  
(*Muokkaa > Käyttäjä > myTobiiDynavox-tili*)
- 2 Asenna TD Snap® rinnakkaislaitteeseesi. TD Snap® -asennusohjelmat ovat saatavilla osoitteessa [mytobiidynavox.com/Support/SnapCoreFirst](https://mytobiidynavox.com/Support/SnapCoreFirst) ja Apple App Store.
- 3 Avaa TD Snap® rinnakkaislaitteellasi ja kirjaudu sisään samalle myTobiiDynavox-tilille.  
(*Muokkaa > Käyttäjä > myTobiiDynavox-tili*)



## Lunasta Communicator 5 -rinnakkaislisenssi

- 1 Paikanna TD I-Series -laitteesi tuoteavain:  
Avaa TD I-Series -laitteesi työpöydältä **Laitteistoasetukset**.  
Valitse **Tuoteavain Laitteistoasetukset-valikon** vasemmalta puolelta. Tuoteavaimesi on lueteltu tässä.
- 2 Asenna Communicator 5 rinnakkaislaitteeseesi. Asennusohjelmat ovat saatavilla osoitteessa: [mytobiidynavox.com/Support/Communicator5](https://mytobiidynavox.com/Support/Communicator5)
- 3 Käy rinnakkaislaitteellasi osoitteessa: [mytobiidynavox.com/device/attachdevice](https://mytobiidynavox.com/device/attachdevice)
- 4 Kirjaudu myTobiiDynavox-tilillesi, jos sinua pyydetään.
- 5 Anna TD I-Series -laitteesi tuoteavain.
- 6 Valitse **Hanki kumppani** luodaksesi rinnakkaislisenssiavaimen.
- 7 Syötä kumppanilaitteellasi rinnakkaislisenssiavain Communicator 5:een.



### Vinkki

Käytä rinnakkaislaitettasi AAC:n käytön mallintamiseen ja sivujoukkojen muokkaamiseen, jotta et keskeytä AAC-käyttäjää hänen omalla laitteellaan.

# Lisäresursseja



## Tobii Dynavox Learning Hub

[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)



## TD I-Series -laitteiden tuotetuki

[qrco.de/bbBdN3](https://qrco.de/bbBdN3)



## Ohjelmistokoulutuskortit

[qrco.de/trainingcards](https://qrco.de/trainingcards)



## TD I-Series -laitteiden käyttöopas

[qrco.de/ISManual](https://qrco.de/ISManual)



## TD Facebook-yhteisö

[qrco.de/TDFB](https://qrco.de/TDFB)



## Tuotetakuut

[qrco.de/wrtglbl](https://qrco.de/wrtglbl)



## Tekninen tuki

Ota yhteys paikalliseen Tobii Dynavox -edustajaan saadaksesi teknistä tukea.