



TD I-Series

# Guia de inicialização

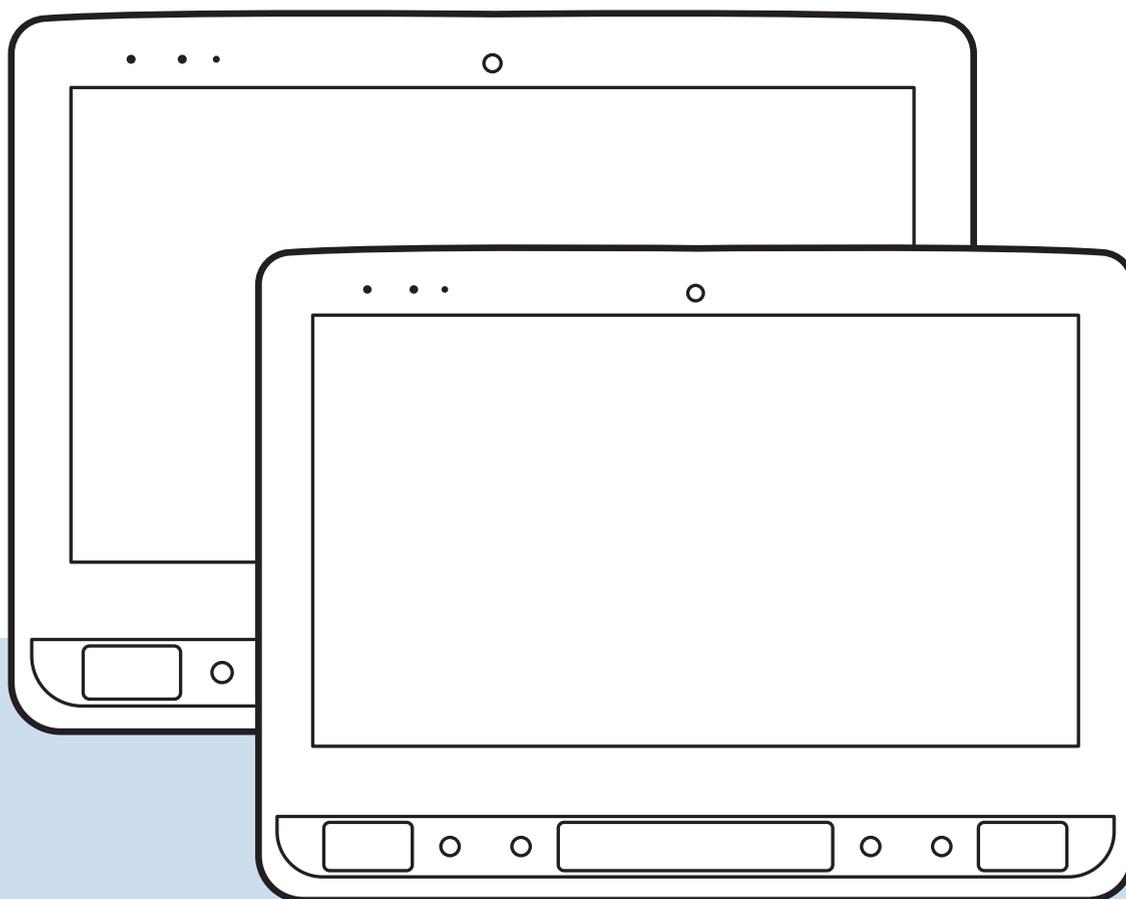


## O que está incluso

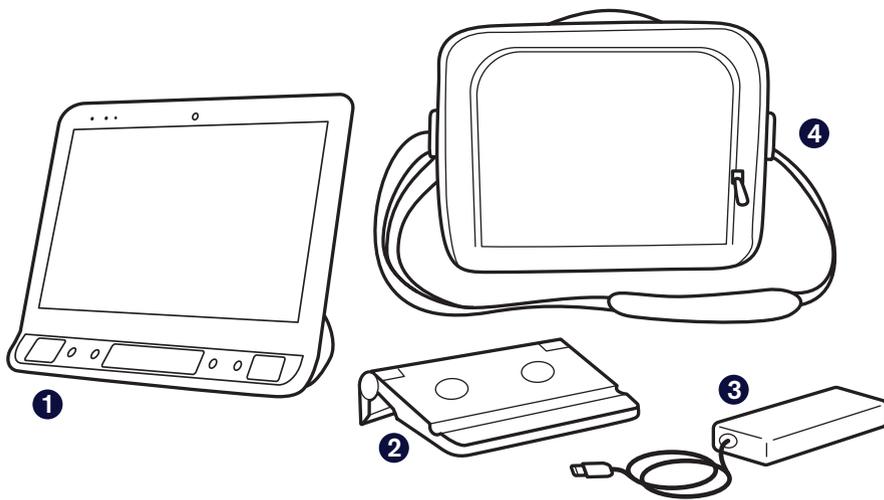


- 1 Dispositivo TD I-Series
- 2 Base ajustável
- 3 carregador
- 4 Estojo Portátil


## Conhecendo seu dispositivo

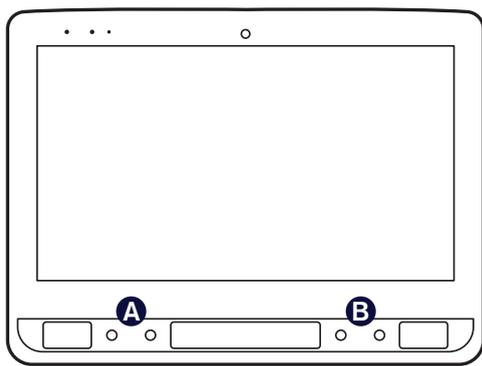

Parte frontal

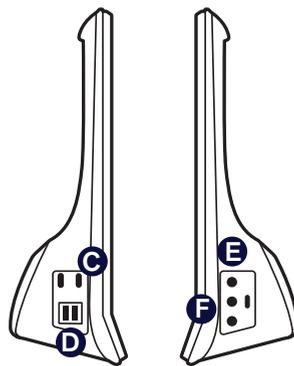

Laterais

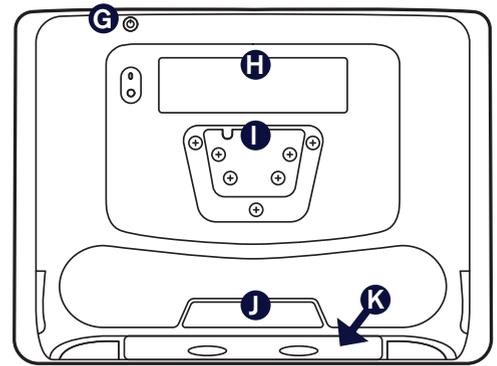

Voltar

- |                              |                                    |   |
|------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>A</b> Botões adaptativos  | <b>E</b> Entrada do fone de ouvido | <b>I</b> Placa de suporte*                  |
| <b>B</b> Botões de Volume    | <b>F</b> Portas de comutação 1 e 2 | <b>J</b> Receptor/Transmissor infravermelho |
| <b>C</b> Conector de energia | <b>G</b> Botão de Ligar/Desligar   | <b>K</b> Acesso à bateria**                 |
| <b>D</b> Entradas USB 3.0    | <b>H</b> Janela do parceiro        |   |

\*Se estiver usando uma placa de suporte Daessy, você precisará de um kit de conversão: [qrco.de/tmkdus](http://qrco.de/tmkdus)


\*\*a bateria está localizada na base do dispositivo

Siga as etapas deste guia para configurar e começar a usar seu dispositivo.

## Etapa 1: Configuração inicial

### Ligando o dispositivo


- 1 Conecte o cabo de energia ao dispositivo e conecte-o à tomada.
- 2 Pressione o botão liga/desliga.

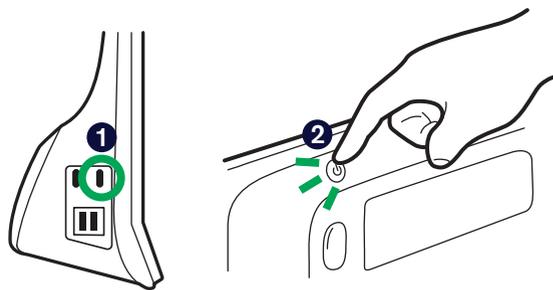

### Configuração


Ao ligar o seu dispositivo, você verá uma das duas telas. Se o seu dispositivo não tiver sido pré-configurado, você será solicitado a concluir o processo de instalação do Windows primeiro.

### Configuração do Windows

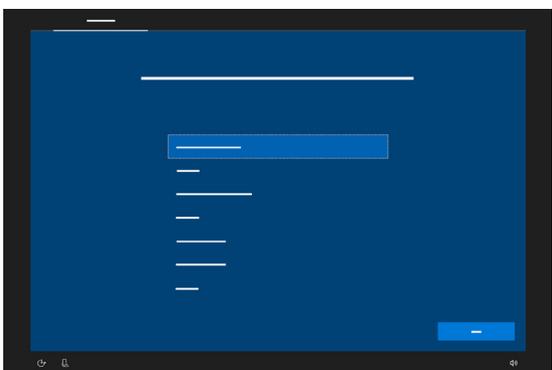

Esse processo não requer uma conta da Microsoft, mas recomendamos conectar-se ou criar uma conta de usuário (não de cuidador).

### Assistente de inicialização: escolha seu aplicativo

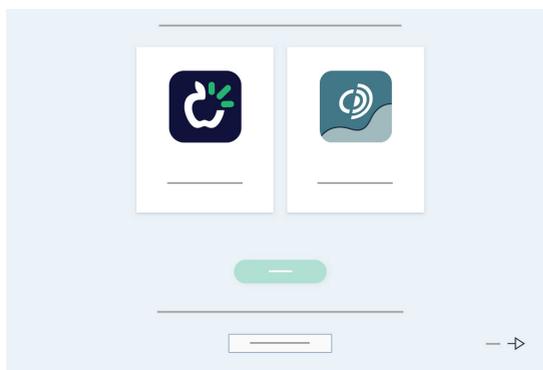

Escolha o TD Snap® ou o Communicator 5 como seu aplicativo padrão quando o dispositivo for ligado.

## Etapa 2 Configuração do software de comunicação

Siga as instruções no software de sua escolha para criar um novo usuário ou restaurar um arquivo de usuário existente.



**TD Snap®**  
Comunicação através de símbolos



**Communicator 5**  
Comunicação através de texto







#### Observação:

Não realize a calibração para o Eye Gaze (interação por olhar) até que o dispositivo tenha sido montado e a pessoa esteja confortavelmente posicionada. Consulte a Etapa 3 para dicas de montagem e posicionamento.




## Etapa 3 Montagem e posição

Prepare-se para usar o rastreamento ocular posicionando confortavelmente a pessoa que está usando o TD I-Series. Se for necessário usar óculos, verifique se eles estão colocados e se as lentes estão limpas.

Toque no botão adaptativo  para iniciar o estado de rastreamento, que ajuda a encontrar a distância e a posição ideais do seu dispositivo.

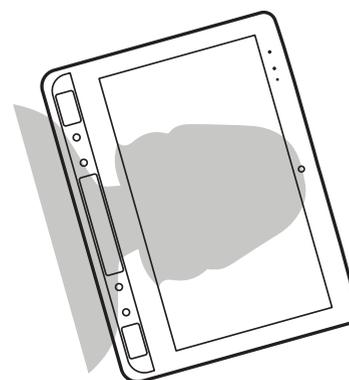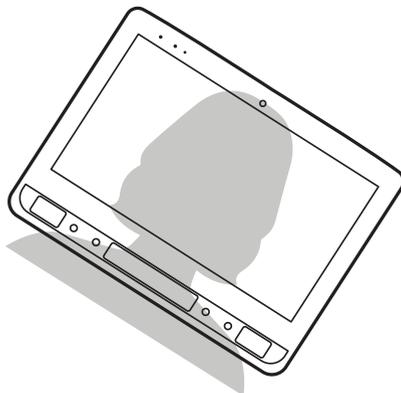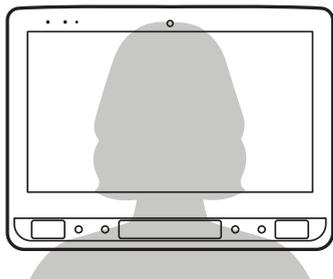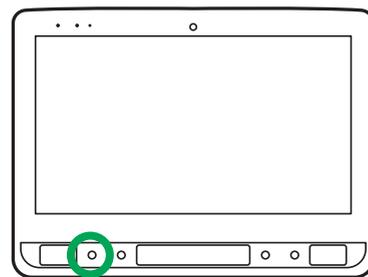

Coloque o TD I-Series em seu sistema de suporte ou use a Base Ajustável em uma superfície estável na frente da pessoa que estiver usando o dispositivo. Ele deve estar no nível dos olhos ou um pouco abaixo deles. Se a cabeça do usuário estiver inclinada, incline o dispositivo de forma correspondente. É importante alinhar o ângulo da superfície da tela com o rosto da pessoa. Se eles estiverem sentados em uma mesa ou escrivaninha, talvez seja necessário posicionar o dispositivo mais alto do que a superfície da mesa.

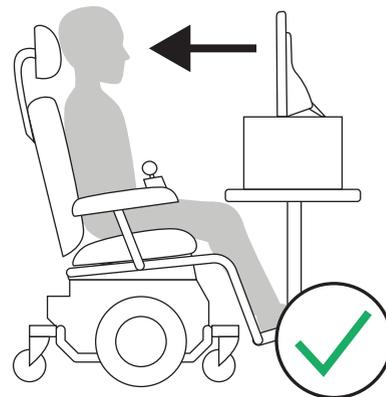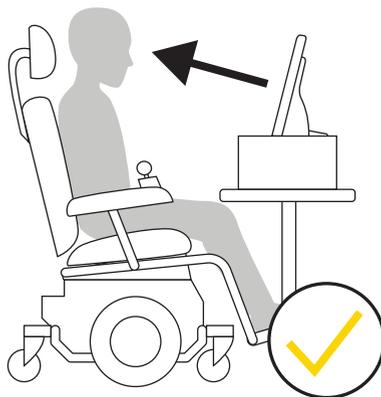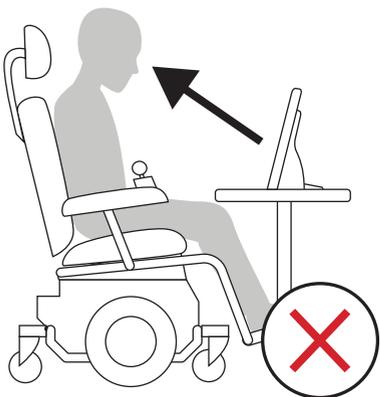

Talvez seja necessário refinar a posição do dispositivo durante as etapas de calibração na próxima página. Sempre ajuste a posição do dispositivo de acordo com o usuário, e não o contrário.



### Observação

Um sistema de suporte é a melhor opção para um posicionamento preciso do dispositivo que seja fácil de ajustar ao longo do dia. Várias opções de suporte estão disponíveis, incluindo suportes para chão, mesa e cadeira de rodas. Visite [TobiiDynavox.com](https://www.tobii-dynavox.com) ou entre em contato com o representante local da Tobii Dynavox.

# Etapa 4 Calibrar

O uso eficaz do rastreamento ocular não exige uma pontuação de calibração perfeita. Quando estiver apenas começando, calibre uma vez sem se preocupar muito com as pontuações. O mais importante é praticar. Você sempre pode recalibrar mais tarde.



## Observação


Não é necessário recalibrar cada vez que utilizar o dispositivo.

### Para calibrar o TD Snap®:

- 1 Selecione o botão **Editar**.




- 2 Selecione **Usuário**.

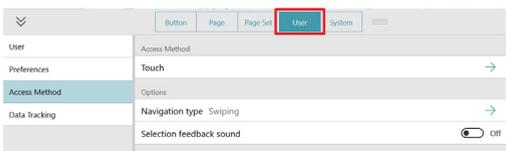


- 3 Selecione **Método de Acesso**.

- 4 Selecione **Eye Gaze**.

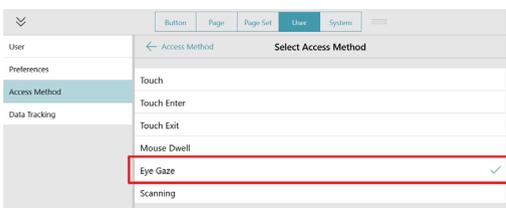

- 5 Role para baixo e selecione **Calibrar**.

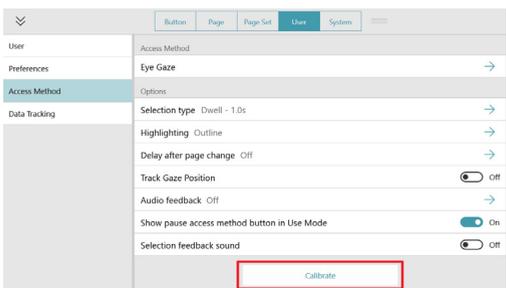


### Para calibrar o Communicator 5:

- 1 Abra o **Menu rápido**.

Para abrir o Menu rápido, pressione Ctrl + M no teclado, clique com o botão direito no mouse ou touchpad, mantenha pressionado e solte em qualquer lugar da tela.



- 2 Selecione **Configurações Avançadas**.

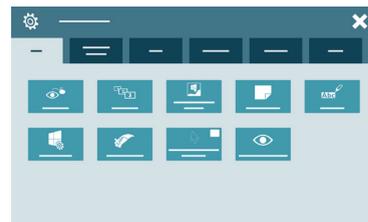

- 3 Selecione **Método de entrada** e certifique-se de que "Gaze Interaction - Interação por olhar" esteja selecionado.



- 4 Selecione **Configurações do Gaze Interaction - Interação por olhar**.

Aqui, é possível alterar o tipo de ativação entre tempo de espera e alternar, alterar os perfis de calibração e iniciar uma nova calibração.



## Etapa 5 Aprenda, pratique e resolva problemas

Seu dispositivo TD I-Series está pronto para ser usado! Sinta-se à vontade para começar a explorar seu dispositivo e aplicativos. Quando estiver pronto para aprender mais, confira os cartões de treinamento do TD Snap® ou Communicator 5. Eles mostram como usar os principais recursos de seus aplicativos de comunicação, desenvolver habilidades de CAA e solucionar problemas.



**Cartões de treinamento do TD Snap**


[qrco.de/bdSEpR](http://qrco.de/bdSEpR)



**Cartões de treinamento do Communicator 5**

[qrco.de/bdqjVT](http://qrco.de/bdqjVT)

## myTobiiDynavox.com

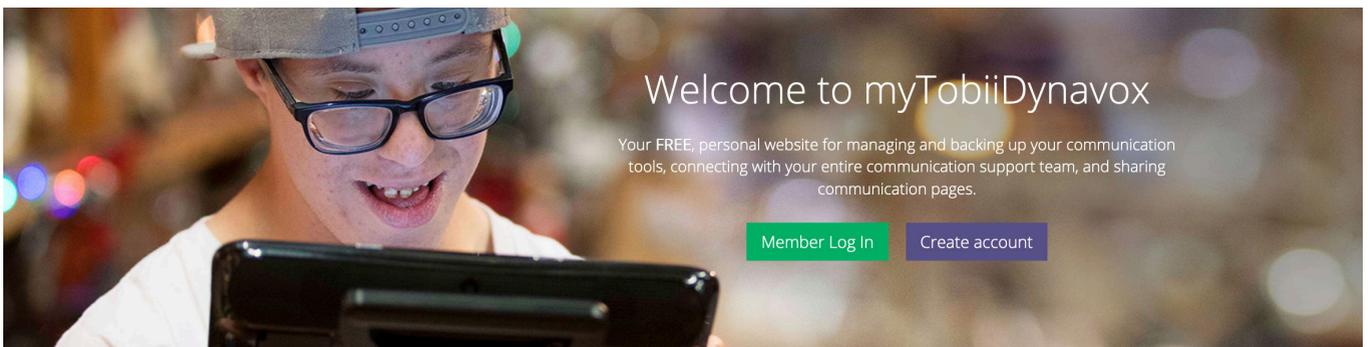

Sua conta myTobiiDynavox.com gratuita dá acesso a vários benefícios, incluindo armazenamento em nuvem para backups, sincronização e compartilhamento de conjuntos de Páginas, planos de aula e muito mais!

### **Ao se associar, você poderá:**

- Faça backup do seu sistema com segurança
- Baixe ferramentas e recursos gratuitos
- Reivindicar e gerenciar licenças adicionais
- Saiba mais sobre as atualizações disponíveis
- Acesse o suporte técnico e perguntas frequentes
- Compartilhe conjuntos e pacotes de páginas



**myTobiiDynavox**

[myTobiiDynavox.com](http://myTobiiDynavox.com)

# Licenças complementares

Seu dispositivo TD I-Series vem com licenças complementares para o TD Snap® e o Communicator 5. As licenças complementares permitem que você use esses aplicativos em um dispositivo adicional, como um laptop. As licenças complementares são solicitadas e gerenciadas por meio de sua conta myTobiiDynavox.



## Solicite sua licença complementar do TD Snap®

- 1 Em seu dispositivo TD I-Series, entre em sua conta myTobiiDynavox no TD Snap®.  
(*Editar > Usuário > Conta myTobiiDynavox*)
- 2 Em seu dispositivo adicional, instale o TD Snap®. Os instaladores do TD Snap® estão disponíveis em [mytobiidynavox.com/Support/SnapCoreFirst](https://mytobiidynavox.com/Support/SnapCoreFirst) e na Apple App Store.
- 3 No seu dispositivo adicional, abra o TD Snap® e entre na mesma conta myTobiiDynavox.  
(*Editar > Usuário > Conta myTobiiDynavox*)



## Solicite sua licença complementar do Communicator 5

- 1 Localize a chave do produto TD I-Series:  
Em seu dispositivo TD I-Series, abra **Configurações do hardware** na área de trabalho.  
Selecione **Product Key (Chave do produto)** no lado esquerdo do menu Hardware Settings (Configurações do hardware). Sua chave do produto está listada aqui.
- 2 Instale o Communicator 5 em seu dispositivo adicional. Os instaladores estão disponíveis em: [mytobiidynavox.com/Support/Communicator5](https://mytobiidynavox.com/Support/Communicator5)
- 3 Em seu dispositivo adicional, acesse: [mytobiidynavox.com/device/attachdevice](https://mytobiidynavox.com/device/attachdevice)
- 4 Faça login na sua conta myTobiiDynavox, se solicitado.
- 5 Digite a chave do produto do dispositivo TD I-Series.
- 6 Selecione **Get Companion** para gerar a chave de licença para um dispositivo adicional.
- 7 Em seu dispositivo adicional, digite a chave de licença adicional no Communicator 5.



### Dica

Use o dispositivo complementar para poder modelar o uso de CAA e editar conjuntos de páginas sem interromper o usuário de CAA em seu próprio dispositivo.

# Recursos adicionais



**Hub de aprendizagem  
Tobii Dynavox**

[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)



**Suporte ao produto TD I-Series**

[qrco.de/bbBdN3](https://qrco.de/bbBdN3)



**Cartões de treinamento  
do software**

[qrco.de/trainingcards](https://qrco.de/trainingcards)



**Garantia de produtos**

[qrco.de/wrtglbl](https://qrco.de/wrtglbl)



**Comunidade TD no Facebook**

[qrco.de/TDFB](https://qrco.de/TDFB)



**Suporte técnico no Brasil**

(11) 3884-2423