

# Tobii Dynavox I-sarja

## Aloitusopas




**tobii**dynavox

## Pakkauksen sisältö:




- 1 Laite
- 2 Adjustable Base -jalusta
- 3 Virtajohto
- 4 Aloitusopas
- 5 Harjoittelukortit
- 6 Turvallisuuden ja vaatimusten mukaisuuden vihkonen
- 7 Asiakirjatasku


## Laitteeseesi tutustuminen

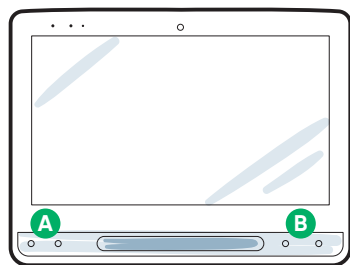

**Etupuoli**

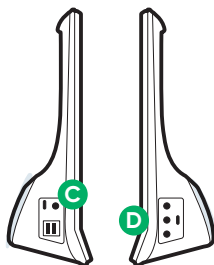

**Sivut**

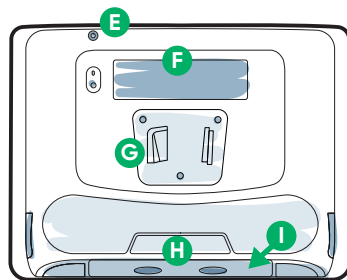

**Takaisin**

**A** Mukautettavat painikkeet

**B** Äänenvoimakkuuspainikkeet

**C** Virtaliitin

**D** DC-virtaliitin / latausliitäntä

**E** Virtapainike

**F** Kakkosnäyttö

**G** Kiinnityslevy\*

**H** IR-vastaanotin / -lähetin

**I** Pääsy akkuun\*\*

\*Jos käytössä Daessy Mount, tarvitset muunnoslevyn.


\*\*Akku sijaitsee laitteen pohjassa.

Noudata tämän oppaan neljää vaihetta, niin uusi I-sarjan laite asennetaan ja on valmis käytettäväksi.

## Vaihe 1: Alustava asennus

### Käynnistä laite


- 1 Liitä virtajohto laitteeseen ja kytke pistorasiaan.
- 2 Paina virtapainiketta.

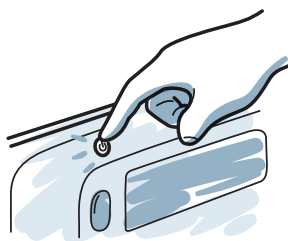

### Asennus


Kytkiessäsi laitteesi päälle, näet jomman kumman kahdesta näytöstä. Jos laitettasi ei ole esimääritetty, sinua kehoitetaan suorittamaan Windows-asennus ensin.

#### Windows-asennus

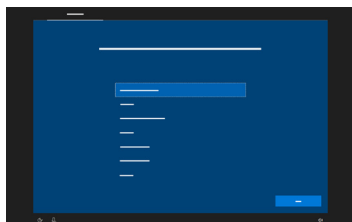

Windows-asennus ei vaadi Microsoft-tiliä, suosittelemme, että luot tai käytät laitteen käyttäjän omaa tiliä, etkä hoitajan käyttäjätiliä.

#### Ohjattu toiminto: Valitse sovelluksesi

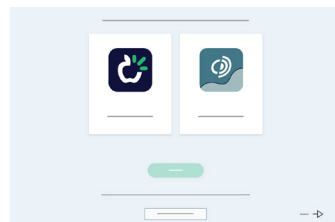

Valitse mikä sovellus käynnistetään automaattisesti, kun laite kytketään päälle.

## Vaihe 2: Määritä kommunikointiohjelmisto

Seuraa valitsemasi ohjelmiston kehotteita luodaksesi uuden käyttäjän tai palauttaaksesi olemassa olevan käyttäjätiedoston.



### TD Snap

Symbolien tuella  
kommunikoiville



### Communicator 5

Tekstin tuella viestiville



Suorita katseenseurannan (katseohjauksen) kalibrointi vasta, kun laite on kiinnitetty ja käyttäjällä on mukava asento. Katso kiinnitystä ja sijoittamista koskevat vinkit vaiheesta 3.

# Vaihe 3: Kiinnitys ja sijoittaminen

Optimoitu asento sekä laitteen, että käyttäjän osalta on välttämätöntä onnistuneelle käytölle. Aseta laite kiinnitysjärjestelmän avulla tai pöydälle säädettävään jalustaan.



## Kiinnitystä ja sijoittamista koskevat vinkit

- Varmista, että käyttäjällä on mukava asento. Säädä kiinnitys ja laite aina käyttäjälle sopivalla tavalla, ei toisinpäin.
- Tarkista silmien sijainti avaamalla Seurantatila-ikkuna. Suuntaa laite niin, että käyttäjä näkee näytön selvästi ja hänen silmänsä ovat Seurantatila-ikkunassa.

### Seurantatilan avaaminen laitteesta:

Kosketa laitteen etupuolella olevaa mukautettavaa painiketta. 

- Siirrä laitetta lähemmäksi käyttäjää tai kauemmaksi hänestä, kunnes kolmio on Seurantatila-ikkunan vihreällä alueella.
- Jos käyttäjän pää on kallistuneena vasemmalle tai oikealle, kallista myös laitetta vastaavasti.
- Jos käyttäjä on nojaavassa asennossa, esimerkiksi vuoteessa, laitteen voi asentaa hänen yläpuolelleen käyttäen kiinnitysjärjestelmää, kuten lattiatelinettä.
- Sijoita näyttö niin, että käyttäjä katsoo suoraan siihen eikä ylös tai alas. Sijoita se mieluummin korkeammalle kuin alemmas.
- Katseenseurannan kalibrointi kalibroidaan käyttäjän silmiin, ei käyttäjän asentoon. Jos käyttäjän asento vaihtuu, siirrä mieluummin laitetta uudelleenkalibroinnin sijaan.

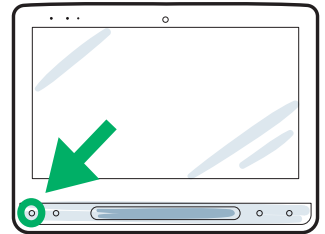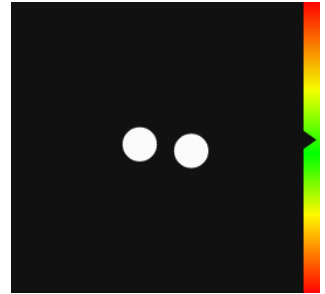

# Vaihe 4: Kalibroi

Katseenseurannan tehokas käyttö ei edellytä täydellistä kalibroititilusta. Suorita käyttö aloitettaessa kalibrointi kerran huolehtimatta liikaa tuloksista ja anna käyttäjän harjoitella katseenseurantaa käyttäen. Voit aina tehdä kalibroinnin uudelleen myöhemmin.




**Kalibrointia ei tarvitse suorittaa joka kerta laitetta käytettäessä.**

## TD Snapin kalibrointi:

- 1 Valitse **Muokkaa**-painike.




- 2 Valitse **Käyttäjä**.

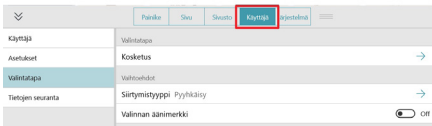


- 3 Valitse **Valintatapa**.

- 4 Valitse **Katseohjaus**.

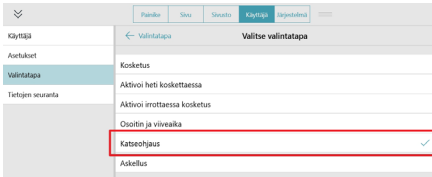

- 5 Vieritä alaspäin ja valitse **Kalibro**.

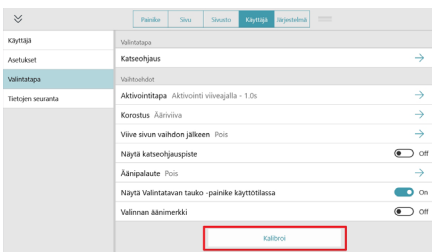

## Communicator 5:n kalibrointi:

- 1 Avaa **Pikavalikko**.


Avaa Pikavalikko painamalla Ctrl + M näppäimistöltä, napsauta hiiren oikeaa painiketta tai kosketa, pidä ja sitten vapauta näytössä missä tahansa.



- 2 Valitse **Lisäasetukset**.



- 3 Valitse **Syöttötapa** ja vahvista, että Katseohjaus on valittu.

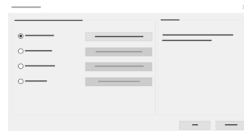

- 4 Valitse **Katseohjauksen asetukset**.

Tässä voit vaihtaa aktivointityyppiä viiveajan ja kytkimen välillä, muuttaa kalibrointiprofileita sekä käynnistää uuden kalibroinnin.



# Olemme täällä auttaaksemme



## myTobiiDynavox

Käytä maksutonta tiliäsi synkronointiin, sivustojen jakoon, varmuuskopioiden tallennukseen ja paljon muuhun! Vieraile:  
**[www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com)**



## Oppimiskeskus

Tobii Dynavox -oppimiskeskus:  
**[learn.tobiidynavox.com](http://learn.tobiidynavox.com)**



## Koulutusmateriaalit

Käyttöopas:  
**<https://qrco.de/ISManual>**

Communicator 5 -harjoittelukortit:  
**<https://qrco.de/C5Cards>**

TD Snap Core First -harjoittelukortit:  
**<https://qrco.de/TDSnapCards>**

TD Snap -tekstiharjoittelukortit:  
**<https://qrco.de/TextCards>**

TD Snap -afasiaharjoittelukortit:  
**<https://qrco.de/AphasiaCards>**

TD Snap – Askelluksen käyttöönotto-opas:  
**<https://qrco.de/ScanGuide>**



## Lisätuki

Yhteisö:  
**<https://qrco.de/TDFB>**

Ota yhteys paikalliseen Tobii Dynavox -edustajaan saadaksesi teknistä tukea.

Lisätietoja  
asennuksesta:



**[qrco.de/bbBdN3](https://qrco.de/bbBdN3)**