



Tobii Dynavox Serija I

Kratke upute

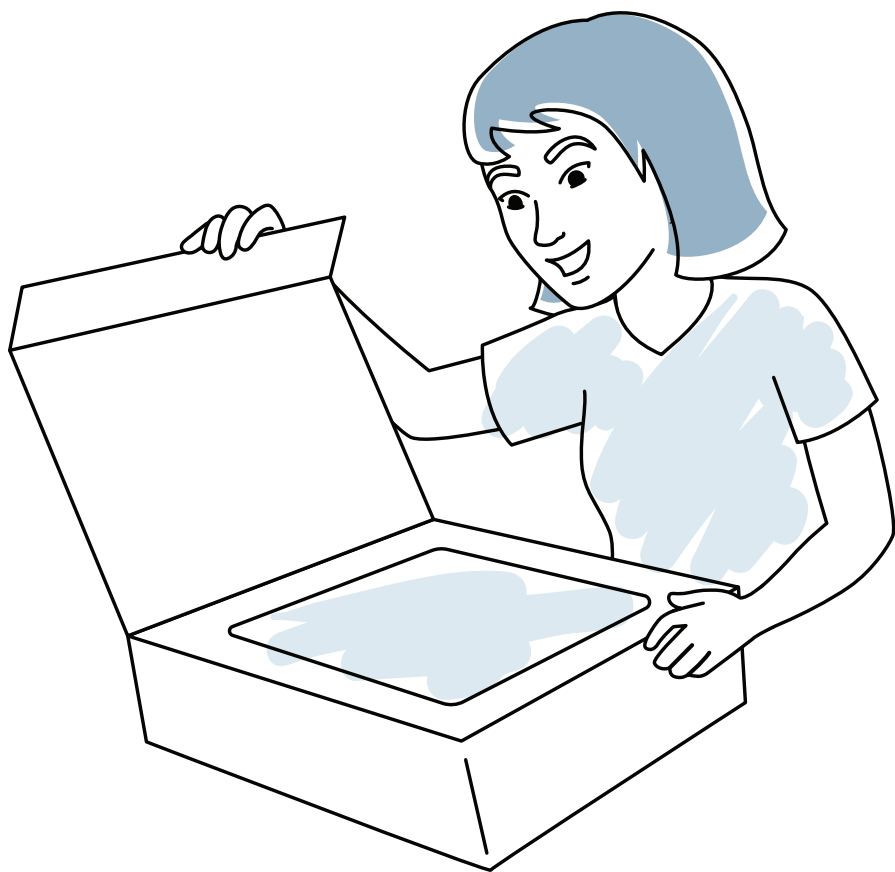


tobiidynavox

Što je u kutiji?

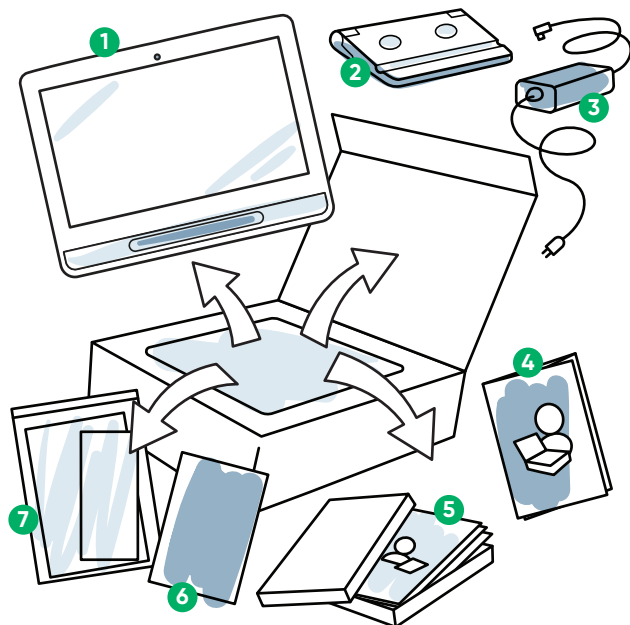


- 1 Uređaj
- 2 Podesiva baza
- 3 Kabel napajanja
- 4 Kratke upute
- 5 Kartice za obuku
- 6 Upute o sigurnosti i usklađenosti s normama
- 7 Vrećica za dokumentaciju


Upoznajte svoj uređaj

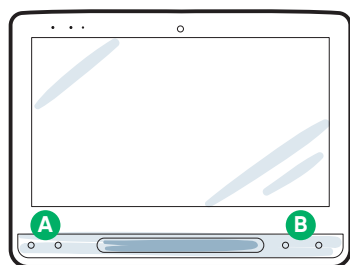

Prednja strana

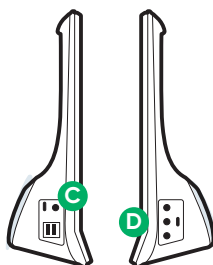

Strane

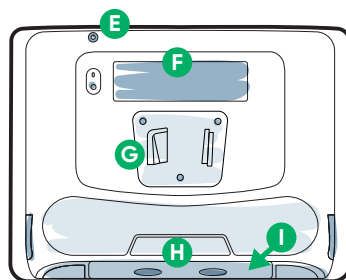

Stražnja strana

- A Adaptivni gumbi
- B Gumbi za razinu glasnoće
- C Priključak za napajanje

- D DC ulaz za napajanje/priključak za punjenje
- E Gumb za isključivanje
- F Partnerski prozor

- G Pločica za montažu*
- H Infracrveni prijemnik/odašiljač
- I Pristup bateriji**

*Koristite li ploču za montažu Daessy, trebat će vam adapterska ploča.


**Baterija se nalazi na donjoj strani uređaja.

Slijedite ova četiri koraka u priručniku kako biste postavili i pripremili za korištenje svoj novi uređaj Serije I.

Korak 1: Početno postavljanje sustava

Pokrenite uređaj


- 1 Priključite kabel napajanja u uređaj i spojite ga u utičnicu.
- 2 Pritisnite gumb za uključivanje.

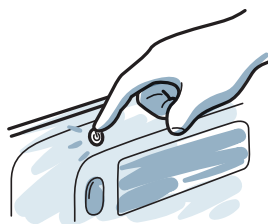


Postavljanje

Kad uključite uređaj, vidjet ćete jedan od dvije vrste zaslona. Ako vaš uređaj nije unaprijed konfiguriran, od vas će se zatražiti da prvo dovršite postupak instaliranja sustava Windows.

Instalacija sustava Windows

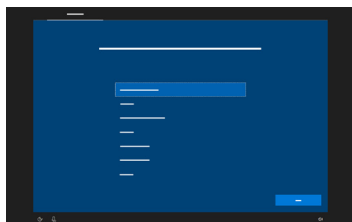

Čarobnjak za postavljanje Snapa Odaberite svoju aplikaciju

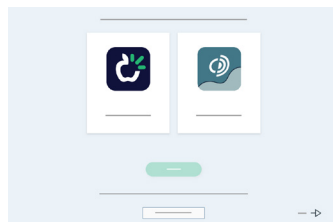

Iako za ovaj postupak nije potrebno imati račun pri Microsoftu, preporučamo vam da se ne koristite računom njegovatelja nego da kreirate ili se prijavite u korisnikov račun.

Odaberite aplikaciju koju želite automatski pokrenuti prilikom uključivanja uređaja.

Korak 2: Konfigurirajte komunikacijski softver

Slijedite upute u izabranom softveru za kreiranje novog korisnika ili vratite postojeću korisničku datoteku.



TD Snap

Komunikatori koji
podržavaju simbole



Communicator 5

Komunikatori koji
podržavaju tekst



Ne obavljajte kalibraciju za Eye Gaze (interakciju pogledom) dok se uređaj ne montira i osoba udobno smijesti. Videti korak 3 za savijete za montiranje i pozicioniranje.

Korak 3: Montaža i namještanje položaja

Optimalno namještanje položaja uređaja i korisnika neophodno je za učinkovito korištenje uređaja. Postavite uređaj na stalku ili ga položite na stol pomoću podesive baze.



Savijeti za montiranje i pozicioniranje

- Pobrinite se da je osoba udobno pozicionirana. Podesite stalak i uređaj da odgovaraju osobi, a ne obrnuto.
- Pokrenite prozor Status praćenja pogleda da provjerite položaj oka. Usmjerite uređaj tako da osoba jasno vidi zaslom i da su joj oči unutar prozora Status praćenja pogleda.

Da pokrenete prozor Status praćenja pogleda na uređaju:

Pritisnite adaptivni gumb  na prijednjem dijelu uređaja

- Pomičite uređaj dalje ili bliže od osobe dok se trokut ne nađe u zelenoj oblasti u prozoru Status praćenja pogleda.
- Ako je glava osobe nagnuta na lijevo ili desno, uređaj također treba nagnuti na istu stranu.
- Ako je osoba naslonjena, primjerice u krevetu, uređaj se može montirati iznad nje pomoću sistema za montiranje, kao što je podni stalak.
- Pozicionirajte zaslon tako da korisnik gleda izravno u njega, a ne gore ili dolje. Više je bolje od nižeg.
- Kalibracija praćenja pogledom kalibrira se prema oku korisnika, ne njegovom položaju. Premjestite uređaj ako se položaj korisnika promijeni, umjesto da ga kalibrirate.

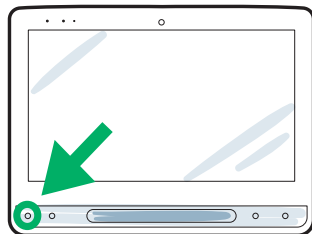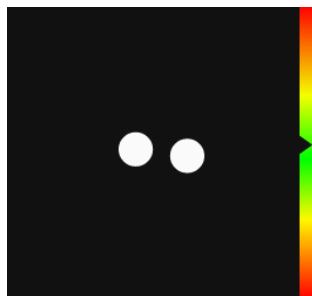

Korak 4: Kalibracija

Savršena ocjena kalibracije nije neophodna za efikasnu uporabu praćenja pogledom. Kada ste tek na početku, kalibrirajte jednom bez previše brige o ocjeni, a onda neka osoba vježba pomoću praćenja oka. Uvek možete da se vratite na kalibraciju kasnije.




Ne morate da kalibrirate svaki put kada koristite uređaj.

Za kalibraciju TD Snap:

- 1 Odaberite gumb **Uredi**.




- 2 Odaberite **User**.

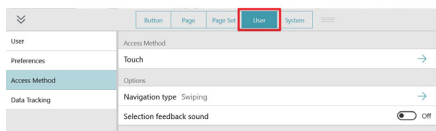


- 3 Odaberite **Način pristupa**.

- 4 Odaberite **Eye Gaze**.

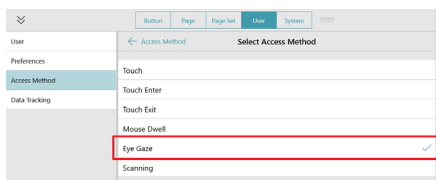

- 5 Pomaknite se dolje i odaberite **Calibrate**.

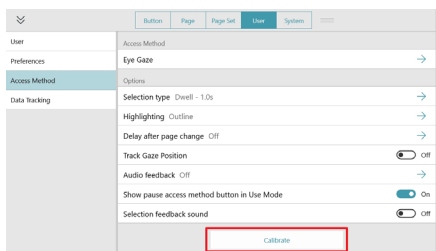


Za kalibraciju Komunikatora 5:

- 1 Otvorite **Brzi izbornik**.


Da otvorite Brzi izbornik, pritisnite Ctrl + M na tipkovnici, desni klik miša, ili dodirnite, držite, pa ispustite bilo gdje na zaslonu.



- 2 Odaberite **Napredno podešavanje**.

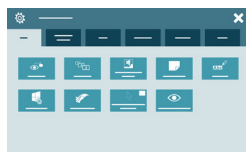

- 3 Odaberite **Metodu unosa** i potvrdite da je odabrana Interakciju pogledom.

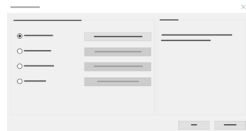

- 4 Odaberite **Podešavanje interakciju pogledom**.

Ovdje možete promijeniti tip aktivacije i odabrati zadržavanje pogleda i klikanje na prekidač, promijeniti profile kalibracije i započeti novu kalibraciju.



Stojimo vam na raspolaganju



myTobiiDynavox

Iskoristite svoj besplatni račun za sinkronizaciju, dijeljenje setova stranica, pohranu sigurnosnih kopija i drugo! Posjetite:
www.myTobiiDynavox.com



Centar za učenje

Tobii Dynavox Centar za učenje:
learn.tobiidynavox.com



Materijal za treniranje

Korisničke upute:
<https://qrco.de/ISManual>

Komunikator 5 kartice za treniranje:
<https://qrco.de/C5Cards>

TD Snap Core First kartice za treniranje:
<https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snap Text kartice za treniranje:
<https://qrco.de/TextCards>

TD Snap Aphasia kartice za treniranje:
<https://qrco.de/AphasiaCards>

TD Snap Scanning vodič za implementaciju:
<https://qrco.de/ScanGuide>



Dodatna podrška

Zajednica:
<https://qrco.de/TDFB>

Za tehničku podršku obratite se svom lokalnom predstavniku za Tobii Dynavox.

**Za detaljnije
informacije o
postavljanju uređaja:**



qrco.de/bbBdN3