



Tobii Dynavox I-Series

Kom i gang – veiledning

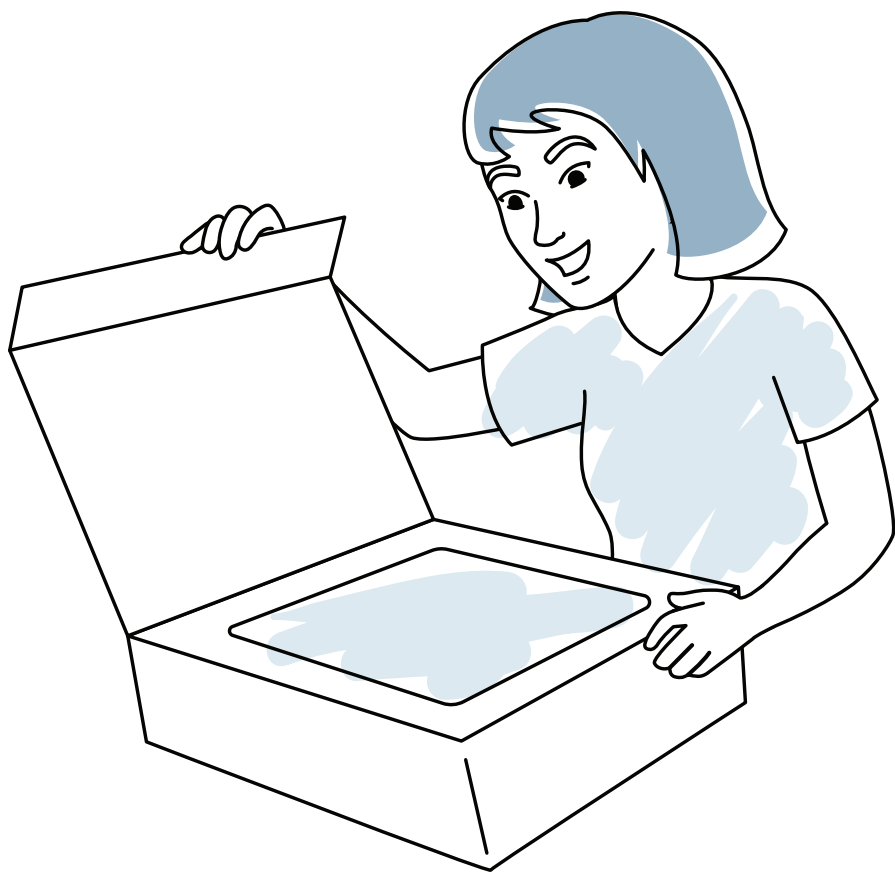


tobiidynavox

Hva er i esken?

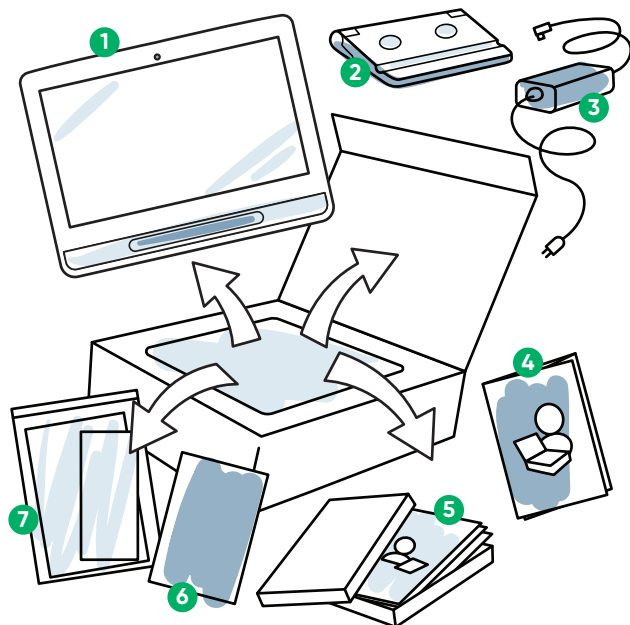


- 1 Enhet
- 2 Justerbar sokkel
- 3 Strømkabel
- 4 Kom i gang –
veiledning
- 5 Opplæringskort
- 6 Sikkerhet- og
samsvarshefte
- 7 Dokumentpose


Bli kjent med enheten din

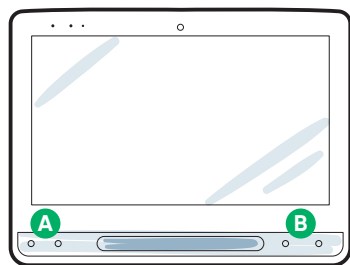

Forside

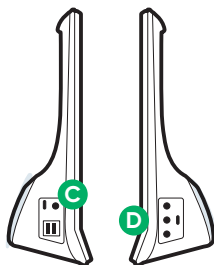

Sider

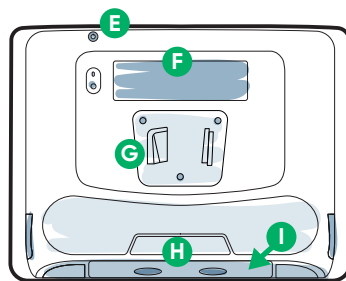

Tilbake

- A Tilpassbare knapper
- B Volumknapper
- C Strømtilkobling

- D DC strøminngang/
ladeport
- E Av-/på-knapp
- F Partnervindu

- G Monteringsplate*
- H IR-sender/
mottaker
- I Batteritilgang**

*Hvis du bruker et Daessy-stativ, vil du trenge en adapterplate.


**Batteriet finner du på undersiden av enheten.

Følg de fire trinnene i denne veiledningen, og din I-Series-enhet vil være ferdig satt opp og klar til bruk.

Trinn 1: Første oppsett

Start enheten


- 1 Koble strømkabelen til enheten og koble til en stikkontakt.
- 2 Trykk på Av-/på-knappen.

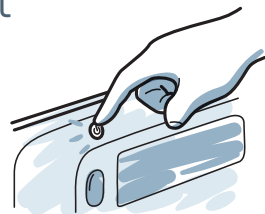

Oppsett


Når du skruer på enheten din, vil du se en av to skjermer. Hvis enheten din ikke har blitt forhåndsconfigurert, vil du bli bedt om å fullføre prosessen med Windows-oppsett først.

Oppsett av Windows

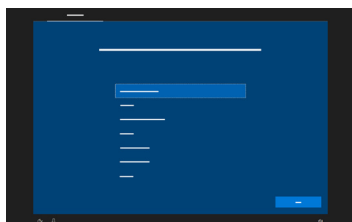

Selv om denne prosessen ikke krever en Microsoft-konto, så anbefaler vi at du kobler til eller oppretter en konto for brukeren, og ikke for hjelperen.

Automatisk oppstart-veiviser: Velg din app

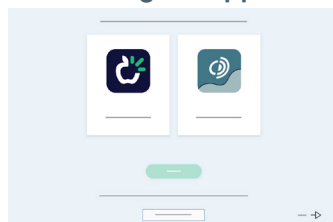

Velg hvilken app som automatisk skal starte når enheten slås på.

Trinn 2: Konfigurering av kommunikasjonsprogramvare

Følg instruksjonene i din valgte kommunikasjonsprogramvare for å opprette en ny bruker eller gjenopprette en eksisterende brukerfil.



TD Snap

Symbolbaserte kommunikatører



Communicator 5

Tekstbaserte kommunikatører



Ikke gjennomfør kalibreringen for blikk (øyestyring) før enheten har blitt montert, og brukeren er korrekt posisjonert. Se trinn 3 for monterings- og posisjoneringstips.

Trinn 3: Stativ og posisjon

Optimalisert posisjonering for både enheten og brukeren er nødvendig for vellykket bruk. Plasser enheten på et monteringsystem, eller på et bord ved bruk av den justerbare sokkelen.



Tips for montering og posisjonering

- Sørg for at brukeren er posisjonert komfortabelt. Juster stativ og enhet for å passe til brukeren, ikke motsatt.
- Åpne Styringsstatus-vinduet for å sjekke øynenes posisjon. Still inn enheten slik at brukeren kan se skjermen tydelig, og slik at øynene deres er innenfor styringsstatus-vinduet.

For å åpne styringsstatus på enheten:

Trykk på den tilpassbare  knappen foran på enheten.

- Flytt enheten nærmere eller lenger unna brukeren frem til trekanten er inne i det grønne området i styringsstatus-vinduet.
- Dersom brukerens hode er tiltet til venstre eller høyre, bør enheten også tiltes for å matche brukeren.
- Dersom brukeren befinner seg i en tilbaketrukket posisjon, slik som i en seng, kan enheten monteres over dem ved hjelp av et monteringsystem, for eksempel et gulvstativ.
- Posisjoner skjermen slik at brukeren ser rett mot den, ikke slik at de må se opp eller ned. Høyere er bedre enn lavere.
- Kalibrering av øyestyringen kalibreres til brukerens øyne, ikke brukerens posisjon. Posisjoner enheten på nytt hvis brukerens posisjon endres, i stedet for å kalibrere på nytt.

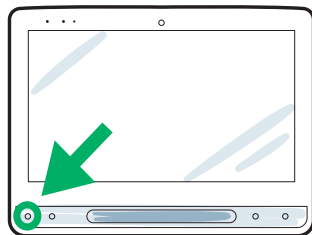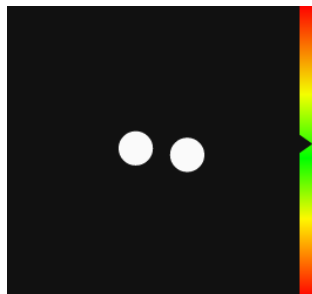

Trinn 4: Kalibrer

Det er ikke nødvendig med en perfekt kalibreringsresultat for å bruke øyestyring effektivt. Når dere nettopp har kommet i gang, er det viktigere å kalibrere én gang, uten å tenke så mye på resultatet, og la brukeren få øve seg på å bruke øyestyring. Du kan alltid gå tilbake til kalibreringen senere.




Du trenger ikke å kalibrere hver gang du bruker enheten.

For å kalibrere TD Snap:

- 1 Velg **Rediger**-knappen.




- 2 Velg **Bruker**.

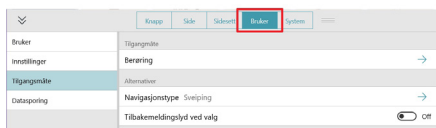


- 3 Velg **Tilgangsmåte**.

- 4 Velg **Blikk**.

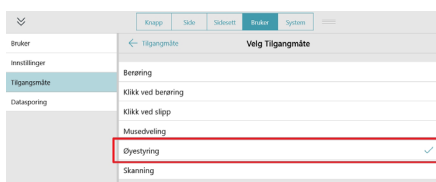


- 5 Bla nedover og velg **Kalibrer**.

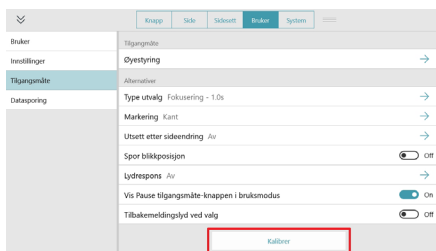

For å kalibrere Communicator 5:

- 1 Åpne **Hurtigmenyen**.


For å åpne Hurtigmenyen, trykk Ctrl + M på tastaturet, høyreklikk med musen, eller berør, hold, og deretter slipp hvor som helst på skjermen.

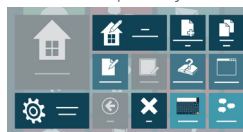

- 2 Velg **Avanserte innstillinger**.



- 3 Velg **Tilgangsmåte** og bekreft at øyestyring er valgt.

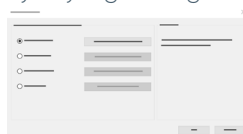

- 4 Velg **Gaze Interaction / Innstillinger**.

Her kan du endre på aktiveringstypen mellom fokusering og bryter, endre kalibreringsprofiler og starte en ny kalibrering.



Vi er her for å hjelpe



myTobiiDynavox

Bruk den gratis kontoen din til å synkronisere, dele sidesett, lagre sikkerhetskopier, og mer!

Besøk:

www.myTobiiDynavox.com



Opplæring

Tobii Dynavox-opplæringsvideoer:

www.tobiidynavox.no



Opplæringsmateriell

Brukerveiledning:

<https://qrco.de/ISManual>

Communicator 5-opplæringskort:

<https://qrco.de/C5Cards>

TD Snap Core First – opplæringskort:

<https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snap – tekstopplæringskort:

<https://qrco.de/TextCards>

TD Snap, veiledning for implementering av skanning: **<https://qrco.de/ScanGuide>**



Ytterligere støtte

Community:

<https://www.facebook.com/TobiiDynavoxNorge>

Teknisk støtte for Norge:

55 55 10 60

For mer
informasjon om
oppsettsprosessen:



qrco.de/bbBdN3