


Pakkauksen sisältö:



- 1 Laite
- 2 Adjustable Base -jalusta
- 3 Virtajohto
- 4 Aloitusopas
- 5 Harjoittelukortit
- 6 Turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden vihkonen
- 7 Asiakirjatasku

Laitteeseesi tutustuminen

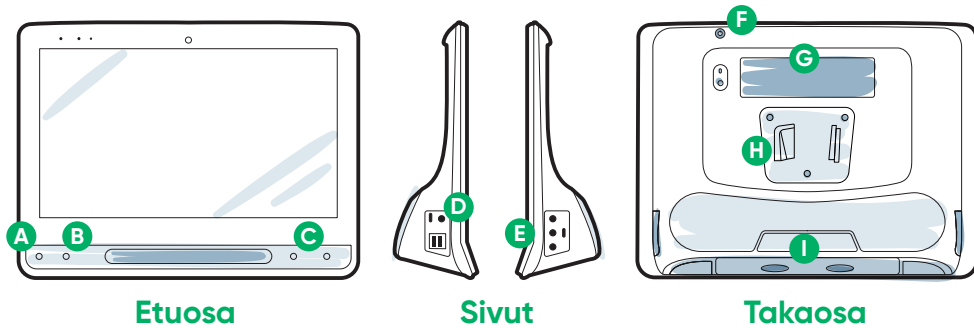

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| A Seurannan tila -painike | D Virtaliitin | G Kumppani-ikkuna |
| B Kalibrintipainike | E Kytkinportit | H Kiinnityslevy* |
| C Äänenvoimakkuuspainikkeet | F Virtapainike | I IR-lähetin |

*Jos käytössä Daessy Mount, tarvitset adapterin.

Olemme täällä auttaaksemme



myTobiiDynavox

Käytä maksutonta tiliäsi synkronointiin, sivustojen jakoon, varmuuskopioiden tallennukseen, ja vielä lisää!
Vieraile: www.myTobiiDynavox.com



Muuta

Käyttöohjekirja: bit.ly/iseriesfi



Lisätuki

Yhteisö: bit.ly/TDFBCommunity

Tekninen tuki:


Ota yhteys paikalliseen Tobii Dynavox -edustajaan saadaksesi teknistä tukea.

Lisätietoja asennuksesta: (Vain englanniksi)



Voit käyttää matkapuhelintasi tai taulutietokonettasi QR-koodin skannaamiseksi. Jos sinulla ei ole QR-koodin lukijaa, lataa maksuton sovellus.

Tobii Dynavox I-sarja Aloitusopas

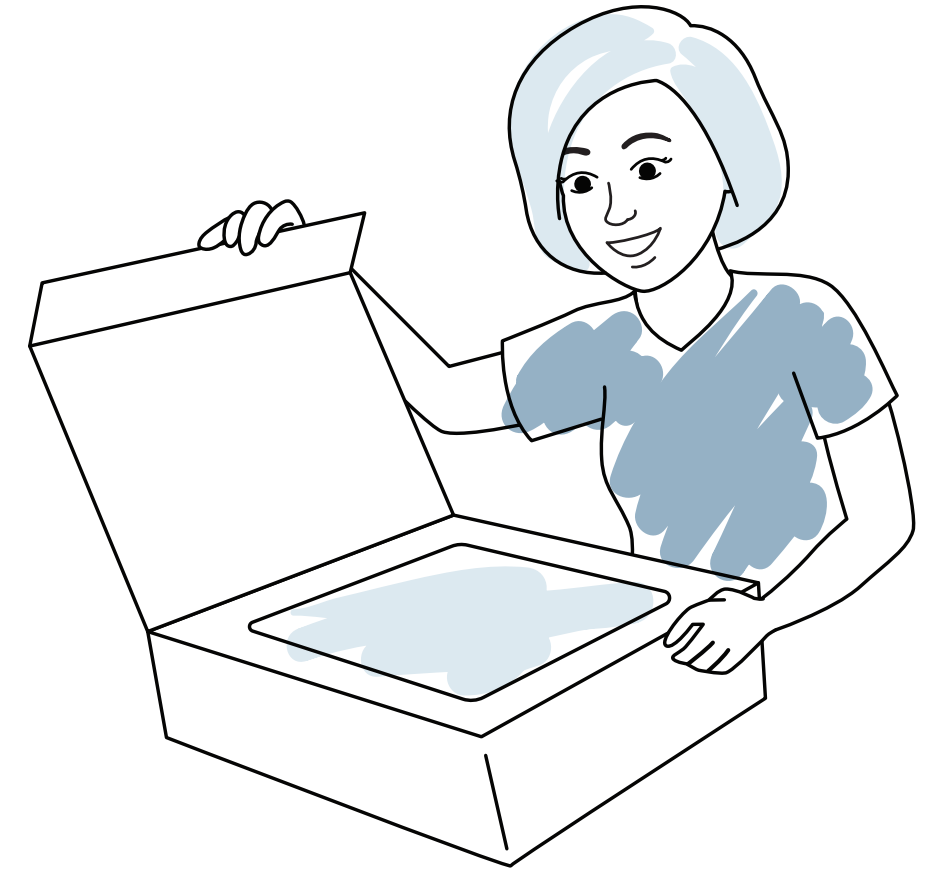

#PowerToBeYou

Jaa I-Series paketoinnin avaus ja käytä ensin valokuvia ja videoita [#iopenedthebox](https://twitter.com/iopenedthebox) kanssa.

#112007975 Tobii Dynavox I-sarja Aloitusopas v.1.0 - fi-FI


tobii dynavox

Noudata kolmea vaihetta tässä oppaassa ja uusi I-sarjan laite asennetaan ja on valmis käytettäväksi.

Vaihe 1: Alustava asennus

Käynnistä laite


- 1 Liitä virtajohto laitteeseen ja liitä pistorasiaan.
- 2 Paina virtapainiketta.

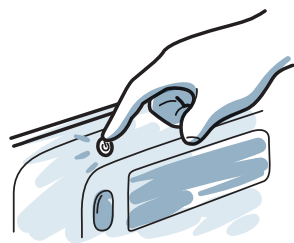

Asennus

Kytkeessäsi laitteesi päälle, näet jomman kumman kahdesta näytöstä. Jos laitettasi ei ole esimääritetty, sinua kehoitetaan täydentämään ensin Windows-käyttöjärjestelmän asennus.

Windows asennus

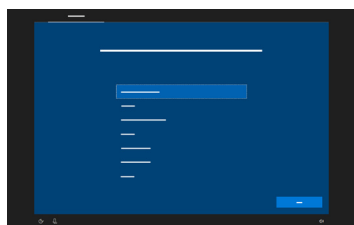

Vaikka tämä asennus ei vaadi Microsoft-tiliä, suosittelemme, että muodostat yhteyden tai luot käyttäjälle oman tilin.

Ohjattu toiminto: Valitse sovelluksesi



Valitse mikä sovellus käynnistetään automaattisesti, kun laite kytketään päälle.

Vaihe 2: Kiinnitys ja asento



Optimoitu asento sekä laitteen, että käyttäjän osalta on välttämätöntä onnistuneelle käytölle. Aseta laite käyttäjän eteen kiinnitysjärjestelmän avulla tai pöydälle säädettävään jalustaan. Jos käytät Gaze Interaction -katseohjausta, tarkista vihjeet katseenseuranta varten.


Vaihe 3: Viestintäohjelmiston määrittäminen



Snap Core First Symbolien tuella viestiville

Ohjattu Snap-asennus Käyttömenetelmä

Seuraa kehoitteita luodaksesi itsellesi uuden käyttäjän tai palauttaaksesi tallennetun käyttäjätiedoston.

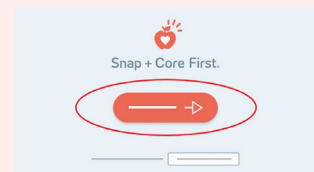

Ruudukon koko

Valitse ruudukon koko, joka tarjoaa useimmat painikkeet sanastoa varten ja jota käyttäjä voi käyttää tarkasti. Voit helposti muuttaa sitä myöhemmin.

Valitse käyttömenetelmäsi:

- 1 Valitse **Muokkaa**.
- 2 Valitse **Käyttäjä**.
- 3 Valitse **Käyttömenetelmä**.
 - Jos käytössä on katseen seuranta, valitse **Gaze Interaction**.
 - Valitse **Käyttömenetelmä** -painike.
 - Vieritä alas valitaksesi **Kalibroi** ja noudata kehoitteita.

Seuraavat vaiheet

Core Firstin Pathways, MAKSUTON resurssi, auttaa opettamaan viestintätaitoja ohjevideoiden, tavoiteruudukkojen, oppituntisuunnitelmien ja muiden vastaavien avulla. <http://bit.ly/TDPCF>



Snap Core First -harjoittelukortit auttavat sinua aloittamaan. Ne sisältävät ideoita jokapäiväistä käyttöä ja askelittaisia ohjeita perusmuokkausta varten.




Communicator 5 Tekstin tuella viestiville

Communicator 5 Ohjattu asennus

Seuraa kehoitteita luodaksesi uuden käyttäjäksi.

- Jos käytät Gaze Interaction -katsevuorovaikutusta, valitse kalibroi ja noudata kehoitteita.
- Jos et käytä Gaze Interaction -katsevuorovaikutusta, vaihda syöttötapa.

Valitse kotisivusi

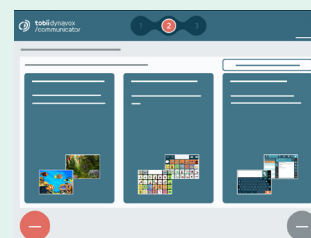

Aloittelija

Paras aloittavalle viestijälle varhaisilla kielitaidoilla.

Symboli

Nämä sivut mahdollistavat käyttäjän muodostavan omat viestinsä, symboli symbolilta.

Teksti

Tarkoitettu henkilöille, jotka kirjoittavat viestejä pääasiallisesti näppäimistön kanssa.

Seuraavat vaiheet

Communicator 5 -harjoittelukortit auttavat sinua aloittamaan. Ne sisältävät ideoita jokapäiväistä käyttöä ja askelittaisia ohjeita perusmuokkausta varten.



Vihjeet katseenseuranta varten

- Jos kalibrointi näyttää olevan epätarkka, voit koskea Seurannan tila -painiketta (kolmio) laitteen edessä avataksesi Seurannan tila -valintaruudun milloin vain. Tämä päättelee, ovatko käyttäjän silmät hyvässä kohdassa Katsevuorovaikutusta varten.

- Kalibroinnin jälkeen, näet värikkäät merkitsimet, näyttäen kuinka hyvin kalibroit sen kyseisellä näytön alueella. Vihreä ja keltainen antavat sinulle lisää tarkkuutta, mutta punainen on yhä kelvollinen aloitusta varten! Voit parantaa tätä ajan mittaan.

- Voit mukauttaa kalibroinnin asetusta täyttämään käyttäjän tarpeet (esim. kohteiden lukumäärä, ärsyksen tyyppi).

Saadaksesi lisätietoja, vieraile sivulla: bit.ly/DevicePosition (Vain englanniksi)