


Que contient la boîte ?



- 1 Appareil
- 2 Socle réglable
- 3 Câble d'alimentation
- 4 Guide de mise en route
- 5 Fiches de familiarisation
- 6 Brochure de sécurité et de conformité
- 7 Pochette de documents

Découvrez votre dispositif

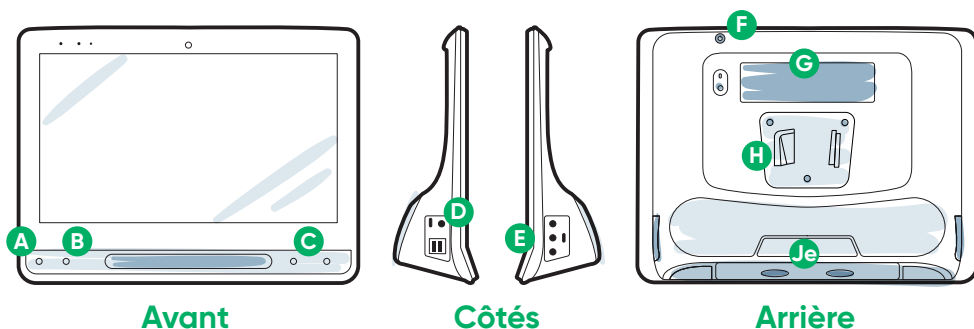

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| A Bouton du statut du suivi | D Connecteur d'alimentation | G Fenêtre du partenaire |
| B Bouton de calibrage | E Ports contacteur | H Plaque de montage* |
| C Boutons de réglage du volume | F Bouton marche/arrêt | Je Émetteur IR |

*Une plaque d'adaptation est nécessaire si vous utilisez une plaque de montage Daessy.

Nous sommes là pour vous aider



myTobiiDynavox

Utilisez votre compte gratuit pour synchroniser et partager des ensembles de pages, stocker des sauvegardes et plus encore !
Visitez : www.myTobiiDynavox.com



Autre

Application Discover Tobii Dynavox (Découvrir Tobii Dynavox) :
bit.ly/TDDiscover

Manuel de l'utilisateur : bit.ly/iseriesfr



Assistance supplémentaire

Communauté : bit.ly/TDFBCommunity

Assistance technique Amérique du nord :
1-800-344-1778 ext. 1


Pour plus d'informations sur le processus de configuration :



Vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou tablette pour scanner les codes QR. Si vous ne disposez pas de lecteur de code QR, téléchargez une application gratuite.

I-series de Tobii Dynavox

Guide de mise en route

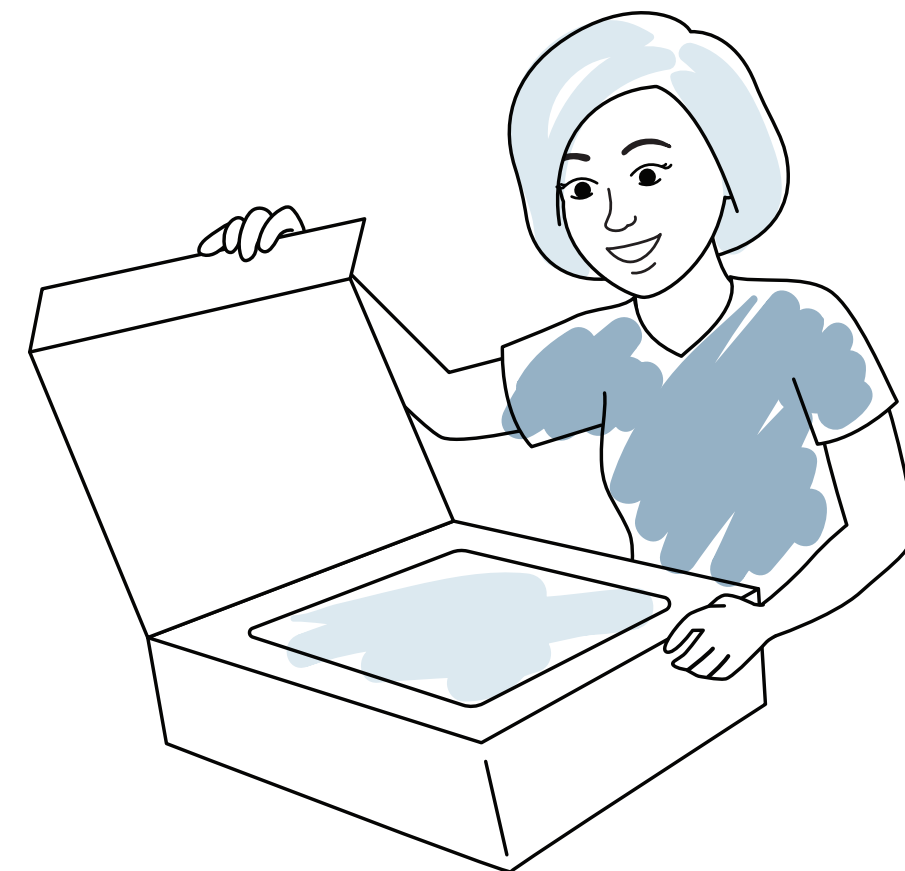

#PowerToBeYou

Partagez les photos et vidéos du déballage et de la première utilisation de votre I-series avec [#iopenedthebox](https://twitter.com/iopenedthebox).

#D2007976 Tobii Dynavox I-Series Getting Started Guide v1.0 - fr-FR


tobiidynavox

Suivez les trois étapes indiquées dans ce guide pour configurer et commencer à utiliser votre nouveau dispositif I-Series.

Étape 1 : Configuration initiale

Mise en marche du dispositif


- 1 Branchez le câble d'alimentation sur le dispositif et sur une prise de courant.
- 2 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

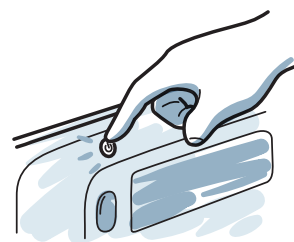

Configuration


Lorsque vous allumez votre dispositif, l'un de ces deux écrans s'affiche. Si votre dispositif n'a pas été pré-configuré, vous serez invité à effectuer la configuration Windows en premier lieu.

Configuration Windows

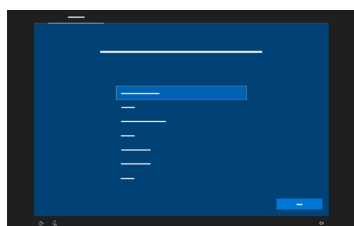

Bien que ce processus ne nécessite pas de compte Microsoft, nous vous recommandons de créer ou de vous connecter à un compte utilisateur, et non à un compte d'aide-soignant.

Démarrage de l'assistant : Choisissez votre application

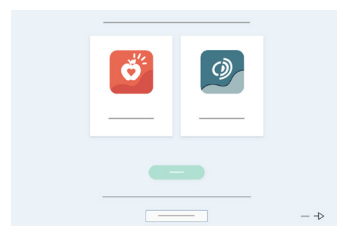

Choisissez l'application à lancer automatiquement au démarrage de l'appareil.

Étape 2 : Montage et positionnement



Un positionnement optimisé de l'appareil et de la personne est nécessaire pour assurer une utilisation réussie. Placez le dispositif sur le système de montage ou sur une table à l'aide du Socle réglable en face de l'utilisateur. Si vous utilisez Gaze Interaction, consultez les conseils relatifs à l'Eye Tracking (commande oculaire).


Étape 3 : Configuration du logiciel de communication



Snap Core First Communication par symboles

Assistant de configuration Snap

Suivez les invites pour créer votre nouvel utilisateur, ou restaurez un fichier utilisateur enregistré.

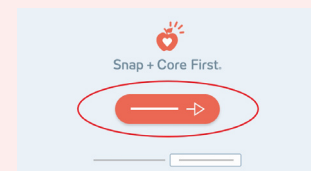

Catégorie

Choisissez une taille de grille proposant le plus de boutons de vocabulaire possible et à laquelle l'utilisateur peut accéder avec précision. Vous pourrez facilement la modifier ultérieurement.

Moyen d'accès

Choisissez votre moyen d'accès :

- 1 Sélectionnez **Éditer**.
- 2 Sélectionnez **Utilisateur**.
- 3 Sélectionnez **Moyen d'accès**.

- Si vous utilisez le regard, sélectionnez **Gaze Interaction**.
- Sélectionnez le bouton **Moyen d'accès**.
- Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner **Calibrer** et suivez les invites.

Étapes suivantes

Pathways for Core First, une documentation GRATUITE, permet d'enseigner des compétences de communication à l'aide de vidéos pratiques, de grilles d'objectifs, de plans de cours et plus encore. <http://bit.ly/TDPCF>



Les fiches de familiarisation Snap Core First vous aideront à démarrer. Elles contiennent des idées pour un usage quotidien, ainsi que des instructions étape par étape pour réaliser des éditions de base.




Communicator 5 Communication textuelle

Assistant de configuration Communicator 5

Suivez les invites pour créer votre nouvel utilisateur.

- Si vous utilisez Gaze Interaction, sélectionnez Calibrer et suivez les invites.
- Si vous n'utilisez pas Gaze Interaction, changez de moyen de saisie.

Sélectionner votre page d'accueil

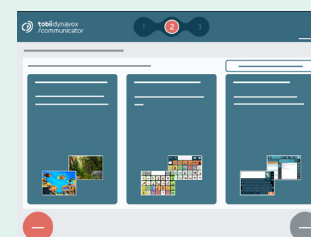

Débutant

Adéquat pour un communicateur émergent ayant des compétences linguistiques de base.

Symbole

Ces pages permettent aux communicants de créer leurs propres messages, symbole par symbole.

Texte

Destiné aux personnes qui composent des messages en utilisant principalement un clavier.

Étapes suivantes

Les fiches de familiarisation Communicator 5 vous aideront à démarrer. Elles contiennent des idées pour un usage quotidien, ainsi que des instructions étape par étape pour réaliser des éditions de base.



Conseils pour l'Eye Tracking (commande oculaire)

- Si le calibrage semble désactivé, vous pouvez appuyer sur le bouton de statut du suivi (triangle) situé sur la face avant de l'appareil pour ouvrir le champ de statut du suivi à tout moment. Cela permet de déterminer si les yeux de l'utilisateur sont dans une position adéquate pour Gaze Interaction.
- Une fois le calibrage effectué, des repères colorés vous indiqueront si vous avez correctement calibré cette zone de l'écran. Le vert et le jaune symbolisent une précision accrue, mais le rouge est suffisant pour démarrer ! Vous pourrez effectuer des améliorations au fil du temps.
- Vous pouvez personnaliser le processus de calibrage afin de répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur (ex. : nombre de cibles, type de stimulus).