



## Wat zit er in de doos?

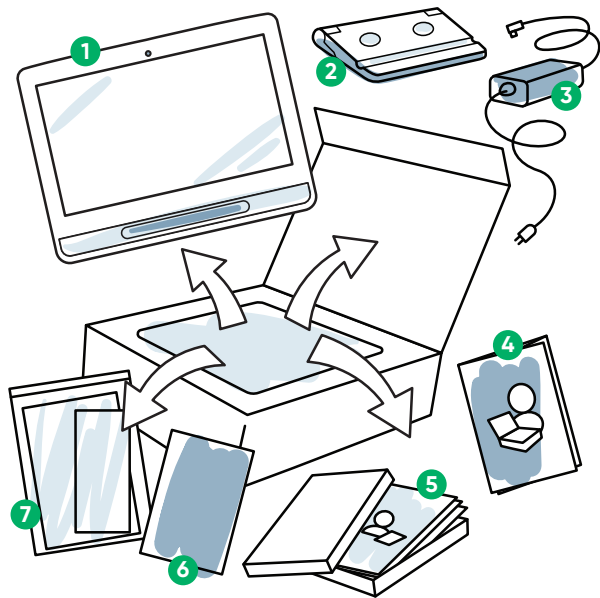

- 1 Apparaat
- 2 Verstelbare tafelstandaard
- 3 Netsnoer
- 4 Introductiehandleiding
- 5 Trainingskaarten
- 6 Brochure Veiligheid en conformiteit
- 7 Documentenmap

## Uw apparaat leren kennen

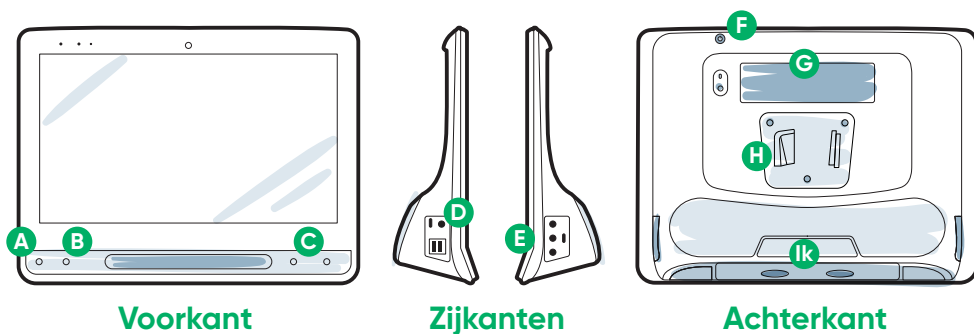

- |                          |                               |                         |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>A</b> Trackstatusknop | <b>D</b> Netstroomaansluiting | <b>G</b> Partnervenster |
| <b>B</b> Kalibratieknop  | <b>E</b> Schakelaarpoorten    | <b>H</b> Montageplaat*  |
| <b>C</b> Volumeknoppen   | <b>F</b> Aan/uit-knop         | <b>Ik</b> IR-zender     |

\*Als u een Daessy-montagevoorziening gebruikt, hebt u een adapterplaat nodig.

## Wij zijn er om u te helpen



### myTobiiDynavox

Gebruik uw gratis account om te synchroniseren, paginasets te delen, back-ups op te slaan en nog veel meer! Ga naar: [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com)



### Overige

Ontdek de Tobii Dynavox-app: [bit.ly/TDDiscover](http://bit.ly/TDDiscover)

Handleiding: [bit.ly/iseriesnl](http://bit.ly/iseriesnl)



### Extra ondersteuning

Community: [bit.ly/TDFBCommunity](http://bit.ly/TDFBCommunity)

Technische ondersteuning:  
**Neem voor technische ondersteuning contact op met uw lokale Tobii Dynavox-vertegenwoordiger.**

Voor meer informatie over het installatieproces:



U kunt uw mobiele telefoon of tablet gebruiken om de QR-codes te scannen. Als u geen lezer voor QR-codes hebt, kunt u een gratis app downloaden.

#12007980 Tobii Dynavox I-Series Getting Started Guide v.1.0 - nl-NL

# #PowerToBeYou

Deel uw foto's en video's van het uitpakken en eerste gebruik van uw I-Series via [#iopenedthebox](https://twitter.com/iopenedthebox).

# Tobii Dynavox I-Series

## Introductiehandleiding




tobii dynavox

Na het volgen van de drie stappen in deze gids is uw I-Series apparaat ingesteld en klaar voor gebruik.

## Stap 1: Eerste instellingen

### Het apparaat starten


- 1 Sluit het netsnoer aan op het apparaat en steek de stekker in een stopcontact.
- 2 Druk op de aan/uit-knop.

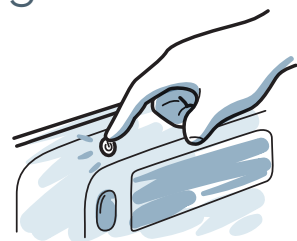


### Instellingen

Wanneer u het apparaat inschakelt, ziet u een van de twee schermen. Als uw apparaat niet vooraf is geconfigureerd, wordt u gevraagd eerst het Windows Setup-proces te voltooien.

#### Windows Setup

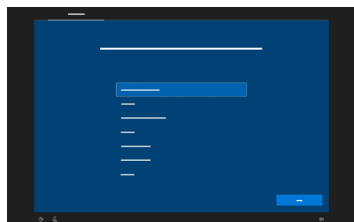

#### Opstartwizard: Kies uw app

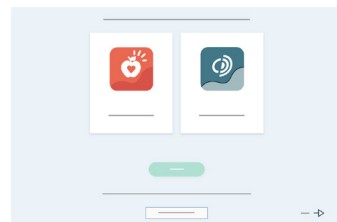

Hoewel er voor dit proces geen Microsoft-account nodig is, raden we u aan verbinding te maken met een gebruikersaccount of er een te maken. Gebruik geen account van een zorgverlener.

Kies welke app automatisch wordt gestart wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

## Stap 2: Montage en positie



Het is noodzakelijk om zowel de persoon als het apparaat optimaal te positioneren om het apparaat juist te kunnen gebruiken. Plaats het apparaat op het montagesysteem of op een tafel met behulp van de verstelbare tafelfstandaard en recht voor de gebruiker. Als u Gaze Interaction gebruikt, leest u de tips voor oogbesturing.


## Stap 3: Configuratie communicatiesoftware



### Snap Core First Symboolondersteunde gebruikers

#### Snap-configuratiewizard

Volg de aanwijzingen om uw nieuwe gebruiker te maken of een opgeslagen gebruikersbestand te herstellen.

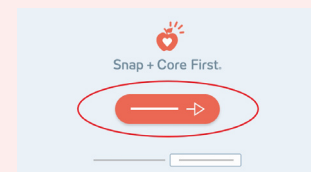

#### Rastergrootte

Kies een rastergrootte die de meeste knoppen bevat voor vocabulaire en die de gebruiker goed kan bedienen. U kunt deze later eenvoudig wijzigen.

#### Selectiemethode

Kies uw selectiemethode:

- 1 Selecteer **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Gebruiker**.
- 3 Selecteer **Selectiemethode**.

Als u oogbesturing gebruikt, selecteert u **Gaze Interaction**.

Selecteer de knop **Selectiemethode**.

Blader omlaag om **Kalibreren** te selecteren en volg de aanwijzingen.



#### Volgende stappen

Pathways voor Core First, een GRATIS hulpmiddel, helpt communicatievaardigheden aan te leren met behulp van instructievideo's, doelenrooster, lesplannen en nog veel meer. <http://bit.ly/TDPCF>



Snap Core First-trainingskaarten helpen u op weg. Deze bevatten ideeën voor dagelijks gebruik en stapsgewijze instructies voor basisbewerkingen.




### Communicator 5 Tekstondersteunde gebruikers

#### Communicator 5 Configuratiewizard

Volg de aanwijzingen om een nieuwe gebruiker te maken.

- Als u Gaze Interaction gebruikt, selecteert u **Kalibreren** en volgt u de aanwijzingen.
- Als u Gaze Interaction niet gebruikt, wijzigt u de invoermethode.

#### De startpagina selecteren

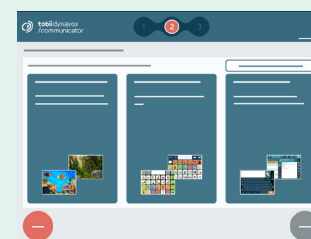

#### Opkomende communicatie

De beste keus voor een beginnende gebruiker met vroege taalvaardigheden.

#### Symbool

Met deze pagina's kunnen gebruikers hun eigen boodschappen samenstellen met afzonderlijke symbolen.

#### Tekst

Bestemd voor personen die voornamelijk boodschappen opstellen met een toetsenbord.

#### Volgende stappen

Communicator 5-trainingskaarten helpen u op weg. Deze bevatten ideeën voor dagelijks gebruik en stapsgewijze instructies voor basisbewerkingen.



### Tips voor oogbesturing

Als de kalibratie onnauwkeurig lijkt te zijn, kunt u op elk willekeurig moment de Trackstatusknop (driehoek) aanraken om het Trackstatusvenster te openen. Dit bepaalt of de ogen van de gebruiker zich in een goede positie bevinden voor Gaze Interaction.



Na de kalibratie ziet u gekleurde markeringen die aangeven hoe goed u hebt gekalibreerd voor dat gedeelte van het scherm. Groen en geel geven u een hogere nauwkeurigheid, maar rood is nog steeds prima om te beginnen! U kunt dit na verloop van tijd verbeteren.

U kunt het kalibratieproces aanpassen aan de specifieke behoeften van de gebruiker (bijvoorbeeld aantal doelen of het type stimulus).

Ga voor meer informatie naar: [bit.ly/DevicePosition](http://bit.ly/DevicePosition)