


O que há na caixa?



- 1 Dispositivo
- 2 Base ajustável
- 3 Cabo de alimentação
- 4 Guia de inicialização
- 5 Cartões de treinamento
- 6 Livreto de segurança e conformidade
- 7 Pasta de documentos

Conhecendo seu dispositivo

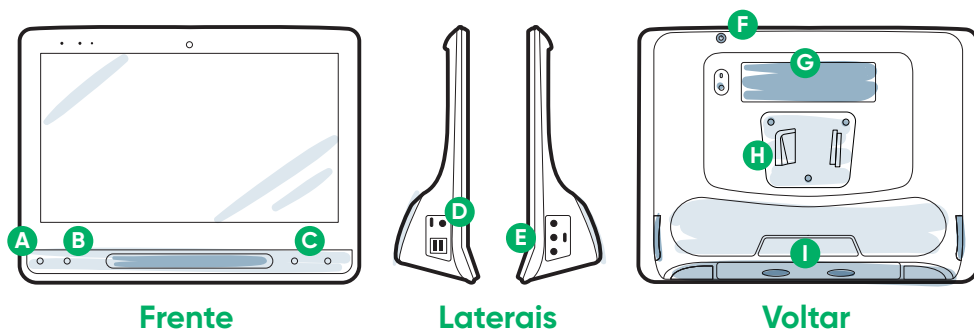

- A** Botão do status de rastreamento
- B** Botão de calibração
- C** Botões de Volume

- D** Entrada de alimentação
- E** Portas de Acionadores
- F** Botão de Ligar/Desligar

- G** Janela do parceiro
- H** Placa de montagem*
- I** Transmissor infravermelho

*Se estiver usando um suporte Daessy, você precisará de uma placa de conversão.

Estamos aqui para ajudar



myTobiiDynavox

Use sua conta gratuita para sincronizar, compartilhar Conjuntos de Páginas, armazenar backups e muito mais!
Visite: www.myTobiiDynavox.com



Outros

Manual do usuário: bit.ly/iseriestp



Suporte adicional

Comunidade: bit.ly/TDFBCommunity

Suporte técnico no Brasil:


Contacte o seu representante- www.tobiidynavox.com/es/sobre-tobii-dynavox/nuestros-representantes/

#PowerToBeYou

Compartilhe seu unboxing do I-Series e use fotos e vídeos com #iopenedthebox.

Tobii Dynavox I-Series

Guia de inicialização

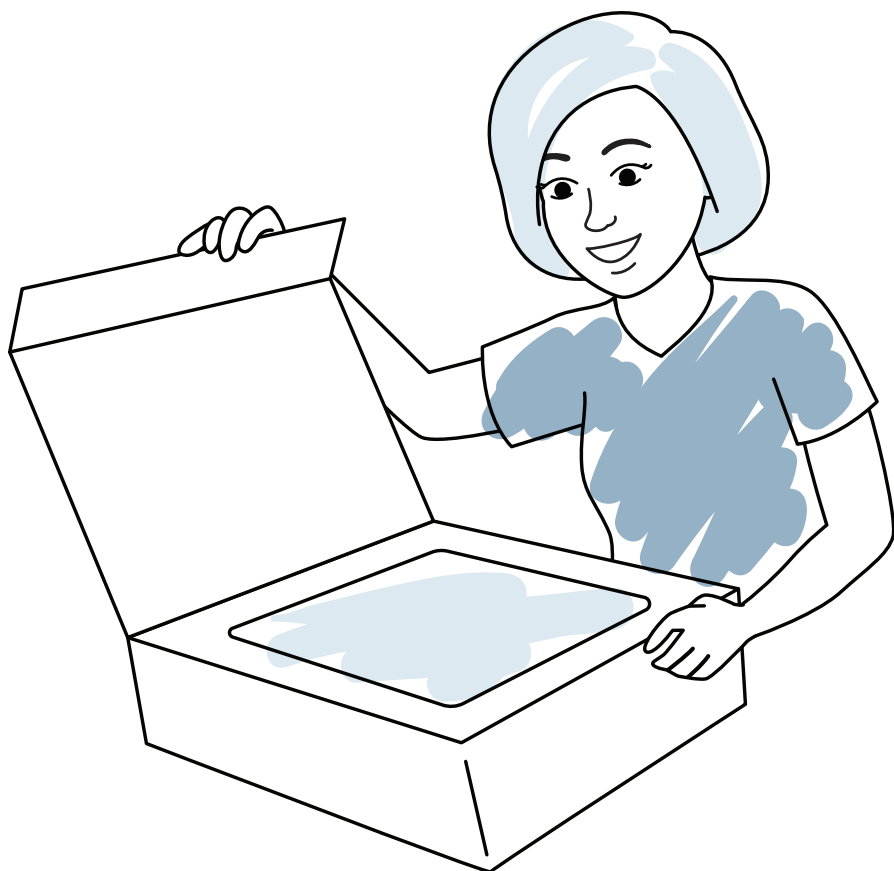


tobiidynavox

Siga as três etapas deste guia e seu novo dispositivo I-Series será configurado e estará pronto para uso.

Etapa 1: Configuração inicial

Iniciar o dispositivo


- 1 Conecte o cabo de alimentação ao dispositivo e conecte a uma tomada.
- 2 Pressione o botão liga/desliga.

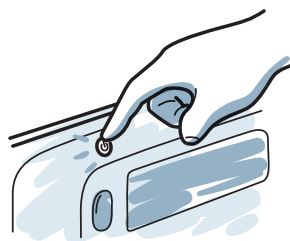

Configuração


Ao ligar o seu dispositivo, você verá uma das duas telas. Se o seu dispositivo não tiver sido pré-configurado, você será solicitado a concluir o processo de instalação do Windows primeiro.

Configuração do Windows

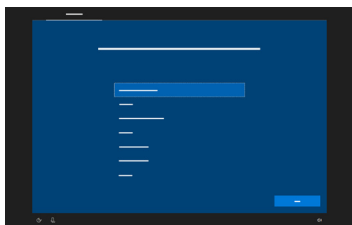

Embora esse processo não exija uma conta da Microsoft, recomendamos que você se conecte ou crie uma conta de usuário e não uma conta de cuidador.

Assistente de inicialização: Escolha seu aplicativo

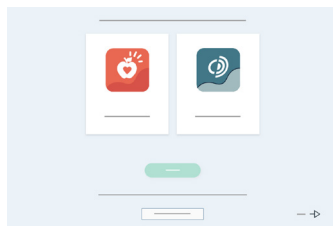

Escolha qual aplicativo será iniciado automaticamente quando o dispositivo for ligado.

Etapa 2: Montagem e posicionamento



O posicionamento otimizado para o dispositivo e o indivíduo é necessário para o uso bem-sucedido. Coloque o dispositivo no sistema de montagem ou em uma mesa usando a Base Ajustável, na frente do usuário. Se estiver usando Interação com Olhar, analise as dicas para rastreamento ocular.

Etapa 3: Configuração do software




Snap Core First

Comunicação
através de texto e
símbolosŨ

Assistente de configuração do Snap

Siga as instruções para criar seu novo usuário ou restaurar um arquivo de usuário salvo.

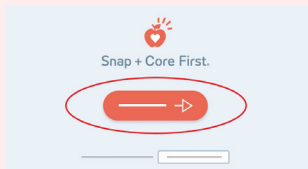



Tamanho da grade

Escolha um tamanho de grade que forneça mais botões para o vocabulário e possa ser acessado com precisão pelo usuário. Você pode facilmente alterá-lo mais tarde.

Método de acesso

Escolha o seu método de acesso:

- 1 Selecione **Editar**. 
- 2 Selecione **Usuário**.
- 3 Selecionar **Método de acesso**.
 - Se estiver usando olhar fixo, selecione **Interação com Olhar**.
 - Selecione o botão **Método de acesso**. 
 - Role para baixo para selecionar **Calibrar** e siga as instruções.



Communicator 5


Comunicação
através de texto e
símbolosŨ

Assistente de configuração do Communicator 5

Siga as instruções para criar seu novo usuário.

- Se estiver usando a Interação por Olhar, selecione Calibrar e siga as instruções.
- Se não estiver usando Interação com Olhar, altere o método de entrada.

Selecionar a página inicial

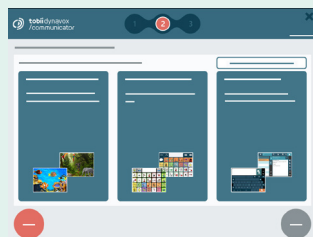

Emergente

Melhor para um comunicador iniciante com habilidades iniciais de linguagem.

de comunicação

Próximas etapas

O Pathways para o Core First, um recurso GRATUITO, ajuda a ensinar habilidades de comunicação, como fazer vídeos, grade de metas, planos de aula e muito mais.

<http://bit.ly/TDPCF>



Os cartões de treinamento do Snap Core First irão ajudá-lo a começar. Eles contêm ideias para uso diário e instruções passo a passo para edição básica.

Símbolos

Essas páginas permitem que os comunicadores criem suas próprias mensagens, símbolo por símbolo.

Texto

Destinado a pessoas que irão compor mensagens principalmente com um teclado.




Próximas etapas

Os cartões de treinamento do Communicator 5 irão ajudá-lo a começar. Eles contêm ideias para uso diário e instruções passo a passo para edição básica.



Dicas para rastreamento ocular

- Se a calibração estiver desativada, você pode tocar no botão Status de Rastreamento (triângulo) na frente do dispositivo para abrir a caixa de Status de Rastreamento a qualquer momento. Isso determinará se os olhos do usuário estão em uma boa posição para Interação com o Olhar. 
- Após a calibragem, você verá marcadores coloridos, mostrando o quão bem você calibrou nessa área da tela. Verde e amarelo lhe darão mais precisão, mas o vermelho ainda está bom para início! Você pode melhorar isso com o tempo.
- Você pode personalizar o processo de calibração para atender às necessidades específicas do usuário (por exemplo, número de destinos, tipo de estímulo).