

Kom i gang med Message Banking™



Denne tjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom [Boston Children's Hospital Department of Otolaryngology](#) og [Tobii Dynavox](#), med mål om å tilby en gratis og åpen meldingsbank for personer som står i fare for å miste stemmen sin. Dette Message Bank-systemet veileder personer gjennom **meldingsbank-prosessen**, hjelper til med å organisere meldingene, lagrer meldingene frem til de trengs, og gir muligheter for nedlasting av meldingene for bruk i hvilket som helst system som kan spille av de meldingene. Bruk av systemet er gratis for brukeren. Lagring av meldinger er gratis. Nedlasting av lagrede meldinger for personlig bruk er gratis.



Ta alltid med deg opptakeren din, slik at du kan ta opp flere ulike meldinger i flere ulike **omstendigheter**. For eksempler og tips om meldinger, gå til [Message Banking, Voice Banking, and Legacy Messages](#) av John M. Costello, Boston Children's Hospital.

Trinn 1: Last opp opptak av meldinger

1. Koble til din høykvalitets- .wav-opptaker (slik som Zoom H1n) i USB-porten på din datamaskin.
2. Åpne en nettleser og gå til [myMessageBanking.com](#) eller [myTobiiDynavox.com/messagebank](#)




Begge nettsidene er oversatt til flere språk.

For å velge ditt språk på [myMessageBanking.com](#)




For å velge ditt språk på [myTobiiDynavox.com/messagebank](#)

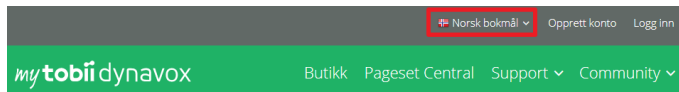


3. Logg deg inn med din myTobiiDynavox-innlogging eller opprett en ny konto (det er gratis).
4. Velg **Last opp**-knappen.



5. Bla til opptakeren (Flyttbar disk) eller der du har lagret dine .wav lydopptak-filer.

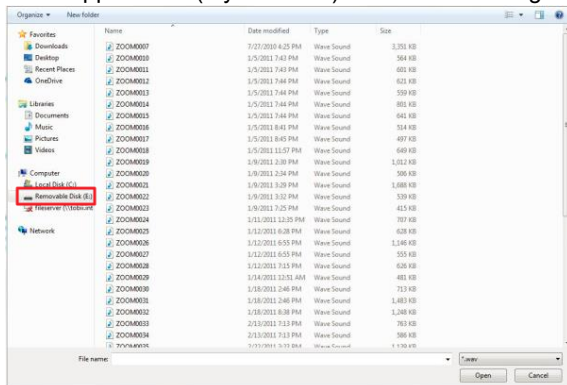

6. Velg filen(e) du ønsker å laste opp, og velg deretter **Åpne**. Spar tid ved å velge flere filer samtidig, og last dem opp.
7. Pass på at det riktige språket er valgt i **Transkriber til**-menyen, og velg deretter **Start**.

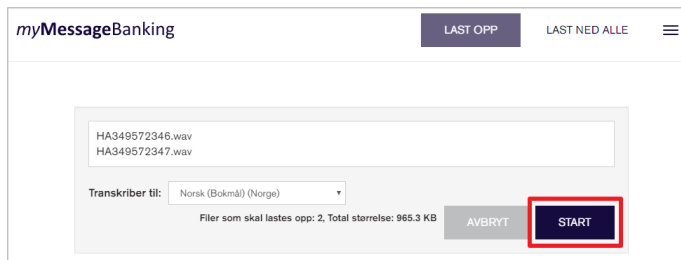

Transkripsjon med Message banking fungerer med 20+ språk. Bare velg brukerens språk fra transkripsjonsmenyen. Dersom ditt språk ikke er tilgjengelig enda velger du "Ikke transkriber", så kan du selv transkribere dem manuelt etter opplasting.

- Et varselvindu viser statusen for opplastingen. Når opplastingen er ferdig velger du **Vis mine meldinger**.

Trinn 2: Administrer og organiser meldingsfiler

Lydfilene du laster opp transkriberes, blir automatisk merket, og presenteres i Message Bank. Når de er lastet opp, kan du spille av opptakene, redigere teksten og legge til tagger.

Å legge til tagger på meldingene dine er en flott måte å organisere dem på. Når du begynner å bruke en ASK-enhet, vil du finne meldingene dine etter kategori (f.eks. telefonsamtaler, hilsener, måltider, etc.). Tenk på hvilke situasjoner en melding kan brukes i, og legg til de relevante taggene (hver melding kan ha flere tagger), men pass på at du ikke lager for mange tagger, ettersom for mange tagger kan bli vanskelig å holde orden på og finne frem i.

Tittel	Tekst	Fortrolighet	Opptak	Tags
<input type="checkbox"/> HA349572347 Norsk (Bokmål) - Norge	La oss gå til parken.		0:02	

Rediger individuelle filer

- Velg **Spill av**-knappen for å lytte til opptaket.
- Hvis du trenger å endre teksten, klikk på teksten i tekstkolonnen.
- Velg **Legg til tag**-knappen for å legge til en ny tag.
- Sikkerhetsscoren representerer transkripsjonens estimerte nøyaktighet. Lytt til opptakene, spesielt meldingene som har en lav sikkerhetsscore, og korrigér den transkriberte teksten om nødvendig. Dersom transkripsjonen var nøyaktig, og ikke trengte korrigering, velg **ansikts-ikonet** og velg deretter **Verifiser**.




Vis 20		Viser 1 - 2 av 2 Resultater	
<input checked="" type="checkbox"/>	2 valgt		
<input checked="" type="checkbox"/>	HA349572347 Norsk (Bokmål) - Norge	La oss gå til parken.	0:02
<input checked="" type="checkbox"/>	HA349572346 Norsk (Bokmål) - Norge	LEGG TIL	0:02

Rediger flere filer (masseoppgaver)

- Du kan utføre handlinger på flere meldinger av gangen ved å huke av i boksene ved siden av meldingene. For å velge alle meldinger, huk av i boksen ved siden av kolonneoverskriften Tittel.
- Velg **Erstatt tittel** for å erstatte tittelen for hver valgte melding med den meldingens transkriberte tekst.



Erstatt tittel-verktøyet er svært nyttig hvis meldingsfilene dine har titler som består av tilfeldige tall og bokstaver tildelt av stemmeopptakeren!

- Bruk **Tag valgte**  for å legge til en tag på alle de valgte meldingene.
- Velg **Last ned valgte**  for å laste ned kun de valgte meldingene.
- Velg **Slett valgte**  for å slette de valgte meldingene.

Trinn 3: Last ned meldingsfiler

Meldinger du laster ned lagres i en enkelt .zip-fil slik at den lett kan importeres til din taleprogramvare.

1. For å laste ned alle meldinger: Velg **Last ned alle** på toppen av siden.
For å laste ned spesifikke meldinger: Huk av i avkrysningsboksene ved siden av filene du vil laste ned, og velg

deretter **Last ned** 

2. I popup-vinduet som vises velger du **Last ned**.
3. Velg **OK** for å lagre .zip-filen.

Trinn 4: Importer meldinger til Communicator 5

Selv om .wav-filer kan importeres til mange ASK-enheter, er Tobii Dynavox' Communicator 5-programvare optimalisert med funksjoner som gjør prosessen enklere. Følg trinnene nedenfor for å importere og bruke de lagrede meldingene dine hvis du bruker Communicator 5-programvare på en talegenererende enhet fra Tobii Dynavox, på en Surface Pro, eller en bærbar datamaskin.




Pass på at du har oppdatert Communicator 5-programvaren din til nyeste versjon.

Importer meldinger


1. Start Communicator 5, og åpne deretter **Hurtigmenyen**.
2. Velg **Avanserte innstillinger**.



3. Velg fanen **Lyd**.
4. Velg **Lydbibliotek**.

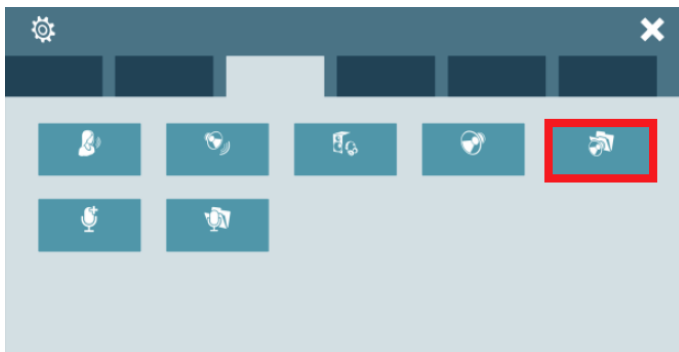

5. Velg **Ny**.

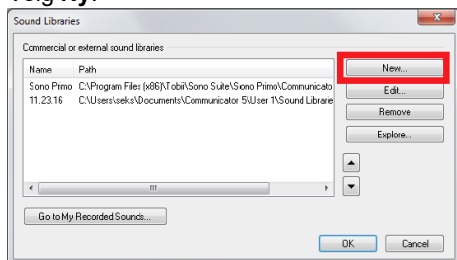

6. Sjekk at *Importer en .zip-fil med lagrede meldinger* er valgt, og velg deretter **Neste**.
7. Skriv inn et navn for lydfil-importen.




Sjekk at *Legg til meldinger i Mine uttrykk* er aktivert. Dette vil automatisk opprette kategorier i Mine uttrykk basert på taggene dine.


8. Velg **Bla gjennom**, og naviger deretter til .zip-filen og velg den for import.
9. Velg **Neste** for å importere meldingene i .zip-filen.
10. Når filene er pakket ut velger du **Fullfør**.

Bruk meldingene dine

1. Åpne Hurtigmenyen og velg **Alle sidesett**.

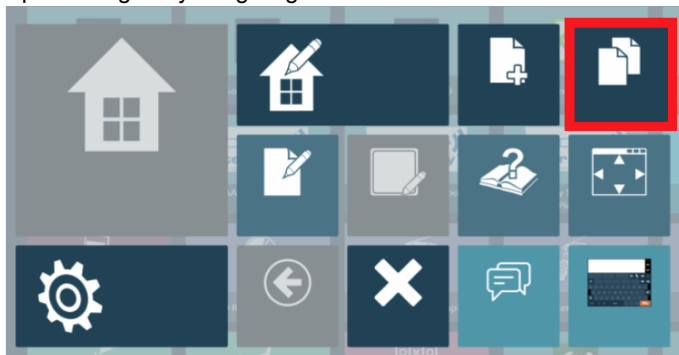

2. Velg **Tekstkommunikasjon**.

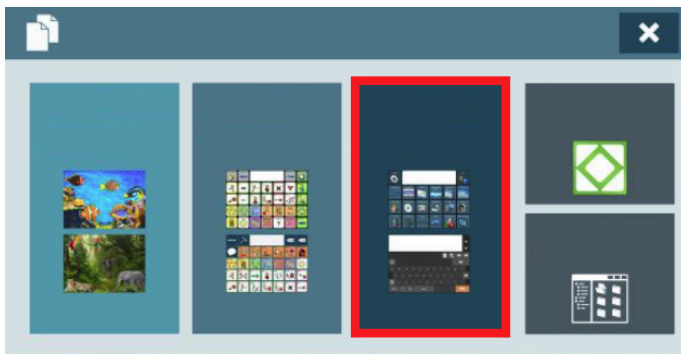

3. Velg **Snakking med uttrykk 7 x 5** i fanen **Direktekommunikasjon**.



4. Velg **Legg til på Hjemmeside**.
5. Velg **X** for å lukke menyen.
6. De innspilte meldingene dine er nå tilgjengelige via Hjemmesiden, organisert basert på taggene du laget på myMessageBanking.com.