




# PCEye 5

## Vodič za prve korake

### Šta se nalazi u kutiji?

- 1 PCEye 5
- 2 Vodič za prve korake
- 3 Ploča za montiranje uređaja
- 4 Komplet za montiranje uređaja

- 5 Dokument o bezbednosti i usaglašenosti
- 6 Kutija
- 7 USB-C na USB-A adapter

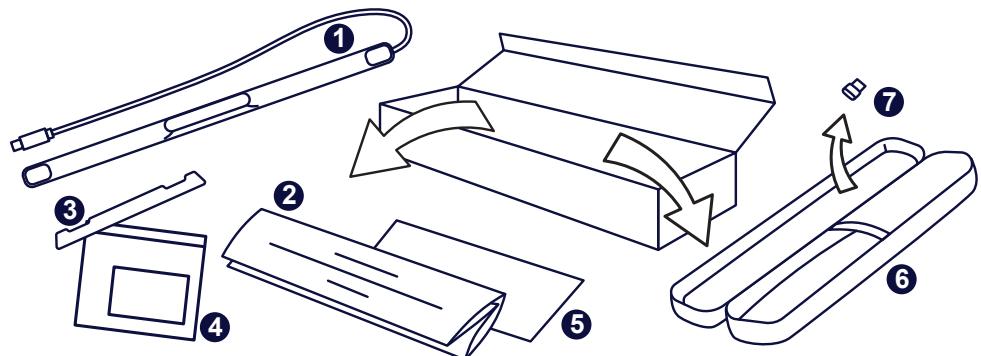


### Softver

PCEye 5 sadrži i softver TD Control. Ako ste kupili paket Magic EyeFx, pogledajte karticu sa dozvolom za više informacija.

### Upoznavanje sa uređajem

- 1 Uredaj za praćenje pokreta očiju
- 2 USB konektor
- 3 Žlebovi za instalaciju
- 4 Magneti za montiranje

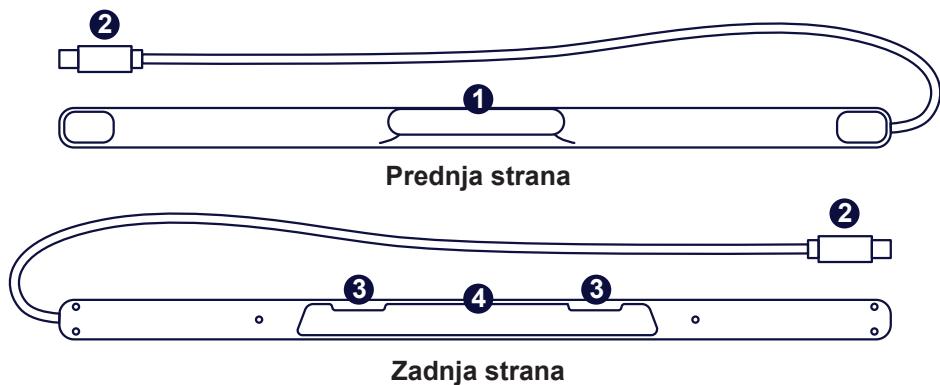

### Tu smo da vam pomognemo

#### Centar za edukaciju

Centar za edukaciju kompanije Tobii Dynavox: [learn.tobiidynavox.com](http://learn.tobiidynavox.com)

#### Dodatna podrška

Zajednica: <http://qrco.de/TDFB>

Obratite se lokalnom predstavniku Tobii Dynavox da biste dobili tehničku podršku.

#### Edukativni materijali

Uputstvo za korišćenje: <http://qrco.de/PCEyeManual>

Priručnik TD Control: <https://qrco.de/TDCmanual>

Radni listovi za Communicator 5: <https://qrco.de/C5Cards>

Radni listovi za TD Snap Core First: <https://qrco.de/TDSnapCards>

Tekstualni radni listovi za TD Snap: <https://qrco.de/TextCards>

Dodatne PCEye 5 resurse pronađite ovde:  
[qrco.de/PCEyeHelp](http://qrco.de/PCEyeHelp)



# Instaliranje

Pratite tri koraka iz ovog vodiča da biste preuzeli neophodni softver i montirali uređaj PCEye 5 na vaš računar. Ako PRVO preuzmete softver imaćete priliku da vidite uputstva na ekranu koja će vas provesti kroz korake za podešavanje i korišćenje.

Možete koristiti PCEye 5 na laptopu ili desktop računaru.



## 1. korak: Preuzmite softver PCEye 5

Posetite <https://arco.de/PCEyeCC> i preuzmite softver PCEye 5.

## 2. korak: Montiranje PCEye 5 i Kalibracija

**i** Ako koristite PCEye 5 sa opcionim PCEye 5 stalkom, preskočite ovaj korak i pogledajte priloeno uputstvo za detaljne informacije.

Pratite obaveštenja na ekranu. Ponovo pročitajte vodič za više informacija o softveru.

## 3. korak: Pokrenite softver


Ako ste kupili softverski paket ili ste dobili dodatne kartice sa licencama, pratite uputstva za preuzimanje i instalaciju na svakoj kartici (vidite levo).

## Prvi koraci sa softverom TD Control

Kada je uparen sa uređajem PCEye 5, softver TD Control daće vam pristup funkcijama miša i tastature. Kada prvi put pokrenete softver TD Control, Vodič za brzi početak pružiće vam pregled različitih aktivnosti.


**i** Moete se vratiti na Vodič za brzi početak tako to ete kliknuti na dugme Informacije.

Kliknite na dugme Sakrij vodič da biste izašli.

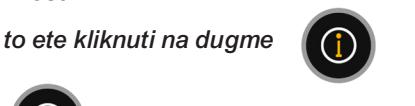

### Istražite Tragača

Tragač će vam dati povratnu informaciju o tome gde gledate na ekranu. Kada fiksirate pogled na jedan predmet, pojaviće se dugme Aktivator. Kada fiksirate pogled na dugme Aktivator, otvorice se Meni za interakcije.

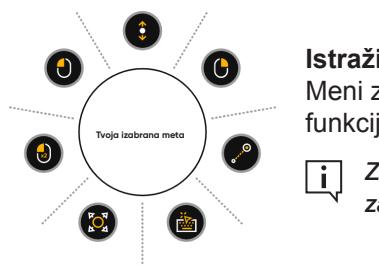

### Istražite Meni za interakcije

Meni za interakcije pruža pristup tastaturi i primarnim funkcijama miša.

**i** Za detaljni opis svake funkcije, pogledajte Uputstvo za korišćenje.




### Istražite Meni van ekранa


Meni van ekranu vam omogućava pristup dodatnim funkcijama, kao što su Kontinuirani klik, Podešavanja, Pauza itd.

Da biste rekalibrirali uređaj, pristupite Meniju van ekranu, odaberite dugme Više, a potom dugme Brza kalibracija.

**i** Dok istrajujete softver TD Control u redu je da rekalibrirete uređaj koliko vaa preciznost nije optimalna.

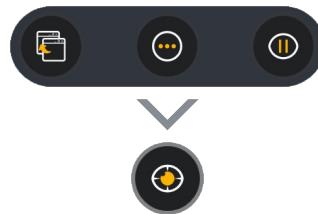

## Korisni saveti za korišćenje softvera TD Control

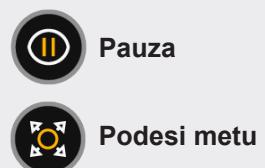

- Koristi pauzu kada ti treba da odmoriš oči.
- Željeni predmet ne mora biti savršeno pozicioniran u centar Tragača.
- Da biste povećali tačnost, korisitite opciju Podesi metu.
- Kada koristite Pomeranje, što je dalje od ikonice za pomeranje usmeren vaš pogled, brže će se stranica pomerati. Pomeranje se može vršiti gore-dole i levo-desno.
- Ako želite da u tekstualnom polju nešto otkucate postavite Tragača u tekstualno polje, a zatim odaberite dugme Tastatura. Nije potrebno da koristite levi klik.