


Instrukcja obsługi

TD Snap®

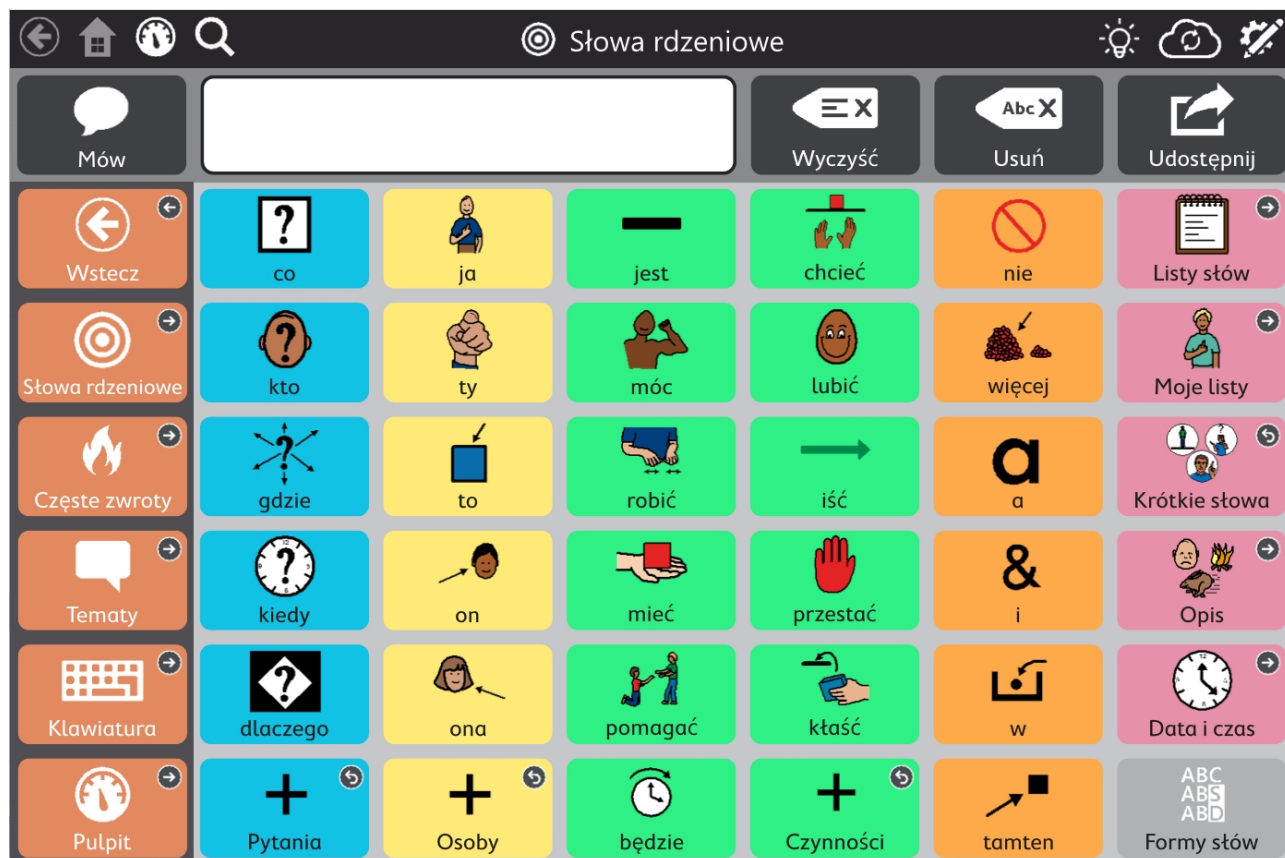

Instrukcja obsługi

Wersja 1.37

2025-07-29

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawo autorskie © Dynavox Group AB (publ)

Zabrania się kopiowania, przechowywania w jakimkolwiek systemie i przesyłania jakichkolwiek części niniejszego dokumentu z wykorzystaniem jakichkolwiek metod (elektronicznych, fotokopiowania, nagrywania i innych) bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy.

Ochrona praw autorskich obejmuje wszystkie formy i postaci podlegających ochronie materiałów i informacji uwzględnionych w przepisach prawa stanowionego lub zwyczajowego, w tym w przepisach przyjętych w przyszłości, wliczając w to m.in. materiały wytworzone z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, które są wyświetlane na ekranie np. widoki ekranów, menu itp.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością Dynavox Group AB. Jakiegokolwiek powielanie w części lub w całości bez uprzedniej pisemnej zgody Dynavox Group AB jest zabronione.

Produkty, o których mowa w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych właścicieli. Wydawca i autor nie zgłaszają żadnych praw do tych znaków.

Chociaż w czasie opracowywania niniejszego dokumentu podjęto wszelkie środki ostrożności, wydawca i autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia oraz za szkody wynikłe w związku z korzystaniem z niniejszego dokumentu lub w związku z korzystaniem programów lub kodu źródłowego, które mogą być do niego dołączone. W żadnym wypadku wydawca ani autor nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty jakichkolwiek zysków lub z tytułu jakiegokolwiek innej straty handlowej spowodowanej lub rzekomo spowodowanej bezpośrednio lub pośrednio przez niniejszy dokument.

Treść może zostać zmieniona bez uprzedzenia.

Aby uzyskać aktualną wersję niniejszego dokumentu, należy odwiedzić witrynę firmy Tobii Dynavox www.TobiiDynavox.com.

Dane kontaktowe:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Sztokholm
Szwecja
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Wielka Brytania
+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Trading działający jako Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australia
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
P.R.China 215021
+86 512 69362880



Spis treści

1	Witamy!	9
1.1	Wymagania systemowe	9
1.2	Obsługiwane języki	10
1.3	Gdzie kupić TD Snap®	10
1.3.1	Zakup funkcji mowy	10
2	Zasoby i wsparcie	11
2.1	Usługa Tobii Dynavox Pathways dla zestawu plansz Core First	11
2.2	Zasoby internetowe i wsparcie	11
2.3	myTobiiDynavox	11
2.4	Centrum nauki	11
3	Pierwsze uruchomienie	13
3.1	Skonfiguruj nowego użytkownika	13
3.2	Przywróć istniejącego użytkownika	13
3.3	Wybierz zestaw stron	13
3.3.1	Core First	13
3.3.2	Zestaw stron Motor Plan*	14
3.3.3	Zestaw stron Skanowanie w Core First*	15
3.3.4	Zestaw stron Tekst*	15
3.3.5	Zestaw stron Afazja*	15
3.3.6	Zestaw stron Express*	15
3.4	Wybierz rozmiar siatki	15
4	Nawigacja	16
4.1	Sterowanie wzrokowe komputerem	16
5	Pasek górny	17
5.1	Wstecz	17
5.2	Strona główna	17
5.3	Pulpit	17
5.4	Wyszukaj	17
5.5	Wskaźnik okna partnera	18
5.6	Filtr słownictwa	18
5.7	Śledzenie danych	19
5.8	Synchronizuj	19
5.9	Edytuj	19
6	Pasek komunikatu	20
6.1	Mów	20
6.2	Okno komunikatu	20
6.2.1	Edycja tekstu w oknie komunikatu	20
6.3	Usuń	21
6.4	Usuń	21

6.5	Cofnij	22
6.6	Przywróć	22
6.7	Czat.....	22
6.8	Przycisk Kopiuj do.....	22
6.9	Udostępniaj	22
6.10	Wstrzymaj metodę dostępu	23
6.11	Przełącz filtr słownictwa (tylko zestawy stron Motor Plan).....	23
7	Pasek narzędzi	24
7.1	Wstecz	24
7.2	Kluczowe słowa	24
7.3	QuickFires	25
7.4	Tematy	25
7.4.1	Słowa w temacie	25
7.4.2	Pomocne słowa	25
7.5	Klawiatura	27
7.6	Pulpit	28
7.7	Formy wyrazowe	28
7.8	plik postępu	28
7.9	Aktualna aktywność Boardmaker.....	28
7.10	abc (tylko w języku niemieckim).....	29
8	Filtr słownictwa.....	30
8.1	Włączaj lub wyłączaj filtr słownictwa	30
8.2	Edytuj listę słownictwa	30
8.3	Wybierz listę słownictwa	31
8.4	Utwórz nową listę słownictwa	31
8.5	Importuj listę słownictwa (plik .txt).....	32
8.6	Udostępnij listę słownictwa	32
8.7	Zmień nazwę, powiel lub usuń listę słownictwa	32
9	Edycja	34
9.1	Panel edycji.....	34
9.2	Dodaj przycisk.....	34
9.3	Przenieś przycisk	35
9.4	Zmień rozmiar przycisku	35
9.5	Narzędzia edycji przycisków	37
9.5.1	Cofnij i Przywróć	38
9.5.2	Kopiuj i wklej przycisk	38
9.5.3	Zaznacz wszystkie przyciski	38
9.5.4	Zaznacz wiele przycisków	38
9.5.5	Wybór obwódki.....	39
9.5.6	Ukryj/pokaż przycisk	39
9.5.7	Sortuj przyciski alfabetycznie	40
9.5.8	Usuń przycisk.....	40
9.5.9	Rozwiń/zwiń nazwy narzędzi edycji	40

9.6	Treść przycisku	41
9.6.1	Opis przycisku	41
9.6.2	Aktywna zawartość	41
9.6.3	Komunikat przycisku	43
9.6.4	Przycisk wskazówki audio	45
9.6.5	Grafika przycisku	45
9.6.6	Edytuj symbol	47
9.6.7	Typ przycisku	49
9.7	Akcje przycisku	51
9.7.1	Usuń akcję	54
9.7.2	Zmień kolejność akcji przycisku	54
9.7.3	Tablica	55
9.7.4	AccessIT	56
9.7.5	Uruchamiaj aktywności Boardmaker w TD Snap®	57
9.7.6	Uruchom aplikację Apple Shortcuts z TD Snap® (tylko iPadOS)	61
9.7.7	Odtwarzanie filmów z YouTube w TD Snap®	62
9.8	Styl przycisku	62
9.8.1	Tło przycisku	63
9.8.2	Obwódka przycisku	63
9.8.3	Opis przycisku	64
9.8.4	Układ przycisku	65
9.8.5	Wizualizacja łącza przycisku	65
9.9	Łączy do strony/Utwórz nową stronę	66
9.9.1	Utwórz przycisk łącza w pustej komórce	67
9.9.2	Tworzenie łącza z istniejącego przycisku	67
9.9.3	Łączy do Nowej strony/Utwórz nową stronę	67
9.9.4	Łączy do istniejącej strony	67
9.9.5	Link do nowej kopii istniejącej strony	67
9.9.6	Zaimportuj i powiąż ze stroną	68
9.9.7	Odwiedź stronę	68
9.10	Ustawienia metody dostępu do przycisków	69
9.11	Zasady języka przycisku	70
9.12	Przyrostki i przedrostki	70
9.13	Edytuj Pomocne słowa	71
9.14	Piloty	71
9.14.1	Programowanie przycisku pilota	71
9.14.2	Korzystanie z pilotów	71
9.15	Edycja strony	72
9.15.1	Nazwa strony	72
9.15.2	Symbol strony	73
9.15.3	Zasady języka strony	75
9.15.4	Rozmiar tabeli strony	75
9.15.5	Kolor tła planszy	76
9.15.6	Pokaż/ukryj pasek komunikatu	76
9.15.7	Usuń stronę	76
9.15.8	Importuj/eksportuj strony	77
9.16	Grupy skanowania	77
9.16.1	Opcje grupy skanowania	78
9.17	Edycja paska komunikatu	78
9.17.1	Przenoszenie i zmiana rozmiaru obiektów na pasku komunikatu	79
9.17.2	Dodawanie przycisków na pasku komunikatu	79
9.17.3	Usuwanie przycisków na pasku komunikatu	79

9.18	Edycja paska narzędzi	80
9.19	Kolory niestandardowe	80
10	Ustawienia zestawu stron	82
10.1	Zestaw stron	82
10.1.1	Wybierz zestaw stron	82
10.1.2	Utwórz nowy zestaw stron	82
10.1.3	Zmiana nazwy zestawu stron i edytowanie opisu	82
10.1.4	Usuń zestaw plansz	83
10.1.5	Ustawienie strony głównej	83
10.1.6	Ustawienie strony klawiatury	83
10.2	Rozmiar tabeli	83
10.3	Styl zestawu stron	84
10.3.1	Symbol odcienia skóry i koloru włosów	84
10.3.2	Czcionka opisów przycisków zestawu stron	85
10.3.3	Wielkość czcionki opisów przycisków zestawu stron	85
10.3.4	Pogrubienie opisów przycisków zestawu stron	85
10.3.5	Układ przycisków zestawu stron	85
10.3.6	Wizualizacja łączy zestawu stron	86
10.3.7	Margines siatki zestawu stron	87
10.3.8	Domyślne kolory tła zestawu stron	87
10.3.9	Czcionka okna komunikatu zestawu stron	87
10.3.10	Rozmiar czcionki okna komunikatu zestawu stron	88
10.3.11	Kolor tekstu okna komunikatu zestawu stron	88
10.3.12	Kolor tła okna komunikatu zestawu stron	88
10.3.13	Kolor podkreślenia mowy w oknie komunikatu zestawu stron	88
10.3.14	Kolor tła paska komunikatu dla zestawu stron	88
10.3.15	Styl przycisku nawigacji	89
10.4	Preferencje zestawu stron	89
10.5	Przyciski adaptacyjne	89
10.6	Informacje o zestawie stron	90
10.6.1	Ustawienia twórcy zawartości zestawu stron	90
11	Drukuj	92
12	Asystent Google	93
12.1	Podłącz swoje konto Google	93
12.2	Skonfiguruj urządzenia Google	93
12.3	Obsługa języka Asystenta Google	93
12.4	Mów do Asystenta Google	94
13	Udostępnianie i zapisywanie	96
13.1	Użytkownicy	96
13.2	Zestawy stron	96
13.2.1	Import zestawu stron	96
13.2.2	Zapisywanie kopii zestawu stron	97
13.2.3	Udostępnianie kopii zestawu stron (przez myTobiiDynavox)	98
13.2.4	Synchronizuj zestaw stron	98
13.3	Pakiety stron	101
13.3.1	Eksportuj pakiet stron	101
13.3.2	Import pakietu stron	102

14	Ustawienia użytkownika	104
14.1	Zmień użytkownika	104
14.2	Tworzenie nowego użytkownika	104
14.3	Kopia zapasowa użytkownika	104
14.4	Przywracanie użytkownika	105
14.5	Edycja/zmiana nazwy użytkownika	106
14.6	Usuwanie użytkownika	107
14.7	Logowanie do konta myTobiiDynavox	107
14.8	Voice	107
14.8.1	Mówiący głos	107
14.8.2	Szybkość głosu	109
14.8.3	Wysokość głosu	109
14.8.4	Wyjątki w wymowie	109
14.9	Urządzenie wyjściowe mowy	110
14.10	Głosy dla określonego języka	110
14.11	Konto Google	111
14.12	Preferencje użytkownika	111
14.12.1	Ustawienia mowy	111
14.12.2	Ustawienia okna komunikatu	111
14.12.3	Ustawienia predykcji	112
14.12.4	Resetowanie przewidywania słów	112
14.12.5	Ustawienia Synchronizacji	112
14.13	Access Method	113
14.13.1	Ustawianie metody dostępu	113
14.13.2	Opcje sterowania dotykowego	114
14.13.3	Opcje aktywacji wzrokiem	114
14.13.4	Opcje aktywacji zwolnieniem	115
14.13.5	Opcje dotyku dźwiękowego	116
14.13.6	Opcje zatrzymania myszy	118
14.13.7	Opcje sterowania wzrokowego	119
14.13.8	Opcje skanowania	120
14.14	Śledzenie danych	122
14.14.1	Śledź wykorzystanie przycisków	122
14.14.2	Przycisk Pokaż pasek górny	124
14.14.3	Pokaż liczbę użyć przycisków	124
14.14.4	Pokaż liczbę modelowania	125
14.14.5	Zarządzanie danymi	125
15	Ustawienia systemowe	127
15.1	Preferencje	127
15.1.1	Hasło	127
15.1.2	Ustawienia ekranu (tylko Windows)	128
15.1.3	Język trybu edycji	128
15.2	Urządzenie	128
15.2.1	Ustawienia okna partnera	128
15.3	Sklep	128
15.3.1	Dokonaj zakupu (tylko iPadOS)	128
15.3.2	Przywracanie zakupów (tylko Windows)	129
15.3.3	Dezaktywuj klucz (tylko Windows)	129
15.4	Zestawy symboli	129

15.4.1	Ustawienia wyszukiwania.....	129
15.4.2	Zainstalowane i możliwe do pobrania symbole.....	129
15.4.3	Zmiana kolejności zestawów symboli	130
15.5	Pomoc i samouczki	130
15.5.1	Filmy.....	130
15.5.2	Pathways dla Core First.....	130
15.5.3	Skrócona prezentacja	130
15.5.4	Pomoc zewnętrzna.....	130
15.6	Informacje	131
15.6.1	Wyślij informację zwrotną.....	131
15.6.2	Aktualizacje oprogramowania	131

1 Witamy!



Ilustracja 1: Snap Core First — QuickFires

TD Snap® to zaawansowane oprogramowanie do komunikacji z użyciem symboli. Został zaprojektowany jako najłatwiejsze w użyciu, najbardziej intuicyjne i spójne rozwiązanie dostępne na rynku, zarówno dla użytkownika, jak i partnera w komunikacji. TD Snap® to idealne rozwiązanie dla osób z autyzmem, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną i afazją. Dzięki TD Snap® zapewniamy najlepszą dostępną komunikację opartą na symbolach w połączeniu z niezbędnymi komponentami dla rodzica, nauczyciela lub terapeuty do współpracy z użytkownikami, aby pomóc im odnieść sukces w komunikacji.

1.1 Wymagania systemowe

Tabela 1: System Windows

	System operacyjny	Architektura	Pamięć	Sterowanie dotykowe	Kamera
Minimalne	Windows 10 Wersja 1803	x64	2 GB	Nie jest wymagane	Nie jest wymagane
Zalecane	Windows 10 Wersja 20H2	x64	4 GB	Zintegrowane sterowanie dotykowe	Zintegrowana kamera

Tabela 2: iPadOS

	System operacyjny	Urządzenie	Pojemność	Sterowanie dotykowe	Kamera
Minimalne	iPadOS 13	iPad Air 2 iPad Mini 4	32 GB	Zintegrowane sterowanie dotykowe	Nie jest wymagane
Zalecane	iPadOS 17	iPad 8. generacji	64 GB	Zintegrowane sterowanie dotykowe	Zintegrowana kamera

1.2 Obsługiwane języki

- Arabic (SA)
- Chinese (Simplified)
- Czech (CZ)
- Danish (DK)
- Dutch (NL)
- English (AU)
- English (CA)
- English (UK)
- English (US)
- Finnish (FI)
- French (CA)
- French (FR)
- German (DE)
- German (Switzerland)
- Hebrew (IL)
- Icelandic (IS)
- Italian (IT)
- Japanese (JP)
- Norwegian (NO)
- Polish (PL)
- Portuguese (BR)
- Portuguese (PT)
- Spanish (ES)
- Spanish (Latin America)
- Spanish (US)
- Swedish (SE)
- Turkish (TR)

1.3 Gdzie kupić TD Snap®

TD Snap® jest dostępny w sklepie Apple App Store dla iPadów i myTobiiDynavox.com dla urządzeń z systemem Windows. TD Snap® jest fabrycznie zainstalowany na urządzeniach z obsługą mowy firmy Tobii Dynavox.

Funkcje mowy w TD Snap® dostępna jest na urządzeniach z obsługą mowy firmy Tobii Dynavox. Podczas instalacji TD Snap® na urządzeniu firmy innej niż Tobii Dynavox, wszystkie funkcje niezwiązane z mową są dostępne za darmo, w tym niektóre treści, tworzenie i edytowanie stron, tworzenie użytkowników oraz tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i synchronizacja; jednak funkcje mowy są ograniczone. Pełna obsługa mowy jest możliwa po dokonaniu zakupu.

Funkcje mowy, które są *wyłączone* w bezpłatnej wersji aplikacji:

- Okno Odczytywanie komunikatu
- Odtwarzanie mowy lub nagrania za pomocą przycisku
- Odtwarzanie mowy lub nagrania za pomocą systemu wspomagania zachowania
- Wskazówki audio

Funkcje mowy, które są *dostępne* w bezpłatnej wersji aplikacji:

- Nagrywanie dźwięku (w trybie edycji)
- Podgląd nagrania audio (w trybie edycji)
- Podgląd głosu
- Podgląd wyjątków wymowy (w trybie edycji)

1.3.1 Zakup funkcji mowy

iPadOS - W TD Snap® przejdź do sekcji *Edycja (Edit)* > *System* > *Sklep (Store)*, aby zakupić funkcje mowy w TD Snap® przez sklep Apple App Store.

Windows - Zadzwoń do obsługi klienta firmy Tobii Dynavox, aby zakupić funkcje mowy w TD Snap®. <https://www.tobiidynavox.com/pages/locations>

2 Zasoby i wsparcie

Tobii Dynavox oferuje kilka bezpłatnych zasobów, które wspierają i uzupełniają korzystanie z TD Snap®. Nie przegap narzędzi, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania Tobii Dynavox!

2.1 Usługa Tobii Dynavox Pathways dla zestawu plansz Core First



Usługa Pathways dla zestawu plansz Core First to bezpłatne źródło informacji, które pomoże Ci wdrożyć produkty Tobii Dynavox w najbardziej skuteczny i wydajny sposób. Poznasz oparte na wynikach badań techniki, które maksymalizują zaangażowanie, łatwość użytkowania i wiele więcej!

Usługa Pathways dla zestawu plansz Core First będzie Ci towarzyszyć, gdy zaczniesz używać zestawu plansz Core First w TD Snap® i zachęca do rozwoju zaangażowania, języka i umiejętności czytania i pisania. Usługa Pathways dla zestawu plansz Core First:

- zapewni jasną, spersonalizowaną ścieżkę umożliwiającą rozpoczęcie pracy.
- zachęci do rozwoju osoby w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności.
- nauczy Cię budować umiejętności w różnych obszarach, w tym korzystania z podstawowych słów, poszerzania słownictwa, korzystania z zestawu plansz Core First w TD Snap® w codziennych czynnościach i nie tylko.
- pokaże Ci, w jaki sposób zestaw plansz Core First w TD Snap® może pomóc w umiejętnościach i sytuacjach społecznych, takich jak radzenie sobie z awariami komunikacji, nawigacja i umiejętności operacyjne oraz zachęcanie do pozytywnego zachowania.
- zbuduje umiejętności komunikacji z partnerem dzięki Najlepszym Wskazówkom (Top Tips).
- będzie wspierać stałą personalizację zestawu plansz Core First.

Pełna wersja usługi Pathways dla zestawu plansz Core First jest dostępna jako [darmowa aplikacja](#) dla systemu Windows i iPadOS. Usługa Pathways dla zestawu plansz Core First online jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na <https://www.tobiidynavox.com/products/pathways-for-core-first?tab=1>.

2.2 Zasoby internetowe i wsparcie

Jeśli potrzebujesz wsparcia, pierwszym krokiem powinna być sekcja Szkolenia i wsparcie na stronie internetowej Tobii Dynavox.

2.3 myTobiiDynavox

myTobiiDynavox to Twoja osobista witryna do przechowywania i udostępniania plików online. Prześlij pliki kopii zapasowych użytkowników do myTobiiDynavox, aby je przechowywać i udostępniać całemu zespołowi wsparcia komunikacji.

Wejdź na myTobiiDynavox.com, aby założyć darmowe konto.

2.4 Centrum nauki



Centrum nauki jest obecnie dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Wejdź na learn.tobiidynavox.com, aby uzyskać dokumentację, szkolenia i inne zasoby, w tym:

- odpowiedzi na często zadawane pytania

- filmy szkoleniowe
- nagrane webinaria
- kursy online

3 Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu TD Snap®, zostanie Ci zadanych kilka pytań, które pomogą dostosować oprogramowanie do Twoich potrzeb. Jeśli chcesz, możesz później zmienić dowolne z tych ustawień.

3.1 Skonfiguruj nowego użytkownika

Wybierz opcję **Rozpocznij**, a pomożemy Ci przeprowadzić konfigurację w mniej niż minutę!

3.2 Przywróć istniejącego użytkownika

Użyj tej opcji, jeśli masz już plik kopii zapasowej użytkownika, który chcesz przywrócić.

Przywróć kopię zapasową użytkownika z myTobiiDynavox

1. Wybierz **Przywróć**.
2. Jeśli obecnie nie zalogowano Cię do myTobiiDynavox, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
3. Wybierz plik kopii zapasowej użytkownika z listy, a następnie wybierz **Dalej**.

Przywróć kopię zapasową użytkownika z pliku lokalnego


1. Wybierz **Przywróć**.
2. Wybierz **Przywróć z lokalnego pliku**.
3. Przejdź do pliku kopii zapasowej użytkownika i zaznacz go, a następnie wybierz opcję **Otwórz**.

3.3 Wybierz zestaw stron

Kreator konfiguracji automatycznie wyświetli zestawy stron odpowiadające ustawieniom języka urządzenia, jeśli są one dostępne w TD Snap®. Wybierz opcję **Język**, aby zobaczyć zestawy stron dostępne w innych językach.

3.3.1 Core First

Core First to podstawowy zestaw stron dostępny w oprogramowaniu TD Snap®. Jego celem jest maksymalizacja zaangażowania, umiejętności czytania i pisania oraz rozwoju poprzez różnorodne narzędzia komunikacji, które są stosowane łącznie w płynny i przewidywalny sposób.

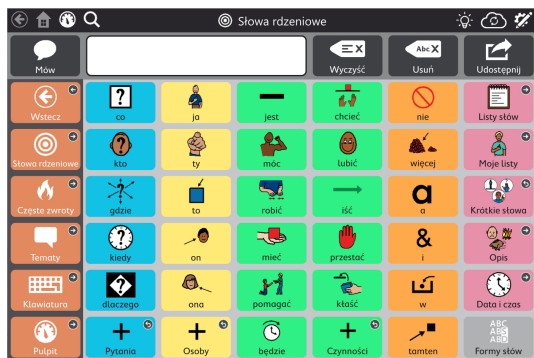

Ilustracja 2: Zestaw stron Core First

Cechą charakterystyczną Core First jest nasza strategia słów kluczowych. Opiera się ona na badaniach, doświadczeniu klinicznym i testach użytkowników:

- Wybór słów dla maksymalnego wykorzystania w różnych środowiskach.
- Rozmieszczenie słów i interfejs użytkownika.
- Kolejność wprowadzania słów.
- Stabilna lokalizacja słów podczas systematycznego dodawania innych.
- Wydajność nawigacji.

- Pomaga uczyć użytkowników znaczenia słów i łączenia ich w celu tworzenia unikalnych wiadomości.

Dodatkowe narzędzia komunikacyjne zawarte w Core First obejmują:

- QuickFires — szybkie, przewidywalne komunikaty, które mogą być używane samodzielnie lub w połączeniu.
- Klawiatura — wprowadzają litery w oknie wiadomości, aby tworzyć lub modyfikować słowa.
- Listy słów — uporządkowane według kategorii dla łatwego wyszukiwania.
- Tematy — wspomagają interakcje w określonych środowiskach lub dotyczące konkretnych wątków.
- Pomocne słowa — pomagają użytkownikom w zachowaniu i komunikacji społecznej.
- Pulpit — zdalne sterowanie, regulacja głośności i wiele więcej na wyciągnięcie ręki!

Zestaw stron Core First został zaprojektowany jako najwyższy standard w komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), dając użytkownikom najbardziej przystępne doświadczenie w szybkim wyszukiwaniu treści i maksymalne możliwości tworzenia własnych i konkretnych wiadomości. Core First pozwala użytkownikom prowadzić szybkie rozmowy w czasie rzeczywistym na tematy, które są dla nich najważniejsze. Daje im również swobodę tworzenia nowych wiadomości, które trudno byłoby przewidzieć z wyprzedzeniem. Poruszając się po dostarczonych narzędziach, uczestnicy komunikacji mogą pozostać aktywnymi uczestnikami danej sytuacji i utrzymywać kontakt z partnerami komunikacyjnymi.

Rozwój umiejętności czytania i pisania jest kluczową umiejętnością, która musi być częścią rozwiązania komunikacyjnego. Dzięki wykorzystaniu klawiatur, czytelnych linków do sprawdzonych programów na urządzeniu oraz treści zaprojektowanych w celu wspierania interakcji komunikacyjnych wokół doświadczeń związanych z czytaniem, Core First będzie wspierać rozwój umiejętności czytania i pisania wśród wszystkich użytkowników.

Core First nie jest systemem uniwersalnym ani zamkniętym. Podstawową zasadą jest ciągłość w różnych rozmiarach siatki. W miarę rozwoju umiejętności komunikacyjnych i zapotrzebowania na dodatkowe opcje w zakresie złożoności języka, te nowe opcje są płynnie dodawane do Core First, pozostawiając zawartość w przewidywalnych lokalizacjach.

3.3.2 Zestaw stron Motor Plan*

Zestaw stron TD Motor Plan kładzie nacisk na rozwój języka i generatywną produkcję języka (powiedz, co chcesz powiedzieć, jak chcesz to powiedzieć). Użytkownicy uczą się różnych wzorców motorycznych związanych z każdym słowem, co z czasem prowadzi do automatyzacji. Pozwala to użytkownikom skupić wysiłek poznawczy na języku i komunikacji, a nie na nawigacji w oprogramowaniu. Narzędzie do filtrowania słownictwa pozwala moderatorom skupić się na konkretnych słowach lub stopniowo zwiększać zasób słownictwa. Wszystkie zestawy stron Motor Plan oferują taką samą liczbę słów (około 2700).



Ilustracja 3: Strona główna zestawu stron Motor Plan 30.

Dwoma głównymi zasadami zestawu stron Motor Plan są spójność i wydajność.

Spójność

- Zawsze zaczynaj od strony głównej i automatycznie powracaj do strony głównej po dokonaniu wyboru.
- Słowa pozostają w tym samym miejscu i pojawiają się tylko raz w zestawie stron.

Wydajność

- Wszystkie z 2700 słów są dostępne w 3 lub mniej kliknięciach.†
- Najczęściej używane słowa znajdują się w pobliżu strony głównej.

Opcje rozmiaru siatki zestawu stron różnią się w zależności od języka: 30 pozycji (5x6), 40 pozycji (5x7) i 66 pozycji (6x11).

* Niedostępne we wszystkich językach.

† Wybór słownictwa wymaga średnio 2,3 kliknięć na 30-pozycyjnym zestawie stron Motor Plan i 2,0 kliknięć na 66-pozycyjnym zestawie stron Motor Plan.

3.3.3 Zestaw stron Skanowanie w Core First*

W tym zestawie stron zawartość Core First została przeprojektowana pod kątem łatwości i wydajności dzięki metodzie dostępu przez skanowanie. Dołączone strony nauki skanowania (Learn to Scan) pomagają użytkownikom w wygodnym korzystaniu z metody dostępu za pomocą skanowania.

Rozmiary siatki zestawu stron: 3x4, 6x4, 7x6, 9x8

* Niedostępne we wszystkich językach.

3.3.4 Zestaw stron Tekst*

Ten zestaw stron jest przeznaczony dla użytkowników, którzy nie polegają na symbolach w komunikacji. Zestaw stron tekstowych jest zalecany dla użytkowników z dużymi umiejętnościami czytania i pisania.

Rozmiary siatki zestawu stron: 7x10

* Niedostępne we wszystkich językach.

3.3.5 Zestaw stron Afazja*

Zestaw stron Afazja jest przeznaczony dla użytkowników z afazją. Zawiera tablicę, strony tematów z opcjami układu siatki lub sceny wizualnej, kalendarz, album ze zdjęciami oraz strony Asystenta Google i Alexa. Symbole używane w zestawie stron dla osób z afazją są odpowiednie dla dorosłych użytkowników.

Rozmiary siatki zestawu stron: 6x5, 4x3, 3x3

* Niedostępne we wszystkich językach.

3.3.6 Zestaw stron Express*

Zestaw stron TD Snap® Express został zaprojektowany z myślą o prostocie i łatwości użytkowania, jednocześnie wspierając rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych. Zestaw stron charakteryzuje się intuicyjną strukturą i sposobem działania, minimalizując krzywą uczenia się dla użytkowników i umożliwiając personalizację. TD Snap® Express zapewnia słownictwo uporządkowane w prostym menu tematów. Każdy temat lub kontekst zawiera typowe początki zdań, pojedyncze słowa i pełne wiadomości. Oferuje pojedynczy rozmiar siatki 18 przycisków. Kompatybilne ze wszystkimi metodami dostępu obsługiwanymi przez TD Snap®, większe przyciski ułatwiają dostęp użytkownikowi i ułatwiają konfigurację partnerom komunikacyjnym.

Rozmiary siatki zestawu stron: 6x3

* Niedostępne we wszystkich językach.

3.4 Wybierz rozmiar siatki

Wybór rozmiaru siatki będzie zależał od kilku czynników: najważniejsza jest dokładność wyboru, a następnie ograniczenia wizualne lub ograniczenia uwagi. Jeśli występują problemy z szybkością lub dokładnością wyboru, zacznij od mniejszego rozmiaru siatki, aby użytkownik mógł pracować z większymi przyciskami. Rozmiar siatki można łatwo zmienić w ustawieniach zestawu stron, więc nie martw się o znalezienie idealnego rozmiaru siatki przy pierwszej próbie. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar siatki w zależności od zmieniających się umiejętności językowych lub fizycznych danej osoby.



Jeśli chcesz wyświetlić pasek komunikatu i/lub pasek narzędzi, musisz wybrać rozmiar siatki z co najmniej 3 wierszami i 3 kolumnami.

Tabela 3: Przykładowe rozmiary siatki (niekompletne)



2x3




3x4



6x6

4 Nawigacja

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak poruszać się po zawartości TD Snap® i znaleźć wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji.

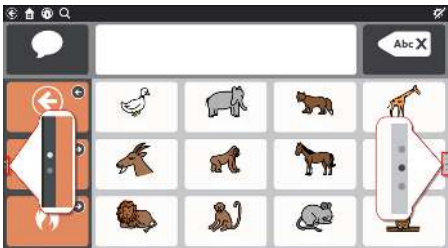Przewijanie	Możesz przewijać w górę i w dół zarówno na pasku narzędzi, jak i na stronie. Wskaźniki strony (kropki po lewej stronie paska narzędzi i po prawej stronie strony) pokazują, kiedy dostępna jest większa ilość treści powyżej lub poniżej. W zależności od Twoich ustawień i metody dostępu, możesz przewijać, przesuwając ekran dotykowy lub wybierając przycisk nawigacyjny. Zobacz sekcję 14.13.2 <i>Opcje sterowania dotykowego</i> , str 114.	
Pasek górny	Przyciski po lewej stronie górnego paska zawierają przycisk Wstecz, przycisk Strona główna, przycisk Pulpit i przycisk Szukaj. Zobacz sekcję 5 <i>Pasek górny</i> , str 17.	
Przycisk Łączy	Przyciski Łączy przenoszą Cię na inną stronę. Zobacz sekcję 9.9 <i>Łączy do strony/Utwórz nową stronę</i> , str 66.	
Przycisk Odwiedź	Przyciski Odwiedź przenoszą Cię na inną stronę, umożliwiają dokonanie jednego wyboru na tej stronie, a następnie automatycznie powracają do poprzedniej strony. Zobacz sekcję 9.9.7 <i>Odwiedź stronę</i> , str 68.	
Przycisk Wstecz	Przycisk Wstecz działa podobnie jak przycisk Wstecz w przeglądarce internetowej. Wybierz przycisk Wstecz jeden raz, aby powrócić do poprzedniej strony, lub kilka razy, aby przechodzić wstecz w historii stron.	
Przycisk Boardmaker	Przyciski Boardmaker łączą się z folderami i aktywnościami przechowywanymi w Boardmaker Online. Przeglądaj i odtwarzaj aktywności bezpośrednio w TD Snap®! Zobacz sekcję 9.7.5 <i>Uruchamiaj aktywności Boardmaker w TD Snap®</i> , str 57.	

4.1 Sterowanie wzrokowe komputerem

Użytkownicy korzystający ze sterowania wzrokowego mogą nawigować między TD Snap® a innymi aplikacjami i funkcjami na swoich urządzeniach za pomocą dostępu do pulpitu. Dostęp do pulpitu zapewnia narzędzia ułatwień dostępu niezbędne do korzystania z funkcji sterowania wzrokowego na Twoim urządzeniu poza TD Snap®. Na urządzeniach z systemem Windows rozwiązaniem dostępu do pulpitu jest TD Control. Na urządzeniach iPad dostęp do pulpitu jest dostępny przy użyciu funkcji iPadOS AssistiveTouch. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem, aby skonfigurować rozwiązanie dostępu do pulpitu przed uruchomieniem dostępu do pulpitu z TD Snap®.

Istnieją dwa sposoby utworzenia przycisku w TD Snap®, których możesz użyć do przejścia z TD Snap® i korzystania z dostępu do pulpitu:

- Przycisk Aktywna zawartość typu „Stan dostępu do pulpitu”. Zobacz sekcję 9.6.2 *Aktywna zawartość*, str 41.
- Przycisk akcji „Przełącz dostęp do pulpitu”. Patrz sekcja 9.7 *Akcje przycisku*, str 51.

5 Pasek górny

5.1 Wstecz



Przycisk Wstecz powoduje powrót do poprzednio odwiedzanej strony.

5.2 Strona główna



Przycisk Strona główna prowadzi do strony głównej (pierwszej strony, którą widzisz po uruchomieniu TD Snap®). Przycisk Strona główna jest skrótem, którego możesz użyć, aby wrócić do strony głównej z dowolnego miejsca w oprogramowaniu. Aby zmienić stronę główną, zobacz sekcję *10.1.5 Ustawienie strony głównej, str 83*.

5.3 Pulpit



Użyj przycisku Pulpit, aby szybko uzyskać dostęp do strony Pulpit. Pulpit to strona zapewniająca łatwy dostęp do często używanych przycisków, zwłaszcza przycisków niewymagających znajomości słownictwa, takich jak regulacja głośności lub piloty.

5.4 Wyszukaj




Wyszukiwanie jest dostępne tylko za pomocą metody dostępu dotykowego, ale podświetloną ścieżkę do słowa można śledzić za pomocą dowolnej metody dostępu.



Narzędzie wyszukiwania pokazuje, gdzie znaleźć dowolne słowo w TD Snap®. Po prostu wprowadź wyszukiwany termin, a następnie podążaj za wizualnymi wskazówkami. Wskazówki wizualne prowadzą do słowa docelowego, dzięki czemu możesz je później znaleźć samodzielnie.




1. Wybierz narzędzie **Szukaj** na pasku górnym.
2. Wprowadź wyszukiwane hasło.

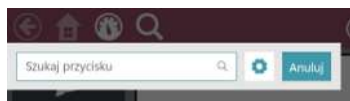

3. Jeśli jest dostępna, wybierz opcję **Ustawienia wyszukiwania przycisków**, aby doprecyzować preferencje wyszukiwania (niedostępne w zestawach stron Motor Plan):
 - **Zezwalaj na zduplikowane dopasowania** — włącz, aby wyświetlić wszystkie lokalizacje identycznych przycisków.
 - **Pokaż ukryte ścieżki** — włącz wyświetlanie ścieżek używających przycisków, które są aktualnie ukryte.

- **Dostępna ścieżka wyszukiwania** — włącz, aby podświetlona ścieżka do przycisku docelowego była dostępna przy użyciu dowolnej metody dostępu.
- 4. Wybierz przycisk, którego szukasz w wynikach wyszukiwania.
- 5. Wybierz podświetlony przycisk na każdej stronie, aż dojdiesz do przycisku docelowego. Być może będziesz musiał przewinąć, aby zobaczyć następny przycisk, więc uważaj na strzałki wskazujące, dokąd się udać!

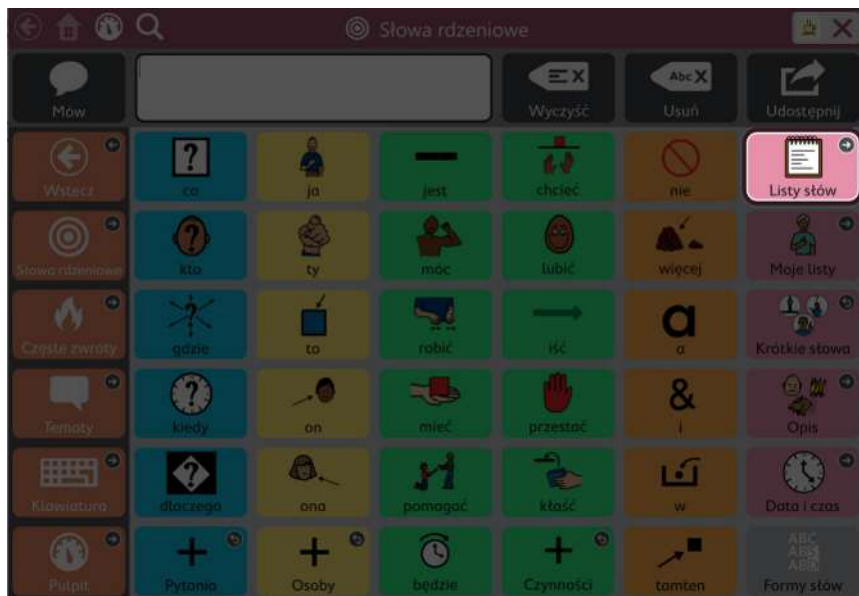

- i** Zwróć uwagę na każdy podświetlony przycisk, aby następnym razem móc samodzielnie zapamiętać ścieżkę. Możesz anulować wyszukiwanie w dowolnym momencie, wybierając dowolne miejsce poza podświetloną ścieżką.

5.5 Wskaźnik okna partnera

- i** Wskaźnik okna partnera jest dostępny tylko w urządzeniach firmy Tobii Dynavox I-13, I-16 i TD Pilot.

Wskaźnik okna partnera informuje o stanie okna partnera z tyłu urządzenia.

Tabela 4: Style wskaźnika okna partnera

Styl lustra — wyświetla tekst znajdujący się aktualnie w oknie partnera.	
Styl ikon — ikona wskazuje, że okno partnera jest włączone. Gdy okno partnera jest wyłączone, ikona nie jest wyświetlana.	

Aby zmienić styl wskaźnika okna partnera, zobacz sekcję 15.2.1 Ustawienia okna partnera, str 128.

5.6 Filtr słownictwa

- i** Filtr słownictwa jest dostępny tylko w zestawach stron Motor Plan.



Po włączeniu filtr słownictwa ogranicza przyciski słownictwa w zestawie stron tylko do tych określonych na wybranej liście słownictwa. Słownictwo spoza listy słownictwa jest ukryte. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtra słownictwa, zobacz sekcję 8 Filtr słownictwa, str 30.

5.7 Śledzenie danych



Śledzenie danych jest dostępne tylko za pomocą dotyku lub bezpośredniego kliknięcia myszą.



Po włączeniu przycisk Śledzenie danych zapewnia szybki dostęp do następujących ustawień: Tryb modelowania, Pokaż zliczenia użycia przycisków, Pokaż zliczenia modelowania i Zarządzaj danymi. Więcej informacji na temat śledzenia danych znajdziesz w sekcji *14.14 Śledzenie danych, str 122*.

5.8 Synchronizuj



Synchronizacja jest dostępna tylko za pomocą dotyku lub bezpośredniego kliknięcia myszą.



Przycisk Synchronizuj służy do rozpoczęcia udostępniania zestawu stron do synchronizacji lub do aktualizacji zestawu stron, który jest już udostępniony do synchronizacji. Więcej informacji na temat synchronizacji znajdziesz w sekcji *13.2.4 Synchronizuj zestaw stron, str 98*.

Aby ukryć przycisk Synchronizacji w Trybie obsługi, zapoznaj się z sekcją *14.12.5 Ustawienia Synchronizacji, str 112*.

5.9 Edytuj



Edycja jest dostępna tylko za pomocą dotyku lub bezpośredniego kliknięcia myszą.




Wybierz przycisk Edytuj, aby wprowadzić zmiany w zestawie stron i uzyskać dostęp do ustawień.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz sekcja *9 Edycja, str 34*.

6 Pasek komunikatu


Pasek komunikatu wyświetla skomponowany tekst wiadomości i przyciski umożliwiające udostępnienie go światu!

 Jeśli chcesz wyświetlić pasek komunikatu, musisz wybrać rozmiar siatki z co najmniej 3 wierszami i 3 kolumnami.

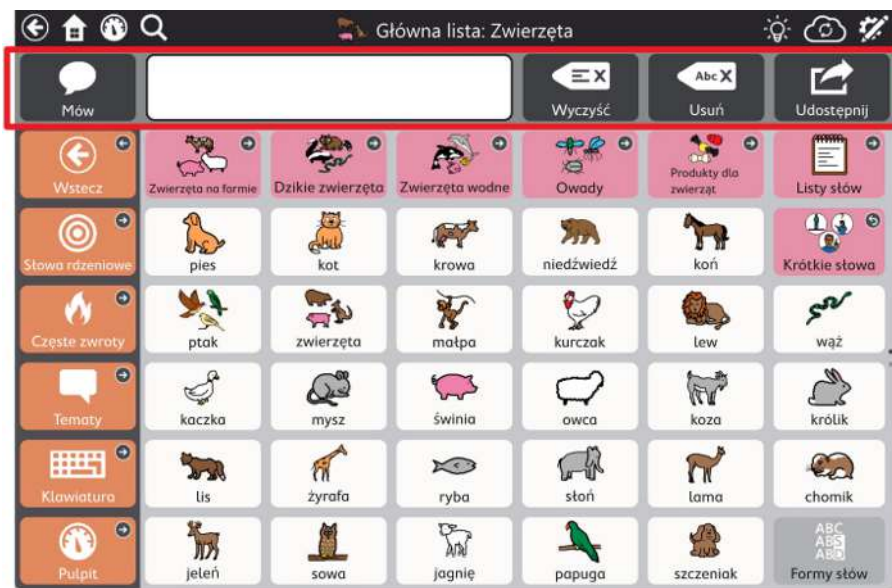

Aby edytować pasek komunikatu, zobacz 9.17 *Edycja paska komunikatu*, str 78.

6.1 Mów

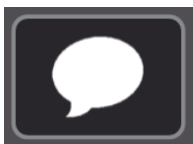

Wybierz ten przycisk, aby wyświetlić bieżącą zawartość okna komunikatu.

 Na urządzeniach z systemem Windows do wywołania okna wiadomości można użyć fizycznego skrótu klawiaturowego **Ctrl + Enter**.

6.2 Okno komunikatu



Okno wiadomości wyświetla tekst, który chcesz wypowiedzieć lub wysłać jako wiadomość. Może również wyświetlać symbole. Możesz wysłać tekst do okna wiadomości za pomocą przycisku, wpisać tekst bezpośrednio do okna wiadomości za pomocą strony klawiatury lub klawiatury fizycznej, lub wkleić tekst ze schowka systemowego.

Aby uzyskać informacje na temat ustawień okna komunikatu, zobacz sekcję 14.12.2 *Ustawienia okna komunikatu*, str 111.

6.2.1 Edycja tekstu w oknie komunikatu

Podczas wprowadzania tekstu w oknie komunikatu kursor domyślnie pojawia się na końcu tekstu. Aby przesunąć kursor w oknie wiadomości, użyj przycisków z zaprogramowaną akcją *Przeniesienie kursora*.

Przeniesienie kursora w oknie komunikatu

- Użyj akcji *Przeniesienie kursora*, aby przesunąć kursor w następujący sposób:
 - Przesuń w górę lub w dół
 - Przesuń do przodu lub do tyłu o znak
 - Przesuń do przodu lub do tyłu o słowo
 - Przesuń do przodu lub do tyłu o zdanie
 - Przesuń na początek lub koniec wiersza
 - Przesuń na początek lub koniec tekstu okna komunikatu
 - Przesuń stronę tekstu w górę lub w dół

Aby zaznaczyć tekst, użyj przycisków wyboru zaprogramowanych z akcją *Zaznacz tekst*. Zaznaczony tekst w oknie komunikatu można usuwać, formatować pogrubieniem lub kursywą, wycinać lub kopiować, udostępniać innej aplikacji, odczytywać na głos i nie tylko. Zapoznaj się z sekcją Okno komunikatu w 9.7 *Akcje przycisku*, str 51, aby dowiedzieć się więcej o tych akcjach.

Zaznaczanie tekstu w oknie komunikatu.

- Użyj akcji *Zaznacz tekst*, aby zaznaczyć tekst, przenieść zaznaczenie lub rozszerzyć zaznaczenie na następujące sposoby:
 - Przesuń zaznaczenie w górę lub w dół
 - Przesuń zaznaczenie do przodu lub do tyłu o znak
 - Przesuń zaznaczenie do przodu lub do tyłu o słowo
 - Przesuń zaznaczenie do przodu lub do tyłu o zdanie
 - Rozszerz zaznaczenie do początku lub końca wiersza
 - Rozszerz zaznaczenie do początku lub końca tekstu okna komunikatu
 - Rozszerz zaznaczenie do góry lub dołu strony tekstu
 - Rozszerz zaznaczenie w górę lub w dół
 - Rozszerz zaznaczenie do przodu lub do tyłu o znak
 - Rozszerz zaznaczenie do przodu lub do tyłu o słowo
 - Rozszerz zaznaczenie do przodu lub do tyłu o zdanie
 - Wybierz wszystkie
 - Anuluj wybór



Najprostszym sposobem na rozpoczęcie edycji tekstu w oknie komunikatu jest skorzystanie z naszych wstępnie zaprogramowanych stron edycji okna komunikatu. Strony te są zawarte w kilku zestawach stron. Strony edycji okna komunikatu są również dostępne w zestawie stron Central. www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral

6.3 Usuń



Usunięcie całej zawartości z okna komunikatu.

6.4 Usuń



Usunięcie bieżącego słowa lub zaznaczonego tekstu w oknie komunikatu.

6.5 Cofnij




Cofnięcie ostatniej akcji w oknie komunikatu.

6.6 Przywróć



Powtórzenie ostatnio cofniętej czynności w oknie komunikatu.

6.7 Czat

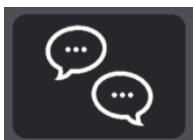

Włącz lub wyłącz czat. Gdy włączysz czat, bieżąca zawartość okna komunikatu zostanie zapisana w pamięci podręcznej, a następnie okno komunikatu zostanie wyczyszczone. Podczas czatu możesz wstawiać nową zawartość do okna komunikatu i mówić. Po wyłączeniu czatu buforowana zawartość okna komunikatu jest przywracana, dzięki czemu możesz kontynuować od miejsca, w którym skończyłeś.

6.8 Przycisk Kopiuj do



Skopijuj tekst w oknie komunikatu, a następnie dodaj go do przycisku. Jest to dostępny dla użytkownika sposób edycji przycisków w locie!

6.9 Udostępniaj




Użyj tej poręcznej, dostępnej dla użytkownika funkcji, aby wysłać tekst w oknie komunikatu do urządzenia AccessIT 3 (9.7.4 *AccessIT*, str 56), przycisku na obecnej stronie (6.8 *Przycisk Kopiuj do*, str 22), schowka systemowego lub Asystenta Google.

Wybierz opcję Inne, aby wysłać tekst z okna komunikatu do wybranej aplikacji (np. Mail, Facebook itp.).



Menu przycisków Inne jest dostępne tylko w trybie dotykowym.

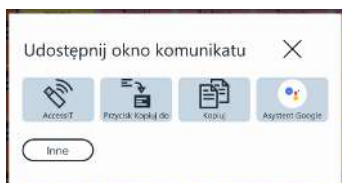

Ilustracja 4: Menu udostępniania

6.10 Wstrzymaj metodę dostępu



Tymczasowo zatrzymaj lub uruchom metodę dostępu. Ten przycisk działa tylko z metodami dostępu opartymi na sterowaniu wzrokowym, skanowaniu i zatrzymaniu myszy.

6.11 Przełącz filtr słownictwa (tylko zestawy stron Motor Plan)



Włącz lub wyłącz filtr słownictwa. Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku korzystania z zestawu stron Motor Plan.

7 Pasek narzędzi

Aby dowiedzieć się, jak edytować pasek narzędzi, zobacz 9.18 *Edycja paska narzędzi*, str 80.



 Opcje paska narzędzi różnią się w zależności od zestawu stron.


7.1 Wstecz



Ilustracja 5: Przycisk wstecz — pasek narzędzi

Przycisk Wstecz działa podobnie jak przycisk Wstecz w przeglądarce. Użyj go, aby powrócić do poprzedniej strony.

7.2 Kluczowe słowa

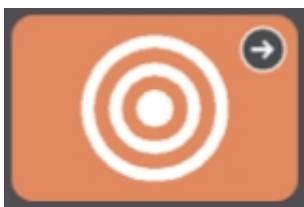

Ilustracja 6: Przycisk Kluczowe słowa — pasek narzędzi Core First

Ten przycisk otwiera stronę Kluczowe słowa. Cechą charakterystyczną Core First jest nasza strategia kluczowych słów, która została opracowana na podstawie badań, doświadczeń klinicznych i testów użytkowników. Podstawowe funkcje strony Kluczowe słowa obejmują:

- Wybór słów dla maksymalnego wykorzystania w różnych środowiskach.
- Rozmieszczenie słów.
- Kolejność wprowadzania słów.
- Stała lokalizacja słów podczas systematycznego dodawania innych.
- Wydajność nawigacji.
- Pomocne słowa, które uczą użytkowników znaczenia słów i łączenia ich w celu tworzenia unikalnych wiadomości.

7.3 QuickFires



Ilustracja 7: Przycisk QuickFires — pasek narzędzi

QuickFires to szybkie, przewidywalne wiadomości, które mogą być używane samodzielnie lub w połączeniu. Są to krótkie słowa, które podtrzymują rozmowę, przyciągają uwagę lub stanowią komentarz. Zawierają również często używane wiadomości, które koncentrują się na potrzebach osobistych, pozdrowieniach, sprawach społecznych, uczuciach, pytaniach i ewentualnych naprawach. QuickFires są odczytywane natychmiast i nie wstawiają tekstu do okna komunikatu.


7.4 Tematy



Ilustracja 8: Przycisk Tematy — pasek narzędzi


Tematy wspierają interakcje w określonych środowiskach lub wokół określonych tematów. Wybierz temat na stronie tematów, aby zobaczyć odpowiednie słowa i wyrażenia. Dostosuj swój zestaw stron, dodając własne tematy!

7.4.1 Słowa w temacie

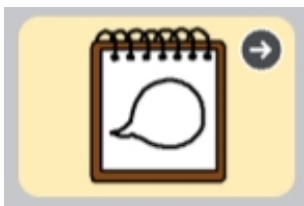

Strony te zawierają często używane słowa w wybranym temacie.


7.4.2 Pomocne słowa

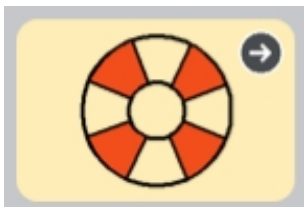


Pomocne słowa pomagają użytkownikom w samoregulacji i komunikacji społecznej. Aby dowiedzieć się, jak edytować pomocne słowa, zapoznaj się z sekcją 9.13 *Edytuj Pomocne słowa*, str 71.



Ilustracja 9: Obsługa „Najpierw, potem” – to wsparcie pokazuje dwuetapową sekwencję zdarzeń, wzmacniając przyczynę i skutek lub logiczne kroki.

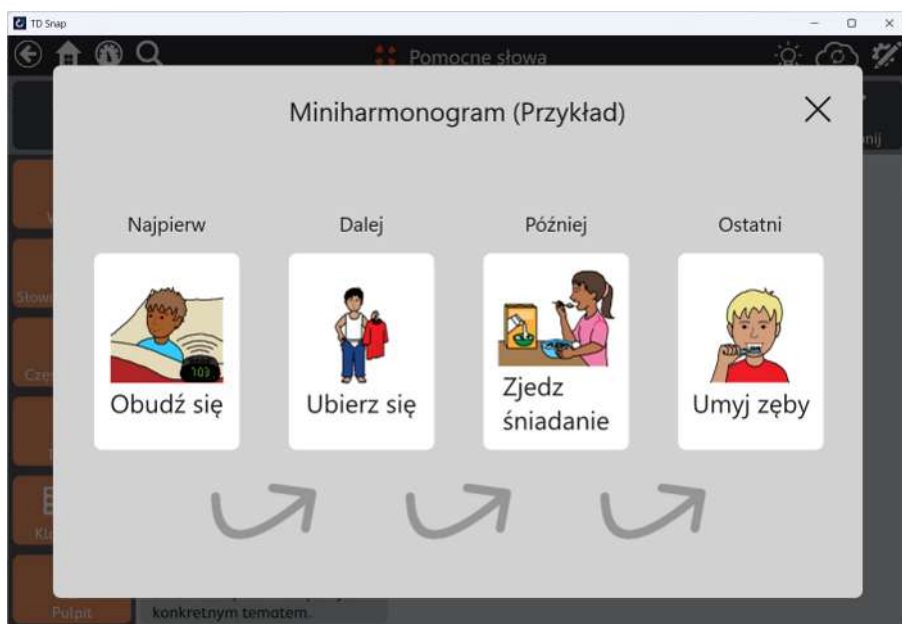

Ilustracja 10: Obsługa mini harmonogramu – mini harmonogram pokazuje wieloetapową sekwencję zdarzeń, wzmacniając pojęcie przyczyny i skutku lub serii logicznych kroków.

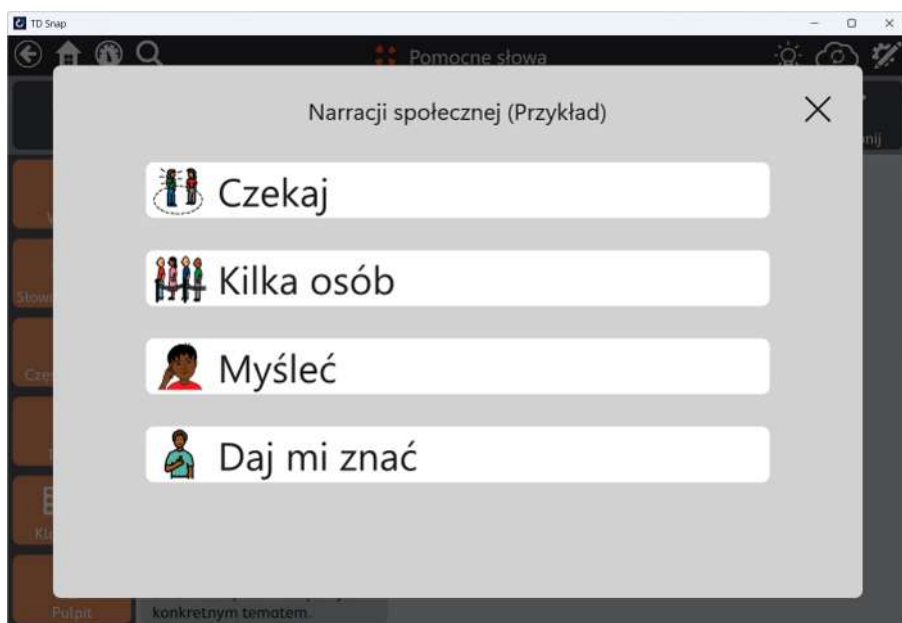

Ilustracja 11: Obsługa skryptów – Skrypt zawiera gotowe zwroty, które są powszechnie używane wokół danego tematu. Skrypty są używane do tworzenia narracji społecznych i pomagają modelować odpowiednią rozmowę.



Ilustracja 12: Obsługa minutnika wizualnego – minutnik wizualny wyświetla zegar odliczający czas i animowany kolorowy pasek na górnym pasku. Wyświetlana liczba odlicza określony czas, a kolorowy pasek zmniejsza się wraz z upływem pozostałego czasu. Gdy włączona jest opcja alarmu, po upływie czasu odtwarzany jest dźwięk.

Aby anulować minutnik wizualny, wybierz **X** po prawej stronie górnego paska.



Aby zmienić odliczany czas lub preferencje alarmu, edytuj przycisk i wybierz akcję Minutnik wizualny (Visual Timer).

7.5 Klawiatura



Ilustracja 13: Przycisk Klawiatura — pasek narzędzi

Strona Klawiatura zawiera przyciski pojedynczych znaków, które zachowują się jak klawisze na klawiaturze. Użyj tej strony do tworzenia słów, które nie są obecnie dostępne w zestawie stron lub do dodawania znaków interpunkcyjnych. Aby ustawić żądaną stronę klawiatury, zobacz *10.1.6 Ustawienie strony klawiatury, str 83*.

7.6 Pulpit



Ilustracja 14: Przycisk Pulpit — pasek narzędzi

Pulpit to strona zapewniająca łatwy dostęp do często używanych przycisków, zwłaszcza przycisków niewymagających znajomości słownictwa, takich jak regulacja głośności lub piloty.

7.7 Formy wyrazowe



Ilustracja 15: Przycisk Formy wyrazowe — pasek narzędzi Core First

Strona Formy wyrazowe pokazuje różne formy (czas, liczba itp.) ostatniego słowa w oknie komunikatu. Wybierz żądaną formę wyrazową, aby zaktualizować wyraz w oknie komunikatu.

7.8 plik postępu



Ilustracja 16: Obsługiwana nawigacja — pasek narzędzi Core First

Strona Obsługiwana nawigacja jest stroną główną dla początkowych rozmiarów siatki (<3x3). Przycisk Pomocna nawigacja na pasku narzędzi sprawia, że strona jest dostępna dla wszystkich rozmiarów siatki.

7.9 Aktualna aktywność Boardmaker



Ilustracja 17: Aktualna aktywność Boardmaker — pasek narzędzi Core First

Otwórz aktywność Boardmaker, która jest aktualnie w toku, jeśli dotyczy. Jeśli nie trwa żadna aktywność Boardmaker, przycisk ten jest nieaktywny. Miniaturka i etykieta przycisku zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić trwającą aktywność Boardmaker.

7.10 abc (tylko w języku niemieckim)



Ten przycisk otwiera obszar słownictwa ABC znany z „LiterAACy”. Znajdziesz tu ponad 3600 słów ze słownictwa podstawowego i pobocznego, posortowanych według pierwszej i drugiej litery.

- Obszar ABC wspiera naukę i wykorzystanie umiejętności czytania i pisania.
- Po wybraniu litery odtwarzana jest odpowiedź dźwiękowa.
- Istnieją dwie wersje tej funkcji, jedna używa wielkich liter, a druga małych. Przycisk abc z małymi literami jest domyślny. Aby używać wielkich liter, ustaw przycisk ABC (wielkie litery) na pasku narzędzi jako widoczny i ukryj przycisk abc (małe litery). Zobacz sekcję 9.5.6 *Ukryj/pokaż przycisk*, str 39.

8 Filtr słownictwa

 Filtr słownictwa jest dostępny tylko w zestawach stron Motor Plan.

Filtr słownictwa to narzędzie, które pozwala opiekunowi szybko zmienić słowa dostępne dla użytkownika. Gdy włączony jest filtr słownictwa, dostępne jest tylko słownictwo z aktywnej listy słownictwa. Słownictwo nieznajdujące się na liście jest ukryte.

Możesz użyć filtra słownictwa, aby stopniowo poszerzać słownictwo użytkownika: zacznij od niewielkiej liczby słów i dodawaj kolejne, gdy użytkownik nabierze pewności w korzystaniu z AAC i poszerzy swoje słownictwo.

Filtr słownictwa może być również używany jako tymczasowy mechanizm skupiania się na określonych słowach podczas sesji terapeutycznych. Na początku sesji terapeutycznej zastosuj listę słownictwa zawierającą tylko słowa dotyczące lekcji lub aktywności. Po zakończeniu sesji wyłącz filtr słownictwa lub wróć do większej listy słownictwa.

8.1 Włączaj lub wyłączaj filtr słownictwa



1. Wybierz ikonę **Filtr słownictwa** na pasku górnym.
2. Włączaj lub wyłączaj Filtr słownictwa na górnym pasku.

 Nazwa aktywnej listy słownictwa jest wyświetlana na górnym pasku.



Filtr słownictwa wyłączony



Filtr słownictwa włączony

8.2 Edytuj listę słownictwa

Istnieje kilka sposobów dodawania i usuwania słownictwa z Twoich list słownictwa.



1. Wybierz ikonę **Filtr słownictwa** na pasku górnym.
2. Zmodyfikuj swoją listę słownictwa przy użyciu dowolnej z poniższych metod:



1.	Wybierz przyciski słownictwa na stronie, aby dodać lub usunąć je z listy.	3.	Wybierz opcję Szybkie dodawanie , aby otworzyć pole tekstowe u dołu strony. Wpisz słownictwo oddzielone przecinkami w polu tekstowym, a następnie wybierz Dodaj . Uwaga: Słownictwo, które nie istnieje w zestawie stron, jest pokazane na czerwono.
2.	Użyj przycisków Usuń... i Dodaj.. , aby wprowadzić zmiany w dużych grupach słownictwa za jednym razem.	4.	Wybierz ikonę Edytuj listę słownictwa , aby wyświetlić i edytować listę słownictwa jako alfabetyczną listę tekstową z możliwością wyszukiwania. Uwaga: Słownictwo, które nie istnieje w zestawie stron, jest pokazane na czerwono.



Przyciski wyświetlane w pełnym kolorze znajdują się na liście słownictwa. Przyciski wyświetlane z szarą nakładką nie znajdują się na liście słownictwa.

Przycisk łączy stają się dostępne, gdy dowolny przycisk słownictwa na połączonej stronie zostanie dodany do listy słownictwa. Na przykład przycisk łączy „Jedzenie i napoje” będzie szary (nieдоступny), jeśli na liście słownictwa nie ma żadnego słownictwa związanego z jedzeniem. Jeśli dodasz „Pizza” do listy słownictwa, przycisk Food & Drink stanie się automatycznie dostępny.

8.3 Wybierz listę słownictwa



1. Wybierz ikonę **Filtr słownictwa** na pasku górnym.



2. Wybierz ikonę **Edytuj listę słownictwa**.
3. Wybierz **Zarządzanie listami**.
4. Wybierz listę słownictwa. Wybrana lista jest teraz aktywna.

8.4 Utwórz nową listę słownictwa



1. Wybierz ikonę **Filtr słownictwa** na pasku górnym.



- Wybierz ikonę **Edytuj listę słownictwa**.
- Wybierz **Zarządzanie listami**.
- Wybierz **Nowa lista**.
- Wybierz **Pusta lista**.
- Wybierz **Gotowe**.

8.5 Importuj listę słownictwa (plik .txt)



- Wybierz ikonę **Filtr słownictwa** na pasku górnym.



- Wybierz ikonę **Edytuj listę słownictwa**.
- Wybierz **Zarządzanie listami**.
- Wybierz **Nowa lista**.
- Wybierz **Pliki lokalne**.
- Wybierz **Przeglądaj**.
- Przejdź do pliku .txt, zaznacz go, a następnie wybierz opcję **Otwórz**.
- Wprowadź nazwę nowej listy słownictwa, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

8.6 Udostępnij listę słownictwa



- Wybierz ikonę **Filtr słownictwa** na pasku górnym.



- Wybierz ikonę **Edytuj listę słownictwa**.
- Wybierz **Zarządzanie listami**.



- Wybierz **Więcej** obok listy, którą chcesz udostępnić.
- Wybierz **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania:
 - Eksport do pliku** — zapisz listę słownictwa jako plik .txt.
 - Kopiuj do schowka** — skopiuj zawartość listy słownictwa do schowka, aby móc wkleić ją w innym miejscu (np. w wiadomości e-mail, dokumencie programu Word itp.).
 - Inne** — udostępnij listę słownictwa bezpośrednio innej aplikacji. Opcje aplikacji różnią się w zależności od konfiguracji Twojego urządzenia.

8.7 Zmień nazwę, powiel lub usuń listę słownictwa



- Wybierz ikonę **Filtr słownictwa** na pasku górnym.



- Wybierz ikonę **Edytuj listę słownictwa**.
- Wybierz **Zarządzanie listami**.



- Wybierz **Więcej** obok listy, której nazwę chcesz zmienić, zduplikować lub usunąć.
- Wybierz żądaną akcję:
 - Zmień nazwę** — wprowadź nową nazwę listy słownictwa.

- **Duplikuj** — utwórz kopię listy słownictwa.
- **Usuń** — usuń listę słownictwa. Aktywnej listy słownictwa (oznaczonej znacznikiem wyboru) nie można usunąć.

9 Edycja

Aby wprowadzić zmiany w przycisku, stronie, ustawieniach lub użytkownikach, oprogramowanie musi znajdować się w



trybie edycji. Możesz przejść do trybu edycji w dowolnym momencie, wybierając

Edytuj.




Przycisk Edytuj i tryb edycji są dostępne tylko przy użyciu metody dostępu dotykowego.

W trybie edycji możesz dwukrotnie kliknąć większość przycisków strony, aby zobaczyć, jak zachowują się one w trybie obsługi.

9.1 Panel edycji

Panel edycji zawiera wszystkie narzędzia i zakładki umożliwiające wprowadzanie zmian w zestawie stron i oprogramowaniu.

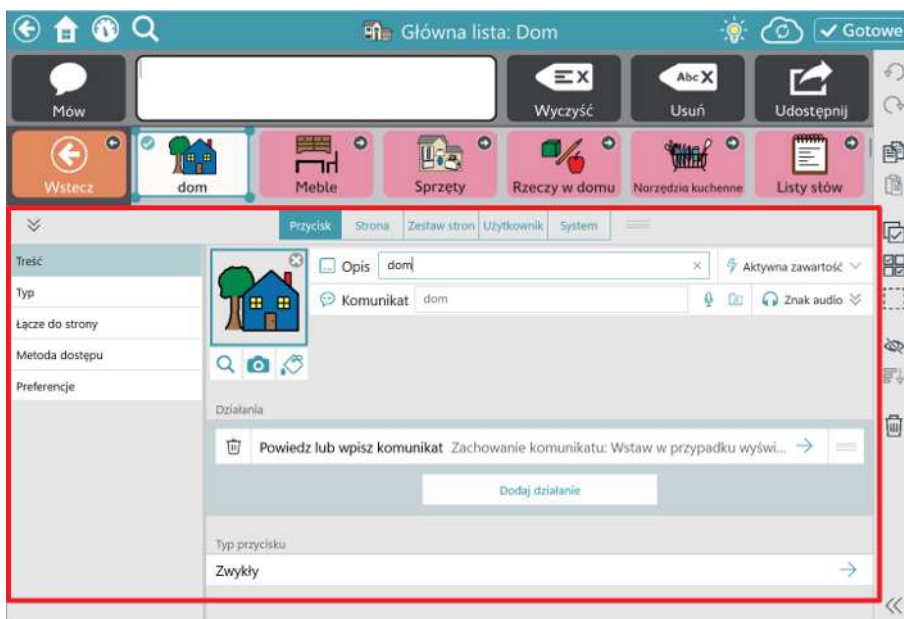

Ilustracja 18: Panel edycji (pokazany rozwinięty)



Wybierz

, aby rozwinąć panel edycji.



Zmień rozmiar panelu edycji na niestandardowy, przeciągając

w górę lub w dół, gdy panel jest

9.2 Dodaj przycisk




1. Kliknij przycisk

Edytuj.




2. Wybierz

w dowolnej pustej komórce na stronie, aby utworzyć nowy przycisk.

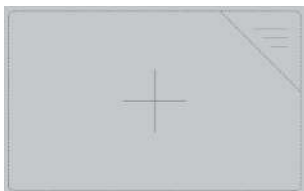


Ilustracja 19: Wyczyść komórkę

9.3 Przenieś przycisk

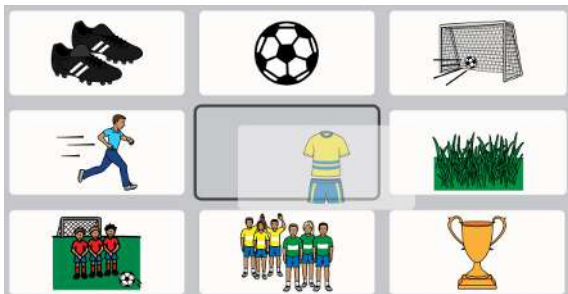

Ilustracja 20: Zamień — Po przeciągnięciu przycisku bezpośrednio na inny przycisk, oba przyciski zamieniają się pozycjami na stronie. Czarny kontur wokół wybranej lokalizacji na siatce oznacza zamianę.

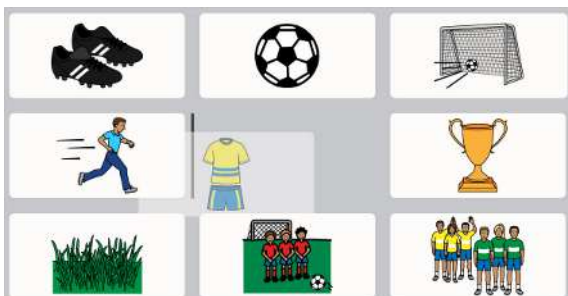

Ilustracja 21: Wstaw — Po przeciągnięciu wybranego przycisku między dwa przyciski, przyciski po prawej i poniżej przesuną się, tworząc miejsce na umieszczenie przycisku. Przyciski zachowają kolejność od lewej do prawej, od góry do dołu na stronie. Umieszczenie wstawionego przycisku jest oznaczone pionowym paskiem.



Możesz wstawić przycisk poziomo (jak pokazano powyżej) lub pionowo.



Gdy przesuwasz przycisk, dotyczy to tylko bieżącego rozmiaru siatki.

9.4 Zmień rozmiar przycisku

Możesz zmienić rozmiar przycisku, aby zajmował dowolną liczbę komórek siatki w sekcji strony lub paska narzędzi.




1. Kliknij przycisk


Edytuj.

2. Wybierz przycisk na stronie lub na pasku narzędzi. Zmiana rozmiaru przycisku jest dostępna tylko po wybraniu pojedynczego przycisku.

- Wybierz i przytrzymaj jedną z niebieskich kropek w rogach wybranego przycisku, a następnie przeciągnij, aby zmienić rozmiar przycisku.

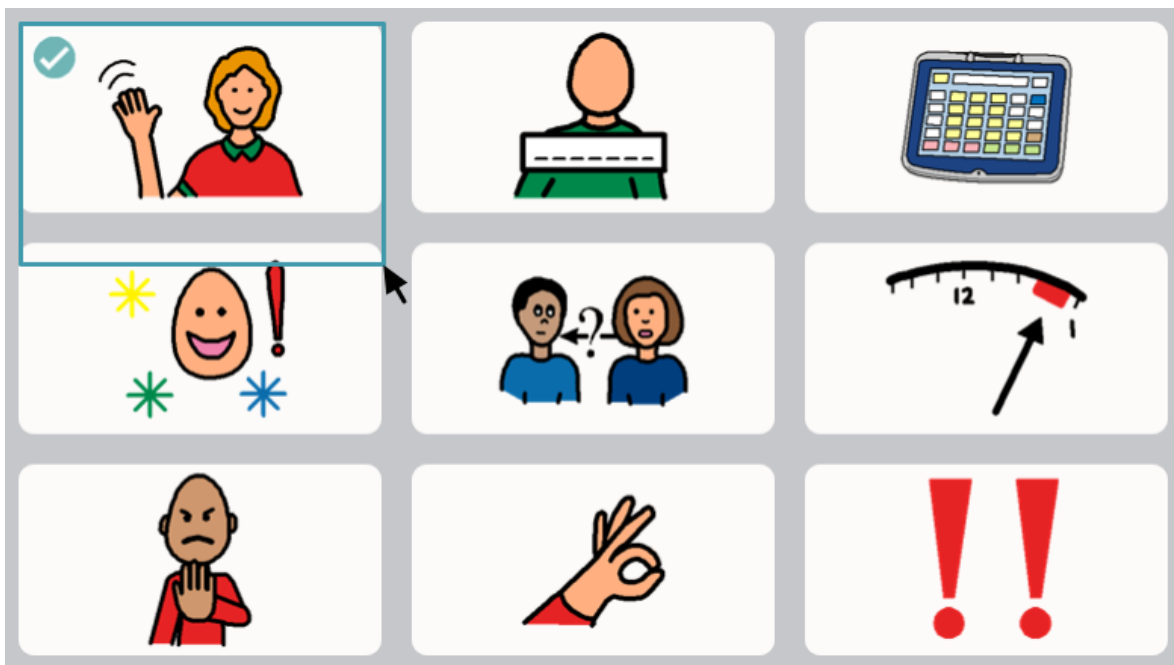

- Poczekaj, aż przycisk całkowicie wypełni komórki, aż osiągnie żądany rozmiar, a następnie zwolnij zaznaczenie. Podczas powiększania przycisku, przemieszczane przyciski zostaną przesunięte do najbliższych pustych komórek.

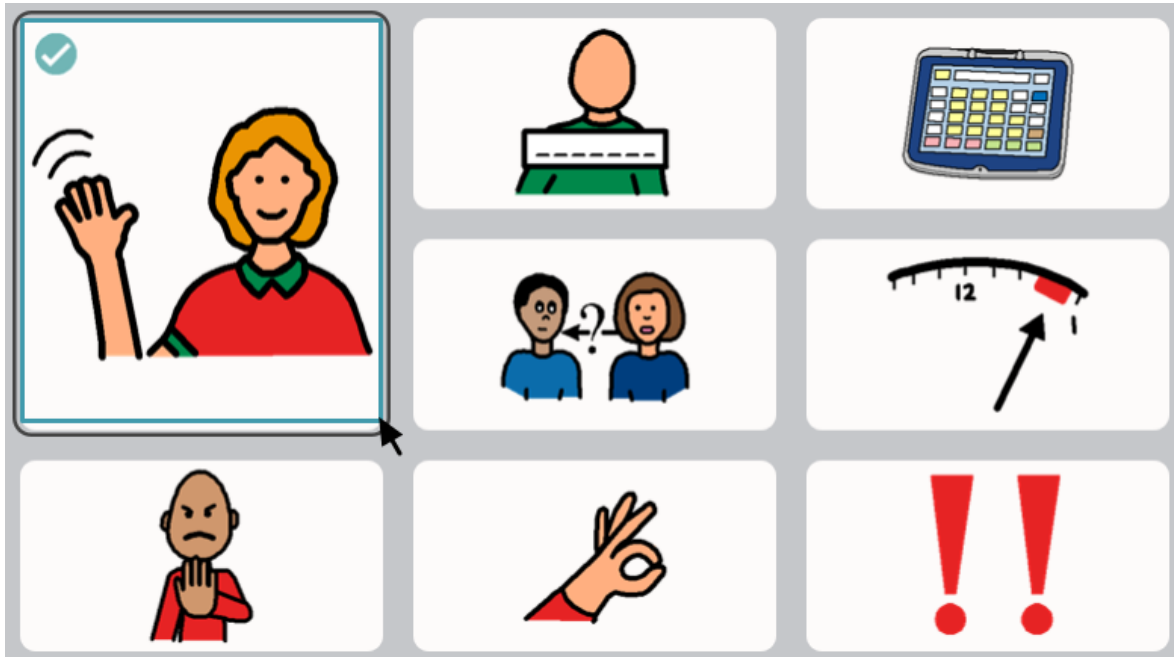

Przyciski o zmienionym rozmiarze nie mogą rozciągać się na sekcje strony lub paska narzędzi.



Nie możesz zmienić rozmiaru ani przenieść przycisku do komórki zajmowanej przez przycisk nawigacji (przewijania).



Gdy zmieniasz rozmiar przycisku, dotyczy to tylko bieżącego rozmiaru siatki.

9.5 Narzędzia edycji przycisków

Narzędzia znajdujące się po prawej stronie okna aplikacji pomogą Ci edytować aktualnie wybrane przyciski.



Ilustracja 22: Narzędzia edycji przycisków — (od góry do dołu) Cofnij, Ponów, Kopiuj, Wklej, Zaznacz wszystko, Wielokrotny wybór, Zaznaczenie, Ukryj/Pokaż, Sortowanie alfabetyczne, Usuń, Rozwiń/Zwiń nazwy narzędzi

9.5.1 Cofnij i Przywróć

Narzędzie  Cofnij umożliwia cofnięcie do 100 ostatnich zmian dokonanych w bieżącym użytkowniku/zestawie stron. Narzędzie  Ponów przywróci ostatnią zmianę, którą cofnąłeś za pomocą narzędzia Cofnij.



Lista cofnięć jest resetowana podczas wczytywania innego użytkownika, innego zestawu stron i po zamknięciu oprogramowania TD Snap®.

9.5.2 Kopiuj i wklej przycisk



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk.

3. Wybierz narzędzie  **Kopiuj**.
Zauważ, że narzędzie Wklej wyświetla liczbę skopiowanych przycisków.

4. Wybierz narzędzie  **Wklej**.
Przycisk zostanie wklejony do pierwszej dostępnej pustej komórki na stronie.

9.5.3 Zaznacz wszystkie przyciski

Narzędzie Zaznacz wszystkie automatycznie zaznacza wszystkie przyciski na bieżącej stronie, dzięki czemu możesz wykonywać zbiorcze operacje edycji.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz zakładkę **Przycisk**.

3. Wybierz narzędzie  **Wybierz wszystkie**.
Po użyciu opcji Zaznacz wszystkie możesz kliknąć poszczególne przyciski, aby je odznaczyć; pozostałe przyciski pozostaną zaznaczone.
4. Wprowadź żądane zmiany w przyciskach.

5. Aby odznaczyć wszystkie przyciski, wybierz opcję  **Wielokrotny wybór**.

9.5.4 Zaznacz wiele przycisków




Narzędzie wielokrotnego wyboru umożliwia (ręczne) zaznaczanie wielu przycisków jednocześnie, dzięki czemu możesz wykonywać zbiorcze operacje edycji.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz zakładkę **Przycisk**.

3. Wybierz narzędzie  **Wielokrotny wybór**.
Narzędzie wielokrotnego wyboru jest czarne, gdy jest wyłączone i niebieskie, gdy jest włączone.
4. Zaznacz przyciski, które chcesz edytować jednocześnie.
5. Wprowadź żądane zmiany w przyciskach.


6. Aby odznaczyć wszystkie przyciski, wybierz opcję  **Wielokrotny wybór**.

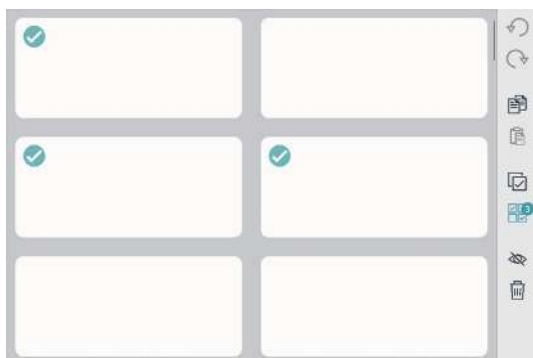

Ilustracja 23: Zaznaczone wiele przycisków — Zauważ, że narzędzie Wielokrotny wybór pokazuje, ile przycisków jest aktualnie zaznaczonych.

9.5.5 Wybór obwódki

 Narzędzie Wybór obwódki to łatwy sposób na zaznaczenie wielu przycisków. Po prostu kliknij i przeciągnij, aby narysować prostokąt wokół jednego lub więcej przycisków, które chcesz zaznaczyć.

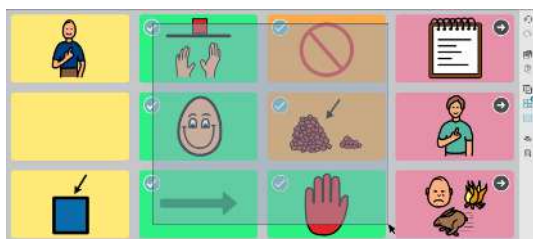

Ilustracja 24: Używanie Wyboru obwódki — Przyciski nie muszą być całkowicie zawarte w prostokącie, aby mogły zostać wybrane.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz zakładkę **Przycisk**.
3. Wybierz narzędzie  **Wybór obwódki**.
4. Kliknij (lub dotknij), a następnie przeciągnij po przekątnej, aby narysować prostokąt nad wszystkimi przyciskami, które chcesz zaznaczyć.
5. Wprowadź żądane zmiany w wybranych przyciskach.
6. Aby odznaczyć wszystkie przyciski, wybierz opcję  **Wielokrotny wybór**.




Klikaj pojedyncze przyciski, aby je zaznaczyć/odznaczyć.

Wyboru przycisków można dokonać na pasku narzędzi lub na stronie, ale nie na obu jednocześnie.

9.5.6 Ukryj/pokaż przycisk

Przyciski, które są ukryte, nie są widoczne w trybie obsługi. Przyciski, które są tymczasowo zbyt zaawansowane lub rozpraszają uwagę, mogą zostać ukryte, a następnie wyświetlone (odblokowane) później.

W trybie edycji ukryte przyciski są oznaczone szarą nakładką.

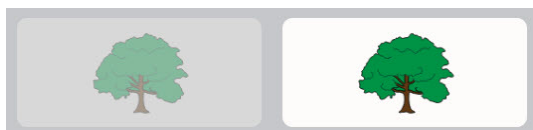

Ilustracja 25: Ukryty przycisk obok widocznego przycisku w trybie edycji.

9.5.6.1 Ukryj



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk, który chcesz ukryć.
3. Wybierz narzędzie **Ukryj**.



Domyślną akcją dla narzędzia Ukryj/Pokaż jest ustawienie widoczności tego przycisku wszędzie tam, gdzie pojawia się on w zestawie stron. Aby ustawić widoczność tylko dla wybranej instancji przycisku, kliknij i przytrzymaj (długie dotknięcie) narzędzie Ukryj/Pokaż i wybierz opcję **Zmień widoczność tutaj**.

9.5.6.2 Pokaż



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz ukryty przycisk.
3. Wybierz narzędzie **Pokaż**.



Domyślną akcją dla narzędzia Ukryj/Pokaż jest ustawienie widoczności tego przycisku wszędzie tam, gdzie pojawia się on w zestawie stron. Aby ustawić widoczność tylko dla wybranej instancji przycisku, kliknij i przytrzymaj (długie dotknięcie) narzędzie Ukryj/Pokaż i wybierz opcję **Zmień widoczność tutaj**.

9.5.7 Sortuj przyciski alfabetycznie

Użyj przycisku Sortowanie alfabetyczne, aby uporządkować wybrane przyciski alfabetycznie. Przyciski są sortowane w następującej kolejności: alfabetycznie według etykiety, następnie przyciski przewidywania, a następnie puste przyciski.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz zakładkę **Przycisk**.
3. Użyj narzędzia **Wielokrotny wybór** lub **Wybór obwódki**, aby wybrać przyciski, które chcesz posortować.



4. Wybierz narzędzie **Sortowanie alfabetyczne**.

9.5.8 Usuń przycisk



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz narzędzie **Usuń**.

9.5.9 Rozwiń/zwiń nazwy narzędzi edycji

Wybierz podwójne strzałki, aby wyświetlić nazwy narzędzi edycji. Wybierz przycisk podwójne strzałki ponownie, aby ukryć nazwy narzędzi.

9.6 Treść przycisku



Ilustracja 26: Przycisk z etykietą, symbolem, kolorem tła i średnim obramowaniem.

9.6.1 Opis przycisku

Etykieta przycisku to tekst wyświetlany na przycisku.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wprowadź tekst w polu **Opis**.



Ilustracja 27: Pole tekstowe Opis przycisku

Jeśli chcesz zmienić inne cechy etykiety (czcionkę, kolor, lokalizację, rozmiar itp.), zapoznaj się z sekcją 9.8.3 *Opis przycisku*, str 64.

9.6.2 Aktywna zawartość

Aktywna zawartość umożliwia wyświetlanie dynamicznych informacji na przycisku. Etykieta i symbol przycisku zmieniają się, odzwierciedlając aktualny status informacji.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz **Aktywna zawartość**. (Dostępne tylko wtedy, gdy **Typ przycisku** jest ustawiony na **Zwykły**)
4. Wybierz typ aktywnej zawartości.



Ilustracja 28: Aktywna zawartość

Typ aktywnej zawartości	Opis
Brak	Wybierz opcję Brak, aby usunąć aktywną zawartość przycisku.
Access Method	Wyświetla bieżącą metodę dostępu.
Stan wstrzymania metody dostępu	Uwaga: Wstrzymanie metody dostępu ma zastosowanie tylko do następujących metod dostępu: Interakcja wzrokowa, Zatrzymanie myszy. Gdy używane są inne metody dostępu, przyciski korzystające z aktywnej zawartości stanu wstrzymania metody dostępu są wyłączone. Jeśli na przycisku znajduje się akcja Wstrzymaj metodę dostępu (domyślnie), na etykiecie wyświetlana jest akcja przycisku: Wznów dostęp lub Wstrzymaj dostęp. Jeśli na przycisku nie ma akcji Wstrzymaj metodę dostępu, na etykiecie wyświetlany jest stan wstrzymania metody dostępu: Dostęp w trakcie realizacji lub Dostęp wstrzymany.
Czas dostępu	Uwaga: Czas dostępu nie ma zastosowania do dotykowej metody dostępu. Wyświetla wartość ustawienia czasu dla bieżącej metody dostępu. Rzeczywiste ustawienie czasu różni się w zależności od metody dostępu, np. czas wstrzymania, prędkość skanowania, czas przebywania itp. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz .
Stan połączenia AccessIT	Wyświetla status połączenia urządzenia AccessIT 3: Rozłączono, Rozłączanie, Łączenie lub Podłączony. Może być sparowany z akcją Połącz z AccessIT, aby utworzyć przycisk, który pokazuje status i po wybraniu łączy się z urządzeniem AccessIT.
Poziom baterii	Pokazuje aktualny procentowy poziom naładowania baterii: 0-100%. Symbol zmienia się, aby odzwierciedlić poziom naładowania baterii i wskazuje, kiedy urządzenie jest podłączone i się ładuje.
Tryb czatu	Jeśli na przycisku znajduje się akcja Wł. / Wył. tryb czatu (domyślnie), na etykiecie wyświetlana jest akcja przycisku: Czatu lub Zatrzymaj czat. Jeśli akcja Wł. / Wył. tryb czatu nie jest obecna na przycisku, etykieta przycisku wyświetla aktualny status trybu czatu: Tryb czatu włączony lub Tryb czatu wyłączony.
Aktualna aktywność Boardmaker	Wyświetla tytuł i miniaturę aktualnie trwającej aktywności Boardmaker (jeśli taka istnieje). Może być sparowany z akcją Otwórz bieżącą aktywność Boardmakera, aby utworzyć przycisk, który otwiera aktualną aktywność Boardmakera, a także wyświetla tytuł i miniaturę aktywności.
Data	Wyświetla bieżący dzień, miesiąc i rok. Formatowanie daty zależy od ustawień regionalnych.
Dzień tygodnia	Wyświetla bieżący dzień tygodnia.
Stan dostępu do pulpitu	Jeśli na przycisku znajduje się akcja Przełączanie dostępu do pulpitu (domyślnie), etykieta wyświetla akcję przycisku: Windows - Uruchom TD Control lub Uruchom Interakcję regionalną (Start Region Interaction). iPadOS - Uruchom AssistiveTouch lub Uruchom Interakcję regionalną. Jeśli na przycisku nie znajduje się akcja Przełączanie dostępu do pulpitu, etykieta przycisku wyświetla bieżący tryb sterowania wzrokowego: Windows - Włącz TD Control lub Włącz Interakcję regionalną. iPadOS - Włącz AssistiveTouch lub Włącz Interakcję regionalną.

Typ aktywnej zawartości	Opis
Stan wyciszenia podpowiedzi dźwiękowej	Jeśli na przycisku znajduje się akcja Przełączanie wyciszenia podpowiedzi dźwiękowej (domyślnie), etykieta wyświetla akcję przycisku: Wycisz podpowiedź dźwiękową lub Wyłącz wyciszenie podpowiedzi dźwiękowej. Jeśli na przycisku nie znajduje się akcja Przełączanie wyciszenia podpowiedzi dźwiękowej, na etykiecie przycisku wyświetlany jest aktualny status wyciszenia podpowiedzi dźwiękowej: Wyciszona podpowiedź dźwiękowa lub Podpowiedź dźwiękowa nie wyciszona.
Głośność podpowiedzi dźwiękowej	Wyświetla głośność podpowiedzi dźwiękowej: 0–100%. Może być sparowany z akcją Zwiększ głośność podpowiedzi dźwiękowej lub Zmniejsz głośność podpowiedzi dźwiękowej, aby utworzyć przycisk sterujący głośnością i wyświetlający poziom głośności podpowiedzi dźwiękowej.
Jasność okna partnera	Tylko urządzenia Tobii Dynavox I-13 i I-16. Wyświetla procent jasności okna partnera: 0–100%. Może być sparowany z akcją Zwiększ jasność okna partnera lub Zmniejsz jasność okna partnera, aby utworzyć przycisk sterujący jasnością okna partnera, a także wyświetlający bieżącą jasność okna partnera.
Stan mocy okna partnera	Tylko urządzenia Tobii Dynavox I-13 i I-16. Jeśli na przycisku znajduje się akcja Przełączanie mocy okna partnera (domyślnie), etykieta wyświetla akcję przycisku: Włącz okno partnera lub Wyłącz okno partnera. Jeśli na przycisku nie znajduje się akcja Przełączanie mocy okna partnera, na etykiecie przycisku wyświetlany jest bieżący status mocy okna partnera: Okno partnera włączone lub Okno partnera wyłączone.
Stan mówienia	Jeśli na przycisku znajduje się akcja Powiedz okno komunikatu (domyślnie), na etykiecie wyświetlana jest akcja przycisku: Powiedz lub Zatrzymaj. Jeśli na przycisku nie znajduje się akcja Powiedz okno komunikatu, etykieta przycisku wyświetla bieżący status mówienia: Mówi lub Nie mówi.
Stan wyciszenia mówienia	Jeśli na przycisku znajduje się akcja Przełącznik wyciszenia (domyślnie), na etykiecie wyświetlana jest akcja przycisku: Wycisz lub Wyłącz wyciszenie. Jeśli na przycisku nie znajduje się akcja Przełącznik wyciszenia, na etykiecie przycisku wyświetlany jest aktualny status wyciszenia mowy: Wyciszony lub Nie wyciszony.
Głośność mowy	Wyświetla głośność mowy: 0–100%. Może być sparowany z akcją Zwiększenie siły głosu mowy lub Zmniejszenie siły głosu mowy, aby utworzyć przycisk sterujący głośnością i wyświetlający poziom głośności mowy.
Czas	Wyświetla bieżący czas systemowy w godzinach i minutach. Format czasu zależy od ustawienia regionu systemu operacyjnego. Uwaga: Symbol to ogólna tarcza zegara, która nie zmienia się wraz z upływem czasu.
Stan filtra słownictwa	Jeśli na przycisku znajduje się akcja Przełącz filtr słownictwa (domyślnie), etykieta wyświetla akcję przycisku: Włącz filtr słownictwa lub Wyłącz filtr słownictwa. Jeśli akcja Przełącz filtr słownictwa nie jest obecna na przycisku, etykieta przycisku wyświetla aktualny status trybu czatu: włączony lub wyłączony.
Rok	Wyświetla bieżący rok.

9.6.3 Komunikat przycisku

Komunikat przycisku może być tekstem, nagraniem dźwiękiem lub plikiem audio wybranym z Twojego urządzenia. Jeśli komunikat przycisku jest tekstem, tekst jest wypowiadany i wstawiany do okna komunikatu po wybraniu przycisku. Jeśli okno komunikatu nie jest obecne, tekst komunikatu przycisku jest wypowiadany. Jeśli Komunikat przycisku jest nagraniem plikiem dźwiękowym lub audio, etykieta przycisku jest wprowadzana do Okna komunikatu, a nagrany plik dźwiękowy lub audio jest odtwarzany. Jeśli w Oknie komunikatu wypowiadany jest nagrany dźwięk lub plik audio, tekst etykiety przycisku nie jest wypowiadany.

9.6.3.1 Zmień tekst komunikatu przycisku



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wprowadź tekst w polu **Komunikat**.



Ilustracja 29: Pole tekstowe Komunikat przycisku



Niektóre głosy Acapela obsługują dźwięki Vocal Smiley, takie jak śmiech, westchnienie itp. Wprowadź kod dźwięku Vocal Smiley dla swojego głosu Acapela w polu Message, aby usłyszeć go po wybraniu przycisku. Pod poniższym linkiem znajdź swój język i głos, aby wyświetlić dźwięki Vocal Smiley dostępne dla Twojego głosu Acapela: [Kody Acapela Vocal Smiley](#). TD Snap nie obsługuje dźwięków Acapela Vocal Smiley z dopiskiem (S) ani wykrzykników Vocal Smiley.

9.6.3.2 Utwórz nagranie



1. Wybierz **Nagraj**. Otworzy się okno dialogowe Nagraj komunikat.



2. Wybierz **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.



3. Po zakończeniu nagrywania wybierz **Stop**.



4. Aby odsłuchać nagranie, wybierz **Odtwórz**.

5. Po zakończeniu tworzenia nagrania wybierz **Zapisz**, aby zapisać nagranie. Wybierz **Anuluj**, aby zamknąć okno dialogowe Nagraj komunikat bez zapisywania.

9.6.3.3 Dodaj plik audio do komunikatu przycisku

Dodaj plik audio, aby utworzyć przycisk odtwarzający utwór lub inną ścieżkę dźwiękową.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.



Dodaj plik audio.

3. Wybierz **Dodaj plik audio**.
4. Wyszukaj i wybierz plik audio na swoim urządzeniu. Pliki muszą mieć rozmiar <50 MB.
Obsługiwane typy plików: .aac, .m4a, .mp3, .wav, .wma
5. Wybierz **Gotowe**.

9.6.4 Przycisk wskazówki audio

Wskazówka audio może być używana z metodami dostępu Wyjście dotykowe, Zatrzymanie myszy, Interakcja wzrokowa i Skanowanie. Wskazówka audio to podgląd przycisku, który jest wypowiadany, gdy przycisk jest podświetlony, ale nie został jeszcze wybrany.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz **Wskazówka audio**, aby rozszerzyć wiersz.
4. Wprowadź tekst w polu **Wskazówka audio**.



Ilustracja 30: Pole tekstowe Przycisk wskazówki audio

Jeśli chcesz nagrać niestandardową wskazówkę audio, zobacz sekcję 9.6.3.2 *Utwórz nagranie*, str 44.

9.6.5 Grafika przycisku

Przycisk może wyświetlać jeden symbol lub obraz.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Dodaj obraz do przycisku:

Aby wyszukać symbol w zestawach symboli:


- Kliknij przycisk  **Wyszukiwanie symboli**.
Otworzy się okno dialogowe Wyszukiwanie symboli.
- Wpisz w polu tekstowym, aby doprecyzować wyszukiwane hasła.



Opcjonalnie: Aby filtrować wyniki wyszukiwania, wybierz przycisk


Filtr symboli, następnie wybierz cechy, które chcesz zobaczyć w wynikach wyszukiwania symboli (dorosły, dziecko, kobieta, mężczyzna).

- Wybierz żądany symbol.
- Wybierz **Gotowe**.

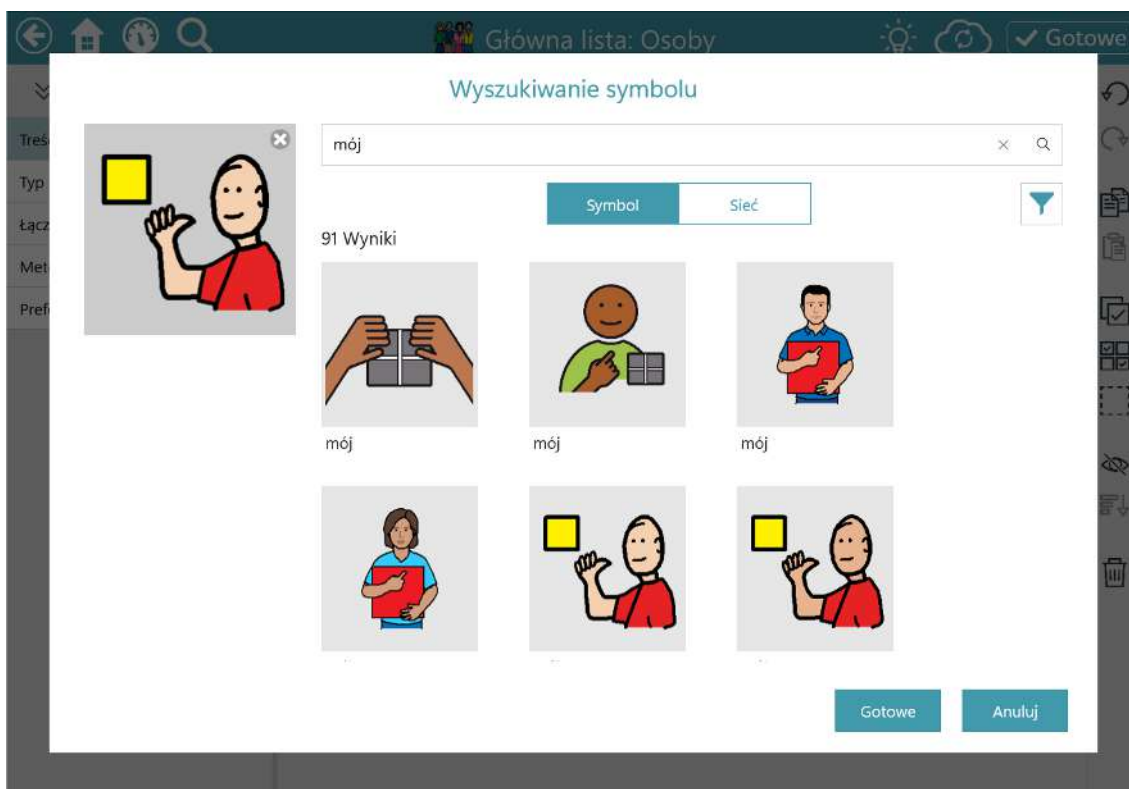

Aby wyszukać obraz w Internecie (wymagane połączenie z Internetem):

- Kliknij przycisk  **Wyszukiwanie symboli**.
Otworzy się okno dialogowe Wyszukiwanie symboli.
- Wybierz zakładkę **Sieć**, a następnie wprowadź wyszukiwane hasło w polu tekstowym.
- Wybierz żądany obraz.
- Wybierz **Gotowe**.

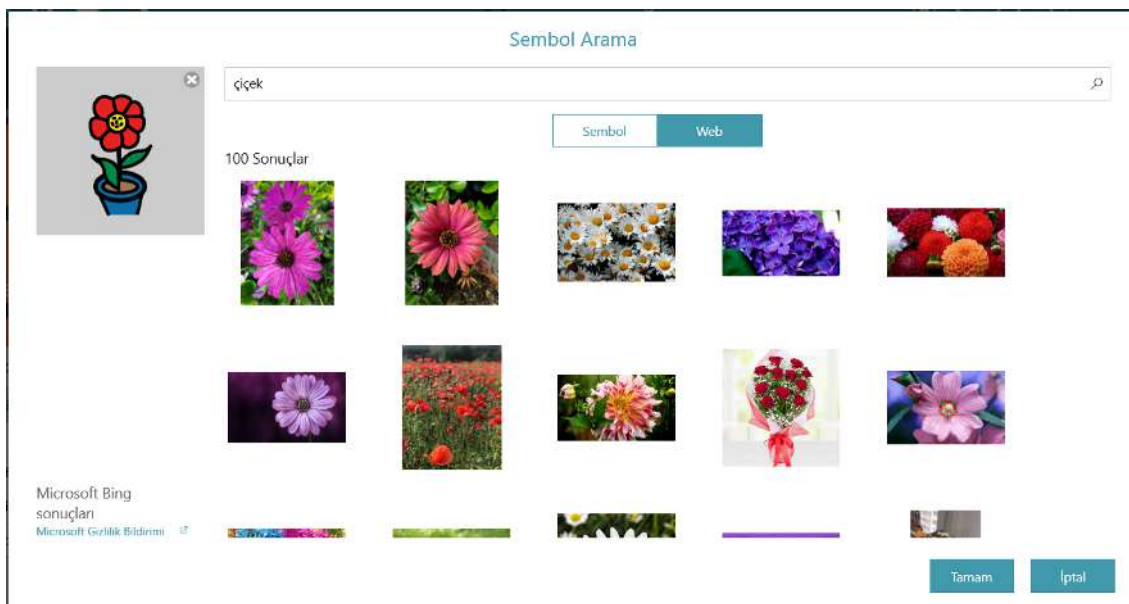

Aby użyć kamery do zrobienia zdjęcia przycisku:



- Kliknij przycisk **Kamera**.
- Wybierz **Z kamery**.
- Użyj kamery na urządzeniu, aby zrobić zdjęcie.

Aby użyć obrazu zapisanego na urządzeniu lokalnym:



- Kliknij przycisk **Kamera**.
- Wybierz **Z biblioteki zdjęć**.
- Użyj przeglądarki plików, aby przejść do żądanego pliku obrazu.

Jeśli nie chcesz mieć symbolu na przycisku, wybierz **X** w rogu bieżącego symbolu lub ustaw Układ przycisku na Tylko opis. Zobacz sekcję 9.8.4 *Układ przycisku*, str 65.



9.6.6 Edytuj symbol

Zmiany w symbolu za pomocą Edytora symboli są stosowane tylko do pojedynczego wystąpienia tego symbolu (na konkretnym przycisku, który wybrałeś) i nie są stosowane globalnie do innych wystąpień tego symbolu. Jeśli chcesz dokonać globalnych zmian koloru włosów lub skóry wszystkich symboli, użyj ustawień Kolor symbolu stylu zestawu stron. Zobacz sekcję 10.3.1 *Symbol odcienia skóry i koloru włosów*, str 84. Uwaga: symbol, który został zmieniony w Edytorze symboli, nie będzie już aktualizowany przez symbol ustawień Odcień skóry i Kolor włosów.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk zawierający symbol.



3. Kliknij przycisk **Edytor symboli**.
4. Edytuj symbol za pomocą narzędzi opisanych poniżej.
5. Aby zapisać zmiany i zamknąć Edytor symboli, wybierz opcję **Gotowe**. Aby odrzucić zmiany i zamknąć Edytor symboli, wybierz opcję **Anuluj**.

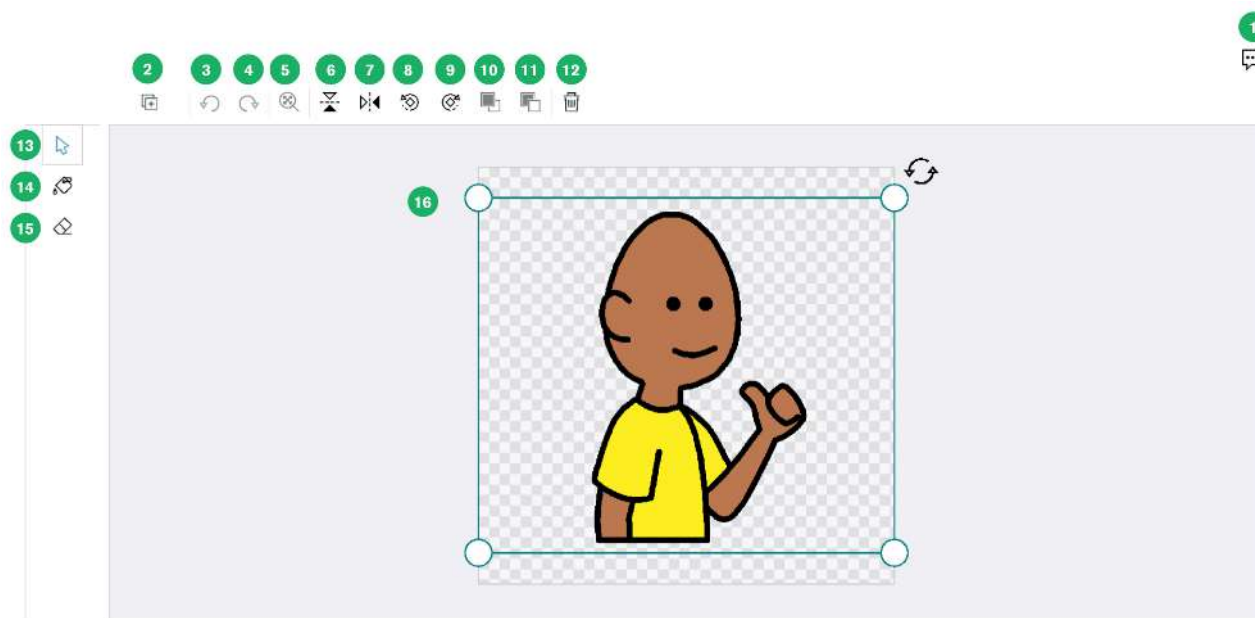


Tabela 5: Edytor symboli - Wybierz narzędzia

	Nazwa narzędzia	Opis
1	Informacja zwrotna symbolu	Wyślij informację zwrotną na temat tego symbolu do Tobii Dynavox.
2	Dodaj obraz	Dodaj obraz do symbolu. Wybierz z biblioteki symboli, zrób zdjęcie kamerą urządzenia lub wybierz z biblioteki zdjęć. Uwaga: Obrazy dodane do obszaru roboczego można wybierać pojedynczo, dopóki nie wykonasz jednej z poniższych czynności: Wybierz opcję Gotowe, aby zapisać zmiany i zamknąć edytor symboli, użyj dowolnego z narzędzi Wymazywanie lub dowolnego z narzędzi Malowanie. Po wykonaniu którejkolwiek z tych czynności obrazy na obszarze roboczym zostaną spłaszczane do jednego obrazu.
3	Cofnij	Cofnij ostatnią akcję.
4	Przywróć	Ponownie wykonaj ostatnią cofniętą akcję.
5	Dopasuj do ekranu	Skaluj poziom powiększenia, aby dopasować go do dostępnego miejsca na ekranie. Jeśli powiększyłeś obszar roboczy, możesz użyć tego narzędzia, aby ponownie wyświetlić cały obszar roboczy.
6	Odwrócenie w pionie	Odwróć bieżące zaznaczenie w pionie.
7	Odwrócenie w poziomie	Odwróć bieżące zaznaczenie w poziomie.
8	Obróć w lewo	Obróć bieżące zaznaczenie w lewo.
9	Obróć w prawo	Obróć bieżące zaznaczenie w prawo.
10	Przenieś do przodu	Przenieś bieżące zaznaczenie do przodu w stosie warstw.
11	Przenieś do tyłu	Przenieś bieżące zaznaczenie do tyłu w stosie warstw.
12	Usuń	Usuń bieżące zaznaczenie.
13	Wybierz	Wybierz element, aby go edytować. Jednocześnie można wybrać tylko jeden element.
14	Maluj	Zastąp kolor w obszarze. Zapoznaj się z poniższą tabelą Edytor symboli - Narzędzia malowania.
15	Kasuj	Wymazywanie odręczne. Zobacz poniższą tabelę Edytor symboli - Narzędzia wymazywania.

	Nazwa narzędzia	Opis
16	Płótno	Obszar z siatką to pole, która definiuje granice symbolu. Użyj gestów uszczypnięcia na ekranie dotykowym lub kółka przewijania na myszy, aby powiększać i pomniejszać obszar roboczy. Na powyższej grafice obraz na polu jest zaznaczony. Wybierz i przeciągnij narożnik ramki zaznaczenia, aby zmienić rozmiar obrazu. Wybierz i przeciągnij ikonę obracania, aby obrócić obraz.



Tabela 6: Edytor symboli - Narzędzia malowania

	Nazwa narzędzia	Opis
17	Kolor	Ustaw kolor do malowania. Wybierz spośród standardowych kolorów, ostatnio używanych kolorów lub wybierz +, aby utworzyć własny kolor niestandardowy.
18	Zakraplacz	Użyj zakraplacza, aby wybrać kolor na płótnie, a następnie użyj tego koloru do malowania.

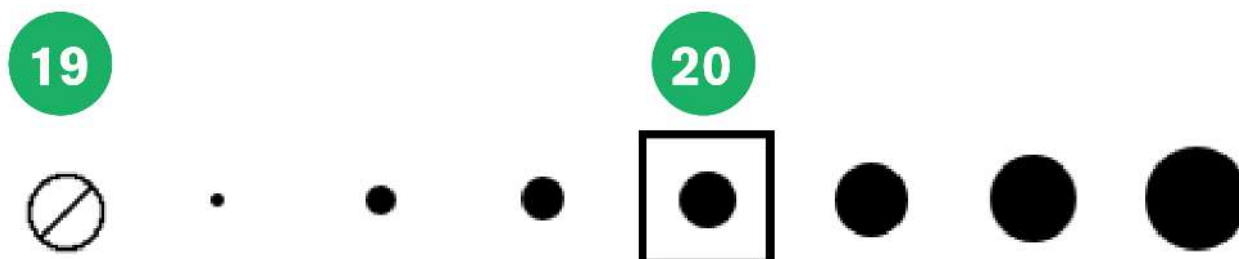


Tabela 7: Edytor symboli - narzędzia usuwania

	Nazwa narzędzia	Opis
19	Usuń	Usuń wszystko z pola.
20	Rozmiar gumki	Wybierz rozmiar narzędzia gumki.

9.6.7 Typ przycisku

Ustawienie Rodzaj przycisku określa sposób działania przycisku.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz **Typ przycisku**.
4. Wybierz typ przycisku z listy:

- **Zwykły** — może zawierać symbol, etykietę, komunikat i akcje. Domyślne działanie to mów/wpisz wiadomość.
- **Przewidywanie** — przewiduje następne słowo na podstawie bieżącej kompozycji w oknie wiadomości. Wybierz przycisk, aby wstawić aktualnie wyświetlane słowo do okna wiadomości.

- **Klawiatura** — służy do wstawiania pojedynczego znaku do okna wiadomości i odpowiednio reaguje na modyfikatory, takie jak klawisz Shift lub Caps Lock. Przyciski klawiatury mogą również odtwarzać nagrany dźwięk lub plik audio po ich wybraniu. Zobacz sekcje 9.6.3.2 *Utwórz nagranie, str 44* oraz 9.6.3.3 *Dodaj plik audio do komunikatu przycisku, str 44*.
- **Odmiana** — zmienia słowo docelowe na określoną formę, np. liczbę mnogą, czas przeszły itp. Element docelowy jest ustawiony na jedną z dwóch opcji: ostatnie słowo w oknie wiadomości lub wszystkie przyciski gramatyczne.

Przycisk Strona Zestaw stron Użytkownik System	
Treść	Typ odmiany
Typ	Tryb Rozkazujący np. bawmy →
Łącze do strony	Cel Okno komunikatu z odmianą →
Metoda dostępu	Opcja opisu
Preferencje	Pokaż odmienione słowo ☒ On
Grafika 	
Odwiedź Opcje	
Przedłuż odwiedzin Anuluj powrót z odwiedzin. ☐ Off	
Typ przycisku	
Odmiana →	

Ustawienie Zasady języka przycisku musi być dokładnie takie samo dla przycisku Odmiana i przycisku Gramatyka, aby odmiana działała poprawnie.

- **Gramatyka** — aktualizuje tekst własnego opisu, aby przewidzieć żadaną formę gramatyczną słowa na podstawie bieżącej zawartości okna komunikatu, wybranego przycisku odmiany lub wybranego przycisku implikowanego podmiotu.
- **Implikowany podmiot** — (tylko język hiszpański) po wypełnieniu odpowiednim zaimkiem, przycisk Implikowany podmiot może być użyty do zmiany przycisków Gramatyki, a także wstawienia jego etykiety do okna wiadomości. Po jednokrotnym wybraniu przycisku Implikowany podmiot przyciski gramatyki zostaną zmienione tak, aby zgadzały się z zaimkiem na przycisku Implikowany podmiot. Jeśli zostanie wybrany po raz drugi, etykieta (zaimek) przycisku Implikowany podmiot zostanie wstawiona do okna wiadomości.

Jeśli Reguły języka przycisku Implikowanego podmiotu są ustawione na hiszpański (Meksyk, Hiszpania lub Stany Zjednoczone), na przycisku można użyć jednego z następujących zaimków:

- Yo
- Tú
- Usted
- Él
- Ella
- Nosotros
- Nosotras
- Vosotros
- Vosotras
- Ustedes
- Ellos
- Ellas



Ustawienie Zasady języka przycisku musi być dokładnie takie samo na przycisku Implikowany podmiot i przycisku Gramatyka, aby odmiana działała poprawnie.

9.7 Akcje przycisku

Akcje umożliwiają tworzenie przycisków, które wykonują określone czynności!

Dodawanie lub edytowanie akcji przycisków



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz opcję **Dodaj akcję**, aby wybrać akcję do dodania do przycisku. (Dostępne tylko wtedy, gdy **Typ przycisku** jest ustawiony na **Zwykły**).



Wpisz w polu **Wyszukaj akcje**, aby znaleźć akcje związane z wyszukiwaniem. Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat akcji, wybierz ikonę informacji w tytule sekcji.



Ulubione akcje są wyświetlane jako pierwsze na liście akcji, co ułatwia do nich dostęp. Wybierz obwód gwiazdki



, aby dodać akcję na listę ulubionych. Wybierz wypełnioną gwiazdkę



, aby usunąć akcję z listy ulubionych.

Akcje mówienia	Opis
Powiedz okno komunikatu	Powiedz treść okna komunikatu.
Powiedz lub wpisz komunikat	Powiedz lub wpisz komunikat przycisku.
Powiedz zdanie	Powiedz ostatnie zdanie w oknie komunikatu.
Zatrzymaj wszystkie obecnie odtwarzane dźwięki	Zatrzymuje wszystkie dźwięki i mowę, które są aktualnie odtwarzane lub oczekują w kolejce w TD Snap®.

Akcje dla okna komunikatu	Opis
Wytłuszczona	Ustawienie pogrubienia wybranego tekstu okna komunikatu.
Clear Message Window	Usuń treść okna komunikatu.
Kopiuń tekst okna komunikatu	Kopiuń bieżący tekst okna komunikatu do schowka systemowego. [‡]
Kopiuń okno komunikatu do przycisku	Skopiuń bieżący tekst okna komunikatu, a następnie dodaj go do wybranej przez użytkownika etykiety przycisku. [‡]
Wynij tekst okna komunikatu	Wynij bieżący tekst okna komunikatu do schowka systemowego. [‡]
Usuń tekst	Usunięcie zaznaczonego tekstu okna wiadomości lub bieżącego słowa w oknie wiadomości.
Kursywa	Ustawienie kursywy wybranego tekstu okna komunikatu.
Przeniesienie kursora	Przeniesienie kursora w oknie komunikatu.
Wklej zawartość schowka do okna komunikatu	Wklej zawartość schowka systemowego do okna komunikatu.
Ponów okno komunikatu	Powtórzenie ostatnio cofniętej czynności w oknie komunikatu.
Wybierz tekst	Wybierz tekst w oknie komunikatu.
Udostępnij tekst okna komunikatu	Udostępnij bieżący tekst okna komunikatu. [‡]
Wł. / Wył. tryb czatu	Włączanie lub wyłączanie czatu. Gdy czat jest włączony, bieżąca zawartość okna komunikatu jest zapisywana w pamięci podręcznej, a następnie okno komunikatu jest czyszczone. Podczas czatu możesz wstawiać nową zawartość do okna komunikatu i mówić. Gdy czat jest wyłączony, zawartość okna komunikatu w pamięci podręcznej jest przywracana, dzięki czemu można kontynuować tam, gdzie przerwano.
Cofnij okno komunikatu	Cofnięcie ostatniej akcji w oknie komunikatu.
Wyszukiwarka słownictwa	Pokaż ścieżkę do przycisku zawierającego tekst w oknie komunikatu. Wyróżniona ścieżka jest dostępna dla wszystkich metod dostępu. Zapytania w wyszukiwarce słownictwa rozróżniają wielkość liter.

[‡] „Bieżący tekst” odnosi się do zaznaczonego tekstu w oknie wiadomości lub, jeśli nie ma zaznaczenia, do całego tekstu w oknie wiadomości.

Akcje dla Nawigacji	Opis
Anuluj odwiedzin	Anuluje wizytę, dzięki czemu użytkownik pozostaje na bieżącej stronie.
Przedłuż odwiedzin	Przycisk zawierający tę akcję nie spowoduje powrotu do poprzedniej strony w czasie trwania wizyty.
Powrót	Wróć do poprzedniej strony.
Przejdź do strony głównej	Przejdź do strony głównej.
Łącze	Łącze do innej strony.
Otwórz pulpit	Otwórz stronę pulpitu.
Otwórz klawiaturę	Otwórz stronę klawiatury.
Otwórz tablicę***	Otworzyć tablicę.
Powrót z odwiedzin	Powrót do poprzedniej strony, anulowanie wizyty.
Przełącz zestaw stron	Przełącz na inny zestaw stron.

*** Zobacz sekcję 9.7.3 *Tablica*, str 55

Akcje dla aktywności Boardmaker	Opis
Otwórz aktywność lub folder Boardmaker [‡]	Otwórz aktywność lub folder Boardmaker jako stronę TD Snap® lub jako popup.
Otwarta biblioteka aktywności Boardmaker [‡]	Otwórz bibliotekę aktywności Boardmaker w TD Snap®. Z poziomu biblioteki użytkownik może przeglądać foldery i odtwarzać aktywności. Biblioteka aktywności Boardmaker to folder Aktywności Snap na myBoardmaker.com
Otwórz bieżącą aktywność Boardmakera [‡]	Otwórz trwającą aktywność Boardmaker, jeśli dotyczy.

[‡] Ta akcja wymaga konta myBoardmaker.com i powiązanej zawartości Boardmaker. Patrz sekcja 9.7.5 *Uruchamiaj aktywności Boardmaker w TD Snap®, str 57*

Akcje dla wsparcia zachowania	Opis
Najpierw Później	Wyświetl Najpierw, Później sekwencja w okienku.
Miniharmonogram	Wyświetl miniharmonogram w okienku.
Dialog	Wyświetl dialog w okienku.
Widoczny stoper	Wyświetla licznik czasu na górnym pasku, który odlicza określony czas.

Akcje dla metody dostępu	Opis
Skalibruj urządzenia do śledzenia ruchu gałek ocznych	Uruchom kalibrację urządzenia do śledzenia ruchu gałek ocznych.
Zmień metodę dostępu	Jeśli ustawiona jest tylko metoda dostępu 1, metoda dostępu zmienia się na określoną po wybraniu przycisku. Jeśli ustawione są zarówno metoda dostępu 1, jak i metoda dostępu 2, przycisk będzie przełączał między metodą dostępu 1 i metodą dostępu 2. Etykieta przycisku dynamicznie wyświetla „Zmień na [metoda dostępu]”, aby wskazać, co się stanie po wybraniu przycisku.
Wstrzymaj metodę dostępu	Wstrzymuje i wznowia metodę dostępu. Treść etykiety przycisku określa, czy metoda dostępu jest obecnie wstrzymana czy aktywna. Obowiązujące metody dostępu: Zatrzymanie myszy, Interakcja wzrokowa.
Ustawianie czasu dostępu	Ustawia zmienną czasową dla metody dostępu na określoną wartość. Dana zmienna czasu jest określana przez aktywną metodę dostępu, gdy <i>Set Access Time action is activated</i> [†] Na przykład można dodać akcję, gdy metoda dostępu jest ustawiona na Dotyk, ale później użytkownik aktywuje ją za pomocą metody dostępu Interakcja wzrokowa, aby zmienić czas zatrzymania spojrzenia

Akcje dla metody dostępu	Opis
Pokaż status śledzenia gałek ocznych	Wyświetla okno stanu śledzenia gałek ocznych.
Przełączanie dostępu do pulpitu	Przełączanie między sterowaniem wzrokowym komputerem a regionalnym śledzeniem gałek ocznych TD Snap. Na urządzeniach z systemem Windows TD Control służy do dostępu do pulpitu. Na iPadzie AssistiveTouch służy do dostępu do pulpitu.

[†] Lista zmiennych czasowych, na które ma wpływ akcja Ustawianie czasu dostępu.

Tabela 8: Wykres czasu dostępu

Access Method	Zmienna dotycząca czasu
Interakcja wzrokowa z zatrzymaniem	Czas zatrzymania wzroku
Interakcja wzrokowa z przełączeniem	Czas zatrzymania przełącznika
Interakcja wzrokowa z mrugnięciem	Minimalny czas mrugnięcia
Aktywacja dotykiem/Aktywacja zwolnieniem	Wstrzymaj czas
Automatyczne skanowanie 1 włącznikiem	Prędkość skanowania
Skanowanie 1 włącznikiem	Pauza
Skanowanie zatrzymania wzroku (1 włącznik)	Pauza
Skanowanie odwrotne	Prędkość
Zatrzymanie myszy	Czas zatrzymania wzroku
Sterowanie dotykowe	nic

Akcje dla filtra słownictwa	Opis
Przełącz filtr słownictwa	Włączaj lub wyłączaj filtr słownictwa.

Akcje dla sterowania głośnością	Opis
Przełączanie wyciszenia podpowiedzi dźwiękowej	Wycisz lub wyłącz wyciszenie podpowiedzi dźwiękowej.
Zmniejszenie głośności podpowiedzi dźwiękowej	Zmniejsza głośność podpowiedzi dźwiękowej.
Zwiększenie głośności podpowiedzi dźwiękowej	Zwiększa głośność podpowiedzi dźwiękowej.
Ustawienie głośności	Ustawienie głośności systemu na określonym poziomie.
Przełącznik wyciszenia	Wycisz lub wyłącz wyciszenie systemu.
Zmniejszenie siły głosu mowy	Zmniejszenie siły głosu w systemie.
Zwiększenie siły głosu mowy	Zwiększenie siły głosu w systemie.

Akcje kontroli otoczenia	Opis
Wyślij polecenie do Asystenta Google	Wyślij polecenie tekstowe do Asystenta Google. Opcje: Wyślij tekst komunikatu przycisku lub wyślij tekst okna komunikatu.
Wyślij sygnał podczerwony	Wyślij określony sygnał podczerwony.

Akcje dla AccessIT	Opis
Połącz z AccessIT*	Odłącz aktualnie podłączone urządzenie AccessIT, a następnie wyświetl selektor urządzeń AccessIT.
Reset AccessIT*	Zatrzymaj określone akcje AccessIT: przesyłanie tekstu, przytrzymane klawisze klawiatury, kliknięcia i/lub ciągłe ruchy myszą.
Wysyłanie tekstu przycisku*	Wysyłanie nazwy przycisku lub wiadomości do urządzenia AccessIT.
Wyślij sygnał klawisza klawiatury*	Wysyłanie sygnału klawisza klawiatury do urządzenia AccessIT.
Wyślij tekst okna komunikatu*	Wysyłanie bieżącego tekstu okna komunikatu do urządzenia AccessIT. [‡]
Wyślij sygnał kliknięcia myszą*	Wysyłanie sygnału kliknięć myszą do urządzenia AccessIT.

Akcje dla AccessIT	Opis
Wyślij sygnał ruch myszy*	Wysyłanie sygnału ruchu myszy do urządzenia AccessIT.
Wyślij tekst*	Wysyłanie tekstu do urządzenia AccessIT.

* Ta akcja wymaga urządzenia Tobii Dynavox AccessIT 3. Patrz sekcja 9.7.4 AccessIT, str 56

† „Bieżący tekst” odnosi się do zaznaczonego tekstu w oknie wiadomości lub, jeśli nie ma zaznaczenia, do całego tekstu w oknie wiadomości.

Akcje dla mediów	Opis
Odtwórz film z YouTube [§]	Odtwórz określony film z YouTube w zintegrowanym odtwarzaczu z ułatwieniami dostępu. Opcje: Po zakończeniu filmu automatycznie odtwórz następny film na stronie TD Snap®, zamknij odtwarzacz YouTube lub nic nie rób. Przytnij wideo (określ czas rozpoczęcia i/lub zakończenia). Przycięte filmy można oglądać tylko w określonym zakresie czasu.

§ Patrz sekcja 9.7.7 Odtwarzanie filmów z YouTube w TD Snap®, str 62

Akcje dla Uruchom inne aplikacje	Opis
Włącz aplikację	Uruchom określoną aplikację. [¶]

¶ Wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji „Shortcuts” (Skróty) można znaleźć w sekcji 9.7.6 Uruchom aplikację Apple Shortcuts z TD Snap® (tylko iPadOS), str 61.

Akcje dla urządzenia	Opis
Minimalizuj	Minimalizuje aplikację TD Snap®.
Restart urządzenia	Restartuje urządzenie.
Wyłączanie urządzenia	Wyłącza urządzenie.
Przełącz tryb widoku pełnoekranowego	Włącz lub wyłącz tryb pełnoekranowy dla urządzenia.

Akcje dla okna partnera	Opis
Zmniejsz jasność okna partnera**	Zmniejsza jasność okna partnera.
Zwiększ jasność okna partnera**	Zwiększa jasność okna partnera.
Przełączanie mocy okna partnera**	Włącza lub wyłącza okno partnera.

** Ta akcja wymaga urządzenia Tobii Dynavox I-13, I-16 lub TD Pilot.

9.7.1 Usuń akcję



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk.

3. Kliknij przycisk  **Usuń** obok akcji.
4. Wybierz czerwony przycisk **Usuń**, aby potwierdzić usuwanie.


9.7.2 Zmień kolejność akcji przycisku



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk.



3. Wybierz i przytrzymaj uchwyt **Akcji**, a następnie przesun ją na nowe miejsce na liście Akcji.

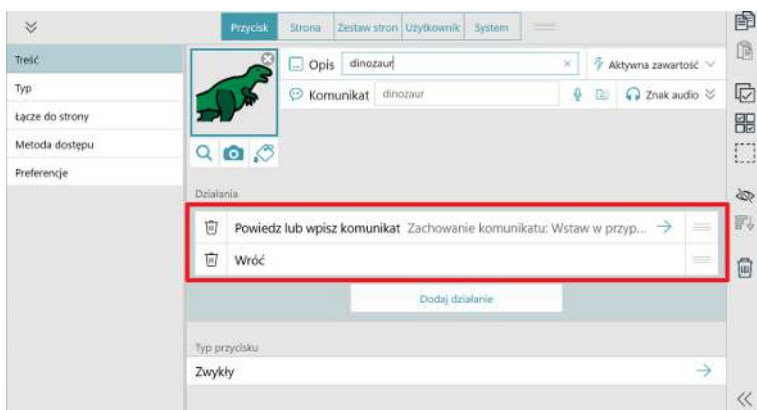


9.7.3 Tablica

i Dostęp do Tablicy jest możliwy tylko za pomocą metody dotykowej.

Tablica to obszar, w którym można wyświetlać zdjęcia i tworzyć rysunki odręczne. Twórz tyle tablic, ile chcesz. Zostaną zachowane, dopóki ich nie usuniesz.

Aby otworzyć tablicę, użyj akcji Otwórz tablicę na przycisku. W wielu zestawach stron przycisk Otwórz tablicę jest dostępny na stronie pulpitu.

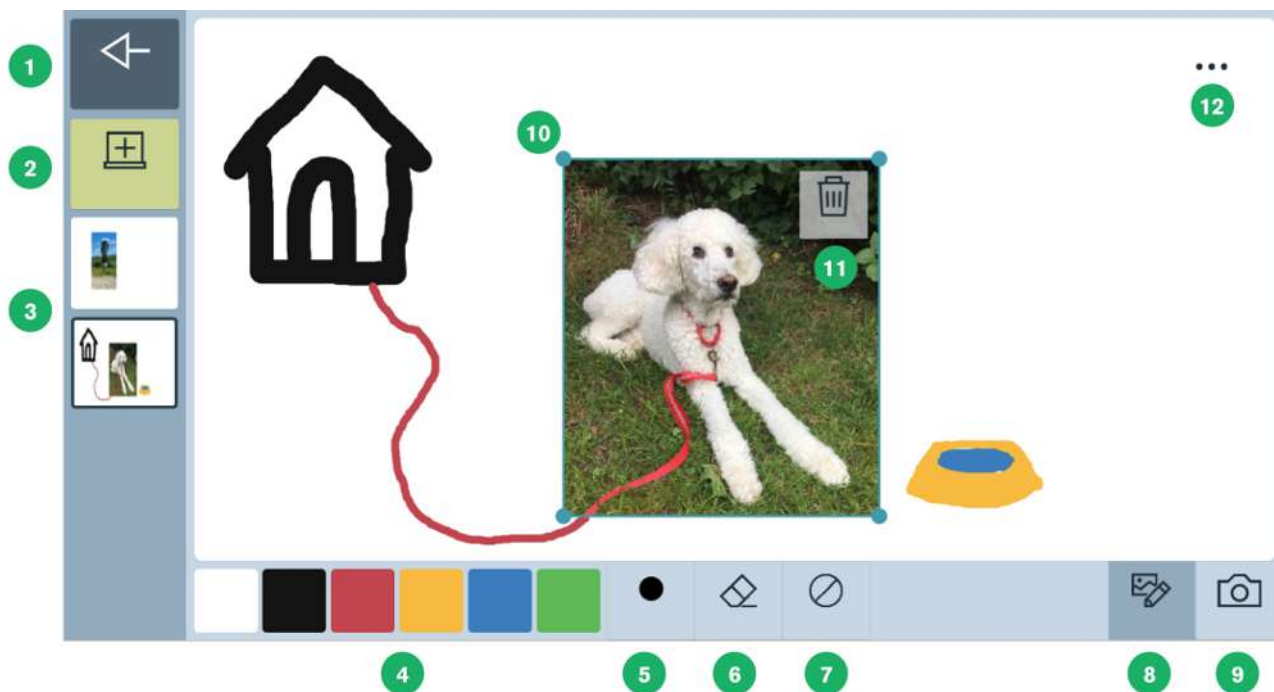

1. **Wstecz** — Powrót do zestawu stron.
2. **Nowa tablica** — Utwórz nową tablicę.
3. **Lista istniejących tablic** — Wybierz dowolną tablicę, aby ją wyświetlić i edytować.
4. **Paleta do rysowania** — Wybierz dowolny kolor, a następnie rysuj odręcznie na tablicy.
5. **Grubość** — Wybierz grubość narzędzia do rysowania.
6. **Narzędzie do wymazywania** — Wymaż rysunki w określonych obszarach.
7. **Wyczyść** — Wyczyść bieżącą tablicę ze wszystkich rysunków.
8. **Edytuj obrazy** — Zmieniaj położenie, rozmiar lub usuwaj obrazy na tablicy.
9. **Dodaj obraz** — Dodaj obraz do tablicy. Użyj wbudowanego aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub wyszukaj obraz zapisany na urządzeniu.

Akcje dla Dodaj obraz

- Zrób zdjęcie
- Wybierz zdjęcie — Uwaga: Dostęp do okna dialogowego tej czynności można uzyskać tylko za pomocą funkcji dotykowych.
- Anuluj

10. **Wybrany obraz** — Kliknij i przeciągnij od środka obrazu, aby zmienić jego położenie. Kliknij i przeciągnij w rogu, aby zmienić rozmiar.
11. **Usuń obraz** — Usuń wybrany obraz.
12. **Więcej** — Otwórz menu zawierające następujące opcje:
 - Usuń tablicę** — Usuń bieżącą tablicę.
 - Udostępniaj** — Udostępnij lub zapisz bieżącą tablicę jako obraz .jpeg.
 - Anuluj** — Zamknij menu Więcej.

9.7.4 AccessIT

TD Snap® obsługuje Tobii Dynavox AccessIT 3, urządzenie USB Bluetooth służące do wysyłania naciśnień klawiszy, ruchów myszy i kliknięć myszą do standardowego komputera z systemem Windows 10 z urządzenia z uruchomioną aplikacją TD Snap®. Aby dowiedzieć się więcej o Tobii Dynavox AccessIT 3, wejdź na <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>



Strony AccessIT są zawarte w zestawach stron Core First utworzonych za pomocą TD Snap® w wersji 1.7 i nowszych. Pakiety stron AccessIT są dostępne do zaimportowania do istniejących zestawów stron pod adresem <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>



Odtąd niniejszy dokument będzie odnosił się do komputera odbierającego polecenia jako „PC”, a do urządzenia, z którego polecenia będą wysyłane jako „urządzenie mowy”.



AccessIT 3 wykorzystuje technologię bezprzewodową Bluetooth®. Komputer (z podłączonym AccessIT 3) i urządzenie mowy muszą znajdować się w odległości około 10 metrów (32 stóp), aby ustanowić i utrzymać parowanie Bluetooth podczas korzystania z AccessIT 3.

Przed wykonaniem poniższych kroków urządzenie mowy i komputer muszą być włączone i odblokowane.

9.7.4.1 Konfiguracja AccessIT

Podłącz AccessIT

1. (Na PC) Podłącz AccessIT 3 do portu USB.



AccessIT 3 wymaga USB 2.0 lub nowszego.

Włącz Bluetooth

Urządzenia mowy w systemie Windows

Urządzenia mowy iPadOS (iPad)

1. (Na urządzeniu mowy) Wybierz menu **Start**, następnie wybierz opcję **Ustawienia**.
 2. Wybierz **Urządzenia**.
 3. Wybierz **Bluetooth**.
 4. Ustaw przełącznik **Bluetooth** w pozycji Wł.
1. (Na urządzeniu mowy) Przejdź do *Ustawienia > Bluetooth* i włącz Bluetooth.

9.7.4.2 Akcje AccessIT


Akcje AccessIT są przeznaczone do stosowania w kombinacjach. Typowe operacje na komputerze, takie jak kliknięcie i przeciągnięcie, wymagają więcej niż jednej akcji. Poszczególne akcje zostały opisane poniżej.



Jeśli urządzenie AccessIT nie jest podłączone po wybraniu przycisku zawierającego akcję AccessIT, (dostępny) selektor urządzeń AccessIT otworzy się automatycznie.

Tabela 9: Akcje AccessIT

Akcja	Opis
Połącz z AccessIT	Odłącz bieżące urządzenie AccessIT (jeśli istnieje) i wyświetl selektor urządzeń AccessIT. Ta akcja jest przydatna do przełączania z jednego urządzenia AccessIT na inne urządzenie AccessIT. Nie jest konieczne używanie tej akcji do uruchamiania wszystkich sesji AccessIT, ponieważ wszystkie akcje AccessIT automatycznie otwierają selektor urządzeń AccessIT, jeśli urządzenie AccessIT nie jest aktualnie podłączone.
Reset AccessIT	Zatrzymaj określone typy poleceń, które są aktualnie wykonywane: klawisze klawiatury, kliknięcia myszą, ruchy myszą i/lub tekst.
Wysyłanie tekstu przycisku	Wysyłanie komunikatu przycisku do urządzenia AccessIT. Jeśli przycisk nie ma komunikatu, wyślij opis przycisku.
Wyślij sygnał klawisza klawiatury	Wysyłanie określonego klawisza klawiatury. Opcje: przytrzymanie wciśniętego klawisza i/lub odczekanie określonego czasu po wysłaniu klawisza klawiatury (przed wykonaniem następnej akcji).
Wyślij tekst okna komunikatu	Wysyłanie bieżącego tekstu okna komunikatu do urządzenia AccessIT. Jeśli okno komunikatu jest oznaczone symbolami, symbole nie są wysyłane.
Wyślij tekst	Wysyłanie określonego tekstu do urządzenia AccessIT.
Wyślij sygnał kliknięcia myszą	Wysyłanie określonego typu kliknięcia (kliknięcie lewym przyciskiem myszy, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, kliknięcie środkowym przyciskiem myszy, podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy). Opcje: odczekanie określonego czasu po wysłaniu kliknięcia (przed wykonaniem następnej akcji) i/lub przytrzymanie kliknięcia.
Wyślij sygnał ruch myszy	Wysyłanie ruchu myszy do urządzenia AccessIT. Ruchy myszy są wykonywane od bieżącej pozycji myszy. Przesuń niebieską kulkę do pozycji na okręgu, która odpowiada kierunkowi żadanego ruchu myszy, a następnie wprowadź liczbę w polu odległości. Jednostką odległości jest najmniejszy wykrywalny ruch myszy, który wynosi od 1/300 do 1/200 cala, w zależności od sprzętu i ustawienia szybkości myszy na komputerze. Opcje: ruch ciągły (mysz będzie poruszać się w określonym kierunku, dopóki inna czynność jej nie zatrzyma/przekieruje lub nie natrafi na krawędź ekranu) i/lub odczekanie określonego czasu po wysłaniu ruchu myszy (przed wykonaniem następnej czynności).

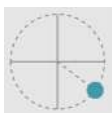

Ilustracja 31: Kierunek ruchu myszy — umieść niebieską kulkę na okręgu, aby ustawić kierunek ruchu myszy.



Niektórzy użytkownicy AccessIT mogą uznać za pomocne włączenie na komputerze ustawienia systemu Windows „Pokaż lokalizację wskaźnika po naciśnięciu klawisza CTRL”. Użyj akcji Wyślij klawisz klawiatury, aby wysłać klawisz klawiatury CTRL z TD Snap®, a wokół wskaźnika myszy na komputerze pojawiają się tymczasowo animowane kółka, aby zwiększyć jego widoczność. Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia myszy w systemie Windows, przejdź do *Ustawienia > Urządzenia > Mysz > Dodatkowe opcje myszy > zakładka Opcje wskaźnika*.

9.7.4.3 Ustawienia zasilania PC i AccessIT

Komputer może odbierać polecenia AccessIT tylko wtedy, gdy jest włączony i uśpiony. Aby zapewnić nieprzerwany dostęp do komputera, należy dostosować ustawienia zasilania PC, aby nigdy nie usypiać komputera (dysku twardego) po podłączeniu.

Komputer może nadal odbierać polecenia AccessIT, jeśli ekran (wyświetlacz) przeszedł w tryb oszczędzania energii. Wysłanie polecenia AccessIT (klawisz klawiatury, ruch myszą lub kliknięcie myszą) z pakietu TD Snap® spowoduje „wybudzenie” ekranu komputera.

Ustawienia zasilania systemu Windows znajdują się w menu *Ustawienia > System > Zasilanie i uśpienie*.


9.7.5 Uruchamiaj aktywności Boardmaker w TD Snap®

Aktywności Boardmaker to interaktywne i drukowane materiały przeznaczone do edukacji, komunikacji i zabawy! Aktywności Boardmaker można odtwarzać bezpośrednio w pakiecie TD Snap®. Użyj akcji Otwórz bibliotekę Boardmaker, aby przeglądać i odtwarzać aktywności. Możesz też użyć akcji Otwórz aktywność Boardmaker lub Folder, aby przejść bezpośrednio do określonej aktywności lub folderu. Możesz nawet udostępniać aktywności do użytku offline.

i Aktywności Boardmaker odtwarzane w TD Snap® są przeznaczone do użytku domowego, w którym opiekun zarządza kontem Tobii Dynavox używanym zarówno w TD Snap®, jak i myBoardmaker. W takiej sytuacji opiekun ma bezpośredni dostęp do folderu Aktywności Boardmaker, w którym może umieszczać aktywności Boardmaker dla użytkownika.

W kontekście klasy lub terapii, gdzie nauczyciel lub terapeuta przypisuje aktywności Boardmaker, uczeń powinien ukończyć swoje zadania za pomocą aplikacji Boardmaker 7 Student Center. Aplikacja Boardmaker 7 Student Center jest darmowa i kompatybilna z większością urządzeń obsługujących pakiet TD Snap®. Uczeń najprawdopodobniej będzie wymagał osobnego loginu podanego przez nauczyciela, aby uzyskać dostęp do swoich zadań w aplikacji Boardmaker 7 Student Center.

! Niektóre ustawienia i aktywności programu Boardmaker nie są obsługiwane w pakiecie TD Snap®. Lista nieobsługiwanych funkcji znajduje się w Podręczniku użytkownika Boardmaker 7.

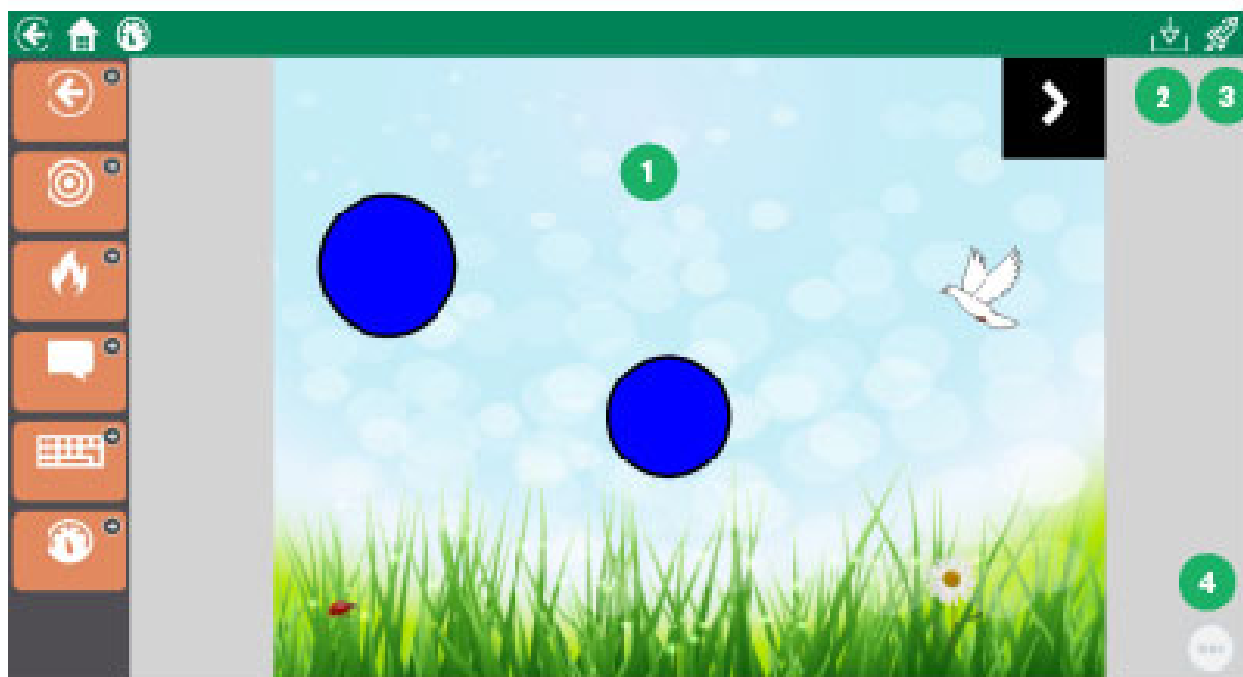

Ilustracja 32: Odtwarzanie Aktywności Boardmaker w TD Snap®

	Element	Opis
1	Aktywność	Domyślnie działania Boardmaker są odtwarzane w głównym obszarze strony pakietu TD Snap®. Możesz także odtwarzać działania Boardmaker w wyskakującym okienku, jeśli włączysz opcję <i>Odtwarzaj w okienku</i> podczas dodawania jednej z akcji Boardmaker do przycisku.
2	Zarządzanie dostępem offline	Wybierz aktywności w bieżącym widoku, aby je pobrać i udostępnić w trybie offline. Wybrane aktywności będą dostępne w TD Snap® nawet bez połączenia z Internetem.
3	Przejdź do myBoardmaker	Uruchom myBoardmaker.com w oknie przeglądarki.
4	Ikona menu aktywności Boardmaker	Otwórz Menu aktywności Boardmaker, aby uzyskać dostęp do następujących przycisków: • Wstecz — opuszczenie aktywności i powrót do poprzedniej strony. • Biblioteka — Przejdź do biblioteki Boardmaker w TD Snap®. • Restart — rozpoczęcie od nowa bieżącej aktywności. • Przesuń — Przesuń ikonę menu aktywności Boardmaker w inny róg ekranu.

9.7.5.1 Zarządzaj aktywnościami w myBoardmaker

Aby udostępnić działania Boardmaker w TD Snap®, musisz mieć konto na myBoardmaker.com. Konta na poziomie społeczności są bezpłatne. Odwiedź stronę myBoardmaker.com i zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta Tobii Dynavox, których używasz również w pakiecie TD Snap®, aby utworzyć bezpłatne konto myBoardmaker Community.



Strona myBoardmaker jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim. Aktywności w Boardmaker są jednak dostępne w wielu językach.



Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz połączenie z Internetem i jesteś zalogowany na swoje konto Tobii Dynavox w TD Snap®.

1. W TD Snap®, wybierz **Pulpit**, a następnie kliknij przycisk **Aktywności Boardmaker**.
Jeśli na pulpicie nawigacyjnym nie ma przycisku Aktywności Boardmaker, można utworzyć przycisk za pomocą akcji Otwórz bibliotekę aktywności Boardmaker, a następnie wybrać ten przycisk w trybie obsługi. Pierwsze wykonanie akcji Otwórz bibliotekę aktywności Boardmaker spowoduje utworzenie niezbędnego folderu na koncie Boardmaker Online.
2. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do [myBoardmaker.com](https://myboardmaker.com)
3. Wybierz opcję **Zaloguj się**, a następnie wprowadź dane logowania do konta Tobii Dynavox. Jeśli użytkownik nie logował się wcześniej w [myBoardmaker.com](https://myboardmaker.com), musi założyć bezpłatne konto społecznościowe lub rozpocząć subskrypcję.
4. Wybierz **My Boardmaker**.
5. Wybierz folder **Aktywności Snap**.
6. Dodaj aktywności i foldery do folderu Aktywności Snap, aby udostępnić je za pomocą akcji w aplikacji TD Snap®.



Folder Aktywności Snap jest wstępnie załadowany kilkoma darmowymi aktywnościami, które pomogą Ci zacząć. Niektóre z bardziej popularnych działań to kalkulator, kości i spinner znajdujące się w folderze Narzędzia matematyczne.



Folder Aktywności Snap w myBoardmaker to Biblioteka aktywności Boardmaker w pakiecie TD Snap®.

9.7.5.2 Otwórz program Boardmaker.

Ta akcja umożliwia użytkownikowi przeglądanie wszystkich aktywności Boardmaker w folderze Aktywności Snap w myBoardmaker bezpośrednio w pakiecie TD Snap®. Z biblioteki aktywności Boardmaker można wybrać dowolną aktywność do odtworzenia.



Wszystkie aktywności w bibliotece są dostępne do odtwarzania, jeśli na urządzeniu jest aktywne połączenie internetowe. W trybie offline odtwarzane są tylko aktywności, które zostały pobrane lub wcześniej zapisane w pamięci podręcznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji 9.7.5.5 *Dostęp do aktywności Boardmaker offline*, str. 60.

1. Przejdź do strony, na której chcesz umieścić przycisk odsyłający do Biblioteki aktywności Boardmaker.



Edytuj.

2. Kliknij przycisk **Edytuj.**
3. Wybierz przycisk, którego chcesz użyć do otwarcia Biblioteki aktywności Boardmaker.
4. Kliknij **Dodaj akcję**.
5. Przewiń w dół do sekcji Aktywności Boardmaker i wybierz **Otwórz bibliotekę aktywności Boardmaker**.

9.7.5.3 Otwórz Aktywności Boardmaker

Odtwórz określoną aktywność w Bibliotece Boardmaker.



Wszystkie aktywności w bibliotece są dostępne do odtwarzania, jeśli na urządzeniu jest aktywne połączenie internetowe. W trybie offline odtwarzane są tylko aktywności, które zostały pobrane lub wcześniej zapisane w pamięci podręcznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji 9.7.5.5 *Dostęp do aktywności Boardmaker offline*, str. 60.

1. Przejdź do strony, na której chcesz umieścić przycisk odsyłający do Aktywności Boardmaker.



2. Kliknij przycisk **Edytuj**.
3. Wybierz przycisk, którego chcesz użyć do otwarcia Aktywności Boardmaker.
4. Kliknij **Dodaj akcję**.
5. Przewiń w dół do Aktywności Boardmaker i wybierz **Otwórz aktywność Boardmaker lub Folder**. Otworzy się okno dialogowe Aktywności Snap.
6. Przejdź przez foldery do aktywności, którą chcesz odtworzyć. Wybierz aktywność.
7. Jeśli chcesz, aby aktywność otwierała się w wyskakującym okienku, włącz opcję **Otwórz w wyskakującym okienku**. W przeciwnym razie aktywność zostanie otwarta jako strona w pakiecie TD Snap®.
Aktywności otwarte w wyskakującym okienku nie pozwalają użytkownikowi na opuszczenie strony, a następnie powrót do niej w celu wznowienia od miejsca, w którym zostały przerwane. Wyskakujące okienka najlepiej sprawdzają się w przypadku krótkich aktywności, które można łatwo wznowić od początku.
8. Kliknij **Wybierz aktywność**. Aby wyjść bez zapisywania, wybierz Anuluj.



Etykieta przycisku jest automatycznie aktualizowana o nazwę powiązanej aktywności.

9.7.5.4 Otwórz Folder Boardmaker.

Otwórz określony folder w bibliotece Boardmaker. Z folderu użytkownik może wybrać aktywności do odtworzenia w TD Snap®.



Możesz przypisać aktywności Boardmaker do użytkownika, tworząc dla niego folder w folderze Aktywności Snap na myBoardmaker.com, a następnie łącząc się z tym folderem w jego zestawie stron TD Snap®. Przenieś aktywności do folderu w razie potrzeby, a użytkownik zobaczy je w pakiecie TD Snap® (użytkownik musi mieć połączenie z Internetem i być zalogowany na konto myTobiiDynavox w pakiecie TD Snap®, aby otrzymywać zaktualizowane aktywności).



Wszystkie aktywności w bibliotece są dostępne do odtwarzania, jeśli na urządzeniu jest aktywne połączenie internetowe. W trybie offline odtwarzane są tylko aktywności, które zostały pobrane lub wcześniej zapisane w pamięci podręcznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji 9.7.5.5 *Dostęp do aktywności Boardmaker offline*, str. 60.

1. Przejdź do strony, na której chcesz umieścić przycisk odsyłający do Aktywności Boardmaker.



2. Kliknij przycisk **Edytuj**.
3. Wybierz przycisk, którego chcesz użyć do otwarcia folderu Boardmaker.
4. Kliknij **Dodaj akcję**.
5. Przewiń w dół do Aktywności Boardmaker i wybierz **Otwórz aktywność Boardmaker lub Folder**. Otworzy się okno dialogowe Aktywności Snap.
6. Przejdź do folderu, do którego chcesz utworzyć łącze, tak aby znaleźć się w wybranym folderze.
7. Kliknij **Wybierz folder**. Aby wyjść bez zapisywania, wybierz Anuluj.



Etykieta przycisku jest automatycznie aktualizowana o nazwę powiązanego folderu.

9.7.5.5 Dostęp do aktywności Boardmaker offline

Aktywności Boardmaker można pobrać na swoje urządzenie, aby były dostępne do odtwarzania, gdy urządzenie jest w trybie offline.



Aktywności offline są pobierane na urządzenie. Jeśli zestaw stron zostanie zsynchronizowany lub udostępniony na innym urządzeniu, proces pobierania musi zostać powtórzony na tym urządzeniu, aby aktywności były dostępne w trybie offline.

1. Otwórz bibliotekę Boardmaker w pakiecie TD Snap®. Zobacz sekcję 9.7.5.2 *Otwórz program Boardmaker.*, str. 59.
2. Otwórz folder, aby wyświetlić listę aktywności.



3. Wybierz **Zarządzanie dostępem offline**.

4. Zaznacz pole obok aktywności, które chcesz pobrać na urządzenie w celu odtwarzania offline.

Aktywności, dla których wyświetlana jest ikona , zostały pomyślnie pobrane i są dostępne na tym urządzeniu w trybie offline.

5. Wybierz **X**, aby zamknąć okno dialogowe po zakończeniu pobierania aktywności w tym folderze.
6. Powtórz powyższe kroki dla każdego folderu zawierającego aktywności, które chcesz udostępnić w trybie offline.



Gdy aktywność nieoznaczona do użytku offline jest odtwarzana podczas połączenia internetowego, jest ona pobierana jako plik tymczasowy. Z tego powodu niektóre aktywności, które były odtwarzane wcześniej, ale nie zostały wyraźnie oznaczone do użytku w trybie offline, mogą być nadal dostępne do odtwarzania w trybie offline. Dostępność tych plików w trybie offline nie jest gwarantowana.

9.7.5.6 Otwórz aktywność Boardmaker w trakcie

Jeśli użytkownik odtwarza aktywność Boardmaker w TD Snap® i przejdzie z aktywności na inną stronę, może powrócić do aktywności Boardmaker w tym samym stanie, w jakim ją opuścił.



Ta akcja może być używana tylko z aktywnościami odtwarzanymi w głównym oknie pakietu TD Snap®. Nie działa z aktywnościami otwieranymi jako wyskakujące okienka.

1. Przejdź do strony, na której chcesz mieć przycisk, który przeniesie użytkownika z powrotem do trwającej aktywności Boardmaker.



2. Kliknij przycisk **Edytuj**.
3. Wybierz przycisk, którego chcesz użyć, aby przejść do trwającej aktywności Boardmaker.
4. Kliknij **Dodaj akcję**.
5. Przewiń w dół do Aktywności Boardmaker i wybierz **Otwórz bieżącą aktywność Boardmaker**.



Jeśli aktualnie nie jest wykonywana żadna Aktywność Boardmaker, przycisk jest automatycznie wyłączany. Gdy Aktywność Boardmaker jest w toku, przycisk jest automatycznie włączany, a na etykiecie wyświetlana jest nazwa i miniatura aktywności.

9.7.6 Uruchom aplikację Apple Shortcuts z TD Snap® (tylko iPadOS)

Aplikację Shortcuts można uruchomić z TD Snap® za pomocą akcji Włącz aplikację.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk, którego chcesz użyć do włączenia aplikacji Shortcuts.
3. Kliknij **Dodaj akcję**.
4. Wybierz **Shortcuts**.

Opcja 1: Jeśli nie dodasz żadnych zaawansowanych parametrów, akcja uruchomi aplikację Shortcuts, w której możesz wybrać skrót, który chcesz uruchomić.

Opcja 2: Wybierz opcję **Zaawansowane**, a następnie w polu Argumenty wiersza poleceń określ skrót do uruchomienia oraz (opcjonalnie) parametry wejściowe i tekstowe.

`name=[name] &input=[input] &text=[text]`

nazwa: Nazwa skrótu do uruchomienia.

dane wejściowe (opcjonalnie): Początkowe dane wejściowe dla skrótu. Istnieją dwie opcje danych wejściowych: ciąg tekstowy lub schowek słów. Gdy wartością danych wejściowych jest ciąg tekstowy, używany jest ten tekst. Gdy wartością danych wejściowych jest schowek, używana jest zawartość schowka.

tekst (opcjonalnie): Jeśli dane wejściowe są ustawione na tekst, wówczas wartość parametru tekstu jest przekazywana jako dane wejściowe dla skrótu. Jeśli dane wejściowe są ustawione na schowek, parametr ten jest ignorowany.


Na przykład, jeśli chcesz uruchomić skrót Słowo dnia, należy dodać następujące elementy w Argumentach wiersza poleceń: `name=Word of the Day`

Wskazówka: Możesz zaprogramować skróty tak, aby wracały do TD Snap® automatycznie po uruchomieniu. W aplikacji Shortcuts edytuj skrót i dodaj akcję Otwórz aplikację na końcu listy akcji. Dotknij zmiennej aplikacji w akcji i wybierz TD Snap®.

9.7.7 Odtwarzanie filmów z YouTube w TD Snap®

Filmy z YouTube można odtwarzać w pakiecie TD Snap® za pomocą akcji Odtwórz film z YouTube. Zintegrowany z pakietem TD Snap® odtwarzacz YouTube jest dostępny przy użyciu wszystkich metod dostępu.

Uwaga: do odtwarzania filmów z YouTube wymagane jest połączenie Wi-Fi.

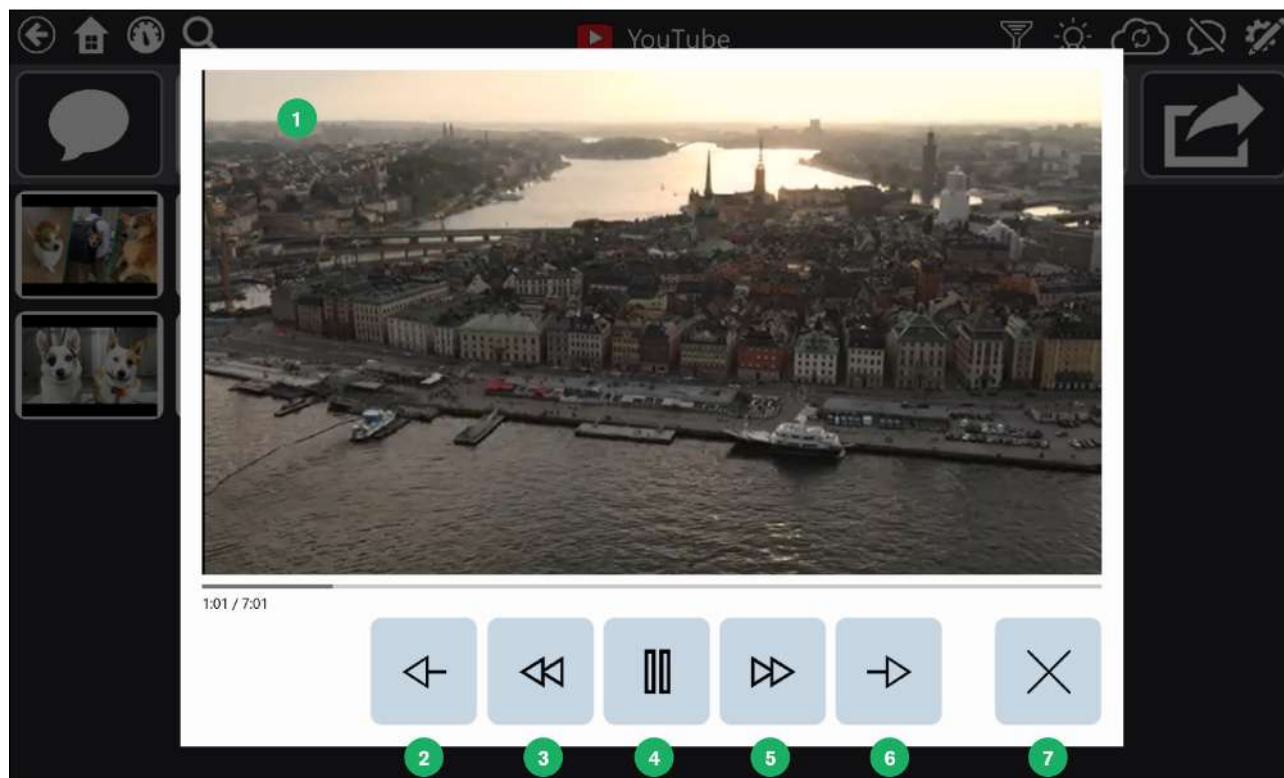


Ilustracja 33: TD Snap®Zintegrowany odtwarzacz YouTube

	Element	Opis
1	Film YouTube	W tym miejscu pojawi się film z YouTube i rozpocznie się jego automatyczne odtwarzanie.
2	Poprzedni film	Przejdź do poprzedniego filmu na stronie pakietu TD Snap®.
3	Pomiń wstecz	Pomiń wstecz o 30 sekund.
4	Wstrzymaj/Odtwórz	Wstrzymaj lub odtwórz wideo.
5	Pomiń do przodu	Pomiń do przodu o 30 sekund.
6	Następny film	Przejdź do następnego filmu na stronie pakietu TD Snap®.
7	Zamknij	Zamknij odtwarzacz YouTube.

Aby utworzyć listę odtwarzania wideo w pakiecie TD Snap®, dodaj akcję Odtwórz wideo YouTube do wielu przycisków na jednej stronie. Jeśli chcesz, aby cała lista odtwarzania była odtwarzana automatycznie, włącz opcję „Automatycznie odtwarzaj następny film” na każdym przycisku. Listy odtwarzania YouTube nie są obsługiwane.

9.8 Styl przycisku

Zmień wygląd przycisku w kategorii Styl przycisku.

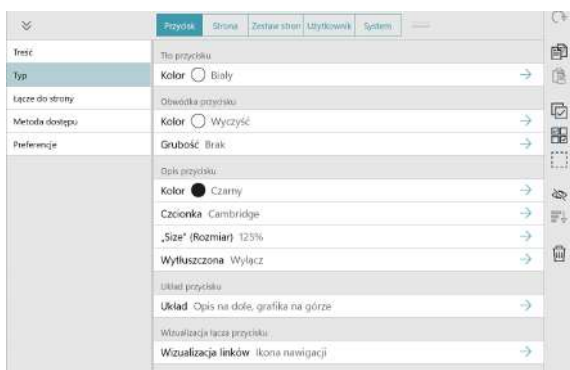

9.8.1 Tło przycisku



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Kolor** w sekcji Tło przycisku.
5. Wybierz kolor.



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 Kolory niestandardowe, str 80.

9.8.2 Obwódka przycisku

9.8.2.1 Kolor obwódki



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Kolor** w sekcji Obwódka przycisku.
5. Wybierz kolor.



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 Kolory niestandardowe, str 80.

9.8.2.2 Grubość obwódki



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Grubość** w sekcji Obwódka przycisku.
5. Wybierz grubość obwódki — Brak, Cienkie, Średnie lub Grube. Można również ustawić niestandardową grubość za pomocą suwaka lub wpisując wartość liczbową z zakresu od 0 do 12 w polu Niestandardowa grubość.



Ilustracja 34: Obwódka przycisków: Brak, Cienkie, Średnie i Ciężkie.

9.8.3 Opis przycisku

9.8.3.1 Kolor



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Kolor** w sekcji Opis przycisku.
5. Wybierz kolor.



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 Kolory niestandardowe, str 80.

9.8.3.2 Czcionka



Domyślne ustawienie tego parametru znajduje się na karcie Ustawienia strony. Jeśli chcesz zastąpić domyślne ustawienie zestawu stron w tym przypadku, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wyl.** Aby dopasować to ustawienie do reszty zestawu stron, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wł.**



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz opcję **Czcionka** w obszarze Opis przycisku.
5. Wybierz czcionkę.

9.8.3.3 Rozmiar



Domyślne ustawienie tego parametru znajduje się na karcie Ustawienia strony. Jeśli chcesz zastąpić domyślne ustawienie zestawu stron w tym przypadku, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wyl.** Aby dopasować to ustawienie do reszty zestawu stron, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wł.**



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Rozmiar** w sekcji Opis przycisku.
5. Wybierz rozmiar.

9.8.3.4 Wyłuszczona



Domyślne ustawienie tego parametru znajduje się na karcie Ustawienia strony. Jeśli chcesz zastąpić domyślne ustawienie zestawu stron w tym przypadku, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wyl.** Aby dopasować to ustawienie do reszty zestawu stron, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wł.**



1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz opcję **Pogrubione** w obszarze Opis przycisku.
5. Ustaw pogrubienie na **Wł.** lub **Wył.**

Edytuj.

9.8.4 Układ przycisku



Domyślne ustawienie tego parametru znajduje się na karcie Ustawienia strony. Jeśli chcesz zastąpić domyślne ustawienie zestawu stron w tym przypadku, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wył.** Aby dopasować to ustawienie do reszty zestawu stron, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wł.**



1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Układ** w sekcji Układ przycisku.
5. Wybierz układ z listy.

Edytuj.



Opis na górze, grafika na dole



Opis na dole, grafika na górze



Opis po lewej, grafika po prawej



Opis po prawej, grafika po lewej



Tylko opis



Tylko grafika

9.8.5 Wizualizacja łącza przycisku



Domyślne ustawienie tego parametru znajduje się na karcie Ustawienia strony. Jeśli chcesz zastąpić domyślne ustawienie zestawu stron w tym przypadku, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wył.** Aby dopasować to ustawienie do reszty zestawu stron, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wł.**

Ustawia styl wizualizacji łącza dla wybranego przycisku.



1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Wizualizacja linków** w sekcji Wizualizacja łącza przycisku.

Edytuj.

5. Wybierz styl wizualizacji linków z listy.

Tabela 10: Style wizualizacji linków

Brak	Nie wyświetlaj wizualizacji linków.	
Ikona nawigacji	W rogu przycisku pojawia się mała ikona wskazująca, co robi (link do innej strony, odwiedź stronę lub wróć).	
Folder dla łącza	Przycisk Łączy ma kształt folderu. Styl dotyczy tylko przycisków Łączy, a nie przycisków Wróć lub Odwiedź.	
Zakładka narożna dla łącza	Przycisk Link ma szary trójkąt w jednym rogu. Styl dotyczy tylko przycisków Link, a nie przycisków Wróć lub Odwiedź.	

9.9 Łączy do strony/Utwórz nową stronę

Przyciski łączy otwierają inną stronę po ich wybraniu. Domyślnie przyciski linków są identyfikowane przez tę ikonę 


lub ikonę wizyty  . Aby zmienić wygląd przycisków linków i odwiedzin, zobacz sekcję 10.3.6 Wizualizacja łącza

zestawu stron, str 86.

9.9.1 Utwórz przycisk łącza w pustej komórce



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz ikonę łącza w pustej komórce.

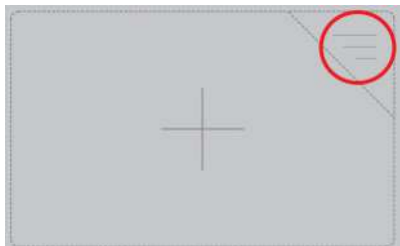

- Aby połączyć się z zupełnie nową stroną, zobacz sekcję 9.9.3 Łącze do Nowej strony/Utwórz nową stronę, str 67.
- Aby połączyć z istniejącą stroną, zobacz sekcję 9.9.4 Łącze do istniejącej strony, str 67.
- Aby połączyć z (nową) kopią istniejącej strony, zobacz sekcję 9.9.5 Link do nowej kopii istniejącej strony, str 67.
- Aby zaimportować stronę i połączyć z nią, zobacz sekcję 9.9.6 Zainportuj i powiąż ze stroną, str 68.

9.9.2 Tworzenie łącza z istniejącego przycisku



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk, z którego chcesz utworzyć łącze.
3. Wybierz zakładkę **Przycisk**.
4. Wybierz kategorię **Akcja**.
5. Kliknij **Dodaj akcję**.
6. Wybierz **Łącze**.
 - Aby połączyć się z zupełnie nową stroną, zobacz sekcję 9.9.3 Łącze do Nowej strony/Utwórz nową stronę, str 67.
 - Aby połączyć z istniejącą stroną, zobacz sekcję 9.9.4 Łącze do istniejącej strony, str 67.
 - Aby połączyć z (nową) kopią istniejącej strony, zobacz sekcję 9.9.5 Link do nowej kopii istniejącej strony, str 67.
 - Aby zaimportować stronę i połączyć z nią, zobacz sekcję 9.9.6 Zainportuj i powiąż ze stroną, str 68.

9.9.3 Łącze do Nowej strony/Utwórz nową stronę

1. Wybierz opcję **Link do nowej strony**. Otworzy się okno dialogowe Nowa strona.
2. Wpisz nazwę strony w polu **Nazwa**. Wybierz symbol lub wybierz **X**, jeśli nie chcesz ustawiać symbolu dla strony.
3. Wybierz **Utwórz**, aby utworzyć łącze i nową stronę. Wybierz **Anuluj**, aby powrócić bez zapisywania.

9.9.4 Łącze do istniejącej strony

1. Wybierz opcję **Łącze do istniejącej strony**. Otworzy się okno dialogowe Łącze do istniejącej strony.
2. Wybierz stronę z listy.

Wpisz w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną stronę, lub wybierz Ostatnio otwierane, aby znaleźć ostatnio odwiedzaną stronę.
3. Wybierz **Zapisz**, aby utworzyć łącze. Wybierz **Anuluj**, aby powrócić bez zapisywania.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcji Odwiedź stronę, zobacz sekcję 9.9.7 Odwiedź stronę, str 68.

9.9.5 Link do nowej kopii istniejącej strony

Ta metoda łączenia umożliwia użycie strony jako szablonu dla nowej tworzonej strony.

1. Wybierz opcję **Łącze do kopii strony**. Otworzy się okno dialogowe Kopia strony.

- Wybierz stronę z listy.
- Wprowadź nazwę nowej strony w polu Nazwa.
- Wybierz **Zapisz**, aby utworzyć kopię wybranej strony i łączy. Wybierz **Anuluj**, aby powrócić bez zapisywania.

 Wpisz w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną stronę, lub wybierz Ostatnio otwierane, aby znaleźć ostatnio odwiedzaną stronę.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcji Odwiedź stronę, zobacz sekcję 9.9.7 *Odwiedź stronę*, str 68.

9.9.6 Zaimportuj i powiąż ze stroną

Jeśli masz plik pakietu stron zawierający stronę, do której chcesz utworzyć link, możesz zaimportować stronę i utworzyć do niej link w jednym kroku, korzystając z opcji Importuj i powiąż ze stroną.

- Wybierz **Importuj i powiąż ze stroną**. Możesz wybrać import z myTobiiDynavox lub z pliku lokalnego:

Z konta myTobiiDynavox

- Wybierz **Z konta myTobiiDynavox**.

Możesz zostać poproszony o zalogowanie się do myTobiiDynavox. Otworzy się okno dialogowe Wybierz pakiet stron z konta myTobiiDynavox.

- Wybierz pakiet stron, który chcesz zaimportować, a następnie wybierz **Dalej**.
- Wybierz stronę, do której chcesz utworzyć link, a następnie wybierz opcję **Importuj**.

Z pliku lokalnego

- Wybierz opcję **Z pliku lokalnego**. Otworzy się okno dialogowe Importuj pakiet stron z lokalnego pliku.
- Wybierz **Przeglądaj**. Przejdź do żądanego pakietu stron (.spb), a następnie wybierz opcję **Otwórz**.
- Wybierz **Dalej**.
- Wybierz stronę, do której chcesz utworzyć link, a następnie wybierz opcję **Importuj**.

 Konflikty stron występują, gdy pakiet stron zawiera jedną lub więcej stron, które już istnieją na urządzeniu, ale nie



są identyczne. Zaznacz każdą ikonę konfliktu stron , a następnie wybierz, czy chcesz zachować istniejącą stronę, czy zastąpić ją zaimportowaną stroną z pakietu stron. Musisz rozwiązać wszystkie konflikty stron w ten sposób, zanim będziesz mógł kontynuować importowanie pakietu stron.

9.9.7 Odwiedź stronę

Gdy opcja ta jest włączona, ustawienie Odwiedź stronę ustawia łączy do powrotu użytkownika do poprzedniej strony po dokonaniu wyboru, który wyzwala powrót na połączonej stronie. Przyciski łączy z włączoną opcją Odwiedź stronę



wyświetlają tę ikonę:

Jak działa funkcja Odwiedź stronę

- Wybierz przycisk łączy Odwiedź stronę. Zostanie otwarta połączona strona.
- Dokonaj wyboru na połączonej stronie.*
Zostanie otwarta poprzednia strona (zawierająca przycisk odnośnika Odwiedź stronę).



* Aby uruchomić powrót do poprzedniej strony, wybrany przycisk musi *Lub* zawierać jedną z następujących akcji:

- Powiedz lub wpisz komunikat
- Powiedz zdanie
- Powrót z odwiedzin

Lub, być jednym z następujących typów przycisków, które również powodują powrót do poprzedniej strony:

- Przyciski Gramatyka
- Przycisk Odmiana
- Przycisk Predykcja
- Przycisk klawiatury ekranowej zaprogramowany z KeyType = spacja

Następujące akcje i typy przycisków rozszerzają tryb wizyty i *Nie* wyzwała powrotu do poprzedniej strony:

- Przedłuż odwiedzin
- Powrót
- Łączy
- Implied Subject (Implikowany podmiot)
- Wstrzymaj metodę dostępu
- Czat

Jeśli przycisk zawiera wiele akcji (niektóre wyzwalają powrót do poprzedniej strony, a inne rozszerzają tryb wizyty), powrót do poprzedniej strony nie jest wyzwalany, chyba że przycisk zawiera również opcję Powrót z odwiedzin.

Następujące działania anulują wizytę:

- Anuluj odwiedzin
- Przejdź do strony głównej
- Otwórz pulpit
- Otwórz klawiaturę

9.9.7.1 Włączenie opcji Odwiedź stronę na przycisku łączy



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz Przycisk Łączy.
3. Wybierz kategorię **Akcja**.
4. Wybierz akcję **Łączy**.
5. Ustaw **Odwiedź stronę** na Wł.

9.9.7.2 Przedłużenie, anulowanie lub powrót z wizyty

Za pomocą akcji można przerwać lub przedłużyć wizytę na stronie, która następuje po wybraniu przycisku Odwiedź. Jeśli wybrany przycisk na odwiedzanej stronie zawiera jedną z poniższych akcji, zmienia normalne zachowanie funkcji Odwiedź w określony sposób:

- Przedłuż odwiedzin - pozostanie w trybie odwiedzin pomimo wykonania akcji na tym przycisku.
- Anuluj odwiedzin - wyjście z trybu odwiedzin, ale pozostanie na bieżącej stronie.
- Powrót z odwiedzin - natychmiastowe wyjście z trybu odwiedzin (przed wykonaniem kolejnych akcji na tym przycisku) i powrót do pierwotnej strony. Wszystkie akcje na przycisku zostaną wykonane.

9.10 Ustawienia metody dostępu do przycisków

Dostosuj niektóre ustawienia metody dostępu do poszczególnych przycisków.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Metoda dostępu**.
4. Dla każdego ustawienia metody dostępu dopasuj do ustawień użytkownika lub ustaw wartość niestandardową dla aktualnie wybranego przycisku:

Opcje sterowania wzrokowego

- Czas zatrzymania wzroku — ustawia czas oczekiwania wymagany do wybrania tego konkretnego przycisku przez użytkowników.

9.11 Zasady języka przycisku

Ustawienie reguł języka umożliwia określenie języka, który będzie używany do wyszukiwania symboli, symbolizowania, przewidywania słów, odmiany, automatycznego morfingu i głosu mówiącego (jeśli dla tego języka ustawiono odpowiadający mu głos) dla tego przycisku.

Przyciski dziedziczą domyślne ustawienia reguł językowych z ustawień na poziomie zestawu stron lub ustawień na poziomie strony. Reguły językowe dla przycisku można ustawić ręcznie, wykonując poniższe czynności:



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Wybierz kategorię **Preferencje**.
4. Wybierz **Zasady języka**.
5. Wybierz język z listy:

- **Języki z pełną obsługą** — wpływa na wyszukiwanie symboli, symbolizowanie, predykcję słów, odmiany, automatycznego morfingu i głos mówiącego (jeśli dla danego języka ustawiono głos specyficzny dla tego języka).

Język neutralny jest używany głównie z nazwami własnymi (na przykład Harriet Tubman lub Amsterdam). Gdy słowa oznaczone jako neutralne zostaną wysłane do okna wiadomości, zostaną wypowiedziane zgodnie z regułami językowymi innych słów aktualnie znajdujących się w oknie wiadomości. Jeśli okno wiadomości jest puste, słowa neutralne zostaną wypowiedziane zgodnie z ustawieniami reguł językowych bieżącej lub ostatniej nieneutralnej strony.

- **Inne języki** — języki w tej kategorii mają różne poziomy wsparcia w ramach aplikacji TD Snap®.

9.12 Przyrostki i przedrostki


Użyj przycisków zawierających przedrostek lub przyrostek bezpośrednio przed lub po innym słowie, aby utworzyć nowe słowo w oknie wiadomości.



Sufiksy i prefiksy działają obecnie tylko w języku angielskim.

Ustawienie użytkownika „Automatycznie twórz formy skrócone” musi być włączone. Zobacz sekcję 14.12.2 *Ustawienia okna komunikatu*, str 111.

- Utwórz osobny przycisk dla każdego sufiksu lub prefiksu.
- Dodaj myślnik w miejscu, w którym przyrostek lub przedrostek łączy się z innym słowem, aby utworzyć nowe słowo bez myślnika. Na przykład „sad” + „-ness” = „sadness”.
- Dodaj dwa myślniki w miejscu, w którym przyrostek lub przedrostek łączy się z innym słowem, aby utworzyć nowe słowo z myślnikiem. Na przykład „anti” + „smoking” = „anti-smoking”.
- Zasady pisowni nie są stosowane, więc możliwe są błędnie napisane słowa i nieistniejące słowa. Na przykład „happy” + „-ness” = „happyness”, a „place” + „-ment” + „-ship” + „-tion” = „placementshiption”.
- Zarówno przedrostek lub przyrostek, jak i inne słowo muszą zostać wprowadzone do okna wiadomości za pomocą standardowych przycisków, a nie przycisków klawiatury.

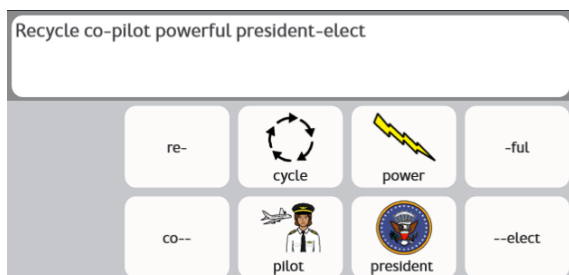

Ilustracja 35: Przykłady przycisków z przedrostkami i przyrostkami

9.13 Edytuj Pomocne słowa

Tematy zawierają gotowe wsparcie pomagające w samoregulacji i komunikacji społecznej. Wsparcie można edytować, aby dostosować je do własnych potrzeb. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach wsparcia, zobacz sekcję 7.4.2 *Pomocne słowa*, str 25.

1. Przejdź do strony zawierającej pomocne słowa, które chcesz edytować.



2. Kliknij przycisk **Edytuj**.
3. Kliknij przycisk wsparcia, które chcesz edytować.
4. Wybierz **akcję** (Mini harmonogram, Minutnik, Najpierw Później lub Dialog).
5. Kliknij ikonę ołówka w dowolnym wierszu, aby dokonać zmian.
6. Kliknij przycisk **Podgląd** na dole panelu edycji wsparcia, aby zobaczyć zmiany Wsparcia przed ich wprowadzeniem.
7. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk **Gotowe**.

9.14 Piloty

Niektóre urządzenia Tobii Dynavox, takie jak Indi i I-110, są wyposażone w nadajnik podczerwieni, którym można sterować za pomocą TD Snap®, dzięki czemu urządzenia te mogą być używane jako piloty do urządzeń takich jak telewizory i zestawy stereo. Zestaw stron Core First zawiera gotowe strony pilotów na pulpicie nawigacyjnym. Te strony pilotów zawierają przyciski, które są gotowe do zaprogramowania za pomocą poleceń pilota.



Piloty TD Snap® nie działają na urządzeniach Tobii Dynavox I-12(+) lub I-15(+).

9.14.1 Programowanie przycisku pilota



Proces programowania pilota należy wykonać tylko raz dla każdego przycisku.

Przygotuj pilota. Będzie on potrzebny do nauczania urządzenia komend IR.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk ekranowy, który chcesz zaprogramować do wysyłania polecenia IR.
3. Wybierz zakładkę **Przycisk**.
4. Wybierz kategorię **Akcja**.
5. Kliknij **Dodaj akcję**.
6. Kliknij **Wyślij sygnał podczerwieni**.
7. Kliknij **Rejestruj**, następnie skieruj pilota na panel podczerwieni urządzenia Tobii Dynavox i naciśnij przycisk na pilocie.
8. Jeśli zobaczysz komunikat „Rejestracja powiodła się!”, kliknij **Gotowe**.
Jeśli pojawi się komunikat „Nie wykryto sygnału. Spróbuj ponownie.” wróć do kroku 7.

9.14.2 Korzystanie z pilotów



Piloty są dostępne tylko dla kompatybilnych urządzeń Tobii Dynavox.

Konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie pilota poprzez zaprogramowanie każdego przycisku pilota za pomocą odpowiedniego polecenia podczerwieni. Patrz 9.14.1 *Programowanie przycisku pilota*, str 71.



Ilustracja 36: Pulpit — przycisk Piloty


1. Przejdź do strony pilota odpowiadającej urządzeniu (telewizor, zestaw stereo itp.), którym chcesz sterować.
2. Skieruj okienko podczerwieni urządzenia Tobii Dynavox w stronę urządzenia, którym chcesz sterować.

- Wybierz przycisk żądanego polecenia.

9.15 Edycja strony

Zmiany wprowadzone na karcie Strona będą miały wpływ *tylko na bieżącą stronę*. Za pomocą ustawień na karcie Strona można zastąpić niektóre ustawienia zestawu stron. Na przykład, jeśli chcesz, aby pasek komunikatu był widoczny na większości stron, ale nie na stronie pulpitu, wykonaj następujące czynności: 1. Włącz pasek komunikatu w ustawieniach strony. 2. Przejdź do strony Pulpit. 3. Wybierz kartę Strona. 4. Wybierz Preferencje 5. W obszarze Widoczność paska komunikatu strony wyłącz ustawienie Dopasuj zestaw stron: Wł. 6. Ustaw opcję Widoczność paska komunikatu na Wył.


9.15.1 Nazwa strony

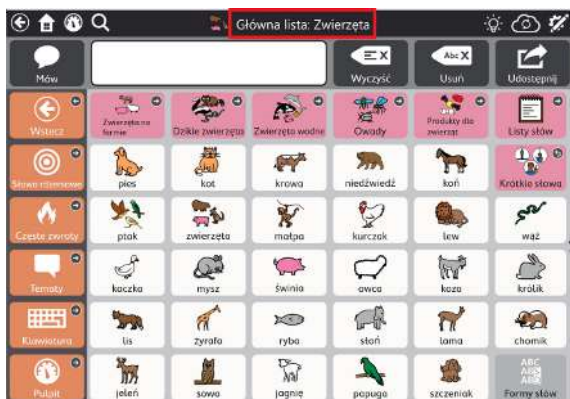


Ilustracja 37: Nazwa strony



- Kliknij przycisk **Edytuj**.
- Kliknij kartę **Strona**.
- Wpisz w polu **Tekst**, aby edytować nazwę strony.

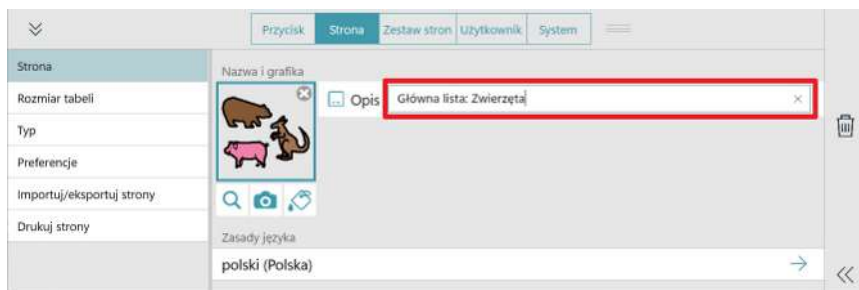

9.15.2 Symbol strony

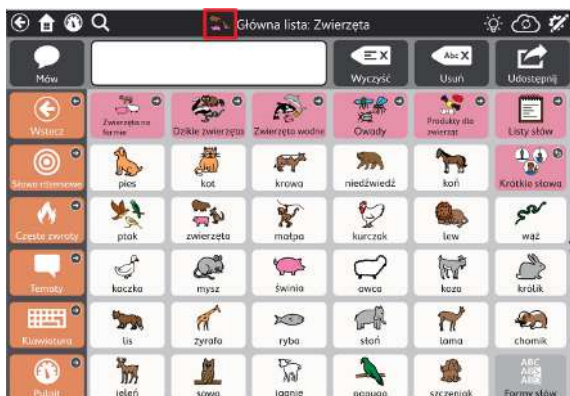

Ilustracja 38: Symbol strony



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Strona**.
3. Dodaj lub zmień symbol strony:

Aby wyszukiwać symbol w zestawach symboli:


- Kliknij przycisk  **Wyszukiwanie symboli**.
- Otworzy się okno dialogowe Wyszukiwanie symboli.
- Wpisz w polu tekstowym, aby doprecyzować wyszukiwane hasła.

Opcjonalnie: Aby filtrować wyniki wyszukiwania, wybierz przycisk




Filtr symboli, następnie wybierz cechy, które chcesz zobaczyć w wynikach wyszukiwania symboli (dorosły, dziecko, kobieta, mężczyzna).

- Wybierz żądany symbol.
- Wybierz **Gotowe**.

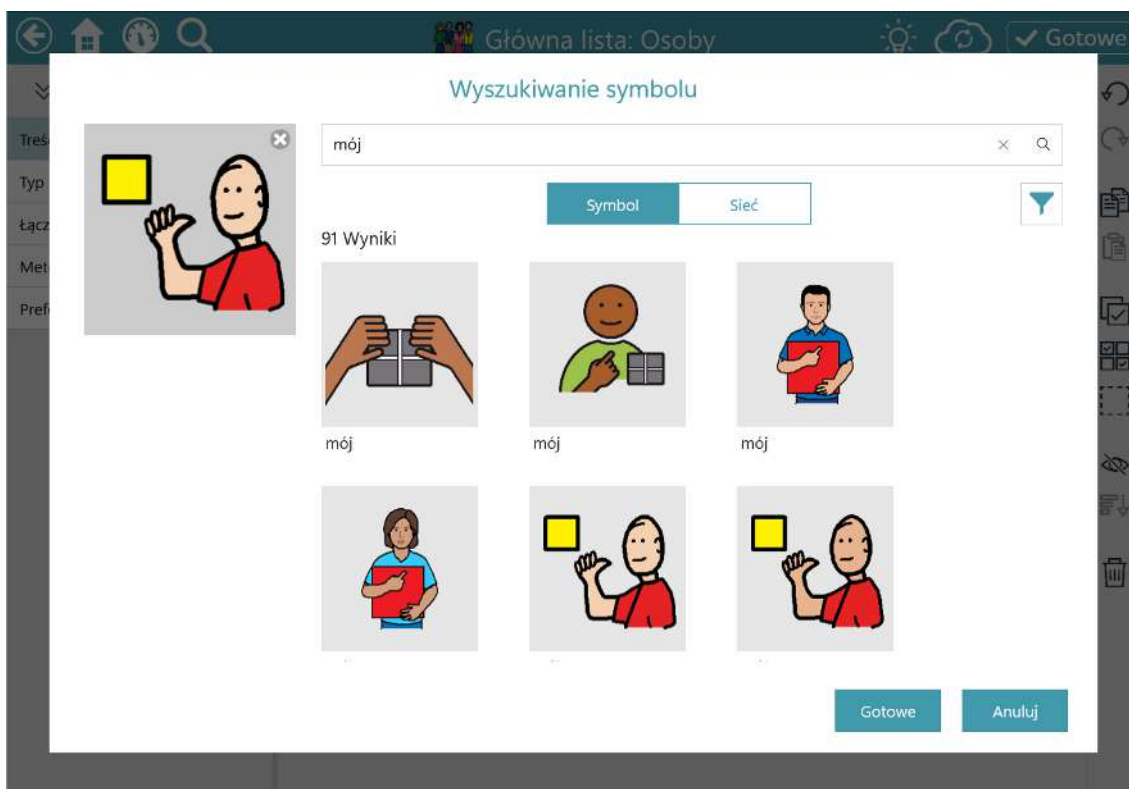

Aby wyszukać obraz w Internecie (wymagane połączenie z Internetem):

- Kliknij przycisk  **Wyszukiwanie symboli**.
Otworzy się okno dialogowe Wyszukiwanie symboli.
- Wybierz zakładkę **Sieć**, a następnie wprowadź wyszukiwane hasło w polu tekstowym.
- Wybierz żądany obraz.
- Wybierz **Gotowe**.

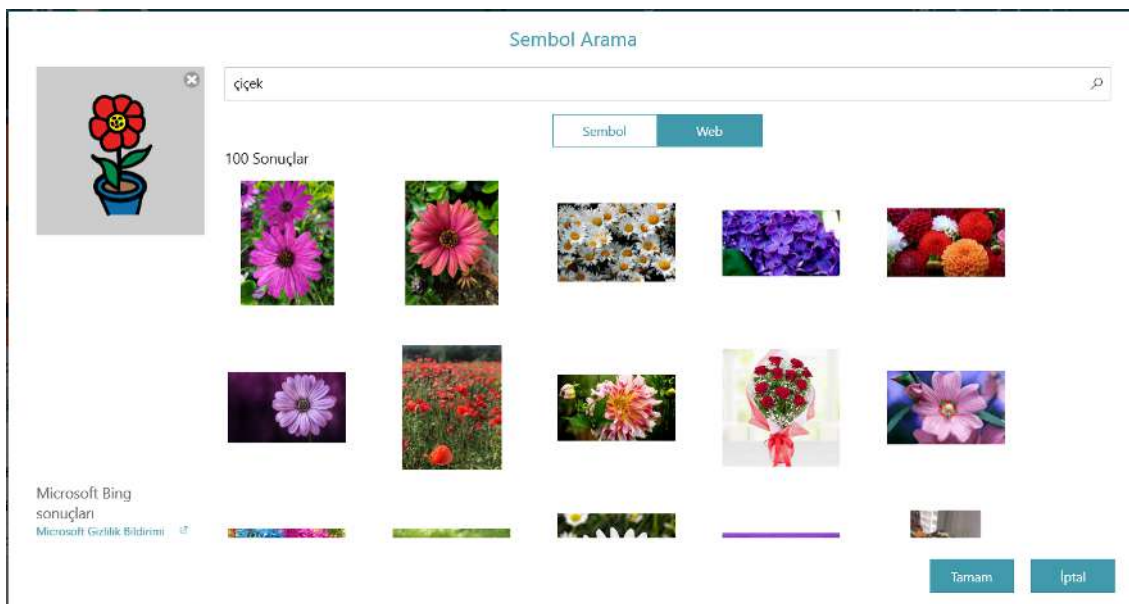

Aby użyć kamerę do zrobienia zdjęcia strony:



- Kliknij przycisk **Kamera**.
- Wybierz **Z kamery**.
- Użyj kamery na urządzeniu, aby zrobić zdjęcie.

Aby użyć obrazu zapisanego na urządzeniu lokalnym:



- Kliknij przycisk **Kamera**.
- Wybierz **Z biblioteki zdjęć**.
- Użyj przeglądarki plików, aby przejść dożądanego pliku obrazu.



Jeśli nie chcesz używać symbolu strony, wybierz **X** w polu Symbol strony.

9.15.3 Zasady języka strony

Ustawienie Zasady języka strony określa domyślne zasady języka dla przycisków na stronie. Ustawienie zasad języka kontroluje język, który będzie używany do wyszukiwania symboli, symbolizowania, predykcji słów, odmiany, automatycznego morfingu i głosu mówiącego (jeśli dla danego języka ustawiono głos specyficzny dla tego języka).

Przyciski dziedziczą domyślne ustawienie reguł językowych z ustawień na poziomie zestawu stron lub ustawień na poziomie strony. Po ustawieniu zasad języka strony wszystkie istniejące przyciski na stronie przyjmą to ustawienie, a nowe przyciski utworzone na stronie również przyjmą to ustawienie domyślne. Aby zmienić reguły językowe dla określonych przycisków, zobacz sekcję 9.11 *Zasady języka przycisku*, str 70.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Strona**.
3. Wybierz **Zasady języka**.
4. Wybierz język z listy:

- **Języki z pełną obsługą** — wpływa na wyszukiwanie symboli, symbolizowanie, predykcję słów, odmiany, automatycznego morfingu i głos mówiącego (jeśli dla danego języka ustawiono głos specyficzny dla tego języka).

Język neutralny jest używany głównie z nazwami własnymi (na przykład Albert Einstein lub Coca-Cola). Gdy słowa oznaczone jako neutralne zostaną wysłane do okna wiadomości, zostaną wypowiedziane zgodnie z regułami językowymi innych słów aktualnie znajdujących się w oknie wiadomości. Jeśli okno wiadomości jest puste, słowa neutralne zostaną wypowiedziane zgodnie z ustawieniami reguł zestawu stron.

- **Inne języki** — języki w tej kategorii mają różne poziomy wsparcia w ramach aplikacji TD Snap®.

9.15.4 Rozmiar tabeli strony



Domyślne ustawienie tego parametru znajduje się na karcie Ustawienia strony. Jeśli chcesz zastąpić domyślne ustawienie zestawu stron w tym przypadku, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wyl**. Aby dopasować to ustawienie do reszty zestawu stron, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wi**.

9.15.4.1 Zmień rozmiar tabeli strony



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Strona**.
3. Wybierz kategorię **Rozmiar siatki**.
4. Ustaw **Dopasuj ustawienia zestawu strony** na **Wyl**.
5. Kliknij **Rozmiar siatki**.
6. Wybierz rozmiar siatki z listy Zoptymalizowane rozmiary siatki lub ustaw liczbę wierszy i kolumn, aby utworzyć niestandardowy rozmiar siatki.



O ile nie tworzysz całkowicie niestandardowej strony, zdecydowanie zaleca się użycie zoptymalizowanych rozmiarów siatki zestawu stron. Zoptymalizowane rozmiary siatki będą wyświetlać wstępnie wypełnioną zawartość strony zaprojektowaną przez nasz zespół kliniczny, podczas gdy inne rozmiary siatki mogą tego nie robić.



Jeśli chcesz wyświetlić pasek komunikatu i/lub pasek narzędzi, musisz wybrać rozmiar siatki co najmniej 3x3.

Aby zmienić rozmiar odstępów między przyciskami, patrz sekcja 10.3.7 *Margines siatki zestawu stron*, str 87.

Tabela 11: Przykładowe rozmiary siatki (niekompletne)



2x3



3x4



6x6

9.15.5 Kolor tła planszy



Domyślne ustawienie tego parametru znajduje się na karcie Ustawienia strony. Jeśli chcesz zastąpić domyślne ustawienie zestawu stron w tym przypadku, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wył.** Aby dopasować to ustawienie do reszty zestawu stron, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wł.**

1. Przejdź do strony, dla której chcesz zmienić kolor tła.



Edytuj.

2. Kliknij przycisk
3. Kliknij kartę **Strona**.
4. Wybierz sekcję **Styl**.
5. Ustaw opcję Dopasuj kolor tła strony do ustawień strony na **Wył.**
6. Kliknij **Kolor**. Otworzy się lista kolorów tła strony.
7. Wybierz kolor.



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 *Kolory niestandardowe*, str 80.

9.15.6 Pokaż/ukryj pasek komunikatu



Domyślne ustawienie tego parametru znajduje się na karcie Ustawienia strony. Jeśli chcesz zastąpić domyślne ustawienie zestawu stron w tym przypadku, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wył.** Aby dopasować to ustawienie do reszty zestawu stron, ustaw opcję Dopasuj zestaw stron na **Wł.**

9.15.6.1 Zmień widoczność okna wiadomości



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Strona**.
3. Wybierz kategorię **Preferencje**.
4. Ustaw opcję **Dopasuj ustawienia zestawu strony** na **Wł.**, aby dopasować wskazane ustawienie lub **Wył.**, aby ustawić inną widoczność paska komunikatu na tej stronie.

9.15.7 Usuń stronę



Usunięcie jest operacją trwałą. Usuwać stronę tylko wtedy, gdy masz pewność, że nie będziesz już z niej korzystać w przyszłości.

1. Przejdź na stronę, którą chcesz usunąć.



2. Kliknij przycisk **Edytuj**.
3. Kliknij kartę **Strona**.
4. Wybierz **Usuń**. Otworzy się okno dialogowe Usuń stronę.
5. Kliknij przycisk **Usuń**, aby trwale usunąć stronę lub wybierz **Anuluj**, aby powrócić do ustawień strony bez jej usuwania.

9.15.8 Importuj/eksportuj strony

Zobacz sekcję 13.3 Pakiety stron, str 101.

9.16 Grupy skanowania

Grupa skanowania to obszar zawierający przyciski, które są skanowane jako pojedyncza jednostka. Po wybraniu grupy skanowania skanowane są przyciski znajdujące się w tym obszarze. Korzystanie z grup skanowania może znacznie przyspieszyć korzystanie z metody dostępu przez skanowanie.

Aby korzystać z grup skanowania, metoda dostępu Skanowanie musi być aktywna z włączonym ustawieniem Skanowanie grup. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 14.13.8 Opcje skanowania, str 120.

Tworzenie i edytowanie grup skanowania




1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Strona**.



3. Wybierz narzędzie **Grupy skanowania**.
Pierwsza grupa skanowania zostanie utworzona automatycznie.



4. Aby dodać obszary do grupy skanowania, wybierz narzędzie **Rysowanie**, a następnie kliknij (lub kliknij i przeciągnij) obszary strony, aby dodać je do grupy skanowania. Obszary mogą znajdować się w dowolnym miejscu na stronie i nie muszą się ze sobą stykać.

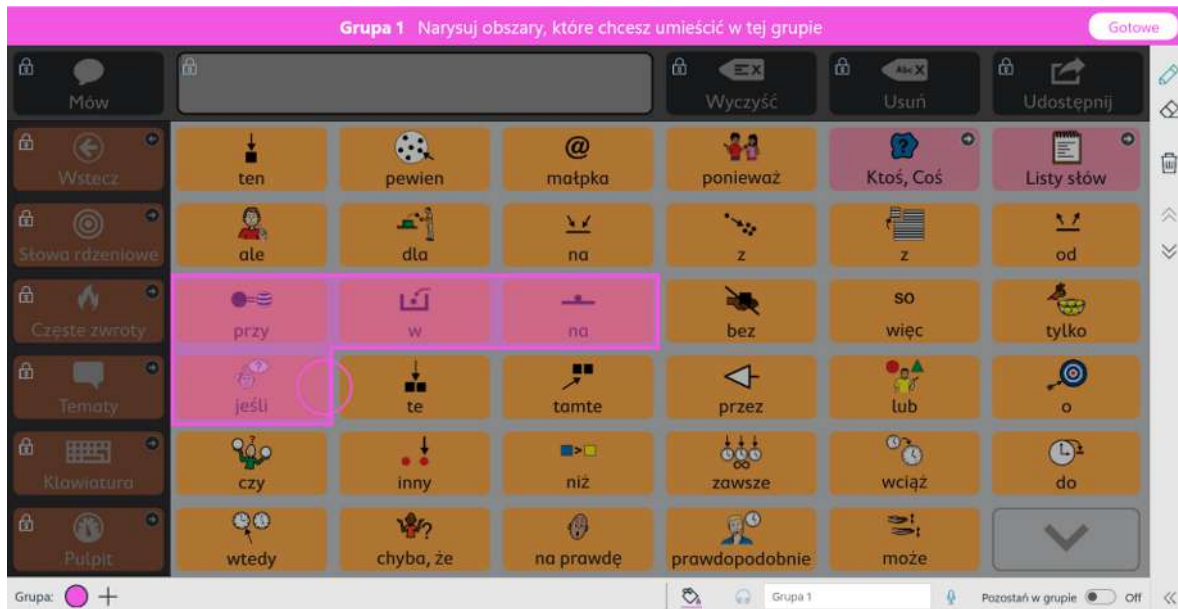

5. Aby usunąć obszary z grupy skanowania, wybierz narzędzie



Wymaż, a następnie kliknij każdy obszar,

który chcesz usunąć z grupy.
Nie można dodać paska komunikatu lub paska narzędzi do grupy skanowania. Dzieje się tak, ponieważ pasek komunikatu i pasek narzędzi są zawsze własnymi grupami skanowania.

Grupy skanowania są definiowane jako obszary strony, a nie konkretne przyciski. Jeśli przycisk zostanie przeniesiony, w nowym położeniu może należeć do innej grupy skanowania.

Sekwencja skanowania przebiega od lewej do prawej, od góry do dołu. Numery grup skanowania nie są powiązane z sekwencją skanowania.

Przyciski na stronie, które nie znajdują się w grupie skanowania, będą skanowane indywidualnie.


Grupy skanowania są powiązane z rozmiarem siatki.

6. Aby utworzyć nową grupę skanowania, wybierz przycisk



w lewym dolnym rogu.

7. Aby nawigować między grupami skanowania, wybierz kolorowy okrąg odpowiadający kolorowi grupy skanowania, którą chcesz edytować.

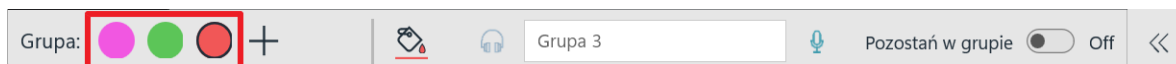

8. Aby usunąć grupę skanowania, najpierw wybierz grupę skanowania zgodnie z opisem w poprzednim kroku, a



następnie wybierz opcję

Usuń grupę skanowania.



Użyj strzałek **Przewiń w górę** i **Przewiń w dół**, aby przewinąć stronę.



9.16.1 Opcje grupy skanowania


Kolor grupy skanowania



- Wybierz narzędzie koloru , aby wybrać kolor dla bieżącej grupy skanowania. Kolory grupy skanowania są wyświetlane tylko w trybie edycji, a nie w trybie użycia.

Wskazówka audio grupy skanowania

- Tekst wprowadzony w polu Wskazówka audio zostanie odczytany podczas skanowania grupy (jeśli włączone jest ustawienie Mów wskazówkę audio).

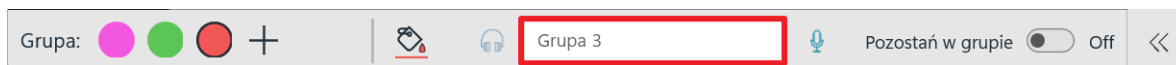

- Jeśli chcesz nagrać niestandardową wskazówkę audio, zobacz sekcję 9.6.3.2 *Utwórz nagranie*, str. 44.

Pozostań w grupie

- Po włączeniu tej funkcji skanowanie zostanie ponownie uruchomione w grupie skanowania po dokonaniu wyboru. Umożliwia to użytkownikom łatwe dokonywanie wielu wyborów w ramach tej samej grupy. Gdy opcja Pozostań w grupie jest wyłączona, po dokonaniu wyboru sekwencja skanowania zostanie ponownie uruchomiona na górze strony.

9.17 Edycja paska komunikatu

Zmiany paska komunikatu dotyczą całego zestawu stron.

9.17.1 Przenoszenie i zmiana rozmiaru obiektów na pasku komunikatu



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz obiekt (przycisk lub okno komunikatu) na pasku komunikatu, którego rozmiar chcesz zmienić.
3. Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz i przytrzymaj jedną z niebieskich kropek w rogach obiektu, a następnie przeciągnij dożądanego rozmiaru.
Aby przesunąć obiekt, wybierz i przytrzymaj środek obiektu, a następnie przeciągnij go w lewo lub w prawo na pasku komunikatu.




Okno komunikatu można powiększyć tylko do pustych komórek.

9.17.2 Dodawanie przycisków na pasku komunikatu



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz pustą komórkę na pasku komunikatu.
Jeśli na pasku komunikatu nie ma pustych komórek, dostępne są trzy opcje:
 - Zmniejszenie okna komunikatu. Zobacz sekcję 9.17.1 *Przenoszenie i zmiana rozmiaru obiektów na pasku komunikatu*, str 79.
 - Usunięcie jednego lub więcej przycisków na pasku komunikatu. Zobacz sekcję 9.17.3 *Usuwanie przycisków na pasku komunikatu*, str 79.
 - Zwiększenie rozmiaru siatki. Zobacz sekcję 10.2 *Rozmiar tabeli*, str 83.
3. Wybierz przycisk z menu, aby dodać go do paska komunikatu. Aby dowiedzieć się więcej o przyciskach paska komunikatu, zobacz sekcję 6 *Pasek komunikatu*, str 20.

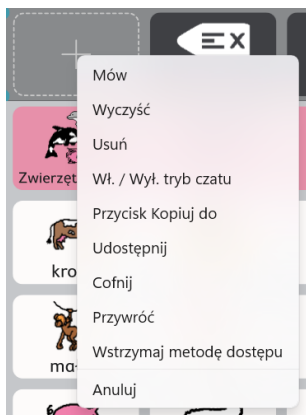

Ilustracja 39: Menu przycisków paska komunikatu

9.17.3 Usuwanie przycisków na pasku komunikatu



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz przycisk na pasku komunikatu.
3. Kliknij  **Usuń**.



Nie można usunąć okna komunikatu.

9.18 Edycja paska narzędzi



Ilustracja 40: Pasek narzędzi Core First, widoczny w trybie edycji, zawierający przyciski, ukryte przyciski i pustą komórkę.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Wybierz dowolny przycisk na pasku narzędzi, aby go edytować.
Może być konieczne przewinięcie, aby zobaczyć całą zawartość paska narzędzi lub uzyskać dostęp do pustych komórek na pasku narzędzi.
3. Kliknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij przyciski, aby zmienić ich kolejność na pasku narzędzi.



Nie można przeciągać przycisków między stroną a paskiem narzędzi.

9.19 Kolory niestandardowe

Kolory niestandardowe można tworzyć, edytować i zapisywać z dowolnego menu kolorów w aplikacji TD Snap®.

1. W trybie edycji wybierz obiekt, dla którego chcesz zmienić kolor.
2. Kliknij **Styl**.
3. Wybierz kolor elementu, który chcesz edytować (obramowanie, tło, tekst itp.).



4. Kliknij przycisk Edytuj kolor.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**, aby zapisać nowo utworzony kolor. Kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić bez zapisywania.

6. Zapisane kolory niestandardowe są dostępne w górnej części menu kolorów przy każdym otwarciu menu kolorów.

Aby usunąć zapisany kolor niestandardowy, wybierz kolor, a następnie kliknij  Usuń.



Aby zastosować zmiany kolorów do obiektów w całym zestawie stron, wybierz kartę **Zestaw stron**.

10 Ustawienia zestawu stron

10.1 Zestaw stron

10.1.1 Wybierz zestaw stron



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz wiersz w obszarze **Zestaw stron nazwy użytkownika**.
4. Wybierz zestaw stron z listy.

10.1.2 Utwórz nowy zestaw stron

Utwórz zestaw stron z wstępnie zainstalowanego, skopiowanego, lub istniejącego zestawu stron użytkownika lub lokalnego pliku



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz wiersz w obszarze **Zestaw stron nazwy użytkownika**.
4. Kliknij **Utwórz zestaw stron**.
Otworzy się okno dialogowe Wybierz zestaw stron.
5. Wybierz zestaw stron:
 - Zakładka Wstępnie zainstalowane zestawy stron
 - Są to gotowe zestawy stron już zainstalowane w TD Snap® na urządzeniu.
 - Zestawy stron użytkownika
 - Wybierz jeden z istniejących zestawów stron do użycia jako szablon (utwórz kopię).
 - Pliki lokalne
 - Zaimportuj plik zestawu stron (.sps) zapisany na urządzeniu lokalnym lub podłączonym dysku.
6. Kliknij **Dalej**, aby utworzyć nowy Zestaw Stron.
7. Wprowadź nazwę nowego zestawu stron.
8. Wybierz **Utwórz**, aby utworzyć zestaw stron. Wybierz **Anuluj**, aby powrócić do ustawień zestawu stron bez tworzenia nowego zestawu stron.

Pobierz zestaw stron z myTobiiDynavox



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz bieżący zestaw stron.
4. Kliknij **Pobierz zestaw stron**.
Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do myTobiiDynavox.
5. Wybierz zestaw stron z listy, a następnie kliknij **Pobierz**.
6. Po zakończeniu pobierania wprowadź nazwę zestawu stron, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

10.1.3 Zmiana nazwy zestawu stron i edytowanie opisu



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.



3. Na liście zestawów stron użytkownika wybierz przycisk **Edytuj** obok nazwy zestawu stron, którego nazwę chcesz zmienić. Otworzy się okno dialogowe Edycja informacji zestawu stron.
4. Edytuj tekst w polu **Nazwa** i/lub polu **Opis**.
5. Wybierz **Zapisz**, aby zapisać zmiany. Wybierz **Anuluj**, aby powrócić do listy zestawów stron bez zapisywania zmian.

10.1.4 Usuń zestaw plansz



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Na liście zestawów stron użytkownika wybierz przycisk  **Usuń** obok nazwy zestawu stron, który chcesz usunąć.
4. Wybierz czerwony przycisk **Usuń**.
5. Wybierz opcję **Usuń**, aby trwale usunąć zestaw stron. Wybierz **Anuluj**, aby powrócić do listy zestawów stron bez ich usuwania.



Nie można usunąć aktualnie aktywnego zestawu stron.

10.1.5 Ustawienie strony głównej



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz **Stronę główną**.
4. Wybierz stronę z listy.



Wpisz w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną stronę, lub wybierz Ostatnio otwierane, aby znaleźć ostatnio odwiedzaną stronę.

Zalecaną stroną główną dla siatek o rozmiarach od 1x1 do 2x3 jest Obsługiwana nawigacja. W przypadku siatki 3x3 i większych sugerowaną stroną główną są Kluczowe słowa.

10.1.6 Ustawienie strony klawiatury



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Kliknij **Strona klawiatury**.
4. Wybierz stronę z listy.



Wpisz w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną stronę, lub wybierz Ostatnio otwierane, aby znaleźć ostatnio odwiedzaną stronę.

Użyj hasła „klawiatura”, aby zawęzić wyniki wyszukiwania do stron Klawiatura.

10.2 Rozmiar tabeli



Niektóre zestawy stron, takie jak Motor Plan i P.O.D.D., wiążą określone rozmiary siatki z określonymi wersjami zestawu stron. Aby użyć innego rozmiaru siatki z tymi zestawami stron, należy wybrać inną wersję zestawu stron.

Rozmiar siatki wybrany w ustawieniach strony jest domyślnym rozmiarem siatki dla użytkownika. Wszystkie strony będą domyślnie miały rozmiar siatki wybrany w ustawieniach strony, chyba że określono inaczej w ustawieniach strony.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Rozmiar siatki**.
4. Wybierz rozmiar siatki z listy zoptymalizowanych rozmiarów siatki lub wybierz liczbę wierszy i kolumn, aby utworzyć niestandardowy rozmiar siatki.



O ile nie tworzysz całkowicie niestandardowej strony, zdecydowanie zaleca się użycie zoptymalizowanych rozmiarów siatki zestawu stron. Zoptymalizowane rozmiary siatki będą wyświetlać wstępnie wypełnioną zawartość strony zaprojektowaną przez nasz zespół kliniczny, podczas gdy inne rozmiary siatki mogą tego nie robić.



Jeśli chcesz wyświetlić pasek komunikatu i/lub pasek narzędzi, musisz wybrać rozmiar siatki co najmniej 3x3.

Aby zmienić rozmiar odstępów między przyciskami, patrz sekcja 10.3.7 *Margines siatki zestawu stron*, str 87.

Tabela 12: Przykładowe rozmiary siatki (niekompletne)



2x3



3x4



6x6

10.3 Styl zestawu stron

Ustawienia dokonane w polu Styl zestawu stron definiują wygląd zestawu stron. Wszystkie strony w zestawie stron, w tym nowe strony, będą używać tych ustawień stylu, chyba że zostaną one ręcznie zastąpione na poziomie strony lub przycisku.

10.3.1 Symbol odcienia skóry i koloru włosów

Ustawienie odcieni skóry i kolorów włosów używanych w symbolach przedstawiających ludzi. Ustawienie **Zróżnicowane**, które wykorzystuje różne odcienie skóry i kolory włosów, jest ustawieniem domyślnym. W przypadku wybrania określonego odcienia skóry lub koloru włosów, opcje te są używane dla wszystkich symboli.



Ustawienia symbolu odcienia skóry i koloru włosów **nie mają** zastosowania do poniższych elementów:

- Symbole przedstawiające konkretne osoby (celebrytów, postacie historyczne itp.)
- Symbole wyświetlane w aktywnościach Boardmaker otwieranych w TD Snap
- Zestaw symboli Snap Aphasia Photos
- Symbole edytowane w edytorze symboli


Jeśli w bieżącym zestawie stron używane są symbole METACOM, ustawienie koloru włosów jest niedostępne.




1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Kliknij **Odcień skóry** lub **Kolor włosów** w zakładce Styl.
5. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Nieustawiony** — Pokaż symbole tak, jak zostały pierwotnie zaprojektowane przez twórców symboli.
 - **Zróżnicowane** — Używaj różnych kolorów w swoich symbolach.
 - **Nowy** — Zaprojektuj niestandardowy kolor, który będzie stosowany do wszystkich symboli.
 - **Kolor** — Wybierz kolor z sekcji Kolory, aby zastosować go do wszystkich symboli.



Ilustracja 41: Nie ustawiono odcienia skóry i koloru włosów

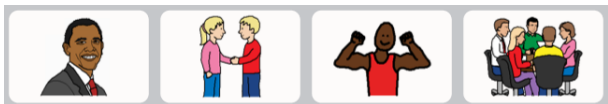

Ilustracja 42: Odcień skóry i kolor włosów ustawione na Zróżnicowany

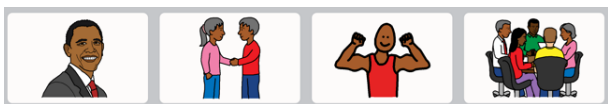

Ilustracja 43: Odcień skóry i kolor włosów ustawione na określone kolory



Poszczególne symbole można edytować za pomocą Edytora symboli. Zobacz sekcję 9.6.6 *Edytuj symbol*, str 47.

10.3.2 Czcionka opisów przycisków zestawu stron



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Czcionka** w sekcji Styl.
5. Wybierz czcionkę.

10.3.3 Wielkość czcionki opisów przycisków zestawu stron



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Czcionka** w sekcji Styl.
5. Wybierz rozmiar czcionki.

10.3.4 Pogrubienie opisów przycisków zestawu stron



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Pogrubienie** w sekcji Styl.
5. Ustaw pogrubienie na Wł. lub Wył.

10.3.5 Układ przycisków zestawu stron



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.

- Wybierz kategorię **Styl**.
- Wybierz **Układ przycisków** w sekcji Styl.
- Wybierz układ z listy.



Opis na górze, grafika na dole



Opis na dole, grafika na górze



Opis po lewej, grafika po prawej



Opis po prawej, grafika po lewej



Tylko opis



Tylko grafika

10.3.6 Wizualizacja łączy zestawu stron

Ustaw wygląd przycisków, które prowadzą do innych stron.

Tabela 13: Style wizualizacji linków

Brak	Nie wyświetlaj wizualizacji linków.	
Ikona nawigacji	W rogu przycisku pojawia się mała ikona wskazująca, co robi (link do innej strony, odwiedź stronę lub wróć).	

Folder dla łącza	Przycisk Łączy ma kształt folderu. Styl dotyczy tylko przycisków Łączy, a nie przycisków Wróć lub Odwiedź.	
Zakładka narożna dla łącza	Przycisk Link ma szary trójkąt w jednym rogu. Styl dotyczy tylko przycisków Link, a nie przycisków Wróć lub Odwiedź.	

10.3.7 Margines siatki zestawu stron

Ustaw rozmiar odstępów między przyciskami.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz opcję **Współczynnik marginesu siatki** w sekcji Margines siatki.
5. Wybierz rozmiar Współczynnika marginesu siatki.

10.3.8 Domyślne kolory tła zestawu stron



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz dowolny z poniższych wierszy, aby zmienić określony kolor tła:
 - **Tło strony** — Domyślny kolor tła strony.
 - **Tło paska narzędzi** — Domyślny kolor tła paska narzędzi.
 - **Tło paska komunikatu** — Domyślny kolor tła paska komunikatu (nie okna komunikatu).



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 *Kolory niestandardowe*, str 80.

10.3.9 Czcionka okna komunikatu zestawu stron



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Czcionka** w sekcji Okno komunikatu.
5. Wybierz czcionkę.

10.3.10 Rozmiar czcionki okna komunikatu zestawu stron



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Rozmiar czcionki** w sekcji Okno komunikatu.
5. Wybierz rozmiar czcionki.

10.3.11 Kolor tekstu okna komunikatu zestawu stron



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Kolor tekstu** w sekcji Okno komunikatu.
5. Wybierz kolor tekstu.



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 *Kolory niestandardowe*, str 80.

10.3.12 Kolor tła okna komunikatu zestawu stron



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Tło** w sekcji Okno komunikatu.
5. Wybierz kolor.



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 *Kolory niestandardowe*, str 80.

10.3.13 Kolor podkreślenia mowy w oknie komunikatu zestawu stron



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Kolor podświetlenia mowy** w sekcji Okno komunikatu.
5. Wybierz kolor.



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 *Kolory niestandardowe*, str 80.

10.3.14 Kolor tła paska komunikatu dla zestawu stron



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz kategorię **Styl**.
4. Wybierz **Tło paska komunikatu** w sekcji Okno komunikatu.

- Wybierz kolor.



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 Kolory niestandardowe, str 80.

10.3.15 Styl przycisku nawigacji



Edytuj.

- Kliknij przycisk
- Kliknij kartę **Zestaw stron**.
- Wybierz kategorię **Styl**.
- Wybierz **Styl przycisków nawigacji** w sekcji Przyciski nawigacji.
- Gdy opcja Automatyczne jest włączona, kolory są automatycznie konfigurowane pod kątem kontrastu i widoczności w odniesieniu do koloru tła strony. Gdy opcja Automatyczne jest wyłączona, użytkownik ustawia kolor tła przycisku nawigacji, kolor obramowania, kolor strzałki i grubość obramowania, które mają być używane w całym zestawie stron.



Możesz tworzyć własne kolory! Zobacz sekcję 9.19 Kolory niestandardowe, str 80.

10.4 Preferencje zestawu stron



Edytuj.

- Kliknij przycisk
- Kliknij kartę **Zestaw stron**.
- Kliknij **Preferencje**.
- Wybierz dowolną z poniższych opcji, aby zmienić określone ustawienie:
 - Interfejs
 - Pasek komunikatu wł.:** Po włączeniu pasek komunikatu jest domyślnie wyświetlany na każdej stronie.
 - Lokalizacja paska narzędzi:** Wybierz wyświetlanie paska narzędzi po lewej lub prawej stronie każdej strony lub wyłączenie paska narzędzi.
 - Wiersze paska narzędzi
 - Dopasuj ustawienia zestawu stron:** Po włączeniu tego ustawienia liczba wierszy dostępnych na pasku narzędzi będzie zgodna z liczbą wierszy w wybranym zestawie stron. Aby zmienić liczbę wierszy na pasku narzędzi niezależnie od rozmiaru siatki zestawu stron, należy wyłączyć to ustawienie i ustawić żądaną liczbę wierszy.
 - Okno komunikatu
 - Automatycznie odmieniaj przyciski gramatyki:** Po włączeniu tej funkcji przyciski gramatyki będą dynamicznie aktualizowane, aby dopasować się do kontekstu gramatycznego zawartości okna komunikatu.
 - Automatycznie twórz formy skrócone:** Po włączeniu tej funkcji kolejne wyrazy będą łączone w celu utworzenia wspólnych skrótów lub wyrazów złożonych.
 - Grupy skanowania zestawów stron
 - 1. xxx, 2. yyy, 3. zzz:** Umożliwia ustawienie kolejności skanowania grup skanowania zestawu stron: stron, paska narzędzi i paska komunikatu. Umożliwia ustawienie opcji kolejności skanowania, wskazówek audio i opcji Pozostań w grupie dla grup skanowania zestawu stron: Strona, Pasek narzędzi i Pasek komunikatu.

10.5 Przyciski adaptacyjne



Ta sekcja dotyczy wyłącznie urządzeń Tobii Dynavox I-13 i I-16.


Przyciski adaptacyjne znajdujące się z przodu urządzeń I-13 i I-16 firmy Tobii Dynavox można wybierać za pomocą

dotyku lub interakcji wzrokowej. Do dwóch z tych przycisków, przycisków  i , można zaprogramować akcje TD Snap®, które zostaną wykonane po wybraniu ich za pomocą Interakcji wzrokowej podczas korzystania z TD Snap®.

Ustawianie akcji interakcji wzrokowej przycisku adaptacyjnego



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Kliknij **Przyciski adaptacyjne**.

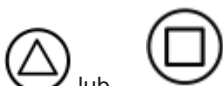

4. Wybierz  lub  z listy.
5. Kliknij **Dodaj akcję**.
6. Wybierz akcję.

 Aby dodać dodatkowe akcje, powtórz kroki 5 i 6.

Ustawianie akcji dotykowych przycisków adaptacyjnych

 Zachowanie dotyku przycisku adaptacyjnego ustawia się w aplikacji Ustawienia sprzętowe firmy Tobii Dynavox. Aplikację tę można uruchomić bezpośrednio za pomocą skrótu znajdującego się na pulpicie lub za pomocą pakietu TD Snap®, jak opisano poniżej.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Kliknij **Przyciski adaptacyjne**.
4. Kliknij **Ustawianie akcji dla dotyku**. Uruchomi się aplikacja Ustawienia sprzętu firmy Tobii Dynavox.
5. Użyj rozwijanego menu w aplikacji Ustawienia sprzętu, aby wybrać działania dla przycisków adaptacyjnych po ich wybraniu za pomocą funkcji dotykowych.

 Zachowanie dotyku przycisku adaptacyjnego ustawia się w aplikacji Ustawienia sprzętowe firmy Tobii Dynavox. Aplikację tę można uruchomić bezpośrednio za pomocą skrótu znajdującego się na pulpicie lub za pomocą pakietu TD Snap®, jak opisano poniżej.

10.6 Informacje o zestawie stron

W tej sekcji wyświetlany jest numer wersji zestawu stron i Ustawienia twórcy zawartości.

10.6.1 Ustawienia twórcy zawartości zestawu stron

Specjalne ustawienia dla zaawansowanych twórców zestawów stron.

10.6.1.1 Ustaw zoptymalizowane rozmiary tabeli

Ustawienie rozmiarów siatki wyświetlanych na liście Zoptymalizowane rozmiary siatki dla tego zestawu stron.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Kliknij **Informacje**.
4. Kliknij **Ustawienia twórcy zawartości**.

5. Kliknij **Rozmiary siatki**.
6. Aby dodać rozmiar siatki do listy, przewiń w prawo i wybierz **Dodaj nowy rozmiar**. Otworzy się okno dialogowe Dodaj zoptymalizowany rozmiar siatki.
7. Wybierz liczbę **wierszy** i **kolumn** dla nowego zoptymalizowanego rozmiaru siatki (do 15 x 15), a następnie wybierz **Zapisz**.
8. Aby usunąć zoptymalizowany rozmiar siatki, wybierz ikonę **Usuń** na rozmiarze siatki na liście. Pojawi się ostrzeżenie Usuń rozmiar siatki. Jeśli jesteś pewien, że chcesz usunąć rozmiar siatki, wybierz **Usuń**. W przeciwnym razie wybierz **Anuluj**, aby zamknąć ostrzeżenie bez usuwania.

10.6.1.2 Zasady języka zestawu stron

Ustawienie Zasady języka zestawu stron określa domyślne zasady języka dla przycisków i stron w zestawie stron. Ustawienie zasad języka kontroluje język, który będzie używany do wyszukiwania symboli, symbolizowania, przewidywania słów, odmiany, automatycznego morfingu i głosu mówiącego (jeśli dla danego języka ustawiono głos specyficzny dla tego języka).

Przyciski dziedziczą domyślne ustawienie reguł językowych z ustawień na poziomie zestawu stron lub ustawień na poziomie strony. Po ustawieniu zasad języka zestawu stron, wszystkie istniejące przyciski w zestawie stron przyjmą to ustawienie, a nowe przyciski utworzone w zestawie stron również przyjmą to ustawienie domyślne. Aby zmienić reguły językowe dla określonych stron w zestawie stron, zobacz sekcję 9.15.3 *Zasady języka strony*, str 75. Aby zmienić zasady języka dla określonych przycisków, zobacz sekcję 9.11 *Zasady języka przycisku*, str 70.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Kliknij **Informacje**.
4. Kliknij **Ustawienia twórcy zawartości**.
5. Wybierz **Zasady języka**.
6. Wybierz język z listy:
 - **Języki z pełną obsługą** — wpływa na wyszukiwanie symboli, symbolizowanie, predykcję słów, odmiany, automatycznego morfingu i głos mówiącego (jeśli dla danego języka ustawiono głos specyficzny dla tego języka).
 - **Inne języki** — języki w tej kategorii mają różne poziomy wsparcia w ramach aplikacji TD Snap®.

11 Drukuj

Drukowanie jednej lub więcej stron na papierze lub w formacie PDF.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Strona**.



3. Wybierz **Drukuj** na pasku narzędzi edycji po prawej stronie ekranu. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz strony do drukowania.
Możesz także drukować z sekcji **Drukuj strony** na karcie Strona.
4. Bieżąca strona jest domyślnie dodawana do kolejki drukowania. Wybierz dodatkowe strony z listy, aby dodać je do kolejki drukowania.
 - Wpisz w polu wyszukiwania, aby wyszukać według nazwy strony.
 - Aby dodać wszystkie strony z bieżących wyników wyszukiwania do kolejki drukowania, zaznacz opcję **Wybierz wszystkie**.
 - Jeśli zaznaczysz opcję Wybierz wszystkie, a następnie usuniesz jej zaznaczenie, kolejka drukowania zostanie zresetowana.
 - Aby usunąć strony z kolejki drukowania, kliknij **X** obok nazwy strony.
5. Po dodaniu żądanych stron do kolejki drukowania wybierz opcję **Dalej**.



6. Wybierz opcje drukowania. Podgląd strony zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić bieżące ustawienia.



- **Pasek komunikatu:** Wyłącz to ustawienie, aby ukryć pasek komunikatu na drukowanych stronach.
 - **Pasek narzędzi:** Wyłącz to ustawienie, aby ukryć pasek narzędzi na drukowanych stronach.
 - **Wizualizacja linków:** Wyłącz to ustawienie, aby ukryć ikony wskaźników łączy na przyciskach łączy na drukowanych stronach.
 - **Liczniki użycia przycisków:** Włącz to ustawienie, aby wyświetlać bieżącą liczbę użyc przycisków na drukowanych stronach. Uwaga: aby wyświetlić liczbę użyc przycisków, należy włączyć śledzenie danych.
7. Po zakończeniu wybierania opcji drukowania wybierz opcję **Drukuj**.
 8. Wybierz drukarkę (lub drukowanie do pliku PDF), ustawienia kolorów i orientację strony. Opcje rozmiaru papieru są dostępne w sekcji **Więcej ustawień**.

Uwaga: To okno dialogowe będzie się różnić w zależności od platformy i domyślnych ustawień drukarki.

Po zakończeniu konfigurowania ustawień drukarki wybierz opcję **Drukuj**.



12 Asystent Google

Odkryj korzyści płynące z posiadania inteligentnego asystenta dzięki integracji Asystenta Google z TD Snap®. Natychmiastowy dostęp z poziomu oprogramowania do informacji, rozrywki, kontroli środowiska i nie tylko



Przeciwwskazania: TD Snap®, Asystent Google i wszelkie powiązane inteligentne urządzenia nigdy nie powinny być dla użytkownika jedynym sposobem przekazywania ważnych informacji.



TD Snap®, Asystent Google i wszelkie powiązane inteligentne urządzenia lub głośniki nie mogą być używane jako urządzenia podtrzymujące życie lub do innych krytycznych celów i nie można na nich polegać w przypadku utraty funkcji z powodu utraty zasilania lub innych przyczyn.



Tobii Dynavox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie jakiegokolwiek użytkownika i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty i/lub szkody (w tym między innymi szkody majątkowe, obrażenia ciała i śmierć) związane z korzystaniem z TD Snap®, Asystenta Google, inteligentnych urządzeń, głośników lub jakiejkolwiek ich kombinacji.



W przypadku korzystania z jakiegokolwiek innego sprzętu poza zewnętrznym głośnikiem Google Speaker konieczne jest posiadanie otwartego urządzenia komunikacyjnego. Aby uzyskać pomoc w otwarciu urządzenia, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Tobii Dynavox.

12.1 Podłącz swoje konto Google

Aby korzystać z Asystenta Google, inteligentnych głośników i inteligentnych urządzeń, musisz najpierw zalogować się na swoje konto Google w TD Snap®. Zobacz sekcję *14.11 Konto Google, str 111*.

12.2 Skonfiguruj urządzenia Google

Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzeń, aby przeprowadzić ich pełną konfigurację przed rozpoczęciem korzystania z TD Snap®.

12.3 Obsługa języka Asystenta Google

Ważne jest, aby skonfigurować w Asystencie Google te same języki, które są używane w TD Snap®.



Przed zmianą języka Asystenta Google należy upewnić się, że urządzenie mobilne lub tablet są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi lub połączone z tym samym kontem, co Google Nest, głośnik Google Home lub inne urządzenie obsługujące Asystenta Google.

Aby zmienić język Asystenta Google:

1. Na urządzeniu mobilnym otwórz aplikację **Google Home** lub **Google Assistant**.
2. W prawym górnym rogu wybierz swoje konto > **Ustawienia asystenta**.
3. Wybierz **Asystent** > **Języki**.
4. Kliknij aktualny język.
5. Wybierz nowy język.

Aby dodać do Asystenta drugi język:

1. Na urządzeniu mobilnym otwórz aplikację **Google Home** lub **Google Assistant**.
2. W prawym górnym rogu wybierz swoje konto > **Ustawienia asystenta**.
3. Wybierz **Asystent** > **Języki**. > **Dodaj język**.
4. Wybierz kolejny język.



Z Asystentem Google można rozmawiać w każdym z tych języków, ale nie można łączyć obu języków w ramach tej samej wypowiedzi.

12.4 Mów do Asystenta Google

Zachęcamy do rozpoczęcia od naszych stron Asystenta Google*. Strony te znajdują się w Pulpicie większości zestawów stron lub można je pobrać i zaimportować z mytobiidynavox.com/PagesetCentral. Strony Asystenta Google zawierają przyciski umożliwiające korzystanie z Asystenta Google do wyszukiwania informacji, odtwarzania muzyki, wykonywania połączeń telefonicznych, sterowania domem i nie tylko.

**Asystent Google i strony Asystenta Google nie są dostępne we wszystkich lokalizacjach i językach.*

Aby utworzyć własne przyciski Asystenta Google, patrz poniżej.



Aby korzystać z Asystenta Google, musisz mieć połączenie z Internetem i być zalogowany na swoje konto Google w TD Snap® oraz na wszystkich urządzeniach połączonych z Asystentem Google, których planujesz używać.

W zależności od posiadanego sprzętu, polecenia Asystenta Google będą wysyłane w nieco inny sposób. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi używanego sprzętu. Sprawdź poniższe ikony, aby znaleźć odpowiednie kroki.

	Tylko konto Google Assistant, bez dodatkowego wyposażenia.
	Google Nest Mini lub inny głośnik Google.



Utwórz przycisk, który wyśle zaprogramowane polecenie Asystenta Google do głośnika Google

Ta opcja jest najlepsza dla poleceń Asystenta Google, które będą używane więcej niż jeden raz.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. W polu Komunikat  wpisz polecenie, które chcesz wysłać do Asystenta Google. Komunikat musi zaczynać się od „Ok Google”, po którym następuje pytanie lub polecenie.
4. W sekcji Akcje wybierz akcję **Mów lub Wstaw wiadomość**.
5. Wybierz opcję **Zawsze mów**.



Aby wysłać unikalne polecenia Asystenta Google w locie, wykonaj powyższe kroki, aby utworzyć przycisk, który zawiera tylko komunikat „Ok Google”. W trybie obsługi skomponuj polecenie Asystenta Google w oknie komunikatu, wybierz przycisk Ok Google, a następnie wypowiedz okno komunikatu, aby wysłać polecenie.



Utwórz przycisk, który wysła tekst komunikatu przycisku do Asystenta Google na Twoim urządzeniu

Ta opcja jest najlepsza dla poleceń Asystenta Google, które będą używane więcej niż jeden raz.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. W polu Komunikat  wpisz pytanie lub polecenie, które chcesz wysłać do Asystenta Google. Nie wpisuj „Ok Google” przed pytaniem lub poleceniem.
4. Kliknij **Dodaj akcję**.
5. Przewiń w dół do sekcji Kontrola otoczenia i wybierz opcję **Wyślij polecenie Asystenta Google**.
6. Kliknij **Wysyłanie tekstu komunikatu przycisku do Asystenta Google**.



Utwórz przycisk, który wysła tekst okna komunikatu do Asystenta Google na Twoim urządzeniu

Ten rodzaj przycisku pozwoli użytkownikowi komponować unikalne polecenia Asystenta Google w oknie komunikatu, a następnie wysłać je do Asystenta Google.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Wybierz przycisk.
3. Kliknij **Dodaj akcję**.
4. Przewiń w dół do sekcji Kontrola otoczenia i wybierz opcję **Wyślij polecenie Asystenta Google**.
5. Kliknij **Wysyłanie bieżącego tekstu okna komunikatu do Asystenta Google**.



Jeśli nie uzyskasz oczekiwanego rezultatu, spróbuj użyć innego sformułowania. Na przykład „Ok Google, włącz światło” nie włączyło inteligentnej żarówki. Zamiast tego „Ok Google, włącz światło w pokoju rodzinnym” włączyło inteligentną żarówkę, ponieważ została ona skonfigurowana w pokoju rodzinnym w aplikacji Google Home.

13 Udostępnianie i zapisywanie

TD Snap® oferuje kilka wygodnych sposobów udostępniania i zapisywania użytkowników, zestawów stron i pojedynczych stron. Oferujemy te możliwości niezależnie od tego, czy chcesz zachować spójność zestawu stron na wszystkich urządzeniach, czy też wysłać kilka nowych stron znajomemu!

- **Eksport/Import lokalny** (Użytkownik, Zestaw stron, Pakiet stron) - użyj w przypadku przechowywania pliku na komputerze lokalnym, udostępniania na dysku USB lub osobom, które nie mają konta myTobiiDynavox.
- **Eksport/Import przez konto myTobiiDynavox*** (zestaw stron, pakiet stron) — Udostępniaj zestawy stron i pakiety stron innym użytkownikom myTobiiDynavox. Prywatne przechowywanie i dostęp do plików na własnym koncie myTobiiDynavox.
- **Synchronizacja*** (zestaw stron) — Udostępniaj bieżące zmiany w zestawie stron na swoich urządzeniach i określonym użytkownikom myTobiiDynavox. Zestaw stron udostępniony poprzez synchronizację utrzymuje aktualną wersję zestawu stron w chmurze, dzięki czemu zmiany wprowadzone w zestawie stron na dowolnym zatwierdzonym urządzeniu/kontach są udostępniane na wszystkich zsynchronizowanych urządzeniach/kontach dla tego zestawu stron.

*Te metody udostępniania wymagają aktywnego połączenia internetowego.

Tabela 14: Typy plików do udostępniania i zapisywania – co zawierają

Typ pliku	Strony	Preferencje stron	Preferencje zestawu stron	Preferencje użytkownika	Preferencje systemowe
Użytkownik	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
Zestaw stron	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Pakiet stron	Tak (określone strony)	Tak	Nie	Nie	Nie

13.1 Użytkownicy

Pliki kopii zapasowych użytkowników zawierają zestawy stron i ustawienia powiązane z danym użytkownikiem. Pliki kopii zapasowej użytkownika nie zawierają głosów. Ustawienia głosu są jednak zachowywane, a wybrany głos zostanie pobrany automatycznie, jeśli nie jest dostępny na urządzeniu (wymagane połączenie internetowe).

Kopia zapasowa użytkownika

Zobacz sekcję 14.3 Kopia zapasowa użytkownika, str 104.

Przywracanie użytkownika

Zobacz sekcję 14.4 Przywracanie użytkownika, str 105.

13.2 Zestawy stron

Plik zestawu stron zawiera wszystkie strony powiązane z tym zestawem. Nie zawiera żadnych informacji o użytkowniku ani ustawień na poziomie użytkownika.

13.2.1 Import zestawu stron

Z konta myTobiiDynavox



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.
3. Wybierz bieżący zestaw stron.
4. Kliknij **Pobierz zestaw stron**.

Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do myTobiiDynavox.

- Wybierz zestaw stron z listy, a następnie kliknij **Pobierz**.
- Po zakończeniu pobierania wprowadź nazwę zestawu stron, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Z pliku lokalnego



- Kliknij przycisk **Edytuj**.
- Kliknij kartę **Zestaw stron**.
- Wybierz bieżący zestaw stron.
- Kliknij **Utwórz zestaw stron**.
- Kliknij zakładkę **Pliki lokalne**.
- Wybierz **Przeglądaj**.
- Przejdź dożądanego pliku .sps, wybierz go, a następnie kliknij **Otwórz**.
- Wybierz **Dalej**.
- Wprowadź unikalną nazwę zestawu stron, a następnie wybierz opcję **Utwórz**.

13.2.2 Zapisywanie kopii zestawu stron

13.2.2.1 Zapisz zestaw stron w myTobiiDynavox

Pliki zestawów stron zapisane w myTobiiDynavox można znaleźć na stronie myTobiiDynavox.com w zakładce **Moje rzeczy > Snap > Zestawy stron**.



- Kliknij przycisk **Edytuj**.
- Kliknij kartę **Zestaw stron**.
- Wybierz bieżący zestaw stron.
- Kliknij ikonę  **Zapisz** obok zestawu stron, który chcesz zapisać.
- Kliknij **Zapisz kopię w myTobiiDynavox**.
- Wprowadź unikalną nazwę zestawu stron i (opcjonalnie) opis, a następnie wybierz **Zapisz**.
- Pasek statusu pokazuje postęp zapisywania. Po zakończeniu wybierz **Gotowe**.



Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do myTobiiDynavox.

13.2.2.2 Lokalne zapisywanie zestawu stron



- Kliknij przycisk **Edytuj**.
- Kliknij kartę **Zestaw stron**.
- Wybierz bieżący zestaw stron.
- Kliknij ikonę  **Zapisz** obok zestawu stron, który chcesz zapisać.
- Kliknij **Zapisz kopię w lokalnym pliku**.
- Wprowadź unikalną nazwę zestawu stron i (opcjonalnie) opis, a następnie wybierz **Dalej**.
- Kliknij **Przeglądaj**. Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać plik zestawu stron, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
- Kliknij **Zapisz**.
- Pasek statusu pokazuje postęp zapisywania. Po zakończeniu wybierz **Gotowe**.

13.2.3 Udostępnianie kopii zestawu stron (przez myTobiiDynavox)



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.

2. Kliknij kartę **Zestaw stron**.



3. Kliknij ikonę **Udostępnij zestaw stron** obok zestawu stron, który chcesz udostępnić.

4. Kliknij **Udostępnij kopię**.

5. Wprowadź unikalną nazwę zestawu stron i (opcjonalnie) opis, a następnie wybierz **Dalej**.

6. Wprowadź nazwę użytkownika myTobiiDynavox lub konto e-mail osoby, do której wysyłasz zestaw stron, a następnie wybierz **+**, aby dodać ją do listy odbiorców. Powtórz ten proces, aby dodać dodatkowych odbiorców. Po dodaniu wszystkich odbiorców kliknij **Udostępnij**.

7. Pasek statusu pokazuje postęp udostępniania. Po zakończeniu wybierz **Gotowe**.



Jeśli chcesz zapisać kopię zestawu stron lokalnie (w celu udostępnienia za pośrednictwem napędu USB, poczty e-mail itp.), zobacz sekcję *13.2.2.2 Lokalne zapisywanie zestawu stron, str 97*.

13.2.4 Synchronizuj zestaw stron

Synchronizacja jest prostym sposobem zarządzania jedną wersją zestawu stron na wielu urządzeniach. Synchronizacja powoduje zapisanie zaktualizowanej wersji zestawu stron w chmurze. Naciśnięcie przycisku Synchronizuj powoduje wysłanie zmian wprowadzonych w zestawie stron na urządzeniu lokalnym, a także odebranie wszelkich zmian wprowadzonych na innych (zsynchronizowanych) urządzeniach*. Gdy wszystkie urządzenia zostaną zsynchronizowane, będą miały identyczną wersję zestawu stron.

Przycisk synchronizacji na górnym pasku pozwala zorientować się o dostępności zaktualizowanej wersji zestawu strony lub lokalnych zmian, które można przesłać do chmury.

*Synchronizacja nie obsługuje scalania zmian z wielu urządzeń na tej samej stronie w ramach tej samej synchronizacji. Jeśli zmiany dotyczące jednej strony zostaną wprowadzone na wielu urządzeniach, wersja z ostatniego synchronizowanego urządzenia zastąpi wszystkie wcześniejsze. Osoby edytujące zsynchronizowany zestaw stron powinny informować się o tym, które strony edytują i często je synchronizować, aby uniknąć synchronizowania zmian na tej samej stronie w tym samym czasie.



W przypadku synchronizacji między wieloma urządzeniami lub użytkownikami ustawienie typu nawigacji musi być zgodne dla wszystkich synchronizowanych urządzeń/użytkowników. Zobacz sekcję *14.13 Access Method, str 113*.



Synchronizacja działa z zestawami stron do 1 GB. Zestawy stron przekraczające 1 GB nie będą synchronizowane.

13.2.4.1 Synchronizacja zestawu stron z kontem myTobiiDynavox

Po zsynchronizowaniu zestawu stron z myTobiiDynavox, jego kopia będzie przechowywana na serwerze myTobiiDynavox. Możesz użyć tego jako szybkiego i łatwego systemu tworzenia kopii zapasowych zestawu stron, a jeśli masz inne urządzenia z oprogramowaniem TD Snap®, możesz zsynchronizować zestaw stron również na tych urządzeniach.

Konfigurowanie zestawu stron do synchronizacji



1. Kliknij przycisk **Synchronizuj** na górnym pasku. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła myTobiiDynavox.

2. Kliknij **Synchronizuj**.

3. To wszystko! Twój zestaw stron jest teraz zsynchronizowany z Twoim kontem myTobiiDynavox.



Przy każdej edycji zestawu stron należy kliknąć przycisk Synchronizuj na górnym pasku, aby wysłać zmiany do chmury.

Synchronizacja zestawu stron na dodatkowych urządzeniach

Jeśli zestaw stron jest już skonfigurowany do synchronizacji na jednym z urządzeń, można zsynchronizować dodatkowe urządzenia, wykonując poniższe czynności na każdym z nich.



1. Kliknij przycisk **Synchronizuj** na górnym pasku. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła myTobiiDynavox.



2. Kliknij ikonę **Pobierz zestaw stron.**
3. Wybierz zestaw stron, który chcesz pobrać i zsynchronizować, a następnie wybierz opcję **Pobierz.**
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Gotowe.**
Pobrane zsynchronizowany zestaw stron jest automatycznie ustawiany jako aktywny zestaw stron.



Przy każdej edycji zestawu stron należy wybrać przycisk Synchronizuj na górnym pasku, aby wysłać te zmiany do chmury i udostępnić zaktualizowany zestaw stron innym urządzeniom do synchronizacji. Najlepszą praktyką jest synchronizacja przed wprowadzeniem zmian w zestawie stron, a następnie ponowna synchronizacja po zakończeniu edycji.

13.2.4.2 Zaproszenie innych osób do synchronizacji zestawu stron

Gdy inni użytkownicy myTobiiDynavox synchronizują się z Twoim zestawem stron, mogą wprowadzać zmiany w zestawie stron na swoich urządzeniach i synchronizować te zmiany z chmurą. Następnym razem, gdy zsynchronizujesz się na swoim urządzeniu, otrzymasz ich zmiany. Podobnie, gdy wprowadzisz zmiany w zestawie stron, a następnie je zsynchronizujesz, zmiany te będą dostępne dla innych użytkowników, którym zezwoliłeś na synchronizację z zestawem stron.

Synchronizacja nie może scalać zmian od wielu użytkowników, którzy edytowali tę samą stronę w tym samym czasie. W takiej sytuacji użytkownik, który jako ostatni dokonał synchronizacji, nadpisze stronę swoją wersją. Powinieneś synchronizować bezpośrednio przed i po wprowadzeniu zmian w zestawie stron i komunikować się z innymi użytkownikami, którzy synchronizują się z Twoim zestawem stron, aby uniknąć edytowania tej samej strony w tym samym czasie.

Powinieneś synchronizować się tylko z zaufanymi osobami, aby wprowadzić odpowiednie zmiany w swoim zestawie stron.



Przy każdej edycji zestawu stron należy wybrać przycisk Synchronizuj na górnym pasku, aby wysłać te zmiany do chmury i udostępnić zaktualizowany zestaw stron innym urządzeniom lub użytkownikom do synchronizacji.



Najlepszą praktyką jest synchronizacja przed wprowadzeniem zmian w zestawie stron, a następnie ponowna synchronizacja po zakończeniu edycji.



1. Kliknij przycisk **Synchronizuj** na górnym pasku. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła myTobiiDynavox.



2. Kliknij ikonę **Udostępnij zestaw stron.**
3. Wprowadź nazwę użytkownika myTobiiDynavox lub adres e-mail osoby, której udostępniasz zestaw stron, a następnie wybierz **+**, aby dodać ją do listy odbiorców. Powtórz ten proces, aby dodać dodatkowych odbiorców. Po dodaniu wszystkich odbiorców kliknij **Udostępnij.**
4. Po zakończeniu procesu udostępniania wybierz **Gotowe.** Odbiorcy otrzymają powiadomienia o udostępnieniu za pośrednictwem poczty e-mail i TD Snap®.



Alerty synchronizacji mogą pojawić się do godziny po wysłaniu zaproszenia. Powiadomienia można sprawdzić w dowolnym momencie, wybierając ikonę synchronizacji.

13.2.4.2.1 Cofnięcie uprawnień do synchronizacji

Możesz usunąć użytkowników z synchronizowanych zestawów stron (których jesteś właścicielem) w dowolnym momencie.



1. Kliknij przycisk **Synchronizuj** na pasku górnym.



2. Kliknij ikonę **Udostępni zestaw stron**.
3. Użytkownicy z uprawnieniami do synchronizacji dla bieżącego zestawu stron są wymienieni w niebieskim polu. Aby usunąć użytkownika, zaznacz **X** obok jego nazwy/adresu e-mail, a następnie kliknij **Aktualizuj**.
4. Wybierz **Gotowe**.

13.2.4.3 Synchronizacja z zestawami stron należącymi do innych osób

Gdy ktoś udostępni Ci zestaw stron do synchronizacji, ikona synchronizacji na górnym pasku wyświetli ikonę alertu



. Wykonaj poniższe kroki, aby zaakceptować lub odrzucić zaproszenie.

Alerty synchronizacji mogą pojawić się nawet godzinę po wysłaniu zaproszenia.

Akceptacja zaproszenia do synchronizacji



1. Kliknij przycisk **Synchronizuj** na pasku górnym.



2. Kliknij ikonę **Pobierz zestaw stron**.
3. Kliknij **Przeglądaj zestawy stron dostępne na koncie myTobiiDynavox**.
4. Wybierz zestaw stron, który chcesz pobrać i zsynchronizować, a następnie wybierz opcję **Pobierz**.
5. Po zakończeniu pobierania wybierz **Gotowe**.

Odrzucenie zaproszenia do synchronizacji



1. Kliknij przycisk **Synchronizuj** na pasku górnym.



2. Kliknij ikonę **Pobierz zestaw stron**.
3. Kliknij **Przeglądaj zestawy stron dostępne na koncie myTobiiDynavox**.
4. Wybierz zestaw stron, który chcesz odrzucić, a następnie wybierz ikonę  **Usuń**.
5. Kliknij **Odrzuć**.

13.2.4.4 Przywracanie zsynchronizowanego zestawu stron do poprzednio zapisanej wersji

Można wrócić do poprzedniej wersji zsynchronizowanego zestawu stron. Funkcja ta jest przydatna w przypadku wprowadzenia zmian w zestawie stron, które mają zostać odrzucone lub cofnięte.



1. Kliknij przycisk **Synchronizuj** na pasku górnym.
2. Kliknij **Zapisane wersje**.
3. Znajdź na liście datę synchronizacji, którą chcesz przywrócić, a następnie wybierz opcję **Przywróć**.

13.2.4.5 Zastępowanie zsynchronizowanego zestawu stron

Użyj opcji Zastąp, aby zagwarantować, że bieżąca wersja zestawu stron jest wersją zestawu stron, która jest również przechowywana w chmurze (niezależnie od zmian, które mogły zostać zsynchronizowane przez innych użytkowników).



1. Kliknij przycisk **Synchronizuj** na pasku górnym.
2. Kliknij **Zaawansowane**.
3. Kliknij **Zastąp**.

13.2.4.6 Synchronizacja tylko przez pobieranie

Podczas synchronizacji w trybie tylko przez pobieranie będą odbierane zmiany w zestawach stron (wprowadzone na innych urządzeniach), ale nie będą wysyłane żadne zmiany w ustawieniach stron wprowadzone na bieżącym urządzeniu. Aby korzystać z trybu „tylko pobieranie”, dostęp do trybu edycji musi być ograniczony kodem dostępu. Aby skonfigurować kod dostępu i tryb „tylko pobieranie”, zobacz sekcję 15.1.1 *Hasło, str 127*.

13.3 Pakiety stron

Możesz udostępnić podzbiór swojego zestawu stron (jedną lub więcej wybranych stron) jako pakiet stron. Pakiety stron zawierają tylko określone strony. Jeśli strony zawierają przyciski z linkami do stron, które nie istnieją na urządzeniu odbiorcy, linki te nie będą działać.

13.3.1 Eksportuj pakiet stron

Eksportuj pakiet stron na konto myTobiiDynavox



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Strona**.
3. Kliknij **Importuj/eksportuj strony**.
4. Kliknij **Eksportuj pakiet stron**.
5. Kliknij **Przejdź do myTobiiDynavox**.
6. Wybierz strony, które chcesz dołączyć do pakietu stron. Wybrane strony zostaną oznaczone znacznikiem wyboru na liście i pojawią się w niebieskim polu.
Bieżąca strona jest automatycznie dołączana do pakietu stron. Aby usunąć tę lub inną stronę z pakietu, kliknij X obok nazwy strony w niebieskim polu.
7. Po dodaniu żądanych stron do pakietu stron, kliknij przycisk **Dalej**. Otworzy się okno dialogowe Nazwa pakietu stron.
8. Wprowadź nazwę pakietu stron w polu Nazwa i (opcjonalnie) opisz strony w polu Opis.
9. Wybierz **Eksportuj**, aby zapisać pakiet stron w myTobiiDynavox.
10. Po zakończeniu eksportu kliknij przycisk **Gotowe**.

Eksportuj pakiet stron do lokalnego pliku



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Strona**.
3. Kliknij **Importuj/eksportuj strony**.
4. Kliknij **Eksportuj pakiet stron**.
5. Kliknij **Do pliku lokalnego**.
6. Wybierz strony, które chcesz dołączyć do pakietu stron. Wybrane strony zostaną oznaczone znacznikiem wyboru na liście i pojawią się w niebieskim polu.
Bieżąca strona jest automatycznie dołączana do pakietu stron. Aby usunąć tę lub inną stronę z pakietu, kliknij X obok nazwy strony w niebieskim polu.
7. Po dodaniu żądanych stron do pakietu stron, kliknij przycisk **Dalej**. Otworzy się okno dialogowe Nazwa pakietu stron.
8. Wprowadź nazwę pakietu stron w polu Nazwa i (opcjonalnie) opisz strony w polu Opis.
9. (tylko system Windows) Kliknij **Dalej**.

10. (tylko system Windows) Kliknij **Przeglądaj**. Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać plik zestawu stron, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
11. Kliknij **Eksportuj**.
12. Po zakończeniu eksportu kliknij przycisk **Gotowe**.

Eksport pakietu stron do udostępniania (przez myTobiiDynavox)



Edytuj.

1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Strona**.
3. Kliknij **Importuj/eksportuj strony**.
4. Kliknij **Eksportuj pakiet stron**.
5. Kliknij **Do udostępnienia**.
6. Wybierz strony, które chcesz dołączyć do pakietu stron. Wybrane strony zostaną oznaczone znacznikiem wyboru na liście i pojawią się w niebieskim polu.
Bieżąca strona jest automatycznie dołączana do pakietu stron. Aby usunąć tę lub inną stronę z pakietu, kliknij X obok nazwy strony w niebieskim polu.
7. Po dodaniu żądanych stron do pakietu stron, kliknij przycisk **Dalej**. Otworzy się okno dialogowe Nazwa pakietu stron.
8. Wprowadź nazwę pakietu stron w polu Nazwa i (opcjonalnie) opisz strony w polu Opis.
9. Kliknij **Dalej**. Otworzy się okno dialogowe Udostępnij pakiet stron.
10. Wprowadź nazwę użytkownika myTobiiDynavox lub konto e-mail osoby, do której wysyłasz zestaw stron, a następnie wybierz **+**, aby dodać ją do listy odbiorców. Powtórz ten proces, aby dodać dodatkowych odbiorców. Po dodaniu wszystkich odbiorców kliknij **Udostępnij**.
11. Po zakończeniu eksportu kliknij przycisk **Gotowe**.

13.3.2 Import pakietu stron

Pobierz pakiet stron z konta myTobiiDynavox

Użyj tej opcji, aby zaimportować pakiet stron zapisany na własnym koncie myTobiiDynavox lub pakiet stron udostępniony przez innego użytkownika myTobiiDynavox.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Strona**.
3. Kliknij **Importuj/eksportuj strony**.
4. Kliknij **Pobierz pakiet stron**.
5. Kliknij **Z konta myTobiiDynavox**. Otworzy się okno dialogowe Wybierz pakiet stron z konta myTobiiDynavox.
6. Wybierz pakiet stron z listy.
7. Aby pobrać wybrany pakiet stron, kliknij **Dalej**.
8. Przejrzyj listę stron zawartych w pakiecie stron. Aby kontynuować import pakietu stron, kliknij **Import**. Aby przerwać import pakietu stron, kliknij **Anuluj**.



Konflikty stron występują, gdy pakiet stron zawiera jedną lub więcej stron, które już istnieją na urządzeniu, ale nie



są identyczne. Zaznacz każdą ikonę konfliktu stron, a następnie wybierz, czy chcesz zachować istniejącą stronę, czy zastąpić ją zaimportowaną stroną z pakietu stron. Musis rozwiązać wszystkie konflikty stron w ten sposób, zanim będziesz mógł kontynuować importowanie pakietu stron.

Importuj pakiet stron z lokalnego pliku



Edytuj.

1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Strona**.

3. Kliknij **Importuj/eksportuj strony**.
4. Kliknij **Pobierz pakiet stron**.
5. Kliknij **Z lokalnego pliku**.
6. Kliknij **Przeglądaj**. Przejdź do pliku pakietu stron (.spb), który chcesz zaimportować i zaznacz go, a następnie kliknij **Otwórz**.
7. Kliknij **Dalej**. Otworzy się okno dialogowe **Przejrzyj pakiet stron**.
8. Przejrzyj listę stron zawartych w pakiecie stron. Aby kontynuować import pakietu stron, kliknij **Import**. Aby przerwać import pakietu stron, kliknij **Anuluj**.



Konflikty stron występują, gdy pakiet stron zawiera jedną lub więcej stron, które już istnieją na urządzeniu, ale nie



są identyczne. Zaznacz każdą ikonę konfliktu stron , a następnie wybierz, czy chcesz zachować istniejącą stronę, czy zastąpić ją zaimportowaną stroną z pakietu stron. Musisz rozwiązać wszystkie konflikty stron w ten sposób, zanim będziesz mógł kontynuować importowanie pakietu stron.

Import pakietu stron i powiązanie

Możesz zaimportować pakiet stron i utworzyć łącze za pomocą funkcji **Zaimportuj i połącz**!

Zobacz sekcję **9.9.6 Zaimportuj i powiąż ze stroną**, str 68.

14 Ustawienia użytkownika

Ustawienia użytkownika pomagają dostosować sposób korzystania z TD Snap®. Każdy użytkownik może mieć własne ustawienia niestandardowe, które są stosowane po załadowaniu użytkownika do oprogramowania.

14.1 Zmień użytkownika



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz bieżącego użytkownika.
4. Wybierz użytkownika z listy Wybierz użytkownika.



Użytkownik ze znacznikiem wyboru jest aktualnie aktywnym użytkownikiem.

14.2 Tworzenie nowego użytkownika



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij **Nowy użytkownik**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji użytkownika, aby utworzyć nowego użytkownika. Kliknij **X**, aby anulować tworzenie nowego użytkownika.

14.3 Kopia zapasowa użytkownika

Utwórz kopię zapasową w myTobiiDynavox



Edytuj.


1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz strzałkę po prawej stronie bieżącego użytkownika.



4. Kliknij przycisk **Kopia zapasowa** obok nazwy użytkownika, którego kopię zapasową chcesz utworzyć.
5. Kliknij **Kopia zapasowa na koncie myTobiiDynavox**.
Jeśli użytkownik nie jest obecnie zalogowany do swojego konta myTobiiDynavox, zostanie o to poproszony.
6. Wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej użytkownika, a następnie kliknij **Dalej**.
Pomocne może być uwzględnienie daty utworzenia kopii zapasowej w nazwie pliku.
7. Wybierz **Gotowe**.



Lokalne pliki kopii zapasowych użytkowników można również przenieść na konto myTobiiDynavox ręcznie. Użyj przeglądarki internetowej, aby przejść do myTobiiDynavox.com i zaloguj się, a następnie przejdź do *Snap > Kopie zapasowe* i kliknij **Prześlij kopię zapasową**.

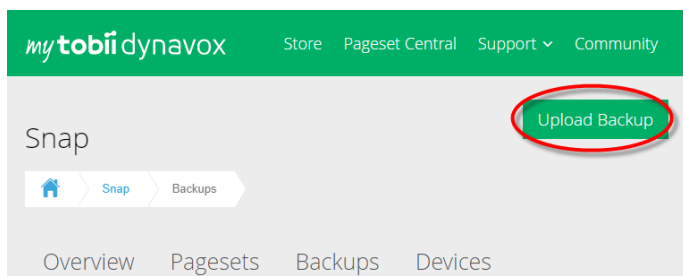

Kopia zapasowa do pliku lokalnego



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz strzałkę po prawej stronie bieżącego użytkownika.



4. Kliknij przycisk **Kopia zapasowa** obok nazwy użytkownika, którego kopię zapasową chcesz utworzyć.
5. Kliknij **Kopia zapasowa do pliku lokalnego**.
6. (Windows) **Przeglądaj** w poszukiwaniu katalogu, w którym zapiszesz plik kopii zapasowej, a następnie kliknij **Zapisz**.
(iOS/iPadOS) Wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej.
7. Kliknij **Kopia zapasowa**.

14.4 Przywracanie użytkownika

Przywróć użytkownika z konta myTobiiDynavox



Edytuj.


1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz strzałkę po prawej stronie bieżącego użytkownika.
4. Kliknij **Nowy użytkownik**.
5. Kliknij **Przywróć istniejącego użytkownika**.
6. Jeśli obecnie nie zalogowano Cię do myTobiiDynavox, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
7. Wybierz plik kopii zapasowej użytkownika z listy, a następnie wybierz **Dalej**.

Przywróć użytkownika z pliku lokalnego



W systemie iPadOS lokalne kopie zapasowe plików użytkownika, które zostały utworzone na innym urządzeniu, muszą najpierw zostać przeniesione do TD Snap® za pośrednictwem iTunes:

- Otwórz iTunes na komputerze Mac lub PC.
- Podłącz iPada do komputera za pomocą kabla USB dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Wybierz swoje urządzenie w iTunes.

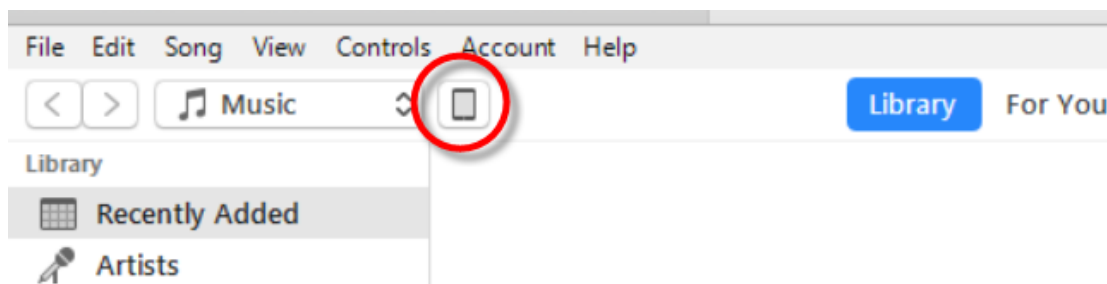

- Na lewym pasku bocznym kliknij opcję **Aplikacje**. Następnie przewiń do sekcji Udostępnianie plików u dołu strony.
- Kliknij **TD Snap®**.

File Sharing

The apps listed below can transfer documents between your iPad and this computer.

Apps

	Snap + Core First
	Student Center

Snap + Core First Documents

	DateTimePrefs.data	4 KB	Yesterday 4:12 PM
	GlobalSettings.ssf	12 KB	Today 9:40 AM
	QA_2017-04-20-17-39-12.sub	264.7 MB	4/20/2017 1:40 PM
	Symbols	zero KB	5/31/2017 9:54 AM
	UserBackups	545.5 MB	Yesterday 12:54 PM
	Users	664.9 MB	Today 9:40 AM
	VoiceBundle_v1_0.json	4 KB	5/31/2017 9:27 AM
	Voices	244.7 MB	5/31/2017 9:53 AM

- Przeciągnij pliki kopii zapasowych użytkownika do obszaru Dokumenty w TD Snap®.
- Wykonaj poniższe kroki, aby przywrócić użytkownika na iPadzie.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz strzałkę po prawej stronie bieżącego użytkownika.
4. Kliknij **Nowy użytkownik**.
5. Kliknij **Przywróć istniejącego użytkownika**.
6. Wybierz **Przywróć z lokalnego pliku**.
7. (Windows) Przejdź do pliku kopii zapasowej użytkownika i zaznacz go, a następnie kliknij **Otwórz**.
(iPadOS) Wybierz plik kopii zapasowej użytkownika z listy, a następnie kliknij **Przywróć użytkownika**.

14.5 Edycja/zmiana nazwy użytkownika



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.



3. Kliknij przycisk **Edytuj** obok nazwy użytkownika, którego chcesz edytować.
4. Wpisz nazwę w polu **Nazwa**.
5. Kliknij **Zapisz**, aby zapisać zmiany lub **Anuluj**, aby odrzucić te zmiany.

14.6 Usuwanie użytkownika



Usunięcie użytkownika z urządzenia jest operacją trwałą. Jeśli uważasz, że możesz potrzebować użytkownika w późniejszym czasie, utwórz kopię zapasową użytkownika *14.3 Kopia zapasowa użytkownika, str 104* przed wykonaniem operacji usunięcia.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij przycisk  **Usuń** obok nazwy użytkownika, którego chcesz usunąć.
4. Wybierz czerwony przycisk **Usuń**.
5. Kliknij **Usuń**, aby trwale usunąć użytkownika lub kliknij **Anuluj**, aby powrócić do menu ustawień bez jego usuwania.



Nie można usunąć aktualnie aktywnego użytkownika.

14.7 Logowanie do konta myTobiiDynavox



Logowanie do konta myTobiiDynavox wymaga aktywnego połączenia internetowego.

Niektóre usługi TD Snap®, takie jak Synchronizacja, wymagają zalogowania się za pomocą konta myTobiiDynavox. Wybierz **Zaloguj się**, aby wprowadzić dane logowania do konta myTobiiDynavox lub utworzyć nowe konto myTobiiDynavox. Po zalogowaniu nazwa użytkownika lub adres e-mail myTobiiDynavox zostaną wyświetlone w sekcji Konto myTobiiDynavox.

14.8 Voice

14.8.1 Mówiący głos

Mówiący głos to głos, który odczytuje zawartość okna komunikatu i komunikaty przycisków.

Mówiący głos jest głosem domyślnym; nie jest on powiązany z konkretnym językiem. Jeśli zostały przypisane głosy dla poszczególnych języków, będą one używane dla tych języków. Aby przypisać głosy dla określonych języków, zobacz *14.10 Głosy dla określonego języka, str 110*.



Ilustracja 44: Karta Użytkownik — Mówiący głos



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.

3. Kliknij **Mówiący głos**.

14.8.1.1 Zainstalowane głosy

Są to głosy aktualnie dostępne do natychmiastowego użycia na urządzeniu. Obejmują one zarówno wstępnie zainstalowane głosy, jak i głosy pobrane na urządzenie.



Można usuwać głosy z listy Zainstalowane, ale nie można usunąć aktualnie aktywnego głosu.

14.8.1.2 Dodatkowe głosy

Zobacz silniki mowy i usługi głosów niestandardowych obsługiwane w TD Snap®.

- Niestandardowe głosy — TD Snap® (wersja pełna) obsługuje kilka niestandardowych syntetycznych głosów. Wybierz Zaloguj się, aby rozpocząć korzystanie z usługi niestandardowego głosu syntetycznego w TD Snap®.
- Silniki mowy — TD Snap® (wersja pełna) obejmuje jeden silnik głosowy i dostęp do wszystkich głosów dla tego silnika głosowego.

14.8.1.3 Głosy indywidualne

TD Snap® obsługuje funkcję iOS Personal Voice. Należy włączyć ustawienie iPadOS Zezwalaj aplikacjom na żądanie użycia i udzielić pozwolenia dla TD Snap®.

Aby utworzyć głos indywidualny, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Apple: <https://support.apple.com/en-us/104993>. Pamiętaj, że jeśli utworzysz głos indywidualny za pomocą innego urządzenia Apple, musisz włączyć ustawienie Udostępnij między urządzeniami, aby używać głosu na innych urządzeniach zalogowanych za pomocą tego samego Apple ID. *Ustawienia iOS > Dostępność > Głos indywidualny > Udostępnij między urządzeniami*

Włącz opcję Zezwalaj aplikacjom na żądanie użycia głosu indywidualnego

1. Wyłącz TD Snap®.
2. Przejdź do *Ustawienia iPadOS > Dostępność > Głos indywidualny*.
3. Włącz opcję **Zezwalaj aplikacjom na żądanie użycia**.
4. Zamknij aplikację Ustawienia iPadOS.

Pozwalaj TD Snap ma używanie funkcji Głos indywidualny

1. Uruchom TD Snap®.
2. Po wyświetleniu monitu o zezwolenie TD Snap® na korzystanie z funkcji Głosu indywidualnego kliknij przycisk **OK**.



3. Kliknij przycisk **Edytuj**.
4. Kliknij kartę **Użytkownik**.
5. Kliknij **Mówiący głos**.
6. W sekcji Głosy indywidualne na liście głosów wybierz swój głos indywidualny.

14.8.1.4 Głosy do pobrania

Pobieranie nowych głosów.



Do pobierania głosów wymagane jest aktywne połączenie internetowe.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij **Mówiący głos**.
4. Na liście głosów do pobrania kliknij opcję **Pobierz** obokżądanego głosu.



W systemie iPadOS pobieranie głosu zostaje wstrzymane po zminimalizowaniu aplikacji TD Snap®.

14.8.1.5 Głosy platformy

Są to głosy dostarczane przez system operacyjny i głosy SAPI5.



Niektóre głosy mogą pojawić się dwukrotnie, jeśli mają zarówno wersję na platformę natywną, jak i wersję SAPI5. SAPI5 jest dostępny tylko dla systemu Windows

14.8.2 Szybkość głosu

Szybkość głosu to szybkość, z jaką wypowiadane są słowa.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Przesuń **suwak szybkości głosu** w lewo, aby głos był wolniejszy, lub w prawo, aby głos był szybszy.

14.8.3 Wysokość głosu

Wysokość głosu odnosi się do tego, jak wysoko lub nisko brzmi głos.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Przesuń **suwak wysokości głosu** w lewo, aby ustawić niższą wysokość lub w prawo, aby ustawić wyższą wysokość.

14.8.4 Wyjątki w wymowie

Wyjątki w wymowie to słowa lub akronimy, których użytkownik uczy głos wymawiać w określony sposób. Wyjątki wymowy są dołączane do głosu, który jest aktywny podczas tworzenia wyjątków wymowy. Jeżeli zmienisz głos i zechcesz użyć tych samych wyjątków w wymowie, musisz zaimportować je z poprzednio używanego głosu.

Wyjątki w wymowie są również dostępne dla głosów przypisanych do konkretnego języka. Zobacz sekcję *14.10 Głosy dla określonego języka*, str 110.



Wyjątków w wymowie nie można importować między platformami (Windows ↔ iPadOS).

Tworzenie nowego wyjątku w wymowie



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij przycisk **Wyjątki w wymowie**.
4. Kliknij przycisk **Dodaj wyjątek w wymowie**.
Otworzy się okienko dialogowe Dodaj wyjątek w wymowie.

Dodaj wyjątek w wymowie

Słowo

Wymowa

Gotowe

Anuluj

5. W polu **Słowo** wpisz dane słowo zgodnie z obowiązującym zapisem ortograficznym.

6. W polu **Wymowa** wpisz to słowo fonetycznie tak, jak chcesz, żeby było wymawiane. Aby przetestować wymowę, kliknij przycisk **Podgląd**.
7. Kliknij **Gotowe**, aby zapisać Wyjątek w wymowie. Kliknij **Anuluj**, aby odrzucić zmiany i powrócić do Ustawień użytkownika.


 Głosy Acapela akceptują również wyjątki w wymowie przy użyciu alfabetu fonetycznego SAMPA. W polu Wymowa wpisz `prn=tutaj kod fonetyczny\`, ale zastąp „tutaj kod fonetyczny” kodami SAMPA dla danego słowa. Na końcu należy umieścić cudzysłów (").

Aby zobaczyć kody fonetyczne i inne szczegóły dotyczące korzystania z SAMPA dla wyjątków wymowy, wybierz język swojego głosu Acapela: [Arabski](#), [Czeski](#), [Duński](#), [Niemiecki](#), [Australijski angielski](#), [Szkocki angielski](#), [Brytyjski angielski](#), [Amerykański angielski](#), [Kataloński](#), [Hiszpański latynoamerykański](#), [Północnoamerykański hiszpański](#), [Fiński](#), [Kanadyjski francuski](#), [Francuski](#), [Włoski](#), [Japoński](#), [Norweski](#), [Belgijski holenderski](#), [Holenderski](#), [Brazylijski portugalski](#), [Portugalski](#), [Szwedzki](#), [Finlandzki szwedzki](#), [Północnolapoński](#), [Turecki](#), [Chiński uproszczony](#).

Importuj wyjątki w wymowie



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij przycisk **Wyjątki w wymowie**.
4. Kliknij **Importuj z innego głosu**.

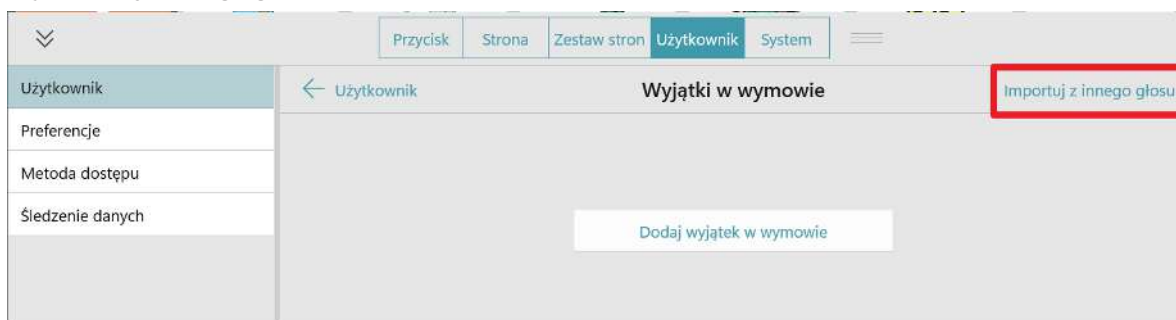

5. Wybierz głos z wyjątkami w wymowie, który chcesz zaimportować. Na liście pojawią się tylko głosy, z którymi powiązane są wyjątki w wymowie.
6. Kliknij **Importuj**, aby zaimportować wszystkie wyjątki wymowy powiązane z wybranym głosem. Kliknij **Anuluj**, aby powrócić do ustawień użytkownika bez importowania.

 Po zaimportowaniu wyjątków w wymowie z innego głosu zaleca się przetestowanie ich z bieżącym głosem.

Wybierz przycisk  Podgląd wyjątku w wymowie, aby usłyszeć, jak jest wypowiadany przez bieżący głos.

14.9 Urządzenie wyjściowe mowy



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij **Urządzenie wyjściowe mowy**.
4. Ustaw opcję Użyj domyślnego urządzenia na **Wł.**, aby używać domyślnego urządzenia wyjściowego systemu Windows. Ustaw opcję Użyj domyślnego urządzenia na **Wył.**, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń wyjściowych.
 - Wybierz urządzenie wyjściowe z listy, aby użyć tego urządzenia do odtwarzania mowy. Aby wyświetlić podgląd urządzenia, wybierz dla niego przycisk odtwarzania.

14.10 Głosy dla określonego języka

Możesz przypisać głos do języka, aby treści w tym języku były wypowiadane z prawidłową wymową.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij **Głosy dla określonego języka**.
4. Kliknij **Dodaj głos dla innego języka**.
5. Kliknij **Język**, a następnie wybierz język z listy Język obsługi głosowej. Po wybraniu języka wybierz opcję **Nowy głos**.
6. Kliknij **Głos**, a następnie wybierz głos z sekcji Zainstalowane na liście głosów. Po wybraniu głosu wybierz opcję **Nowy głos**.
7. (Opcjonalnie) Dostosuj szybkość głosu dla wybranego języka/głosu.
8. (Opcjonalnie) Dodaj wyjątki w wymowie dla głosu. Zobacz sekcję *14.8.4 Wyjątki w wymowie, str 109*.



Niektóre głosy są dostępne do pobrania za darmo (wymagane jest połączenie z Internetem). Kliknij opcję **Pobierz** obokżądanego głosu. Po zakończeniu pobierania znajdź i wybierz głos w sekcji Zainstalowane na liście głosów.

14.11 Konto Google

Połącz swoje konto Google, aby korzystać z Asystenta Google, inteligentnych głośników i inteligentnych urządzeń z TD Snap®.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Przewiń w dół i wybierz **Połącz z Google**. Otworzy się domyślna przeglądarka internetowa.
4. Zaloguj się na swoje konto Google.
5. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Zezwalaj**, aby przyznać TD Snap® uprawnienia do komunikowania się z Asystentem Google w Twoim imieniu.
6. Powrót do TD Snap®.



Aby wylogować się z konta Google w TD Snap®, wybierz opcję **Rozłącz**.

14.12 Preferencje użytkownika

14.12.1 Ustawienia mowy



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz kategorię **Preferencje**.
4. Ustaw opcję Zawsze przerywaj wypowiedź w celu nowej wypowiedzi na **Wł.** (trwająca wypowiedź zostanie zatrzymana, aby wypowiedzieć nowe polecenie) lub **Wył.** (polecenia głosowe zostaną ustawione w kolejce, tak aby bieżąca wypowiedź została zakończona, a następnie wypowiedziane zostanie nowsze polecenie głosowe).

14.12.2 Ustawienia okna komunikatu



Ilustracja 45: Opcja Użyj symboli w oknie komunikatu włączona



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz kategorię **Preferencje**.
4. Ustaw następujące preferencje na **Wł.** (włączone) lub **Wył.** (wyłączone):
 - **Użyj symboli w oknie komunikatu** — Po włączeniu tej opcji słowa i frazy w oknie komunikatu będą symbolizowane.
 - **Zawsze wyświetlaj kursor w oknie komunikatu** — Po włączeniu kursor jest zawsze widoczny w oknie komunikatu. Po wyłączeniu kursor jest widoczny tylko po przesunięciu go z domyślnej pozycji na koniec tekstu okna komunikatu.
 - **Mów podczas wstawiania do okna komunikatu** — Po włączeniu tej funkcji każde słowo lub fraza będą wypowiedzane po wprowadzeniu ich do okna komunikatu.
 - **Wypowiedz znaki** — Po włączeniu tej funkcji każdy znak będzie wypowiedzany po wprowadzeniu go do okna komunikatu.
Aby włączyć funkcję „Wypowiedz znaki”, należy włączyć ustawienie „Mów podczas wstawiania do okna komunikatu”.
 - **Wyczyść po wypowiedzi** — Po wypowiedzeniu tekstu w oknie komunikatu jest on usuwany przy następnym wstawieniu tekstu.
 - **Automatyczne wielkie litery** — Gdy opcja ta jest włączona, pierwsza litera pierwszego słowa każdego zdania jest automatycznie pisana wielką literą. Gdy opcja ta jest wyłączona, użytkownik musi wprowadzić wielkie litery ręcznie.

14.12.3 Ustawienia predykcji



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz kategorię **Preferencje**.
4. Ustaw opcję Pokaż symbole na przyciskach przewidywania na **Wł.** (Przyciski przewidywania wyświetlają symbol aktualnie przewidywanego słowa) lub **Wył.** (Przyciski przewidywania wyświetlają tylko tekst).

14.12.4 Resetowanie przewidywania słów

Funkcja przewidywania słów w TD Snap® uczy się na podstawie wypowiedzanych wiadomości, aby tworzyć spersonalizowane przewidywania słów. Zresetowanie przewidywania słów przywraca domyślne przewidywanie słów we wszystkich językach dla bieżącego użytkownika.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz kategorię **Preferencje**.
4. Kliknij **Resetowanie przewidywania słów**
5. Kliknij **Resetuj**.
6. Kliknij **Resetuj** w oknie potwierdzenia.

14.12.5 Ustawienia Synchronizacji



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz kategorię **Preferencje**.
4. Ustaw opcję Włącz synchronizację w trybie obsługi na **Wł.** (przycisk synchronizacji jest widoczny na górnym pasku zarówno w trybie obsługi, jak i edycji) lub **Wył.** (przycisk synchronizacji jest ukryty na górnym pasku w trybie obsługi, ale widoczny w trybie edycji).

14.13 Access Method

Sterowanie dotykowe

Obiekty są aktywowane poprzez dotknięcie obiektu na ekranie palcem lub, w przypadku korzystania z myszy, poprzez kliknięcie obiektu kursorem myszy. Ta metoda dostępu jest odpowiednia dla użytkowników, którzy są w stanie szybko i dokładnie dotknąć ekranu lub kontrolować i klikać lewym przyciskiem myszy za pomocą tradycyjnej myszy komputerowej. Obiekty są aktywowane natychmiast po ich dotknięciu lub kliknięciu.

Aktywacja dotykiem

Obiekty są aktywowane poprzez fizyczne dotknięcie i przytrzymanie obiektu na ekranie przez minimalny czas lub, w przypadku korzystania z myszy, poprzez kliknięcie i przytrzymanie obiektu przez minimalny czas. Czas przytrzymania jest ustawiany przez użytkownika. Ta metoda dostępu jest przydatna dla użytkowników, którzy mogą przypadkowo dotknąć lub kliknąć niezamierzone obiekty.

Aktywacja zwolnieniem

Ta metoda jest podobna do Aktywacji dotykiem, ale wybrany obiekt jest aktywowany po zwolnieniu zaznaczenia. Metoda ta umożliwia użytkownikowi utrzymanie kontaktu z ekranem dotykowym bez przypadkowego dokonania wyboru.

Oznacza to, że użytkownik może przesunąć palcem lub wskaźnikiem po ekranie dotykowym lub przytrzymać przycisk myszy podczas przesuwania kursora. Wybór nie zostanie dokonany, dopóki palec lub wskaźnik nie zniknie z ekranu dotykowego lub gdy przycisk myszy nie zostanie zwolniony. Dzięki temu metoda wyboru Aktywacja zwolnieniem jest idealna dla osób, którym łatwiej jest przeciągać palcem lub wskaźnikiem po ekranie dotykowym, przechodząc między wyborami.

Dotyk dźwiękowy

Użytkownik dotyka ekranu, aby aktywować wskazówki audio przycisków, które pomagają mu zidentyfikować każdy przycisk, aby mógł pewnie dokonać wyboru. Ustawienia metody dostępu można skonfigurować tak, aby użyć dotknięcia i przeciągnięcia, aby usłyszeć wskazówki audio, a następnie unieść palec z ekranu, aby wybrać lub dotknąć raz, aby usłyszeć wskazówkę audio, a następnie dotknąć ponownie, aby wybrać. Ta metoda dostępu jest przydatna dla użytkowników niedowidzących lub korzystających ze wskazówek dźwiękowych.

Zatrzymanie myszy

Metoda dostępu Zatrzymanie myszy wymaga, aby mysz komputerowa, track ball lub mysz czołowa sterowały kursorem na ekranie. Obiekt jest wybierany, gdy kursor zatrzyma się na obiekcie przez określony czas lub gdy użytkownik aktywuje przełącznik. Ta metoda dostępu jest dobrą opcją dla osoby, która ma fizyczną zdolność manewrowania myszą, ale nie jest w stanie nacisnąć przycisku myszy w celu dokonania wyboru.

Sterowanie wzrokowe

Metoda ta pozwala użytkownikowi kontrolować TD Snap® wyłącznie za pomocą wzroku. Wybór dokonuje się poprzez skupienie wzroku na obiekcie przez określony czas (zatrzymanie) lub aktywację przełącznika. Interakcja wzrokowa wymaga urządzenia do interakcji wzrokowej firmy Tobii Dynavox.

Skanowanie

Gdy aktywną metodą wyboru jest skanowanie, obiekty na ekranie są podświetlane w określony sposób. Skanowanie wymaga przełącznika lub klawisza klawiatury, aby dokonać wyboru, gdy żądany element jest podświetlony. Ta metoda dostępu jest przeznaczona dla osób, których zdolności motoryczne mogą uniemożliwiać skuteczne korzystanie z bezpośrednich metod wyboru.



Aby dowiedzieć się więcej o metodach dostępu, obejrzyj film Metody dostępu dostępny w sekcji *System — Pomoc i samouczki*.

14.13.1 Ustawianie metody dostępu



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Wybierz kategorię **Metoda dostępu**.
4. Wybierz bieżącą metodę dostępu.
5. Wybierz metodę dostępu z listy.

14.13.2 Opcje sterowania dotykowego



Domyślną metodą dostępu jest dotyk.

Korzystając z metody dostępu Dotyk, obiekty są aktywowane poprzez dotknięcie obiektu na ekranie palcem lub, w przypadku korzystania z myszy, poprzez kliknięcie obiektu kursorem myszy. Ta metoda dostępu jest odpowiednia dla użytkowników, którzy są w stanie szybko i dokładnie dotknąć ekranu lub kontrolować i klikać lewym przyciskiem myszy za pomocą tradycyjnej myszy komputerowej. Obiekty są aktywowane natychmiast po ich dotknięciu lub kliknięciu.

Typ nawigacji

Typ nawigacji to sposób, w jaki użytkownik może przewijać stronę i pasek narzędzi. Można wybrać przewijanie poprzez przesuwanie palcem po ekranie, wybieranie przycisków nawigacyjnych lub oba te sposoby.

Przeciąganie

- Przewijaj stronę i pasek narzędzi w górę i w dół, przesuwając palcem po ekranie dotykowym. (Tylko metoda dostępu dotykowego).

Przyciski nawigacji

- Przyciski strzałek pojawiają się na stronie i pasku narzędzi, gdy powyżej lub poniżej znajduje się dodatkowa zawartość. Przyciski nawigacji ze strzałkami są dostępne dla wszystkich metod dostępu.



Przeciąganie i przyciski nawigacji

- Zarówno przesuwanie, jak i przyciski nawigacyjne są włączone, dzięki czemu można używać dowolnego typu nawigacji do poruszania się w górę i w dół po zawartości. (Tylko metoda dostępu dotykowego).

Dźwięk informacji zwrotnej wyboru

Odtwarzanie dźwięku po wybraniu przycisku bez mowy.

14.13.3 Opcje aktywacji wzrokiem

Po wybraniu metody dostępu Aktywacja dotykiem, obiekty są aktywowane poprzez fizyczne dotknięcie i przytrzymanie obiektu na ekranie przez minimalny czas lub, w przypadku korzystania z myszy, poprzez kliknięcie i przytrzymanie obiektu przez minimalny czas. Czas przytrzymania jest ustawiany przez użytkownika. Ta metoda dostępu jest przydatna dla użytkowników, którzy mogą przypadkowo dotknąć lub kliknąć niezamierzone obiekty.

Czas wstrzymania

Czas wstrzymania to minimalny czas potrzebny do wybrania i przytrzymania obiektu w celu jego aktywacji.

Połącz więcej stuknięć

To ustawienie wykrywa wielokrotne dotknięcia, które występują w określonym przedziale czasu i łączy je tak, aby zostały zarejestrowane jako jedno długie dotknięcie i przytrzymanie. To ustawienie jest przydatne, jeśli użytkownik ma trudności z ciągłym przytrzymywaniem zaznaczenia.

Gdy opcja Połącz wiele stuknięć jest włączona, można wybrać ramy czasowe, w których stuknięcia są łączone. Na przykład po ustawieniu opcji Średni wszystkie stuknięcia, które wystąpią w odstępie 0,3 sekundy (począwszy od pierwszego stuknięcia), zostaną zarejestrowane jako pojedyncze długie stuknięcie i przytrzymanie.


Opóźnienie między wyborami

To ustawienie umożliwia ustawienie czasu, w którym TD Snap® ignoruje próby dokonania wyboru po jego dokonaniu. Włączenie opcji Opóźnienie między wyborami może pomóc w zapobieganiu niezamierzonym powtórnym wyborom w oprogramowaniu.

Gdy opcja Opóźnienie między wyborami jest włączona, można wybrać przedział czasu, w którym próby wyboru będą ignorowane po dokonaniu wyboru. Na przykład po ustawieniu opcji Średni TD Snap® będzie ignorować wszystkie próby wyboru, które nastąpią w ciągu 2 sekund od dokonania wyboru.

Podświetlanie

Wybierz preferowany typ i kolor podświetlenia. Podświetlenie to wizualna wskazówka, która pokazuje, kiedy obiekt jest zaznaczony. Podświetlenie zatrzymuje się, gdy obiekt zostanie aktywowany.

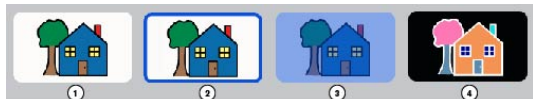

1. Brak podświetlenia
2. Zarys
Opcje: Kolor, Grubość podświetlenia
3. Pokryj
Opcja: Kolor
4. Odwróć

Dźwięk sprzężenia zwrotnego wyboru

Odtwarzanie dźwięku po wybraniu przycisku bez mowy.

Dostępne przyciski nawigacji na górnym pasku

Po włączeniu przyciski Wstecz, Strona główna i Pulpit na górnym pasku są dostępne przy użyciu metod wprowadzania dotykowego lub dostępu dotykowego. Po wyłączeniu przyciski te są dostępne tylko przy użyciu dotykowej metody dostępu.

14.13.4 Opcje aktywacji zwolnieniem

W przypadku korzystania z funkcji Aktywacja zwolnieniem obiekt jest aktywowany po zwolnieniu zaznaczenia. Ta metoda umożliwia użytkownikowi utrzymanie kontaktu z ekranem dotykowym bez przypadkowego dokonania wyboru. Oznacza to, że użytkownik może przesuwać palcem lub wskaźnikiem po ekranie dotykowym lub przytrzymać przycisk myszy podczas przesuwania kursora. Gdy kursor przesuwa się po przyciskach, aktualnie wybrany przycisk zostanie podświetlony. Przycisk nie zostanie aktywowany, dopóki palec lub wskaźnik nie zostanie odsunięty od ekranu dotykowego lub gdy przycisk myszy nie zostanie zwolniony. Dzięki temu metoda wyboru Aktywacja zwolnieniem jest idealna dla osób, którym łatwiej jest przeciągać palcem lub wskaźnikiem po ekranie dotykowym podczas przechodzenia od wyboru do wyboru. Jest to również przydatne dla osób, które korzystają z wizualnych informacji zwrotnych w celu dokonywania dokładnych wyborów.

Czas wstrzymania

Czas wstrzymania to minimalny czas potrzebny do wybrania i przytrzymania obiektu w celu jego aktywacji po zwolnieniu.

Połącz więcej stuknięć

To ustawienie wykrywa wielokrotne dotknięcia, które występują w określonym przedziale czasu i łączy je tak, aby zostały zarejestrowane jako jedno długie dotknięcie i przytrzymanie. To ustawienie jest przydatne, jeśli użytkownik ma trudności z ciągłym przytrzymywaniem zaznaczenia.

Gdy opcja Połącz wiele stuknięć jest włączona, można wybrać ramy czasowe, w których stuknięcia są łączone. Na przykład po ustawieniu opcji Średni wszystkie stuknięcia, które wystąpią w odstępie 0,3 sekundy (począwszy od pierwszego stuknięcia), zostaną zarejestrowane jako pojedyncze długie stuknięcia i przytrzymanie.


Opóźnienie między wyborami

To ustawienie umożliwia ustawienie czasu, w którym TD Snap® ignoruje próby dokonania wyboru po jego dokonaniu. Włączenie opcji Opóźnienie między wyborami może pomóc w zapobieganiu niezamierzonym powtórnym wyborom w oprogramowaniu.

Gdy opcja Opóźnienie między wyborami jest włączona, można wybrać przedział czasu, w którym próby wyboru będą ignorowane po dokonaniu wyboru. Na przykład po ustawieniu opcji Średni TD Snap® będzie ignorować wszystkie próby wyboru, które nastąpią w ciągu 2 sekund od dokonania wyboru.

Podświetlanie

Wybierz preferowany typ i kolor podświetlenia. Podświetlenie to wizualna wskazówka, która pokazuje, kiedy obiekt jest zaznaczony. Podświetlenie zatrzymuje się, gdy obiekt zostanie aktywowany.

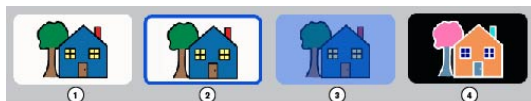

1. Brak podświetlenia
2. Zarys
Opcje: Kolor, Grubość podświetlenia
3. Pokryj
Opcja: Kolor
4. Odwróć

Podpowiedź dźwiękowa

Konfiguracja głosu używanego do wypowiadania wskazówek audio. Wskazówka audio to słowo lub krótka wiadomość, która pomaga zidentyfikować obiekt. Można wybrać głos dla podpowiedzi dźwiękowych, głosy podpowiedzi specyficzne dla języka, a także niestandardową szybkość głosu, głośność, wysokość i wyjątki w wymowie.

Ustawienie Mieszaj informacje zwrotne i mowę umożliwia odtwarzanie dźwięków informacji zwrotnych jednocześnie z mową, jeśli ustawienia Urządzenie wyjściowe mowy i Urządzenie podpowiedzi dźwiękowej są takie same.

Dźwięk informacji zwrotnej wyboru

Odtwarzanie dźwięku po wybraniu przycisku bez mowy.

Dostępne przyciski nawigacji na górnym pasku

Po włączeniu przyciski Wstecz, Strona główna i Pulpit na górnym pasku są dostępne przy użyciu metod aktywacji zwolnieniem lub dostępu dotykowego. Po wyłączeniu przyciski te są dostępne tylko przy użyciu dotykowej metody dostępu.

14.13.5 Opcje dotyku dźwiękowego

Korzystając z dotyku dźwiękowego, użytkownik dotyka ekranu, aby aktywować wskazówki audio przycisków, które pomagają mu zidentyfikować każdy przycisk, aby mógł pewnie dokonać wyboru. Ustawienia metody dostępu można skonfigurować tak, aby użyć dotknięcia i przeciągnięcia, aby usłyszeć wskazówki audio, a następnie unieść palec z ekranu, aby wybrać lub dotknąć raz, aby usłyszeć wskazówkę audio, a następnie dotknąć ponownie, aby wybrać. Ta metoda dostępu jest przydatna dla użytkowników niedowidzących lub korzystających ze wskazówek dźwiękowych.

Czas wstrzymania

Czas wstrzymania to minimalny czas potrzebny do wybrania i przytrzymania obiektu w celu jego aktywacji.

Połącz więcej stuknięć

To ustawienie wykrywa wielokrotne dotknięcia, które występują w określonym przedziale czasu i łączy je tak, aby zostały zarejestrowane jako jedno długie dotknięcie i przytrzymanie. To ustawienie jest przydatne, jeśli użytkownik ma trudności z ciągłym przytrzymywaniem zaznaczenia.

Gdy opcja Połącz wiele stuknięć jest włączona, można wybrać ramy czasowe, w których stuknięcia są łączone. Na przykład po ustawieniu opcji Średni wszystkie stuknięcia, które wystąpią w odstępie 0,3 sekundy (począwszy od pierwszego stuknięcia), zostaną zarejestrowane jako pojedyncze długie stuknięcie i przytrzymanie.


Opóźnienie między wyborami

To ustawienie umożliwia ustawienie czasu, w którym TD Snap® ignoruje próby dokonania wyboru po jego dokonaniu. Włączenie opcji Opóźnienie między wyborami może pomóc w zapobieganiu niezamierzonym powtórным wyborom w oprogramowaniu.

Gdy opcja Opóźnienie między wyborami jest włączona, można wybrać przedział czasu, w którym próby wyboru będą ignorowane po dokonaniu wyboru. Na przykład po ustawieniu opcji Średni TD Snap® będzie ignorować wszystkie próby wyboru, które nastąpią w ciągu 2 sekund od dokonania wyboru.

Podświetlanie

Wybierz preferowany typ i kolor podświetlenia. Podświetlenie to wizualna wskazówka, która pokazuje, kiedy obiekt jest zaznaczony. Podświetlenie zatrzymuje się, gdy obiekt zostanie aktywowany.

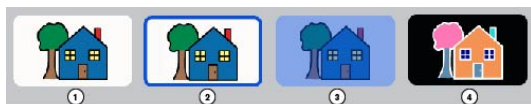

1. Brak podświetlenia
2. Zarys
Opcje: Kolor, Grubość podświetlenia
3. Pokryj
Opcja: Kolor
4. Odwróć

Podpowieź dźwiękowa

Konfiguracja głosu używanego do wypowiadania wskazówek audio. Wskazówka audio to słowo lub krótka wiadomość, która pomaga zidentyfikować obiekt. Można wybrać głos dla podpowiedzi dźwiękowych, głosy podpowiedzi specyficzne dla języka, a także niestandardową szybkość głosu, głośność, wysokość i wyjątki w wymowie.

Ustawienie Mieszaj informacje zwrotne i mowę umożliwia odtwarzanie dźwięków informacji zwrotnych jednocześnie z mową, jeśli ustawienia Urządzenie wyjściowe mowy i Urządzenie podpowiedzi dźwiękowej są takie same.

Dźwięk informacji zwrotnej krawędzi przycisku

Odtwarzanie dźwięku podczas przesuwania nad krawędzią przycisku.

Dźwięk informacji zwrotnej wyboru

Odtwarzanie dźwięku po wybraniu przycisku bez mowy.

Odtwarzanie sygnału audio przy pierwszym wybraniu

Po włączeniu pierwszy wybór podświetla przycisk i odtwarza wskazówkę audio; drugi wybór aktywuje przycisk. Gdy przycisk jest wyłączony, dotknięcie i przytrzymanie (lub dotknięcie i przeciągnięcie) odtwarza sygnał dźwiękowy; zwolnienie dotknięcia (podniesienie palca z ekranu) aktywuje przycisk.

Dostępne przyciski nawigacji na górnym pasku

Po włączeniu przyciski Wstecz, Strona główna i Pulpit na górnym pasku są dostępne przy użyciu metod dotyku dźwiękowego lub dostępu dotykowego. Po wyłączeniu przyciski te są dostępne tylko przy użyciu dotykowej metody dostępu.

14.13.6 Opcje zatrzymania myszy

Metoda dostępu Zatrzymanie myszy wymaga, aby mysz komputerowa, track ball lub mysz czołowa sterowały kursorem na ekranie. Obiekt jest wybierany, gdy kursor zatrzyma się na obiekcie przez określony czas lub gdy zostanie aktywowany przełącznik.

Typ wyboru

Zatrzymanie

- Wyboru dokonuje się, utrzymując kursor na obiekcie przez określony czas (czas zatrzymania kursora).
 - Czas zatrzymania kursora — pozwala ustawić czas, przez który kursor musi pozostać na obiekcie, aby nastąpiła jego aktywacja.

Przełącz


- Wyboru dokonuje się, aktywując włącznik, gdy kursor znajduje się na żądanym obiekcie.
 - Ustaw przełączanie opcji — możesz dookreślić metodę dostępu dla użytkownika, wybierając spośród podanych opcji. Wybierz i ustaw klawisz, który pozwoli to zrobić.

Podświetlanie

Wybierz preferowany typ i kolor podświetlenia. Podświetlenie to wizualna wskazówka, która pokazuje, kiedy obiekt jest zaznaczony. Podświetlenie zatrzymuje się, gdy obiekt zostanie aktywowany.



W przypadku tej metody dostępu opcja „Bez podświetlenia” nie jest dostępna.

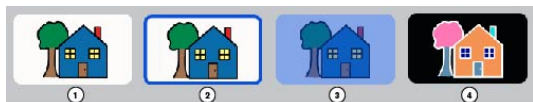

- Brak podświetlenia
- Zarys
Opcje: Kolor, Grubość podświetlenia
- Pokryj
Opcja: Kolor
- Odwróć

Podpowieź dźwiękowa

Konfiguracja głosu używanego do wypowiadania wskazówek audio. Wskazówka audio to słowo lub krótka wiadomość, która pomaga zidentyfikować obiekt. Można wybrać głos dla podpowieści dźwiękowych, głosy podpowieści specyficzne dla języka, a także niestandardową szybkość głosu, głośność, wysokość i wyjątki w wymowie.

Ustawienie Mieszaj informacje zwrotne i mowę umożliwia odtwarzanie dźwięków informacji zwrotnych jednocześnie z mową, jeśli ustawienia Urządzenie wyjściowe mowy i Urządzenie podpowieści dźwiękowej są takie same.

Pokaż przycisk wstrzymania metody dostępu w trybie obsługi

Po włączeniu tej funkcji na górnym pasku w trybie użytkownika wyświetlany jest przycisk Wstrzymaj/Wznów metodę dostępu. Po wyłączeniu przycisk jest ukryty.

Dźwięk informacji zwrotnej wyboru

Odtwarzanie dźwięku po wybraniu przycisku bez mowy.

Dostępne przyciski nawigacji na górnym pasku

Po włączeniu przyciski Wstecz, Strona główna i Pulpit na górnym pasku są dostępne przy użyciu metod zatrzymania myszy lub dostępu dotykowego. Po wyłączeniu przyciski te są dostępne tylko przy użyciu dotykowej metody dostępu.

14.13.7 Opcje sterowania wzrokowego

Metoda ta pozwala użytkownikowi kontrolować TD Snap® wyłącznie za pomocą wzroku. Wyboru dokonuje się poprzez skupienie wzroku na obiekcie przez określony czas (zatrzymanie) lub aktywację przełącznika. Metoda interakcji wzrokowej wymaga urządzenia do interakcji wzrokowej firmy Tobii Dynavox.

Typ wyboru

Zatrzymanie

- Umożliwia użytkownikowi wybór poprzez skupienie wzroku na obiekcie przez określony czas (czas zatrzymania).
 - Czas zatrzymania wzroku — pozwala ustawić czas, przez który spojrzenie musi pozostać na obiekcie, aby można było go wybrać.
 - Odwrócić wzrok przed ponownym wybraniem opcji — gdy ta opcja jest włączona, użytkownik nie może dokonywać wielokrotnego wyboru tego samego celu, chyba że odwróci wzrok od ostatnio wybranego regionu między wyborami. To ustawienie jest pomocne dla użytkowników, którzy przypadkowo wielokrotnie wybierają cele.

Przełącz

- Użytkownik kieruje podświetleniem na ekranie za pomocą wzroku, a następnie dokonuje wyboru za pomocą przełącznika.
 - Ustaw przełączanie opcji — możesz dookreślić metodę dostępu dla użytkownika, wybierając spośród podanych opcji. Wybierz i ustaw klawisz, który pozwoli to zrobić.
Wybór przełącznika za pomocą klawisza klawiatury lub przełącznika Bluetooth może nie działać poza TD Snap®.
 - Czas trwania naciśnięcia przełącznika - czas, przez jaki przełącznik musi być aktywowany, aby wybrać aktualnie podświetlony obiekt.
 - Czas powtarzania przełącznika - czas, jaki użytkownik musi odczekać między aktywacjami przełącznika. Przed upływem tego czasu wszelkie dodatkowe aktywacje przełącznika są ignorowane.

Wzrokowa informacja zwrotna

Wzrokowa informacja zwrotna jest wizualną wskazówką, która informuje użytkownika, gdzie, jak spójnie i przez jaki czas jego spojrzenie jest rejestrowane na ekranie.

Pozwala ustawić styl, kolor i rozmiar dla funkcji Podpowiedź dla spojrzenia.

Opóźnienie po zmianie strony

Po przejściu na nową stronę wybór nie będzie możliwy przez określony czas. Ustawienie to pomaga zapobiegać przypadkowym wyborom przy pierwszym otwarciu strony.

Rodzaj sterowania Windows

Ustawienie trybu dostępu do komputera w celu nawigacji poza oprogramowaniem TD Snap®. Niedostępne na wszystkich urządzeniach.

- Wybór wzrokiem – jest to dwuetapowa metoda wyboru, która zmniejsza ryzyko niechcianych kliknięć.
- Emulacja myszy – emuluje i kontroluje standardowy wskaźnik myszy PC na ekranie.

Podpowiedź dźwiękowa

Konfiguracja głosu używanego do wypowiadania wskazówek audio. Wskazówka audio to słowo lub krótka wiadomość, która pomaga zidentyfikować obiekt. Można wybrać głos dla podpowiedzi dźwiękowych, głosy podpowiedzi specyficzne dla języka, a także niestandardową szybkość głosu, głośność, wysokość i wyjątki w wymowie.

Ustawienie Mieszaj informacje zwrotne i mowę umożliwia odtwarzanie dźwięków informacji zwrotnych jednocześnie z mową, jeśli ustawienia Urządzenie wyjściowe mowy i Urządzenie podpowiedzi dźwiękowej są takie same.

Pokaż przycisk wstrzymania metody dostępu w trybie obsługi

Po włączeniu tej funkcji na górnym pasku w trybie użytkownika wyświetlany jest przycisk Wstrzymaj/Wznów metodę dostępu. Po wyłączeniu przycisk jest ukryty.

Dźwięk informacji zwrotnej wyboru

Odtwarzanie dźwięku po wybraniu przycisku bez mowy.

Dostępne przyciski nawigacji na górnym pasku

Po włączeniu przyciski Wstecz, Strona główna i Pulpit na górnym pasku są dostępne przy użyciu metod sterowania wzrokiem lub dostępu dotykowego. Po wyłączeniu przyciski te są dostępne tylko przy użyciu dotykowej metody dostępu.

Pauza poza ekranem

Gdy funkcja ta jest włączona, użytkownicy śledzący ruch gałek ocznych mogą spojrzeć poniżej ekranu, aby otworzyć menu zawierające przycisk Wstrzymaj/wznów śledzenie ruchu gałek ocznych.

14.13.8 Opcje skanowania

Gdy aktywną metodą wyboru jest skanowanie, obiekty na ekranie są podświetlane w określony sposób. Użytkownik będzie używał przełącznika lub klawisza klawiatury, aby dokonać wyboru, gdy żądany element jest podświetlony. Ta metoda dostępu jest przeznaczona dla osób, których zdolności motoryczne mogą uniemożliwiać skuteczne korzystanie z bezpośrednich metod wyboru.

Typ skanowania

Ustawienie Typ skanowania określa, w jaki sposób podświetlenie skanowania przesuwają się do przodu (automatycznie lub poprzez użycie przełącznika) i w jaki sposób dokonywane są wybory.

1 Przełącz automatyczne skanowanie

- W przypadku korzystania z funkcji 1 Przełącz automatyczne skanowanie oprogramowanie skanuje elementy na stronie przy użyciu wyznaczonego sposobu skanowania. Użytkownik dokonuje wyboru za pomocą przełącznika.
 - Przełącz wprowadzanie — wybierz dotknięcie ekranu lub klawisz klawiatury.
 - Prędkość — ustawienie szybkości automatycznego skanowania.
 - Czas przejścia — ustawienie czasu między dokonaniem wyboru a kontynuacją automatycznego skanowania.
 - Skanuj po — wybierz, kiedy automatyczne skanowanie ma zostać uruchomione ponownie: Wybór, Zmiana strony, Mówienie.
 - Opcja Skanuj po rozpoczęciu wypowiedzi ma trzy opcje: Czekaj na aktywację przełącznika (wznów skanowanie po rozpoczęciu mówienia tylko wtedy, gdy przełącznik został aktywowany), Natychmiast (kontynuuj skanowanie niezależnie od mówienia), Poczekaj na zakończenie mowy (wznów skanowanie po zakończeniu mówienia).
- Jeśli włączona jest funkcja podpowiedzi dźwiękowej, podpowiedź dźwiękowa nie będzie słyszalna w przypadku skanowania podczas odtwarzania innej mowy.
- Mów pełną podpowiedź dźwiękową przed przejściem dalej — gdy ta opcja jest włączona, długie podpowiedzi dźwiękowe opóźniają postęp podświetlenia skanowania do momentu wypowiedzenia całej podpowiedzi dźwiękowej.

Skanowanie krokowe (2 włączniki)

- W przypadku korzystania z funkcji Skanowanie krokowe (2 włączniki) użytkownik uruchamia jeden przełącznik, aby przejść do podświetlenia skanowania, a drugi przełącznik, aby dokonać wyboru.
 - Przełącznik 1 Wejście — wybierz dotknięcie ekranu lub klawisz klawiatury, aby przejść do podświetlenia skanowania.
 - Przełącznik 2 Wejście — wybierz dotknięcie ekranu lub klawisz klawiatury, aby dokonać wyboru.
- Przełącznik 1 Wejście i Przełącznik 2 Wejście muszą być różne.

Skanowanie (1 włącznik)

- Gdy aktywna jest opcja Skanowanie (1 włącznik), użytkownik uruchomi przełącznik, aby przesunąć podświetlenie (każdy wybór powoduje przesunięcie podświetlenia o jeden interwał). Aby wybrać podświetlony obiekt, użytkownik wybierze przełącznik i utrzyma wybór przez określony czas wstrzymania.
 - Przełącznik 1 Wejście — wybierz dotknięcie ekranu lub klawisz klawiatury, aby przejść do podświetlenia skanowania.
 - Czas wstrzymania — minimalny czas potrzebny do wybrania i przytrzymania obiektu w celu jego aktywacji.

Skanowanie zatrzymania wzroku (1 włącznik)

- Gdy włączona jest opcja Skanowanie zatrzymania wzroku (1 włącznik), użytkownik wyzwoli przełącznik, aby przesunąć podświetlenie (każdy wybór powoduje przesunięcie podświetlenia o jeden interwał). Aby wybrać podświetlony obiekt, użytkownik zatrzyma się (nic nie robi) na określony czas wstrzymania.
 - Przełącznik 1 Wejście — wybierz dotknięcie ekranu lub klawisz klawiatury, aby przejść do podświetlenia skanowania.
 - Czas wstrzymania — minimalny czas potrzebny do zatrzymania się na danym obiekcie, aby go aktywować.

Skanowanie odwrotne

- Osoba korzystająca ze skanowania odwrotnego przytrzyma przełącznik, aby przesunąć podświetlenie skanowania (podświetlenie będzie się przesunąć tak długo, jak przełącznik będzie wciśnięty). Gdy osoba zwolni przełącznik, podświetlony obiekt zostanie wybrany.
 - Przełącznik 1 Wejście — wybierz dotknięcie ekranu lub klawisz klawiatury, aby przejść do podświetlenia skanowania.
 - Szybkość — szybkość przesuwania podświetlenia skanowania (gdy przełącznik jest przytrzymany).
 - Mów pełną wypowiedź dźwiękową przed przejściem dalej — gdy ta opcja jest włączona, długie wypowiedzi dźwiękowe opóźniają postęp podświetlenia skanowania do momentu wypowiedzenia całej wypowiedzi dźwiękowej.

Zachowanie podczas skanowania

Zachowanie podczas skanowania to kolejność, w jakiej obiekty na ekranie są podświetlane do zaznaczenia. Ta sekcja zawiera również ustawienia związane z rodzajami skanowanych obiektów.

Schemat samogłoski [V]-spółgłoski [C]

- Rząd / kolumna — Skanuje rzędy od góry do dołu. Gdy wybrany zostanie wiersz, elementy w wierszu są skanowane od lewej do prawej.
- Kolumna / rząd — Skanuje kolumny od lewej do prawej. Gdy wybrana zostanie kolumna, elementy w kolumnie są skanowane od góry do dołu.
- Liniowo — obiekty są skanowane pojedynczo od lewej do prawej, od góry do dołu.

Liczba przejść

- Liczba przejść — określa, ile razy skanować wiersz lub kolumnę bez dokonania wyboru.
- Po końcowym przejściu — określa czynności po tym, jak funkcja Autoskanowanie zakończy wyznaczoną liczbę przebiegów (nieodstępne dla nieograniczonej liczby przebiegów).

Skanowanie grupy

- Po włączeniu tej funkcji przyciski stron są skanowane grupowo.

Grupy skanowania muszą być wstępnie zdefiniowane. Zobacz sekcję 9.16 *Grupy skanowania*, str 77.

Skanuj od ostatniego wyboru

- Po włączeniu skanowanie zostanie wznowione na stronie, na której dokonano ostatniego wyboru. Jeśli ta opcja jest wyłączona, po dokonaniu wyboru skanowanie wznowi się na górze strony.

Skanuj górny pasek

- Gdy opcja ta jest włączona, skanowane są dostępne do skanowania elementy na górnym pasku (Wstecz, Strona główna i Pulpit). Po wyłączeniu elementy górnego paska nie są skanowane.



Przyciski Wyszukaj, Synchronizuj, Wstrzymaj metodę dostępu i Edytuj na górnym pasku nie są skanowane. Są one dostępne dotykowo w dowolnym momencie.


Skanuj puste przyciski

- Gdy opcja ta jest włączona, skanowane są przyciski bez zawartości. Gdy opcja ta jest wyłączona, puste przyciski nie są skanowane.

Podświetlanie

Wybierz preferowany typ i kolor podświetlenia. Podświetlenie to wizualna wskazówka, która pokazuje, kiedy obiekt jest skanowany. Podświetlenie zatrzymuje się, gdy obiekt zostanie aktywowany.

W przypadku tej metody dostępu opcja „Bez podświetlenia” nie jest dostępna.

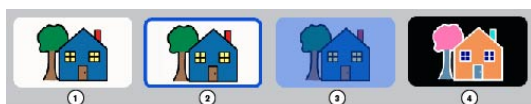

1. Brak podświetlenia
2. Zarys
Opcje: Kolor, Grubość podświetlenia
3. Pokryj
Opcja: Kolor
4. Odwróć

Czas wstrzymania

Czas wstrzymania to minimalny czas potrzebny do wybrania i przytrzymania obiektu w celu jego aktywacji.

Opóźnienie między wyborami

Opóźnienie między wyborami pomaga zapobiegać przypadkowym powtórzeniom wyboru przełącznika. Po dokonaniu wyboru przełącznika, następny wybór przełącznika nie może nastąpić przed upływem czasu ustawionego w opcji Opóźnienie między wyborami. Jeśli przełącznik zostanie uruchomiony w czasie opóźnienia, odliczanie zostanie zresetowane.

Podpowiedź dźwiękowa

Konfiguracja głosu używanego do wypowiadania wskazówek audio. Wskazówka audio to słowo lub krótka wiadomość, która pomaga zidentyfikować obiekt. Można wybrać głos dla podpowiedzi dźwiękowych, głosy podpowiedzi specyficzne dla języka, a także niestandardową szybkość głosu, głośność, wysokość i wyjątki w wymowie.

Ustawienie Mieszaj informacje zwrotne i mowę umożliwia odtwarzanie dźwięków informacji zwrotnych jednocześnie z mową, jeśli ustawienia Urządzenie wyjściowe mowy i Urządzenie podpowiedzi dźwiękowej są takie same.

Zoom

Po włączeniu tej funkcji obiekty na ekranie są powiększane podczas skanowania. W przypadku skanowania wielu obiektów (wierszy lub kolumn), pierwszy obiekt w schemacie zostaje przybliżony, a kolejne obiekty są podświetlane zgodnie z ustawieniami Styl podświetlenia.

Pokaż przycisk wstrzymania metody dostępu w trybie obsługi

Po włączeniu tej funkcji na górnym pasku w trybie użytkownika wyświetlany jest przycisk Wstrzymaj/Wznów metodę dostępu. Po wyłączeniu przycisk jest ukryty.

Dźwięk informacji zwrotnej wyboru

Odtwarzanie dźwięku po wybraniu przycisku bez mowy.


14.14 Śledzenie danych

14.14.1 Śledź wykorzystanie przycisków

Gdy funkcja śledzenia wykorzystania przycisków jest włączona, rejestrowane są informacje o wykorzystaniu przycisków w TD Snap®. Informacje te obejmują czas zdarzenia wykorzystania przycisku, komunikat, język, zestaw stron, stronę, pozycję siatki, metodę dostępu (np. interakcja wzrokowa), tryb modelowania oraz to, czy przycisk został wypowiedziany, czy wstawiony do okna komunikatu.



Informacje o wykorzystaniu przycisków nie są rejestrowane w trybie edycji.

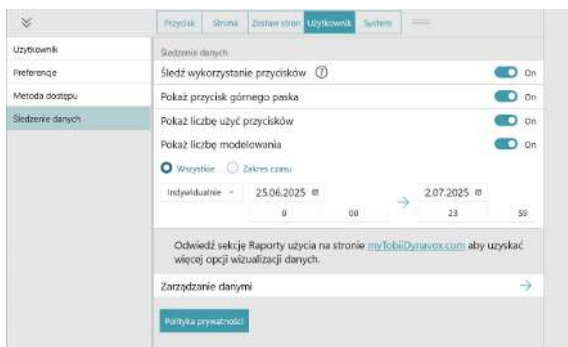

Włącz śledzenie wykorzystania przycisków



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij kategorię **Śledzenie danych**.
4. Ustaw opcję **Śledź wykorzystanie przycisków** na **Wł**.
5. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące prywatności danych i wybierz opcję **Tak**, aby włączyć korzystanie z przycisku śledzenia. Jeśli nie chcesz włączać funkcji śledzenia wykorzystania przycisków, wybierz opcję **Nie**.



Liczniki użycia przycisków można wyświetlić bezpośrednio w oprogramowaniu TD Snap®, włączając opcję Pokaż liczbę użyć przycisków i/lub Pokaż liczbę modelowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 14.14.3 Pokaż liczbę użyć przycisków, str 124 and 14.14.4 Pokaż liczbę modelowania, str 125. Dalsze wizualizacje danych są dostępne w sekcji **Raporty wykorzystania** na koncie myTobiiDynavox.com.

Śledzenie wykorzystania przycisków, gdy jest włączone, odbywa się za każdym razem, gdy używane jest oprogramowanie TD Snap®. Aby uzyskać dokładne dane dotyczące wykorzystania, ważne jest rozróżnienie między wyborami przycisków dokonywanymi przez użytkownika a modelowaniem wyborów dokonywanych przez opiekuna lub partnera komunikacyjnego. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z TD Snap® za pomocą metody dostępu innej niż dotykowa (Zatrzymanie myszy, Interakcja wzrokowa lub Skanowanie), wszelkie wybory przycisków dokonane za pomocą dotyku są automatycznie rejestrowane jako modelowanie. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z TD Snap® za pomocą dotykowej metody dostępu, opiekun musi włączyć tryb modelowania przed dokonaniem jakichkolwiek wyborów modelowania, a następnie wyłączyć go ponownie, zanim użytkownik dokona następnego wyboru.



Jeśli funkcja śledzenia wykorzystania przycisków jest włączona, a użytkownik ma metodę dostępu opartą na dotyku, upewnij się, że włączona jest także opcja Pokaż przycisk na górnym pasku. Zobacz sekcję 14.14.2 Przycisk Pokaż pasek górny, str 124.



W przypadku udostępnienia zestawu stron zawierającego dane o użytkowaniu będzie można dołączyć lub nie informacje o wykorzystaniu.

Włącz tryb modelowania (konieczne tylko wtedy, gdy metoda dostępu jest ustawiona na Dotyk, Aktywacja dotykem, Aktywacja zwolnieniem lub w przypadku używania Ekranu jako przełącznika).



Jeśli bieżąca metoda dostępu zawiera przycisk Wstrzymaj metodę dostępu na górnym pasku, wstrzymaj metodę



dostępu

przed rozpoczęciem poniższych czynności. Wyłącz wstrzymanie metody dostępu



po wyjściu z trybu modelowania.



1. Kliknij przycisk **Śledzenie danych** na pasku górnym.

Aby włączyć przycisk śledzenia danych na górnym pasku, zobacz sekcję 14.14.2 Przycisk Pokaż pasek górny, str 124.

2. Włącz Tryb modelowania.

Po zakończeniu modelowania należy pamiętać o wyłączeniu trybu modelowania.



Tryb modelowania można również włączać i wyłączać poprzez długie dotknięcie (dotknięcie i przytrzymanie) przycisku Śledzenie danych na górnym pasku. Gdy tryb modelowania jest włączony, przycisk śledzenia danych



wygląda tak:




. Gdy tryb modelowania jest wyłączony, przycisk śledzenia danych wygląda tak:

14.14.2 Przycisk Pokaż pasek górny



Po włączeniu, na górnym pasku pojawi się przycisk Śledzenie danych . Przycisk Śledzenie danych zapewnia szybki dostęp do następujących ustawień: Tryb modelowania, Pokaż zliczenia użycia przycisków, Pokaż zliczenia modelowania i Zarządzaj danymi.

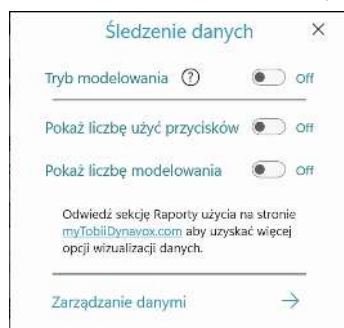

14.14.3 Pokaż liczbę użyć przycisków

Gdy opcja ta jest włączona, przyciski wyświetlają białą plakietkę z liczbą użyć przycisku przez użytkownika (przy włączonej funkcji śledzenia użycia przycisków) w określonym przedziale czasu. Domyślny zakres czasu to Wszystkie.

Włącz opcję Pokaż liczbę użyć przycisków (w Ustawieniach użytkownika)



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij kategorię **Śledzenie danych**.
4. Ustaw opcję **Pokaż liczbę użyć przycisków** na Wł.



Aby zmienić zakres czasu zliczania użycia, wybierz opcję **Zakres czasu**, a następnie użyj menu rozwijanego lub pół daty/czasu początkowego i końcowego.

Włącz opcję Pokaż liczbę użyć przycisków (za pomocą przycisku śledzenia danych na górnym pasku).



Aby włączyć przycisk śledzenia danych na górnym pasku, zobacz sekcję 14.14.2 Przycisk Pokaż pasek górny, str 124.



1. Kliknij przycisk

Śledzenie danych na górnym pasku.


2. Włącz opcję **Pokaż liczbę użyć przycisków**.



Aby włączyć przycisk śledzenia danych na górnym pasku, zobacz sekcję 14.14.2 *Przycisk Pokaż pasek górny*, str 124.



Aby zmienić zakres czasu zliczania użycia, wybierz opcję **Zakres czasu**, a następnie użyj menu rozwijanego lub pól daty/czasu początkowego i końcowego.

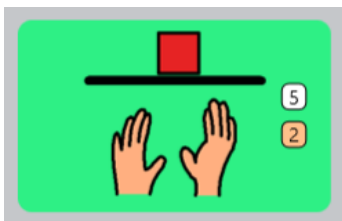

Ilustracja 46: Przycisk pokazujący liczbę użyć (biały) i liczbę modelowania (pomarańczowy).

14.14.4 Pokaż liczbę modelowania

Gdy opcja ta jest włączona, przyciski wyświetlają pomarańczową plakietkę z liczbą użyć przycisku w trybie modelowania (przy włączonej funkcji śledzenia użycia przycisków) w określonym przedziale czasu. Domyślny zakres czasu to Wszystkie.

Włącz opcję Pokaż liczbę modelowania (w Ustawieniach użytkownika)



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij kategorię **Śledzenie danych**.
4. Ustaw opcję **Pokaż liczbę modelowania** na Wł.



Aby zmienić zakres czasu zliczania modelowania, wybierz opcję **Zakres czasu**, a następnie użyj menu rozwijanego lub pól daty/czasu początkowego i końcowego.

Włącz opcję Pokaż liczbę modelowania (za pomocą przycisku śledzenia danych na górnym pasku)



Aby włączyć przycisk śledzenia danych na górnym pasku, zobacz sekcję 14.14.2 *Przycisk Pokaż pasek górny*, str 124.



1. Kliknij przycisk **Śledzenie danych** na pasku górnym.
2. Włącz opcję **Pokaż liczbę modelowania**.



Aby zmienić zakres czasu zliczania modelowania, wybierz opcję **Zakres czasu**, a następnie użyj menu rozwijanego lub pól daty/czasu początkowego i końcowego.

14.14.5 Zarządzanie danymi

Resetowanie liczników użycia przycisków i liczników modelowania do zera dla bieżącej strony, przycisków paska komunikatu, przycisków paska narzędzi lub całego zestawu stron.



Zresetowanie liczników użycia przycisków nie usuwa wcześniejszych danych użytkownika. Jeśli chcesz trwale usunąć wszystkie dane użytkownika, które zostały zapisane na Twoim koncie myTobiiDynavox, użyj przeglądarki internetowej, aby wejść na myTobiiDynavox.com > Snap > Raporty użycia.

Resetuj liczbę użyć (w Ustawieniach użytkownika)



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **Użytkownik**.
3. Kliknij kategorię **Śledzenie danych**.
4. Kliknij **Zarządzanie danymi**.
5. Wybierz obszar, w którym chcesz wyzerować liczniki użycia przycisków i liczniki modelowania.
6. Kliknij **Reset**, aby zresetować liczniki użycia i modelowania dla wybranego obszaru. Aby anulować operację resetowania, kliknij Anuluj.

Resetuj liczbę użyć przycisków (za pomocą przycisku śledzenia danych na górnym pasku)



Aby włączyć przycisk śledzenia danych na górnym pasku, zobacz sekcję *14.14.2 Przycisk Pokaż pasek górny*, str 124.



Śledzenie danych na pasku górnym.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij **Zarządzanie danymi**.
3. Wybierz obszar, w którym chcesz wyzerować liczniki użycia przycisków i liczniki modelowania.
4. Kliknij **Reset**, aby zresetować liczniki użycia i modelowania dla wybranego obszaru. Aby anulować operację resetowania, kliknij Anuluj.

15 Ustawienia systemowe

15.1 Preferencje

15.1.1 Hasło

Po włączeniu tej funkcji, aby uzyskać dostęp do zakupów w aplikacji i określonych funkcji na górnym pasku, wymagane jest podanie czterocyfrowego kodu dostępu. Włączenie kodu dostępu może pomóc w zapobieganiu nieautoryzowanym zmianom zestawu stron i ustawień.

Włączanie kodu dostępu



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **System**.
3. Kliknij **Kod dostępu**.
4. Ustaw przełącznik Zastosuj kod dostępu w pozycji **Wł.**
5. Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu, który będzie znany tylko Tobie i trudny do zgadnięcia.

6. Wprowadź kod dostępu ponownie, aby go zweryfikować.
7. Po włączeniu opcji Użyj kodu dostępu, kod dostępu jest domyślnie włączony dla zakupów w aplikacji, trybu edycji, synchronizacji, śledzenia danych, trybu wyszukiwania, żarówki i przycisków nawigacyjnych na górnym pasku (Wstecz, Strona główna i Pulpit). Przełącz ustawienie na Wył. dla dowolnej z tych funkcji, jeśli chcesz, aby były one dostępne bez kodu dostępu.
Jeśli funkcja Kod dostępu jest włączona, a Kod dostępu funkcji Synchronizacji jest wyłączony, wówczas Synchronizacja będzie działać w trybie Tylko pobieranie. Podczas synchronizacji w trybie „Tylko pobieranie” będą odbierane zmiany w zestawach stron (wprowadzone na innych urządzeniach), ale nie będą wysyłane żadne zmiany w ustawieniach stron wprowadzone na bieżącym urządzeniu.
8. Po wyjściu z trybu edycji kod dostępu będzie wymagany, aby uzyskać dostęp do zakupów w aplikacji i dowolnych funkcji włączonych w menu preferencji kodu dostępu.



Jeśli masz już włączony kod dostępu, możesz go zresetować, wybierając przycisk



Edytuj.

W przypadku zapomnienia kodu dostępu należy użyć kodu głównego (0520), aby uzyskać dostęp do trybu edycji i natychmiast zresetować kod dostępu.

15.1.2 Ustawienia ekranu (tylko Windows)

Po włączeniu trybu pełnoekranowego TD Snap® wypełni cały ekran urządzenia. Gdy tryb pełnoekranowy jest wyłączony, TD Snap® będzie działać w oknie o zmiennym rozmiarze.

15.1.3 Język trybu edycji

Wybierz język interfejsu trybu edycji.

15.2 Urządzenie



Funkcje sekcji urządzenia są dostępne tylko w urządzeniach I-13, I-16 i TD Pilot firmy Tobii Dynavox.

15.2.1 Ustawienia okna partnera

Okno partnera to ekran znajdujący się z tyłu urządzeń I-13, I-16 i TD Pilot firmy Tobii Dynavox. Okno partnera informuje partnera rozmowy, że użytkownik przygotowuje się do rozmowy i wyświetla tekst do przeczytania przez partnera.



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **System**.
3. Kliknij **Urządzenie**.
4. Dokonaj wyboru w opcjach okna partnera:
 - **Pokaż tekst okna komunikatu** — wyświetla tekst okna komunikatu w oknie partnera w czasie rzeczywistym.
 - **Wyświetlanie wypowiedzanego tekstu** — wyświetla tekst w oknie partnera tylko wtedy, gdy jest on wypowiedzany. Podczas pisania w oknie komunikatu, okno partnera wyświetla serię kropek, aby wskazać, że użytkownik przygotowuje wiadomość. Gdy w Oknie komunikatu zostanie wypowiedziana wiadomość, Okno partnera będzie przewijać tekst w miarę jego wypowiedzania.
- Okno partnera wyświetla tylko tekst. Nie są w nim wyświetlane symbole.
5. Dokonaj wyboru w opcjach stylu wskaźnika okna partnera:
 - **Lustro** — wyświetla miniaturową wersję okna partnera na górnym pasku.
 - **Ikona** — wyświetla ikonę, gdy okno partnera jest włączone. Ukrywa ikonę, gdy okno partnera jest wyłączone.
6. Ustaw przełącznik okna partnera na **Wł.** lub **Wył.** Gdy opcja okna partnera jest ustawiona na **Wył.**, nie wyświetla ono żadnego tekstu.



Za pomocą przycisków Akcje można również kontrolować jasność ekranu okna partnera oraz włączać i wyłączać okno partnera. Zobacz sekcje 9.6.2 *Aktywna zawartość*, str 41 and 9.7 *Akcje przycisku*, str 51.

15.3 Sklep

Zakup elementów (tylko iPadOS) i zarządzanie kluczem aktywacyjnym.

Uwaga: jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Windows, możesz dokonać zakupów dzwoniąc do działu wsparcia Tobii Dynavox. <https://www.tobiidynavox.com/pages/locations>

15.3.1 Dokonaj zakupu (tylko iPadOS)



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **System**.
3. Kliknij **Sklep**.
4. Kliknij **Kup** na pozycji, którą chcesz nabyć.
5. Dokonaj bezpiecznej transakcji.



Do dokonywania zakupów w sklepie wymagane jest połączenie z Internetem.

15.3.2 Przywracanie zakupów (tylko Windows)

Jeśli zakupione elementy nie są wyświetlane w wersji aplikacji TD Snap® dla systemu Windows, należy przywrócić zakupione elementy za pomocą klucza aktywacyjnego.



Do przywrócenia zakupów wymagane jest połączenie z Internetem.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **System**.
3. Kliknij **Sklep**.
4. Kliknij **Przywróć zakupy**.
5. Wprowadź **Klucz aktywacyjny**.
6. Wybierz **Gotowe**.

15.3.3 Dezaktywuj klucz (tylko Windows)

Usuń klucz aktywacyjny z bieżącego urządzenia z systemem Windows, aby można go było użyć na innym urządzeniu.



1. Kliknij przycisk **Edytuj**.
2. Kliknij kartę **System**.
3. Kliknij **Sklep**.
4. Kliknij **Dezaktywuj klucz**. Otworzy się okno dialogowe potwierdzenia.
5. Potwierdź, że chcesz dezaktywować klucz na tym urządzeniu.

15.4 Zestawy symboli

15.4.1 Ustawienia wyszukiwania

Gdy włączona jest funkcja Bezpieczne wyszukiwanie symboli, symbole odwołujące się do seksualności nie będą wyświetlane w wyszukiwaniu symboli, oknie komunikatów (z symbolami) ani w trybie wyszukiwania. Gdy funkcja Bezpieczne wyszukiwanie symboli jest wyłączona, wyszukiwanie symboli, symbole w oknie komunikatów i tryb wyszukiwania będą wykorzystywać wszystkie dostępne symbole.

15.4.2 Zainstalowane i możliwe do pobrania symbole

Zestawy symboli wymienione w sekcji Zainstalowane symbole to zestawy symboli aktualnie zainstalowane i dostępne na urządzeniu.

Aby usunąć zainstalowany zestaw symboli, kliknij przycisk  **Usuń**, a następnie wybierz opcję **Usuń** w celu potwierdzenia.



Nie można usunąć symboli Snap Core.

Zestawy symboli wymienione w sekcji Symbole do pobrania to bezpłatne zestawy symboli, które nie są obecnie zainstalowane na urządzeniu. Aby pobrać i zainstalować bezpłatny zestaw symboli, wybierz opcję **Pobierz** obok żądanego zestawu symboli.



Do pobierania zestawów symboli wymagane jest aktywne połączenie internetowe.



Niektóre zestawy symboli innych firm są dostępne do nabycia wyłącznie za pośrednictwem Sklepu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji 15.3 Sklep, str 128.

15.4.3 Zmiana kolejności zestawów symboli

Kolejność wyników wyszukiwania symboli jest określana przez kolejność zestawów symboli na liście Zainstalowane symbole. Jeśli na przykład w zestawie stron używasz głównie symboli o wysokim kontraście, możesz przenieść zestaw symboli o wysokim kontraście na górę listy zainstalowanych symboli, aby nadać priorytet symbolom o wysokim kontraście (jeśli są dostępne) w wyszukiwaniu symboli.




Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **System**.
3. Kliknij kategorię **Zestawy symboli**.



4. Wybierz i przytrzymaj uchwyt zestawu symboli na liście Zainstalowane symbole.
5. Przeciągnij zestaw symboli na nową pozycję na liście.

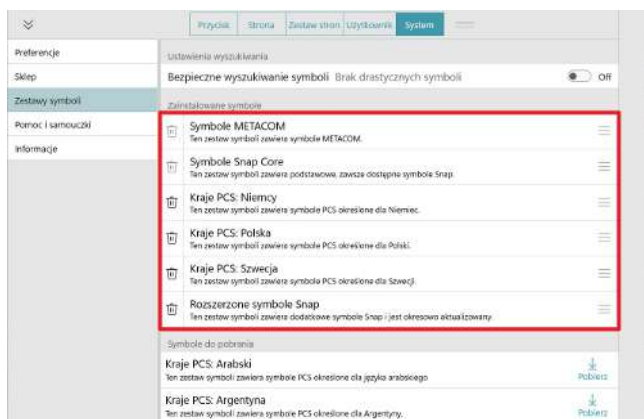

15.5 Pomoc i samouczki

15.5.1 Filmy

Obejrzyj filmy, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z TD Snap®.

15.5.2 Pathways dla Core First

	Pathways dla Core First to bezpłatna aplikacja, która uczy najbardziej skutecznych metod korzystania z pakietu TD Snap® Core First w zakresie komunikacji, umiejętności czytania i pisanja, wsparcia zachowania i nie tylko! Skorzystaj z linków w tej sekcji, aby dowiedzieć się więcej.
--	---

15.5.3 Skrócona prezentacja

Uruchom ponownie skróconą prezentację, aby zapoznać się z oprogramowaniem TD Snap®.

15.5.4 Pomoc zewnętrzna

Uzyskaj dostęp do podręcznika użytkownika, kart szkoleniowych, dodatkowych filmów wideo, internetowej bazy wiedzy i umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

15.6 Informacje

Informacje o wersji TD Snap®.

15.6.1 Wyślij informację zwrotną

Użyj przycisku Wyślij opinię, aby zgłosić problem z pakietem TD Snap® lub przesłać prośbę o dodanie funkcji do zespołu programistów. Nie jest to czat na żywo ani linia pomocy technicznej.

15.6.2 Aktualizacje oprogramowania



Dotyczy tylko systemu Windows

Aplikacja TD Snap® aktualizuje się automatycznie w regularnych odstępach czasu.

Aby ręcznie sprawdzić dostępność nowej wersji i pobrać aktualizację:



Edytuj.

1. Kliknij przycisk
2. Kliknij kartę **System**.
3. Kliknąć kategorię **Informacje**.
4. Jeśli dostępna jest aktualizacja, pojawi się ona pod numerem EAN. Aby pobrać zaktualizowaną wersję, wybierz opcję **Zainstaluj aktualizację**.

Wsparcie dotyczące urządzenia firmy Tobii Dynavox

Pomoc on-line

Zapoznaj się ze stroną wsparcia dotyczącą danego produktu firmy Tobii Dynavox. Znajdują się na niej aktualne informacje dotyczące problemów oraz porady ułatwiające użytkowanie produktu. Strony wsparcia można znaleźć on-line pod adresem: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Kontakt z doradcą handlowym lub sprzedawcą

W przypadku pytań lub problemów z produktem należy się skontaktować z doradcą handlowym lub autoryzowanym sprzedawcą firmy Tobii Dynavox, u którego można uzyskać pomoc. Będą oni najlepiej poinformowani w sprawie indywidualnych ustawień danego użytkownika i będą mogli zapewnić najlepszą pomoc, udzielając rad i szkoleń w zakresie korzystania z produktu. Aby uzyskać dane kontaktowe, należy odwiedzić witrynę <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>