

TD Snap® – Podstawy

Karty ćwiczeń



Spis treści

3	Wskazówki dotyczące wprowadzania AAC
4	Bycie świetnym partnerem w komunikacji
4	Indywidualizuj zestaw stron
5	Edytuj przycisk
6	Dodaj przycisk
7	Wyszukaj słowo
7	Zablokuj tryb edycji hasłem
8	Popraw wymowę
9	Udostępnij i zapisz swoje strony
10	Dalsze kroki
10	Często zadawane pytania
11	myTobiiDynavox.com
12	Dodatkowe wsparcie

Wskazówki dotyczące wprowadzania AAC



Pracuj zespołowo

Wszyscy członkowie rodziny i inne istotne osoby powinny mieć wiedzę na temat TD Snap®. Daj każdej z osób trochę czasu na zapoznanie się z aplikacją i odnalezienie często używanych słów, które pojawią się w interakcjach z użytkownikiem AAC.



Miej je pod ręką

Miej urządzenie AAC przy sobie, aby przez cały czas było dostępne dla użytkownika. Myśl o urządzeniu AAC jak o głosie użytkownika. Ty masz zawsze swój głos „ze sobą”, więc użytkownicy też powinni mieć swój głos!



Bądź modelem

Ludzie uczą się posługiwania językiem przez obserwację i słuchanie, a potem samodzielne próby. Udowodniono, że modelowanie jest najlepszym sposobem, aby nauczyć kogoś komunikowania się przy użyciu AAC. Modelowanie oznacza dotykanie i używanie urządzenia tak, jakbyśmy rozmawiali i kontaktowali się z tą osobą. Rozmawiając z użytkownikiem AAC, a także w ciągu dnia, modeluj komunikowanie się z wykorzystaniem TD Snap®. W modelowaniu powinni uczestniczyć również wszyscy członkowie rodziny i opiekunowie.

- Modelowanie polega na pokazywaniu drugiej osobie, jak się ze sobą komunikować.
- Nie wymaga od nas naśladowania.
- Nie modeluj każdego wypowiedzanego słowa, lecz tylko słowa kluczowe.
- Modeluj, szukając słownictwa.
- Popelnianie błędów jest w porządku. Daje Ci to szansę na modelowanie poprawek.
- Modelowanie to nie przepytывanie czy testowanie.



Obejrzyj wideo
z demonstracją
modelowania.

qrco.de/bbA7Ur



Reaguj na wszystkie próby komunikacji

Często zdarza się, że odkrywając swoje urządzenie użytkownicy AAC wybierają pozornie losowe elementy. Odpowiadając na dokonane przez nich wybory wzmacniasz w nich poczucie, że każde słowo ma znaczenie i niesie realne efekty.



Wykorzystuj okazje

Identyfikuj pory dnia, w których dana osoba może uczyć się i ćwiczyć swoje umiejętności komunikacji. Na przykład, pomóż jej używać TD Snap® do zakomunikowania wyboru, co chce zjeść lub jaki film chce obejrzeć.



Zachowuj cierpliwość

Nauka posługiwania się AAC jest jak nauka każdego nowego języka. Nie oczekujemy od nikogo, że będzie w stanie rzeczowo komunikować się w zupełnie nowym języku w pierwszych tygodniach, czy nawet miesiącach prób. Po prostu modeluj dalej, zapewnij interesujące okazje do komunikowania się i reaguj na wszystko, co wybierze użytkownik TD Snap®.

Bycie świetnym partnerem w komunikacji

Żeby być dobrym partnerem w komunikacji, pamiętaj o poniższych strategiach, które pozwolą Ci stworzyć środowisko sprzyjające skutecznemu porozumiewaniu się.



Stwarzaj pozytywne środowisko dla komunikacji

Przyjmij te postawy i strategie zachęcające do komunikowania się.

- **Wychodź z założenia, że druga strona jest zdolna**
"Wiem, że masz o czym mówić" „Dasz radę”.
- **Koncentruj się na używaniu, nie na testowaniu**
Zamiast „Znajdź książkę”, powiedz „Pora coś poczytać. Jaką książkę czytamy?”
- **Reaguj na wszelkie formy komunikacji**
Osoba ucząca się: uśmiecha się do Ciebie. Partner: „Cześć i czołem!”
- **Czekaj**
Komunikacja przez AAC wymaga czasu. Zanim pomożesz znaleźć właściwe słownictwo, policz do pięciu. Jeżeli użytkownik AAC układa zdanie, czekaj cierpliwie aż je wypowie, zamiast patrzeć mu przez ramię, zgadywać, co chce powiedzieć, albo kontynuować rozmowę.



Wypatruj sukcesów

Sukces w komunikacji to coś więcej niż przekazanie przez daną osobę tego, co oczekujesz, kiedy i w sposób, jaki tego oczekujesz.

Sukcesem może być:

- Większa uwaga przykładana do interakcji
- Inicjowanie komunikacji
- Używanie większego słownictwa
- Dłuższe interakcje
- Większa radość z interakcji
- Większa niezależność w komunikacji

Indywidualizuj zestaw stron

Bez względu na wybrany zestaw stron dobrze będzie dodać trochę spersonalizowanego słownictwa. Poświęć trochę czasu na przejrzanie zestawu stron, aby znaleźć najlepsze miejsca na dodanie tego słownictwa. Aby uzyskać pomoc dotyczącą dodawania niektórych lub wszystkich poniższych informacji, zapoznaj się z sekcjami Edytuj przycisk i Dodaj przycisk:

- Imiona oraz zdjęcia przyjaciół i rodziny
- Informacje osobiste, o ile jest to stosowne do wieku (np. adres e-mail, numer telefonu)
- Ulubione dania i restauracje
- Preferowane serie telewizyjne i muzycy

Wskazówka: Zanim coś dodasz, użyj narzędzia Wyszukaj, aby sprawdzić, czy dany element słownictwa już znajduje się w zestawie stron.

Edytuj przycisk

1 Przejdź do strony z przyciskiem, który chcesz edytować.

2 Wybierz **Edytuj**.



3 Na dole ekranu pojawi się panel edycji. Zauważ, że „Przycisk” jest już wyróżniony.



4 Kliknij przycisk, który chcesz edytować.

5 Aby zmienić symbol przycisku:



Aby znaleźć symbol, kliknij przycisk **Wyszukaj**.



Aby dodać zdjęcie, kliknij przycisk **Kamera**.




Aby zmienić kolory aktualnego symbolu, kliknij przycisk **Edytor symboli**.

6 Aby zmienić tekst, który widnieje na przycisku, wpisz go w polu Tekst. Aby zmienić wprowadzaną lub wypowiedzaną wiadomość po wybraniu przycisku, wpisz go w polu Komunikat.

7 Aby zmienić kolor przycisku, obramowanie, czcionkę lub układ, wybierz **Styl**.

8 Aby zmienić zachowanie przycisku po jego wybraniu, edytuj Akcje.

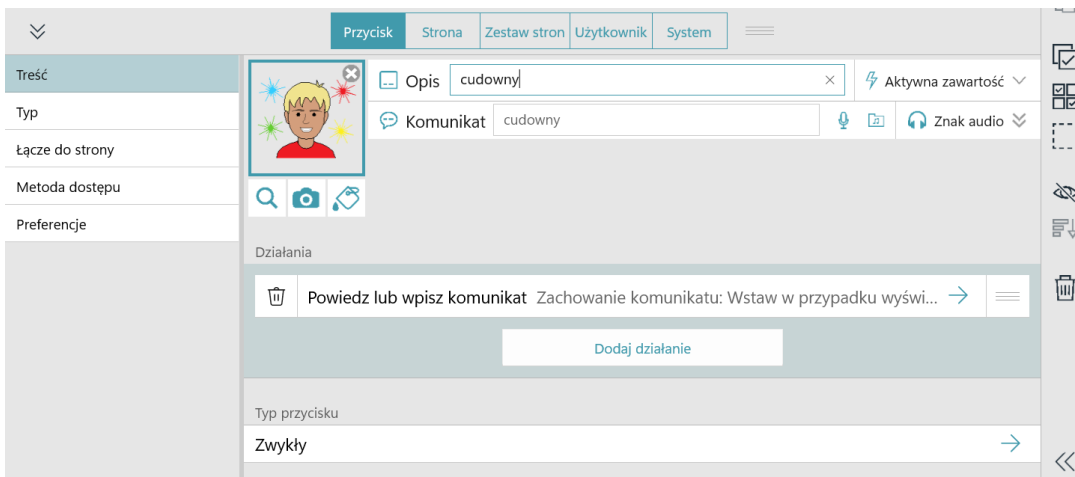

9 Po zakończeniu edycji wybierz **Gotowe**.



Obejrzyj wideo na temat edytowania przycisków.

qrco.de/bbA7XP

Dodaj przycisk

1 Przejdź do strony, na której chcesz dodać przycisk.

2 Wybierz **Edytuj**.



3 Kliknij pustą komórkę, w której chcesz dodać przycisk.



4 W polu **Tekst** wpisz opis przycisku.

5 Aby zmienić symbol przycisku:



Aby znaleźć symbol, kliknij przycisk **Wyszukaj**.



Aby dodać zdjęcie, kliknij przycisk **Kamera**.



Aby zmienić kolory aktualnego symbolu, kliknij przycisk **Edytor symboli**.

6 Gdy skończysz dodawać przyciski, wybierz **Gotowe**.



Uwaga

Akcja „Powiedz lub wpisz komunikat” jest dodawana do wszystkich nowych przycisków automatycznie. Aby dodać inne akcje, kliknij przycisk **Dodaj akcję**.

Wyszukaj słowo

- 1 Kliknij narzędzie **Wyszukaj**.




- 2 Kliknij pole tekstowe i wpisz wyszukiwane słowo.
- 3 Wybierz pożądany wynik z listy opcji.
- 4 Idź według wyróżnionej ścieżki, aby znaleźć słowo lub wyrażenie.



Obejrzyj krótkie wideo na temat obsługi narzędzia Wyszukaj.

grco.de/bbAAcm

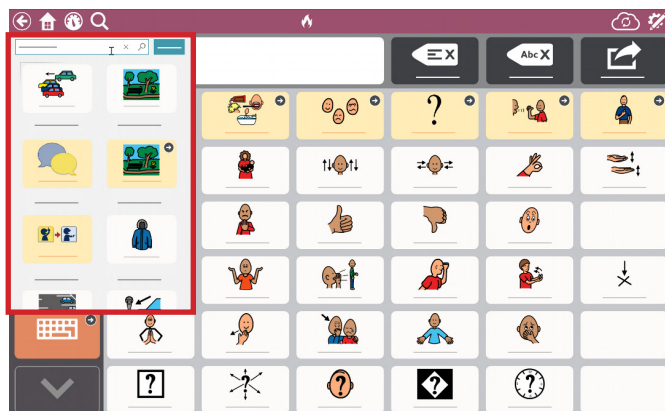


Zablokuj tryb edycji hasłem

Jeżeli musisz uniemożliwić użytkownikowi edycję zestawu stron, ustawień, zakupów w aplikacji lub synchronizacji, dostęp do tych funkcji możesz zastrzec hasłem.

- 1 Kliknij przycisk **Edytuj**.



- 2 Kliknij kartę **System**.
- 3 Ustaw przełącznik **Zastosuj hasło** w pozycji **Wł**.
- 4 Wprowadź czterocyfrowe hasło, które będzie znane tylko Tobie i trudne do zgadnięcia.
- 5 Wprowadź hasło ponownie, aby je zweryfikować.

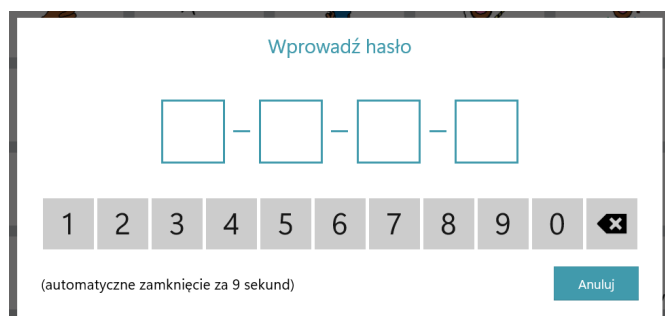

Po wyjściu z Trybu edycji dostęp do zakupów w aplikacji, a także Trybu edycji, Synchronizacji lub Trybu wyszukiwania – o ile zostały wybrane – będzie wymagał podania hasła.



Wskazówka

Jeśli zapomnisz hasła, w instrukcji obsługi TD Snap® podane jest hasło nadrzędne.

Popraw wymowę

Jeśli znajdziesz słowo błędnie wymawiane przez wybrany głos, możesz skorzystać z funkcji wyjątku w wymowie, aby nauczyć głos wypowiedzania tego słowa w taki sposób, jaki określisz.

- 1 Kliknij przycisk **Edytuj**.



- 2 Kliknij kartę **Użytkownik**.

- 3 Kliknij przycisk **Wyjątki w wymowie**.

- 4 Kliknij przycisk **Dodaj wyjątek w wymowie**.

Otworzy się okienko dialogowe Dodaj wyjątek w wymowie.

- 5 W polu Słowo wpisz dane słowo zgodnie z obowiązującym zapisem ortograficznym.

- 6 W polu Wymowa wpisz to słowo fonetycznie tak, jak chcesz, żeby było wymawiane.
Aby przetestować wymowę, kliknij przycisk **Podgląd**.

- 7 Aby zapisać Wyjątek w wymowie, kliknij przycisk **Gotowe**.



Uwaga

Wyjątki w wymowie są powiązane z głosem, który jest aktywny podczas tworzenia wyjątków w wymowie. Jeżeli zmienisz głos i zechcesz użyć tych samych wyjątków w wymowie, musisz zaimportować je z poprzednio używanego głosu. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi TD Snap®.

Udostępnij i zapisz swoje strony

Synchronizuj

Synchronizacja pozwala:

- Używać tej samej wersji zestawu stron na wielu urządzeniach
- Udostępniać zestawy stron innym użytkownikom
- Dokonywać edycji zdalnie
- Zapisywać swój zestaw stron w chmurze jednym kliknięciem

Inaczej niż w przypadku kopiowania, synchronizowane strony są połączone ze sobą za sprawą aktualnej wersji w chmurze.

Gdy klikniesz przycisk Synchronizuj, prześlesz wprowadzone przez siebie zmiany do chmury i pobierzesz zmiany wprowadzone przez innych użytkowników.

Gdy wszystkie połączone urządzenia zostaną zsynchronizowane, będą miały identyczną wersję zestawu stron!



Oto Twój przycisk Synchronizuj. Znajduje się on na górnym pasku TD Snap®.



Więcej informacji na temat Synchronizacji i platformy myTobiiDynavox.com znajdziesz po zeskanowaniu następującego kodu.

qrco.de/bbA7YD

Zapisz do pliku

Kopię zapasową profilu użytkownika TD Snap® i stron można zapisać w pliku. Pliki te można przechowywać i udostępniać na platformie myTobiiDynavox.com albo zapisać lokalnie na urządzeniu lub pamięci USB.



Synchronizacja czy zapis do pliku?



Synchronizacja

Synchronizacja najbardziej przydaje się wtedy, gdy użytkownik korzysta z wielu urządzeń. Może to być na przykład jedno urządzenie w szkole, a drugie w domu. Synchronizacja zestawu stron między tymi dwoma urządzeniami zapewni spójne doświadczenia.

Ponadto synchronizacja może służyć do zdalnej edycji bez niepokojenia użytkownika. Na przykład, użytkownik może dalej używać ze swojego urządzenia komunikacyjnego, podczas gdy Ty edytujesz zestaw stron na komputerze. Aby pobrać zmiany, najpierw dokonaj synchronizacji na komputerze, a potem na urządzeniu komunikacyjnym.

Synchronizacji można też używać do wygodnego robienia kopii zapasowych jednego urządzenia. Przy każdej synchronizacji w chmurze utworzona zostaje kopia zapasowa.

Zapisz do pliku

Zapis do pliku lepiej sprawdza się u osób, które chcą dokonywać własnych, oddzielnych niż Twoje, zmian. Przydaje się także wtedy, gdy chcesz zapisać lub udostępnić tylko kilka stron, a nie cały zestaw.

Zapis do pliku to świetne rozwiązanie, gdy nie masz połączenia internetowego. Możesz stworzyć plik kopii zapasowej dla siebie lub wgrać go do pamięci USB, żeby udostępnić go komuś innemu.

Zapisywanie do pliku to jedyny sposób na utworzenie kopii zapasowej Użytkownika razem ze wszystkimi jego ustawieniami.

Dalsze kroki

Ucz się i ćwicz z zestawem stron

Każdy zestaw stron w TD Snap® jest organizowany w inny sposób i ma inne funkcje. Dla każdego zestawu stron stworzyliśmy karty ćwiczeń. Objaśniają one wyjątkowe funkcje danego zestawu stron i pomagają w praktycznej nauce poprzez przykładowe aktywności. Wystarczy zeskanować odpowiedni kod QR poniżej.



Karty ćwiczeń dla zestawu stron
TD Snap® Core First

qrco.de/bgBOPd

Często zadawane pytania

Jak zdecydować, którego zestawu stron używać?

Właściwy dla danego użytkownika zestaw stron określa kilka czynników, w tym potrzeby w zakresie dostępności lub symboli, poziom umiejętności czytania i pisania oraz preferencje, styl przyswajania języka (analityczny lub gestalt), diagnoza kliniczna (afazja itp.), czy też język(i) ojczysty(-e). Najlepszą poradę można uzyskać od lekarza kierującego lub miejscowego doradcy ds. rozwiązań Tobii Dynavox. Przyjrzą się oni unikalnemu profilowi i potrzebom każdego użytkownika i wydadzą rekomendację. Wejdź na stronę TobiiDynavox.com i wybierz opcję **Contact** (Kontakt), aby wyszukać miejscowego doradcę ds. rozwiązań lub partnera Tobii Dynavox.

Czy mogę wypróbować różne zestawy stron?

Tak! W każdej chwili możesz wybrać inny zestaw stron.

Przejdź do *Edytuj* > *Zestaw stron* > [*Wybierz aktualny zestaw stron*] > *Nowy zestaw stron*.

Jeśli chcesz, na początku swojej drogi możesz poeksperymentować z różnymi zestawami stron. Jednakże, gdy użytkownik zacznie zaznajamiać się z konkretnym zestawem stron i korzystać z niego z powodzeniem, najlepiej będzie trzymać się tego zestawu.


Co, jeśli użytkownik ma trudności z dokładnym dokonywaniem wyborów?

Jest kilka sposobów na pomoc użytkownikowi szybko i dokładnie dokonać wyboru. Problemy z dostępnością może rozwiązać wszystko od zmiany metody dostępu, przez dostosowanie ustawień, po wybór innego rozmiaru tabeli lub po prostu przestawienie urządzenia. Możemy w tym pomóc! Zawsze w pierwszej kolejności zasięgnij porady lekarza, doradcy ds. rozwiązań lub partnera Tobii Dynavox. Ewentualnie możesz zadzwonić lub napisać do działu wsparcia Tobii Dynavox.



Zeskanuj ten kod, żeby
obejrzeć wideo na temat metod
dostępu w zaawansowanych
technicznie urządzeniach.

qrco.de/bbA7US

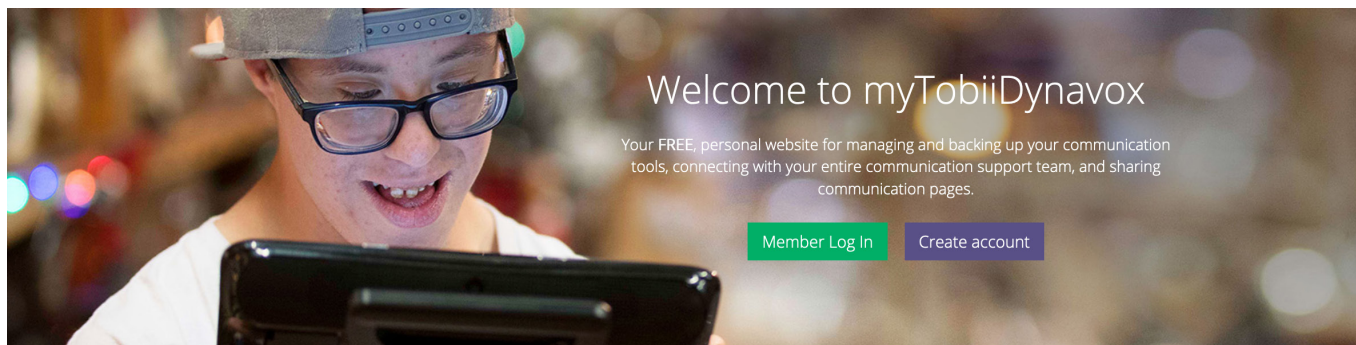

Welcome to myTobiiDynavox

Your FREE, personal website for managing and backing up your communication tools, connecting with your entire communication support team, and sharing communication pages.

[Member Log In](#)[Create account](#)

Twoje darmowe konto myTobiiDynavox.com daje Ci dostęp do licznych korzyści, w tym do przechowywania w chmurze kopii zapasowych, synchronizacji i udostępniania zestawów stron, planów lekcji i nie tylko!

Dołączenie do myTobiiDynavox daje Ci następujące korzyści:

- Tworzenie bezpiecznych kopii zapasowych systemu
- Pobieranie bezpłatnych narzędzi i zasobów
- Przeglądanie bezpłatnych planów lekcji Core First
- Informacje o dostępnych aktualizacjach
- Dostęp do pomocy technicznej i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
- Udostępnianie zestawów stron i pakietów stron



myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

Dodatkowe wsparcie



Strona wsparcia TD Snap®

qrco.de/SnapHelp



Społeczność TD na Facebooku

qrco.de/TDFB



Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc techniczną,
skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem Tobii Dynavox.

qrco.de/bgBNdZ