

# Fiches de familiarisation



# Table des matières

1	FAQ
2	Glossaire de TD Snap® Core First
4	Commençons l'utilisation !
6	Activité Lire un livre
6	Activité Jouer à un jeu
7	Activité Regarder les sports
7	Activité Au restaurant
8	Utiliser l'Assistant Google avec TD Snap® Core First
10	Éditer les soutiens visuels
11	Modifier les tailles de grilles
12	Assistance supplémentaire

# FAQ

## Qu'est-ce que Core First ?

Core First est une gamme d'outils de communication qui aide les personnes à communiquer efficacement et avec précision. L'ensemble de pages évolue en même temps que l'utilisateur et peut facilement être personnalisé. Cet ensemble de pages est basé sur les mots essentiels, qui constituent de petits ensembles de mots polyvalents représentant environ 80 % du vocabulaire que nous utilisons tous dans diverses situations au quotidien.

## À quoi servent ces divers outils ?

Les outils de Core First fonctionnent conjointement et ont pour objectif de favoriser l'investissement (grâce aux sujets, aides au comportement et phrases rapides), l'alphabétisation (avec Core, les listes de mots et le clavier) et les progrès (différentes tailles de grille).

## Quel est l'avantage des supports visuels ?

Les supports visuels permettent aux utilisateurs d'être au courant de ce qui se passe pendant une activité, de comprendre ce qu'on attend de lui et s'autodiscipliner. Les supports visuels de Core First sont notamment les suivants : D'abord, puis, Séquentiel, Récit sociaux, Scripts conversationnels, et Chronomètre visuel. Les supports visuels sont disponibles sur chaque page des sujets.

## Comment fonctionnent les sujets ?

Les sujets favorisent les interactions dans des environnements spécifiques ou autour de certains sujets. Il s'agit principalement de messages constitués de phrases qui permettent aux utilisateurs de communiquer rapidement et efficacement. Nous vous recommandons de personnaliser les sujets avec des messages pertinents pour l'utilisateur afin d'optimiser leur efficacité.

Les sujets permettent aux utilisateurs de participer à des conversations pertinentes et de démontrer que leurs connaissances vont au-delà de leurs compétences linguistiques et de leur niveau d'alphabétisation actuel.

## Comment fonctionne la barre d'outils ?

La barre d'outils permet d'accéder aux divers outils de communication qui peuvent s'avérer nécessaires sur chaque page. Vous pouvez masquer ou ajouter des boutons à la barre d'outils.

## Comment élargir le vocabulaire ?

Il existe deux méthodes différentes pour élargir le vocabulaire dans Core First. La première consiste à augmenter la taille de la grille. Dans l'ensemble, la position du vocabulaire est conservée, mais quelques ajustements devront peut-être être effectués. L'autre méthode pour élargir le vocabulaire consiste à démarrer avec une grille plus grande que celle que vous considérez comme adéquate, tout en masquant les boutons. Vous pouvez ensuite afficher les boutons pour élargir le vocabulaire de l'utilisateur, au fur et à mesure que celui-ci progresse.

# Glossaire de TD Snap® Core First


## Core

Un petit ensemble de mots fréquemment utilisés et pouvant être combinés pour créer des messages uniques.



## Phrases rapides

Petits mots et expressions utilisés dans la vie de tous les jours destinés à continuer les conversations, attirer l'attention ou commenter.

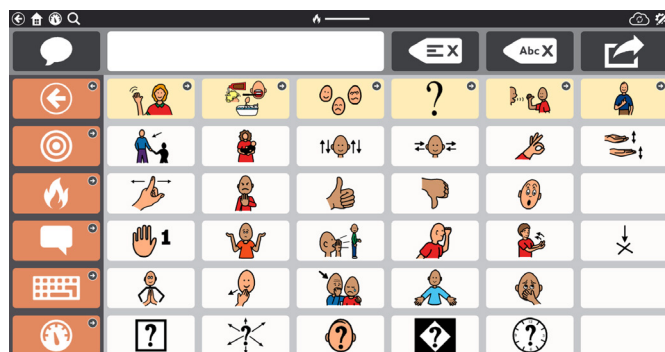


## Sujets

Messages pré-stockés, organisés en fonction des objectifs de communication et relatifs à une situation ou un environnement spécifique.



## Barre d'outils


Tous les outils de communication sont situés sur la barre d'outils. Vous y trouverez des outils tels que Core, les sujets et les phrases rapides.

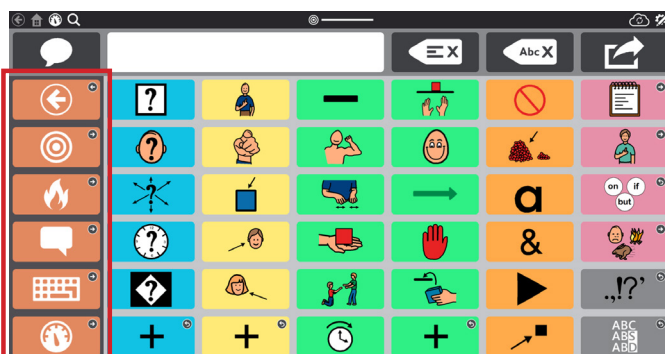

## Listes de mots et mots du sujet

Les listes de mots sont organisées par catégories.(ex. : nourriture, animaux de compagnie, etc.). Les mots du sujet sont organisés par catégories et relatifs à un sujet en particulier.



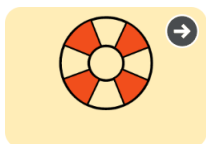

### Soutiens

Les soutiens sont inclus dans chaque thème. Ils aident les personnes dans leur autodiscipline en rendant les attentes plus concrètes, cohérentes et claires.


### D'abord, puis

Montrez à la personne ce qui se produit d'abord, puis ce qui arrive ensuite.




### Séquentiel

Montre l'ordre de petits ensembles d'activités.

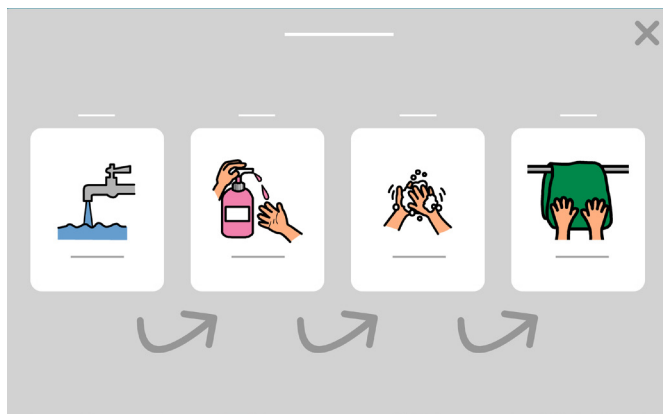


### Scénarios sociaux (Scripts conversationnels)

Les scénarios sociaux sont des récits qui décrivent une situation et prennent en compte les réactions éventuelles d'une personne afin de les gérer de manière positive.

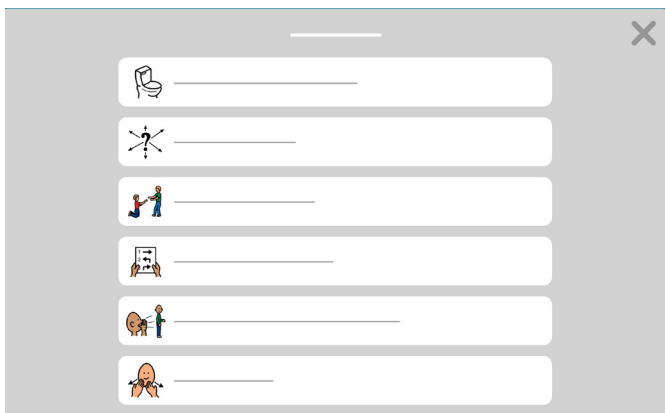


### Chronomètre visuel

Montre la durée restante d'une activité.

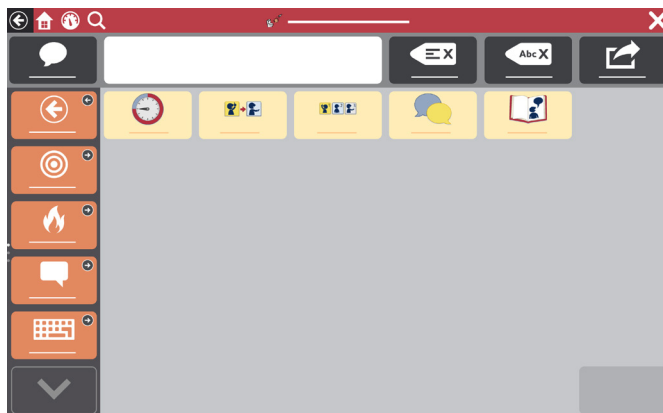

### Tableau de bord

Le tableau de bord contient les commandes du dispositif, comme par exemple le volume et les télécommandes. Vous pouvez y accéder dans de la barre d'outils.

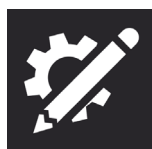

### Outil d'édition

Permet d'effectuer des modifications de contenu ou de paramètres.

# Commençons l'utilisation !



Des activités conçues pour vous aider à démarrer sont disponibles sur les pages suivantes. Choisissez des activités motivantes et stimulantes. N'hésitez pas à recommencer les activités, car la répétition encourage l'apprentissage. N'oubliez pas d'utiliser les stratégies décrites ci-dessous pour devenir un excellent partenaire de communication et de créer un environnement propice à une communication réussie.



## **Identifier les opportunités**

Identifiez les moments de la journée au cours desquels une personne peut apprendre et pratiquer des compétences de communication. Par exemple, aidez-la à utiliser TD Snap® afin de communiquer sur la collation ou le film de son choix.



**Créer Un environnement de communication positif.** Adoptez ces attitudes et de stratégies qui encouragent la communication.

- **Supposer la compétence**

« Je sais que tu peux le faire. ».

- **Concentrez-vous sur l'utilisation, et non l'évaluation.**

Au lieu de dire « Trouve le livre », dites « C'est l'heure de lire. Quel livre pourrions-nous lire ? »

- **Réagissez à tous les modes de communication.**

L'apprenant : Vous sourit Partenaire : « Eh bien, bonjour à toi aussi ! ».

- **Patiencez**

Le partenaire compte jusqu'à cinq avant de fournir de l'aide pour localiser le vocabulaire.



### **Modélisation de l'utilisation de la CAA**

Il a été prouvé que la modélisation était le moyen le plus efficace d'apprendre aux personnes à communiquer à l'aide de la CAA. Pour modéliser, il vous faut toucher et utiliser l'appareil pendant que vous parlez et interagissez avec la personne.

- La modélisation consiste à indiquer à la personne la façon de communiquer.
- Elle n'exige pas d'imitation.
- Modélisez les mots clés plutôt que tous les mots que vous dites.
- Modélisez pendant la recherche de vocabulaire.
- Ce n'est PAS GRAVE de faire des erreurs. Elles vous donnent l'opportunité de modéliser la façon de les corriger.
- La modélisation ne consiste pas à interroger ou évaluer.



**La réussite pour objectif** La réussite va au-delà du simple fait de parvenir à faire dire à la personne ce que vous voulez qu'elle dise au moment et de la façon dont vous le souhaitez.

**La réussite peut se traduire notamment par ce qui suit :**

- Amélioration de l'attention lors des interactions
- Amorçage de la communication
- Utilisation de vocabulaire supplémentaire
- Interactions plus longues
- Plaisir accru lors des interactions
- Plus d'indépendance dans la communication


### **Conseils utiles**



- Vous n'avez pas à créer d'éléments en partant de zéro. La structure a déjà été pré-programmée par nos soins. Familiarisez-vous avec le contenu de TD Snap® Core First, puis personnalisez-le pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas trop de pression sur l'utilisateur ou vous-même.
- La réalisation de toutes les tâches avec précision dès le début n'est pas un objectif réaliste. Ce n'est pas grave de faire des erreurs.



# Activité Lire un livre

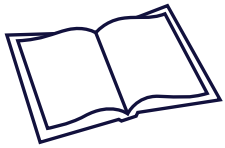

## Matériel

- Thème de lecture de TD Snap® Core First
- Un livre favori

## Préparation

Sélectionnez Thèmes dans la barre d'outils. Localisez le Thème de lecture et passez le vocabulaire en revue avant de commencer l'activité.



## Étapes


- 1 Présentez le livre et montrez la couverture. Indiquez le thème du livre.
- 2 Lisez chaque page, puis faites une pause à la fin pour donner lieu à des opportunités de communication.
- 3 Pendant que vous lisez, faites des pauses pour formuler des commentaires et poser des questions (ex. : qu'en penses-tu ? Est-ce que ça fait peur ? Je crois que le garçon a eu peur).
- 4 Une fois que vous avez terminé la lecture, n'interrogez pas la personne sur le contenu du récit. Demandez-lui plutôt ce qu'elle a ressenti ou ce qu'elle en a pensé.

## Conseils utiles

- Si le récit contient une phrase qui se répète et qu'un bouton vide est disponible sur la page, programmez cette phrase sur ce même bouton.
- Sélectionnez ce bouton à chaque fois que la phrase répétée apparaît.
- Les messages tels que « Tourne la page » et « Relis ça » sont déjà programmés sur votre dispositif.
- Formulez des commentaires sur tout ce que l'enfant regarde et/ou pointe dans l'environnement. Une fois ceci effectué, soulignez à quel point la personne a bien communiqué avec vous.
- Passez à nouveau le livre en revue en vous concentrant sur les images. Faites remarquer les mots présents sur le dispositif qui correspondent aux images et modélisez leur sélection.



# Activité Jouer à un jeu

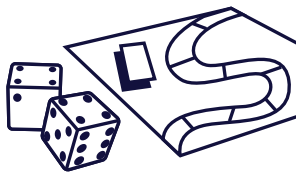

## Matériel

- Thème de jeu de TD Snap® Core First
- Un jeu de société ou de carte favori

## Idées de jeu

Pioche, jeu de guerre, bingo, jeu de mémoire, Candy Land

## Préparation

Sélectionnez Thèmes dans la barre d'outils. Localisez le Thème de jeu et passez le vocabulaire en revue avant de commencer l'activité.



## Étapes

- 1 Présentez le jeu et expliquez ses règles si vous n'y avez jamais joué auparavant.
- 2 Commencez la partie en utilisant le vocabulaire que vous avez précédemment passé en revue.
- 3 Prenez le temps de faire des pauses afin de formuler des commentaires sur le déroulement de la partie.
- 4 Une fois la partie terminée, prenez le temps de formuler des commentaires.

## Conseils utiles

- Consultez le dossier Mots de jeu dans Mots thématiques pour obtenir du vocabulaire supplémentaire.
- Les messages tels que « C'est mon tour », « Jouer à nouveau » et « Je n'aime pas ce jeu » sont déjà programmés sur votre dispositif.
- Laissez le soin à l'utilisateur de déterminer qui doit jouer (c'est mon tour, c'est ton tour) à l'aide des boutons adéquats.





# Activité Regarder les sports



## Matériel

- Thème du sport de TD Snap® Core First
- Un événement sportif favori

## Préparation

Sélectionnez Thèmes dans la barre d'outils. Localisez le Thème du sport et passez le vocabulaire en revue avant de commencer l'activité.



## Étapes


- 1 Présentez l'événement sportif que vous regardez et discutez des équipes qui jouent.
- 2 Montrez à la personne la façon de naviguer et d'activer les boutons afin de formuler des commentaires amusants pendant le match.
- 3 Lorsque l'activité est terminée, passez en revue toute tentative de communication réussie (ex. : « J'ai vraiment apprécié la façon dont tu as pointé la balle pour me montrer que tu l'aimais. »).

## Conseils utiles

- Utilisez le bouton Édition pour ajouter votre équipe favorite au bouton qui indique « Équipe favorite [ ] ».
- Les messages tels que « Y a-t-il un match aujourd'hui ? », « J'adore cette équipe » et « Ils puent » sont déjà programmés sur votre dispositif.
- Si l'un de vos bouton est vide, programmez-y un message d'encouragement amusant pour votre équipe.



# Activité Au restaurant

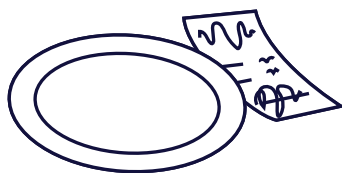

## Matériel

- Thème du restaurant de TD Snap® Core First
- Un restaurant favori

## Préparation

Sélectionnez Thèmes dans la barre d'outils. Localisez le Thème du restaurant et passez le vocabulaire en revue avant de commencer l'activité.



## Étapes

- 1 Parlez d'une sortie au restaurant.
- 2 Vous pouvez commencer à modéliser le vocabulaire avant même d'arriver au restaurant. Par exemple, sélectionnez le bouton « Allons dîner dehors ».
- 3 Une fois au restaurant, effectuez une modélisation en utilisant le dispositif tout au long du repas.
- 4 Une fois votre repas terminé, passez en revue toute tentative de communication réussie. (ex. : « Lorsque tu as appuyé sur « Encore », j'ai su qu'il fallait te passer la corbeille à petits pains ! »).

## Conseils utiles

- Des messages tels que « Pouvons-nous aller manger quelque part ? » et « J'adore cet endroit » sont déjà programmés dans votre appareil.
- Encouragez toutes les personnes présentes à la table à s'impliquer, notamment les serveurs et serveuses.



# Utiliser l'Assistant Google avec TD Snap® Core First


Les pages de l'Assistant Google disponibles dans TD Snap® sont organisées par fonction. Les boutons de ces pages vous permettent de gérer les tâches quotidiennes, d'écouter de la musique, de poser des questions et même de contrôler votre environnement à l'aide de l'Assistant Google.

## Pour rechercher les pages de l'Assistant Google dans TD Snap® :

- 1 Sélectionnez **Tableau de bord** dans la barre d'outils.



- 2 Sélectionnez **Assistant Google**.

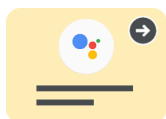

## Les icônes vous indiquent l'équipement dont vous avez besoin pour utiliser ce bouton.



Aucun matériel supplémentaire requis.



Dispositif Google Nest Mini ou haut-parleur compatible avec l'Assistant Google requis.



Prise intelligente, ampoule et/ ou thermostat requis.

## Quelques conseils pour une utilisation réussie :

- L'écoute de musique à volume élevé peut affecter l'arrêt de celle-ci ou l'exécution de toute autre commande.
- Si vous n'obtenez pas le résultat attendu lors de l'envoi d'une commande Google, essayez une formulation différente ou soyez plus précis.  
*Exemple : Si la commande « OK Google, allume la lumière » ne fonctionne pas, essayez de prononcer la commande suivante : « OK Google, allume la lumière du salon ».*
- N'oubliez pas que lorsque vous utilisez un haut-parleur Google externe, vous devez prononcer « OK Google » auparavant.
- Assurez-vous que vous disposez d'un moyen d'appeler à l'aide et d'un système de secours pour les fonctions d'automatisation de l'environnement.
- Les jeux fonctionnent mieux lorsqu'ils ne nécessitent pas de réactions spécifiques et donnent suffisamment de temps pour réagir.

## Questions courantes à propos de l'Assistant Google

### L'application Google Home est-elle nécessaire ?

Oui, l'application Google Home doit être installée sur votre téléphone ou tablette si vous avez acheté un équipement supplémentaire (ex. : Google Nest Mini, prises intelligentes, etc.).

### Un compte Google est-il nécessaire ?

Oui, vous avez besoin d'un compte Google gratuit pour utiliser l'Assistant Google. Vous devez connecter votre compte Google à TD Snap® (*Modifier > Utilisateur > Se connecter à Google*).

### Puis-je écouter de la musique ?

Oui, vous devez utiliser un haut-parleur Google externe (ex. : Google Nest Mini, Google Home Nest, etc.) et vous assurer que le dispositif peut toujours être entendu quel que soit le volume de la musique.

### Puis-je contrôler l'éclairage chez moi ?

Oui, vous pouvez contrôler l'éclairage chez vous avec l'équipement adéquat.

### Je dispose de dispositifs intelligents chez moi. Puis-je les contrôler à l'aide de l'Assistant Google ?

Oui Consultez le guide fourni avec les dispositifs intelligents en question pour obtenir des informations détaillées.

### Puis-je utiliser l'Assistant Google pour passer des appels d'urgence ?

Non. L'Assistant Google n'appelle PAS les services d'urgence.

### Comment puis-je obtenir de l'aide ?

En cas de problème avec le logiciel TD Snap®, contactez le support technique de Tobii Dynavox.

Si vous rencontrez des problèmes relatifs à l'équipement intelligent, veuillez consulter le site Web de son fabricant.

## Dépannage de l'assistance Google

[qrco.de/TDDiscover](https://qrco.de/TDDiscover)

[www.tobiidynavox.com/fr/assistance-formations](https://www.tobiidynavox.com/fr/assistance-formations)

[www.mytobiidynavox.com](https://www.mytobiidynavox.com)




Consultez le guide complet de l'Assistant Google pour TD Snap®.

[qrco.de/gatdsa](https://qrco.de/gatdsa)

# Éditer les soutiens visuels


- 1 Recherchez la page de soutiens contenant le soutien visuel à éditer.

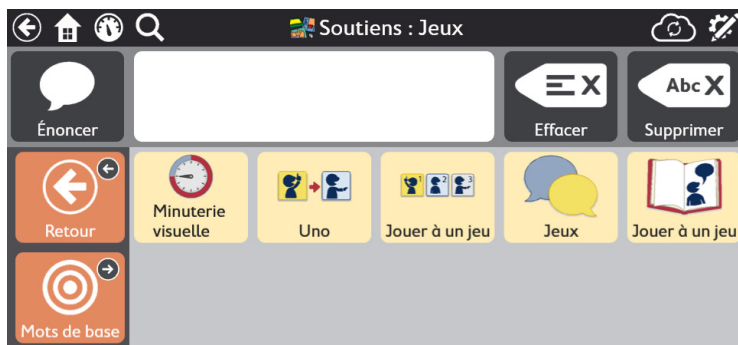

- 2 Sélectionnez **Édition**.




- 3 Sélectionnez le bouton de soutien que vous souhaitez éditer.

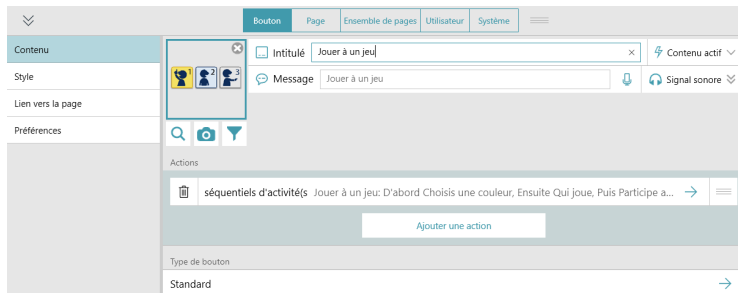

- 4 Sélectionnez l'action (séquentiel, Chronomètre visuel, D'abord, puis ou Scénario).

- 5 Sélectionnez l'icône représentant un crayon sur n'importe quelle ligne pour effectuer des modifications.

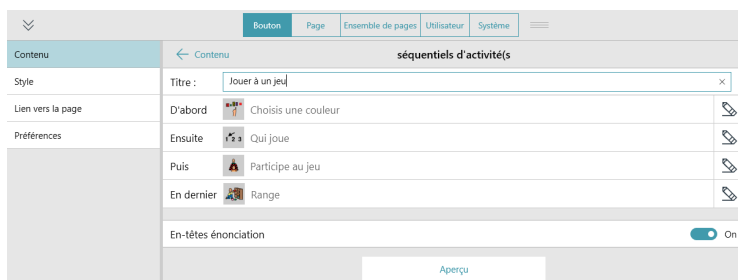

- 6 Sélectionnez le bouton **Aperçu** situé en bas du panneau d'édition des soutiens afin d'obtenir un aperçu des modifications que vous avez apportées au soutien au comportement.

- 7 Sélectionnez **Terminé** une fois ceci effectué.


# Modifier les tailles de grilles

Nous vous recommandons de vous concentrer sur la capacité de l'utilisateur à sélectionner les boutons avec précision. L'accès physique au dispositif de communication nécessite de la pratique. Commencez avec des grilles de petite taille. L'utilisateur sera éventuellement en mesure d'utiliser des grilles de taille plus importante au fur et à mesure qu'il se familiarisera avec l'utilisation du dispositif. La modifications des tailles de grilles est simple et l'ensemble de pages TD Snap® Core First est conçu pour assurer un emplacement du vocabulaire cohérent entre les différentes tailles de grilles.


- 1 Sélectionnez le bouton **Éditer**.



- 2 Sélectionnez l'onglet **Ensemble de pages**.

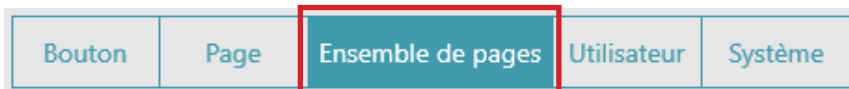

- 3 Sélectionnez **Taille de la grille**.

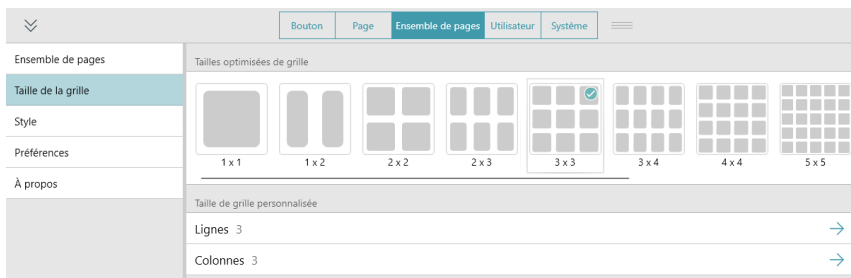

- 4 Effectuez une sélection parmi les tailles optimisées.

- 5 Sélectionnez **Terminé**.



# Assistance supplémentaire



**Page d'assistance de TD Snap®**

[qrco.de/SnapHelp](https://qrco.de/SnapHelp)



**Communauté TD Facebook**

[qrco.de/TDFB](https://qrco.de/TDFB)



**Assistance technique pour l'Europe**

Pour toute demande d'assistance, veuillez contacter votre revendeur.



**Assistance technique pour l'Amérique du Nord**

1-800-344-1778 ext. 1

**Découvrez comment modifier des boutons, sauvegarder et partager des ensembles de pages et utiliser d'autres fonctionnalités de TD Snap® :**



**Fiches de familiarisation sur les bases de TD Snap®**

[qrco.de/SnapBasicsFR](https://qrco.de/SnapBasicsFR)



**Manuel de l'utilisateur de TD Snap®**

[qrco.de/tdsumFR](https://qrco.de/tdsumFR)



**Tobii Dynavox Learning Hub (anglais uniquement)**

[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)