


Guía de inicio

SC Tablet Mini



¿Qué hay en la caja?

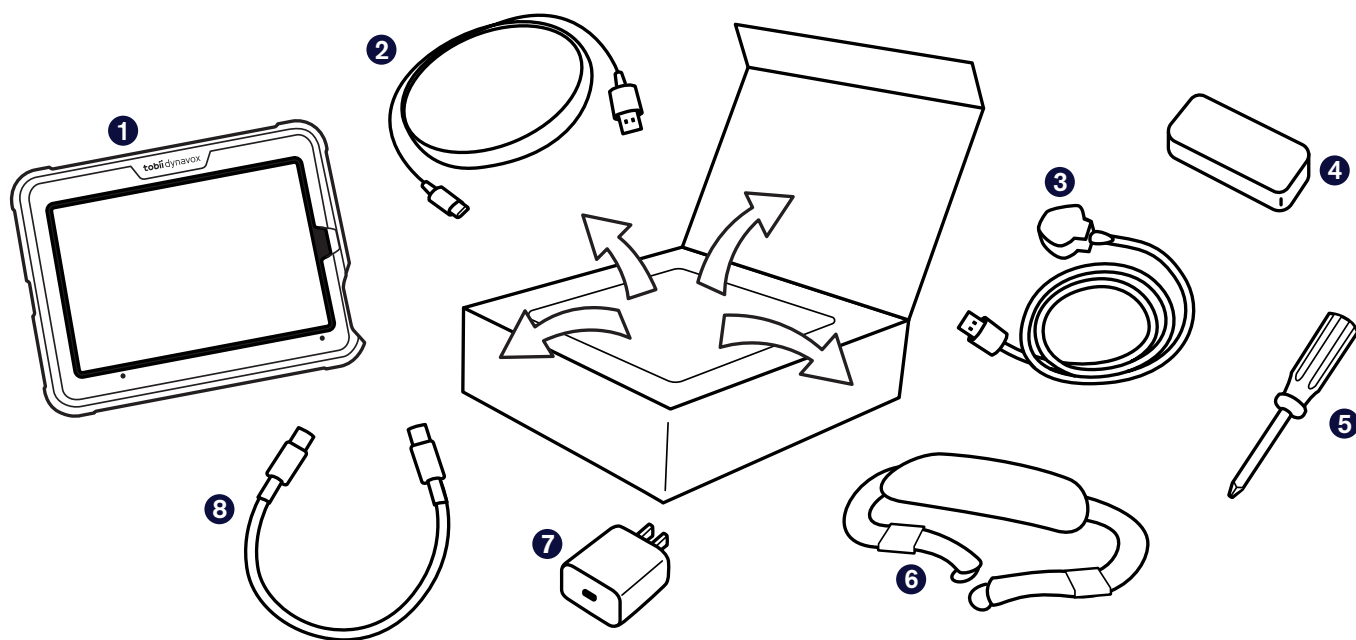

1 SC Tablet ensamblada
(TD Speech Case Mini y
iPad Mini)

2 Cable de USB-C a USB-A

3 Cable de alimentación de
Speech Case Mini

4 Fuente de alimentación de
Speech Case (USB dual)

5 Destornillador

6 Correa de transporte para
hombro


7 Adaptador de corriente USB-C
del iPad

8 Cable de alimentación USB-C
del iPad



*Si compró algún accesorio,
busque las instrucciones de
instalación correspondientes*

Conozca su dispositivo.

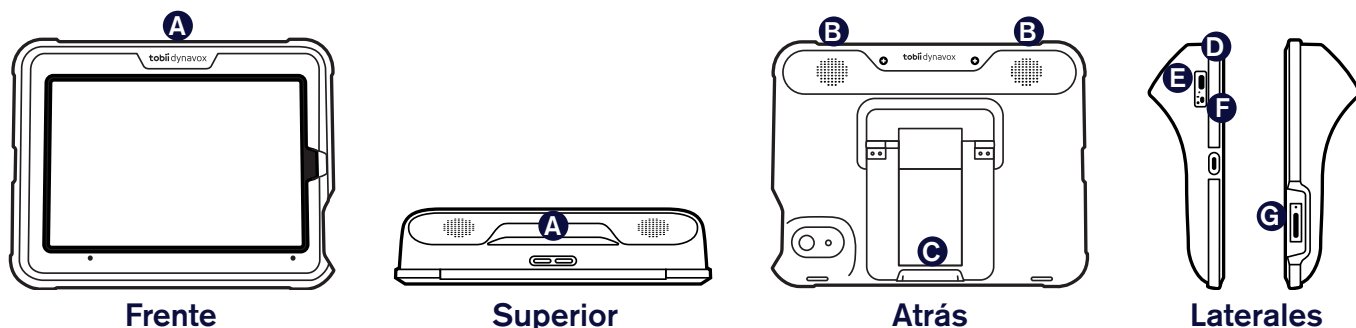

Frente

Superior

Atrás

Laterales

A Interruptor basculante de
volumen

B Altavoces

C Pata plegable

D Puerto del cargador

E Luz indicadora de carga
(LED de encendido)



F Selector de encendido/
apagado

G Botón de inicio del iPad Mini

Paso 1: Botón de encendido/apagado

- 1 Conecte el cable de alimentación al Speech Case Mini y, a continuación, enchufe a una toma de corriente.
- 2 Cambie la opción activar/desactivar del Speech Case Mini a activado.
- 3 Conecte el cable de alimentación USB-C del iPad al iPad y al adaptador de corriente, y luego conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
- 4 Presione el botón de inicio en el iPad para encenderlo.

 Si se usan varias Speech Case en una habitación, se puede identificar cada Speech Case por los últimos cinco dígitos de la identificación de Bluetooth. Coincidirá con el número de serie único de cinco dígitos que se encuentra debajo del pata plegable del Speech Case.

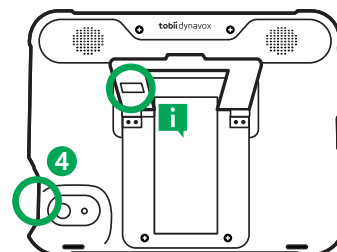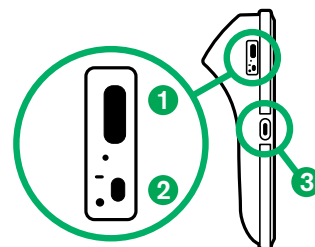

Paso 2: Vinculación por Bluetooth

- 1 En el iPad, vaya a **Configuración > Bluetooth**.
- 2 Asegúrese de que Bluetooth esté activado.
- 3 Seleccione SCmini.

Paso 3: Elija un aplicación de comunicación

Use la siguiente tabla para identificar la aplicación de comunicación que mejor se adapte al usuario.

Tanto TD Snap como TD Talk están preinstaladas en su SC Tablet Mini, así que simplemente seleccione el ícono de su aplicación preferida para comenzar a comunicarse.

	 TD Snap	 TD Talk
Descripción	TD Snap es una aplicación de generación de voz para aquellos que son analfabetos o necesitan soporte de símbolos.	TD Talk es una aplicación de generación de voz para personas alfabetizadas y que no necesitan símbolos de soporte.
Redacción de mensajes	Los mensajes se redactan utilizando botones de palabras y frases con símbolos de soporte. También está disponible un teclado en pantalla.	Los mensajes se redactan utilizando un teclado en pantalla con predicción de palabras y frases, similar a los mensajes de texto SMS.
Nivel de alfabetización	Todos: emergente a avanzado	Opciones avanzadas
Edades	Todas las edades	Adolescente a adulto
Soportes para personas con afasia	No	No

Paso 4: Aprendizaje, práctica y solución de problemas

iSu SC Tablet Mini ya está lista para usarse! No dude en empezar a explorar su dispositivo y las aplicaciones. Cuando quiera saber más, consulte las tarjetas de entrenamiento de TD Snap y TD Talk. Las tarjetas de entrenamiento le enseñan a usar las principales funciones de su programa de comunicación, a desarrollar sus habilidades de CAA y a solucionar problemas.



Importante

Muchas fuentes de financiación requieren que los dispositivos de generación de voz se vendan como dispositivos exclusivos (cerrados). Los dispositivos cerrados tienen acceso limitado a Internet y a la tienda de aplicaciones. Una vez que se entrega un dispositivo de generación de voz al usuario o a su representante, se les permite abrir el dispositivo por una tarifa adicional, lo que les brinda acceso completo a Internet y a la tienda de aplicaciones. Si desea obtener más información sobre cómo abrir un dispositivo cerrado, llame al **1-800-344-1778**.



Tarjetas de entrenamiento de TD Snap Core First

grco.de/SnapCards



Tarjetas de entrenamiento de TD Talk

grco.de/tlkttrng

Recursos adicionales

Escanee los códigos QR para usar los vínculos.



Manual de usuario de SC Tablet Mini

grco.de/bdCCac



Centro de aprendizaje de Tobii Dynavox

learn.tobiidynavox.com



Página de soporte de TD Speech Case

grco.de/bczj7y



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Comunidad de TD en Facebook

grco.de/TDFB



Soporte técnico

Norteamérica:

1-800-344-1778 ext. 1

Resto del mundo:

+46 8 522 950 20 ext. 1