


Guide de mise en route

SC Tablet Mini



Que contient la boîte ?

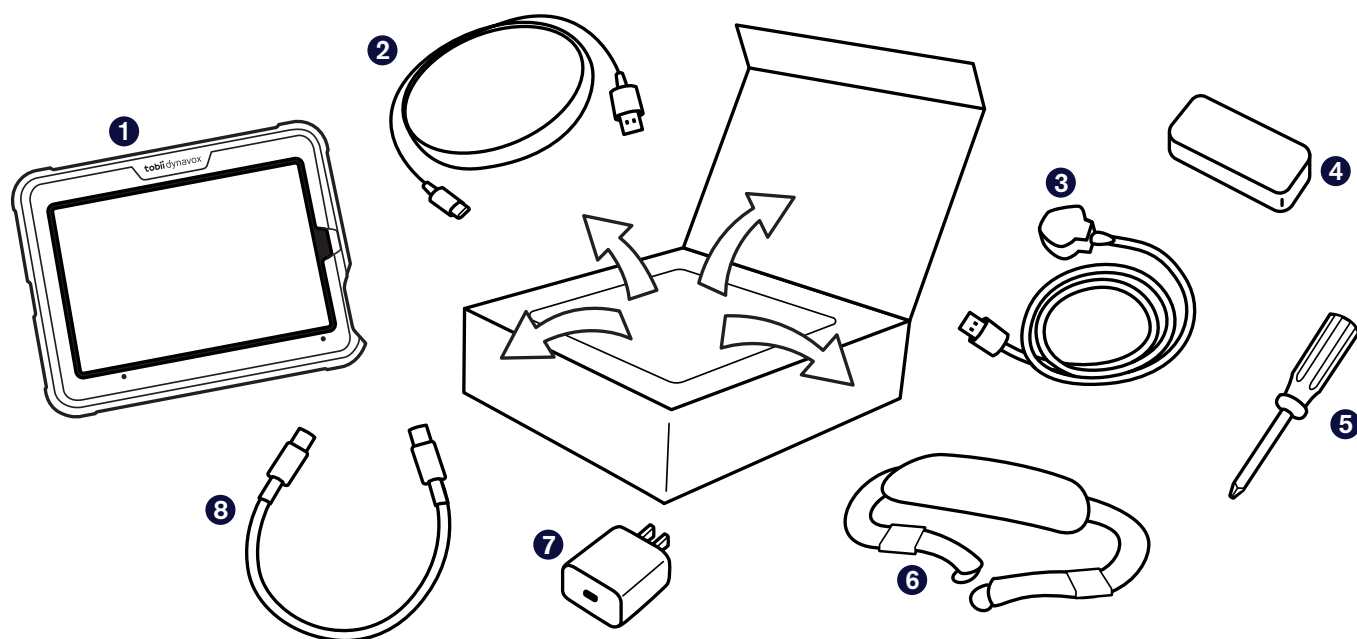

1 SC Tablet montée

(TD Speech Case Mini et iPad Mini)

2 Câble USB-C vers USB-A

3 Câble d'alimentation Speech Case Mini Power

4 Source d'alimentation de la Speech Case

(USB à deux ports)

5 Tournevis

6 Bandoulière


7 Chargeur USB-C iPad

8 Câble d'alimentation USB-C iPad



Si vous avez acheté des accessoires, consultez les instructions d'installation séparées.

Découvrez votre dispositif

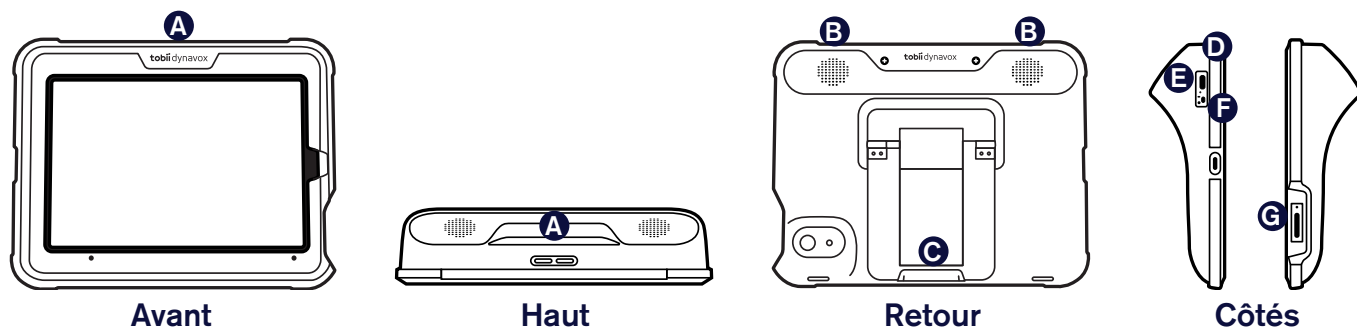

A Bouton de réglage du volume

B Enceinte

C Béquille pliable

D Port d'alimentation

E Témoin lumineux de chargement (témoin d'alimentation DEL)



F Outil de sélection Marche/Arrêt

G Bouton Marche/Arrêt de l'iPad Mini

Étape 1 : Marche/arrêt

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur la Speech Case, puis sur une prise de courant.
- 2 Faites basculer l'interrupteur d'alimentation de la Speech Case Mini sur la position ON (allumé).
- 3 Connectez le câble d'alimentation USB-C de l'iPad à l'iPad et à l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise.
- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur l'iPad afin de l'allumer.

 Si vous utilisez plusieurs tablettes Speech Case au sein d'un seul emplacement, vous pouvez identifier chacune d'entre elles grâce aux cinq chiffres de l'identifiant Bluetooth. Cet identifiant correspond à la combinaison unique de cinq chiffres située sous le support pliable de la Speech Case.

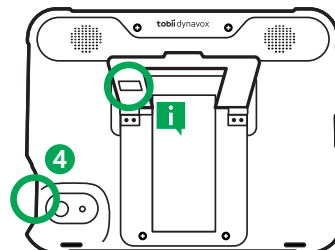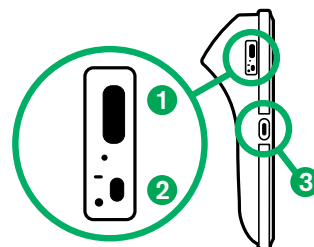

Étape 2 : Couplage Bluetooth

- 1 Sur l'iPad, allez à **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Assurez-vous que Bluetooth est ACTIVÉ.
- 3 Sélectionnez SCmini.

Étape 3 : Sélection d'une application de communication

Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier l'application de communication qui convient le mieux à l'utilisateur.

TD Snap et TD Talk sont préinstallés sur votre SC Tablet Mini, il vous suffit donc d'appuyer sur l'icône de votre application préférée pour commencer à communiquer !

	 TD Snap	 TD Talk
Description	TD Snap est une application de synthèse vocale qui s'adresse aux personnes qui ne savent pas lire et/ou qui nécessitent une prise en charge des symboles (notamment les personnes atteintes d'aphasie).	TD Talk est une application de synthèse vocale qui s'adressent aux personnes alphabétisées et qui n'ont pas besoin de symboles à l'appui.
Composer des messages	Les messages sont composés à l'aide de boutons mots et phrases accompagnés de symboles. Les messages sont composés à l'aide d'un clavier à l'écran avec prédiction de mots et de phrases, similaire à l'envoi de SMS.	Les messages sont composés à l'aide d'un clavier à l'écran avec prédiction de mots et expressions, similaire à l'envoi de SMS.
Niveau d'alphabétisation	Tous - d'émergent à avancé	Avancé
Âges	Tous âges	De l'adolescence à l'âge adulte
Nouvelles aides	Oui	Non

Étape 4 : Apprentissage, pratique et dépannage

Votre dispositif SC Tablet Mini est maintenant prêt à être utilisé ! N'hésitez pas à explorer votre appareil et vos applications dès maintenant. Lorsque vous serez prêt à en savoir plus, consultez les fiches de familiarisation de TD Snap et de TD Talk. Les fiches de familiarisation vous apprennent à utiliser les principales fonctionnalités de votre logiciel de communication, à développer vos compétences en communication CAA et à résoudre les problèmes.



Important

De nombreuses sources de financement exigent que les dispositifs de synthèse vocale soient vendus en tant qu'appareils dédiés (fermés). Les appareils fermés ont un accès limité à Internet et à la boutique d'applications. Une fois qu'un dispositif de synthèse vocale est livré à l'utilisateur ou à son représentant, ce dernier est autorisé à l'ouvrir moyennant des frais supplémentaires, afin de lui donner un accès complet à Internet et à l'App Store. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ouverture d'un dispositif fermé, appelez au **1-800-344-1778**.



Fiches de familiarisation TD Snap Core First

grco.de/SnapCards



Fiches de familiarisation TD Talk

grco.de/tlktrng

Ressources supplémentaires

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.



Manuel de l'utilisateur de la SC Tablet Mini

grco.de/bd7f71



Centre d'apprentissage Tobii Dynavox

learn.tobiidynavox.com



Page d'assistance de la TD Speech Case

grco.de/bd7f6P



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Communauté TD

grco.de/tdfbfr



Assistance technique Amérique du Nord

1-800-344-1778 Poste 1