


Guide de mise en route

TD Speech Case Mini



Que contient la boîte ?

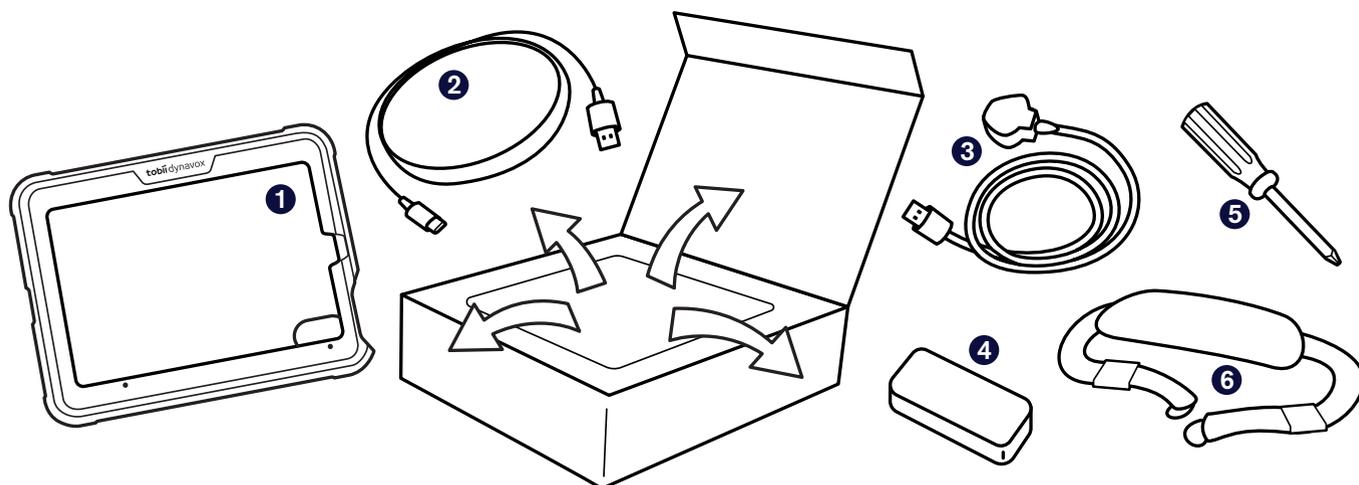

1 TD Speech Case Mini

2 Câble USB-C vers USB-A

3 Câble d'alimentation

4 Source d'alimentation
(double USB)


5 Tournevis

6 Bandoulière de transport




Si vous avez acheté des accessoires, consultez les instructions d'installation séparées.


Découvrez votre dispositif

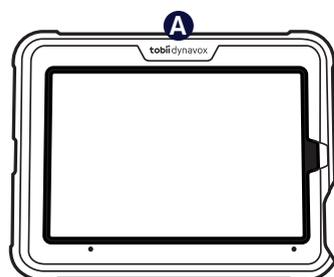


Avant

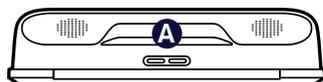

Haut

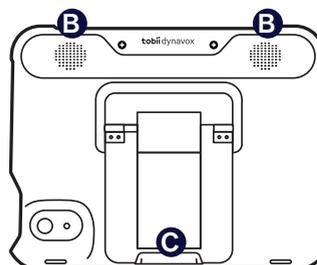

Retour

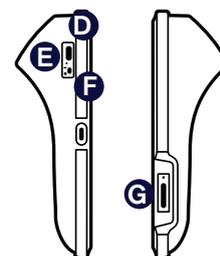

Côtés

A Bouton de réglage du volume

B Enceintes

C Béquille pliable

D Port d'alimentation

E Témoin lumineux de
chargement (témoin
d'alimentation DEL)


F Outil de sélection Marche/
Arrêt

G Bouton Marche/Arrêt de
l'iPad Mini


Étape 1 : Assemblage

❶ Séparez la plaque avant et le corps de la Speech Case Mini en séparant les deux pièces.


❷ Poussez l'iPad dans la plaque avant, en alignant la caméra de l'iPad sur la découpe de la plaque.

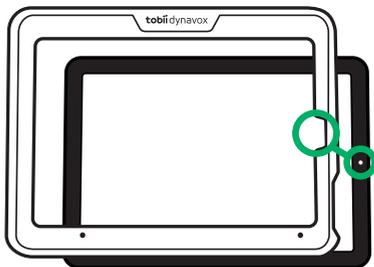

❸ Poussez l'ensemble iPad et plaque dans le corps de la Speech Case Mini.

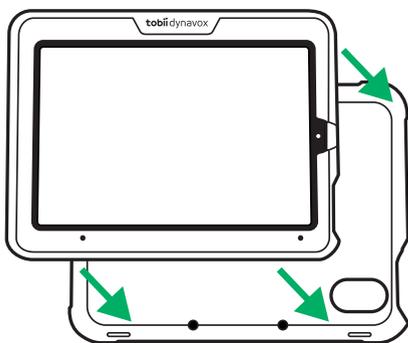


❹ Appuyez sur les bords pour les emboîter.

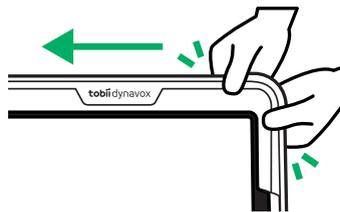


❺ Retournez l'ensemble de l'assemblage.

❻ Serrez les deux vis situées dans la partie supérieure.

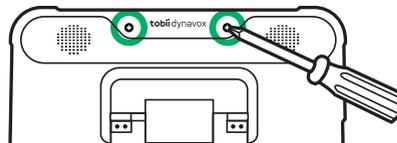

❼ Relevez le support pliable et serrez les deux vis situées dans la partie inférieure.

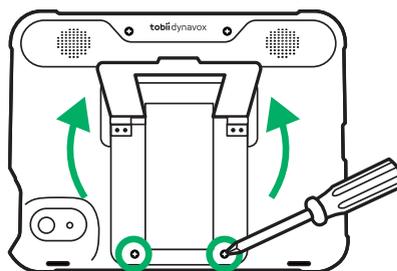

Ne serrez pas trop les vis

Étape 2 : Couplage Bluetooth

❶ Branchez le câble d'alimentation sur la Speech Case, puis sur une prise de courant.



❷ Faites basculer l'interrupteur d'alimentation de la Speech Case Mini sur la position ON (allumé).

❸ Sur l'iPad, allez à **Paramètres > Bluetooth**.

❹ Assurez-vous que Bluetooth est ACTIVÉ.

❺ Sélectionnez SCmini.

i Si vous utilisez plusieurs tablettes Speech Case au sein d'un seul emplacement, vous pouvez identifier chacune d'entre elles grâce aux cinq chiffres de l'identifiant Bluetooth. Cet identifiant correspond à la combinaison unique de cinq chiffres située sous le support pliable de la Speech Case.

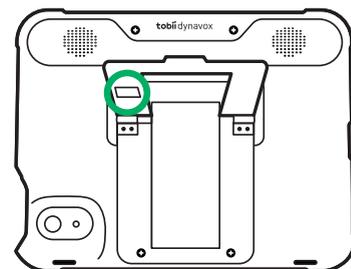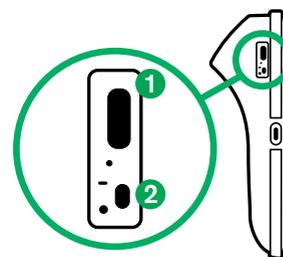

Étape 3 : Installation des applications de communication

Assurez-vous que votre iPad est connecté à Internet, puis ouvrez la boutique Apple App  et installez vos applications de CAA. La plupart des gens n'utilisent qu'une seule application de CAA. Les utilisateurs qui ont besoin de la prise en charge des symboles doivent utiliser TD Snap. Les utilisateurs sachant lire et écrire qui ne nécessitent pas la prise en charge des symboles peuvent télécharger les deux applications s'ils le souhaitent afin de décider laquelle leur convient le mieux.



TD Snap

Application de communication pour les utilisateurs nécessitant une prise en charge des symboles. Essai gratuit, fonctionnalités complètes par le biais d'un achat dans l'application.



TD Talk

Application de communication pour les utilisateurs sachant lire et écrire. Gratuit.

Étape 4 : Apprentissage, pratique et dépannage

Votre Speech Case Mini est maintenant prête à être utilisée ! N'hésitez pas à explorer votre appareil et vos applications dès maintenant. Lorsque vous serez prêt à en savoir plus, consultez les fiches de familiarisation de TD Snap et de TD Talk. Les fiches de familiarisation vous apprennent à utiliser les principales fonctionnalités de votre logiciel de communication, à développer vos compétences en communication CAA et à résoudre les problèmes.



Fiches de familiarisation TD Snap

qrco.de/SnapCards



Fiches de familiarisation TD Talk

qrco.de/tlktrng

Ressources supplémentaires

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.



Manuel de l'utilisateur de la TD Speech Case Mini

qrco.de/bd7f71



Centre d'apprentissage Tobii Dynavox

learn.tobiidynavox.com



Page d'assistance de la TD Speech Case Mini

qrco.de/bd7f6P



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Communauté TD

qrco.de/TDFB



Assistance technique Amérique du Nord

1-800-344-1778 Poste 1