


Guida rapida

Tobii Dynavox Speech Case



tobiidynavox

Cosa include?

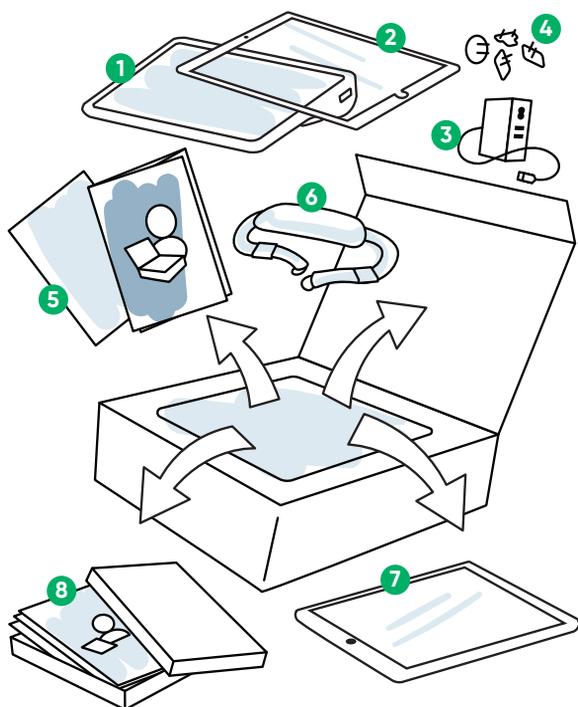


- 1 Speech Case
 - 2 Copertura telaio iPad
 - 3 Cavo di alimentazione
 - 4 Adattatori di alimentazione universali
 - 5 Manuale Utente
 - 6 Tracolla
- In aggiunta, con SC Tablet:
- 7 iPad
 - 8 Schede di formazione Snap TD




In caso di acquisto di una piastra di supporto o di una protezione tasti, per informazioni dettagliate, vedere le istruzioni incluse.

Acquisisci dimestichezza con il tuo dispositivo

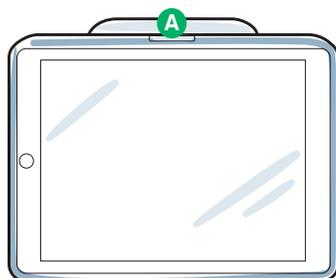

Lato anteriore

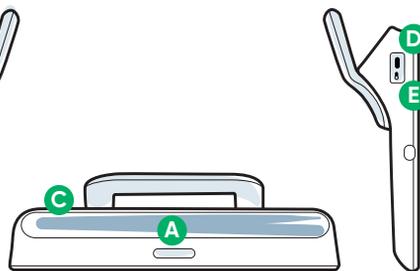

Parte superiore e lati

A Pulsante Volume

B Porte per Sensori

C Altoparlanti

D Porta di alimentazione (USB-C)

E Selettore del metodo di accesso

Completa le quattro fasi di questa guida per configurare il tuo Speech Case/ SC Tablet.


Prima di iniziare



Se è stato acquistato l'SC Tablet (bundle Speech Case e iPad), accendere l'iPad e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di configurazione. Assicurarsi di selezionare **Configurazione manuale** e scegliere una rete Wi-Fi non appena richiesto.

Passo 1: Posizionare l'iPad nello Speech Case

- 1 Poggiare l'iPad (schermo in alto) su una superficie piatta.
- 2 Posizionare la copertura telaio iPad sulla parte superiore dell'iPad e spingerla in basso per agganciarla in posizione.
- 3 Allineare la porta di ricarica dell'iPad con il foro corrispondente nello Speech Case, quindi far scorrere il bordo dell'iPad sotto il labbro flessibile sulla parte superiore dello Speech Case.
- 4 Inclinare in basso l'iPad in modo che sia piatto all'interno dello Speech Case.
- 5 Con le dita piegare il labbro flessibile intorno e sui bordi dell'iPad.

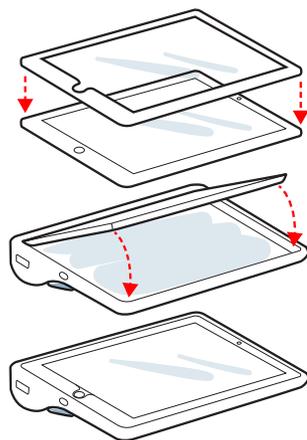


Passo 2: Impostare la modalità

Lo Speech Case ha tre modalità: Tocco (T), Scansione iOS (S) e Off (O). Impostare la modalità sul selettore del metodo di accesso **PRIMA** di utilizzare il dispositivo. Utilizzare lo schema delle decisioni riportato di seguito per determinare la migliore modalità per l'utente.


Posizione Tocco (T): L'unità pronuncerà "Alimentazione attiva" e verrà emesso 1 clic.

Posizione Scansione (S): L'unità pronuncerà "Alimentazione attiva" e verranno emessi 2 clic.

La **Posizione (O)** è per la spedizione e lo stoccaggio prolungato.

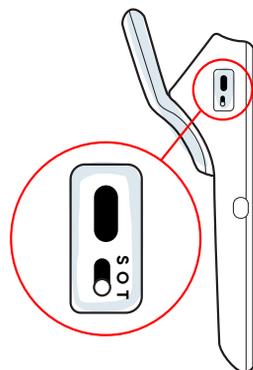


In che modo l'utente eseguire le selezioni sul dispositivo?

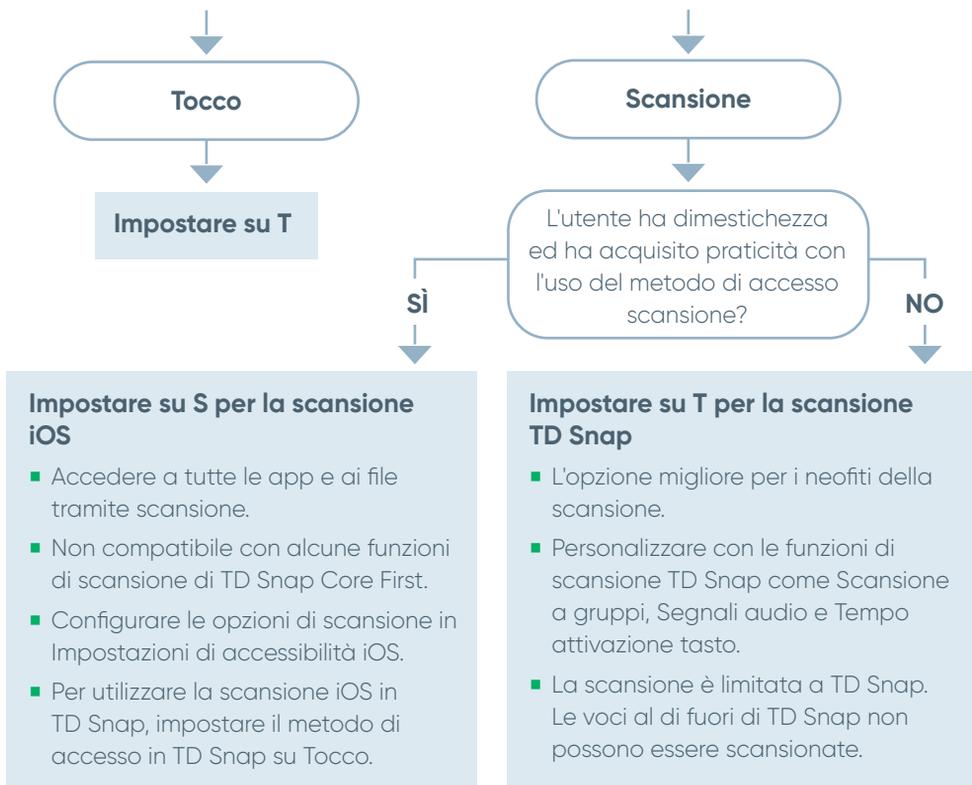

Se è necessario cambiare modalità, fare riferimento al manuale utente dello Speech Case.


Passo 3: Abbinamento Bluetooth

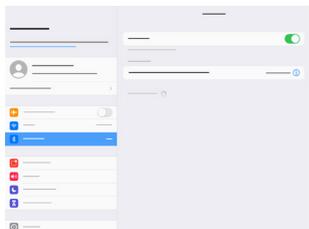

- 1 Sull'iPad, andare su Impostazioni > Bluetooth.
- 2 Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato.
- 3 Selezionare Tobii Dynavox SC Tablet.



Se si sono più SC Tablet in una stanza, è possibile identificare ciascuno di essi tramite le ultime cinque cifre dell'ID Bluetooth. Corrisponderanno al numero di serie esclusivo di cinque cifre riportato sotto il supporto integrato sullo Speech Case.

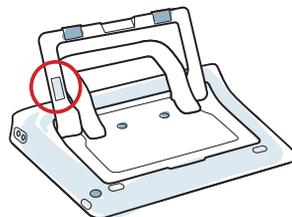

Passo 4: Guida rapida con TD Snap



Procedura guidata di impostazione TD Snap

Avviare l'app TD Snap.

Segui i comandi per creare il tuo nuovo utente o ripristinare un file utente salvato.

Siamo qui per aiutare



myTobiiDynamovox

Usa il tuo account gratuito per sincronizzare, condividere Gruppi di pagine, memorizzare backup e altro ancora! Visita:
www.myTobiiDynamovox.com



Hub di apprendimento

Hub di apprendimento Tobii Dynamovox:
learn.tobiiDynamovox.com



Materiale di formazione

Manuale Utente:
<http://qrco.de/SCmanual>

Schede di formazione TD Snap Core First:
<https://qrco.de/TDSnapCards>

Schede di formazione TD Snap Text:
<https://qrco.de/TextCards>

Schede di formazione TD Snap Aphasia:
<https://qrco.de/AphasiaCards>

Guida all'implementazione della scansione TD Snap: <https://qrco.de/ScanGuide>



Supporto aggiuntivo

Community:
<http://qrco.de/TDFB>

Contattare il rappresentante Tobii Dynamovox locale per supporto tecnico.

Le risorse aggiuntive di Speech Case sono disponibili qui:



qrco.de/TDSCinfo