


Kom i gang – veiledning

Tobii Dynavox Speech Case



Hva er i esken?

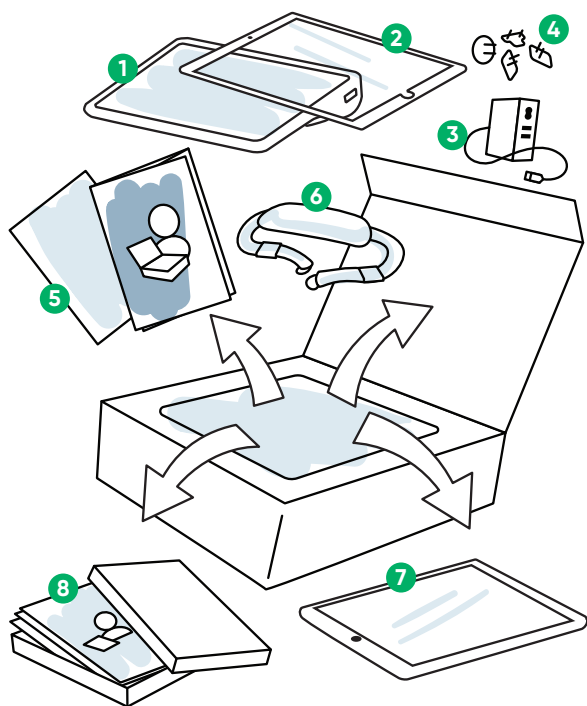

- 1** Speech Case
- 2** Rammedeksel til iPad
- 3** Strømkabel
- 4** Universelle strømadaptere
- 5** Bruksanvisning
- 6** Bærestropp


I tillegg, med SC-nettbrett:

- 7** iPad
- 8** TD Snap-opplæringskort





Dersom du kjøpte en monteringsplate eller en fingerguide – se de medfølgende instruksjonene for detaljert informasjon.

Bli kjent med enheten din

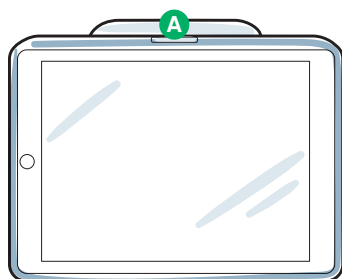

Forside

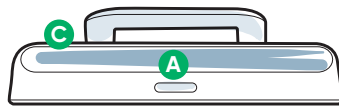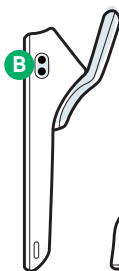

Topp og sider



A Volumbryter

B Bryterporter

C Høytalere

D Strøminngang (USB-C)

E Tilgangsmåtevelger

Fullfør de fire trinnene i denne veiledningen for å sette opp din Speech Case.


Før du begynner



Dersom du kjøpte SC-nettbrettet (pakke med Speech Case og iPad), skru på iPaden og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettsprosessen. Sørg for at du velger **Manuelt oppsett**, og velger et Wi-Fi-nettverk så snart du blir bedt om det.

Trinn 1: Plasser iPad i Speech Case

- 1 Legg iPaden (med skjermen vendt opp) på et flatt underlag.
- 2 Plasser iPadens rammedeksel oppå iPaden og press ned slik at det klikkes på plass.
- 3 Pass på at iPadens ladeport er på linje med det tilsvarende hullet i Speech Casen, og før kanten av iPaden inn under den fleksible kanten på toppen av Speech Casen.
- 4 Vinkle iPaden ned slik at den ligger flatt inni Speech Casen.
- 5 Bruk fingrene dine til å bøye den fleksible kanten rundt og over kantene av iPaden.

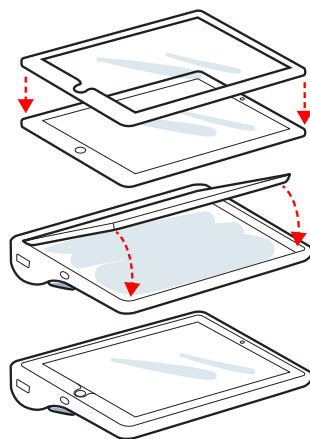

Trinn 2: Velg modus


Speech Case har tre ulike moduser: Berøring (T), iOS-skanning (S) og Av (O). Bruk Tilgangsmåtevelgeren til å velge modus **FØR** du bruker enheten. Bruk beslutningstreet nedenfor for å avgjøre hvilken modus som er best for brukeren.




Berøringsposisjon (T): Enheten vil si «Power on» og lage 1 klikkelyd.

Skanneposisjon (S): Enheten vil si «Power on» og lage 2 klikkelyder.

Av-posisjon (O) er til bruk ved frakt og langtidslagring.

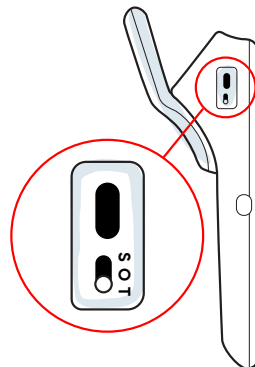


Hvordan skal brukeren velge objekter på enheten?

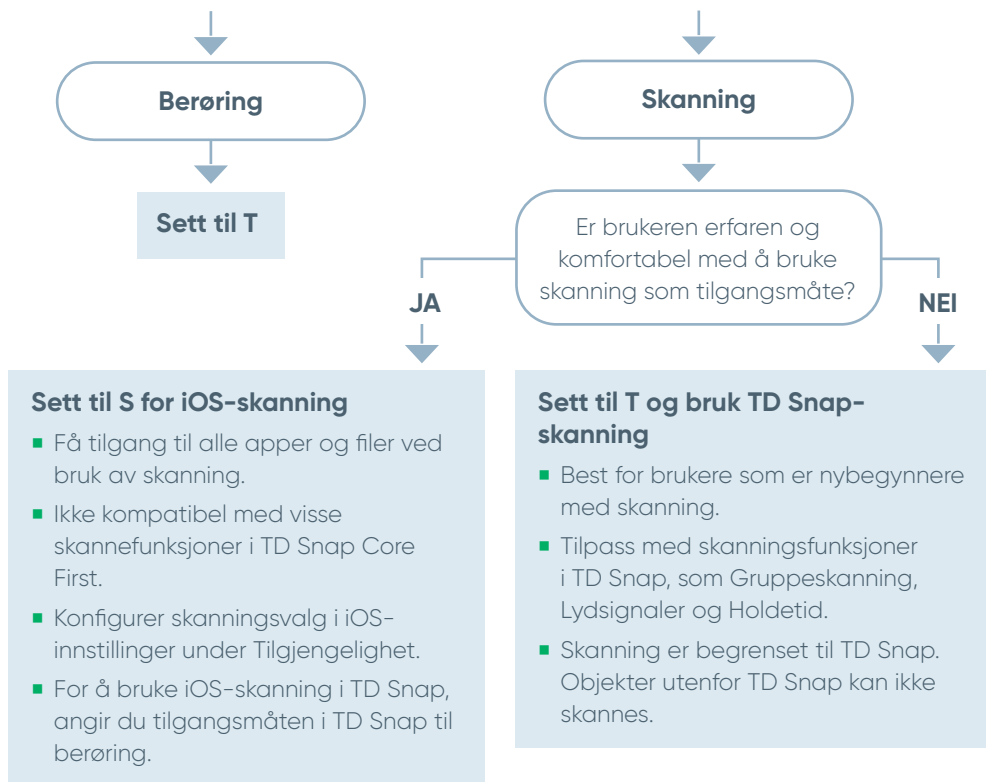

Dersom du trenger å endre modusen, se brukerveiledningen til Speech Case.


Trinn 3: Koble til Bluetooth

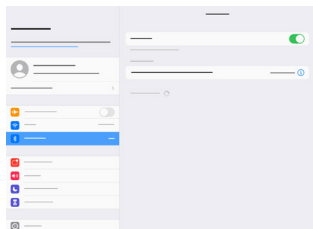

- 1 Gå til Innstillinger > Bluetooth på iPaden.
- 2 Pass på at Bluetooth er slått PÅ.
- 3 Velg Tobii Dynavox SC Tablet.



Dersom det er flere SC-nettbrett i ett rom, kan du identifisere hvert SC-nettbrett ved hjelp av de fem siste sifrene i Bluetooth-ID-en. Disse vil stemme overens med det unike, femsifrede serienummeret som du finner under den innebygde støtten på Speech Case.

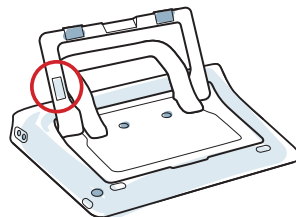

Trinn 4: Kom i gang med TD Snap



Veiviser for oppsett, TD Snap

Åpne TD Snap-appen.

Følg instruksjonene for å opprette den nye brukeren din, eller gjenopprett en lagret brukerfil.

Vi er her for å hjelpe



myTobiiDynavox

Bruk den gratis kontoen din til å synkronisere, dele sidesett, lagre sikkerhetskopier, og mer! Besøk: www.myTobiiDynavox.com



Opplæring

Tobii Dynavox-opplæringsvideoer: www.tobiidynavox.no



Opplæringsmateriell

Bruerveiledning: [http://qrco.de/SCmanual](https://qrco.de/SCmanual)

TD Snap Core First – opplæringskort: <https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snap – tekstopplæringskort: <https://qrco.de/TextCards>

TD Snap, veiledning for implementering av skanning: <https://qrco.de/ScanGuide>



Ytterligere støtte

Community: <https://www.facebook.com/TobiiDynavoxNorge>

Teknisk støtte for Norge:
55 55 10 60

Ytterligere Speech Case-ressurser finner du her:



qrco.de/TDSCinfo