



# Guia de inicialização

## Tobii Dynavox Speech Case

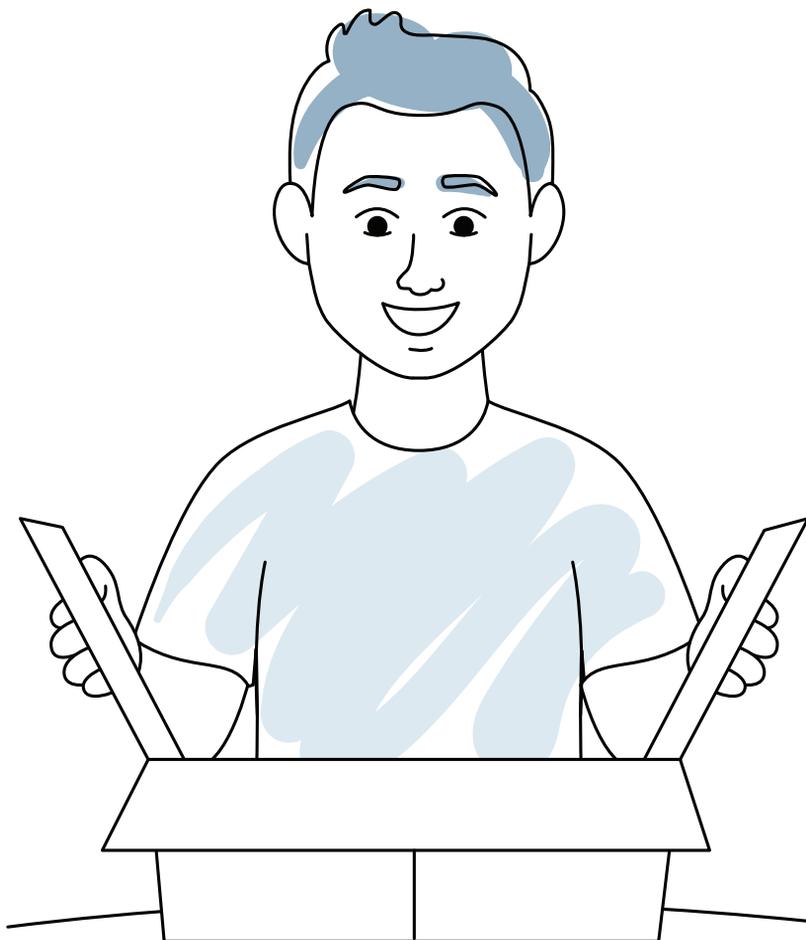

**tobii**dynavox

## O que há na caixa?

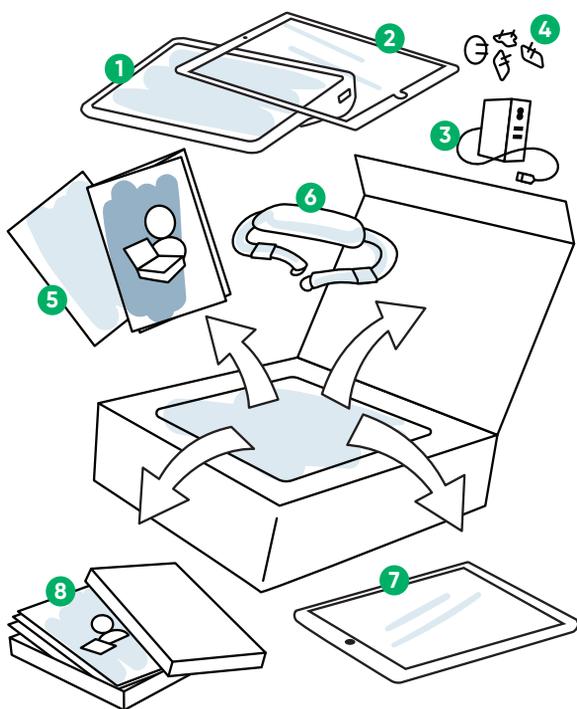

- 1 Speech Case
- 2 Capa do iPad
- 3 Cabo de alimentação
- 4 Adaptadores de energia universais
- 5 Manual do Usuário
- 6 Alça de transporte


Na versão com Tablet SC, acompanha:

- 7 iPad
- 8 Cartões de treinamento do Snap TD




*Se você comprou uma placa de montagem ou colméia, consulte as instruções incluídas para informações mais detalhadas.*

## Conhecendo seu dispositivo

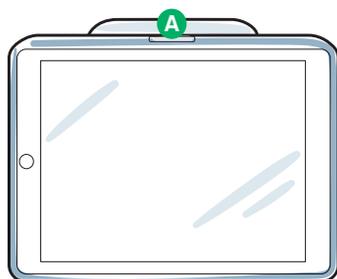

Parte frontal

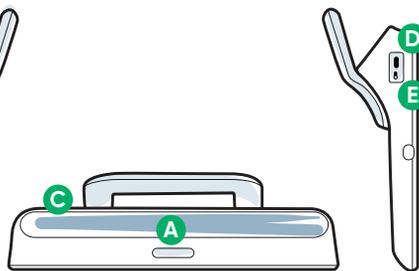

Partes superior e laterais

**A** Controle de volume

**B** Portas de Acionadores

**C** Alto-falantes

**D** Entrada de alimentação (USB-C)

**E** Seletor do método de acesso

## Complete as quatro etapas deste guia para configurar o seu Tablet Speech Case/SC.


### Antes de começar



Se você comprou um Tablet SC (pacote com Speech Case e iPad), ligue o iPad e siga as instruções na tela para concluir o processo de configuração. Certifique-se de selecionar **Configuração manual** e escolher uma rede Wi-Fi assim que receber a solicitação para tal.


## Etapa 1: Coloque o iPad na Speech Case

- 1 Coloque o iPad (com a tela para cima) em uma superfície plana.
- 2 Posicione a capa do iPad sobre o dispositivo e puxe para baixo até que ela encaixe no local correto.
- 3 Alinhe a porta de carregamento do iPad com o orifício correspondente na Speech Case. Depois, deslize a extremidade do iPad sob a aba flexível na parte superior do Speech Case.
- 4 Acerte o ângulo do iPad para que fique plano dentro do Speech Case.
- 5 Utilize seus dedos para dobrar a aba flexível sobre as extremidades do iPad e ao redor dele.

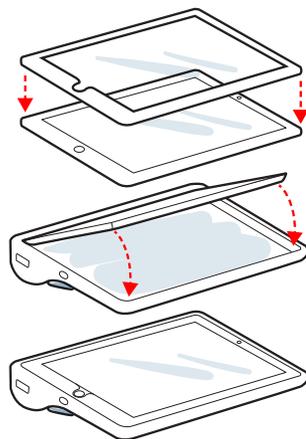

## Etapa 2: Defina o modo

O Speech Case tem três modos: Touch (Toque: "T"), iOS Scanning (Varredura iOS: "S") e Off (Desligado: "O"). Defina o modo no Seletor do método de acesso **ANTES** de utilizar o dispositivo. Utilize a árvore de decisão abaixo para determinar o melhor modo para o usuário.

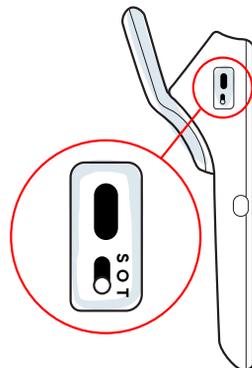


**Posição Touch (T):** A unidade mostrará "Power On" e soará um clique.

**Varredura de posição (S):** A unidade mostrará "Power On" e soará dois cliques.

**A posição (O)** é utilizada para envio e armazenamento por longos períodos.

### Como o usuário fará seleções no dispositivo?

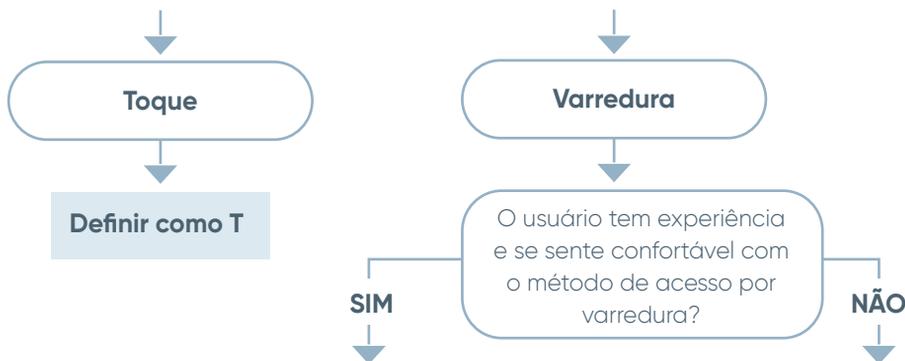

#### Coloque em "S" para iOS scanning

- Acesse todos os aplicativos e arquivos utilizando a varredura.
- Não compatível com alguns recursos de varredura do Snap Core First TD.
- Configure as opções de varredura em Configurações de Acessibilidade no iOS.
- Para utilizar a varredura do iOS no Snap TD, defina o método de acesso no Snap TD como Touch.


#### Definir como T para Varredura do Snap TD

- Melhor opção para usuários que não possuem experiência com varreduras.
- Personalize com recursos de varredura do Snap TD, como Varredura de Grupo, Sinais de Áudio e Tempo de Espera.
- A varredura está limitada ao Snap TD. Itens fora do Snap TD não podem ser incluídos na varredura.



Caso precise alterar o modo, consulte o Manual do Usuário do Speech Case.


## Etapa 3: Pareamento Bluetooth

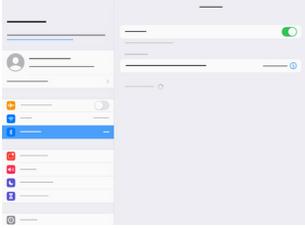

- 1 No iPad, vá para configurações > Bluetooth.
- 2 Certifique-se de que o Bluetooth esteja LIGADO.
- 3 Selecione Tobii Dynavox SC Tablet.



*Ao utilizar diversos Tablets SC no mesmo ambiente, é possível identificar cada um deles pelos últimos cinco dígitos do ID Bluetooth. Ele corresponderá ao número de série de cinco dígitos exclusivo localizado sob o suporte integrado do Speech Case.*

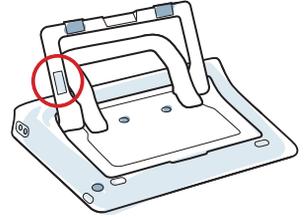

## Etapa 4: Começando a utilizar o Snap TD



### Assistente de configuração do Snap TD

Abra o aplicativo Snap TD.

Siga as instruções para criar seu novo usuário ou restaurar um arquivo de usuário salvo.

# Estamos aqui para ajudar



## myTobiiDynamovox

Use sua conta gratuita para sincronizar, compartilhar Conjuntos de Páginas, armazenar backups e muito mais! Visite: [www.myTobiiDynamovox.com](http://www.myTobiiDynamovox.com)



## Learning hub (Hub de aprendizagem)

Learning hub da Tobii Dynamovox  
[learn.tobiidynamovox.com](http://learn.tobiidynamovox.com)



## Materiais de treinamento

Manual do usuário:  
<http://qrco.de/SCmanual>

Cartões de treinamento do Snap Core First TD:  
<https://qrco.de/TDSnapCards>

Cartões de treinamento do Snap Text TD:  
<https://qrco.de/TextCards>

Cartões de treinamento do Snap Aphasia TD:  
<https://qrco.de/AphasiaCards>

Guia de implementação de varredura do Snap TD: <https://qrco.de/ScanGuide>



## Suporte adicional

Comunidade:  
<http://qrco.de/TDFB>

Suporte técnico no Brasil:  
**(11) 3884-2423**

Os recursos adicionais do Speech Case estão disponíveis aqui:



[qrco.de/TDSCinfo](http://qrco.de/TDSCinfo)