


入门指南

Tobii Dynavox Speech Case



tobii dynavox

装箱清单

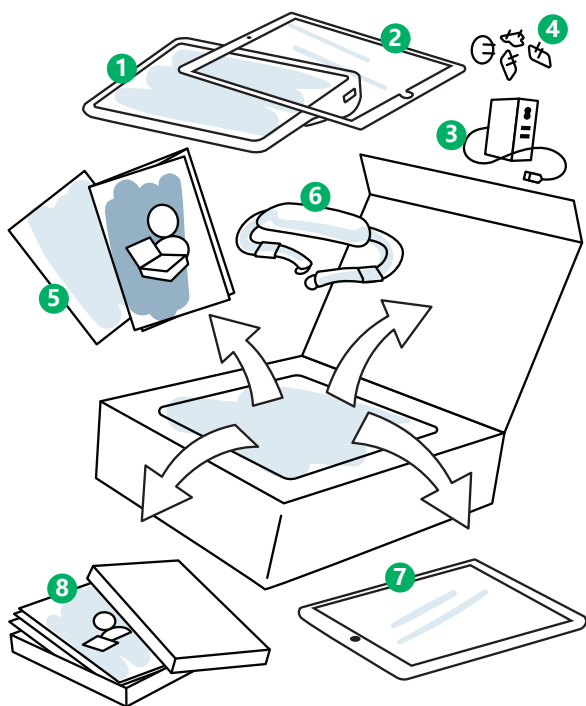

- 1 Speech Case
- 2 iPad 框架护套
- 3 电源线
- 4 通用电源适配器
- 5 用户手册
- 6 背带


此外，SC 平板电脑附带：

- 7 iPad
- 8 TD Snap 培训卡片





如果您购买了安装板或者键盘，
请见随附说明书了解详细信息。

了解您的设备

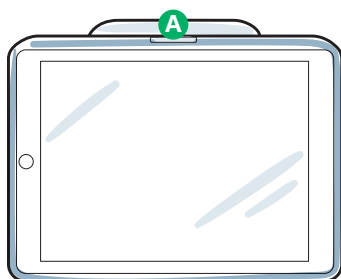

正面

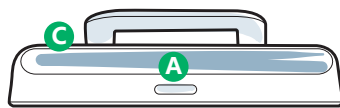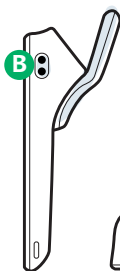

顶部与侧面



- A 音量键
- B 外置按钮接口

- C 扬声器
- D 电源端口 (USB-C)

- E 访问方式选择器
开关

完成本指南中的四个步骤，设置 Speech Case/SC 平板电脑。


开始之前



如果您购买的是 SC 平板电脑（Speech Case 与 iPad 捆绑包），打开 iPad 并且执行屏幕上的说明完成设置过程。务必选择“**手动设置**”，然后根据提示选择 Wi-Fi 网络。

步骤 1：将 iPad 放入 Speech Case

- 1 将 iPad（屏幕朝上）平放。
- 2 将 iPad 框架护套放置到 iPad 屏幕表面，然后向下推动将其卡入位。
- 3 将 iPad 的充电端口与 Speech Case 上的相应孔对齐，然后将 iPad 的边缘对准并装入 Speech Case 顶部弹性密封框的下方。
- 4 向下倾斜 iPad，直至将其平放于 Speech Case 内部。
- 5 用手指拨动弹性密封框，并将其盖住 iPad 的边缘。

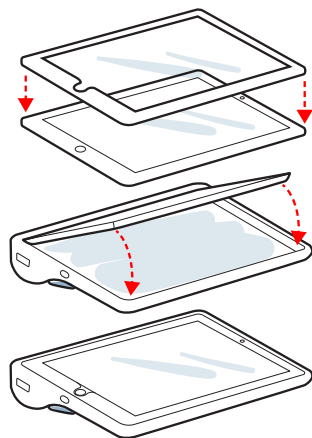

步骤 2：设置模式


Speech Case 分为三种模式：触摸 (T)、iOS 扫描 (S) 与关闭 (O)。在使用设备之前，在访问方式选择开关上设置模式。使用下方方案选择图为用户确定最佳模式。




触摸位置 (T)：设备将会提示“开机”并且发出一次咔嚓声。

扫描位置 (S)：设备将会提示“开机”并且发出两次咔嚓声。

位置 (O) 用于运输与长时间存储。

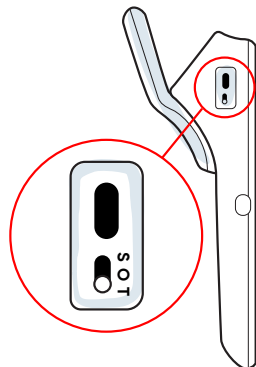


用户将如何在设备上进行选择？

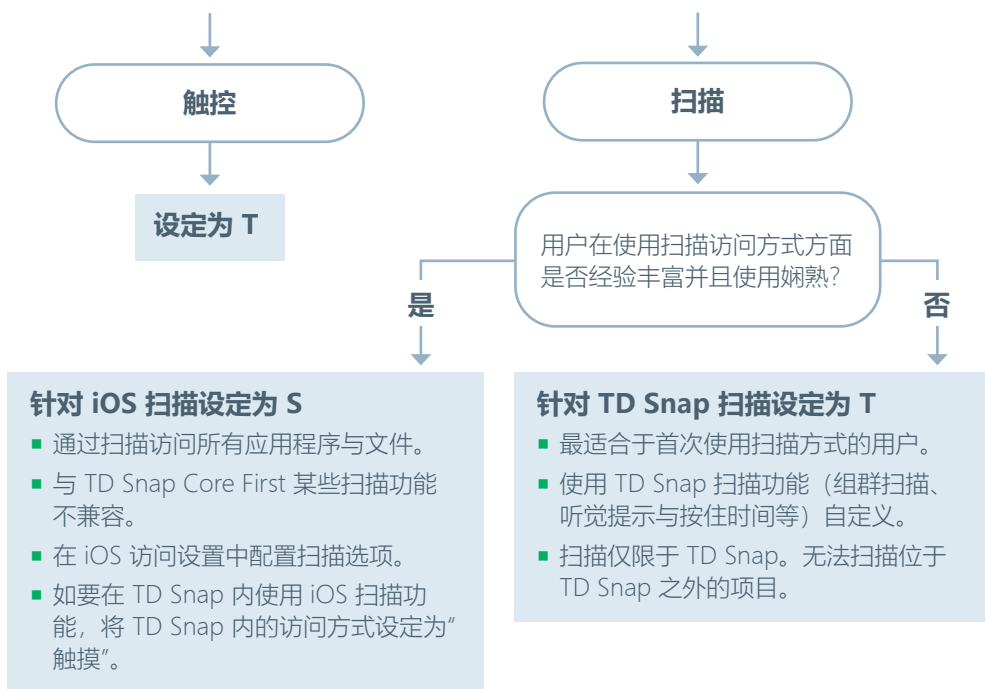

如果需要更改模式，请参阅《Speech Case 用户手册》。


步骤 3：蓝牙配对

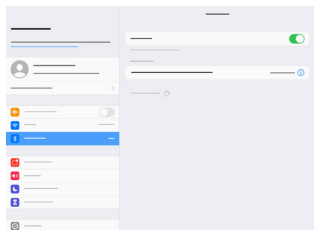

- 1 在 iPad 上，访问设置 > 蓝牙。
- 2 确保蓝牙打开。
- 3 选择 Tobii Dynavox SC 平板电脑。



如果您是在一个房间内使用多台 SC 平板电脑，可通过蓝牙 ID 的最后五位数识别每台 SC 平板电脑。它将与位于 Speech Case 上内置支架下方的唯一五位序列号匹配。

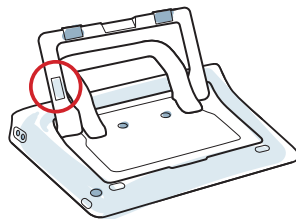

步骤 4：开始使用 TD Snap



TD Snap 设置向导

启动 TD Snap 应用程序。

按照提示创建新用户，或者从已经保持的用户文件恢复。

我们在此为您服务



myTobiiDynavox

您可以免费注册账户进行同步、页面集分享、备份存储以及更多操作！访问：

www.myTobiiDynavox.com



学习中心

Tobii Dynavox 学习中心：

learn.tobiidynavox.com



培训材料

用户手册：

<http://qrco.de/SCmanual>

TD Snap Core First 培训卡片：

<https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snap Text 培训卡片：

<https://qrco.de/TextCards>

TD Snap Aphasia 培训卡片：

<https://qrco.de/AphasiaCards>

TD Snap Scanning 实施指南：

<https://qrco.de/ScanGuide>



服务与支持

中国技术支持：

0512-69362880

关于更多的
Speech Case 资源，
请访问下列链接：



qrco.de/TDSCinfo