


Introductiehandleiding

Tobii Dynavox Speech Case



tobiidynavox

Wat zit er in de doos?

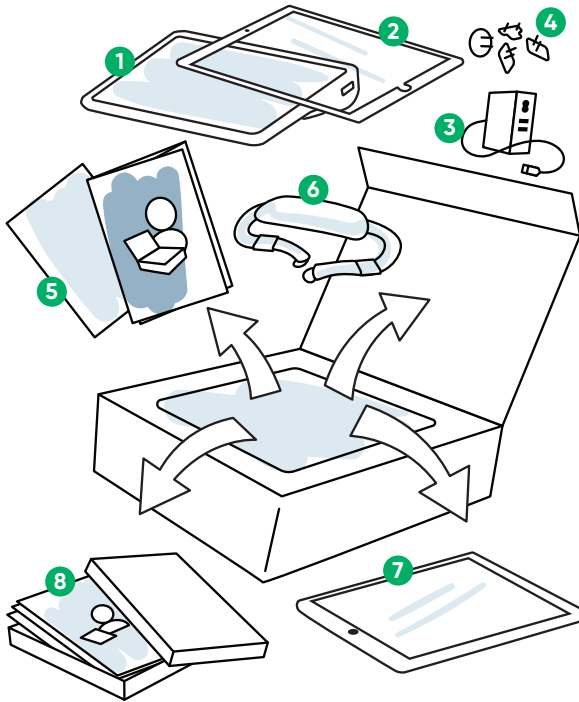

- 1 Speech Case
- 2 iPad-framehoes
- 3 Netsnoer
- 4 USB-voedingsadapters
- 5 Gebruikershandleiding
- 6 Draagriem


Aanvullend, met SC-tablet:

- 7 iPad
- 8 Snap-trainingskaarten





If you purchased a mounting plate or keyguard, see the included instructions for detailed information.


Uw apparaat leren kennen

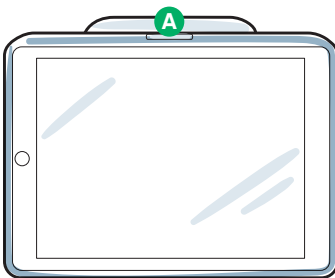

Voorkant

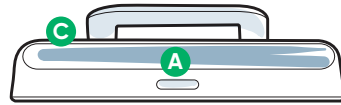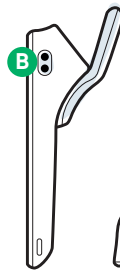

Boven- en zijkanten

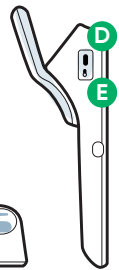

A Volume-tuimelschakelaar

C Luidsprekers

E Keuzeschakelaar selectiemethode

B Schakelaarpoorten

D Oplaadpoort (USB-C)

Voltooi de vier stappen in deze handleiding om uw Speech Case/SC-tablet in te stellen.


Voordat u aan de slag gaat



Als u een SC-tablet (Speech Case en iPad-bundel) hebt aangeschaft, schakelt u de iPad in en volgt u de instructies op het scherm.

Stap 1: De iPad in de Speech Case plaatsen

- 1 Leg de iPad (met het scherm omhoog) op een vlak oppervlak.
- 2 Plaats de iPad-framehoes op de iPad en druk hem naar beneden om hem vast te klikken.
- 3 Zorg ervoor dat de oplaadpoort van de iPad op een lijn ligt met de Speech Case en schuif vervolgens de rand van de iPad onder het flexibele lipje aan de bovenkant van de Speech Case.
- 4 Houd de iPad schuin, zodat u deze plat in de Speech Case kunt leggen.
- 5 Gebruik uw vingers om de flexibele lip rond en over de randen van de iPad te buigen.

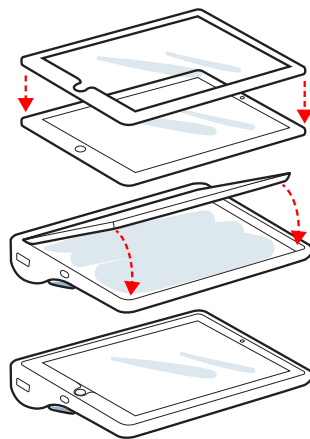

Stap 2: De modus instellen


De Speech Case heeft drie modi: Aanraken (T), iOS-scannen (S) en Off (O). Stel de modus in met de keuzeschakelaar selectiemethode **VOORDAT** u het apparaat gebruikt. Gebruik het beslissingsschema aan de rechterkant om de beste modus voor de gebruiker te bepalen.




Aanraakpositie (T): Het apparaat zegt 'Inschakelen' en laat 1 klikgeluid horen.

Scanpositie (S): Het apparaat zegt 'Inschakelen' en laat 2 klikgeluiden horen.

Positie (O) dient voor transport en langdurige opslag.

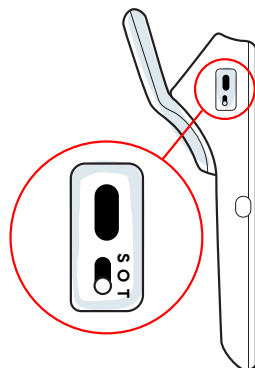


Hoe maakt de gebruiker selecties op het apparaat?

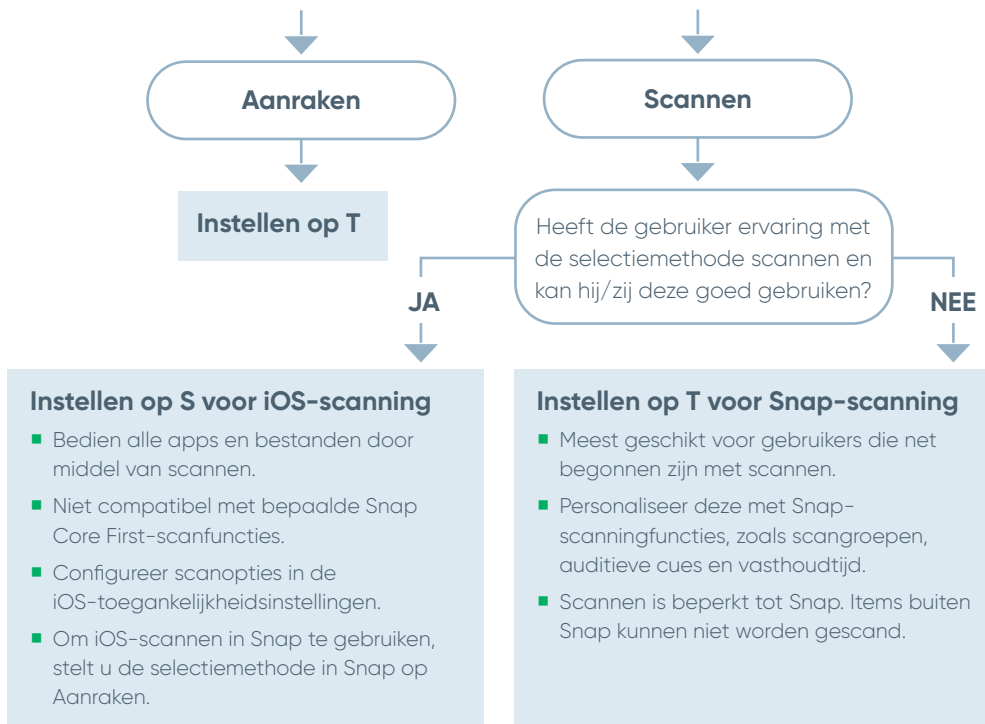

Als u de modus moet wijzigen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Speech Case.


Stap 3: Koppelen via Bluetooth

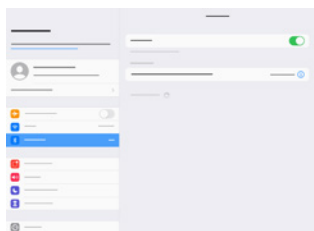

- 1 Ga op de iPad naar Instellingen > Bluetooth.
- 2 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
- 3 Selecteer Tobii Dynavox SC-tablet.



Als u meerdere SC-tablets in één ruimte gebruikt, kunt u elke SC-tablet herkennen aan de laatste vijf cijfers van de Bluetooth-ID. Deze komt overeen met het unieke vijfcijferige serienummer onder de ingebouwde standaard op de Speech Case.

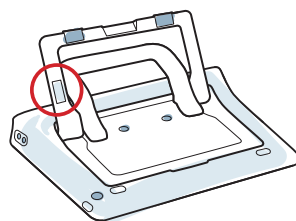


Stap 4: Aan de slag met Snap

Snap-configuratiewizard



Open de app Snap Core First.

Volg de aanwijzingen om uw nieuwe gebruiker te maken of een opgeslagen gebruikersbestand te herstellen.

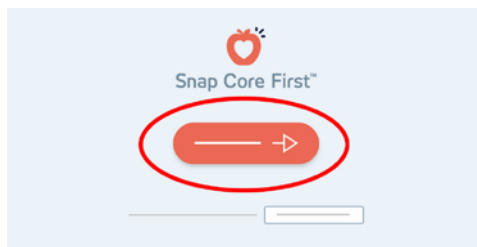

Rastergrootte

Kies een rastergrootte die de meeste knoppen bevat voor vocabulaire en die de gebruiker goed kan bedienen. U kunt deze later eenvoudig wijzigen.

Selectiemethode

Kies uw selectiemethode:

- 1 Selecteer **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Gebruiker**.
- 3 Selecteer **Selectiemethode**.



Gebruik het menu *Opties* om de instellingen voor *Aanraken en Snap* nog verder aan te passen. Als u iOS-scanning gebruikt, kunt u aanpassingen maken in *iOS-instellingen > Toegankelijkheid > Schakelbediening*.

Volgende stappen

Pathways voor Core First, een GRATIS hulpmiddel, helpt communicatievaardigheden aan te leren met behulp van instructievideo's, doelenrooster, lesplannen en nog veel meer.

Snap Core First-trainingskaarten bevatten ideeën voor dagelijks gebruik en stap-voor-stap instructies voor basisbewerkingen. Vind ze hier:



[http://qrco.de/
PathwaysCF](http://qrco.de/PathwaysCF)



[http://qrco.de/
SnapCards](http://qrco.de/SnapCards)



Wij zijn er om u te helpen



myTobiiDynavox

Gebruik uw gratis account om te synchroniseren, paginasets te delen, back-ups op te slaan en nog veel meer!

Ga naar: www.myTobiiDynavox.com



Overige

Ontdek de Tobii Dynavox-app:

<http://qrco.de/TDDiscover>

Gebruikershandleiding:

<http://qrco.de/SCmanual>



Extra ondersteuning

Community:

<http://qrco.de/TDFB>

Neem contact op met uw lokale Tobii Dynavox-vertegenwoordiger voor technische ondersteuning.

U kunt extra hulpmiddelen voor uw Speech Case hier vinden:



<http://qrco.de/TDSCinfo>

#PowerToBeYou

Deel van het uitpakken uw Speech Case en de eerste foto's en video's van het gebruik ervan via **#PowerToBeYou**.