

الإعداد

توضح هذه الوثيقة كيفية الاستعداد لإجراء إصلاحات استدعاء طرازي TD Navio Midi أو TD Navio Maxi. اتّبع التعليمات لإجراء نسخ احتياطي لجهازك وبيانات تطبيقاتك والاتصال، وحماية معلوماتك الشخصية، والتحضير لخيارات اتصال بديلة. بعد الانتهاء من الخطوات الواردة في قسم "التحضير"، انتقل إلى بدء عملية الإصلاح، صفحة 8. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يُرجى الاتصال بفريق الدعم. نحن ندرک أن هذا الأمر يتطلب وقتاً وجهداً، ونحن هنا لمساعدتك.

تنويه

منع فقدان البيانات

قد تتم إعادة ضبط جهازك أثناء عملية الإصلاح. في حالة إعادة الضبط، سيتم مسح جميع البيانات الشخصية والإعدادات الموجودة على الجهاز. تقع على عاتق المستخدم مسؤولية عمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز قبل إرساله للإصلاح. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فقدان البيانات بشكل نهائي. اتبع الخطوات الواردة في هذه الوثيقة بعناية لإجراء نسخ احتياطي لجهازك.

دُون معلومات حساب المستخدم

- 1 دُون معرّف Apple الخاص بك وكلمة المرور.
- 2 دُون اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب myTobiiDynavox.

كيف يمكنني إنشاء حساب myTobiiDynavox؟

انتقل إلى "إنشاء حساب myTobiiDynavox" لإنشاء حساب myTobiiDynavox.

قم بعمل نسخة احتياطية من جهاز TD Navio باستخدام نظام التشغيل iPadOS

قد تُظهر المعلومات رسومات من نظام iOS، إلا أن الإرشادات هي نفسها بالنسبة لنظام iPadOS.



تعمل عملية النسخ الاحتياطي للجهاز على إنشاء نسخة من معلومات جهازك، بما في ذلك الملفات الشخصية والتطبيقات والصور والإعدادات. يمكن استخدام ملف النسخ الاحتياطي لإعادة جهازك إلى حالته السابقة بعد إعادة ضبطه. لإجراء نسخ احتياطي لجهاز TD Navio، اتبع التعليمات التالية:

اللغة	ارتباط
إنجليزي	https://support.apple.com/en-us/108366
الألمانية	https://support.apple.com/de-de/108366
الفرنسية	https://support.apple.com/fr-fr/108366
الإسبانية	https://support.apple.com/es-mx/108366
الهولندية	https://support.apple.com/nl-nl/108366
السويدية	https://support.apple.com/sv-se/108366
النرويجية	https://support.apple.com/no-no/108366
الدانماركية	https://support.apple.com/da-dk/108366
الصينية المبسطة	https://support.apple.com/zh-cn/108366
اليابانية	https://support.apple.com/ja-jp/108366
الإيطالية	https://support.apple.com/it-it/108366
الفنلندية	https://support.apple.com/fi-fi/108366
عربي	https://support.apple.com/ar-sa/108366

<https://support.apple.com/bg-bg/108366>
<https://support.apple.com/pl-pl/108366>
<https://support.apple.com/sl-si/108366>
<https://support.apple.com/et-ee/108366>
<https://support.apple.com/pt-pt/108366>
<https://support.apple.com/hr-hr/108366>
<https://support.apple.com/is-is/108366>
<https://support.apple.com/he-il/108366>

البغارية
البولندية
اللغة السلوفينية
الإستونية
البرتغالية
الكرواتية
الأيسلندية
العبرية

اربط جهاز TD Navio بشبكة Wi-Fi

قد تُظهر المعلومات رسومات من نظام iOS، إلا أن الإرشادات هي نفسها بالنسبة لنظام iPadOS.



اربط جهاز TD Navio بشبكة Wi-Fi، اتبع التعليمات التالية:

ارتباط	اللغة
https://support.apple.com/en-us/111107	إنجليزي
https://support.apple.com/de-de/111107	الألمانية
https://support.apple.com/fr-fr/111107	الفرنسية
https://support.apple.com/es-mx/111107	الإسبانية
https://support.apple.com/nl-nl/111107	الهولندية
https://support.apple.com/sv-se/111107	السويدية
https://support.apple.com/no-no/111107	النرويجية
https://support.apple.com/da-dk/111107	الدانماركية
https://support.apple.com/zh-cn/111107	الصينية المبسطة
https://support.apple.com/ja-jp/111107	اليابانية
https://support.apple.com/it-it/111107	الإيطالية
https://support.apple.com/fi-fi/111107	الفنلندية
https://support.apple.com/ar-sa/111107	عربي
https://support.apple.com/bg-bg/111107	البغارية
https://support.apple.com/pl-pl/111107	البولندية
https://support.apple.com/sl-si/111107	اللغة السلوفينية
https://support.apple.com/et-ee/111107	الإستونية
https://support.apple.com/pt-pt/111107	البرتغالية
https://support.apple.com/hr-hr/111107	الكرواتية
https://support.apple.com/is-is/111107	الأيسلندية
https://support.apple.com/he-il/111107	العبرية

قم بعمل نسخة احتياطية من حساب المستخدم الخاص بك على TD Snap

الرجوع إلى myTobiiDynavox (موصى به)



1 حدد زر Edit (التحرير).

1 حدد زر

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynavox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجو الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynavox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynavox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

- 2 حدد علامة التثبيت **User** (المستخدم).
- 3 حدد السهم إلى يمين المستخدم الحالي.



- 4 حدد الزر **Backup** (النسخ الاحتياطي) بجانب اسم المستخدم الذي ترغب في عمل نسخة احتياطية منه.
- 5 حدد **Backup to myTobiiDynavox** (نسخ احتياطي إلى myTobiiDynavox).
- 6 إذا لم تقم بتسجيل الدخول حاليًا إلى حساب myTobiiDynavox الخاص بك، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك الآن. أدخل اسمًا لملف النسخ الاحتياطي للمستخدم، ثم حدد **Next** (التالي).
- 7 قد يكون من المفيد تضمين تاريخ النسخ الاحتياطي في اسم الملف.
- 7 اختر **Done** (تم).

النسخ الاحتياطي إلى ملف محلي




- 1 حدد زر **Edit** (التحرير).
- 2 حدد علامة التثبيت **User** (المستخدم).
- 3 حدد السهم إلى يمين المستخدم الحالي.



- 4 حدد الزر **Backup** (النسخ الاحتياطي) بجانب اسم المستخدم الذي ترغب في عمل نسخة احتياطية منه.
- 5 حدد **Back up to a local file** (النسخ الاحتياطي إلى ملف محلي).
- 6 أدخل اسمًا لملف النسخ الاحتياطي.
- 7 حدد (النسخ الاحتياطي).
- 8 انقل ملف النسخة الاحتياطية أو انسخه من "الملفات" < "على جهاز" > "UserBackups" > "TD Snap" > "iPad" إلى مساحة التخزين السحابية أو إلى جهاز آخر.

يمكن أيضًا نقل ملفات النسخ الاحتياطي للمستخدم المحلي إلى myTobiiDynavox يدويًا. استخدم مستعرض الويب للانتقال إلى myTobiiDynavox.com وتسجيل الدخول، ثم انتقل إلى Backups > Snap > Snap < النسخ الاحتياطية) وحدد (تحميل النسخ الاحتياطي).

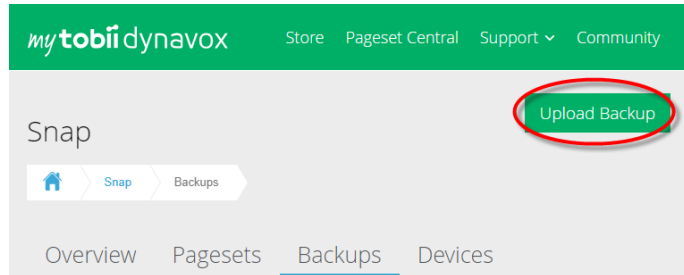

قم بعمل نسخة احتياطية لحساب المستخدم الخاص بك على TD Talk



- 1 ابدأ محادثة TD (تحدث).
- 2 اختر إحدى الطرق التالية للوصول إلى لوحة التحكم.
 - ثبّت نظرك أسفل الشاشة أو في منتصف جهاز تتبّع العين أو منطقة جهاز تتبّع العين.
 - اسحب لأعلى من مفتاح المسافة.



سيظهر زر (لوحة التحكم) في الجزء السفلي الأوسط من الشاشة.



- 3 انقر على زر (لوحة التحكم) لفتح لوحة التحكم.

4 اختر إجراء (الإعدادات) لفتح إعدادات TD Talk.



5 ابحث عن رمز (تسجيل الدخول) في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.



6 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة اسم المستخدم الخاص بك في حقل "اسم المستخدم".

7 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة كلمة المرور في حقل «كلمة المرور».

8 حدد زر تسجيل الدخول .

9 اضغط على زر "النسخ الاحتياطي".

سيظهر تاريخ إجراء النسخ الاحتياطي والجهاز الذي تم النسخ منه على يسار زر «النسخ الاحتياطي» عند إتمام عملية النسخ الاحتياطي.

10 اضغط على زر (إغلاق) للخروج.



مسح بيانات بطاقة الائتمان

قد تُظهر المعلومات رسومات من نظام iOS، إلا أن الإرشادات هي نفسها بالنسبة لنظام iPadOS.



إزالة وسيلة دفع من حساب Apple الخاص بك، اتبع التعليمات التالية:

اللغة	ارتباط
إنجليزي	https://support.apple.com/en-us/118291
الألمانية	https://support.apple.com/de-de/118291
الفرنسية	https://support.apple.com/fr-fr/118291
الإسبانية	https://support.apple.com/es-mx/118291
الهولندية	https://support.apple.com/nl-nl/118291
السويدية	https://support.apple.com/sv-se/118291
النرويجية	https://support.apple.com/no-no/118291
الدانماركية	https://support.apple.com/da-dk/118291
الصينية المبسطة	https://support.apple.com/zh-cn/118291
اليابانية	https://support.apple.com/ja-jp/118291
الإيطالية	https://support.apple.com/it-it/118291
الفنلندية	https://support.apple.com/fi-fi/118291
عربي	https://support.apple.com/ar-sa/118291
البلغارية	https://support.apple.com/bg-bg/118291
البولندية	https://support.apple.com/pl-pl/118291
اللغة السلوفينية	https://support.apple.com/sl-si/118291
الإستونية	https://support.apple.com/et-ee/118291
البرتغالية	https://support.apple.com/pt-pt/118291
الكرواتية	https://support.apple.com/hr-hr/118291
الأيسلندية	https://support.apple.com/is-is/118291
العبرية	https://support.apple.com/he-il/118291

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynamox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجى الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynamox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج.

ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynamox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام

المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

اختياري: طباعة صفحات "TD Snap" لأغراض التواصل

أثناء إصلاح جهازك، من المفيد أن تكون لوحات التواصل المطبوعة متوفرة. الصفحات الموصى بطباعتها: صفحات "لوحات المفاتيح" و"الكلمات الأساسية" و"الأسئلة السريعة" و"المواضيع" التي تستخدمها بشكل متكرر. إذا لم تكن هناك طابعة متصلة بجهازك، فاتبع الخطوات التالية لحفظ ملفات PDF على iCloud أو بريدك الإلكتروني، أو أرسلها إلى نفسك عبر Airdrop لطباعتها من جهاز آخر. كما تتوفر لوحات التواصل الجاهزة للطباعة للتنزيل في القسم الموارد، صفحة 9



- 1 حدد زر **Edit (التحرير)**.
- 2 حدد علامة التبويب **Page (الصفحة)**.



- 3 حدد **Print (طباعة)** في شريط أدوات التحرير على الجانب الأيمن من الشاشة. يفتح مربع حوار **Select Pages to Print (تحديد صفحات للطباعة)**. يمكنك كذلك الطباعة من القسم **Print Pages (طباعة صفحات)** على علامة التبويب **Page (الصفحة)**.
- 4 تتم إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة انتظار الطباعة بالوضع الافتراضي. حدد الصفحات الإضافية من القائمة لإضافتها إلى قائمة انتظار الطباعة.
 - اكتب في الحقل **Search (البحث)** للبحث حسب اسم الصفحة.
 - لإضافة جميع الصفحات في نتائج البحث الحالية إلى قائمة انتظار الطباعة، حدد **Select All (تحديد الكل)**.
 - إذا قمت بتحديد **Select All (تحديد الكل)**، ثم قمت بإلغاء تحديد **Select All (تحديد الكل)**، فإنه سيتم إعادة تعيين قائمة انتظار الطباعة.
 - لإزالة الصفحات من قائمة انتظار الطباعة، حدد **X** بجانب اسم الصفحة.
- 5 عندما تتم إضافة الصفحات المرغوب فيها إلى قائمة انتظار الطباعة، حدد **Next (التالي)**.



- 6 اختر خيارات الطباعة الخاصة بك. يتم تحديث معاينة الصفحة لتعكس الإعدادات الحالية.



- **شريط الرسائل:** قم بتعطيل هذا الإعداد لإخفاء شريط الرسائل على الصفحة (الصفحات) المطبوعة.
 - **شريط الأدوات:** قم بتعطيل هذا الإعداد لإخفاء شريط الأدوات على الصفحة (الصفحات) المطبوعة.
 - **تصور الارتباط:** قم بتعطيل هذا الإعداد لإخفاء أيقونات مؤشر الارتباط على أزرار الارتباط الموجودة على الصفحة (الصفحات) المطبوعة.
 - **عدد مرآت استخدام الزر:** قم بتعيين هذا الإعداد لإظهار عدد استخدامات الزر الحالية على الصفحة (الصفحات) المطبوعة. ملاحظة: يجب تمكين تتبع البيانات لرؤية عدد استخدامات الزر.
- 7 عند الانتهاء من اختيار خيارات الطباعة، حدد **Print (طباعة)**.
 - 8 اطبع أو احفظ كملف PDF.
 - أرسل إلى الطابعة: اختر طابعتك وقم بتعيين الإعدادات التي تفضلها، ثم انقر على "طباعة".



- حفظ كملف PDF: اختر «مشاركة»، ثم اختر خيارًا إما لإرسال ملف PDF إلى نفسك عبر Airdrop أو «الرسائل» أو «البريد»، أو اختر «حفظ في الملفات» لحفظه في محرك iCloud الخاص بك. يمكنك الوصول إلى ملف PDF الخاص بك من جهاز آخر مزود بخاصية الطباعة، ثم طباعته.

اختياري: اطبع صفحات "TD Talk" لأغراض التواصل

يجب عليك التأكد من أن طابعتك المزودة بخدمة AirPrint وجهاز TD Navio متصلان بنفس شبكة Wi-Fi. لطباعة ملفات من TD Talk، اتبع الخطوات التالية.

- 1 انتقل إلى الصفحة المراد طباعتها في TD Talk.
- 2 اضغط على زر التشغيل و زر زيادة الصوت أو خفض الصوت في نفس الوقت.
- 3 حدد النافذة الصغيرة الجديدة التي تحتوي على لقطة الشاشة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

4 اضغط على زر (مشاركة).

5 اضغط على زر (طباعة).

6 اطبع أو احفظ كملف PDF.

– أرسل إلى الطابعة: اختر طابعتك وقم بتعيين الإعدادات التي تفضلها، ثم انقر على (طباعة).

– حفظ كملف PDF: اختر (مشاركة)، ثم اختر خيارًا إما لإرسال ملف PDF إلى نفسك عبر AirDrop أو تطبيق "الرسائل" أو البريد الإلكتروني، أو اختر "حفظ في الملفات" لحفظه على محرك iCloud الخاص بك. يمكنك الوصول إلى ملف PDF الخاص بك من جهاز آخر مزود بخاصية الطباعة، ثم طباعته.

اختياري: تنزيل التطبيقات على جهاز مؤقت

إذا كان لديك جهاز آخر متوافق، مثل جهاز iPad، فيمكنك تنزيل تطبيقات الاتصال واستعادة بيانات المستخدم التي تم نسخها احتياطيًا لمواصلة التواصل أثناء إصلاح جهاز TD Navio الخاص بك.

تنزيل TD Snap

- 1 من الشاشة الرئيسية، افتح متجر التطبيقات ()
- 2 اختر علامة التبويب "بحث"



- 3 البحث عن TD Snap ()
- 4 اختر زر "الحصول على" الموجود بجوار تطبيق TD Snap.
- 5 اضغط على زر «تثبيت».
- 6 أدخل كلمة مرور Apple ID الخاصة بك.
- 7 اضغط على زر «تأكيد».
- 8 اضغط على زر «فتح» عند انتهاء التنزيل.

تنزيل تطبيق TD Talk

- 1 من الشاشة الرئيسية، افتح متجر التطبيقات ()
- 2 اختر علامة التبويب "بحث"



- 3 البحث عن TD Talk ()
- 4 انقر على زر "الحصول على" الموجود بجوار تطبيق TD Talk.
- 5 اضغط على زر «تثبيت».
- 6 أدخل كلمة مرور Apple ID الخاصة بك.
- 7 اضغط على زر «تأكيد».
- 8 اضغط على زر «فتح» عند انتهاء التنزيل.

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynavox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجى الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynavox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynavox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

استعادة حساب المستخدم الخاص بك على TD Snap

قبل إتمام الخطوات التالية، انتقل في TD Snap إلى «تحرير» < «المستخدم» < «حساب myTobiiDynavox» وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حساب myTobiiDynavox الخاصة بك. سيتيح ذلك استخدام ميزة الكلام الصوتي على هذا الجهاز باستخدام إحدى التراخيص المرافقة المضمنة مع جهاز TD Navio الخاص بك.

لإدارة تراخيص أجهزتك المساعدة، تفضل بزيارة موقع myTobiiDynavox.com، وقم بتسجيل الدخول، ثم اختر "حسابي" < "التراخيص".

استعادة مستخدم من myTobiiDynavox



- 1 حدد زر **Edit (التحرير)**.
- 2 حدد علامة التبويب **User (المستخدم)**.
- 3 حدد السهم إلى يمين المستخدم الحالي.
- 4 حدد **New User (مستخدم جديد)**.
- 5 حدد **Restore Existing User (استعادة مستخدم موجود)**.
- 6 إذا لم تقم بتسجيل الدخول حاليًا في myTobiiDynavox، فأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم حدد **Next (التالي)**.
- 7 اختر ملف نسخ احتياطي للمستخدم من القائمة، ثم حدد **Next (التالي)**.

استعادة مستخدم من ملف محلي

ملاحظة: قبل إتمام الخطوات التالية، يجب عليك نسخ ملف النسخة الاحتياطية sub إلى «الملفات» < «على جهاز UserBackups» > «TD Snap» > «iPad»



- 1 حدد زر **Edit (التحرير)**.
- 2 حدد علامة التبويب **User (المستخدم)**.
- 3 حدد السهم إلى يمين المستخدم الحالي.
- 4 حدد **New User (مستخدم جديد)**.
- 5 حدد **Restore Existing User (استعادة مستخدم موجود)**.
- 6 حدد **Restore from a local file (استعادة من ملف محلي)**.
- 7 اختر ملف نسخة احتياطية للمستخدم من القائمة، ثم اختر **"استعادة المستخدم"**.

استعادة حساب المستخدم الخاص بك على TD Talk

- 1 ثبت نظرك أسفل الشاشة أو في منتصف جهاز تتبع العين أو منطقة جهاز تتبع العين.



سيظهر زر (لوحة التحكم) في الجزء السفلي الأوسط من الشاشة.



- 2 انقر على زر (لوحة التحكم) لفتح لوحة التحكم.



- 3 اختر إجراء (الإعدادات) لفتح إعدادات TD Talk.



- 4 ابحث عن رمز (تسجيل الدخول) في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.
- 5 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة اسم المستخدم الخاص بك في حقل **"اسم المستخدم"**.
- 6 استخدم لوحة المفاتيح لكتابة كلمة المرور في حقل **"كلمة المرور"**.
- 7 حدد زر **تسجيل الدخول**.
- 8 اضغط على زر **"استعادة"**.

سيظهر تاريخ إجراء الاستعادة على يسار زر "استعادة" عند إتمام عملية الاستعادة.



- 9 اضغط على زر (إغلاق) للخروج.

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynavox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

يرجى الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynavox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynavox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

بدء عملية الإصلاح

سيرشك فريقيا خلال الخطوات التالية، بما في ذلك تغليف جهازك وترتيب الشحن المجاني، كما سيقدم لك الدعم طوال عملية الإصلاح. لبدء الإجراءات، يُرجى ملء نموذج الاستدعاء عبر الإنترنت:

- على الصعيد العالمي: <https://www.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- نحن <https://us.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- SE: <https://se.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>

ويمكنك أيضًا الاتصال بفريق الدعم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. يُرجى تجهيز رقم التسلسل الخاص بجهاز TD Navio الخاص بك. يوجد الرقم التسلسلي أسفل ويمين الساق القابلة للطي في الجزء السفلي من الجهاز.

المكتب العالمي

هاتف

الساعات: من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا)

البريد الإلكتروني: support.eu@tobiidynavox.com

مكتب أمريكا الشمالية

الهاتف: +1-800-344-1778، الخيار 1

الساعات: من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً (بتوقيت الساحل الشرقي)

البريد الإلكتروني: support.na@tobiidynavox.com

ما الذي يجب أن أرسله مع جهازي؟

يُرجى إرسال جهاز TD Navio نفسه فقط.

- يُرجى عدم تضمين الشواحن أو الكابلات أو الملحقات أو أي معدات أخرى.
- اترك الغطاء الواقي على الجهاز.

ستتلقى تعليمات شحن واضحة، بما في ذلك إرشادات التغليف، عند إصدار تصريح الإصلاح (داخل الولايات المتحدة) أو تصريح شحن البضائع المراد إصلاحها (خارج الولايات المتحدة).

الاستعادة بعد الإصلاح

إذا تمت إعادة ضبط جهازك أثناء عملية الإصلاح، فاتبع الخطوات التالية لاستعادة بيانات جهازك من ملفات النسخ الاحتياطي. لا تتم إعادة ضبط معظم الأجهزة أثناء الإصلاح، لذا لا تقم بتنفيذ هذه الخطوات إلا عند الضرورة.

استعادة جهازك من نسخة احتياطية

قد تُظهر المعلومات رسومات من نظام iOS، إلا أن الإرشادات هي نفسها بالنسبة لنظام iPadOS.



لاستعادة جهازك من نسخة احتياطية، اتبع التعليمات التالية:

اللغة	ارتباط
إنجليزي	https://support.apple.com/en-us/118105
الألمانية	https://support.apple.com/de-de/118105
الفرنسية	https://support.apple.com/fr-fr/118105
الإسبانية	https://support.apple.com/es-mx/118105
الهولندية	https://support.apple.com/nl-nl/118105
السويدية	https://support.apple.com/sv-se/118105
النرويجية	https://support.apple.com/no-no/118105
الدانماركية	https://support.apple.com/da-dk/118105
الصينية المبسطة	https://support.apple.com/zh-cn/118105
اليابانية	https://support.apple.com/ja-jp/118105
الإيطالية	https://support.apple.com/it-it/118105

https://support.apple.com/fi-fi/118105	الفنلندية
https://support.apple.com/ar-sa/118105	عربي
https://support.apple.com/bg-bg/118105	البلغارية
https://support.apple.com/pl-pl/118105	البولندية
https://support.apple.com/sl-si/118105	اللغة السلوفينية
https://support.apple.com/et-ee/118105	الإستونية
https://support.apple.com/pt-pt/118105	البرتغالية
https://support.apple.com/hr-hr/118105	الكرواتية
https://support.apple.com/is-is/118105	الأيسلندية
https://support.apple.com/he-il/118105	العبرية

الموارد

طباعة تعليمات لوحة الإعلانات

يمكن لمستخدم نظام التواصل المعرّز والبديل (AAC) أن يلمس العناصر الموجودة على لوحة التواصل. استخدم الحروف الموجودة على لوحة التواصل لكتابة الكلمات. إذا كان لمس الأشياء يمثل صعوبة، فيمكن استخدام اللوحة مع شريك على النحو التالي.

- 1 تأكد من الطريقة التي يستخدمها مستخدم وسائل التواصل المعرّز والبديل للإشارة إلى "نعم". ويمكن أن يكون ذلك عن طريق الإجابة بكلمة «نعم»، أو الإيماء بالرأس، أو رفع النظر، وما إلى ذلك. اسأل أيضًا عما إذا كان مستخدم وسائل التواصل المعرّز والبديل (AAC) يرغب في أن يخمن شريكه في التواصل ما يكتبه أم لا.
- 2 يشير الشريك إلى كل صف بالترتيب ويقول: "هل هو هذا الصف؟" أو يذكر اسم الصف برقمه أو بحرفه ("هل هو الصف 1؟"، "هل هو الصف أ؟"). توقف قليلاً بين كل جملة وأخرى لإتاحة الوقت لمستخدم وسائل التواصل المعرّز والبديل (AAC) للرد.
- 3 يُشير مستخدم نظام التواصل المعرّز والبديل (AAC) بكلمة "نعم" عندما يصل شريكه إلى السطر المطلوب. إذا لم يحدد مستخدم نظام التواصل المعرّز والبديل "نعم"، فراجع الصفوف مرة أخرى.
- 4 يشير الشريك إلى العناصر الموجودة في الصف المحدد وتسميتها ("هل هي أ؟"، "هل هي ب؟"، "هل يوجد خطأ؟"، إلخ).
- 5 يُشير مستخدم نظام التواصل المعرّز والبديل (AAC) بكلمة "نعم" عندما يصل شريكه إلى العنصر الذي يريده. إذا لم يحدد مستخدم نظام التواصل المعرّز والبديل "نعم"، فراجع العناصر الموجودة في ذلك الصف مرة أخرى.
- 6 كرر الخطوات من 2 إلى 5 حتى ينتهي مستخدم نظام التواصل المعرّز والبديل (AAC) من كتابة رسالته.

اللغة الأفريقانية

مجموعة الصفحات	الرابط
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_af_ZA.pdf

عربي

مجموعة الصفحات	الرابط
المسح بمساعدة الشريك	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_ar.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_ar.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_ar.pdf

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynavox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجو الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynavox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynavox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

مجموعة الصفحات	الرابط
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_ar.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ar.pdf

البلغارية

مجموعة الصفحات	الرابط
المسح بمساعدة الشريك	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_bg-BG.pdf

الدانماركية

مجموعة الصفحات	الرابط
المسح بمساعدة الشريك	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_da.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_da.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_da.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_da.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_da_DK.pdf
النص	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_da.pdf

الهولندية

مجموعة الصفحات	الرابط
المسح بمساعدة الشريك	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_nl.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_nl.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_nl.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_nl.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nl_NL.pdf
النص	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_nl.pdf

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynamox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجو الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynamox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynamox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

مجموعة الصفحات	الرابط
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_AU.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_AU.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_AU.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_AU.pdf

الإنجليزية - بريطانيا العظمى

مجموعة الصفحات	الرابط
احتباس الكلام	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-UK.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_en-UK.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_en-UK.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_en-UK.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_UK.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_UK.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_GB.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_GB.pdf

الإنجليزية - الولايات المتحدة

مجموعة الصفحات	الرابط
المسح بمساعدة الشريك	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_en.pdf
احتباس الكلام	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-US.pdf

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_en-US.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_en-US.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_en-US.pdf	Core First 7x7
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en-US.pdf	Express
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en-US.pdf	Motor Plan 30
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en-US.pdf	Motor Plan 40
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en-US.pdf	Motor Plan 66
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_en.pdf	النص

الإستونية

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_et-EE.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_et-EE.pdf	Express

الفنلندية

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fi.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fi.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fi.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fi.pdf	Core First 7x7

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynamox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجو الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynamox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمسئثشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمسئثشار حلول شركة Tobii Dynamox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fr.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_fr_FR.pdf	احتباس الكلام
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr_FR.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr_FR.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr_FR.pdf	Core First 7x7
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_FR.pdf	Express
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_fr.pdf	النص

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr_CA.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr_CA.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr_CA.pdf	Core First 7x7
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_CA.pdf	Express

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_de.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_de_DE.pdf	احتباس الكلام
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_de_DE.pdf	Core First 5x5

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_PCS_de.pdf	Core First 5x5 (PCS)
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_DE.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de_PCS.pdf	Core First 6x6 (PCS)
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_DE.pdf	Core First 7x7
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_PCS_de.pdf	Core First 7x7 (PCS)
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_de_DE.pdf	Express
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_de-DE-Metacom.pdf	Express METACOM
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_METACOM_de-DE.pdf	Motor Plan 30 METACOM
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_PCS_all_de_DE.pdf	قطعة Motor Plan 30
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_de-DE-Metacom.pdf	Motor Plan 40 METACOM
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_PCS_all_de_DE.pdf	قطعة Motor Plan 40
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_de-DE-Metacom.pdf	Motor Plan 66 METACOM
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_PCS_all_de_DE.pdf	قطعة Motor Plan 66
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_de.pdf	النص

العبرية

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_help_IL.pdf	المسح بمساعدة الشريك

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynavox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجو الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynavox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمسئئلي الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمسئلي حلول شركة Tobii Dynavox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والترتيب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_female_he-IL.pdf	Core First 5x5 أنثى
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_male_he-IL.pdf	Core First 5x5 ذكر
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_female_he-IL.pdf	Core First 6x6 أنثى
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_male_he-IL.pdf	Core First 6x6 ذكر
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_female_he-IL.pdf	Core First 7x7 أنثى
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_male_he-IL.pdf	Core First 7x7 ذكر

الأيسلندية

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_is-IS.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_female_is-IS.pdf	Core First 5x5 أنثى
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_male_is-IS.pdf	Core First 5x5 ذكر
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_female_is-IS.pdf	Core First 6x6 أنثى
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_male_is-IS.pdf	Core First 6x6 ذكر
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_female_is-IS.pdf	Core First 7x7 أنثى
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_male_is-IS.pdf	Core First 7x7 ذكر
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-female.pdf	Express أنثى
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-male.pdf	Express ذكر

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynavox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجو الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynavox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynavox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

مجموعة الصفحات	الرابط
النص	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_is-IS.pdf

الأيرلندية

مجموعة الصفحات	الرابط
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ga_IE.pdf

الإيطالية

مجموعة الصفحات	الرابط
المسح بمساعدة الشريك	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_it.pdf
احتباس الكلام	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_it_IT.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_it-IT.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_it-IT.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_it-IT.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_it_IT.pdf
النص	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_it.pdf

اليابانية

مجموعة الصفحات	الرابط
Core First 5x5 Hiragana	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Hiragana_ja.pdf
Core First 5x5 Kanji	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Kanji_ja.pdf
Core First 6x6 Hiragana	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Hiragana_ja.pdf
Core First 6x6 Kanji	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Kanji_ja.pdf
Core First 7x7 Hiragana	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Hiragana_ja.pdf

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynamox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجو الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynamox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynamox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Kanji_ja.pdf	Core First 7x7 Kanji
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Hiragana_ja.pdf	Express Hiragana
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Kanji_ja.pdf	Express Kanji

النرويجية

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_no.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_no.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_no.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_no.pdf	Core First 7x7
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nb_NO.pdf	Express
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_no.pdf	النص

البولندية

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pl.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pl.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pl.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pl.pdf	Core First 7x7
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pl.pdf	Express

البرتغالية – البرتغال

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pt.pdf	المسح بمساعدة الشريك

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynamox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجى الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynamox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynamox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pt.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pt.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pt.pdf	Core First 7x7
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pt_PT.pdf	Express
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_pt.pdf	النص

اللغة السلوفينية

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sl-SL.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_female_sl-SL.pdf	Express أنثى
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_male_sl-SL.pdf	Express ذكر

الإسبانية – المكسيك

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es_MX.pdf	احتباس الكلام
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_MX.pdf	Express
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_MX.pdf	Motor Plan 30
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_MX.pdf	Motor Plan 40
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_MX.pdf	Motor Plan 66
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es-MX.pdf	النص

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynamox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجو الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynamox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمسئثشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمسئثشار حلول شركة Tobii Dynamox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_es.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es-ES.pdf	احتباس الكلام
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_es.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_es.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_es.pdf	Core First 7x7
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_ES.pdf	Express
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_ES.pdf	Motor Plan 30
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_ES.pdf	Motor Plan 40
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_ES.pdf	Motor Plan 66
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es.pdf	النص

السويدية

الرابط	مجموعة الصفحات
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sv.pdf	المسح بمساعدة الشريك
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_sv.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_sv.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_sv.pdf	Core First 7x7
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_sv_SE.pdf	Express
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_sv.pdf	النص

الدعم لجهاز شركة Tobii Dynavox الخاص بك

احصل على المساعدة عبر الإنترنت

نرجى الرجوع إلى صفحة الدعم المخصصة لكل منتج للاطلاع على الدعم الخاص بجهازك من Tobii Dynavox. تحتوي هذه الصفحة على أحدث المعلومات المتعلقة بالمشاكل والنصائح والحيل المرتبطة بالمنتج. ابحث عن صفحات الدعم على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

اتصل بمستشار الحلول أو الموزع الذي تتعامل معه

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل تواجهك مع المنتج، يمكنك الاتصال بمستشار حلول شركة Tobii Dynavox أو الموزع المعتمد للحصول على المساعدة. فهم على دراية أكثر بالإعداد الشخصي ويمكنهم تقديم أفضل مساعدة لك من خلال إعطاء النصائح والتدريب على استخدام المنتج. للاطلاع على تفاصيل الاتصال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>