

מידע על קריאת שירות ל-TD Navio

הכנה

מסמך זה מתאר כיצד להתכונן לתיקונים במסגרת קריאת השירות של TD Navio Midi או TD Navio Maxi. פעל על פי ההוראות כדי לגבות את נתוני המכשיר ואפליקציית התקשורת שלך, לאבטח את המידע האישי שלך ולהכין אמצעי תקשורת חלופיים. לאחר שתסיים לבצע את השלבים המפורטים בסעיף "הכנה", המשך ל התחל את תהליך התיקון, עמוד 8 אם אתה זקוק לעזרה, אנא פנה לשירות התמיכה. אנו מודעים לכך שזה דורש זמן ומאמץ, ואנו כאן כדי לעזור.

הודעה

למנוע אובדן נתונים

ייתכן שהמכשיר שלך יאפס במהלך תהליך התיקון. במקרה של איפוס, כל הנתונים האישיים וההגדרות במכשיר יימחקו. על המשתמש מוטלת האחריות לגבות את נתוני המכשיר לפני שליחתו לתיקון. אי-ביצוע פעולה זו עלול לגרום לאובדן בלתי הפיך של הנתונים. פעל בקפדנות לפי השלבים המפורטים במסמך זה, כדי לגבות את המכשיר שלך.

רשום את פרטי חשבון המשתמש

1. רשום את ה-Apple ID והסימה שלך.
2. רשום את שם המשתמש והסימה שלך ל-myTobiiDynavox.

כיצד פותחים חשבון myTobiiDynavox?

עבור אל '[פתיחת חשבון myTobiiDynavox](#)' כדי ליצור חשבון myTobiiDynavox.

גבה את ה-TD Navio שלך באמצעות iPadOS

המידע עשוי לכלול תמונות ממערכת ההפעלה iOS, אך ההוראות זהות גם עבור iPadOS.



גיבוי המכשיר יוצר עותק של המידע שבמכשיר, כולל קבצים אישיים, אפליקציות, תמונות והגדרות. ניתן להשתמש בקובץ הגיבוי כדי להחזיר את המכשיר למצב שבו היה לפני האיפוס. כדי לגבות את ה-TD Navio שלך, פעל לפי ההוראות הבאות:

שפה	קישור
English	https://support.apple.com/en-us/108366
גרמנית	https://support.apple.com/de-de/108366
צרפתית	https://support.apple.com/fr-fr/108366
ספרדית	https://support.apple.com/es-mx/108366
הולנדית	https://support.apple.com/nl-nl/108366
שוודית	https://support.apple.com/sv-se/108366
נורווגית	https://support.apple.com/no-no/108366
דנית	https://support.apple.com/da-dk/108366
סינית פשוטה	https://support.apple.com/zh-cn/108366
יפנית	https://support.apple.com/ja-jp/108366
איטלקית	https://support.apple.com/it-it/108366
פינית	https://support.apple.com/fi-fi/108366

יצירות יוצרים © 2020-05-20 - תא-10 - תמיכה על קריאת שירות ל-Apple. המפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. כל הישגים המסחריים היום רשומים של בעליהם בהתאמה.

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשיר ה-Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפרטות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצת והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

https://support.apple.com/ar-sa/108366	ערבית
https://support.apple.com/bg-bg/108366	בולגרית
https://support.apple.com/pl-pl/108366	פולנית
https://support.apple.com/sl-si/108366	סלובנית
https://support.apple.com/et-ee/108366	אסטוני
https://support.apple.com/pt-pt/108366	פורטוגזית
https://support.apple.com/hr-hr/108366	קרואטית
https://support.apple.com/is-is/108366	איסלנדית
https://support.apple.com/he-il/108366	עברית

חבר את ה-TD Navio שלך לרשת ה-Wi-Fi

המידע עשוי לכלול תמונות ממערכת ההפעלה iOS, אך ההוראות זהות גם עבור iPadOS.



כדי לחבר את ה-TD Navio לרשת ה-Wi-Fi, פעל לפי ההוראות הבאות:

שפה	קישור
English	https://support.apple.com/en-us/111107
גרמנית	https://support.apple.com/de-de/111107
צרפתית	https://support.apple.com/fr-fr/111107
ספרדית	https://support.apple.com/es-mx/111107
הולנדית	https://support.apple.com/nl-nl/111107
שוודית	https://support.apple.com/sv-se/111107
נורווגית	https://support.apple.com/no-no/111107
דנית	https://support.apple.com/da-dk/111107
סינית פשוטה	https://support.apple.com/zh-cn/111107
יפנית	https://support.apple.com/ja-jp/111107
איטלקית	https://support.apple.com/it-it/111107
פינית	https://support.apple.com/fi-fi/111107
ערבית	https://support.apple.com/ar-sa/111107
בולגרית	https://support.apple.com/bg-bg/111107
פולנית	https://support.apple.com/pl-pl/111107
סלובנית	https://support.apple.com/sl-si/111107
אסטוני	https://support.apple.com/et-ee/111107
פורטוגזית	https://support.apple.com/pt-pt/111107
קרואטית	https://support.apple.com/hr-hr/111107
איסלנדית	https://support.apple.com/is-is/111107
עברית	https://support.apple.com/he-il/111107

יצירת יוצרים © 2020-05-20 - He-IL - תמונות יוצרים על ידי תמיכת TD Navio. כל המידע המופיע באתר זה הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ או המלצה. המידע המופיע באתר זה אינו מהווה ייעוץ או המלצה. המידע המופיע באתר זה אינו מהווה ייעוץ או המלצה.

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשיר ה-Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציגי המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפרטיות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצת והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

גבה את חשבון המשתמש שלך ב-TD Snap

חזרה ל-myTobiiDynavox (מומלץ)



1. בחר את הלחצן **עריכה**.
2. בחר בלשונית **משתמש**.
3. בחר את החץ מימין למשתמש הנוכחי.



4. בחר את לחצן **גיבוי ליד שם המשתמש שברצונך לגבות**.
5. בחר **גבה אל myTobiiDynavox**.
אם לא נכנסת לחשבון myTobiiDynavox, תתבקש לעשות זאת כעת.
6. הזן שם עבור קובץ גיבוי המשתמש שלך, ולאחר מכן בחר **הבא**.
זה עשוי להיות מועיל לכלול את תאריך הגיבוי בשם הקובץ.
7. בחר **סיים**.
- גיבוי לקובץ מקומי




1. בחר את הלחצן **עריכה**.
2. בחר בלשונית **משתמש**.
3. בחר את החץ מימין למשתמש הנוכחי.



4. בחר את לחצן **גיבוי ליד שם המשתמש שברצונך לגבות**.
5. בחר **גבה לקובץ מקומי**.
6. הזן שם לקובץ הגיבוי.
7. בחר **גבה**.
8. העבר או העתק את קובץ הגיבוי מהתיקייה 'קבצים' < 'ב-iPad שלי' < 'UserBackups' > 'TD Snap' לאחסון בענן או למכשיר אחר.

ניתן גם להעביר קבצי גיבוי משתמש מקומי ל- myTobiiDynavox באופן ידני. השתמש בדפדפן שלך כדי לעבור ל- myTobiiDynavox.com והיכנס, לאחר מכן עבור אל Snap < גיבויים ובוחר **העלה גיבוי**.

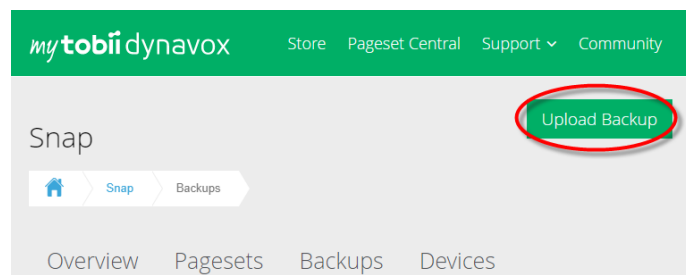

גבה את חשבון המשתמש שלך ב-TD Talk



1. התחל את TD Talk (C).
2. בחר באחת מהדרכים הבאות כדי לגשת למרכז השליטה.
 - קבע את מבטך מתחת למסך עוקב העין, או באזור עוקב העין.
 - החלק כלפי מעלה ממקשי הרווח.

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשירי Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר.
דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobii-dynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צרו קשר לצורך סיוע עם יועץ הפתרונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצות והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobii-dynavox.com/pages/contact-us>

<https://support.apple.com/hr-hr/118291>

קראטית

<https://support.apple.com/is-is/118291>

איסלנדית

<https://support.apple.com/he-il/118291>

עברית

אופציה: הדפס את דפי TD Snap לצורך תקשורת

בזמן שהמכשיר שלך נמצא בתיקון, כדאי שיהיו ברשותך לוחות תקשורת מודפסים. דפים מומלצים להדפסה: דפי המקלדות, מילות הליבה, התרגילים המהירים והנושאים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר. אם אין מדפסת מחוברת למכשיר שלך, בצע את השלבים הבאים כדי לשמור את קבצי ה-PDF ב-iCloud, לשלוח אותם בדוא"ל או להעביר אותם לעצמך באמצעות Airdrop כדי להדפיס אותם ממכשיר אחר. ניתן להוריד לוחות תקשורת מוכנים להדפסה גם מהמדור **משאבים**, עמוד 9



עריכה

1. בחר את הלחצן
2. בחר בלשונית **עמוד**.



3. בחר **הדפס** בסרגל העריכה בצד הימני של המסך. תיבת הדו-שיח 'בחר עמודים להדפסה' תיפתח. תוכל גם להדפיס מהקטע **הדפס עמודים בלשונית 'עמוד'**.
4. העמוד הנוכחי יתוסף לתור להדפסה כברירת מחדל. בחר עמודים נוספים מהרשימה כדי להוסיף אותם לתור להדפסה.
 - הקלד בשדה תווית כדי לחפש לפי שם עמוד.
 - כדי להוסיף את כל העמודים בתוצאות החיפוש הנוכחיות לתור להדפסה סמן את **בחר הכל**.
 - אם סימנת את 'בחר הכל', בטל את סימון 'בחר הכל' והתור להדפסה יתאפס.
 - כדי להסיר עמודים מהתור להדפסה, בחר את ה-**X** לצד שם העמוד.
5. כשהעמודים הרצויים נבחרו לתור להדפסה, בחר **הבא**.



6. בחר את אפשרויות ההדפסה שלך. התצוגה המקדימה של העמוד מתעדכנת כדי לשקף את ההגדרות הנוכחיות.



- **סרגל המסרים** השבת הגדרה זו כדי להסתיר את סרגל המסרים בעמודים (ים) המודפס(ים).
 - **סרגל כלים**. השבת הגדרה זו כדי להסתיר את סרגל הכלים בעמוד (ים) המודפס(ים).
 - **קישור ויזואליזציה** השבת הגדרה זו כדי להסתיר את סמלי סמן הקישורים בלחצני הקישור בעמודים (ים) המודפס(ים).
 - **ספירת השימוש בלחצן** אפשר הגדרה זו כדי להציג את ספירות השימוש בלחצן הנוכחי בעמודים (ים) המודפס(ים). הערה: 'מעקב אחר נתונים' חייב להיות מאופשר כדי לראות את ספירות השימוש בלחצנים.
7. כשסיימת לבחור את אפשרויות ההדפסה שלך, בחר **הדפס**
 8. הדפס או שמור כקובץ PDF.
 - שלח למדפסת שלך: בחר את המדפסת והגדר את ההגדרות המועדפות עליך, ולאחר מכן בחר **'הדפס'**.



– שמור כקובץ PDF: בחר באפשרות 'שתף', ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות: שליחת קובץ ה-PDF לעצמך באמצעות AirDrop, 'הודעות' או 'דואר', או בחר באפשרות 'שמור בקבצים' כדי לשמור את הקובץ ב-iCloud Drive. גש לקובץ ה-PDF שלך ממכשיר אחר עם יכולת הדפסה והדפס אותו.

אופציה: הדפס את דפי " TD Talk " לצורך תקשורת

עליך לוודא שהמדפסת התומכת ב-AirPrint וה-TD Navio שלך מחוברים לאותה רשת Wi-Fi. כדי להדפיס מ-TD Talk, בצע את השלבים הבאים.

1. עבור לדף להדפסה ב-TD Talk.
2. לחץ על לחצן ההפעלה ועל לחצן הגברת עוצמת הקול או הפחתת עוצמת הקול בו-זמנית.
3. בחר את החלון הקטן החדש המכיל את צילום המסך בפניה השמאלית התחתונה של המסך.

4. בחר בלחצן (שתף).

5. לחץ על לחצן (הדפסה).
6. הדפס או שמור כקובץ PDF.

– **שלח למדפסת שלך:** בחר את המדפסת והגדר את ההגדרות המועדפות עליך, ולאחר מכן בחר (הדפס).

– **שמור כקובץ PDF:** בחר (שתף), ולאחר מכן בחר באפשרות לשלוח את קובץ ה-PDF לעצמך באמצעות AirDrop, 'הודעות' או 'דואר', או בחר 'שמור בקבצים' כדי לשמור אותו ב-iCloud Drive. גש לקובץ ה-PDF שלך ממכשיר אחר עם יכולת הדפסה והדפס אותו.

אופציה: הורדת אפליקציות למכשיר זמני

אם יש ברשותך מכשיר תואם אחר, כגון iPad, תוכל להוריד את אפליקציות התקשורת שלך ולשחזר את נתוני המשתמש שגיבית, כדי להמשיך לתקשר בזמן שה-TD Navio שלך נמצא בתיקון.

הורד את TD Snap

1. ממסך הבית, פתח את App Store .
2. בחר בכרטיסייה 'חיפוש'



3. חפש **TD Snap**
4. בחר בלחצן 'הורד' שלידי האפליקציה TD Snap.
5. לחץ על לחצן 'התקן'.
6. הזן את סיסמת ה-Apple ID שלך.
7. לחץ על לחצן 'אשר'.
8. לחץ על לחצן 'פתח' בסיום ההורדה.

הורד את TD Talk

1. ממסך הבית, פתח את App Store .
2. בחר בכרטיסייה 'חיפוש'

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשיר ה-Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפרטיות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצות והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>



- כפש את TD Talk ()
1. בחר בלחצן "הורד" שליד האפליקציה TD Talk.
 2. לחץ על לחצן 'התקן'.
 3. הזן את סיסמת ה-Apple ID שלך.
 4. לחץ על לחצן 'אשר'.
 5. לחץ על לחצן 'פתח' בסיום ההורדה.

שחזור חשבון המשתמש שלך ב-TD Snap

לפני שתבצע את השלבים שלהלן, ב-TD Snap עבור אל 'ערוך' < 'משתמש' < 'חשבון myTobiiDynavox' והתחבר באמצעות פרטי הכניסה שלך ל-myTobiiDynavox. פעולה זו תאפשר שימוש בדיבור במכשיר זה באמצעות אחת מהרישיונות הנלווים הכלולים ב-TD Navio שברשותכם.

כדי לנהל את הרישיונות הנלווים שלך, היכנס לאתר myTobiiDynavox.com, התחבר ובחר 'החשבון שלי' < 'רישיונות'.

שחזור משתמש מ-myTobiiDynavox



1. בחר את הלחצן עריכה.
2. בחר בלשונית משתמש.
3. בחר את החץ מימין למשתמש הנוכחי.
4. בחר משתמש חדש.
5. בחר שחזור משתמש קיים.
6. אם לא נכנסת עדיין ל-myTobiiDynavox, הזן את הדוא"ל שלך ואת סיסמתך ולאחר מכן בחר הבא.
7. בחר קובץ גיבוי משתמש מהרשימה ולאחר מכן בחר הבא.

שחזור משתמש מקובץ מקומי

הערה: לפני שתבצע את השלבים שלהלן, עליך להעתיק את קובץ הגיבוי שלך בפורמט sub. לתיקייה 'קובצים' < 'ב-iPad שלי' > 'TD Snap UserBackups'



1. בחר את הלחצן עריכה.
2. בחר בלשונית משתמש.
3. בחר את החץ מימין למשתמש הנוכחי.
4. בחר משתמש חדש.
5. בחר שחזור משתמש קיים.
6. בחר שחזור מקובץ מקומי.
7. בחר קובץ גיבוי משתמש מהרשימה, ולאחר מכן בחר 'שחזור משתמש'.

שחזר את חשבון המשתמש שלך ב-TD Talk

1. קבע את מבטך מתחת למסך במרכז עוקב העין, או באזור עוקב העין.
2. לחץ על לחצן (לוח המחוונים) יופיע בחלק התחתון-מרכזי של המסך.
3. לחץ על לחצן (לוח המחוונים) כדי לפתוח את לוח המחוונים.
3. בחר בפעולה (הגדרות) כדי לפתוח את הגדרות TD Talk.



4. חפש את סמל (התחבר) בפינה השמאלית העליונה של המסך.
5. השתמש במקלדת כדי להקליד את שם המשתמש שלך בשדה "שם משתמש".
6. השתמש במקלדת כדי להקליד את הסיסמה שלך בשדה "סיסמה".
7. בחר בלחצן התחבר.
8. לחץ על לחצן 'שחזור'.
- תאריך השחזור יופיע משמאל ללחצן "שחזור" לאחר ביצוע השחזור.
9. לחץ על לחצן (סגור) כדי לצאת.

התחל את תהליך התיקון

הצוות שלנו ילווה אתכם בשלבים הבאים, כולל אריזת המכשיר והזמנת משלוח חנים, ויספק תמיכה לאורך כל תהליך התיקון. כדי להתחיל בתהליך, אנא מלאו את טופס ההחזרה המקוון:

- **עולמי:** <https://www.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- **אנו:** <https://us.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- **SE:** <https://se.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>

לחלופין, ניתן לפנות לשירות התמיכה בטלפון או בדוא"ל. אנא הכינו את מספר הסידורי של ה-TD Navio שלכם. מספר הסידורי נמצא מתחת ומימין לרגל המתקפלת בתחתית המכשיר.

משרד צפון אמריקה
טלפון: +1-800-344-1778, בחרו באפשרות 1
שעות: ימים ב' ו', 9:00–21:00 (שעון מזרח)
דוא"ל: support.na@tobiidynavox.com

משרד גלובלי
טלפון:
שעות: יום שני – יום שישי 9 בבוקר עד 5 אחה"צ (CET)
דוא"ל: support.eu@tobiidynavox.com

מה עליי לשלוח יחד עם המכשיר שלי?

אנא שלח רק את מכשיר ה-TD Navio עצמו.

- אין לכלול מטענים, כבלים, אביזרים או ציוד אחר.
- השאר את נרתיק המגן על המכשיר.

תקבל הוראות משלוח ברורות, כולל הנחיות לאריזה, עם הנפקת אישור התיקון (בתוך ארצות הברית) או אישור החזרת המוצר לתיקון (מחוץ לארצות הברית).

שחזור לאחר תיקון

אם המכשיר שלך עבר איפוס במהלך תהליך התיקון, בצע את השלבים הבאים כדי לשחזר את המכשיר מקבצי הגיבוי שלך. ברוב המכשירים לא מתבצע איפוס במהלך התיקון, ולכן יש לבצע את השלבים הבאים רק במידת הצורך.

שחזור המכשיר מגיבוי

המידע עשוי לכלול תמונות ממערכת ההפעלה iOS, אך ההוראות זהות גם עבור iPadOS.



כדי לשחזר את המכשיר מגיבוי, פעל לפי ההוראות הבאות:

שפה	קישור
English	https://support.apple.com/en-us/118105
גרמנית	https://support.apple.com/de-de/118105

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_ar.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_ar.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_ar.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_ar.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ar.pdf

בולגרית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_bg-BG.pdf

דנית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_da.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_da.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_da.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_da.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_da_DK.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_da.pdf

הולנדית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_nl.pdf

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשירי Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציגי המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפתרונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצות והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

מארז עמודים	כתובת
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_nl.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_nl.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_nl.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nl_NL.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_nl.pdf

אנגלית (אוסטרליה)

מארז עמודים	כתובת
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_AU.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_AU.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_AU.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_AU.pdf

אנגלית - בריטניה

מארז עמודים	כתובת
אפזיה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-UK.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_en-UK.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_en-UK.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_en-UK.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_UK.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_UK.pdf

יצירות יוצרים © 2020 Tobii Dynavox Group AB (publ) לא כל המוצרים והשירותים מוצעים בכל שוק מקומי. המפרטים נחשבים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. כל השינויים המסחריים הינם רשומים של בעליהם בהתאמה.

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשיר ה-Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפתרונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצת והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

מארז עמודים	כתובת
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_GB.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_GB.pdf

אנגלית (ארצות הברית)

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_en.pdf
אפזיה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-US.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_en-US.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_en-US.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_en-US.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en-US.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en-US.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en-US.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en-US.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_en.pdf

אסטוני

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_et-EE.pdf

יצירת קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר. <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשירי Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפרטונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצות והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

מארז עמודים	כתובת
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_et_EE.pdf

פינית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning.fi.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5.fi.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6.fi.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7.fi.pdf

צרפתית - צרפת

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fr.pdf
אפזיה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_fr_FR.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-FR.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-FR.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-FR.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_FR.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_fr.pdf

צרפתית - קנדה

מארז עמודים	כתובת
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-CA.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-CA.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-CA.pdf

מארז עמודים	כתובת
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_CA.pdf

גרמנית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_de.pdf
אפזיה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_de_DE.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_de-DE.pdf
Core First 5x5 (PCS)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_PCS_de.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de-DE.pdf
Core First 6x6 (PCS)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de_PCS.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_de-DE.pdf
Core First 7x7 (PCS)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_PCS_de.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_de_DE.pdf
METACOM Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_de-DE-Metacom.pdf
תוכנית מוטורית METACOM 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_METACOM_de-DE.pdf
Motor Plan 30 PCS	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_PCS_all_de_DE.pdf
Motor Plan 40 METACOM	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_de-DE-Metacom.pdf
Motor Plan 40 PCS	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_PCS_all_de_DE.pdf

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשיר ה-Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפתרונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצת והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

מארז עמודים	כתובת
Motor Plan 66 METACOM	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_de-DE-Metacom.pdf
Motor Plan 66 PCS	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66-PCS_all_de_DE.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_de.pdf

עברית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_he-IL.pdf
Core First 5x5 לנשים	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_female_he-IL.pdf
Core First 5x5 גברים	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_male_he-IL.pdf
Core First 6x6 נקבה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_female_he-IL.pdf
Core First 6x6 זכר	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_male_he-IL.pdf
Core First 7x7 נקבה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_female_he-IL.pdf
Core First 7x7 זכר	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_male_he-IL.pdf

איסלנדית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_is-IS.pdf
Core First 5x5 לנשים	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_female_is-IS.pdf

יזורים © 2020-05-20 - he-IL תד נאיוויד-טובי עיל קריאת שירות ל 4. יזורים © 2020-05-20 - he-IL תד נאיוויד-טובי עיל קריאת שירות ל 4. יזורים © 2020-05-20 - he-IL תד נאיוויד-טובי עיל קריאת שירות ל 4.

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשיר ה-Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפתרונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצת והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

כתובת	מארז עמודים
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_male_is-IS.pdf	Core First 5x5 גברים
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_female_is-IS.pdf	Core First 6x6 נקבה
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_male_is-IS.pdf	Core First 6x6 זכר
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_female_is-IS.pdf	Core First 7x7 נקבה
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_male_is-IS.pdf	Core First 7x7 זכר
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-female.pdf	Express (נקבה)
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-male.pdf	Express (זכר)
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_is-IS.pdf	טקסט

אירי

כתובת	מארז עמודים
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ga IE.pdf	Express

איטלקית

כתובת	מארז עמודים
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_it.pdf	סריקה בסיוע שותף
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_it IT.pdf	אפזיה
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_it-IT.pdf	Core First 5x5
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_it-IT.pdf	Core First 6x6
https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_it-IT.pdf	Core First 7x7

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשיר ה-Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפרטונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצות והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

מארז עמודים	כתובת
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_it_IT.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_it.pdf

יפנית

מארז עמודים	כתובת
Core First 5x5 היראגאנה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Hiragana_ja.pdf
Core First 5x5 קאנג'י	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Kanji_ja.pdf
Core First 6x6 היראגאנה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Hiragana_ja.pdf
Core First 6x6 קאנג'י - "Core First"	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Kanji_ja.pdf
Core First 7x7 היראגאנה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Hiragana_ja.pdf
Core First 7x7 הקאנג'י הבסיסי	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Kanji_ja.pdf
היראגאנה מהירה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Hiragana_ja.pdf
קאנג'י אקספרס	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Kanji_ja.pdf

נורווגית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_no.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_no.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_no.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_no.pdf

יפנית יוצרים © 2020-05-20 - Tobii Dynavox Group AB (publ) לא כל המוצרים והשירותים מוצעים בכל שוק מקומי. המפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. כל הישגים המסחריים הינם רכושם של בעליהם בהתאמה.

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשיר ה-Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאילוח או פתרון בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפרטונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצת והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

מארז עמודים	כתובת
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nb_NO.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_no.pdf

פולנית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pl.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pl.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pl.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pl.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pl.pdf

פורטוגזית (פורטוגל)

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pt.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pt.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pt.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pt.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pt_PT.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_pt.pdf

סלובנית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sl_SL.pdf

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

ראה עמוד התמיכה הספציפי של המוצר, לגבי מכשירי Tobii Dynavox שלך. העמוד כולל מידע עדכני על בעיות, וכן טיפים ועצות בנוגע למוצר. דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאילוט או פתרון בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפתרונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצות והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>

מארז עמודים	כתובת
Express (נקבה)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_female_sl-SL.pdf
Express (זכר)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_male_sl-SL.pdf

ספרדית - מקסיקו

מארז עמודים	כתובת
אפזיה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es_MX.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_MX.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_MX.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_MX.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_MX.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es-MX.pdf

ספרדית (ספרד)

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_es.pdf
אפזיה	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es-ES.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_es.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_es.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_es.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_ES.pdf

מארז עמודים	כתובת
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_ES.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_ES.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_ES.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es.pdf

שוודית

מארז עמודים	כתובת
סריקה בסיוע שותף	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sv.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_sv.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_sv.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_sv.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_sv_SE.pdf
טקסט	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_sv.pdf

תמיכה עבור מכשיר Tobii Dynavox שלכם.

קבלת עזרה אונליין

דפי התמיכה המקוונים נמצאים בכתובת: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

צור קשר עם נציג המכירות שלך או עם המוכר.

לגבי שאלות או פתרונות בעיות לגבי המוצר, אנא צור קשר לצורך סיוע עם יועץ הפתרונות של Tobii Dynavox או נציג מורשה. הם מודעים בצורה הטובה ביותר להתקנה האישית שלך, ויכולים לסייע לך בעצות והכשרה לגבי המוצר. לפרטי יצירת קשר אנא בקר בכתובת <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>