


TD Navio


# Priročnik za začetek uporabe

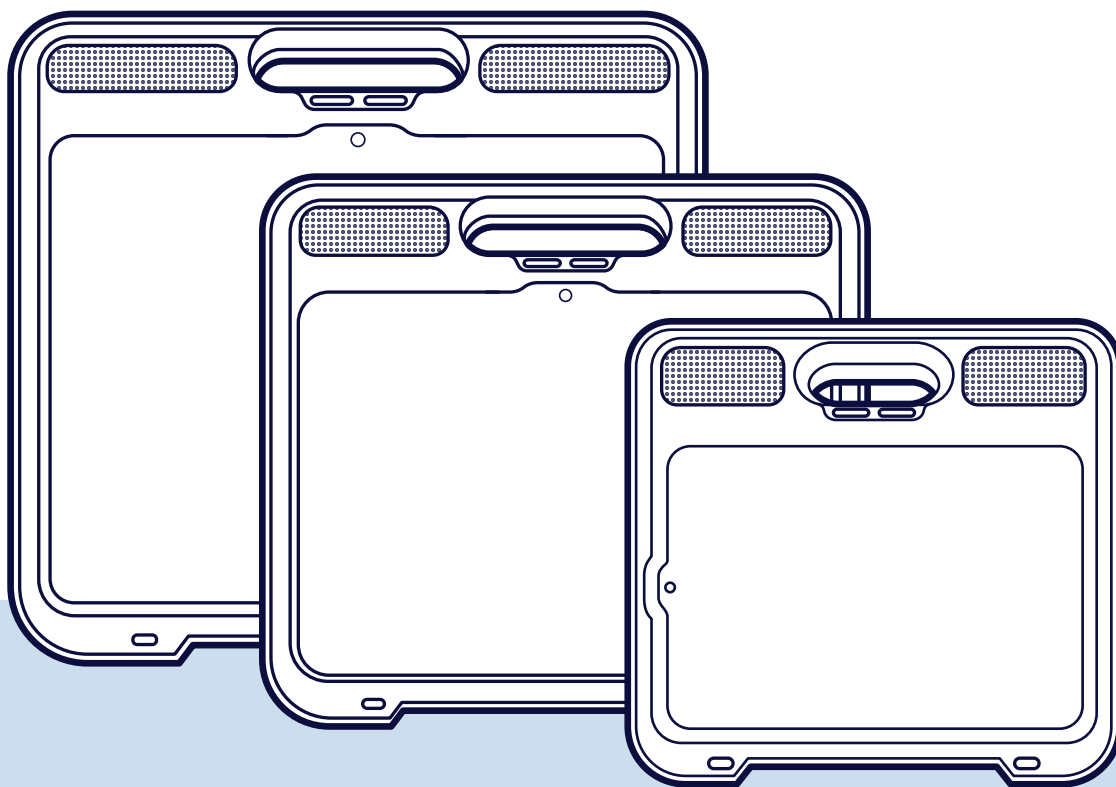

Za ogled tega dokumenta v vseh  
jezikih, ki so na voljo na spletu,  
poskenirajte kodo QR.

[qrco.de/bf5Bzk](https://qrco.de/bf5Bzk)

## Kaj je vključeno

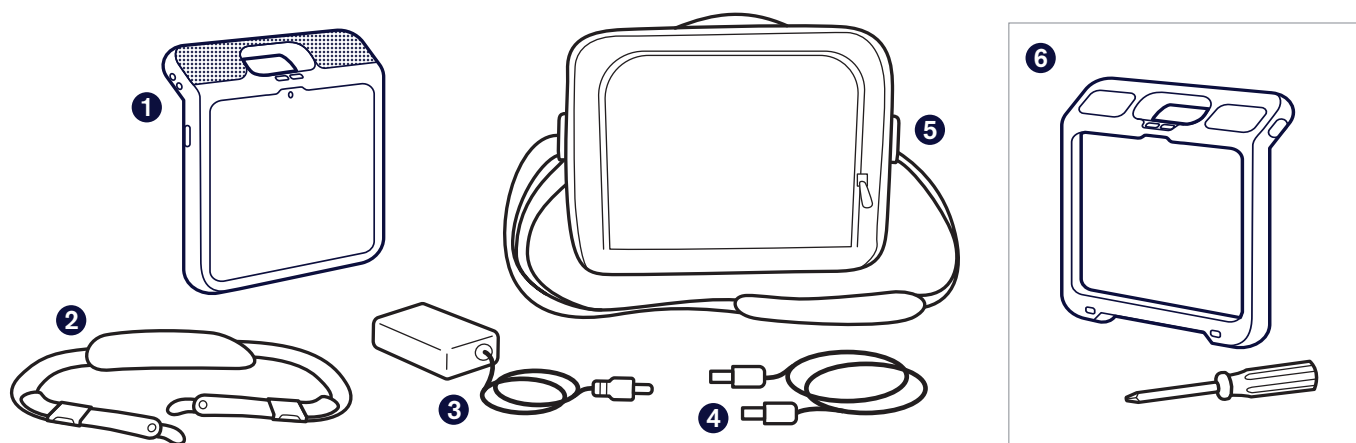

**1** Naprava TD Navio

**2** Ramenski pas za napravo

**3** Napajanje

**4** Kabel USB-C


**5** Nosilno ohišje  
Patent v postopku čakanja

**6** Komplet zaščitnega ohišja


Na nekaterih trgih je zaščitno ohišje že nameščeno. Nadomestna zaščitna ohišja v različnih barvah lahko kupite na spletni strani [TobiiDynavox.com](http://TobiiDynavox.com).

## Spoznajte svojo napravo


Naprava je prikazana z nameščenim zaščitnim ohišjem.

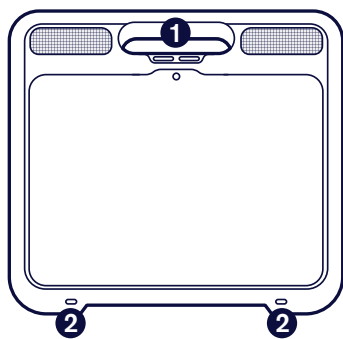

Sprednja stran

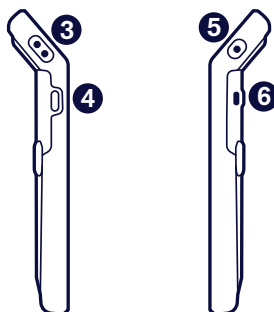

Strani

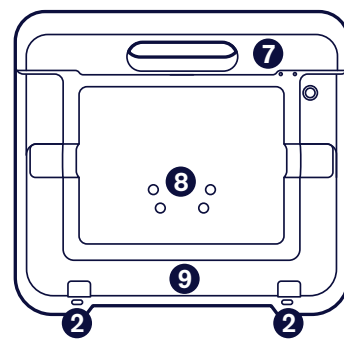

Nazaj

**1** Gumbi za glasnost

**2** Priključne točke pasu

**3** Preklopna vrata

**4** Vključno-izklopni gumb

**5** Vrata vtiča za zvok

**6** Napajalni spojnik USB-C

**7** Gumbi za ponastavitev\*

**8** Lokacija namestitve

**9** Zložljiva noga

\* Pri napravi TD Navio Mini so gumbi za ponastavitev na levi strani naprave.


### **i** Opomba

Če vaš TD Navio nima predhodno nameščenega zaščitnega ohišja, upoštevajte navodila, priložena kompletu zaščitnega ohišja, in namestite ohišje, preden začnete z namestitvenimi koraki.

# 1. korak: Začetna nastavitve

## Napajanje

- 1 Priključite en konec kabla USB-C na napajanje.
- 2 Drugi konec kabla USB-C priključite na napravo TD Navio.
- 3 Vključite napajalnik v vtičnico. TD Navio se bo samodejno zagnal.

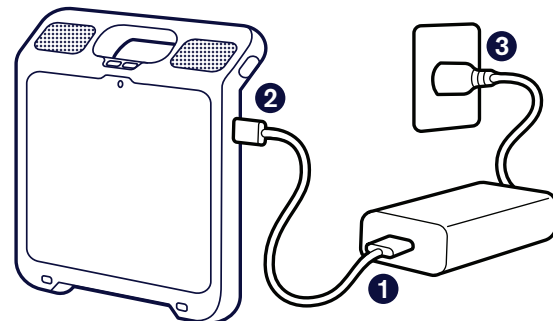

Sledite navodilom za nastavitve iPadOS na zaslonu. Če želite prejeti programsko opremo Tobii Dynavox, ki je vključena v nakup, morate izbrati naslednje možnosti:

## iPadOS setup

- 4 Izberite jezik, regijo in nastavitve videza.
- 5 Na zaslonu za hitri začetek izberite **Nastavitev brez druge naprave** ali **Nastavitev ročno**.
- 6 Če je ta možnost na voljo, nastavite pisne in govorne jezike po svojih željah.
- 7 Pridružite se omrežju Wi-Fi in izberite **Next**.
- 8 Če se pojavi poziv za prenos aplikacij in podatkov, izberite **Don't Transfer Anything**.
- 9 Na zaslonu za oddaljeno upravljanje izberite **Enroll this iPad** ali **Next**.



### Opozorilo

NE izberite možnosti Odstrani iPad iz organizacije. Če je ta možnost izbrana, komunikacijskih aplikacij ne boste prejeli, napravo pa bo treba poslati nazaj družbi Tobii Dynavox, da bo rešila težavo.



### Opomba

Daljinsko upravljanje, znano tudi kot MDM, omogoča napravi Tobii Dynavox, da prek omrežja Wi-Fi v vaš iPad pošilja programsko opremo in posodobitve programske opreme. Pri oddaljenem upravljanju bo Tobii Dynavox imel dostop le do informacij o specifikacijah strojne opreme iPada, različici operacijskega sistema, nameščenih aplikacijah in varnostnih nastavitvah. Tobii Dynavox ne bo mogel dostopati do vaših osebnih datotek, fotografij, kamer, mikrofонов ali podatkov o lokaciji.

- 10 Če se prikaže poziv za nastavitve Face ID, ga zdaj preskočite in ga nastavite pozneje v Nastavitvah.
- 11 Nastavitev gesla ni obvezna. Če ga zdaj preskočite, ga lahko nastavite pozneje v nastavitvah



### Opozorilo

Če nastavite geslo, zagotovite, da ga uporabnik ne bo pozabil. Zelo priporočljivo je, da geslo shranite na varnem mestu, na primer v upravitelju gesel v drugi napravi, če ga boste morali poiskati. Če pozabite geslo in se zaklenete, boste morali napravo TD Navio vrniti družbi Tobii Dynavox in jo ponastaviti.


- 12 Če se prikaže poziv za ID Apple, vnesite ID Apple za uporabnika in ne za skrbnika. Če želite za zdaj preskočiti vnos Apple ID, izberite **Ste pozabili geslo ali nimate Apple ID?** in nato v **Nastavitvah nastavite pozneje**. Če ste izbrali srednji ali velik videz, podrsnite, da si ogledate **Ste pozabili geslo ali nimate Apple ID?**
- 13 Na spletnem mestu se strinjajte s pogoji družbe Apple.
- 14 Na preostale pozive za nastavitve odgovorite glede na svoje osebne preference.  
Ko boste končali s pozivi za nastavitve sistema iPadOS, se bo prikazal začetni zaslon z ikonami aplikacij.

## Nastavitve





### Opomba

Na neki točki se bo pojavilo pojavno sporočilo z vprašanjem, ali priključujete par slušalk. Izberite **Druga naprava**.


- 15 Izberite **Nastavitve** .
- 16 Na levi strani izberite **Face ID & Passcode** ali **Touch ID & Passcode**.
- 17 Če ste geslo že nastavili, vnesite geslo, sicer izberite **Dodaj geslo**.
- 18 Podrsnite do dna in vklopite **Dodatki**. Tako bodo naprava TD Navio in dodatki, kot so stikala, ostali povezani.
- 19 Podrsnite navzgor z dna zaslona, da zaprete možnost Nastavitve.

## 2. korak: Izberite in nastavite svojo komunikacijsko aplikacijo

- 1 V spodnji preglednici poiščite komunikacijsko aplikacijo, ki je za uporabnika najprimernejša.
- 2 Zaženite izbrano aplikacijo in sledite navodilom za ustvarjanje novega uporabnika ali obnovitev obstoječega uporabnika.

	 TD Snap®	 TD Talk
<b>Opis</b>	TD Snap® je aplikacija za ustvarjanje govora za tiste, ki potrebujejo pomoč simbolov.	TD Talk je aplikacija za ustvarjanje govora za pismene ljudi, ki ne potrebujejo podpornih simbolov.
<b>Sestavljanje sporočil</b>	Sporočila se sestavljajo z uporabo gumbov za besede in fraze s podpornimi simboli. Na voljo je tudi zaslonska tipkovnica s predvidevanjem besed.	Sporočila so sestavljena z zaslonsko tipkovnico s predvidevanjem besed in besednih zvez, podobno kot pri pošiljanju sporočil SMS.
<b>Raven pismenosti</b>	Ponavljajoče prek naprednega	Napredno
<b>Starosti</b>	Vse starosti	Od najstnikov do odraslih
<b>Bela tabla</b>	Da	Ne
<b>Samoregulacijska podpora</b>	Da	Ne

### 3. korak: Nameščanje in položaj

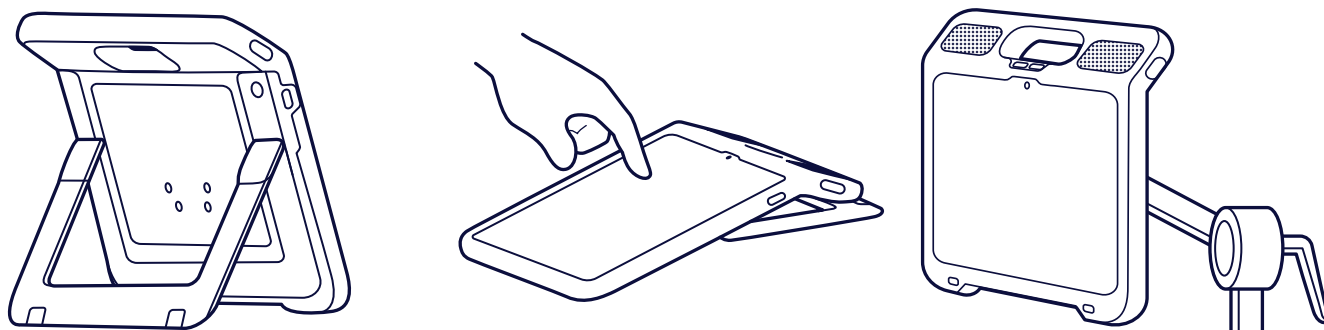

Uporabnika najprej udobno namestite, nato pa poiščite položaj naprave, ki mu omogoča dobro vidljivost zaslona in enostaven dostop do izbrane metode izbire. Napravo je mogoče namestiti z uporabo sistema za nameščanje, tako da jo položite plosko na površino ali podprete z zložljivo nogo. Vedno namestite napravo, da ustreza uporabniku in ne obratno. Pričakovano je, da bo treba napravo tekom dneva mogoče prestaviti v drug položaj.

**Možnost:** Pritrdite ramenski pas. Navodila so na oznaki na ramenskem pasu.

### 4. korak: Učite se, vadite in odpravite napake

Vaš TD Navio je zdaj pripravljen za uporabo! Začnite raziskovati napravo in aplikacije. Ko boste pripravljeni izvedeti več, poskenirajte spodnje kode QR, da dobite kartice za usposabljanje TD Snap® Basics in kartice za usposabljanje TD Talk Touch. Te prikazujejo, kako uporabljati glavne značilnosti komunikacijskih aplikacij, pridobiti spretnosti za AAC in odpraviti napake.



Vadbena kartica za osnove  
TD Snap®

[qrco.de/bdPliQ](https://qrco.de/bdPliQ)




TD Talk Touch kartice  
za usposabljanje

[qrco.de/tdtalktouch](https://qrco.de/tdtalktouch)



**Ne ustavite se!**

Ne spreglejte virov na naslednjih straneh, vključenih v vaš nakup!

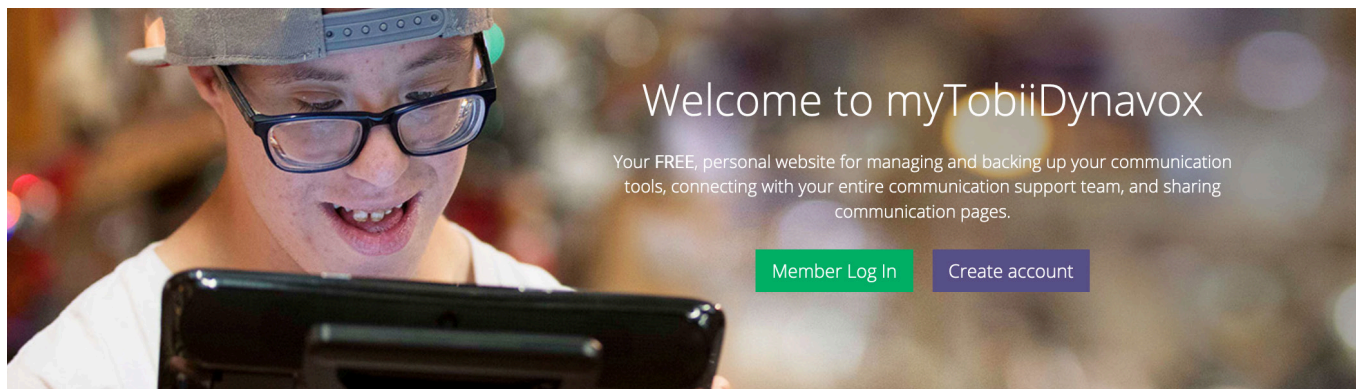

Vaš brezplačni račun myTobiiDynavox.com vam omogoča dostop do številnih prednosti, vključno s shranjevanjem v oblaku za varnostno kopiranje, sinhronizacijo nastavitv strani in deljenje, načrte lekcij itn.

### Pridružitve vam bo omogočila:

- varno varnostno kopiranje sistema,
- prenos brezplačnih orodij in virov,
- prevzemanje in upravljanje spremljevalnih licenc,
- informacije o razpoložljivih posodobitvah,
- dostop do tehnične podpore in pogostih vprašanj,
- deljenje nastavitv in svežnjev strani.



myTobiiDynavox  
[myTobiiDynavox.com](https://mytobiidynavox.com)

## Spremljevalne licence



TD Navio je opremljen z dvema spremljevalnima licencama za TD Snap®. S spremljevalnimi licencami lahko TD Snap® uporabljate na dodatnih napravah Windows ali iPadOS. Spremljevalne licence lahko prevzamete in z njimi upravljate prek računa myTobiiDynavox.

### Zahtevajte spremljevalne licence TD Snap®

- 1 V napravi TD Navio se prijavite v račun myTobiiDynavox v aplikaciji TD Snap®. (Uredi > Uporabnik > Račun myTobiiDynavox)
- 2 Na spremljevalni napravi namestite TD Snap®. *Namestitveni programi za TD Snap® so na voljo na [mytobiidynavox.com/Support/TDSnap](https://mytobiidynavox.com/Support/TDSnap) in v trgovini Apple App Store.*
- 3 Na svoji spremljevalni napravi odprite TD Snap® in se vpišite v isti račun myTobiiDynavox. (Uredi > Uporabnik > Račun myTobiiDynavox)



### Nasvet

Uporabite spremljevalno napravo za oblikovanje uporabe AAC in uredite nastavitve strani, da ne boste zmotili uporabnika AAC na njegovi napravi.

## Dodatni viri



**Učno vozlišče Tobii Dynavox**

[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)



**Vadbene kartice  
programske opreme**

[qrco.de/trainingcards](https://qrco.de/trainingcards)



**TD Navio Uporabniški priročnik**

[qrco.de/bgeYIH](https://qrco.de/bgeYIH)



**Garancije izdelkov**

[qrco.de/wrtgIbl](https://qrco.de/wrtgIbl)



**Skupnost TD na Facebooku**

[qrco.de/TDFB](https://qrco.de/TDFB)



**Komunikacijske plošče Lite-Tech**

[qrco.de/litetech](https://qrco.de/litetech)

# Tehnična podpora



## Tehnična podpora

Za tehnično podporo se obrnite  
na lokalnega zastopnika  
Tobii Dynavox.

[qrco.de/tdslpartners](https://qrco.de/tdslpartners)