


TD Pilot


Ръководство за стартиране

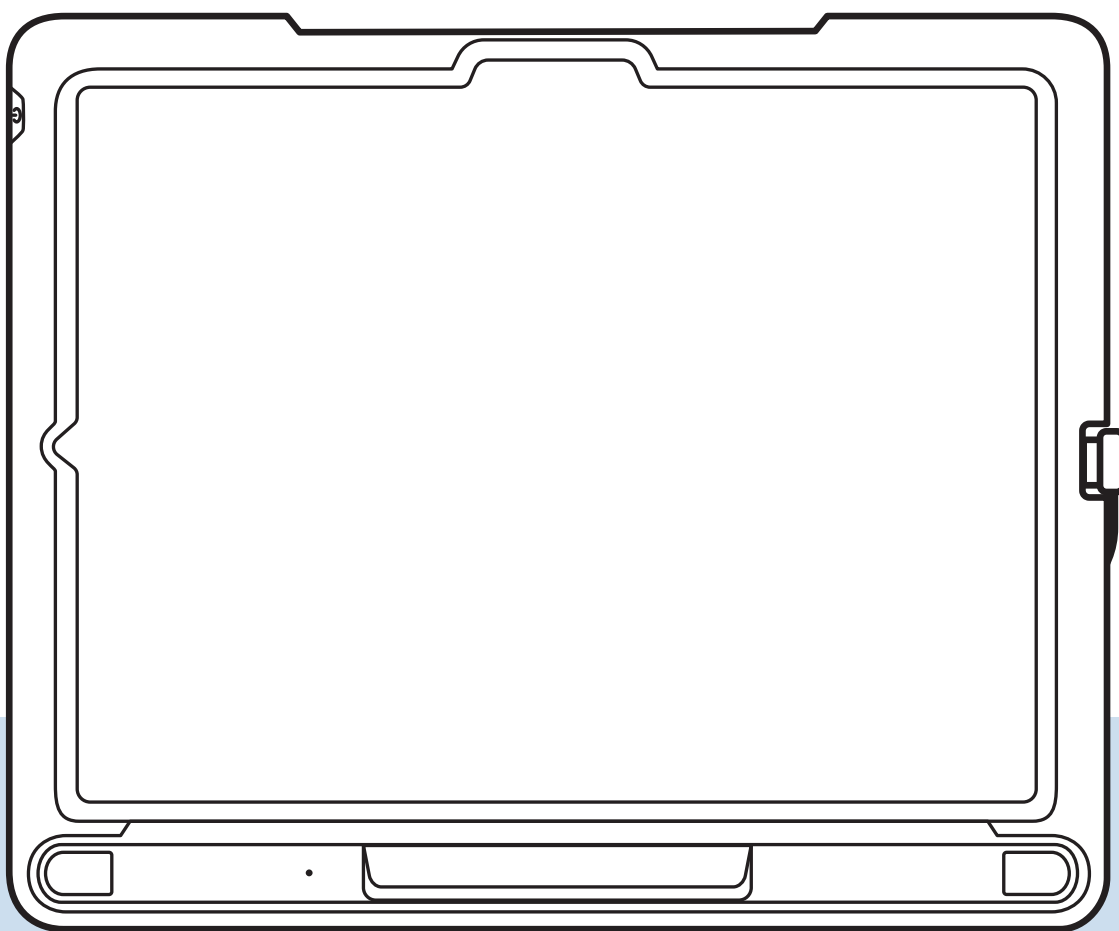

Сканирайте QR кода, за да видите този документ на всички налични езици в мрежата.

qrco.de/PilotDocs

Какво е включено

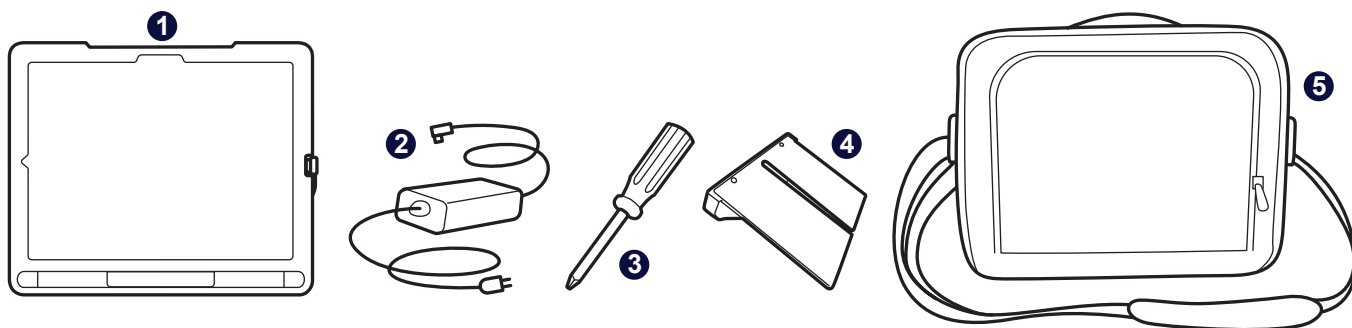

1 Устройство TD Pilot


2 Зарядно устройство с кабел
За употреба само със захранване NGE60-TD

3 Отвертка


4 Регулируема скоба

5 Калъф за пренасяне


Запознайте се с устройството си

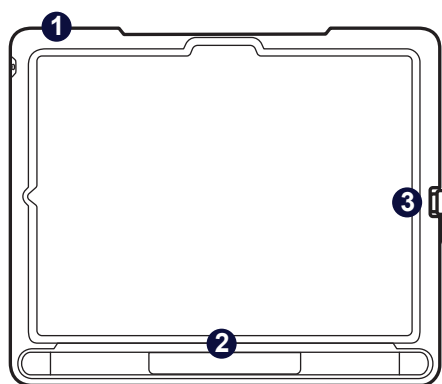

Предна страна

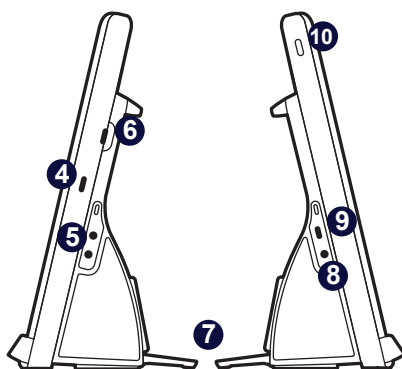

Страни

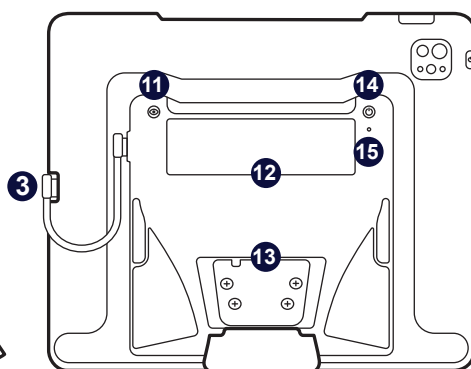

Задна страна

1 Бутон за сила на звука

2 Устройство за
проследяване на поглед

3 USB-C кабел

4 Порт за зареждане на iPad

5 Портове за превключване

6 USB-C конектор (вътрешен)

7 Сгъваемо краче

8 Порт за аудио жак

9 Конектор за захранване

10 Бутон за захранване
на iPad

11 Бутон за състоянието
на проследяване

12 Партньорски прозорец

13 Монтажна пластина

14 Бутон за захранване на
TD Pilot

15 LED индикатор за статус

Нека да започнем

Това Ръководство за стартиране е предназначено за двама души: човекът, който ще използва устройството за комуникация, и помощник, който може да докосва екрана и да премества устройството. Разделите с икона на ръка трябва да бъдат попълнени от помощника. Разделите с икона на око трябва да бъдат попълнени от потребителя на AAC.




Помощник



Потребител



Включване

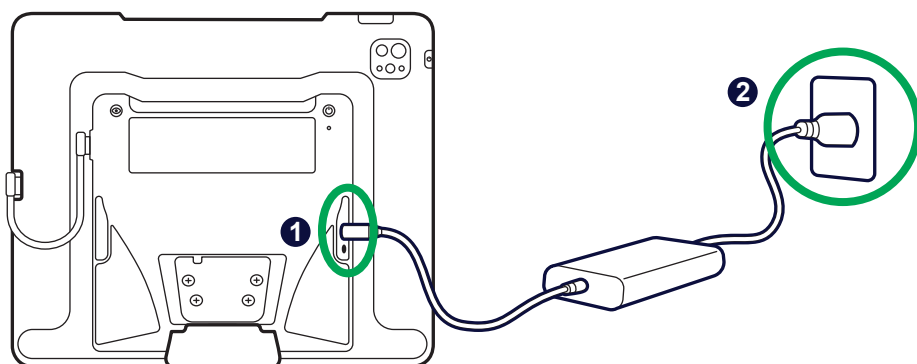

- 1 Отворете защитния капак над портовете и свържете USB-C кабела на зарядното устройство.
- 2 Включете захранването в електрически контакт. TD Pilot ще стартира автоматично.



Управление на захранването на TD Pilot

Когато TD Pilot е включен, устройството за проследяване на поглед винаги е активно, дори когато екранът на iPad е заключен. Поради тази причина батериите ще се изтощат, когато TD Pilot е включен и не е свързан към външно захранване. Най-добре е да оставите TD Pilot включен в зарядното устройство, когато не го използвате.

Информацията за състоянието на батерията се намира в *TD CoPilot > Настройки > Батерия*.

Допълнителна информация за управлението на захранването е налична в Ръководството за потребителя на TD Pilot.



Настройка на iPad

Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите iPad. За да получите софтуера Tobii Dynavox, включен в покупката ви, ще трябва да направите следните избори по време на настройката:

- 1 Изберете вашия език и регион.
- 2 Изберете **голям** размер на текста.
Може да бъдете подканени да персонализирате настройките си за писмени и говорими езици. Изберете въз основа на личните си предпочитания.
- 3 В екрана за бързо стартиране изберете **Настройка без друго устройство** или **Настройка ръчно**.
- 4 Присъединете се към Wi-Fi мрежа, след което изберете **Напред**.
- 5 На екрана Данни и поверителност изберете **Продължи**. Ако бъдете подканени да прехвърлите приложенията и данните си, изберете **Не прехвърляй нищо**.
- 6 На екрана за отдалечено управление изберете **Регистрирай този iPad**.



Предупреждение

НЕ избирайте Премахване на iPad от организацията. Ако тази опция е избрана, няма да получавате приложенията си за комуникация и устройството ще трябва да бъде изпратено обратно на Tobii Dynavox за решаване на проблема.



Бележка

Дистанционното управление, известно също като MDM, позволява на Tobii Dynavox да изпраща софтуер и софтуерни актуализации на вашия iPad през Wi-Fi. Чрез дистанционното управление Tobii Dynavox ще има достъп само до информация за хардуерните спецификации на вашия iPad, версията на операционната система, инсталираните приложения и настройките за сигурност. Tobii Dynavox няма да има достъп до вашите лични файлове, снимки, камери, микрофони или данни за местоположението ви.

- 7 Ако бъдете подканени да настроите Face ID, можете да го направите или да пропуснете засега и да го настроите по-късно в Настройки.
- 8 Задаването на парола не е задължително. Ако го пропуснете сега, можете да го настроите по-късно в Настройки.
- 9 Ако бъдете подканени за Apple ID, въведете идентификатора на Apple за потребителя, а не за лицето, което се грижи за него. Ако искате да пропуснете въвеждането на Apple ID за момента, изберете **Забравена парола или нямате Apple ID?** след това **Настройте по-късно в Настройки**.
- 10 Съгласете се с Общите условия на Apple.
- 11 Отговорете на останалите подкани за настройка в зависимост от личните си предпочитания.

След като завършите указанията за настройка на iPadOS, ще видите началния екран с иконите на приложенията си.



Забележка

В определен момент ще се появи изскачащо съобщение, което ще ви попита дали свързвате чифт слушалки. Изберете **Друго устройство**.

Настройте достъпа до взирането с поглед



Конфигурирайте дисплея за точност на взирането

- 1 Докоснете **Настройки**.



- 2 От лявата страна докоснете **категорията Дисплей и яркост**.
- 3 Вдясно докоснете **Тъмно**.
- 4 От дясната страна превъртете надолу и натиснете **Мащабиране на дисплея**.
- 5 Изберете **По-голям текст**.
- 6 Изберете **Използване на увеличение**, след което изберете **Готово**.



Настройте AssistiveTouch

- 1 От лявата страна докоснете **Достъпност**.
- 2 От дясната страна докоснете **Докосване**.
- 3 Докоснете **AssistiveTouch**, след което го включете.

Взирането с поглед вече е активирано. Ще видите показалеца, който показва местоположението на погледа ви. Бутонът на менюто AssistiveTouch също се появява на екрана.



- 4 Плъзнете бутона на менюто AssistiveTouch до горната третина на екрана от дясната страна.



Какво общо има AssistiveTouch с взирането с поглед?

AssistiveTouch е предназначен за хора, които имат затруднения с докосването на екрана. Менюто AssistiveTouch ви позволява да извършвате „докосване“, като натискане и превъртане, като използвате взирането с поглед. Той също така предоставя достъпни за поглед преки пътища до неща като началния екран и App Switcher, които обикновено се достига чрез жестове.



Персонализирайте менюто AssistiveTouch

- 1 От дясната страна изберете **Персонализиране на менюто на най-горното ниво**.
- 2 Докоснете **+**, за да промените броя на иконите на 8.
- 3 Докоснете **Център за известия**.
- 4 Плъзнете до дъното на списъка и докоснете **Превключване на пауза/Възобновяване на задържането**. Докоснете извън списъка, за да го затворите.
- 5 Докоснете бутона **Жестове**.
- 6 Плъзнете до и след това докоснете **Преместване на менюто**. Докоснете някъде извън менюто, за да го затворите.
- 7 Продължете да редактирате иконите на менюто, докато менюто ви съвпадне с показаното вдясно.



Спри/продължи задържането

Превключвател на приложения

Докосване

Персонализиран

Устройство

Премести меню

Дом

Прелиствай



Конфигуриране на контрола на задържането

- 1 Отляво изберете **Достъпност**.
- 2 Вдясно изберете **Докосване**.
- 3 Вдясно изберете **AssistiveTouch**.
- 4 От дясната страна плъзнете до дъното на менюто AssistiveTouch. Включете **Контрол на задържането**. Ако бъдете подканени да персонализирате менюто за най-горното ниво на AssistiveTouch, докоснете **Не**.



Съвет

Времето за задържане по подразбиране е 1,5 секунди. Можете да промените настройката на времето за задържане по-късно, за да отговаря на вашите нужди.



Активирайте вирането с поглед, когато TD Pilot е заключен

- 1 Вляво изберете **Face ID и парола**.
- 2 Въведете паролата си.
- 3 Плъзнете до долната част и включете **Акcesoари**.




Събуждане и отключване на вашия TD Pilot

TD Pilot се събужда автоматично, когато устройството за проследяване на поглед засече очите на потребителя. Отключете TD Pilot, като изберете бутона AssistiveTouch, след това Начало.

Опитайте сега:

- 1 Натиснете горния бутон, за да заключите TD Pilot.

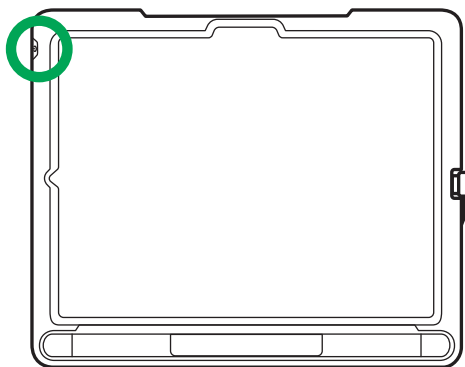

- 2 Погледнете екрана за няколко секунди. TD Pilot се събужда и показва заключения екран.
- 3 Докоснете или използвайте очите си, за да изберете бутона от менюто **AssistiveTouch**, след което изберете **Начало**.



TD Pilot вече е отключен.



Съвет

Ако се интересувате от допълнителна сигурност на вашето устройство, препоръчваме да използвате Face ID. Face ID ви позволява да отключвате устройството си, без да въвеждате парола всеки път. Настройте Face ID в *Настройки на iPadOS > Face ID и парола*.




Изберете и настройте приложението си за комуникация



Забележка

Ако приложението Настройки е отворено, плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да затворите приложението.

- 1 Използвайте таблицата по-долу, за да определите приложението за комуникация, което е най-подходящо за потребителя.
- 2 Стартирайте избраното приложение и следвайте указанията за създаване на нов потребител или възстановяване на съществуващ .


	 TD Snap®	 TD Talk
Описание	TD Snap е приложение за генериране на реч за тези, които се нуждаят от поддръжка на символи.	TD Talk е приложение за генериране на реч за хора, които са грамотни и не се нуждаят от помощни символи.
Съставяне на съобщения	Съобщенията се съставят с помощта на бутони за думи и фрази с помощни символи. Налична е и екранна клавиатура с предсказване на думи.	Съобщенията се съставят с помощта на екранна клавиатура с предсказване на думи и фрази, подобно на SMS.
Ниво на грамотност	От начинаещи до напреднали	Напреднали
Възраст	Всички възрасти	От тийнейджър до възрастен
Подкрепа за саморегулиране	Да	Не

Монтаж и позиция


Подгответе потребителя да започне да използва проследяването на погледа, като го позиционирате удобно. Ако използва очила, уверете се, че ги носи и че стъклата са чисти.



Поставете TD Pilot върху вашата монтажна система или стабилна повърхност пред потребителя на или малко под нивото на очите му. Ако главата му е наклонена наляво или надясно, наклонете устройството така, че да съвпадат. Важно е ъгълът на повърхността на екрана да съответства на ъгъла на лицето на потребителя. Повечето потребители, когато седят на маса или бюро, ще трябва да поставят устройството по-високо от повърхността на масата.

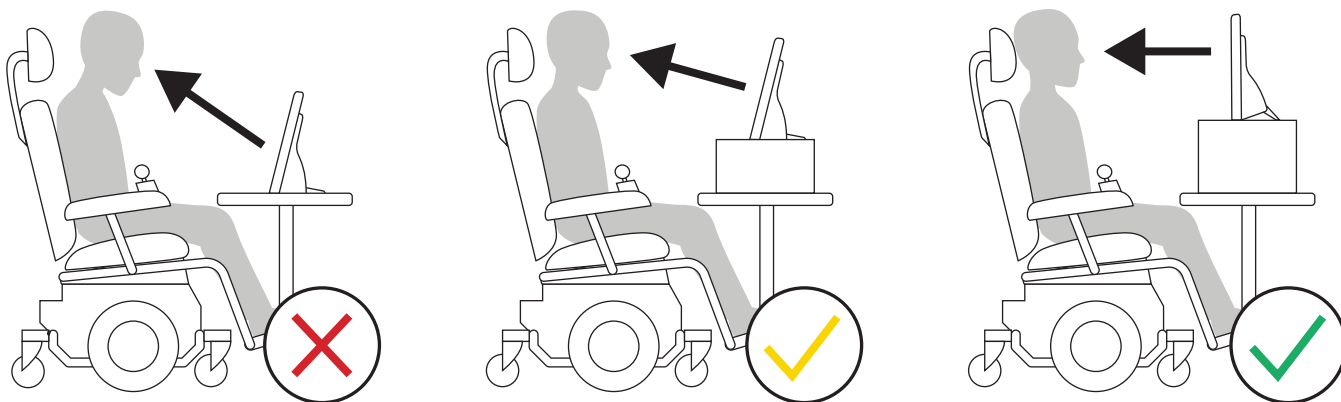

Може да се наложи да прецизирате позицията на устройството по време на стъпките за калибриране на следващата страница. Винаги регулирайте позицията на устройството според потребителя, а не обратното.

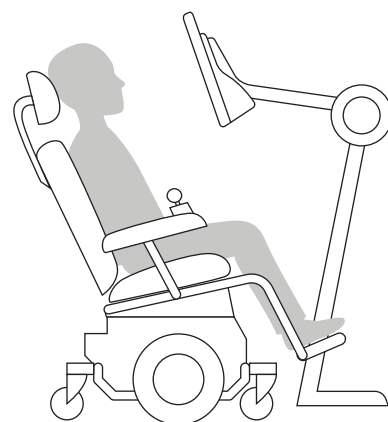

Бележка

Системата за монтаж е най-добрият вариант за прецизно позициониране на устройството, което е лесно да се регулира през целия ден. Предлагат се няколко опции за монтаж, включително стойки за под, бюро и инвалидни колички. Посетете [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com) или се свържете с местния партньор на Tobii Dynavox.



Забележка

Ако TD Snap® или TD Talk са отворени, плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да затворите приложението.

- 1 Докоснете приложението TD CoPilot.



- 2 Следвайте инструкциите на екрана в CoPilot, за да калибрирате устройството за проследяване на поглед спрямо очите на потребителя.
- 2 Когато потребителят приключи с калибрирането, плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да се върнете към началния екран.



Съвет

Използвайте App Switcher в менюто AssistiveTouch, за да превключвате между отворени приложения.



Научете, упражнявайте и отстранявайте неизправности

Вашият TD Pilot вече е готов за употреба! Започнете да разглеждате устройството и приложенията си. Когато сте готови да научите повече, сканирайте QR кодовете по-долу, за да получите картите за обучение TD Snap® Basics и картите за обучение TD Talk Touch за iPadOS и AssistiveTouch. Те ще ви покажат как да използвате основните функции на приложенията за комуникация, да развivate уменията си за работа с ААК и да отстранявате проблеми.




Основи на TD Snap
Кarti за обучение

qrco.de/bdPliQ



TD Talk за iPadOS и карти за
обучение за AssistiveTouch

qrco.de/bdzoal

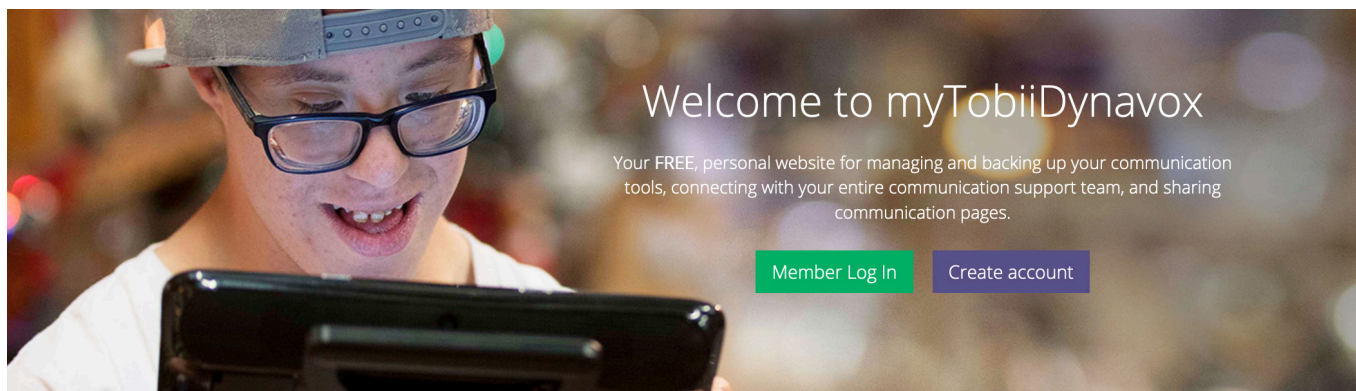

Вашият безплатен акаунт в myTobiiDynavox.com ви дава достъп до множество предимства, включително съхранение в облака за резервни копия, синхронизиране и споделяне на набор от страници, планове за уроци и др.

Присъединяването ви ще ви позволи да:

- Архивирате безопасно на системата
- Изтеглете безплатни инструменти и ресурси
- Заявявате и управлявате придружаващи лицензи
- Научавате повече за наличните актуализации
- Достъп до техническа поддръжка и често задавани въпроси
- Споделяне на набори от страници и пакети от страници



myTobiiDynavox
myTobiiDynavox.com

Лицензи за спътници



Вашият TD Pilot се предлага с два съпътстващи лиценза за TD Snap®. Придружаващите лицензи ви позволяват да използвате TD Snap на допълнителни устройства с Windows или iPadOS. Придружаващите лицензи се заявяват и управляват чрез вашия акаунт в myTobiiDynavox.

Заявете съпътстващите лицензи за вашия TD Snap

- 1 На вашето устройство TD Pilot влезте в акаунта си в MyTobiidynAvox в TD Snap.
(Редактиране > Потребител > myTobiiDynavox Акаунт)
- 2 На вашето съпътстващо устройство инсталирайте TD Snap. Инсталиращите файлове на TD Snap са достъпни на mytobiidynavox.com/Support/TDSnap и в Apple App Store.
- 3 На съпътстващото си устройство отворете TD Snap и влезте в същия акаунт в MyTobiidynAvox.
(Редактиране > Потребител > акаунт myTobiiDynavox)



Съвет

Използвайте придружаващото си устройство, за да моделирате използването на ААК и да редактирате набори от страници, така че да не прекъсвате работата на потребителя на ААК с неговото собствено устройство.

Допълнителни ресурси



**Ръководство на потребителя
на TD Pilot**

qrco.de/PilotDocs



Общност на TD във Facebook

qrco.de/TDFB



Софтуерни карти за обучение

qrco.de/be9m4o



Гаранции за продукти

qrco.de/wrtgIbl



Документация

TD CoPilot > Настройки > Помощ



Техническа поддръжка

За техническа поддръжка се свържете с местния представител на Tobii Dynavox.