



TD Pilot

Guía de iniciación

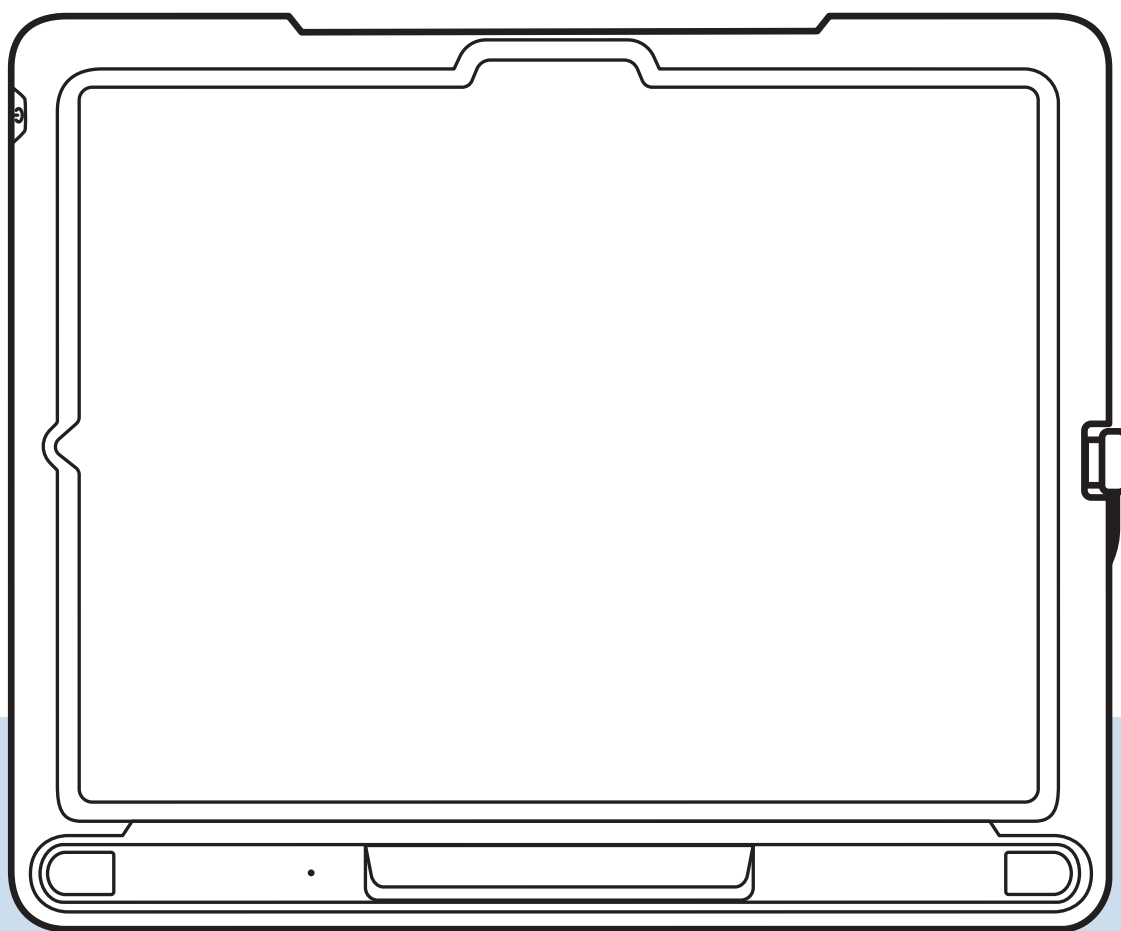

Escanee el código QR para ver este documento
en todos los idiomas disponibles en la web.
qrco.de/PilotDocs

Qué incluye

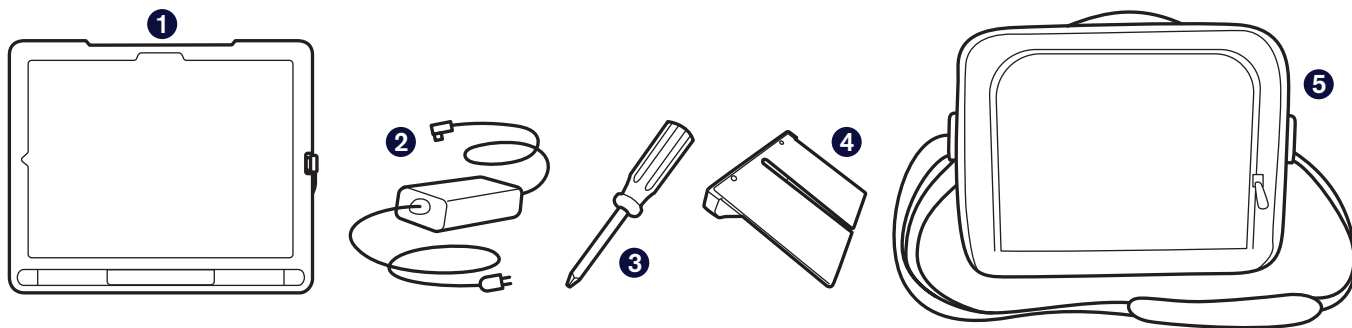

1 Dispositivo TD Pilot

2 Cargador con cable


Para uso exclusivo con la fuente de alimentación NGE60-TD

3 Destornillador

4 Soporte ajustable

5 Maletín de transporte

Conozca su dispositivo

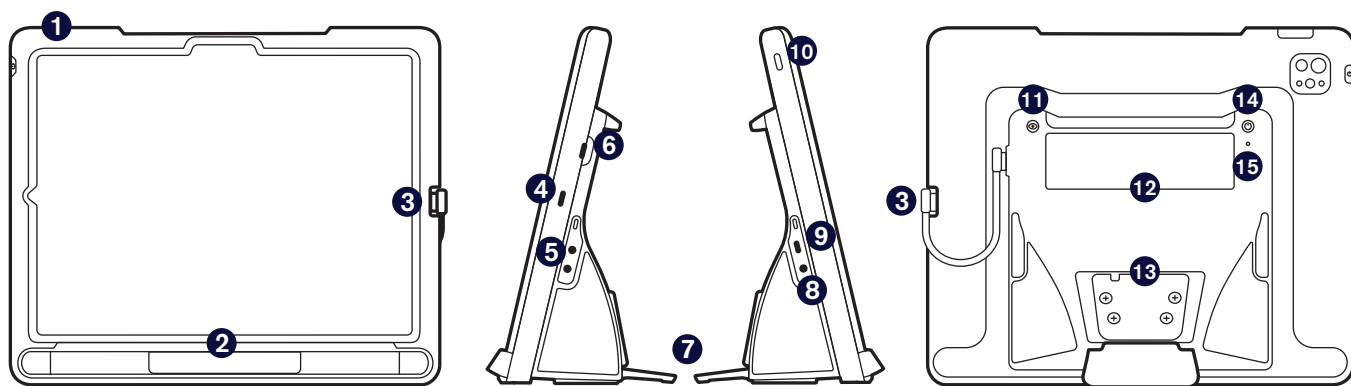

Parte frontal

Lados

Parte trasera

1 Botones de volumen

2 Seguidor ocular

3 Cable USB-C

4 Puerto de carga del iPad

5 Puertos de conmutación

6 Conector USB-C (interno)

7 Pata plegable

8 Puerto para conector de audio

9 Conector de alimentación

10 Botón de encendido del iPad

11 Botón de estado de seguimiento

12 Ventana para el interlocutor


13 Placa de montaje

14 Botón de encendido del TD Pilot


15 LED de estado

Comencemos

Esta guía de iniciación está diseñada para dos personas: la persona que utilizará el dispositivo para comunicarse y un asistente que pueda tocar la pantalla y mover el dispositivo. El ayudante debe completar las secciones con el ícono de la mano. El usuario de CAA debe completar las secciones con el ícono del ojo.

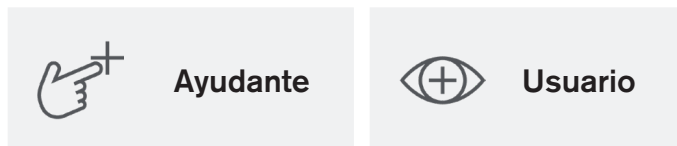

Encendido

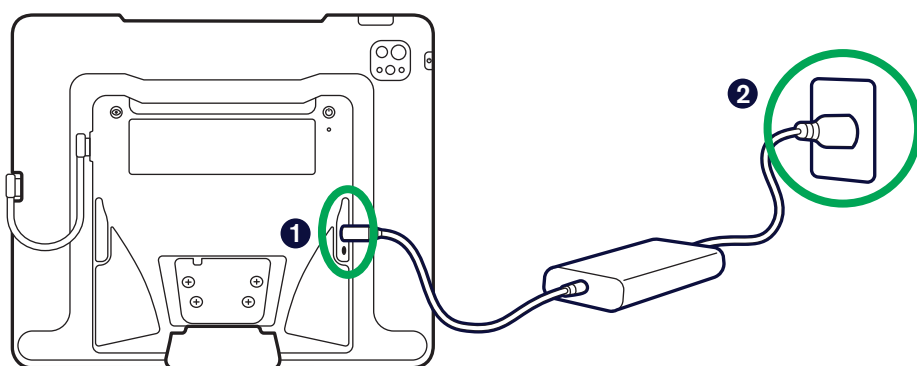

- 1 Abra la cubierta protectora de los puertos y conecte el cable USB-C del cargador.
- 2 Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente. TD Pilot se iniciará automáticamente.



Gestión de la energía de TD Pilot

Cuando el TD Pilot está encendido, el rastreador ocular está siempre activo, incluso cuando la pantalla del iPad está bloqueada. Debido a esto, las baterías se agotarán cuando el TD Pilot esté encendido y no esté conectado a una fuente de alimentación externa. Es mejor dejar el TD Pilot enchufado al cargador cuando no lo esté utilizando.

La información sobre el estado de la batería se encuentra en *TD CoPilot > Configuración > Batería*.

Encontrará más información sobre la gestión de la energía en el Manual del usuario de TD Pilot.



Configuración del iPad

Siga las instrucciones en pantalla para configurar el iPad. Para recibir el software de Tobii Dynavox incluido con su compra, deberá realizar seleccionar lo siguiente durante la configuración:

- 1 Seleccione su idioma y región.
- 2 Elija **un tamaño de texto grande**.
Es posible que se le solicite personalizar la configuración de idiomas escritos y hablados. Elija según sus preferencias personales.
- 3 En la pantalla Inicio rápido, seleccione **Configurar sin otro dispositivo** o **Configurar manualmente**.
- 4 Conéctese a una red Wi-Fi y seleccione **Siguiente**.
- 5 En la pantalla Datos y privacidad, seleccione **Continuar**. Si se le pide que transfiera sus aplicaciones y datos, seleccione **No transferir nada**.
- 6 En la pantalla Gestión remota, seleccione **Registrar este iPad**.



Advertencia

NO seleccione Eliminar iPad de la organización. Si se selecciona esta opción, no recibirá sus aplicaciones de comunicación y se tendrá que devolver el dispositivo a Tobii Dynavox para resolver el problema.



Nota

La gestión remota, también conocida como MDM, permite a Tobii Dynavox enviar software y actualizaciones de software a su iPad a través de Wi-Fi. A través de la gestión remota, Tobii Dynavox solo tendrá acceso a la información sobre las especificaciones de hardware de su iPad, la versión del sistema operativo, las aplicaciones instaladas y la configuración de seguridad. Tobii Dynavox no podrá acceder a sus archivos personales, fotos, cámaras, micrófonos o datos de localización.

- 7 Si se le pide que configure Face ID, no dude en configurarlo u omitirlo por ahora y hacerlo más tarde en Configuración.
- 8 La configuración de un código de acceso es opcional. Si se salta este paso ahora, puede configurarlo más tarde en Configuración.
- 9 Si se le pide un ID de Apple, introduzca el ID de Apple del usuario, no del cuidador. Si desea omitir el ingreso de un ID de Apple por ahora, seleccione **¿Olvidó su contraseña o no tiene un ID de Apple?** t y, luego, **Configurar más tarde en Configuración**.
- 10 Acepte los Términos y condiciones de Apple.
- 11 Responda a las preguntas de configuración restantes en función de sus preferencias personales.

Cuando haya completado las instrucciones de configuración de iPadOS, verá la pantalla de inicio con los íconos de sus aplicaciones.



Nota

En algún momento aparecerá un mensaje emergente preguntándole si va a conectar unos auriculares. Seleccione **Otro dispositivo**.

Configuración del acceso mediante la mirada



Configurar la pantalla para la precisión de la mirada

- 1 Toque **Configuración**.



- 2 En el lado izquierdo, toque la categoría **Pantalla y brillo**.
- 3 A la derecha, toque **Oscuro**.
- 4 En el lado derecho, desplácese hacia abajo y toque **Zoom de pantalla**.
- 5 Seleccione **Texto más grande**.
- 6 Seleccione **Usar zoom** y, luego, seleccione **Listo**.



Configuración de AssistiveTouch

- 1 En la parte izquierda, toque **Accesibilidad**.
- 2 En el lado derecho, toque **Tacto**.
- 3 Toque **AssistiveTouch** y actívelo.

La mirada está ahora activada. Verá el Puntero, que muestra la ubicación de su mirada. El botón de menú de AssistiveTouch también aparecerá en la pantalla.



- 4 Arrastre el botón de menú de AssistiveTouch al tercio superior derecho de la pantalla.



¿Qué tiene que ver AssistiveTouch con la mirada?

AssistiveTouch está diseñado para personas que tienen dificultades para tocar la pantalla. El menú AssistiveTouch permite realizar funciones "táctiles", como tocar y desplazarse, mediante la mirada. También permite acceder con la mirada a accesos directos como la pantalla de inicio y App Switcher, a los que normalmente se accede mediante gestos.



Personalización del menú de AssistiveTouch

- 1 En la parte derecha, seleccione **Personalizar menú del nivel superior**.
- 2 Toque **+** para cambiar el número de íconos a 8.
- 3 Toque **Centro de notificaciones**.
- 4 Deslícese hasta el final de la lista y toque **Alternar pausa/Reanudar permanencia**. Toque fuera de la lista para cerrarla.
- 5 Toque el botón **Gestos**.
- 6 Deslice el dedo hacia **Mover menú** y tóquelo. Toque en cualquier lugar fuera del menú para cerrarlo.
- 7 Continúe editando los íconos del menú hasta que su menú coincida con el que se muestra a la derecha.



Configuración del control de permanencia

- 1 A la izquierda, seleccione **Accesibilidad**.
- 2 A la derecha, seleccione **Tacto**.
- 3 A la derecha, seleccione **AssistiveTouch**.
- 4 En el lado derecho, deslice el dedo hacia la parte inferior del menú AssistiveTouch. Active **Control de permanencia**. Si se le pide que personalice el menú de nivel superior de AssistiveTouch, toque **No**.



Consejo

El tiempo de permanencia por defecto es de 1,5 segundos. Puede cambiar el ajuste del tiempo de permanencia más tarde para adaptarlo a sus necesidades.



Activación de la mirada cuando TD Pilot está bloqueado

- 1 A la izquierda, seleccione **Face ID y código de acceso**.
- 2 Introduzca su código de acceso.
- 3 Deslice el dedo hasta la parte inferior y active **Accesorios**.



Cómo despertar y desbloquear el TD Pilot

TD Pilot se despierta automáticamente cuando el seguidor ocular detecta los ojos del usuario. Desbloquee el TD Pilot seleccionando el botón AssistiveTouch y, luego, Inicio.

Pruébalo ahora:

- 1 Toque el botón superior para bloquear el TD Pilot.



- 2 Mire la pantalla unos instantes. El TD Pilot se despierta y muestra la pantalla de bloqueo.
- 3 Toque o utilice los ojos para seleccionar el botón de menú de **AssistiveTouch** y, luego, seleccione **Inicio**.



El TD Pilot ya está desbloqueado.



Consejo

Si le interesa obtener seguridad extra en su dispositivo, le recomendamos usar Face ID. Face ID le permite desbloquear su dispositivo sin tener que introducir un código de acceso cada vez. Configure Face ID en *Configuración de iPadOS > Face ID y código de acceso*.





Elija y configure su aplicación de comunicación



Nota


Si la aplicación Configuración está abierta, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para cerrarla.

- 1 Utilice la siguiente tabla para identificar la aplicación de comunicación que mejor se adapte al usuario.
- 2 Inicie la aplicación elegida y siga las instrucciones para crear un nuevo usuario o restaurar uno existente.


	 TD Snap®	 TD Talk
Descripción	TD Snap es una aplicación de generación de voz para quienes necesitan apoyo relacionado con los símbolos.	TD Talk es una aplicación de generación de voz para personas alfabetizadas que no necesitan símbolos de apoyo.
Redacción de mensajes	Los mensajes se componen mediante botones de palabras y frases con símbolos de apoyo. También dispone de un teclado en pantalla con predicción de palabras.	Los mensajes se redactan mediante un teclado en pantalla con predicción de palabras y frases, similar a los mensajes SMS.
Nivel de alfabetización	De emergente a avanzado	Avanzado
Edades	Todas las edades	De adolescente a adulto
Apoyos para la autorregulación	Sí	No

Montaje y posición


Prepare al usuario para empezar a utilizar el seguimiento ocular posicionándolo cómodamente. Si usa anteojos, asegúrese de que los lleve puestos y de que los cristales estén limpios.

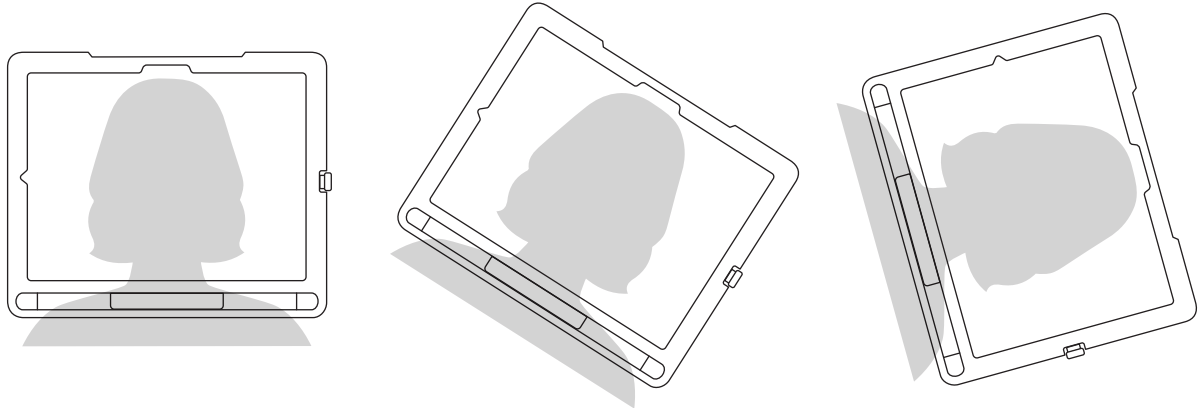

Coloque el TD Pilot en su sistema de montaje o en una superficie estable frente al usuario a la altura de sus ojos o ligeramente por debajo. Si su cabeza está inclinada hacia la izquierda o la derecha, incline el dispositivo para que coincida. Es importante que el ángulo de la superficie de la pantalla coincida con el ángulo de la cara del usuario. La mayoría de los usuarios, cuando están sentados en una mesa o escritorio, tendrán que colocar el dispositivo a una altura superior a la de la superficie de la mesa.

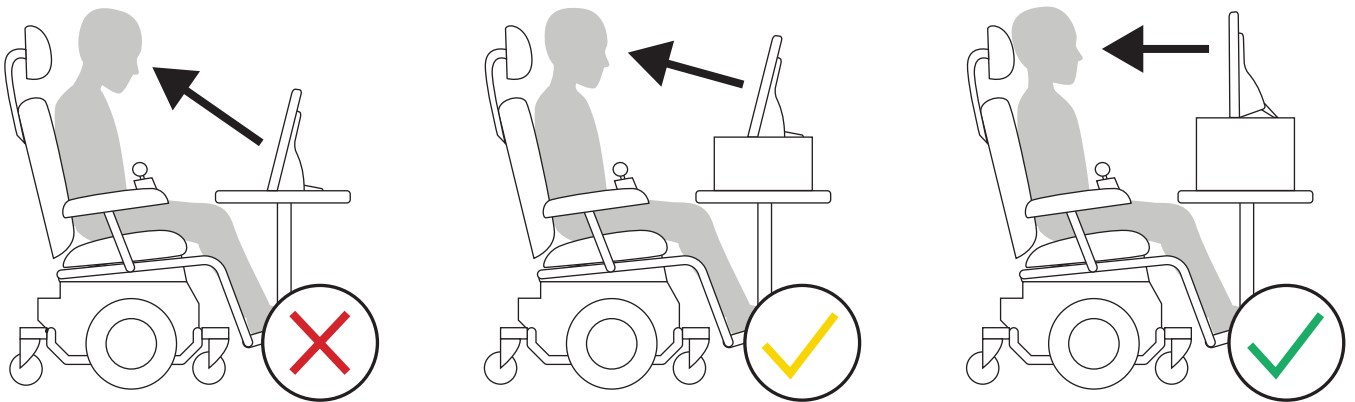

Es posible que tenga que perfeccionar la posición del dispositivo durante los pasos de calibración de la página siguiente. Ajuste siempre la posición del dispositivo para que se adapte al usuario, y no al revés.

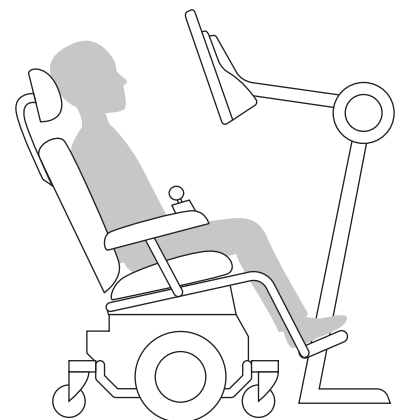

Nota

Un sistema de montaje es la mejor opción para una colocación precisa del dispositivo que sea fácil de ajustar a lo largo del día. Dispone de varias opciones de montaje: en el suelo, en sobremesa y en silla de ruedas. Visite [TobiiDynavox.com](https://www.tobii-dynavox.com) o póngase en contacto con su socio local de Tobii Dynavox.



Nota

Si TD Snap® o TD Talk están abiertos, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para cerrar la aplicación.

- 1 Toque la aplicación **TD CoPilot**.



- 2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla en CoPilot para calibrar el seguidor ocular a los ojos del usuario.
- 2 Cuando el usuario haya terminado de calibrar, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio.



Consejo

Utilice el App Switcher en el menú de AssistiveTouch para cambiar entre aplicaciones abiertas.



Aprender, practicar y solucionar problemas

¡El TD Pilot ya está listo para usar! No dude en empezar a explorar el dispositivo y las aplicaciones. Cuando esté listo para obtener más información, escanee los códigos QR que aparecen a continuación para conseguir las tarjetas de capacitación TD Snap® Basics y las tarjetas de capacitación TD Talk para iPadOS y AssistiveTouch. Estas le enseñarán a utilizar las principales funciones de las aplicaciones de comunicación, a desarrollar sus habilidades de CAA y a solucionar problemas.



Tarjetas de capacitación de aspectos básicos de TD Snap

qrco.de/bdcOHo



Tarjetas de capacitación de TD Talk para iPadOS y AssistiveTouch


qrco.de/beR7Xr



Su cuenta gratuita de myTobiiDynavox.com le da acceso a numerosas ventajas, como almacenamiento en la nube para copias de seguridad, sincronización y uso compartido de conjuntos de páginas, planes de lecciones y mucho más.

Afiliarse le permitirá hacer lo siguiente:

- Hacer copias de seguridad de su sistema
- Descargar herramientas y recursos gratuitos
- Reclamación y gestión de licencias complementarias
- Más información sobre las actualizaciones disponibles
- Acceso a asistencia técnica y preguntas frecuentes
- Compartir conjuntos y paquetes de páginas

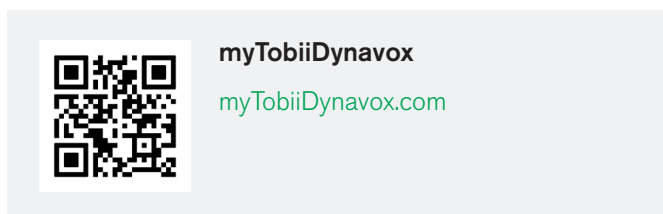

Licencias complementarias



El TD Pilot incluye dos licencias complementarias de TD Snap®. Las licencias complementarias le permiten utilizar TD Snap en dispositivos Windows o iPadOS adicionales. Las licencias complementarias se solicitan y gestionan a través de su cuenta myTobiiDynavox.

Reclame sus licencias complementarias de TD Snap

- 1 En el dispositivo TD Pilot, inicie sesión en su cuenta myTobiiDynavox en TD Snap.
(*Editar > Usuario > Cuenta myTobiiDynavox*)
- 2 En el dispositivo complementario, instale TD Snap. Los instaladores de TD Snap están disponibles en mytobiidynavox.com/Support/TDSnap y en Apple App Store.
- 3 En el dispositivo complementario, abra TD Snap e inicie sesión en la misma cuenta myTobiiDynavox.
(*Editar > Usuario > Cuenta myTobiiDynavox*)



Consejo

Utilice su dispositivo complementario para demostrar el uso de la CAA y editar conjuntos de páginas para no interrumpir al usuario de CAA en su propio dispositivo.

Recursos adicionales



Manual del usuario de TD Pilot

qrco.de/PilotDocs



Comunidad TD en Facebook

qrco.de/FB-Espanol



Fichas de formación capacitación sobre software

qrco.de/be9m4o



Garantías de productos

qrco.de/wrntES



Documentación

TD CoPilot > Configuración > Ayuda



Asistencia técnica

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con su representante local de Tobii Dynavox.